

Essentiële
hoortechologie,
omdat uw cliënt
uniek is



PERFORMANCE LINE



- Premium ●
- Advanced ●
- Essential ●**



OTICON RIA - EEN **ESSENTIËLE** AANVULLING OP ONZE PERFORMANCE LINE

Met Ria is onze Performance Line nu compleet

Eerst kwam Oticon Alta, toen Nera en nu Ria. Een complete familie Performance Line hooroplossingen gebouwd op het Inium quad-core platform.

Inium biedt een unieke combinatie van uitstekende prestaties, ongelooflijk klein formaat en zeer laag stroomverbruik. Ontworpen om tegemoet te komen aan de drie dimensies van moderne hoorzorg: verbeterde prestatie, personalisatie en verminderde luisterinspanning.

Meer mogelijkheden om rekening te houden met individuele behoeften

Powered by Inium, biedt Ria exclusieve audiologische eigenschappen in de essential categorie. Met Free Focus Essential, Inium Feedback Shield en YouMatic Essential, biedt Ria u de mogelijkheid uw cliënten de uitstekende prestatie te leveren die ze zoeken, waardoor een grotere mate van tevredenheid zal worden bereikt.

Ria levert een uitstekende geluidskwaliteit in het essential segment en vergroot het vermogen om te voldoen aan de

individuele geluidsvorkeuren van uw cliënten. Er is tevens een uitgebreide keuze aan uitvoeringen, inclusief nieuwe toevoegingen aan onze IHO-productlijn.

Zodoende heeft u de mogelijkheid een oplossing op maat te maken die essentiële prestaties levert en voldoet aan de individuele behoeften van uw cliënten. Ria is wat wij essential hoorttechnologie, aangepast aan uw levensstijl, noemen.

Belangrijke eigenschappen

Speech Guard E	•		
Spatial Noise Management	•		
Spatial Sound	Premium	Advanced	
Binaurale Verwerking	•	•	
Binaurale Synchronisatie	•	•	•
YouMatic	Premium	Advanced	Essential
Free Focus	Premium	Advanced	Essential
Inium Feedback Shield	•	•	•
Bandbreedte*	10 kHz	8 kHz	8 kHz

ALTA NERA RIA

DE VRIJHEID OM GELUIDEN TE VOLGEN DIE BELANGRIJK ZIJN

Binaurale Synchronisatie creëert een meer uitgebalanceerd geluid overal om u heen

In dynamische omgevingen kan het erg moeilijk zijn om zich op stemmen te concentreren en gesprekken te volgen.

Onderzoek toont aan dat wanneer twee toestellen gesynchroniseerd zijn, de gebruiker een beter uitgebalanceerd geluid ervaart en de persoon met wie ze praten beter kunnen verstaan. Dit voordeel was tot nu toe beschikbaar voor gebruikers van onze premium en advanced hooroplossingen, en is nu ook beschikbaar in Ria.

Door twee Ria toestellen naadloos samen te laten werken in real-time, kan de cliënt met behulp van Binaurale Synchronisatie genieten van het voordeel van lawaaimanagement en een verbeterd spraakverstaan - zelfs in luidruchtige situaties.

Free Focus Essential ondersteunt uw cliënten bij het concentreren op de gewenste geluiden

Richtinggevoeligheid in microfoons is algemeen aanvaard als één van de meest efficiënte manieren om te zorgen voor een betere signaal/ruis-prestatie in moeilijke geluidsomgevingen.

Free Focus Essential schakelt naadloos tussen twee standen - Opti Omni en Split Focus - om uw cliënten een uitstekend ondersteuningsniveau te bieden, met de mogelijkheid om over te schakelen naar Full Focus in zeer moeilijke luistersituaties.

Dit alles betekent dat Ria, met Free Focus Essential, u cliënten het vermogen biedt zich beter te concentreren op gewenste geluiden, zelfs in luidruchtige en dynamische omgevingen.

Opti omni

Boots de natuurlijke naar voren gerichte functie van de oorschelp na, zonder comfort en ruimtelijk bewustzijn aan te tasten.

Voorkant



Achterkant

Split Focus

Combineert het beste van twee werelden door de cliënt in staat te stellen zich op het gewenste signaal van voren te concentreren, terwijl hij/zij zich nog steeds bewust is van de geluiden die van achteren komen.



Full Focus

Full Focus geeft de gebruiker de meest gerichte ondersteuning in moeilijke luistersituaties door het gewenste signaal prioriteit te geven boven alle andere geluiden.



**MEER
COMFORT,
MINDER
ONDERBREKINGEN**

Een halt toeroepen aan feedback

Bescherming tegen feedback gaat vaak ten koste van de geluidskwaliteit. Agressieve methoden die ontworpen zijn om fluiten te verwijderen kunnen een negatief effect hebben op geluidskwaliteit en comfort. Sommigen verlagen zelfs de gain, wat de hoorbaarheid aantast. Deze methoden hebben verscheidene nadelen en zullen uiteindelijk leiden tot een luisterervaring die verre van ideaal is.

Inium Feedback Shield vermindert fluiten significant in moeilijke luistersituaties, zonder afbreuk te doen aan geluidskwaliteit, hoorbaarheid en comfort. Het resultaat spreekt voor zich: Inium Feedback Shield vermindert feedback met meer dan 80% (in vergelijking tot onze eerdere DFC-generatie), verbetert de geluidskwaliteit en optimaliseert de hoorbaarheid.

Anti-feedback prestatie

Het belangrijkste doel is om fluiten te voorkomen door opnieuw versterkte signalen in het signaalpad te verwijderen. Het intelligente evenwicht tussen fase-omkering en frequentieverschuiving zorgt voor een effectieve verwijdering van feedback.

Behoud van het natuurlijke signaal

Behoud van een zo natuurlijk mogelijk signaal is het fundament van Inium Feedback Shield. Waar andere systemen mogelijk artefacten veroorzaken, behoudt Inium Feedback Shield de signaalintegriteit, wat de herkenbaarheid en luisterinspanning bij uw cliënt ten goede komt.

Volledige versterking


Volledige en adequate versterking is cruciaal voor hoorbaarheid, dus moet er te allen tijde voldoende versterking worden geboden om goed te kunnen horen en spraak te verstaan. Gewone DFC-systemen verminderen vaak de versterking om feedback te elimineren, hetgeen een negatieve invloed heeft op de hoorbaarheid. De gainmanager in Inium Feedback Shield zorgt voor optimale hoorbaarheid, zelfs in moeilijke situaties.



Fase-omkering



Frequentie-verschuiving

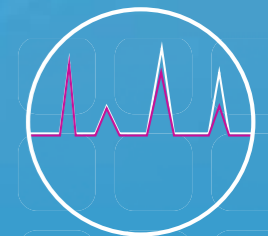

Gainmanager

Drie technologieën worden op intelligente wijze gecombineerd om feedback te verwijderen en de geluidskwaliteit en hoorbaarheid in alle situaties te optimaliseren.

GROTERE CLIËNT- TEVREDENHEID EENVOUDIG TE BEREIKEN

De combinatie van de in Genie geïntegreerde YouMatic Essential en geluidsdemo's, helpen u bij het creëren van een verbeterde luisterervaring

Geen enkele persoon ervaart geluid op dezelfde manier. Daarom zullen uw cliënten enorm veel baat hebben bij een hoeroplossing die speciaal voor hen is gepersonaliseerd.

Met YouMatic Essential is een niveau van persoonlijke afstelling mogelijk die voorheen niet verkrijgbaar was in deze categorie. U kunt een brede reeks automatische functies eenvoudig instellen en tevens regelen hoe het toestel klinkt. Met YouMatic Essential is het eenvoudig voor u om de reactie

en respons van het toestel aan te passen, om beter te voldoen aan de voorkeuren van cliënten wat betreft comfort, ondersteuning en helderheid van het geluid.

YouMatic Essential en Genie helpen u samen een verbeterde luisterervaring te creëren, met een oplossing die is aangepast aan de manier waarop individuele cliënten de wereld rond hen willen horen.

Het YouMatic scherm in Genie met een combinatie van eigenschappen die zijn aangepast aan de persoonlijke hoorwensen en voorkeuren van een individuele cliënt.



360° AAN KEUZE



Ria biedt een uitgebreide keuze aan uitvoeringen, inclusief nieuwe toevoegingen aan onze IHO-productlijn

De Ria familie kan worden aangepast op de individuele luister- en levensstijlbehoeften van uw cliënt en er kan bovendien tegemoet worden gekomen aan comfort en esthetische voorkeuren. Ria introduceert een ongekend niveau in vorm, afmeting en variatie aan uitvoeringen in de essential categorie.

Onze nieuwe generatie miniFit luidsprekers en Corda miniFit dunne slangoplossingen, met een brede reeks oorstukjes, stellen een nieuwe norm in betrouwbaarheid en prestatie. Extra makkelijk is dat alle Oticon oorstukjes op Alta, Nera en Ria Achter-het oor uitvoeringen passen.

De nieuwe IHO-productlijn gaat een stap verder met de veelzijdigheid van Ria zodat u in alle Performance Line families tegemoet kunt komen aan de behoeften van nog meer cliënten. Met de nieuwe IHO 100 voor een zwaarder hoorverlies, en IIC voor ultieme discretie, bij zowel Alta, Nera als Ria.

HET INTUÏTIEVE SYSTEEM OM VERBONDEN TE BLIJVEN MET DE WERELD

ConnectLine laat uw cliënten het meeste uit hun hooroplossing halen

Ria geeft gebruikers de vrijheid en tevredenheid van volledige connectiviteit met communicatie- en entertainment-technologie.

ConnectLine werkt naadloos samen met Ria zodat uw cliënten kunnen genieten van één-op-één communicatie, telefoon streaming, video-chatting, muziek, televisiekijken en nog veel meer. Dit alles is mogelijk met één apparaat, de Streamer Pro, die eenvoudig is te installeren en te gebruiken.

Met ConnectLine kunnen uw cliënten gemakkelijk, comfortabel en draadloos verbinden, zonder afbreuk te doen aan de audiologische prestatie van hun hooroplossing.



Telefoon

Heldere telefoongesprekken vanuit huis met familieleden en vrienden.



Afstandsbediening

Volumeregeling en programmaverandering binnen handbereik van uw cliënt.



Kantoor telefoon

Een nieuwe en gemakkelijke manier om op het werk te kunnen telefoneren.



Microfoon

Verstaan in complexe luistersituaties.



Ringleiding

Verbeterd de beleving van evenementen zoals theaters, collegezalen en religieuze diensten.



FM

Voor probleemloos luisteren tijdens lezingen en in groepen.



Muziek

Alle favoriete muziek van uw cliënt wordt rechtstreeks naar de hoortoestellen gestreamd.



Mobiel

Heldere en comfortabele gesprekken onderweg zonder gedoe.



TV

Televisiekijken, zonder de rest van de familie te hinderen. Nu met digitale input en ingebouwde Dolby Decoder.



Computer

Communicatie en toegang tot informatie en entertainment. Plug-and-play videochatten en andere toepassingen via de computer.



OTICON RIA

OVERZICHT

AHO met toonbocht



miniAHO

AHO

AHO met Corda miniFit dunne slang



miniAHO

AHO

0,9 mm

1,3 mm


LIHO



miniLIHO

LIHO

LIHO miniFit ontvangers

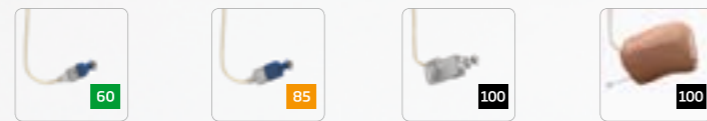

60

85

100

100

Flex Mould

LIHO en AHO MiniFit oorstukjes



Open miniFit tip


Bass tip

Power tip

ThinMould

MicroMould

LIHO en AHO kleuren

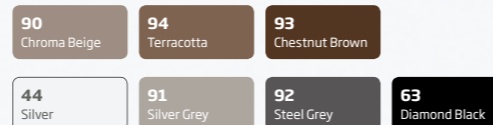

90 Chroma Beige

94 Terracotta

93 Chestnut Brown

44 Silver

91 Silver Grey

92 Steel Grey

63 Diamond Black

IHO



IIC


CIC

Kanaal

Half concha

Concha

Kleuren op maat

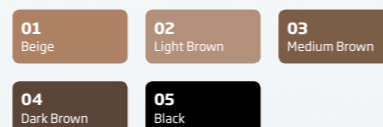

01 Beige

02 Light Brown

03 Medium Brown

04 Dark Brown

05 Black

Alleen IIC

Belangrijkste eigenschappen	Ria Pro	Ria	Nera Pro	Nera	Alta Pro	Alta
Speech Guard E	-	-	-	-	•	•
YouMatic	Essential	Essential	Advanced	Advanced	Premium	Premium
Spatial Sound	-	-	Advanced	-	Premium	-
Spatial Noise Management	-	-	-	-	•	-
Bandbreedte*	8 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz	10 kHz	10 kHz
Binaurale verwerking (compressie)	-	-	•	-	•	-
Binaurale Synchronisatie (automatische regelaars)	•	-	•	•	•	•
Binaurale coördinatie (schakelaar)	•	•	•	•	•	•
Inium Feedback Shield	•	•	•	•	•	•
Free Focus	Essential	Essential	Advanced	Advanced	Premium	Premium
Automatische directionaliteit	Single band	Single band	Multi-band	Single band	Multi-band	Multi-band
TriState Noise Management	-	-	•	-	•	•
Transient Management	-	-	•	•	•	•
Power Bass (streaming)	-	-	•	•	•	•
Music Widening (streaming)	-	-	•	•	•	•
Life Leren	-	-	•	•	•	•
Aanpasopties (Genie 2014.1)						
Persoonlijke Profielen	1	1	3	3	5	5
Aanpasbanden	6	4	8	6	10	10
nEARcom draadloos programmeerbaar	•	•	•	•	•	•
In-situ audiometrie	•	•	•	•	•	•
VAC-aanpasregel	-	-	-	-	•	•
NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v 5.0a m[i/o]	•	•	•	•	•	•
Automatische Adaptatiemanager	•	-	•	•	-	-
Adaptatiemanager met First Fit algoritme	-	-	-	-	•	•
Geheugen	•	•	•	•	•	•
3 LIHO Luidsprekers (60, 85, 100)	•	•	•	•	•	•
Connectiviteit						
ConnectLine	•	•	•	•	•	•
DAI en FM	•	•	•	•	•	•


* Bandbreedte beschikbaar voor versterking tijdens de aanpassing

Gemaakt om te blijven presteren

Alle achter-het-oor hooroplossingen hebben een IP57-classificatie. Het intelligente mechanische ontwerp is voorzien van meerdere afdichtingen om te voorkomen dat water, stof en vuil binnendringen en alle hoofdcomponenten hebben een vochtwerende nano-coating.



Ria aanpasbereik

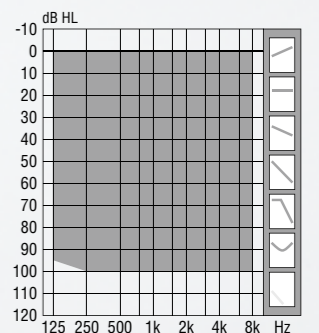

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively