

# RITE

Alta2 Pro Ti  
Nera2 Pro Ti  
Ria2 Pro Ti



Gebruiksaanwijzing

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Overzicht uitvoeringen

Dit boekje is geldig voor Oticon RITE in de volgende hoortoestelmodellen en -stijlen:

- Alta2 Pro Ti
- Nera2 Pro Ti
- Ria2 Pro Ti

Voor bovenstaande modellen zijn de volgende luidsprekers verkrijgbaar:

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85
- Luidspreker 100
- Power FlexMould luidspreker 100

## Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe hoortoestel optimaal benutten.

Uw audicien heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw audicien.

| **Over** | Aan de slag | Gebruik | Opties | Tinnitus | Waarschuwingen | Aanvullende informatie |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

## Beoogd gebruik

De functie van een hoortoestel is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor licht tot ernstig tot zwaar gehoorverlies. Dit hoortoestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Uw audicien heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

## Inhoudsopgave 1/2

### Over

Nagaan over welke luidspreker en welk oorstukje uw hoortoestel beschikt	10
Uw hoortoestel	12
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	14
Batterij	15

### Aan de slag

Het hoortoestel AAN- en UITzetten	16
Wanneer moet u de batterij vervangen	17
De batterij vervangen	18

### Gebruik

Verzorging van uw hoortoestel	20
MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken	21
Het toestel indoen	22
Standaard oorstukjes: dome of GripTip	24
Dome of GripTip vervangen	25
ProWax miniFit filter	26

ProWax miniFit filter vervangen	27
Op maat gemaakte oorstukjes: MicroMould, LiteTip (ThinMould) of PowerMould	28
De MicroMould, LiteTip (ThinMould) of PowerMould onderhouden	29
ProWax filter in op maat gemaakte oorstukjes vervangen	30

### Opties

Optionele functies en accessoires	32
De microfoon van het hoortoestel dempen	33
Overschakelen naar een ander programma	34
Het volume aanpassen	36
Kindveilige batterijlade	38
Draadloze accessoires	40
Overige opties	42

## Inhoudsopgave 2/2

### Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	44
Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusgeluidsgenerator	45
Geluidsopties en volumeregeling	46
Beperking op gebruiksduur	49
Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport	50
Waarschuwingen met betrekking tot tinnitus	53

### Waarschuwingen

Waarschuwingen	54
----------------	----


### Aanvullende informatie

Problemen oplossen	60
Waterbestendig	62
Gebruiksomstandigheden	63
Garantiecertificaat	64
Internationale garantie	65
Technische informatie	66

## Nagaan over welke luidspreker en welk oorstukje uw hoortoestel beschikt


Hierdoor is het voor u gemakkelijker om door dit boekje te navigeren.

Een RITE heeft drie verschillende luidsprekers en oorstukjes.

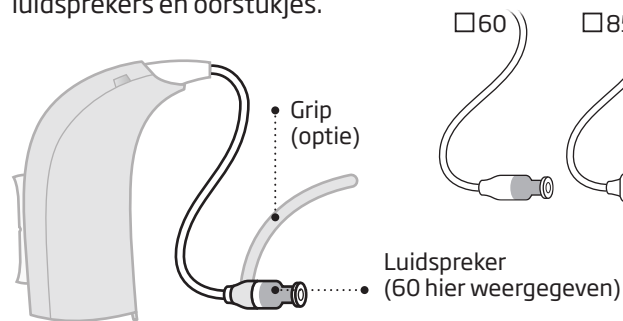


### Luidsprekers

Een RITE heeft een van de volgende luidsprekers.

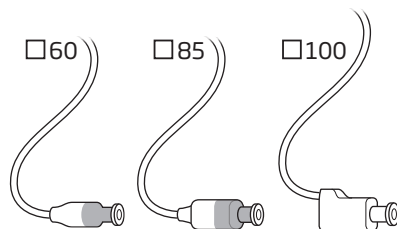

### Oorstukjes


Een RITE heeft een van de volgende oorstukjes.

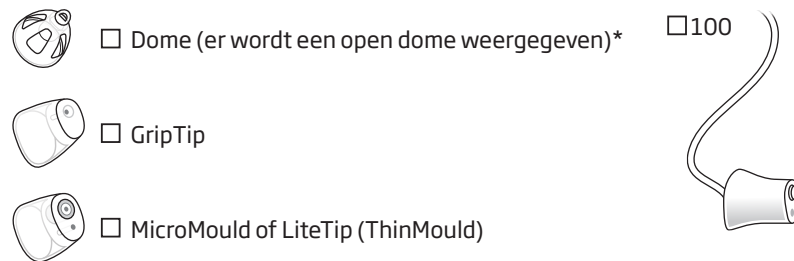


\* Ga voor meer details over het vervangen van de dome of GripTip naar de paragraaf: Dome of GripTip vervangen

## Uw hoortoestel

### Wat het is

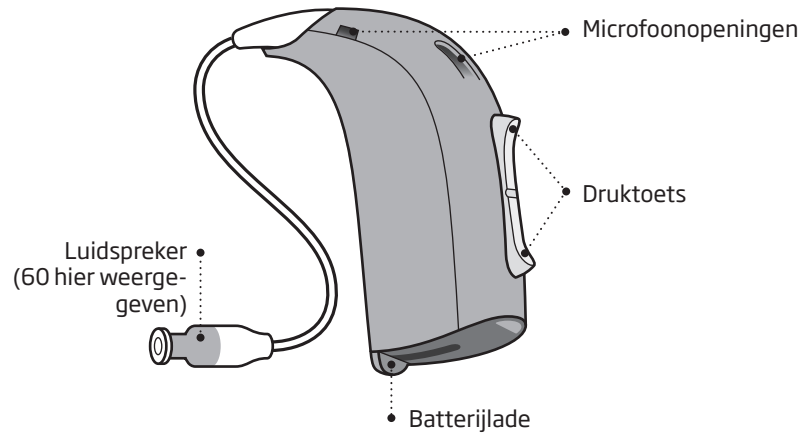

### Wat het doet

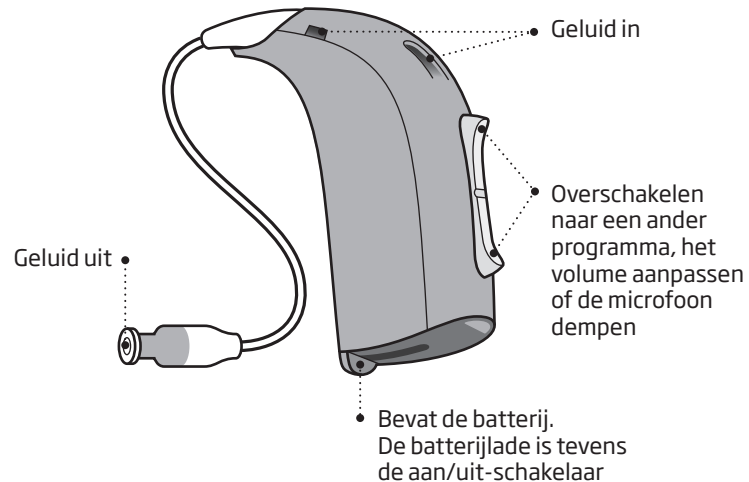


## Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn. Er bevinden zich links/rechtsmarkeringen in de batterijlade, of op de 60- en 85-luidsprekers of op de MicroMoulds/LiteTips (ThinMoulds).


Een **RODE** stip markeert het rechter-toestel.

Een **BLAUWE** stip markeert het linker-toestel.

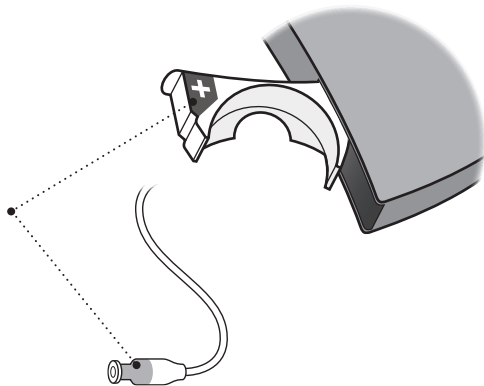

## Batterij

Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Raadpleeg het hoofdstuk "De batterij vervangen" om te zien hoe u dat moet doen.

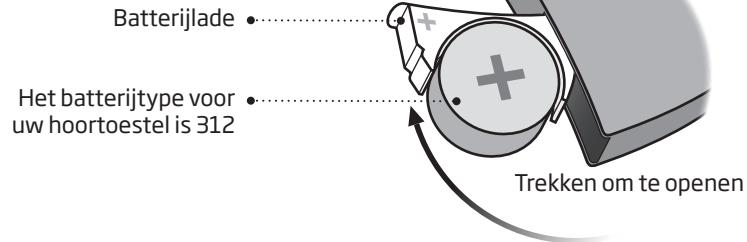




## Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt tevens gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt.


### AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.

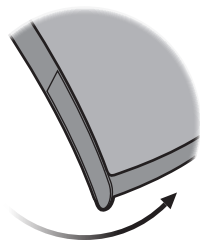

### UITZETTEN

Doe de batterijlade open.

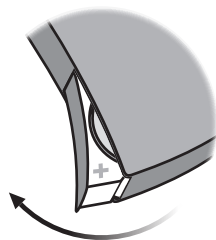

## Wanneer moet u de batterij vervangen

U hoort twee piepjes als het tijd is om de batterij te vervangen. Deze waarschuwing wordt met regelmatige tussenpozen herhaald, totdat de batterij leeg is.



### Twee piepjes

= de batterij is bijna leeg



### Vier piepjes


= de batterij is leeg

### Tip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.


## De batterij vervangen

### 1. Oude batterij verwijderen

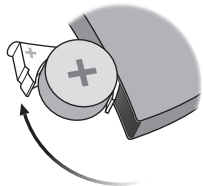

Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.


### 2. Sticker verwijderen

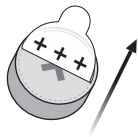

Haal de sticker van de +-zijde van de nieuwe batterij.


Tip:  
Wacht 2 minuten zodat de batterij lucht kan opvangen om er zo voor te zorgen dat de batterij optimaal werkt.

### 3. Nieuwe batterij plaatsen

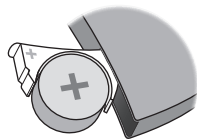

Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.


### 4. Sluiten

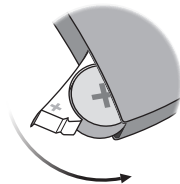

Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

### Tip

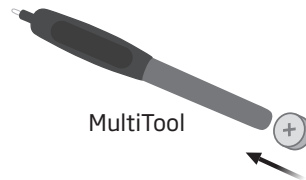

MultiTool

De MultiTool kan gebruikt worden voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.


De MultiTool is verkrijgbaar bij uw audicien.

## Verzorging van uw hoortoestel

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

### De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de borstel schoon is en dat hij niet in de openingen wordt geduwd.

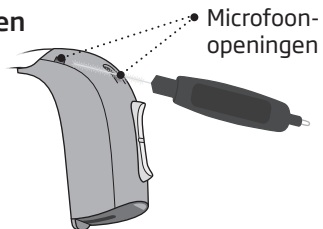


#### BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

## MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw audicien.

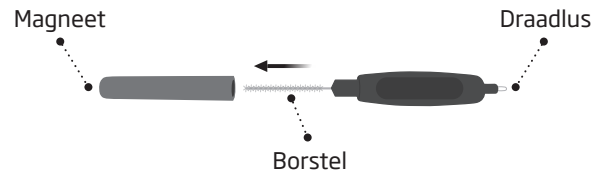


#### BELANGRIJKE OPMERKING

De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

## Het toestel indoen

De luidspreker brengt het geluid naar uw oor. De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt. (zie stap 3).

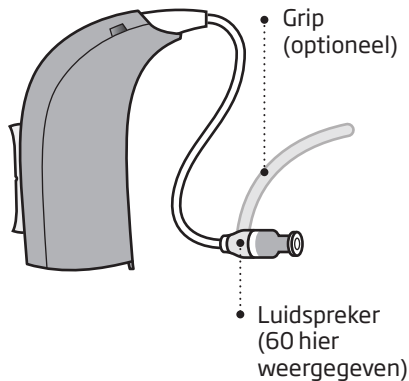


### Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.

### Stap 2

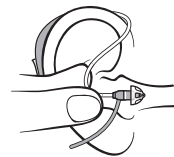

Houd de bocht van de luidsprekerdraad tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet in de richting van de gehoorgang wijzen.


### Stap 3



Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot de luidsprekerdraad dicht tegen de zijkant van uw hoofd zit.

## Standaard oorstukjes: dome of GripTip

De domes en GripTip zijn beide van zacht rubber gemaakt. Er zijn 4 verschillende soorten domes. Controleer uw type dome en maat hieronder.

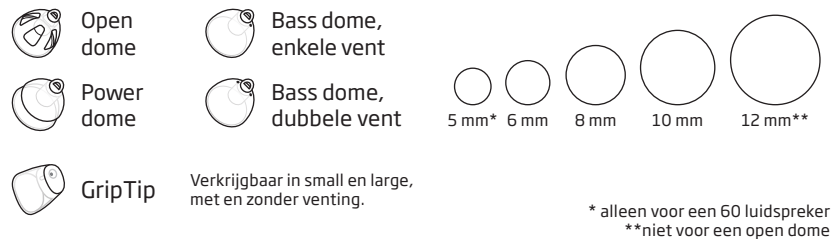


### BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

## Dome of GripTip vervangen


De dome of GripTip mag niet gereinigd worden. Wanneer het oorstukje vol zit met oorsmeer moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip tenminste een keer per maand te vervangen.

### Stap 1

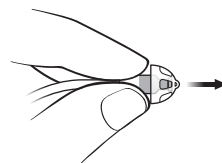


Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

### Stap 2

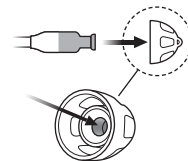

Plaats de luidspreker precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.

### Stap 3

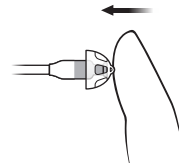

Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.

## ProWax miniFit filter

De luidspreker heeft een witte oorsmeerfilter die bevestigd zit aan het einde waar het oorstukje is bevestigd. De oorsmeerfilter voorkomt dat er oorsmeer of vuil in de luidspreker komt. Als de filter verstopt raakt, vervangt u de filter of neemt u contact op met uw hoorzorg professional.


Verwijder het oorstukje van de luidspreker voordat u de oorsmeerfilter plaatst.

### BELANGRIJK

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als het type dat u oorspronkelijk kreeg bij uw hoortoestel. Als u twijfelt over het gebruik of het vervangen van uw oorsmeerfilter, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

## ProWax miniFit filter vervangen

### 1. Tool

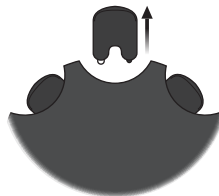


Verwijder de tool uit de schijf. De tool heeft twee pinnetjes, een lege voor het verwijderen en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

### 2. Verwijderen



Druk het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in de luidspreker en trek het eruit.

### 3. Plaatsen

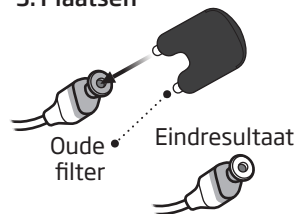

Plaats de nieuwe oorsmeerfilter door gebruik te maken van het andere pinnetje en gooi de oude filter weg.

NB:

Als u een mould gebruikt, is het noodzakelijk dat een hoorzorg professional uw oorsmeerfilter in de luidspreker vervangt.

## Op maat gemaakte oorstukjes: MicroMould, LiteTip (ThinMould) of PowerMould

Er zijn 3 verschillende soorten oorstukjes: MicroMould, LiteTip (ThinMould) en PowerMould. De oorstukjes zijn aangepast aan de vorm van uw oor.



• MicroMould



• LiteTip (ThinMould)



• PowerMould


## De MicroMould, LiteTip (ThinMould) of PowerMould onderhouden

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt.

Het oorsmeerfilter in het oorstukje moet worden vervangen wanneer het verstopt zit of wanneer het hoortoestel niet normaal klinkt.


Gebruik de oorsmeerfilter die door uw audicien wordt geleverd.

*De ventilatieopening wordt schoongemaakt door de borstel licht draaiend door de opening te duwen.*

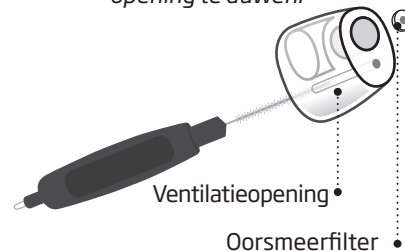


## ProWax filter in op maat gemaakte oorstukjes vervangen

### 1. Tool

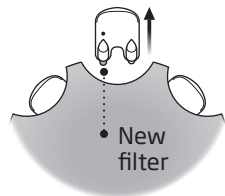


Verwijder de tool uit de schijf. De tool heeft twee pinnetjes, een lege voor het verwijderen en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

### 2. Verwijderen

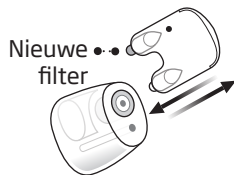

Druk het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in de MicroMould en trek het eruit.

### 3. Plaatsen

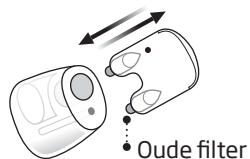

Plaats de nieuwe oorsmeerfilter door het andere pinnetje te gebruiken, verwijder de tool en gooi hem weg.



## Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw audicien om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken hebt met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw audicien geprogrammeerd.

*Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.*


---

---

---

## De microfoon van het hoortoestel dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om de microfoon uit te zetten terwijl u het hoortoestel in hebt.

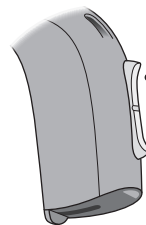


Druk lang op een van beide uiteinden van de toets om de microfoon te dempen. Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

## Overschakelen naar een ander programma



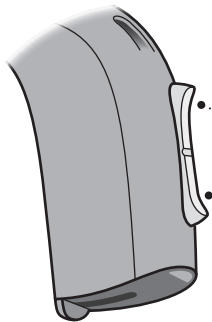

Uw toestel heeft maximaal vier verschillende programma's. Deze worden door uw audicien geprogrammeerd.



Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen.

Let op: u kunt continu tussen programma's schakelen – zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld wilt overschakelen van programma 1 naar programma 4, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.

## In te vullen door de audicien

Programma	Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

Overschakelen naar een ander programma:

LINKS


RECHTS

Kort drukken

Lang drukken

## Het volume aanpassen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.  
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.

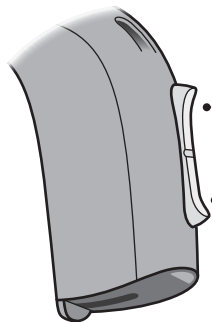

- .....• Druktoets voor het verhogen van het volume.
- .....• Druktoets voor het verlagen van het volume.



U hoort 2 piepjes bij het startvolume


## In te vullen door de audicien

Aanpassen van het volume	<input type="checkbox"/> LINKS	<input type="checkbox"/> RECHTS	<input type="checkbox"/> Kort drukken
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------


## Snelle reset

U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw audicien zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten.

### Openen

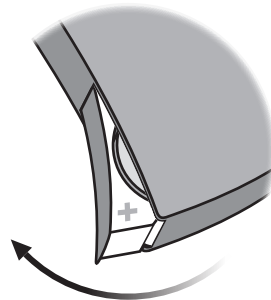

### Sluiten

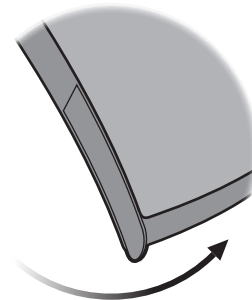

## □ Kindveilige batterijlade


Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt. Gebruik een kleine schroevendraaier om de batterijlade te openen.

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Gebruik geen overmatige kracht om de batterijlade te openen. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst.


Neem contact op met uw audicien als u vermoedt dat de kindveilige vergrendeling is beschadigd of de werking ervan is aangetast.

### De batterijlade ontgrendelen

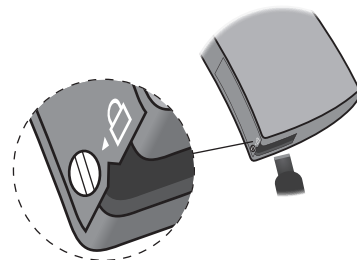

Gebruik de schroevendraaier om de schroef naar de ontgrendelde positie te draaien (verticaal). Plaats de schroevendraaier in de gleuf onderaan het hoortoestel en duw tegen de lade om hem te openen.

### De batterijlade vergrendelen

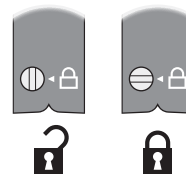

Zorg ervoor dat de lade volledig is gesloten. Draai de schroef naar de vergrendelde positie (horizontaal).

## Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar.

### **ConnectLine**

ConnectLine bestaat uit een serie producten waarmee u audiosignalen van tv, vaste en mobiele telefoon, muziekspeler, pc of externe microfoon rechtstreeks en draadloos in uw hoortoestel kunt ontvangen.

### **Afstandsbediening**

Met de afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen of het volume van uw hoortoestel aanpassen.

### **FM**

Uw toestel ondersteunt het gebruik van een FM-systeem. Via het FM-systeem kunt u spraak of audiosignalen rechtstreeks in uw hoortoestel ontvangen via een speciale zender.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over draadloze accessoires of ga naar **[www.oticon.nl](http://www.oticon.nl)**.

## Overige opties



### Luisterspoel

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



### AutoPhone

is een programma dat automatisch wordt geactiveerd wanneer uw telefoon beschikt over een ingebouwde ringleiding (zie hierboven). Hiervoor moet een magneet op uw telefoon worden geplaatst, vlak naast de geluidsopening.

### Direct Audio Input (DAI)

zorgt ervoor dat uw hoortoestel signalen kan ontvangen die rechtstreeks afkomstig zijn van externe bronnen, zoals tv, radio, muziekspelers, enz. De DAI-adaptor wordt aan uw hoortoestel bevestigd en via een kabel verbonden met een externe geluidsbron.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over deze mogelijkheden of ga naar [www.oticon.nl](http://www.oticon.nl)

#### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Wanneer de DAI is aangesloten op een audiobron die op netvoeding werkt, dient de audiobron in overeenstemming te zijn met IEC-60065, IEC-60601 of equivalente veiligheidsnormen.

## **Tinnitus SoundSupport™** (optioneel)

### **Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport**

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan cliënten die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een behandelprogramma voor tinnitus.

De doelpopulatie is de volwassen populatie (18 jaar en ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professional (audiologen, audiciens of kno-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. Aanpassing van Tinnitus SoundSupport moet door een hoorzorg professional worden gedaan die onderdeel uitmaakt van een behandelplan voor tinnitus.

## **Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator**

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit in uw hoortoestellen hebben geactiveerd.

Tinnitus SoundSupport is een apparaat voor de behandeling van tinnitus. Het genereert geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte om tinnitus te kunnen behandelen.

Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u zijn/haar advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

### **Uitsluitend voor gebruik op voorschrift**

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

## **Geluidsopties en volumeregeling**

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

### **Tinnitus SoundSupport programma's**

U beslist samen met uw hoorzorg professional voor welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

### **Dempfunctie**

Als u zich in een programma bevindt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, zal de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid dempen, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie hoofdstuk: "Geluid van het hoortoestel dempen".

### **Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport**

Wanneer u een hoortoestelprogramma zoekt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorg professional de drukknop op uw hoortoestel alleen instellen om te werken als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume in beide oren tegelijkertijd aanpassen.



<input type="checkbox"/>	<p><b>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen</b></p> <p>Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te <b>verhogen</b> herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p> <p>Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te <b>verlagen</b> herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen</b></p> <p>U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen.</p> <p>Om het volume te <b>verhogen</b>, drukt u herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop.</p> <p>Om het volume te <b>verlagen</b>, drukt u herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop.</p>

In te vullen door uw gehoorspecialist.

## Beperking op gebruiksduur

### Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw gehoorspecialist zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

### Tinnitus SoundSupport: Beperking op gebruiksduur

<input type="checkbox"/>	Geen beperking op gebruiksduur
<input type="checkbox"/>	Beperkt gebruik, maximaal _____ uur per dag

*In te vullen door uw hoorzorg professional.*

## Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

### Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door de hoorzorg professional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

### Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie "Maximale draagtijdindicatie" naast de tinnitus aanpasgrafiek in de aanpassoftware.

### De volumeregeling is geactiveerd

De volumeregeling voor de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd in het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de volumeregeling voor tinnitus in het scherm "Knoppen en Indicaties" activeert. Dit gebeurt als het verlichtende geluid de hoogste volume instelling in het hoortoestel de 80 dB(A) SPL overschrijdt.

Met de tabel "Max. draagtijd" berekent u de maximale draagtijd voor uw cliënt gebaseerd op:

1. De output van het programma met het hoogste dB(A) niveau.\*  
**plus**
2. Het decibel bereik van de volumebediening.

*\* Kan gevonden door muis te bewegen over de signaalniveau bediening.*

Instrueer uw cliënt naargelang de draagtijd en leg de maximale draagtijd voor uw cliënt vast in de tabel "Tinnitus SoundSupport: Beperking op gebruiksduur."

### Maximale draagtijd met Tinnitus SoundSupport

totale dB(A) SPL	Draagtijd/uren per dag
< 81	Volledige dag
82	16
85	8
88	4
90	3

Referentie: OSHA (Occupational Safety & Health Administration, U.S. department of Labour) / DIRECTIVE 2003/10/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) / Occupational exposure to noise: evaluation, prevention and control - Special Report S 64, WHO.

## Waarschuwingen met betrekking tot tinnitus

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een apparaat voor de behandeling van tinnitus wordt gegenereerd. Het gaat hier onder meer over het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audicien of andere hoorzorg professional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik voorkomen wordt en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

### Maximale draagtijd

Houd u altijd aan de door uw hoorzorg professional geadviseerde maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport. Langdurig gebruik kan tot verslechteren van uw tinnitus of uw gehoorverlies leiden.

## **Waarschuwingen**

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Wees u ervan bewust dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw audicien indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

### **Gebruik van hoortoestellen**

- Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de audicien. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

### **Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen**

- Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.
- Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

- Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
- Kinderen jonger dan 36 maanden moeten altijd een kindvriendelijke batterijlade gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorg professional over de beschikbaarheid van deze optie.

*Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.*

## **Waarschuwingen**

### **Batterijgebruik**

- Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw audicien. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

### **Slechte werking**

- Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

### **Actieve implantaten**

- Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.
- De AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient meer dan 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.
- Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

### **Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie**

- Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

### **Hitte en chemicaliën**

- Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.
- Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

## **Waarschuwingen**

- Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

### **Power-toestel**

- Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantasting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

*Raadpleeg de achterzijde van dit boekje om te zien of uw hoortoestel een power-toestel is.*

### **Mogelijke bijwerkingen**

- Bij gebruik van hoortoestellen, oorstukjes of domes kan een versnelde ophoping van oorsmeer optreden.
- De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

*Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.*

### **Storing**

- Het hoortoestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

### **Verbinding met externe apparatuur**

- De veiligheid van het hoortoestel, indien verbonden met externe apparatuur (via aux inputkabel, via USB kabel, of direct) wordt bepaald door de externe apparatuur. Wanneer verbonden met externe apparatuur verbonden met een stopcontact, dan moet deze apparatuur voldoen aan of gelijkwaardig zijn aan de IEC60065 of de IEC-60950 standaarden.

## Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopt slangetje of verstopt oorstukje (dome, GripTip, of mould)	Reinig het oorstukje
		Vervang de oorsmeerfilter of de dome
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak het oorstukje schoon of vervang de oorsmeerfilter of dome
	Vocht	Veeg de batterij met een droge doek af
	Lege batterij	Vervang de batterij
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het toestel opnieuw in het oor
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw audicien voor hulp.

## Waterbestendig

Uw hoortoestel is waterbestendig, maar niet waterproof. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

## Gebruiksomstandigheden

<b>Gebruiksomstandigheden</b>	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
<b>Opslag- en transportomstandigheden</b>	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag:  Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend



## Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: \_\_\_\_\_

Gehoorspecialist: \_\_\_\_\_

Adres gehoorspecialist: \_\_\_\_\_

Telefoon gehoorspecialist: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Garantieperiode: \_\_\_\_\_ Maand: \_\_\_\_\_

Model links: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

Model rechts: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

## Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder

de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw audicien heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

**Als u ondersteuning nodig hebt**  
Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

## Technische informatie

Het toestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB $\mu$ A/m @ 10 m.

Het emissievermogen van het radiosysteem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van het hoortoestel is lager dan de onbedoelde

elektromagnetische straling van bijvoorbeeld halogeenlampen, computerschermen, afwasmachines, enzovoorts. Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

### VS en Canada

De hooroplossing bevat een module met:

FCC ID: U28FU2BTERIT  
IC: 1350B-FU2BTERIT

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Meer informatie: [www.oticon.nl](http://www.oticon.nl)

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de eisen van het Canadese ICES-003.

NB: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van het FCC reglement. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in wooninstallaties. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiostraling en kan deze uitstralen. Indien niet correct geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het leiden tot schadelijke storing aan de radio communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen schadelijke storing zal plaatsvinden in een installatie.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio of televisie ontvangst, die kan bepaald worden door het uitzetten van de apparatuur, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Verbind de apparatuur met een stopcontact anders dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de fabrikant of een ervaren radio/TV technicus voor ondersteuning.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Vervaardigd door:  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denemarken  
[www.oticon.global](http://www.oticon.global)

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



E2831

IP58

Power-toestel <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
Overzicht toestelinstellingen				
Links		Rechts		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempfunctie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

152931NL / 2017.09.01

152931NL / 2017.09.01



**oticon**  
PEOPLE FIRST

152931NL / 2017.09.01