

Technische gegevens

Charger 1.0 miniRITE R

De oplader is ontworpen om het dagelijks opladen te vergemakkelijken met een paar eenvoudige handelingen.

Opladen

- Neem de hoortoestellen uit en plaats ze in de oplader - u hoeft geen klepjes te openen.
- De hoortoestellen worden automatisch opgeladen wanneer ze in de oplader worden geplaatst en automatisch ingeschakeld wanneer ze uit de oplader worden genomen.
- Laad de hoortoestellen elke nacht op zodat ze volledig zijn opgeladen voor gebruik overdag.

Gemakkelijk af te lezen

De gebruiker kan de oplaadstatus eenvoudig aflezen van de led op het hoortoestel:

- Oranje / Rood* = opladen
- Groen = volledig opgeladen

Korte oplaadtijd

Als de hoortoestellen volledig ontladen zijn, is de normale oplaadtijd:

- 3 uur = volledig opgeladen
- 1 uur = 50% opgeladen
- 0,5 uur = 25% opgeladen


Productkenmerken

- Opladen door inductie
- Led AAN/UIT
- Magnetische aansluiting - hoortoestellen blijven in de oplaadpoorten zitten
- Vaste stroomkabel
- Rubberen voetjes voor hoge stabiliteit
- Zachte, ronde vormen - eenvoudig schoon te maken
- Inclusief zachte reisetui



De oplader is ontworpen voor het opladen van de miniRITE R. Hij is gebaseerd op inductieve technologie en laadt de hoortoestellen binnen drie uur draadloos op voor een volledige oplading.


Ontworpen voor miniRITE R
Oticon More™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Ruby

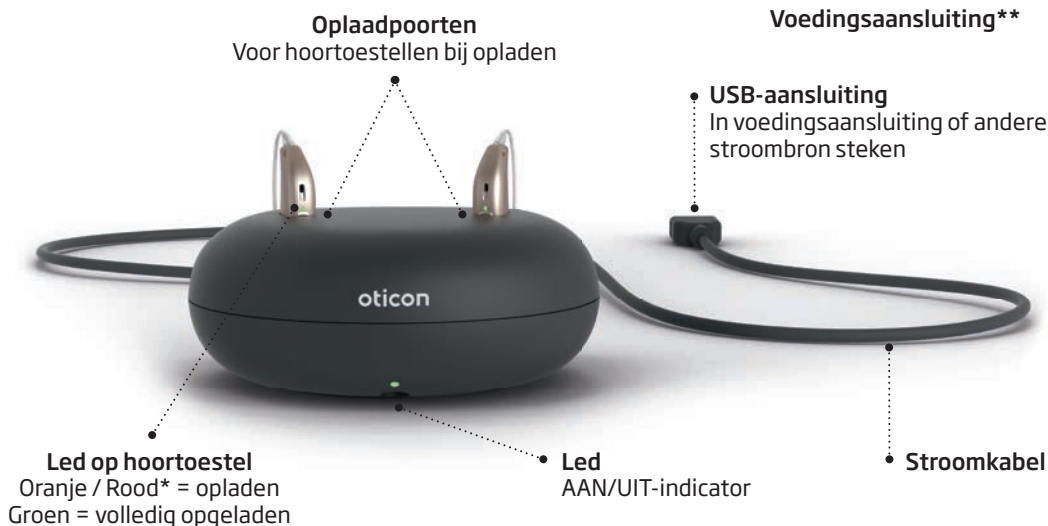

* De kleur is oranje of rood, afhankelijk van de hoortoestelfamilie
** Stekker varieert per land



Technische gegevens: Oplader	
Naam	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Ontworpen voor/compatibel met	Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Ruby: miniRITE R
Afmetingen	Ø95 mm/totale hoogte van 39 mm
Gewicht	135 g
Kleur	Black
Voedingsstekker	USB A
Statusindicator	Led op oplader: geeft status oplader AAN/UIT aan Led op hoortoestel bij opladen: geeft de oplaadmodus aan
Oplaadtijd van hoortoestellen	Maximaal 3 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij (Temperatuur: +10 °C tot +35 °C) Maximaal 4 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij (Temperatuur: +5 °C tot +10 °C en +35 °C tot +40 °C)
Voedingsbron	Meegeleverde voedingsaansluiting
Ingangsspanning	5 V DC
Ingangsstroom	< 0,2 A (twee hoortoestellen opladen) <10 mA stand-by (geen hoortoestellen geplaatst)
Kabel	Vaste kabel, lengte 150 cm
Aangesloten op externe apparatuur	Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
Gebruiksomstandigheden	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 93 %, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	Temperatuur: -25 °C tot +70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 93 %, niet-condenserend
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa
Technische gegevens: Voedingsaansluiting	
Ingangsspanning	100-240 V AC
Ingangsfrequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning	5 V DC
Uitgangsstroom	1 A

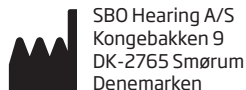

Hoofdkantoor
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken