

Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening 2.0



Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe Afstandsbediening. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw Afstandsbediening te halen.

Voor eventuele vragen over het gebruik van uw Afstandsbediening kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Met Afstandsbediening 2.0 kunnen hoortoestelgebruikers het programma wijzigen en het volume aanpassen van draadloze Oticon hoortoestellen.
Aanwijzingen voor gebruik	Geen aanwijzingen voor gebruik.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruikersomgeving	Binnen / buiten.
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen .
Klinische voordelen	Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.

Inhoudsopgave

Over

Inhoud van de verpakking	6
Productoverzicht	7

Aan de slag

Batterijen	8
Plaatsen van de batterijen	9

Gebruik

Bedieningsafstand	10
Bevestigingen	11
Programma veranderen	12
Volume wijzigen	13
Dempen*	14
Opening voor koord	15
Onderhoud van uw Afstandsbediening	16

Waarschuwingen

Waarschuwingen	17
----------------	----


Aanvullende informatie

Gebruiksomstandigheden	20
Technische informatie	22


Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat de volgende onderdelen:

Afstandsbediening 2.0

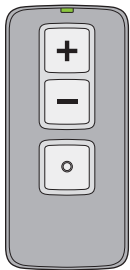


Batterijen


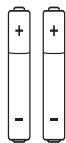


2 x AAAA

Dit boekje

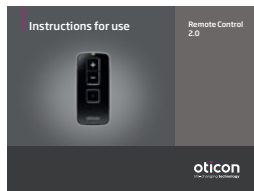

Productoverzicht

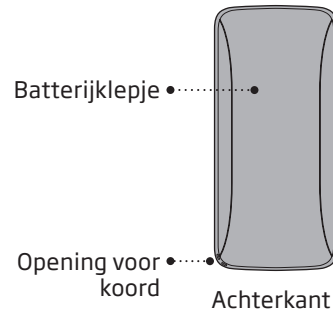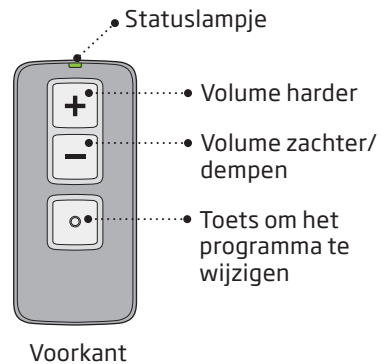

Batterijen


Om de Afstandsbediening te activeren, moet u twee AAAA-batterijen in de batterijlade plaatsen.

De levensduur van een batterij hangt af van het gebruik. Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer eenmaal per jaar worden vervangen.

Forceer het batterijklepje niet. Als u kracht nodig heeft om het batterijklepje op zijn plaats te klikken, controleer dan eerst of deze wel goed zit. Plaats het klepje opnieuw zodat deze zonder kracht op zijn plaats kan worden geklikt.

Plaatsen van de batterijen


1 Oude batterij verwijderen

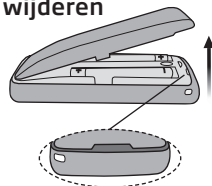

Open het batterijklepje voorzichtig.

Verwijder de gebruikte batterijen.


2 Nieuwe batterij plaatsen

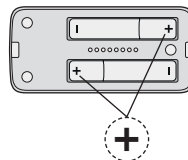

Plaats de nieuwe batterijen in de batterijlade.

Zorg dat het +-teken op de batterij overeenkomt met het +-teken in het batterijlade.

3 Sluiten

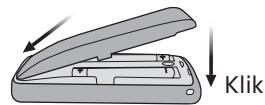

Plaats het batterijklepje terug.


Druk vervolgens het batterijklepje voorzichtig omlaag tot het op zijn plaats klikt.

Bedieningsafstand

Met de Afstandsbediening kunt u uw hoortoestellen op een afstand van maximaal 1 meter.

Er is geen directe zichtlijn tussen de Afstandsbediening en de hoortoestellen nodig.

Als u hoortoestellen in beide oren heeft, past de Afstandsbediening beide tegelijk aan.

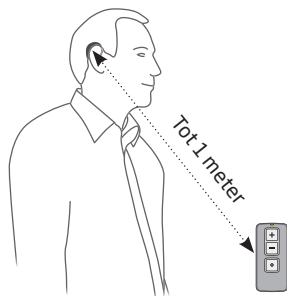


Bevestigingen

Visuele indicaties

Het statuslampje geeft de werking van de Afstandsbediening aan. Het knippert na elke druk op een toets.


Lage batterijspanning

Het statuslampje knippert langzaam (eens per 2 seconden) wanneer de batterijen moeten worden vervangen. De Afstandsbediening werkt dan niet tot de batterijen zijn vervangen. In dat geval dient u de batterijen zo spoedig mogelijk te vervangen.

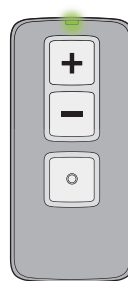

Programma veranderen

U kunt de Afstandsbediening gebruiken van programma te veranderen als uw hoortoestel meer dan één programma heeft. Druk kort op de “•”-toets op de Afstandsbediening om door de hoortoestelprogramma's te gaan. Elke keer dat u op de toets drukt, gaan de hoortoestellen verder naar het volgende programma.

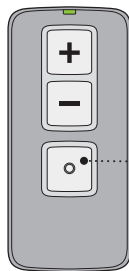


• Druk om het programma te veranderen


Om terug te keren naar programma 1 en de oorspronkelijke volume-instellingen, houdt u de “•”-toets 3-4 seconden ingedrukt.

Volume wijzigen

U kunt de geluidsstrekte van uw hoortoestel aanpassen met de volumetoetsen op de Afstandsbediening.

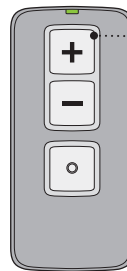

• Druk op “+” om het volume te verhogen (harder)

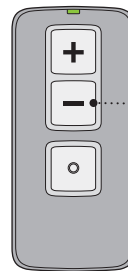


• Druk op “-” om het volume te verlagen (zachter)

BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Dempen*

U kunt de dempfunctie gebruiken om de hoortoestellen uit te zetten terwijl u ze draagt.

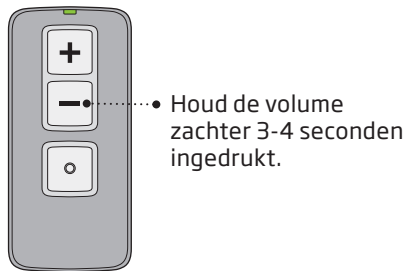

Druk op een willekeurige toets op de Afstandsbediening om de demping van uw hoortoestellen op te heffen.


*De dempfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met bepaalde typen draadloze hoortoestellen. Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorgprofessional.

Opmerking: De dempfunctie schakelt de hoortoestellen niet uit. Open de batterijlade van de hoortoestellen om ze uit te schakelen.

Opening voor koord

De Afstandsbediening heeft rechts onderaan een opening voor een koord.

Alle geschikte polskoorden kunnen gebruikt worden.

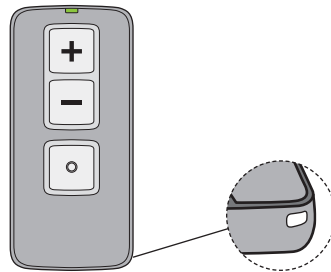

Onderhoud van uw Afstandsbediening

Als u de batterijen vervangt of de Afstandsbediening schoonmaakt, doe dat dan boven een zacht oppervlak om schade te voorkomen als u de Afstandsbediening laat vallen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de Afstandsbediening. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw Afstandsbediening gaat gebruiken.

Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als u een onverwachte werking of ernstige incidenten ervaart met uw Afstandsbediening tijdens of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorgprofessional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er is een risico dat de batterijen ontploffen.

Koordbevestiging

Als u een polskoord gebruikt, zorg er dan voor dat deze ontworpen en geschikt is voor gebruik met de Afstandsbediening. Gebruik nooit een lanyard vanwege het risico op verstikking.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

Uw Afstandsbediening, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een batterij, hoortoestel of kleine onderdelen.

Waarschuwingen

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw Afstandsbediening buiten bereik van kinderen te blijven of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Mogelijke bijwerkingen

De anti-allergene materialen in uw Afstandsbediening kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Actieve implantaten

De Afstandsbediening is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (specifiek absorptietempo - SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen

en spanningen in het menselijk lichaam. De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw Afstandsbediening voorafgaand aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De Afstandsbediening kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Gebruik in het verkeer

Het gebruik van de Afstandsbediening kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de Afstandsbediening gebruikt. Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u zich in het verkeer bevindt.

Hitte en chemicaliën

Stel uw Afstandsbediening nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Uw Afstandsbediening mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray kunnen de Afstandsbediening beschadigen. Verwijder daarom altijd uw Afstandsbediening voordat u dergelijke producten aanbrengt en geef deze de tijd om te drogen.

Storing

Uw Afstandsbediening is grondig getest op storing volgens de strengste internationale normen.

Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen uw Afstandsbediening en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de Afstandsbediening en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +10°C tot +45°C Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid; niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -20°C tot +70°C Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid; niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Internationale garantie

Uw apparaat valt onder een internationale beperkte garantie afgegeven door de fabrikant voor een periode van 12 maanden na levering aan uw. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Onder deze garantie kiest de fabrikant naar eigen goeddunken of het apparaat moet worden gerepareerd of vervangen door een

gelijkwaardig model. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw apparaat naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen van garantieservice van de fabrikant. Hoorzorgprofessionals kunnen kosten in rekening brengen voor hun diensten.

Technische informatie

Naam van het model	RC-2A
--------------------	-------

De Afstandsbediening bevat een radiozondontvanger die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan -15 dBµA/m op een afstand van 10 meter).

De Afstandsbediening voldoet aan internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op de Afstandsbediening zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Voor gebruik op het lichaam voldoet dit apparaat aan de RF-blootstellingslimieten van de FCC en IC en is getest in contact met het menselijk lichaam. Het apparaat mag niet worden geplaatst naast of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Aanvullende informatie is te vinden in de technische gegevensbladen op www.oticon.global

VS en Canada

Dit apparaat is gecertificeerd volgens:

FCC ID: 2ACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01

Opmerking

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor vergunningsvrijstelling van Industry Canada.

Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden

1. Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

De fabrikant verklaart hierbij dat deze Afstandsbediening 2.0 (RC-2A) voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen



Waarschuwingen

Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.



Fabrikant

Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-verordening 2017/745 en 2017/746.



CE-markering

Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-verordeningen en -richtlijnen.



Elektronisch afval (AEEA)

Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.



IMDA-label Singapore

Geeft aan dat het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing produceert voor andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels	
	Droog houden Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
	Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.
	Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
	Batterij Geeft het type batterij en wijze van plaatsing aan.
	Brazil ANATEL-label Geeft aan dat het apparaat gecertificeerd en goedgekeurd is in Brazilië.

219962NL / 2020.03.20 / v1

219962NL / 2020.03.20 / v1



oticon
life-changing **technology**

219962NL / 2020.03.20 / v1