

GEBRUIKSAANWIJZING

AHO SP



Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe hoortoestel optimaal benutten.

Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw gehoorspecialist.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Waarschuwingen](#) | [Meer info](#) |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De functie van hoortoestellen is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor gehoorverlies. De hoortoestellen zijn bedoeld voor gebruik door (jonge) kinderen en volwassenen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.

BELANGRIJKE OPMERKING


Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave


Over	Afbeelding van het instrument	6	Volume wijzigen	26	
	Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	8	Volumebediening en ConnectLine (optioneel)	28	
	Batterijtype 13	9	Kindveilige batterijlade (optioneel)	31	
Aan de slag	Het hoortoestel aan- en uitzetten	10	Draadloze accessoires (optioneel)	33	
	Wanneer moet u de batterij vervangen	11	Direct Audio Input - DAI (optioneel)	34	
	De batterij vervangen	12	FM (optioneel)	36	
Gebruik	Onderhoud van uw toestel	14	Overige opties (optioneel)	38	
	Toonbocht met oorstukje	16	Overzichtstabel hoorbare en visuele indicaties (LED)	40	
	Het hoortoestel met het oorstukje indoen	17	Waarschuwingen	Waarschuwingen	42
	Het hoortoestel met het oorstukje en		Aanvullende informatie	Problemen oplossen	48
	SmartFit™ Trainer indoen	18		Waterbestendige nanocoating (IP58)	50
	Het oorstukje schoonmaken	20		Omstandigheden	51
	Het oorstukje wassen	21		Oticon Garantiecertificaat	52
Opties	Optionele functies en accessoires	22		Internationale garantie	53
	De microfoon van het hoortoestel dempen (optioneel)	23		Mobiele telefoons	54
	Overschakelen naar een ander programma (optioneel)	24		Technische informatie	56

Afbeelding van het toestel

Wat het is

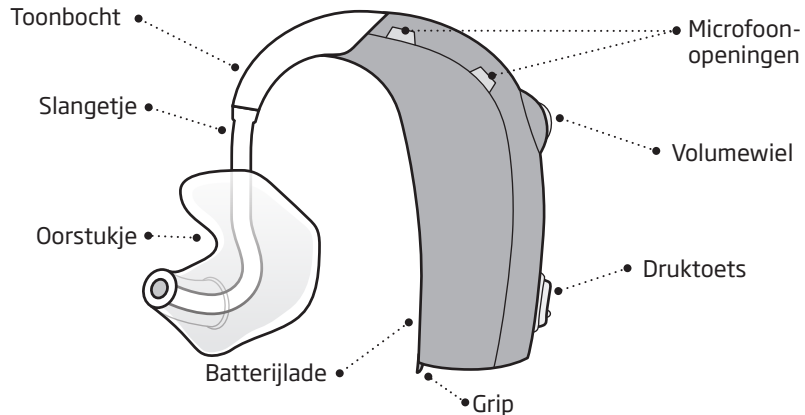


Wat het doet

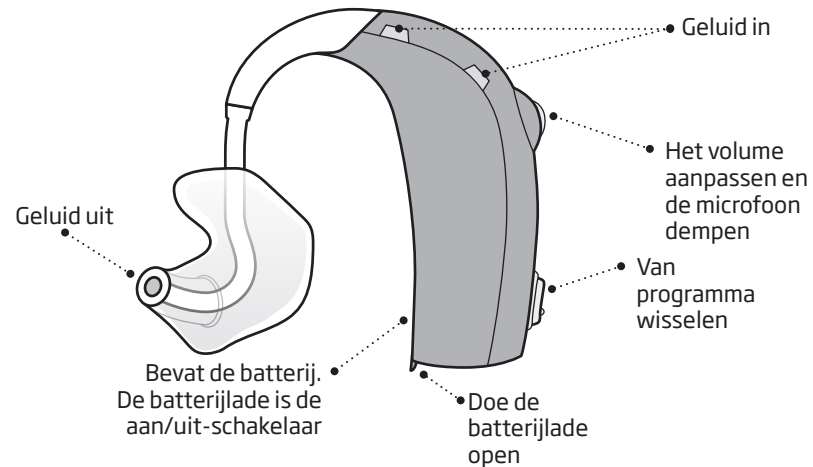


Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

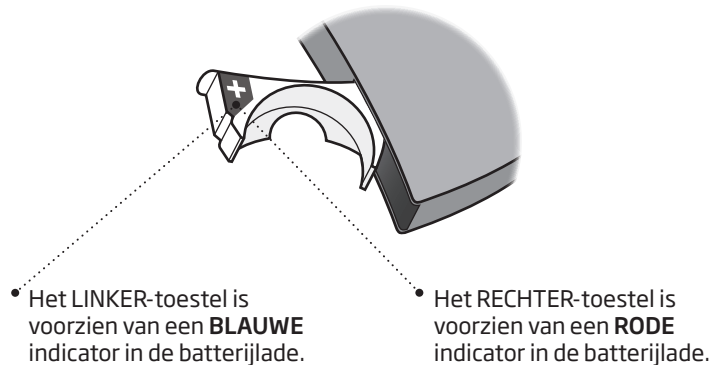


Batterijtype 13

Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Raadpleeg het hoofdstuk "De batterij vervangen" om te zien hoe u dat moet doen.

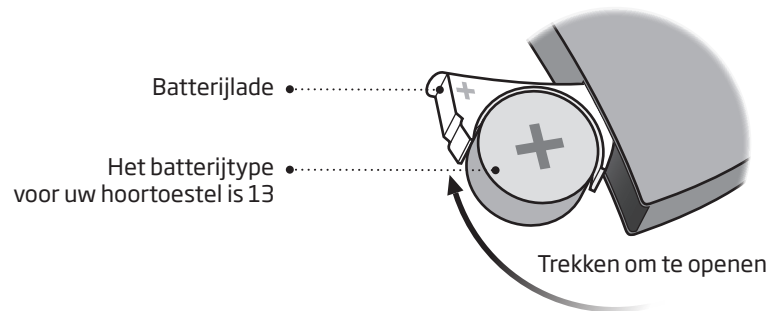


De batterij vervangen

1. Oude batterij verwijderen

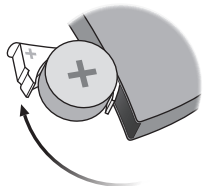


Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.

2. Sticker verwijderen

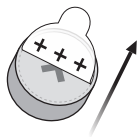


Haal de sticker van de +-zijde van de nieuwe batterij.

3. Nieuwe batterij plaatsen

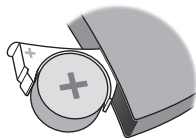


Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.

4. Afsluiten

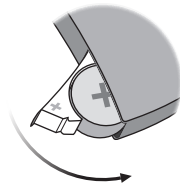

Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af. Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip

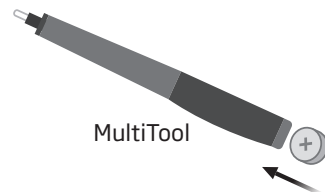

De MultiTool kan gebruikt worden voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.


De MultiTool is verkrijgbaar bij uw gehoorspecialist.

Verzorging van uw hoortoestel

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat u de haren van de borstel niet in de openingen drukt.

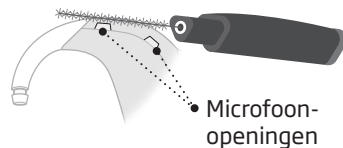


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het toestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

De MultiTool

De MultiTool is voorzien van een borstel en een draadlus om oorsmeer uit de openingen van het oorstukje te verwijderen. De borstel kan worden vervangen en is verkrijgbaar bij uw gehoorspecialist.

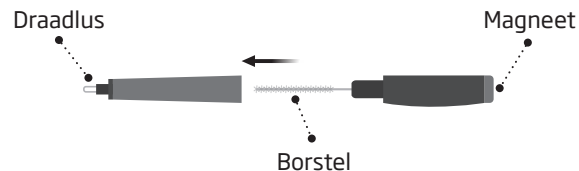


BELANGRIJKE OPMERKING

Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Toonbocht met oorstukje

Het oorstukje is voor u op maat gemaakt en past in uw oor.

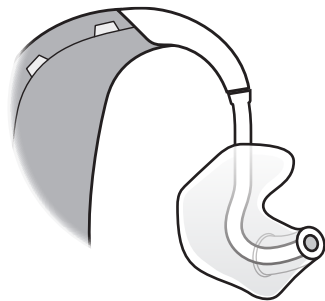


Het hoortoestel met het oorstukje indoen

Stap 1



Trek uw oor voorzichtig iets naar buiten en druk het oorstukje in de gehoorgang, terwijl u het tegelijkertijd licht heen en weer draait.

Stap 2

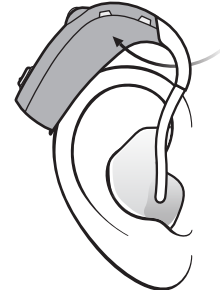

Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Het hoortoestel met het oorstukje en SmartFit™ Trainer indoen

Uw toestel kan voorzien zijn van SmartFit™ Trainer, een controle-hulpmiddel voor het plaatsen van het oorstukje.

De LED-indicatie blijft maximaal 20 seconden aan terwijl het systeem de plaatsing van het oorstukje en de passing controleert. Als het oorstukje NIET correct is geplaatst, zal de LED snel knipperen.


Als de LED snel knippert, zet het hoortoestel dan uit en weer aan en plaats het oorstukje opnieuw.

Het is mogelijk dat het oorstukje niet geplaatst kan worden zonder dat de LED snel gaat knipperen. Dit geeft aan dat het oorstukje mogelijk vervangen moet worden.

Uw gehoorspecialist kan SmartFit™ Trainer in- of uitschakelen.

Het oorstukje schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het oorstukje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.

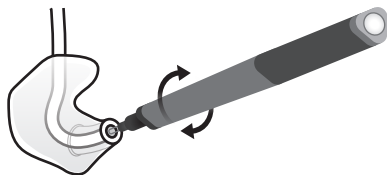

Het slangetje vervangen

Het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel moet worden vervangen als het vergeelt of stug wordt. Neem hiervoor contact op met uw gehoorspecialist.

Het oorstukje wassen

Stap 1




Zorg ervoor dat u weet welk oorstukje bij welk toestel hoort voordat u het oorstukje van het hoortoestel loskoppelt.

Stap 2



Maak het slangetje en het oorstukje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het slangetje lostrekt, om schade aan het hoortoestel te voorkomen.

Stap 3

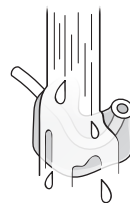

Reinig het oorstukje en het slangetje met een milde zeepoplossing. Spoel het af en maak het goed droog voordat u het weer met het hoortoestel verbindt.

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw gehoorspecialist om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken hebt met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw gehoorspecialist geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.

De microfoon van het hoortoestel dempen (optioneel)

U kunt de dempfunctie gebruiken om de microfoon uit te zetten terwijl u het hoortoestel in hebt. NB: de LED geeft het huidige programma, indien ingeschakeld, aan.




Druk lang op de toets om het toestel te dempen. Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Van programma wisselen (optioneel)



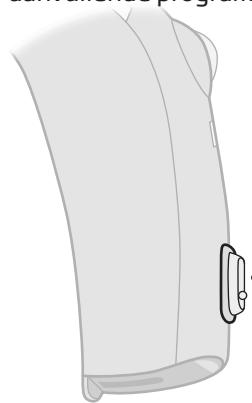

Uw toestel heeft maximaal vier verschillende programma's. Deze worden door uw gehoorspecialist geprogrammeerd. Wanneer u FM, DAI of Streamer gebruikt, worden er automatisch aanvullende programma's toegevoegd.



• Druk kort op de toets om van programma te veranderen

NB: als u twee toestellen gebruikt, schakelt het RECHTER-toestel vooruit van bijv. programma 1 naar 2 en schakelt het LINKER-toestel terug van bijv. programma 4 naar 3.

In te vullen door de audicien

Programma	Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

Van programma wisselen:

LINKS

RECHTS


Kort drukken

Lang drukken

Volume wijzigen

Het volumewiel kan geactiveerd zijn. Met het volumewiel kunt u het volume in specifieke situaties op het voor u meest aangename niveau instellen.

Het volumewiel heeft de markeringen 1, 2, 3 en 4 en een 'klik'-positie:

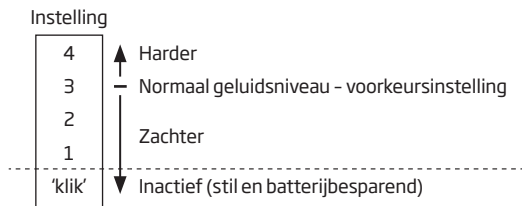

de gebruikelijke instelling van het volumewiel is 3. Bij het aanpassen van het volume naar het normale niveau, hoort u een dubbel piepje.



Gebruik het volumewiel om het geluid te dempen; draai het wiel volledig naar beneden tot u 1 klik hoort. Om uw toestel weer in te schakelen, kunt u het volumewiel weer omhoog draaien.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de inactieve 'klik'-positie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Volumebediening en ConnectLine (optioneel)

Zorg dat de volumebediening van uw toestel ingesteld staat op 1 tot en met 4 om gebruik van de Streamer voor bediening op afstand, telefoongesprekken en het streamen van tv/muziek mogelijk te maken. Streamen kan niet geïnitieerd worden als het volumewiel van uw toestel is ingesteld op de inactieve 'klik'-positie.

Als u de Streamer gebruikt om het luistervolume van het hoortoestel aan te passen, dan komt het volume niet langer overeen met de indicaties op het volumewiel. Draai het volumewiel naar de inactieve 'klik'-positie en terug naar het bereik van 1-4 of zet het toestel uit en weer aan; dit zal het volume resetten naar de instelling die wordt aangegeven op het volumewiel.


De visuele indicatie (LED) knippert en u hoort twee piepjes (indien geactiveerd) wanneer u het ingestelde niveau weer hebt bereikt.

Tijdens het streamen van audio, kunt u het volume aanpassen op de Streamer. De Streamer bedient het volume onafhankelijk van de instelling van het volumewiel.


Snelle reset

U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw gehoorspecialist zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten.

Open

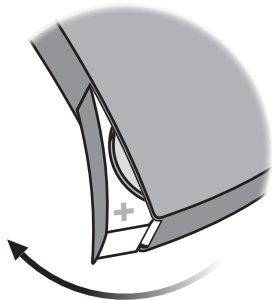

Afsluiten

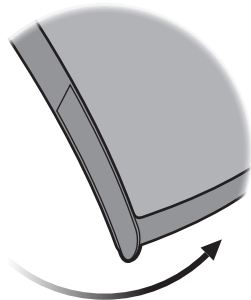

Let op: het ingestelde volume verandert niet met de snelle reset.

Kindveilige batterijlade (optioneel)


Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt. Gebruik een kleine schroevendraaier om de batterijlade te vergrendelen en te ontgrendelen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik geen overmatige kracht om de batterijlade te openen wanneer deze vergrendeld is. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst.


Neem contact op met uw gehoorspecialist als u vermoedt dat de kindveilige vergrendeling is beschadigd of de werking ervan is aangetast.

De batterijlade ontgrendelen

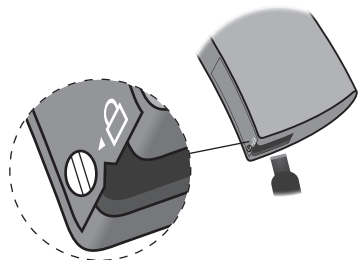

Gebruik de schroevendraaier om de schroef naar de ontgrendelde positie te draaien (verticaal). Plaats de schroevendraaier in de gleuf onderaan het hoortoestel en duw tegen de lade om hem te openen.

De batterijlade vergrendelen

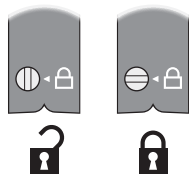

Zorg ervoor dat de lade volledig is gesloten. Draai de schroef naar de vergrendelde positie (horizontaal).

Draadloze accessoires (optioneel)

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar.

ConnectLine

ConnectLine bestaat uit een serie producten waarmee u audiosignalen van tv, vaste en mobiele telefoon, muziekspeler, pc of externe microfoon rechtstreeks en draadloos in uw hoortoestel kunt ontvangen.

Afstandsbediening

Met de Afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen, het volume van uw hoortoestel aanpassen of uw hoortoestel dempen.

□ Direct Audio Input - DAI (optioneel)


DAI zorgt ervoor dat uw hoortoestel signalen kan ontvangen die rechtstreeks afkomstig zijn van externe bronnen, zoals tv, radio, muzikspelers, enz. De DAI-adaptor wordt aan uw hoortoestel bevestigd en via een kabel verbonden met een externe geluidsbron.

Raadpleeg uw gehoorspecialist voor meer informatie over deze mogelijkheden of ga naar www.oticon.nl

BELANGRIJKE OPMERKING


Verbindt hoortoestellen alleen met DAI met elektrische apparaten die voldoen aan EN 60950-1, EN 60065, of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften. De veiligheid van hoortoestellen met DAI wordt bepaald door de externe geluidsbron.

De DAI-adaptor monteren

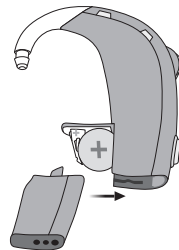

Open de batterijlade en schuif de DAI-adaptor op het toestel.

Plaats het DAI-snoer in de adaptor

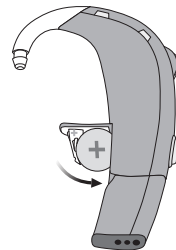


Wanneer de DAI-adaptor is aangesloten, zal het toestel automatisch overschakelen naar een combinatie van een DAI-programma en de microfooningang van het toestel. Wanneer u de microfooningang van het hoortoestel wilt uitschakelen en alleen naar DAI wilt luisteren, kunt u naar het volgende programma gaan met de programmatoets.


FM (optioneel)

Uw toestel ondersteunt het gebruik van een FM-systeem. Via het FM-systeem kunt u spraak of audiosignalen rechtstreeks in uw hoortoestel ontvangen via een speciale zender.

Een FM-ontvanger plaatsen

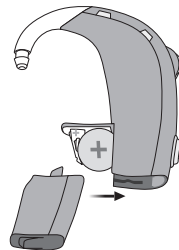

Open de batterijlade. Schuif de FM-ontvanger op het toestel.

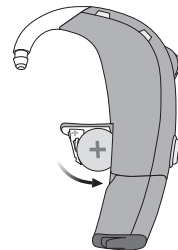

Wanneer de FM-ontvanger is aangesloten en ingeschakeld, schakelt het toestel automatisch naar een programma dat signalen ontvangt van de microfoon in combinatie met een externe draadloze FM-zender.

Overige opties (optioneel)



Luisterspoel

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



AutoPhone

Als uw telefoon een speciale magneet heeft, kan AutoPhone automatisch een telefoonprogramma in het hoortoestel activeren. De magneet moet naast de geluidsuitgang op uw telefoon worden geplaatst.

Overzichtstabel hoorbare en visuele indicaties (LED)

Programma's	Hoorbaar	Visueel (LED)
Programma 1		
Programma 2		
Programma 3		
Programma 4		
FM of DAI + microfoon		
FM of DAI		

Volume	Hoorbaar	Visueel (LED)
Gewenst volume		
Maximum volume		
Minimum volume		

Waarschuwingen	Hoorbaar	Visueel (LED)
Waarschuwing batterij bijna leeg		
Batterij leeg		

SmartFit™ Trainer	Hoorbaar	Visueel (LED)
Correct geplaatst		
Oorstukje opnieuw plaatsen		

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

NB: uw hoortoestellen herstellen het normale gehoor niet. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Het is belangrijk om te weten dat in de meeste gevallen onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt zal opleveren.

Raadpleeg uw gehoorspecialist indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Gebruik van een hoortoestel

- Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de gehoorspecialist. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen

- Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

- Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.
- Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
- Kinderen die jonger zijn dan 36 maanden moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar voor AHO-, miniAHO-, LIHO- en miniLIHO-toestellen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts indien een batterij of hoortoestel wordt ingeslikt.

Batterijgebruik

- Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw gehoorspecialist. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Waarschuwingen

Slechte werking

- Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegval- len, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

- Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabri-

kanten van implanteerbare defibril- lators en pacemakers te volgen.

- Uw hoortoestel heeft een draadloze transmissie. Houd het hoortoestel meer dan 15 cm verwijderd van het implantaat en draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.
- Als de hoortoestellen op of in de oren zijn geplaatst, is de afstand tussen de hoortoestellen en het implantaat groter dan 15 cm.
- Uw AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient meer dan 30 cm van het implan- taat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

- Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Explosieven

- De batterij van uw hoortoestel heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. Het hoortoe- stel is niet getest op naleving van de internationale normen met betrek- king tot explosieve omgevingen. Het is aan te bevelen uw hoortoestel niet te gebruiken op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET- scans en elektrotherapie

- Verwijder uw hoortoestel tijdens het maken van bijvoorbeeld een röntgenfoto, CT-, MRI- en PET-scan, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Waarschuwingen

Hitte en chemicaliën vermijden

- Stel uw toestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.
- Uw hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.
- Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw toestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om ze te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer in doet.

Power-toestel

- Dit is een power-toestel en bij het kiezen, aanpassen en gebruiken van een hoortoestel met een maximum geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere aandacht nodig omdat er een risico bestaat van aantasting van uw restgehoor.

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van hoortoestellen, oorstukjes of tips kan een versnelde ophoping van oorsmeer optreden.
- De anti-allergene materialen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere ongebruikelijke aandoeningen veroorzaken.

Raadpleeg uw (KNO-)arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Storing

- Uw toestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen uw hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur en alarmsystemen in winkels). Probeer in dat geval de afstand tussen het toestel en de storende apparatuur te vergroten.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopt slangetje of verstopt oorstukje	Reinig het oorstukje
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Reinig het oorstukje
	Vocht	Veeg de batterij en/of het slangetje droog met een droge doek
	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopt dempingsfilter in toonbocht	Neem contact op met uw gehoorspecialist voor hulp
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje (mould) opnieuw
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw gehoorspecialist voor hulp.

Waterbestendige nanocoating (IP58)

Uw hoortoestel is waterbestendig, wat betekent dat het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of dat u nat raakt door regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Omstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opslag- en transport-omstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: _____

Gehoorspecialist: _____

Adres gehoorspecialist: _____

Telefoon gehoorspecialist: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Batterijtype: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande

garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen.

Uw gehoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw gehoorspecialist voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig hebt

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw gehoorspecialist gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Mobiele telefoon

Sommige slechthorenden hebben gemeld dat ze bij gebruik van hun mobiele telefoon een brommend geluid in hun toestel hoorden, hetgeen erop kan wijzen dat de mobiele telefoon en het toestel niet compatibel zijn.

Volgens de ANSI C63.19-norm kan de compatibiliteit tussen een bepaald hoortoestel en een mobiele telefoon voorspeld worden door de afschermingswaarde van het hoortoestel op te tellen bij de emissiewaarde van de mobiele telefoon. Een som van 4 geeft aan dat de combinatie van het draadloze apparaat en het hoortoestel bruikbaar is; een gecombineerde kwalificatie van tenminste 5 biedt 'normaal gebruik'; een gecombineerde

kwalificatie van 6 of meer levert een 'uitstekende prestatie'.

Terwijl alle hoortoestellen akoestische koppeling hebben, hebben alleen de grotere toestellen de fysieke ruimte voor luisterspoel (inductieve) koppeling. Deze twee soorten koppeling hebben verschillende waarderingschalen (M1-M4 voor akoestische koppeling en T1-T4 voor luisterspoel koppeling respectievelijk) en beide kwalificaties zijn daarom relevant bij het voorspellen van de compatibiliteit van een bepaald hoortoestel.

Voor een hoortoestel met zowel akoestische koppeling als luisterspoel koppeling met een kwalificatie van M4/

T2 en met een telefoonkwalificatie van M3/T3), is de gecombineerde kwalificatie 7 (M4 + M3) voor de akoestische koppeling en 5 (T2 + T3) voor de luisterspoel koppeling. Volgens de hierboven vermelde richtlijnen zijn beide soorten koppeling acceptabel, waarbij de akoestische koppeling 'uitstekende prestatie' biedt en de luisterspoel koppeling 'normaal gebruik'.

De metingen, categorieën en systeemkwalificaties van de prestaties van de toestellen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie, maar geven geen garantie voor tevredenheid van elke slechthorende.

De afschermingswaarde van dit hoortoestel is minimaal M4/T4.

BELANGRIJKE OPMERKING

De prestaties van individuele hoortoestellen kunnen per mobiele telefoon variëren. Probeer dit hoortoestel daarom uit met de mobiele telefoon die u momenteel gebruikt en doe hetzelfde bij aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon.

Vraag voor meer informatie uw gsm-provider naar het boekje 'Compatibiliteit van hoortoestellen met digitale draadloze mobiele telefoons.', of in het Engels: 'Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Cell Phones.'

Technische informatie

Het toestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB μ A/m @ 10 m.

Het emissievermogen van het radio-systeem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van het toestel is lager dan de onbedoelde elektromagnetische straling van bijvoorbeeld halogeenlampen, computerschermen, afwasmachines, enzovoorts. Het toestel voldoet aan de internationale standaard betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Meer informatie is te vinden in de Productinformatie op Oticon.nl.

De hooroplossing bevat een module met:

FCC ID: U28FU2SP
IC: 1350B-FU2SP

Het hoortoestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Meer informatie: www.oticon.nl

Hierbij verklaart Oticon A/S dat dit toestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.nl

CE 0543 0682



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



E2831

IP58


161873NL / 10.15


Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumewiel	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempfunctie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Vervang de batterij	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Oorstukje opnieuw inbrengen	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit


161873NL / 10.15

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively

 [youtube.com/OticonPeopleFirst](https://www.youtube.com/OticonPeopleFirst)

 [facebook.com/OticonNL](https://www.facebook.com/OticonNL)

 [facebook.com/OticonPeopleFirst](https://www.facebook.com/OticonPeopleFirst)



0000161873000001

oticon
PEOPLE FIRST