

Ervaren gebruikers

Oticon ♦ Tego

**Wat kunt u van Tego
verwachten?**



oticon
PEOPLE FIRST

Ontmoet uw nieuwe persoonlijke assistent!

Nu u over bent gestapt op de Tego zult u zich wellicht afvragen wat u kunt verwachten.

En dat is nogal wat! U heeft samen met uw audicien een hoortoestel uitgezocht dat zich permanent aan uw persoonlijke wensen aanpast. Dit gebeurt met een niet te evenaren precisie, dankzij de unieke ingebouwde 'DecisionMaker', een slim, nieuw systeem, dat gebaseerd is op Artificiële Intelligentie.

Zeg slechte geluidskwaliteit vaarwel

Tego wordt een soort persoonlijke assistent. Het toestel is zó slim ontworpen dat u het, om aanzienlijk beter te horen, alleen maar 's ochtends in het oor hoeft te doen en er 's avonds weer uit moet halen. Verder doet u het toestel alleen uit als de Tego aangeeft dat de batterij moet worden verwisseld.

Lees verder voor meer informatie over de ongeëvenaarde eigenschappen.



Begroet legio nieuwe voordelen

De 'DecisionMaker' combineert voortdurend verschillende geluidsbewerkingssystemen, waardoor het toestel volledig 'hands free' werkt. De geluidskwaliteit is permanent helder en comfortabel. Hieronder leest u wat meer over de werking.

De spraak horen...


Tego heeft een nieuw richtinggevoelig systeem dat op een slimme manier bepaalt wat u nodig heeft om goed te horen. Of het nu gaat om een stem vóór, of juist achter u, de Tego bepaalt de juiste richting en de optimale instelling. Als er geen specifieke spreker is, zorgt de Tego voor een aangenaam contact met uw omgeving. Het richtinggevoelige systeem richt zich op stemmen en zorgt tegelijkertijd voor het ruimtelijke en natuurlijke behoud van het algemene geluidsbeeld.

...niet het lawaai

Geluiden van auto's en vaatwassers kunnen erg afleiden wanneer u een gesprek wilt voeren. Door de permanente samenwerking van het lawaai-reductiesysteem en het richtinggevoelige systeem wordt ongewenst geluid van twee kanten aangepakt. De Tego benadrukt de spraak die u wilt horen en zorgt daarnaast voor een zeer comfortabele luisterervaring.

Geen last meer van fluiten

Wanneer een hoortoestel rondfluit (ook wel feedback genoemd) is dat zeer irritant. Dit fluiten is niet alleen onprettig omdat het hard klinkt, maar ook omdat het zich voordoet op onmogelijke momenten. De Tego pakt feedback efficiënt aan: nog voordat het zich voordoet en hoorbaar is, wordt het gevonden en geëlimineerd. Fluiten behoort hierdoor tot het verleden.

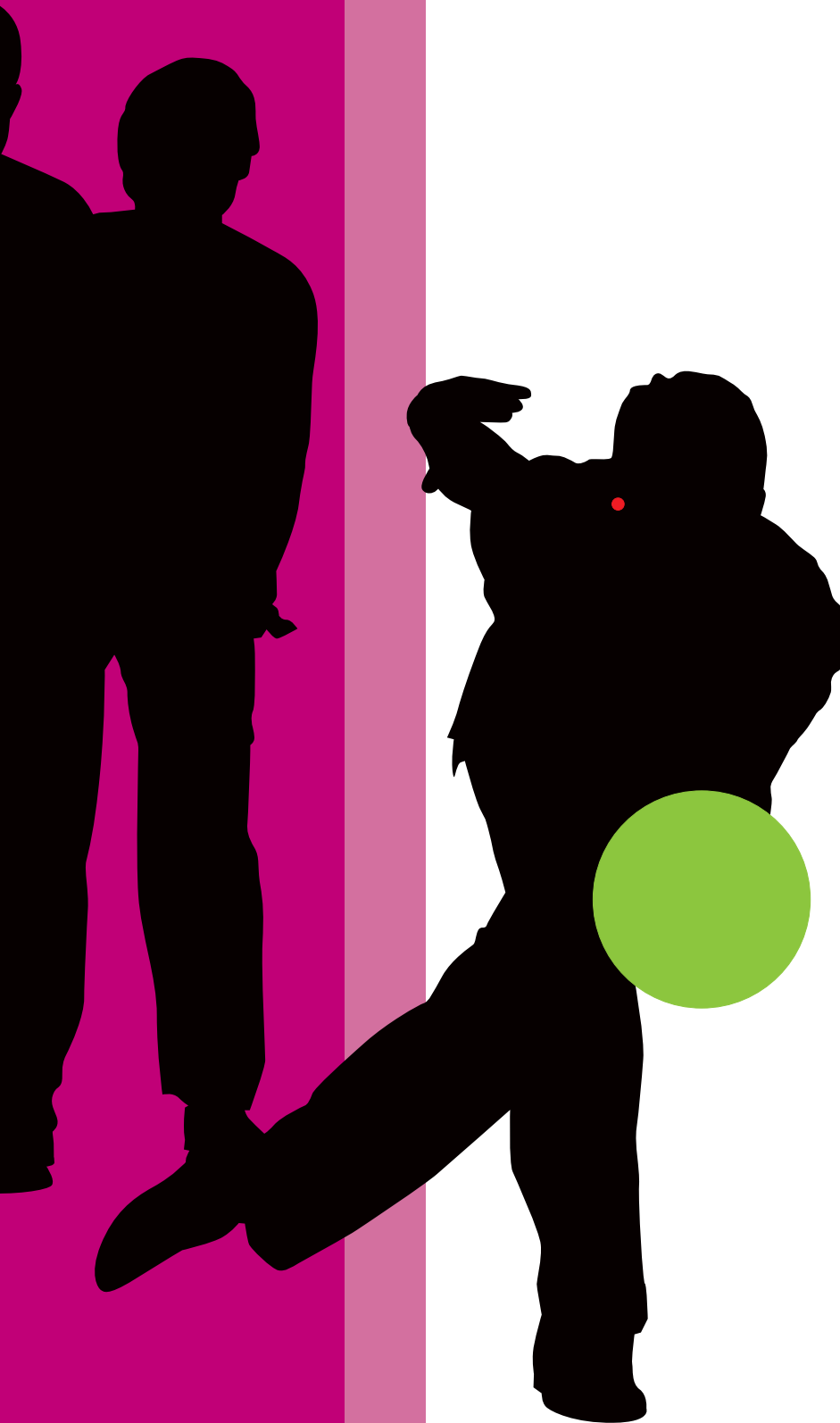

Persoonlijke begeleiding

We controleren of uw hoortoestel comfortabel is aangepast en of de prestaties overeenkomen met uw persoonlijke hoorprofiel en uw levensstijl.

Wanneer u terugkomt voor controle bekijken we wat u van uw hoortoestel vindt. We bespreken uw indrukken en controleren hoe goed u met het toestel om kunt gaan. Zonodig kunnen we de Tego eenvoudig nog wat verder fijnafstellen, of, als u dat wenst, wijzigingen aanbrengen in de geluidskwaliteit.

Succes met uw persoonlijke assistent

Door over te stappen op Tego heeft u de eerste stap gezet en zult u het verschil al binnen enkele dagen opmerken. En dat geldt ook voor uw vrienden en familie: ze zullen u met de dag zekerder, actiever en energiever zien worden.



People first



Wij denken dat er meer dan audiologie en technologie nodig is om de beste hoortoestellen te maken. Daarom stellen we de individuele behoeften en wensen van slechthorenden voorop bij de ontwikkeling van nieuwe hooroplossingen.

www.tego.oticon.com
www.hear-it.org

oticon
PEOPLE FIRST