

BRUKSANVISNING

BTE13 PP



Innledning til dette heftet

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder ditt nye høreapparat. Les gjennom heftet nøye, også delen **Advarsel**. Dette hjelper deg til å få mest mulig nytte av det nye høreapparatet ditt.

Din audiograf har programmert høreapparatet slik at det passer til dine behov. Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt med din audiograf.

| **Om** | Oppstart | Håndtering | Alternativer | Advarsler | Ekstra |

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

På enkelte sider, finner du en kobling til Oticon sin nettside. Skriv koblingen inn i nettleseren din for informasjon og instruksjonsvideoer.

Tiltenkt bruk

Høreapparatet skal forsterke og overføre lyd til øret, og dermed kompensere for hørselstap. Dette elektriske høreapparatet er tiltenkt både voksne og barn (> 36 måneder) med moderat-til-betydelig og betydelig-til-alvorlig hørselstap.

VIKTIG

Forsterkningen i høreapparatet er spesielt justert og optimalisert for hørselen din etter innstillinger fra din audiograf.

Innholdsfortegnelse

Om	Identifiser modell og ørepropp til høreapparatet ditt	6
	Lydhook og ørepropp	8
	Tynnslange (Corda miniFit)	10
	Identifisere venstre og høyre apparat	12
	Batteri (størrelse 13)	13
Oppstart	Slå høreapparatet av og på	14
	Når det er på tide å skifte ut batteriet	15
	Hvordan skifte batteri	16
Håndtering	Stell av høreapparatet ditt	18
	Hook med ørepropp	20
	Sett på apparatet med ørepropp	21
	Rense øreproppen	22
	Vaske øreproppen	23
	Tynnslange (Corda miniFit)	24
	Sett på apparatet med tynnslange	25
	Rengjør tynnslangen	26


	Tynnslange med dome	28
	Skifte ut domen	29
	Tynnslange med mikropropp	30
	Rengjøre mikroproppen	31
Alternativer	Valgfrie funksjoner og tilbehør	32
	Mute høreapparatet (valgfritt)	33
	Endre volum (valgfritt)	34
	Endre program (valgfritt)	36
	Andre alternativer (valgfritt)	38
	Trådløst tilbehør (valgfritt)	40
	Barnesikret batteriskuff (valgfritt)	42
Advarsler	Advarsler	44
Diverse	Feilsøkingssguide	50
	Vannavstøtende (IP58)	52
	Forhold	53
	Garantisertifikat	54
	Internasjonal garanti	55
	Mobiltelefon	56
	Teknisk informasjon	58

Identifiser modell og ørepropp til høreapparatet ditt

Det finnes to ulike versjoner og flere ulike ørepropper som klassifiserer modellen til høreapparatet ditt.


Vennligst indentifiser din versjon og propp. Dette gjør det lettere for deg å navigere gjennom heftet.

- ☐ **Lydhook og ørepropp**
Et apparat med hook har en propp som øreplugg.

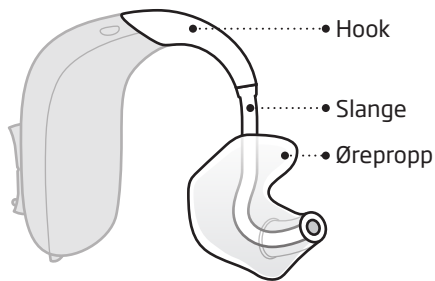


- ☐ **Tynnslange (Corda miniFit)**

Et apparat med tynnslange har én av følgende ørepropper: dome eller mikropropp.

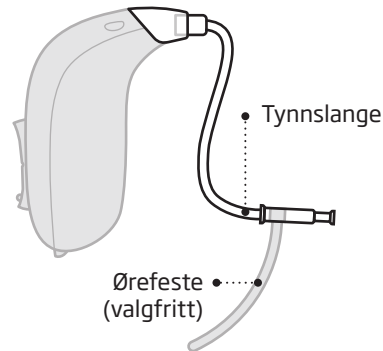


Lydhook og ørepropp

Hva den er

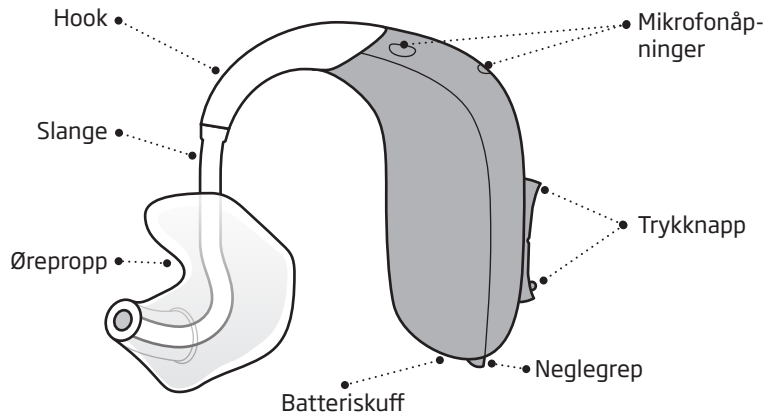


Hva den gjør

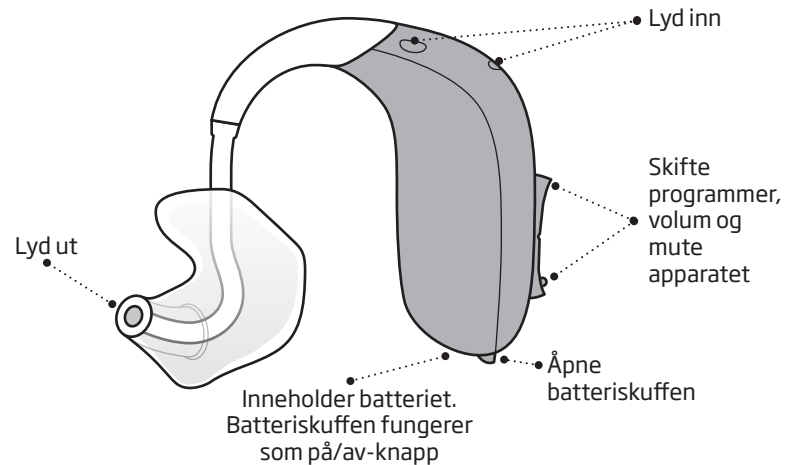


Tynnslange (Corda miniFit)

Hva den er

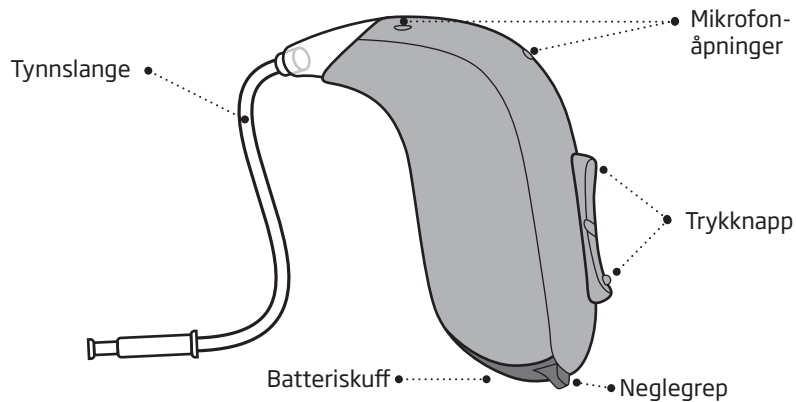


Hva den gjør

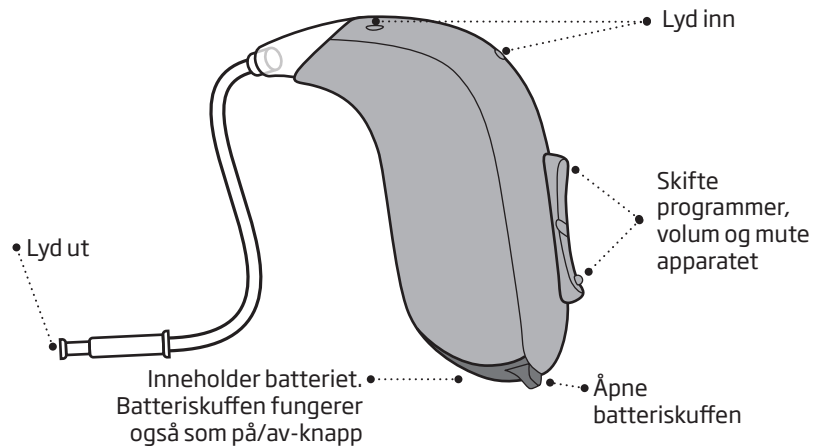


Identifisere venstre og høyre apparat

Det er viktig å skille mellom venstre og høyre apparat, da de kan være ulikt programmert.

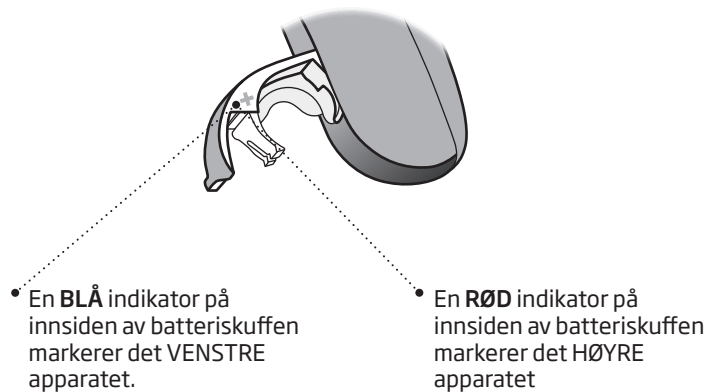

Batteri (størrelse 13)

Høreapparatet er et lite elektronisk apparat som bruker spesielle batterier. For å aktivere apparatet, må du først sette inn et nytt batteri i batteriskuffen. Se delen «Skifte batteriet».

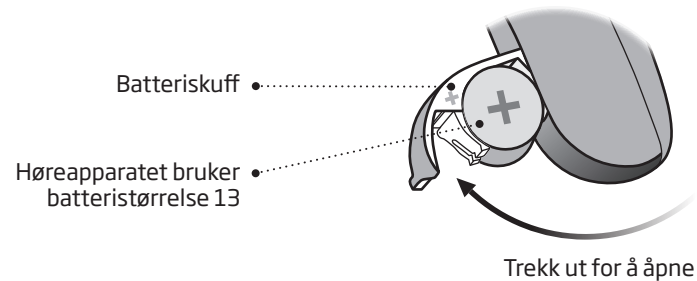


Slå høreapparatet av og på

Batteriskuffen brukes også til å slå høreapparatet på og av. For å bevare batteriet lengst mulig bør du slå av høreapparatet når du ikke bruker det.


Slå PÅ

Lukk batteriskuffen med batteriet på plass.

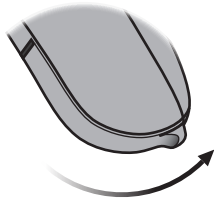

Slå AV

Åpne batteriskuffen

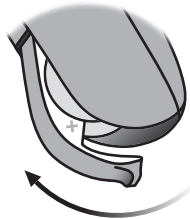

Når det er på tide å skifte ut batteriet

Når det er på tide å skifte ut batteriet, høres to pip som gjentas i moderate intervaller til batteriet blir tomt.



To pip
= Batterinivå lavt




Fire pip
= Batteriet er tomt

Tips til vedlikehold av batteri

For å påse at høreapparatet alltid fungerer er det lurt å ta med reservebatterier, eller skifte batteri før du går hjemmefra.


Hvordan skifte batteri

1. Fjern

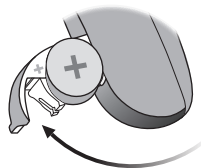


Åpne batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

2. Ta av

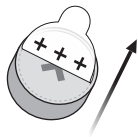

Fjern den påklippede etiketten fra + siden av det nye batteriet.

3. Sett inn

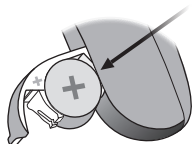

Sett inn det nye batteriet i batteriskuffen. Sett det inn ovenfra, IKKE fra siden. Påse at +-siden er vendt oppover.

4. Lukk



Lukk batteriskuffen. Apparatet spiller en melodi gjennom øreproppen.

Hold proppen nærme øret ditt for å høre melodien.

Tupp



Multiverktøyet kan brukes for å skifte batteri. Bruk den magnetiske enden for å fjerne og sette inn batterier.


Multiverktøyet får du av din audiograf.

Stell av høreapparatet ditt

Når du steller høreapparatet bør du holde det over en myk overflate for å unngå skade om du skulle miste det.

Rengjøring av mikrofonåpninger

Børst forsiktig vekk synlige tegn på skitt fra åpningene. Børst lett av overflaten. Påse at børsten ikke trykkes inn i åpningene.

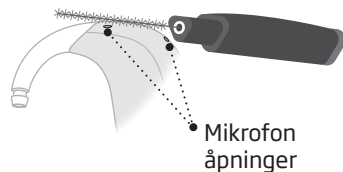


VIKTIG

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre apparatet. Selve høreapparatet må aldri vaskes eller senkes ned i vann eller andre væsker.

Multiverktøyet

Multiverktøyet inneholder en børste og en ledningsløkke som er spesielt laget til å rense ørevoks fra øreproppen. Børsten kan skiftes ut og kjøpes hos audiograf.

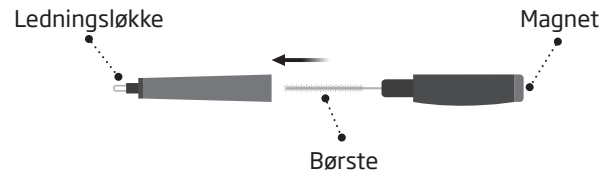

VIKTIG

Multiverktøyet har en innebygd magnet. Hold multiverktøyet minst 30 cm unna kredittkort eller annet magnetisk følsomt utstyr.

Hook med ørepropp

Les følgende sider hvis du har et høreapparat med hook og ørepropp.

Proppen er spesiallaget til deg og passer i øret ditt.




Sett på apparatet med ørepropp

Trinn 1



Trekk forsiktig i øret, trykk øreproppen i retning av øregangen og vri det litt.


Trinn 2

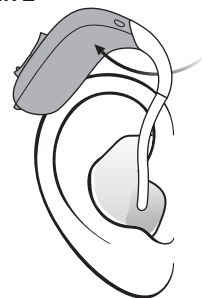

Plasser høreapparatet bak øret.

Rense øreproppen

Øreproppen må rengjøres jevnlig. Bruk en myk klut til å tørke av overflaten på øreproppen. Bruk Multiverktøyets ledningsløkke til å rengjøre åpningen med.

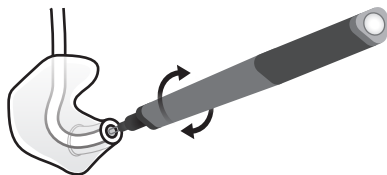

Bytte slange

Slangen mellom øreproppen og apparatet må skiftes når den blir gul eller stiv. Ta kontakt med audiografen din om dette.

Vaske øreproppen

Trinn 1




Vær sikker på at du kan kjenne igjen hvilken ørepropp som tilhører hvilket apparat før du kobler proppen fra apparatet.

Trinn 2



Koble slangen og øreproppen fra hooken. Hold godt i hooken når du drar av slangen. Hvis ikke kan apparatet bli ødelagt.

Trinn 3

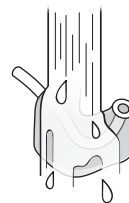


Vask øreproppen og slangen med mild såpe. Rengjør og tørk helt før du kobler til høreapparatet igjen.

Tynnslange (Corda miniFit)

Les følgende sider hvis apparatet ditt har en tynnslange (Corda miniFit) med enten en dome eller mikropropp som ørepropp.

Corda miniFit er en tynnslange som fører lyd inn i øret ditt. Tynnslangen bør alltid brukes med en propp festet på den. Bruk kun deler som er laget for ditt høreapparat.

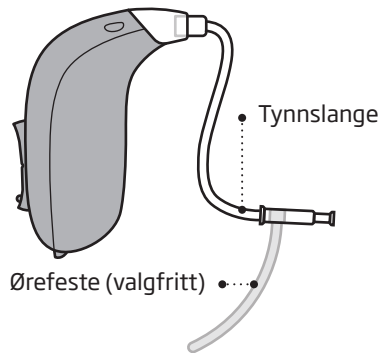


Sett på apparatet med tynnslange

Trinn 1



Plasser høreapparatet bak øret.

Trinn 2

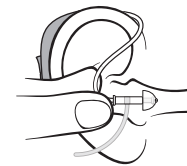

Hold bøyen på slangen mellom tommel og pekefinger. Proppen skal peke mot åpningen til øregangen.

Trinn 3




Skyv proppen inn i øregangen til tynnslangen ligger inntil siden på hodet ditt.

Rengjør tynnslangen


Tynnslangen bør rengjøres for å holde den fri for fuktighet og voks. Hvis den ikke rengjøres, kan den bli blokkert med voks, noe som fører til at ingen lyd kommer ut.

Trinn 1

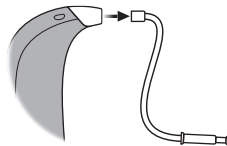


Trekk tynnslangen ut av høreapparatet

Trinn 2

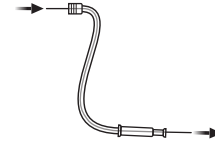

Trykk rengjøringsverktøyet hele veien gjennom tynnslangen.

Trinn 3

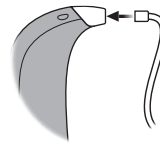

Koble tynnslangen sammen med høreapparatet igjen.

Tynnslange med dome

Det finnes tre ulike type domer. Domene er laget av et medisinsk godkjent materiale.

Hvis du har en dome, kan du sjekke type og størrelse nedenfor.




Bassdome,
enkelventil



Bassdome,
dobbelventil



Power-dome

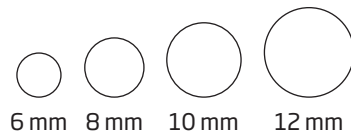


VIKTIG

Hvis domen ikke er på slangen når den fjernes fra øret, kan den fortsatt være i øregangen. Kontakt audiografen for ytterligere instruksjoner.

Skifte ut domen


Domen skal ikke renses. Når domen er mer eller mindre fylt med voks, erstatter du den med en ny (vanligvis ukentlig).

Trinn 1

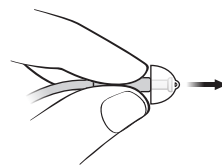


Hold på tuppen av tynnslangen og dra av domen.

Trinn 2

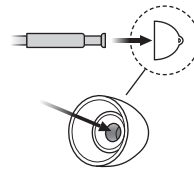

Plasser tynnslangen nøyaktig i midten av domen.

Trinn 3

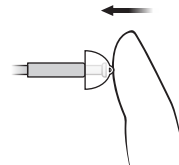

Trykk godt for å påse at den er godt festet.

Tynnslange med mikropropp

Les følgende sider hvis du har en mikropropp.
Mikroproppen er tilpasset din øreform.




Rengjøre mikroproppen

Proppen bør rengjøres jevnlig.

Voksfilteret i proppen bør erstattes når det er tett eller når høreapparatet ikke fungerer som normalt.

Bruk kun voksfiltrene som du har fått av audiografen din.

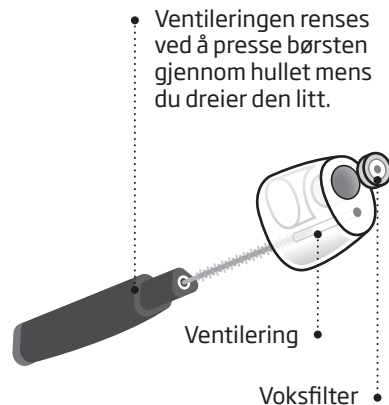

Valgfrie funksjoner og tilbehør


Funksjonene og tilbehørene beskrevet på følgende sider er valgfrie. Ta kontakt med audiografen din for å finne ut hvordan høreapparatet ditt er programmert.

Hvis du opplever vanskelige lyttesituasjoner, kan et spesialprogram være behjelpelig. Dette programmeres av din audiograf.

Skriv ned lyttesituasjoner der du kanskje trenger hjelp.

☐ Mute høreapparatet (valgfritt)

Bruk mute-funksjonen hvis du vil koble ut lyden i høreapparatet mens du har det på.

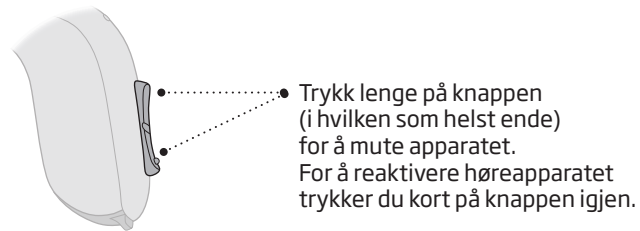


VIKTIG

Ikke bruk mute-funksjonen som en av-bryter, ettersom høreapparatet fremdeles bruker strøm fra batteriet i denne modusen.

☐ **Endre volum** (valgfritt)

Trykknappen lar deg justere volumet.

Du hører et klikk når du øker eller reduserer volumet.

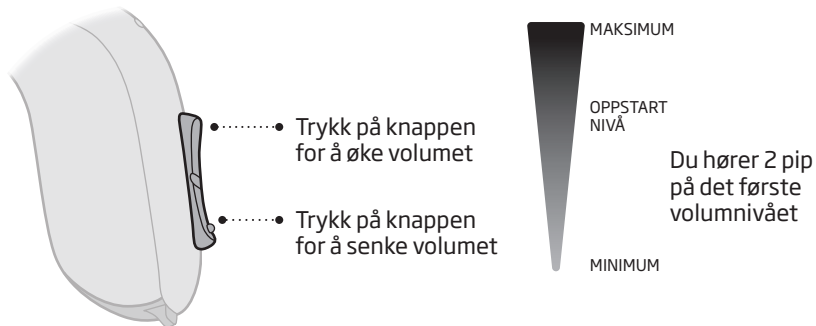


Fylles ut av audiograf

Endre volum	☐ VENSTRE	☐ HØYRE	☐ Kort trykk
-------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------


Rask tilbakestilling

Dersom du ønsker å gå tilbake til standardinnstillingene som ble programmert av din audiografen, er det bare å åpne og lukke batteriskuffen.

Åpne

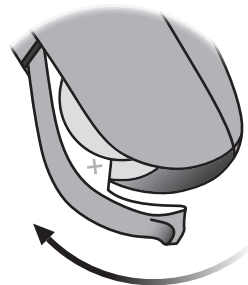

Lukk

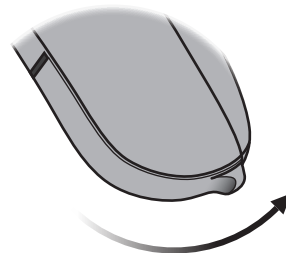

☐ Endre program (valgfritt)

Ditt høreapparat kan ha opptil fire forskjellige programmer. Dette programmeres av din audiograf.



Trykk opp eller ned mellom programmer

Vær oppmerksom på at du kan endre mellom program fortløpende - både opp og ned i programrekken. Hvis du f.eks. vil gå fra program 1 til 4, kan du trykke på ned-knappen én gang i stedet for å trykke på opp-knappen 3 ganger.

Fylles ut av audiograf

Program	Lyden du hører når det er aktivert	Når skal den brukes
1	 «1 pip»	
2	 «2 pip»	
3	 «3 pip»	
4	 «4 pip»	

Skifte program:

☐ VENSTRE

☐ HØYRE

☐ Kort trykk

☐ Langt trykk

☐ Andre alternativer (valgfritt)



Telespole

Telespole hjelper deg med å høre bedre når du har en telefon med innebygd slynge eller når du er i bygninger med teleslyngesystemer, slik som teatre, kirker eller undervisningsrom. Dette symbolet eller et lignende tegn vises der en teleslynge er installert.



Autophone

Hvis telefonen din har en dedikert BTE13 PP-magnet, kan Autophone aktivere et telefonprogram i høreapparatet automatisk. Ikke bruk noen annen magnet. Magneten må plasseres på telefonen din.

Direkte audioingang (DAI)

DAI lar høreapparatet ditt motta signaler direkte fra eksterne kilder, slik som TV, radio, musikkavspillere osv. DAI-adapteren installeres på apparatet ditt og kobles til en ekstern lydkilde via en kabel.

For nærmere opplysninger om disse alternativene, spør audiografen din eller besøk **www.oticon.no**

VIKTIG

Koble DAI-enheter kun til elektriske apparater som er i samsvar med EN 60950-1, EN 60065 eller tilsvarende standarder. Den eksterne signalkilden avgjør sikkerheten ved å bruke høreapparater med DAI.

☐ **Trådløst tilbehør** (valgfritt)

En rekke apparater kan tilkobles det trådløse høreapparatet ditt som en utvidelse av bruksområdet.

ConnectLine

ConnectLine er en produktserie som lar deg motta lydsignaler fra TV-er, telefoner, musikkspillere, datamaskiner eller en ekstern mikrofon trådløst gjennom høreapparatet ditt.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen tilbyr en mulighet til å endre program, justere volumet eller mute høreapparatet ditt.

FM

Høreapparatet ditt kan tilkobles et FM-system. FM-systemet lar deg motta tale- eller lydsignaler uten bakgrunnsstøy direkte i høreapparatet fra en dedikert sender.

For nærmere opplysninger om trådløst tilbehør, spør audiografen din eller besøk **www.oticon.no**.

☐ **Barnesikret batteriskuff** (valgfritt)

For å holde batteriene utenfor rekkevidde av små barn og personer med lærevansker, anbefales det på det sterkeste å bruke en barnesikker batteriskuff.

VIKTIG

Unngå for stor kraft når du åpner batteriskuffen når den er i låst posisjon. Ikke tving batteriskuffen lenger opp enn til åpen posisjon. Kontroller at batteriet er satt inn riktig.


Ta kontakt med audiografen din hvis du mistenker at barnesikringen og låsefunksjonen er skadet.

Åpne batteriskuffen




Forsikre deg om at batteriskuffen er helt lukket.

Verktøy for å åpne batteriskuffen

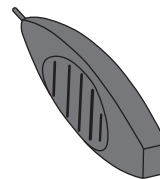

Bruk det lille verktøyet for å åpne batteriskuffen.

Lås opp batteriskuffen

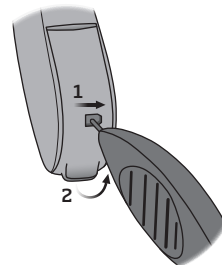

Stikk tuppen inn i det lille hullet på baksiden av batteriskuffen.

1. Flytt det til høyre, og hold det der
2. Åpne batteriskuffen

Advarsler

Du bør for personlig sikkerhet og korrekt bruk bli fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker høreapparatet.

Merk at et høreapparat ikke vil gi tilbake normal hørsel, og det vil ikke forhindre eller forbedre hørselsproblemer som er forårsaket av organiske forhold. Merk også at i de fleste tilfeller, vil ujevn bruk av et høreapparat gjøre at brukeren ikke vil ha full nytte av det.

Ta kontakt med din audiograf dersom du opplever at høreapparatet oppfører seg uvant eller annerledes.

Bruk av høreapparater

- Høreapparater skal alltid brukes i henhold til bruksanvisningen og alltid justeres av en audiograf. Feilaktig bruk kan resultere i plutselig og permanent hørselstap.
- La aldri andre bruke høreapparatet ditt. Feil bruk kan forårsake permanent hørselskade for dem.

Fare for kvelning og svelging av batterier

- Høreapparatet, dets deler og batterier er ikke leketøy og må holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre som kan kunne tenkes å svelge dette, eller på annen måte skade seg selv.

- Batterier har av og til blitt tatt for å være tabletter. Kontroller derfor medisinen din nøye før du svelger noen piller.
- De fleste apparater kan leveres med barnesikret batteriskuff ved forespørsel. Dette anbefales på det sterkeste for babyer, små barn og mennesker med lærevansker.
- Barn under 36 måneder må alltid bruke en barnesikret batteriskuff. Dette alternativet er tilgjengelig i høreapparatene BTE, miniBTE, RITE og miniRITE.

Hvis et batteri eller høreapparat svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig.

Batteribruk

- Bruk alltid batteri som er anbefalt av audiografen. Batterier med dårlig kvalitet kan lekke og forårsake skade på høreapparatet.
- Prøv aldri å lade opp eller brenne batteriene. Det er risiko for at batteriene kan eksplodere.

Advarsler

Feilfunksjon

- Vær oppmerksom på muligheten for at høreapparatet ditt kan slutte å fungere uten forvarsel. Tenk på dette når du er avhengig av varsellyder (f.eks. når du er i trafikken). Høreapparatet kan slutte å virke, f.eks. hvis batteriet er flatt eller at fukt og ørevoks tetter igjen slangene.

Aktive implantater

- Det må utvises forsiktighet med aktive implantater. Et generelt råd er å følge retningslinjene som anbefales av produsentene til implanterbare defibrillatorer og pacemakere når det gjelder bruk sammen med mobiltelefoner og magneter.

- Høreapparatet ditt har trådløs overføring. Hold høreapparatet mer enn 15 cm unna implantatet, f.eks. ikke ha det i en brystlomme.
- Når høreapparatene er montert på eller i ørene, er avstanden mellom høreapparatene og implantatet lengre enn 15 cm.
- Autophone-magneten og multiverktøyet ditt (som har en innebygd magnet) bør være mer enn 30 cm unna implantatet. F.eks. ikke ha det i en brystlomme.

- Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, ta kontakt med produsenten av den implanterbare enheten for å få informasjon om risikoen for forstyrrelser.

Eksplosiver

- Strømkilden i høreapparatet ditt har ikke tilstrekkelig energi til å forårsake brann ved normal bruk. Høreapparatet har ikke blitt testet for samsvar med internasjonale standarder når det gjelder eksplosive atmosfærer. Det anbefales ikke å bruke høreapparatet i områder der det er fare for eksplosjoner.

Røntgen, CT, MR, PET-skanning og elektroterapi

- Ta ut høreapparatet ved bruk av for eksempel røntgen, CT/MR/PET-skanninger eller ved operasjoner, siden høreapparatene kan skades når de utsettes for sterke felt.

Advarsler

Unngå varme og kjemikalier

- Høreapparatet må aldri utsettes for sterk varme, f.eks. etterlates inne i en bil som står parkert i solen.
- Høreapparatet må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller i andre ovner.
- Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade høreapparatet ditt. Fjern alltid høreapparatet før du bruker slike produkter. La produktet tørke før du setter høreapparatet på plass igjen.

Power-apparat

- Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater som har et maksimalt lydtrykk som overstiger 132 dB SPL (IEC 711). Det er risiko for å skade den resterende hørselen til brukeren av høreapparatet.

Mulige bivirkninger

- Høreapparater, ørepropper og domer kan forårsake en økt dannelse av ørevoks.
- De ellers ikke-allergifremmende materialene som brukes i høreapparater kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre uvanlige tilstander.

Oppsøk lege hvis disse tilstandene oppstår.

Interferens

- Høreapparatet ditt er blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Det kan imidlertid oppstå interferens mellom høreapparatet ditt og andre apparater, (f.eks. med enkelte mobiltelefoner, amatørradiobånd- og alarmsystemer i butikker). Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom dine høreapparater og enheten som skaper interferens.

Feilsøkingssguide

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ingen lyd	Utgått batteri	Skift batteriet
	Tett slange eller ørepropper (propp, mikropropp eller dome)	Rengjør øreproppen
		Rengjør Corda miniFit (tynnslange), skift ut domen eller skift ut voksfilteret
Periodevis eller redusert lyd	Tett lydutgang	Rengjør øreproppen
		Rengjør Corda miniFit (tynnslange), skift ut domen eller skift ut voksfilteret
	Fuktighet	Tørk over batteriet med en tørr klut og/eller tørk slangen
	Utgått batteri	Skift batteriet
	Tett dempefilter i lydhooken	Kontakt din audiograf eller ØNH-lege for hjelp
Hyling/piping	Proppen til høreapparatet er satt inn feil	Plasser proppen på nytt (ørepropp, mikropropp eller dome)
	Ørevoks i øregangen	Få øregangen undersøkt av legen din

Hvis ingen av forslagene over løser problemet, spør audiografen din om hjelp.

Vannavstøtende (IP58)

Høreapparatet ditt er vannavstøtende, som betyr at det er designet for å kunne brukes i alle hverdagslige situasjoner. Derfor behøver du ikke å bekymre deg for svette eller å bli våt i regnet. Hvis høreapparatet ditt kommer i kontakt med vann og slutter å virke, følg disse retningslinjene:

1. Tørk forsiktig av evt. vann
2. Åpne batteriskuffen, fjern batteriet og tørk forsiktig bort evt. vann i batteriskuffen
3. La høreapparatet tørke med batteriluken åpen i ca. 30 minutter
4. Sett inn et nytt batteri

VIKTIG

Ikke bruk høreapparatet når du dusjer eller deltar i aktiviteter med vann. Ikke senk høreapparatet ned i vann eller andre væsker.

Forhold

Driftsforhold	Temperatur: +1 °C til +40 °C Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Lagrings- og transportforhold	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring: Temperatur: -25 °C til +60 °C Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

Garantisertifikat

Navn på eier: _____

Audiograf: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Modell venstre: _____ Serienr.: _____

Modell høyre: _____ Serienr.: _____

Batteristørrelse: _____

Internasjonal garanti

Høreapparatet ditt dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve høreapparatet, men ikke tilbehør slik som batterier, slanger, ørevoksfilter, osv. Garantien dekker IKKE feil som oppstår grunnet misbruk, feilbehandling, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av uautorisert personell, fysiske endringer i øret ditt, at det blir utsatt for etsende væske, skade forårsaket av fremmedlegeme i apparatet eller feiljusteringer, da dette kan tilsidesette garantien. Denne garantien påvirker ingen rettigheter du har gjennom gjeldende nasjonale lovgivninger angående forbrukerkjøp.

Audiografen din kan derfor ha innført en garanti som går utover denne begrensede garantien. Ta kontakt med Oticon AS for mer informasjon.

Hvis du trenger hjelp

Ta høreapparatet ditt med til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og innstillinger på stedet.

Mobiltelefon

Noen høreapparatbrukere har rapportert om en summetone i høreapparatet når de bruker mobiltelefoner, noe som kan indikere at mobiltelefonen og høreapparatet ikke er kompatible.

ANSI C63.19-standarden avgjør forutsigbarhet av kompatibiliteten mellom et bestemt høreapparat og en mobiltelefon, ved å legge inn den numeriske verdien for vurderinger av høreapparatets immunitet til den numeriske verdien for utstråling fra mobiltelefonen. En sum på 4 vil indikere at kombinasjonen av trådløs enhet og høreapparat er anvendbar, en kombinert merkedata som er lik minst 5 vil gi normal bruk; en kombinert sum på 6 eller høyere vil antyde ypperlig ytelse.

Hvorpå alle høreapparater har akustisk kobling, har kun de større instrumentene fysisk plass til telespolekobling (induktiv). Disse to koblingstypene har forskjellige rangeringsskalaer (respektivt M1–M4 for akustisk kobling og T1–T4 for telespolekobling), og begge verdiene er derfor relevante for å forutsi kompatibilitet med et bestemt høreapparat.

For et høreapparat med både akustisk- og telespolekobling med en verdi på M4/T2, og med en telefonverdi på M3/T3, er den kombinerte verdien 7 (M4 + M3) for den akustiske koblingen og 5 (T2 + T3) for telespolekoblingen. I følge retningslinjene ovenfor, er begge koblingstypene derfor akseptable,

hvor den akustiske koblingen indikerer ypperlig ytelse og telespolekoblingen indikerer normal bruk.

Ytelsesmålingene av utstyret ovenfor, kategorier og systemklassifiseringer er basert på den beste informasjonen

som er tilgjengelig, men det kan ikke garanteres at alle brukere vil bli fornøyde.

Immuniteten til dette høreapparatet er M4/T4.

VIKTIG

Ytelsen til de enkelte høreapparatene kan variere brukt sammen med enkelte mobiltelefoner. Derfor bør høreapparatet testes sammen med mobiltelefonen, eller hvis du kjøper en ny telefon, test den med høreapparatet før du kjøper den.

For å få mer informasjon, spør leverandøren av mobiltelefonen om heftet som heter «Samsvar mellom høreapparater og digitale, trådløse mobiltelefoner.»

Teknisk informasjon

Høreapparatet inneholder en radiosender som benytter en magnetisk induksjonsteknologi med kort rekkevidde, som virker på 3,84 MHz. Den magnetiske feltstyrken til senderen er < -42 dBµA/m @ 10 m.

Stråleeffekten fra radiosystemet er godt under internasjonale grenser for hva mennesker må utsettes for. Til sammenligning, er utstrålingen fra høreapparatet lavere enn utilsiktet elektromagnetisk stråling fra f.eks. halogenlamper, datamaskinskjærmer, oppvaskmaskiner osv. Høreapparatet er i henhold til internasjonale standarder når det gjelder elektromagnetisk samsvar.

På grunn av begrenset størrelse på apparatet, er alle relevante merkinger å finne i dette dokumentet.

Detaljert informasjon kan finnes i produktinformasjonsarket på [Oticon.com](https://www.oticon.com).

Høreapparatet inneholder en modul med:

FCC ID: U28FU2BTEPP
IC: 1350B-FU2BTEPP

Høreapparatet samsvarer med del 15 i FCC-reglementet og RSS-210 for Industry Canada.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
2. Denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Herved erklærer Oticon at dette produktet er i overensstemmelse med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 1999/5/EC.

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra produsenten.



Produsert av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.com

CE 0543 0682



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.



E2831

IP58

Oversikt over høreapparatinnstillingene

Venstre			Høyre	
☐ Ja	☐ Nei	Volumkontroll	☐ Ja	☐ Nei
☐ Ja	☐ Nei	Programendring	☐ Ja	☐ Nei
☐ Ja	☐ Nei	Mute	☐ Ja	☐ Nei
Volumkontrollindikator				
☐ På	☐ Av	Piper ved min/maks volum	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Klikkelyd ved volumendring	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Pipelyd ved ønsket volum	☐ På	☐ Av
Batteriindikatorer				
☐ På	☐ Av	Varsel ved lavt batterinivå	☐ På	☐ Av

161782NO / 09.15

161782NO / 09.15

People First

Med People First lover
vi å hjelpe mennesker til
å kommunisere fritt og
naturlig, for dermed kunne
ta en aktiv del i livet



0000161782000001

oticon
PEOPLE FIRST