


PRODUKTFORMASJON OTICON ALTA2 PRO OTICON ALTA2

Oticon | Alta2

Oticon Alta2 er bygget på Inium Sense-plattformen. Alta2-audiologien gir brukere premium lytteytelse, og kan justeres til den enkeltes lyttepreferanser. Alta2 er basert på VAC+-rasjonalet og Soft Speech Booster, og kan dermed ta i betraktning forskjeller i hvordan lydstyrke oppfattes og optimalisere lytteopplevelsen av svake lyder.

Alta2-familiens utvalg spenner fra kompakte i-øret-modeller, til flere ulike bak-øret-modeller. Den nye modellrekken inkluderer en ny og mindre ikke-trådløs IIC & CIC 75 v2, som passer enda flere brukere, pga mindre ytre mål.

TILPASNINGSOMRÅDE

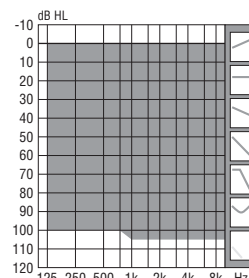

Soft Speech Booster

Soft Speech Booster er en egenskap i VAC+ som sørger for økt nivå av svak forsterkning ved høye frekvenser. Egenskapen forbedrer detaljene i svake talesignaler, og den tilpasses etter brukerens individuelle behov og preferanser for svake lyder og svak tale. Den nye muligheten for justering av svake lyder i Genie justerer hvordan den svake forsterkningen fra Soft Speech Booster leveres til hver bruker.

YouMatic Premium

YouMatic er et personlig, automatisk system programmert etter brukerens individuelle behov og lyttepreferanser. YouMatic styrer lydbehandlingen på tvers av flere omgivelser ved å justere respons, direksjonalitet, støybehandling, transient-behandling og kompresjon.

Speech Guard E

Speech Guard er et signalbehandlings-system som bevarer talens dynamikk og talemønster da dette er viktig og nødvendig informasjon til det auditive system. Speech Guard E er optimalisert for å rette seg etter den dynamiske rekkevidden i tale for å bevare flere talelyder.

Speech Guard E opprettholder hørbarheten, hindrer ubehag og beskytter talekurven ved å kombinere fordelene med både rask og langsom komprimering.

Inium Sense feedback shield

Inium Sense feedback shield reduserer piping betraktelig uten å påvirke lyd kvalitet og komfort.

Egenskaper


- Speech Guard E
- Spatial Noise Management
- Spatial Sound Premium
- Binaural prosessering
- Binaural synkronisering
- Binaural koordinering
- YouMatic Premium
- Soft Speech Booster
- Voice Aligned Compression (VAC+)
- Frekvensbredde 10 kHz
- Inium Sense feedback shield
- Free Focus Premium
- Learning
- Minne
- Telespole
- AutoPhone-program
- Power Bass (streaming)
- Music Widening (streaming)
- TriState støybehandling
- Transientbehandling
- Flerbånds adaptiv direksjonalitet
- NAL-NL1, NAL-NL2 og DSL v5.0a m[i/o]
- Fleksibelt miniFit Receiver-system
- ConnectLine og Fjernkontroll
- DA1 input og FM
- In-Situ-audiometri (Genie)
- IP68-sertifisert mot vann- og støvinntrængning (alle custom-apparater)
- IP58-sertifisert mot vanninntrængning (alle BTE-apparater)



oticon
PEOPLE FIRST

BTE-MODELLER

RITE-MODELLER

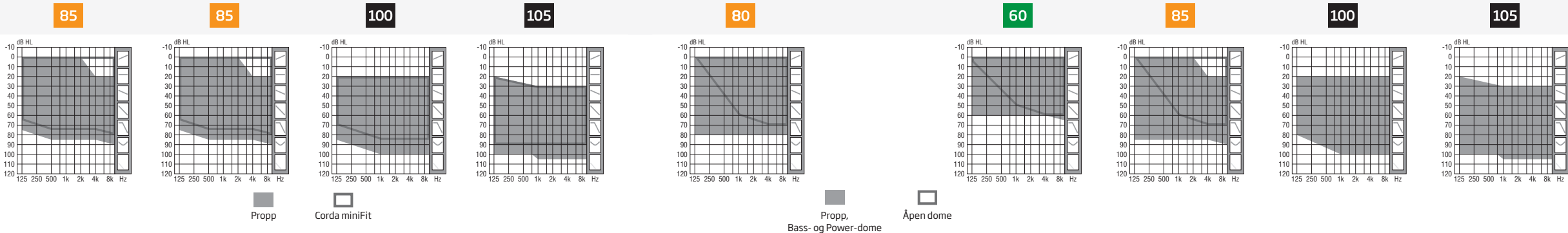

OSPL90 Toppverdi	Øresimulator	131 dB SPL	126 dB SPL	135 dB SPL	138 dB SPL	127 dB SPL	115 dB SPL	127 dB SPL	132 dB SPL	135 dB SPL
	2cc coupler	121 dB SPL	117 dB SPL	126 dB SPL	133 dB SPL	117 dB SPL	105 dB SPL	118 dB SPL	124 dB SPL	125 dB SPL
Full-on gain Toppverdi	Øresimulator	62 dB	61 dB	68 dB	73 dB	62 dB	46 dB	65 dB	66 dB	73 dB
	2cc coupler	53 dB	51 dB	60 dB	67 dB	53 dB	35 dB	55 dB	57 dB	61 dB




	miniBTE	BTE13	BTE13 105	designRITE	miniRITE	RITE
Batteristørrelse	312	13	13	10	312	312
Tilpasningsnivå	85	85 100	105	80	60 85 100 105	60 85 100 105
Batterilevetid (t)*	115-140	85-190	100-200	65-75	80-110	80-110
Trådløs	■	■	■	■	■	■
Retningsmikrofon	■	■	■	■	■	■
Programvalg	■	■	■	■	■	■
Volumkontroll	■	■	■	■	■	■
Telespole	■	■	■	■	■	■
AutoPhone	■	■	■	■	■	■
Kompatibel med ConnectLine/Fjernkontroll	■	■	■	■	■	■
FM-kompatibel	■	■	■	■	■	■
Valgfri programmeringsgrensesnitt, kabel nr. 3	Kabel nr. 3	Programmeringssko	Kabel nr. 3	Kabel nr. 3	FlexConnect	Programmeringssko

Kun Alta2 Pro

- Standard
- Valgfritt


* Batterilevetid (reell) vises som et beregnet intervall basert på målinger med variable forsterkningsinnstillinger og variable input-nivåer.

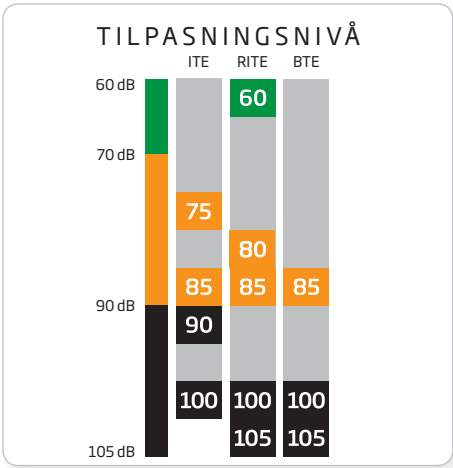


TILBEHØR

Tilbehør	Type/info	Bruk med
Barnesikret batteriskuff	Tilgjengelig i 7 farger Tilgjengelig i 8 farger	RITE, miniBTE, BTE13 og BTE13 105 miniRITE
DAI-adapter	AP900 AP1000	BTE13 og RITE BTE13 105
Dedikert FM-mottaker	Amigo R12	BTE13 og RITE
FM-adapter	FM 9 FM10 Kompatibel med Amigo R2 og andre generiske mottakere	BTE13 BTE13 105

PRODUKTOVERSIKT

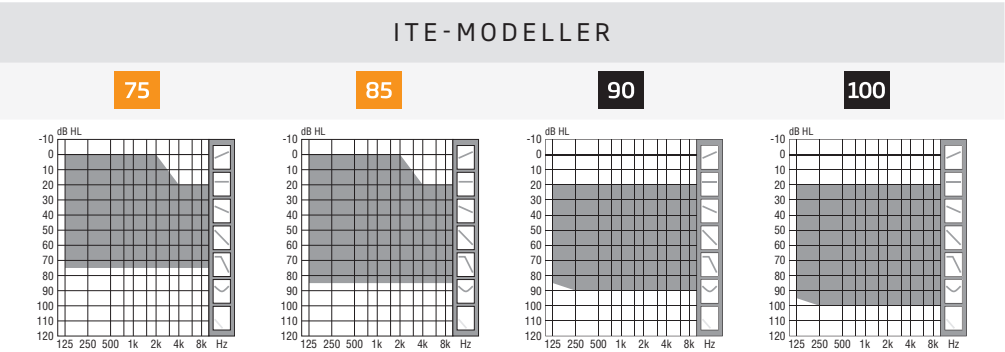

OSPL90 Toppverdi	Øresimulator	119 dB SPL	126 dB SPL	130 dB SPL	135 dB SPL
	2cc coupler	109 dB SPL	117 dB SPL	121 dB SPL	127 dB SPL
Full-on gain Toppverdi	Øresimulator	49 dB	59 dB	64 dB	71 dB
	2cc coupler	38 dB	50 dB	54 dB	62 dB

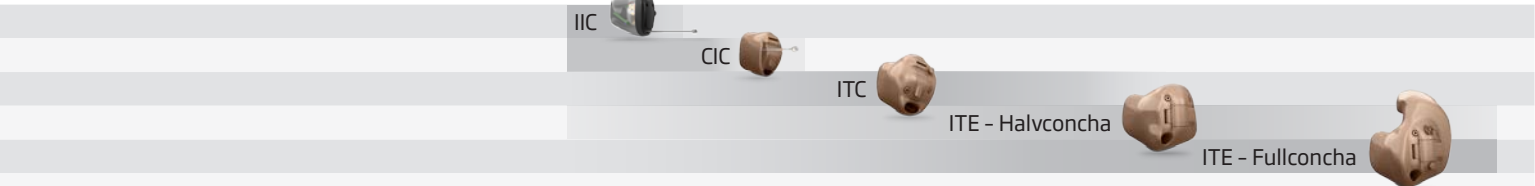

Batteristørrelse	10	312	13
Tilpasningsnivå	75 85	75 85 90 100	75 85 90 100
Batterilevetid (t) ¹	95-100	75-135	140-250
Trådløs	○	○	○
Retningsmikrofon		○	■
Programvalg	○ ²	○	○
Volumkontroll	○ ²	○	○
Telespole		○	○
AutoPhone		○	○
Kompatibel med ConnectLine / Fjernkontroll	○	○	○
FM-kompatibel			
Valgfri programmeringsgrensesnitt, kabel nr. 3	Programming Adaptor Mini ³ FlexConnect Mini ⁴	FlexConnect Mini	FlexConnect Mini

IIC er kun tilgjengelig i Alta2 Pro 75

- Standard
- Valgfritt

- 1) Batterilevetid (reell) vises som et beregnet intervall basert på målinger med variable forsterkningsinnstillinger og variable input-nivåer.
- 2) Alternativ kun tilgjengelig for CIC
- 3) Ikke-trådløse IIC & CIC 75-apparater fra november 2016
- 4) Trådløse apparater og ikke-trådløse fra før November 2016

ITE - MODELLER

Voksfilter	Lydtrykk, ikke-trådløse IIC og CIC ³	ProWax miniFit
	Lydtrykk, trådløse og ikke-trådløse apparater ⁴	ProWax
	Mikrofoninngang, apparater med 10-batteri	T-Cap
	Mikrofoninngang, apparater med 312- og 13-batteri	O-Cap

Apparater med 312-batteri kan produseres med horisontal batteriskuff avhengig av ørets anatomi.

Oticon optimaliserer tilpasningsnivå og ventilering som standard i henhold til hørselstap, ønsket modell og ørets anatomi.

FORHOLD

Driftsforhold	Temperatur:	+1 °C til +40 °C
	Relativ fuktighet:	5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Lagrings- og transportforhold	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring.	
	Temperatur:	-25 °C til +60 °C
	Relativ fuktighet:	5 % til 93 %, ikke-kondenserende

GENERELL TILPASNING


Oticon Alta2-apparater programmeres med Genie 2015.2 eller nyere versjoner, kompatibelt med NOAH 3 eller nyere.

Trådløs tilpasning - FittingLINK
FittingLINK gir en trådløs forbindelse (Bluetooth) mellom datamaskinen og ett eller to høreapparater med trådløse egenskaper. I tillegg kan FittingLINK brukes via en USB-kabel som er koblet til PC-en.


Kabeltilpasning
Bruk programmeringskabel #3.

FARGEVALG


RITE- OG BTE-MODELLER

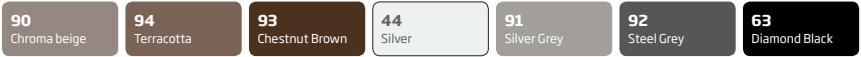

FLERE FARGER

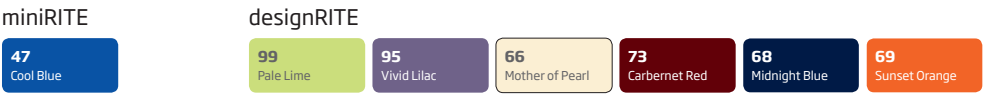

ITE - MODELLER

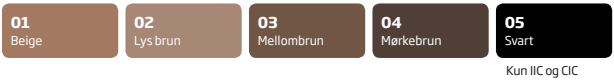

POWER FLEX-PROPPER



PRODUKTOVERSIKT

miniRITE OG RITE	
Receiver	Må bruke miniFit-receivere. Velg mellom tre receivere med ulik styrke. De er merket i henhold til tilpasningsnivå: 60, 85 og 100.
	60, 85 lengde 0-5 100 lengde 1-5
Power Flex-propp	Velg mellom to Power Flex-propper, 100 og 105, med forskjellig output-nivå
Receiver-ledning	Separate ledninger for tilkobling til Power Flex-propper. Tilgjengelig i lengder fra 1-5.
Receiver-kobling til apparat	Type C1 (merket på pakningen).
ProWax miniFit	miniFit-mottakere 60, 85 og 100
ProWax	Power Flex-propp Mikropropp LiteTip

designRITE	
Receiver	Må bruke miniFIT 80-receiver. Tilgjengelig i lengde 1-5.
Receiver-kobling til apparater	Type C3 (merket på pakningen).
ProWax miniFit	miniFit-receiver 80
ProWax	Mikropropp LiteTip
Kun tilgjengelig i Alta2 Pro	

BTE - MODELLER	
Hook	Utskiftbar standard- og barnehook, både dempet og udempet for BTE13 105 . Utskiftbar standard- og barnehook for BTE13 85 og BTE13 100 . Utskiftbar standard- og barnehook for miniBTE 85 .
Damper	Dempefilter tilgjengelig for BTE13 85 og miniBTE 85 . Valgfritt for BTE13 100 .
Tynnslanger	Corda miniFit (0,9 mm slange) for miniBTE 85 og BTE13 85 . Corda miniFit Power (1,3 mm slange) for BTE13 100 og BTE13 105 . Tynnslanger er tilgjengelige i lengdene -1-4. Modellspesifikke adaptere må brukes ved tilkobling av tynnslanger.
ProWax	Mikropropp LiteTip

RITE- OG BTE - MODELLER	
Ørepropper	Alle miniFit-receivere og Corda mini-Fit-slanger må bruke miniFit-ørepropper. LiteTip og mikropropp (krever avtrykk).
miniFit-domer	
Type	Størrelser
Åpen dome	6, 8, 10 mm
Power-dome	6, 8, 10, 12 mm
Bassdome, enkel ventilering	6, 8, 10, 12 mm
Bassdome, dobbel ventilering	6, 8, 10, 12 mm
Grip Tip, uten ventilering	S og L
Grip Tip, stor ventilering	S og L

Egenskaper	Oticon Alta2 Pro	Oticon Alta2
Tilpasningsrasjonaler	VAC+, NAL, DSL	VAC+, NAL, DSL
Speech Guard E	Ja	Ja
Soft Speech Booster	Ja	Ja
Spatial Noise Management	Ja	Nei
Spatial Sound	Premium	Nei
Binaural prosessering (kompresjon)	Ja	Nei
Binaural synkronisering (automatikk)	Ja	Ja
Binaural koordinering (Trykknapp-funksjon)	Ja	Ja
YouMatic	Premium	Premium
Personlige profiler	5	5
Transientbehandling	Ja	Ja
Tilpasningsbåndbredde*	10 kHz	10 kHz
Inium Sense feedback shield	Ja	Ja
Free Focus	Premium	Premium
Automatikk	Tri-modus	Tri-modus
Back dir	Ja	Ja
Power Bass	Ja	Ja
Music Widening	Ja	Ja
Programmer med spesielle formål (musikk, foredrag osv.)	Ja	Ja
Learning	Ja	Ja
Tilpasningsbånd	10	10
Frekvenskanaler	16	16

* Tilgjengelig båndbredde for justering av forsterkning under tilpassing

MERK: designRITE og IIC er kun tilgjengelig i Alta2 Pro

ITE 75 (KUN IIC)
OTICON ALTA2 PRO



Målestokk 1:1
ikke-trådløs IIC

Teknisk informasjon
Målingene er utført på apparater med ProWax og T-Cap beskyttelse.

75

OSPL90	Toppverdi	121 dB SPL	109 dB SPL
	1 600 Hz	112 dB SPL	103 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	110 dB SPL	103 dB SPL
	Toppverdi	45 dB	36 dB
	1 600 Hz	41 dB	33 dB
	Gjennomsnitt	40 dB	34 dB
Reference test gain		-	-
Frekvensområde		100-9 600 Hz	100-8 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-	-
	10 mA/m-felt	-	-
	SPLITS V/H	-	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	2,0 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	21 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	-	-
Strømtrekk	Stille	0,7 mA	0,7 mA
	Typisk	0,7 mA	0,7 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*

135

Størrelse: 10 (IEC PR70)

IRIL (IEC 60118-13-2011)


800/1 400/2 000 MHz: 16/16/<9 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser
Merk: For tilpassede apparater er den maksimale forsterkningen tilpasset for optimal størrelse og ytelse.

Oticon | Alta2

2CC COUPLER

Målt i henhold til
ANSI S3.22 (2003) og S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) og IEC 60318-5 (2006).

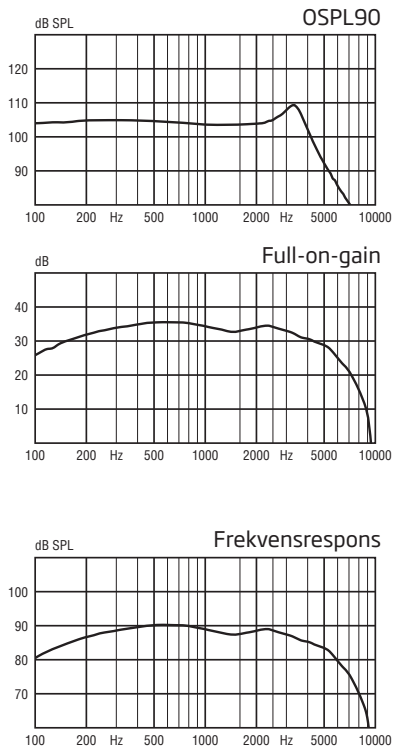

Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Målingene er utført på apparater med ProWax og T-Cap eller O-Cap beskyttelse. Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

75

OSPL90	Toppverdi	119 dB SPL	109 dB SPL
	1 600 Hz	112 dB SPL	104 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	110 dB SPL	105 dB SPL
	Toppverdi	49 dB	38 dB
	1 600 Hz	43 dB	35 dB
	Gjennomsnitt	41 dB	35 dB
Reference test gain		36 dB	27 dB
Frekvensområde		100-9 500 Hz	100-8 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	73 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	93 dB SPL	-
	SPLITS V/H	-	82/82 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	2,0 %	< 2 %
	800 Hz	2,0 %	< 2 %
	1 600 Hz	3,0 %	2,0 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	22 dB SPL	20 dB SPL
	Dir	31 dB SPL	29 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,0 mA	1,0 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*

135/140/260

Størrelse: 10 (IEC PR70) / 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1 400/2 000 MHz: 28/44/37 dB SPL

IRIL (IEC 60118-13-2011) for IIC og CIC


800/1 400/2 000 MHz: 17/33/26 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser
Merk: For tilpassede apparater er den maksimale forsterkningen tilpasset for optimal størrelse og ytelse.

Oticon | Alta2


ØRESIMULATOR

Målt i henhold til
IEC 60118-0 (1983) og 60711 (1981)
og DIN 45605.

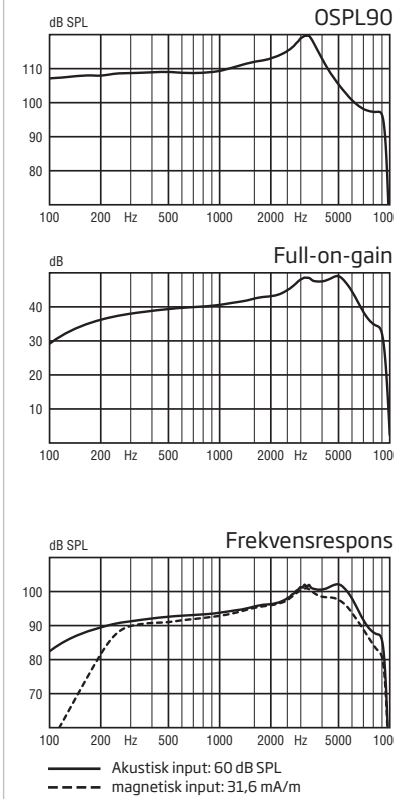

2CC COUPLER

Målt i henhold til
ANSI S3.22 (2003) og S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) og IEC 60318-5 (2006).

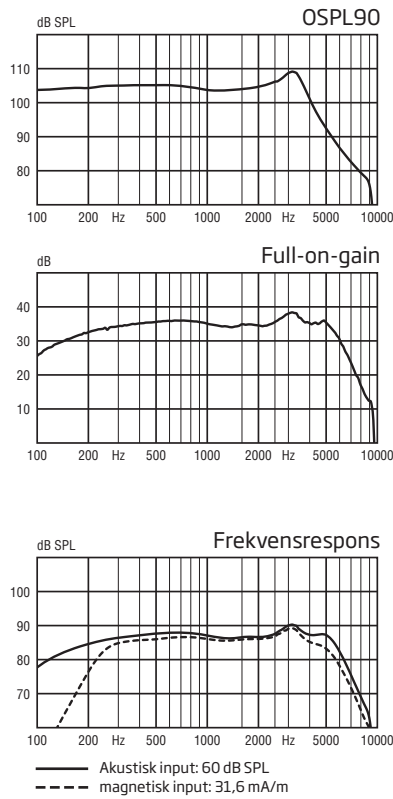

ITE 85

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Målingene er utført på apparater med ProWax og T-Cap eller O-Cap beskyttelse. Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

85

OSPL90	Toppverdi	126 dB SPL	117 dB SPL
	1 600 Hz	119 dB SPL	111 dB SPL
	Gjennomsnitt	117 dB SPL	113 dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	59 dB	50 dB
	1 600 Hz	51 dB	43 dB
	Gjennomsnitt	50 dB	45 dB
Reference test gain		44 dB	37 dB
Frekvensområde		100-9 600 Hz	100-8 000 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	81 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	101 dB SPL	-
	SPLITS L / R	-	90/90 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	2,0 %	<2 %
	800 Hz	2,0 %	<2 %
	1 600 Hz	3,0 %	2,0 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	22 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	29 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,0 mA	1,0 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*	125/140/260
Størrelse: 10 (IEC PR70) / 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)	
IRIL (IEC 60118-13-2011)	800/1 400/2 000 MHz: 21/39/<14 dB SPL
IRIL (IEC 60118-13-2011) for IIC og CIC	800/1 400/2 000 MHz: <20/26/29 dB SPL




* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser
Merk: For tilpassede apparater er den maksimale forsterkningen tilpasset for optimal størrelse og ytelse.

Oticon

Alta2

2CC COUPLER

Målt i henhold til
ANSI S3.22 (2003) og S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) og IEC 60318-5 (2006).

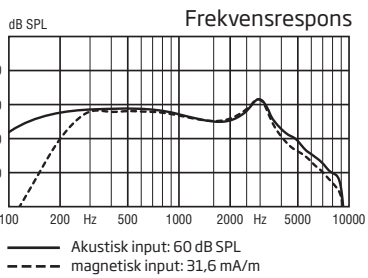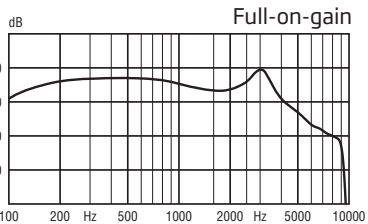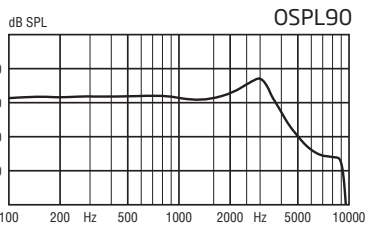

ITE 90

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Målingene er utført på apparater med ProWax og O-Cap beskyttelse. Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

90

OSPL90	Toppverdi	130 dB SPL	121 dB SPL
	1 600 Hz	123 dB SPL	115 dB SPL
	Gjennomsnitt	121 dB SPL	116 dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	64 dB	54 dB
	1 600 Hz	56 dB	47 dB
	Gjennomsnitt	54 dB	49 dB
Reference test gain		48 dB	40 dB
Frekvensområde		100-8 700 Hz	100-8 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	85 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	105 dB SPL	-
	SPLITS V/H	-	93/93 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1 600 Hz	3,0 %	2,0 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	23 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	34 dB SPL	29 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,0 mA	1,0 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*	140/260
Størrelse: 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)	
IRIL (IEC 60118-13-2011)	800/1 400/2 000 MHz: 26/55/41 dB SPL




* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser
Merk: For tilpassede apparater er den maksimale forsterkningen tilpasset for optimal størrelse og ytelse.

Oticon

Alta2

2CC COUPLER

Målt i henhold til
ANSI S3.22 (2003) og S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) og IEC 60318-5 (2006).

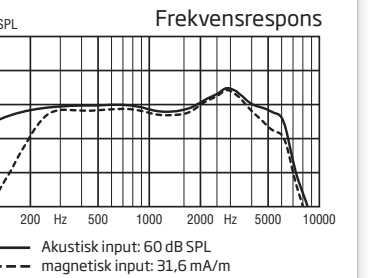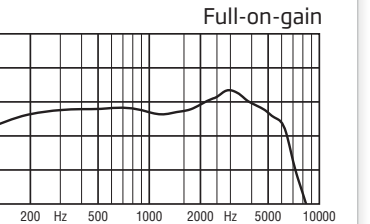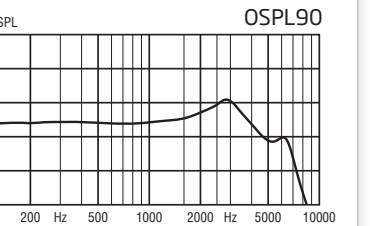

ITE 100

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Målingene er utført på apparater med ProWax og O-Cap beskyttelse. Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

100

OSPL90	Toppverdi	135 dB SPL	127 dB SPL
	1 600 Hz	135 dB SPL	127 dB SPL
	Gjennomsnitt	130 dB SPL	123 dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	71 dB	62 dB
	1 600 Hz	67 dB	59 dB
	Gjennomsnitt	65 dB	58 dB
Reference test gain		60 dB	48 dB
Frekvensområde		100-8 175 Hz	100-8 000 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	95 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	115 dB SPL	-
	SPLITS L / R	-	105/105 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1 600 Hz	2,0 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	17 dB SPL	15 dB SPL
	Dir	27 dB SPL	26 dB SPL
Strømtrekk	Stille	0,9 mA	0,9 mA
	Typisk	0,9 mA	0,9 mA



Batterilevetid kalkulert i timer*155/290

Størrelse: 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)800/1 400/2 000 MHz: 15/45/28 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser
Merk: For tilpassede apparater er den maksimale forsterkningen tilpasset for optimal størrelse og ytelse.

Oticon | Alta2

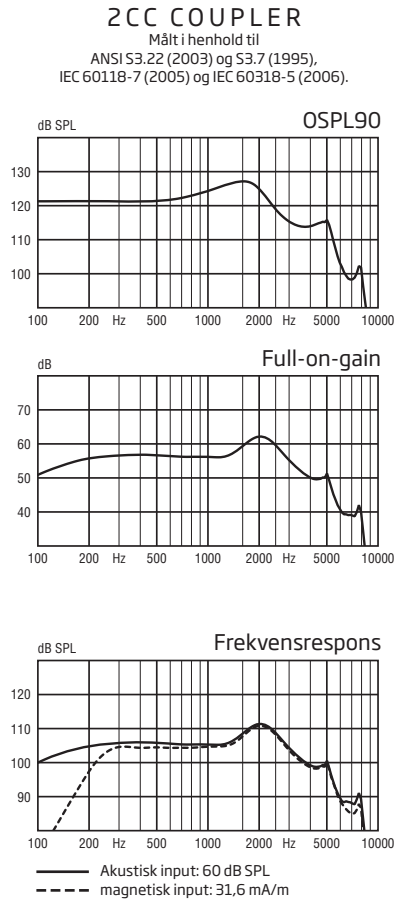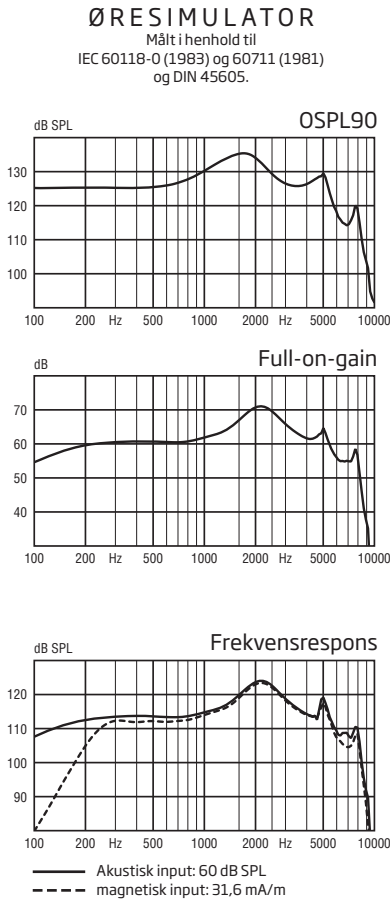

designRITE 80

OTICON ALTA2 PRO



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

80

OSPL90	Toppverdi	127 dB SPL	117 dB SPL
	1 600 Hz	120 dB SPL	112 dB SPL
	Gjennomsnitt	117 dB SPL	111 dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	62 dB	53 dB
	1 600 Hz	53 dB	44 dB
	Gjennomsnitt	50 dB	47 dB
Reference test gain		45 dB	34 dB
Frekvensområde		100-9 300 Hz	100-7 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-	-
	10 mA/m-felt	-	-
	SPLITS V/H	-	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	21 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	30 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,3 mA	1,3 mA



Batterilevetid kalkulert i timer*90

Størrelse: 10 (IEC PR70)

IRIL (IEC 60118-13-2011)800/1 400/2 000 MHz: <17 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

Oticon | Alta2

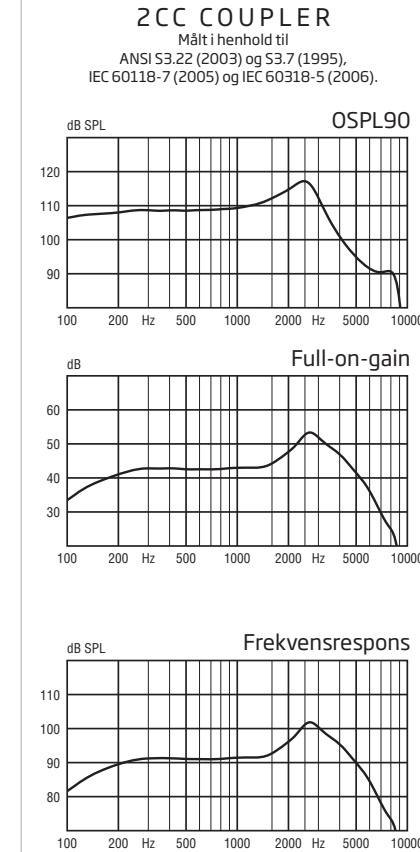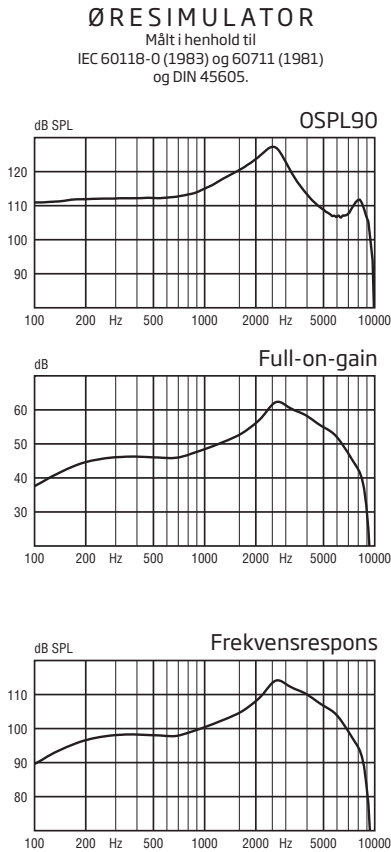


miniRITE 60
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

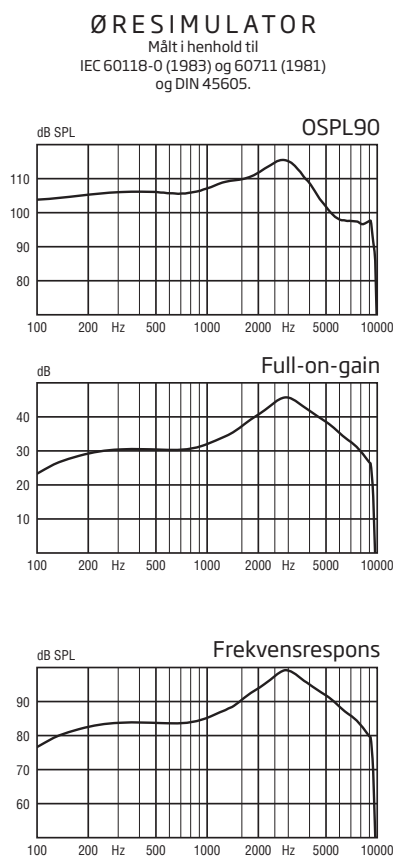

60

OSPL90	Toppverdi	115 dB SPL	105 dB SPL
	1 600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	108 dB SPL	103 dB SPL
	Toppverdi	46 dB	35 dB
Full-on gain	1 600 Hz	37 dB	29 dB
	Gjennomsnitt	34 dB	30 dB
Reference test gain		30 dB	26 dB
Frekvensområde		100-9 500 Hz	100-8 300 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-	-
	10 mA/m-felt	-	-
	SPLITS V/H	-	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	21 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	24 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA	1,3 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*

130

Størrelse 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1 400/2 000 MHz: 43/26/18 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydombgivelser


Oticon | Alta2

miniRITE 85
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

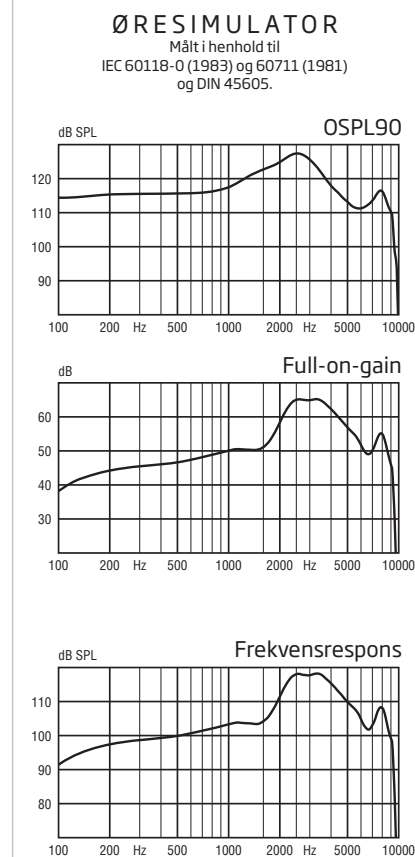

85

OSPL90	Toppverdi	127 dB SPL	118 dB SPL
	1 600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	119 dB SPL	114 dB SPL
	Toppverdi	65 dB	55 dB
Full-on gain	1 600 Hz	51 dB	43 dB
	Gjennomsnitt	52 dB	47 dB
Reference test gain		44 dB	38 dB
Frekvensområde		100-9 500 Hz	100-8 700 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-	-
	10 mA/m-felt	-	-
	SPLITS V/H	-	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	2,4 %	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	25 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	25 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA	1,2 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*

130

Størrelse 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1 400/2 000 MHz: 45/30/25 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydombgivelser

Oticon | Alta2

miniRITE 100
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

100

OSPL90	Toppverdi	132 dB SPL	124 dB SPL
	1 600 Hz	131 dB SPL	124 dB SPL
Gjennomsnitt		126 dB SPL	121 dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	66 dB	57 dB
	1 600 Hz	56 dB	49 dB
Gjennomsnitt		58 dB	52 dB
Reference test gain		50 dB	44 dB
Frekvensområde		100-8 700 Hz	100-8 100 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-	-
	10 mA/m-felt	-	-
	SPLITS V/H	-	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1 600 Hz	<2 %	<2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	22 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	30 dB SPL	25 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA	1,3 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*

130

Størrelse 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1 400/2 000 MHz: 46/28/23 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

Oticon | Alta2

miniRITE 105
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Målestokk 1:1

Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

105

OSPL90	Toppverdi	135 dB SPL	125 dB SPL
	1 600 Hz	133 dB SPL	123 dB SPL
Gjennomsnitt		130 dB SPL	121 dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	72 dB	61 dB
	1 600 Hz	65 dB	55 dB
Gjennomsnitt		64 dB	55 dB
Reference test gain		57 dB	44 dB
Frekvensområde		100-8 100 Hz	100-7 900 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-	-
	10 mA/m-felt	-	-
	SPLITS V/H	-	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %	<2 %
	800 Hz	2,0 %	<2 %
	1 600 Hz	2,0 %	<2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	28 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA	1,3 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*

130

Størrelse 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1 400/2 000 MHz: 39/28/24 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

Oticon | Alta2

RITE 60

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

60

OSPL90	Toppverdi	115 dB SPL	105 dB SPL
	1 600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	108 dB SPL	103 dB SPL
	Toppverdi	46 dB	35 dB
Full-on gain	1 600 Hz	37 dB	29 dB
	Gjennomsnitt	34 dB	30 dB
Reference test gain		30 dB	26 dB
Frekvensområde		100-9 500 Hz	100-8 300 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	65 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	85 dB SPL	-
SPLITS V/H		-	82/82 dB SPL
	Total harmonisk forvrengning		
(Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	21 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	24 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA	1,3 mA


Batterilevetid kalkulert i timer*
Størrelse 312 (IEC PR41)
IRIL (IEC 60118-13-2011)

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

130

800/1 400/2 000 MHz: 27/46/51 dB SPL

Oticon | Alta2

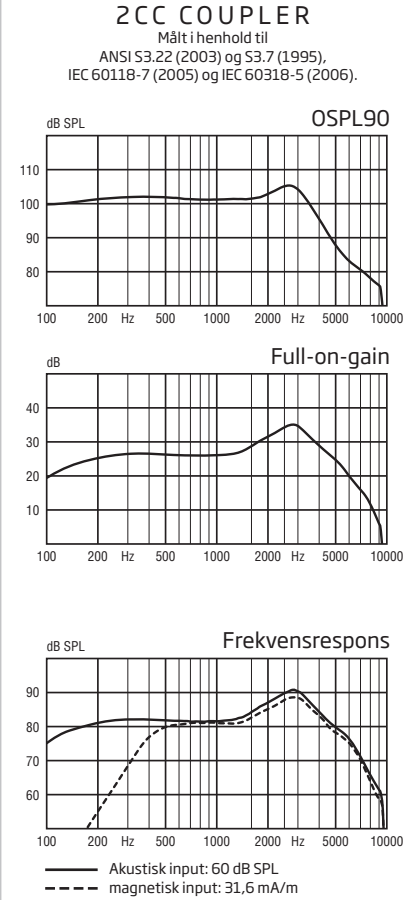

RITE 85

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

85

OSPL90	Toppverdi	127 dB SPL	118 dB SPL
	1 600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	119 dB SPL	114 dB SPL
	Toppverdi	65 dB	55 dB
Full-on gain	1 600 Hz	51 dB	43 dB
	Gjennomsnitt	52 dB	47 dB
Reference test gain		44 dB	38 dB
Frekvensområde		100-9 500 Hz	100-8 700 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	79 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	99 dB SPL	-
SPLITS V/H		-	95/95 dB SPL
	Total harmonisk forvrengning		
(Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	2,4 %	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	25 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	25 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA	1,2 mA


Batterilevetid kalkulert i timer*
Størrelse 312 (IEC PR41)
IRIL (IEC 60118-13-2011)

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

130

800/1 400/2 000 MHz: 19/41/36 dB SPL

Oticon | Alta2

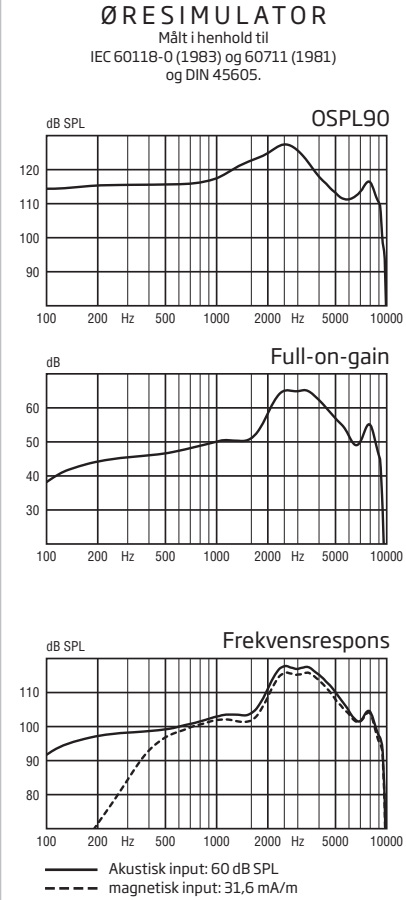

RITE 100

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

100


OSPL90	Toppverdi	132 dB SPL
	1 600 Hz	131 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	126 dB SPL
	Toppverdi	66 dB
	1 600 Hz	56 dB
	Gjennomsnitt	58 dB
Reference test gain		50 dB
Frekvensområde		100–8 700 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	85 dB SPL
	10 mA/m-felt	105 dB SPL
	SPLITS V/H	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %
	800 Hz	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	22 dB SPL
	Dir	30 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*130

Størrelse 312 (IEC PR41)
IRIL (IEC 60118-13-2011)800/1 400/2 000 MHz: <17/49/39 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

Oticon | Alta2

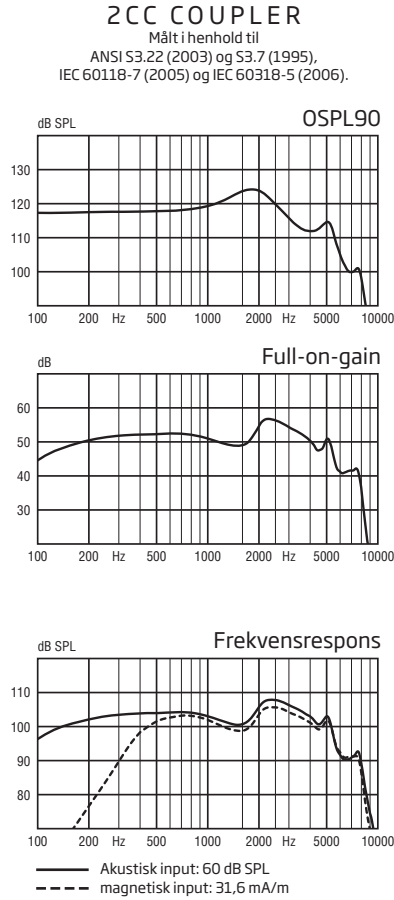

OSPL90	Toppverdi	124 dB SPL
	1 600 Hz	124 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	121 dB SPL
	Toppverdi	57 dB
	1 600 Hz	49 dB
	Gjennomsnitt	52 dB
Reference test gain		44 dB
Frekvensområde		100–8 100 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-
	10 mA/m-felt	-
	SPLITS V/H	101/101 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %
	800 Hz	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	16 dB SPL
	Dir	25 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA
	Typisk	1,3 mA

130

RITE 105

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

105

OSPL90	Toppverdi	135 dB SPL
	1 600 Hz	133 dB SPL
Full-on gain	Gjennomsnitt	130 dB SPL
	Toppverdi	72 dB
	1 600 Hz	65 dB
	Gjennomsnitt	64 dB
Reference test gain		58 dB
Frekvensområde		100–8 100 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	94 dB SPL
	10 mA/m-felt	114 dB SPL
	SPLITS V/H	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %
	800 Hz	2,0 %
	1 600 Hz	2,0 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	18 dB SPL
	Dir	29 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA

Batterilevetid kalkulert i timer*130

Størrelse 312 (IEC PR41)
IRIL (IEC 60118-13-2011)800/1 400/2 000 MHz: 33/51/51 dB SPL

* Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydomgivelser

miniBTE 85

OTICON ALTA2 PRO


OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

85

OSPL90	Toppverdi	
	1 600 Hz	
Gjennomsnitt		
Full-on gain	Toppverdi	
	1 600 Hz	
Gjennomsnitt		
Reference test gain		
Frekvensområde		
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	
	10 mA/m-felt	
	SPLITS V/H	
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	
	800 Hz	
	1 600 Hz	
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	
	Dir	
Strømtrekk	Stille	
	Typisk	

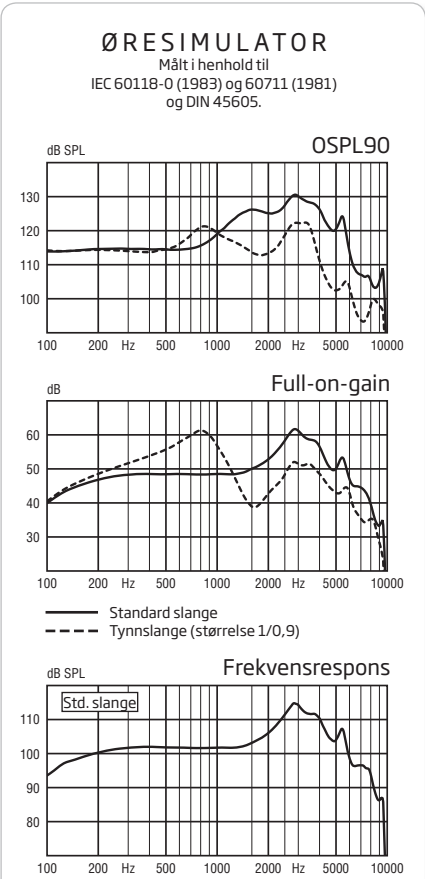


OSPL90	Toppverdi	131 (122*) dB SPL
	1 600 Hz	126 (114*) dB SPL
Gjennomsnitt		119 (116*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	62 (61*) dB
	1 600 Hz	50 (39*) dB
Gjennomsnitt		50 (52*) dB
Reference test gain		43 dB
Frekvensområde		100-8 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-
	10 mA/m-felt	-
	SPLITS V/H	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %
	800 Hz	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	22 dB SPL
	Dir	29 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA
	Typisk	1,1 mA

Batterilevetid, kalkulte timer**
Størrelse 312 (IEC PR41)
IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1 400/2 000 MHz: <18/24/36 dB SPL

* For apparater tilpasset med Corda miniFit
** Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydombgivelser

Oticon | Alta2

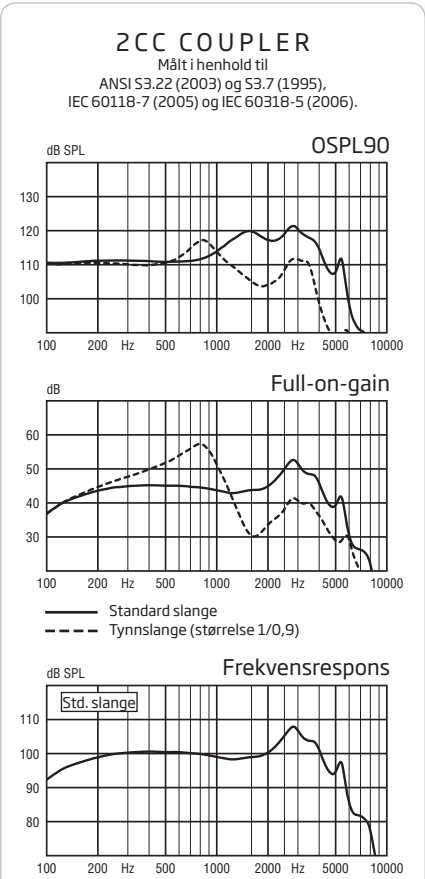

OSPL90	Toppverdi	121 (117*) dB SPL
	1 600 Hz	120 (105*) dB SPL
Gjennomsnitt		118 (109*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	53 (57*) dB
	1 600 Hz	44 (30*) dB
Gjennomsnitt		46 (40*) dB
Reference test gain		41 dB
Frekvensområde		100-7 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-
	10 mA/m-felt	-
	SPLITS V/H	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %
	800 Hz	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	17 dB SPL
	Dir	25 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,0 mA
	Typisk	1,2 mA

130

BTE13 85

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.

85


OSPL90	Toppverdi	
	1 600 Hz	
Gjennomsnitt		
Full-on gain	Toppverdi	
	1 600 Hz	
Gjennomsnitt		
Reference test gain		
Frekvensområde		
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	
	10 mA/m-felt	
	SPLITS V/H	
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	
	800 Hz	
	1 600 Hz	
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	
	Dir	
Strømtrekk	Stille	
	Typisk	

Batterilevetid, kalkulte timer**
Str.13 (IEC PR48)
IRIL (IEC 60118-13-2011)


800/1 400/2 000 MHz: 24/48/45 dB SPL

* For apparater tilpasset med Corda miniFit
** Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydombgivelser

Oticon | Alta2

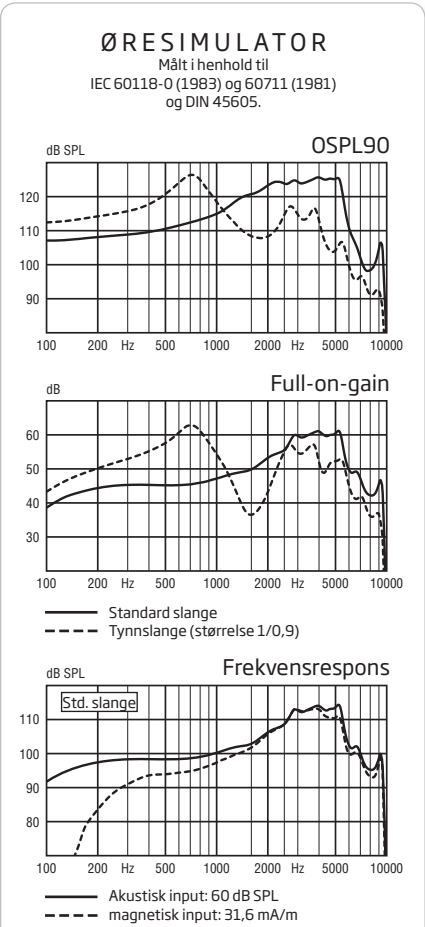

OSPL90	Toppverdi	126 (126*) dB SPL
	1 600 Hz	121 (108*) dB SPL
Gjennomsnitt		116 (116*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	61 (63*) dB
	1 600 Hz	50 (36*) dB
Gjennomsnitt		49 (52*) dB
Reference test gain		43 dB
Frekvensområde		100-9 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	79 dB SPL
	10 mA/m-felt	99 dB SPL
	SPLITS V/H	-
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %
	800 Hz	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	23 dB SPL
	Dir	32 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,1 mA
	Typisk	1,1 mA

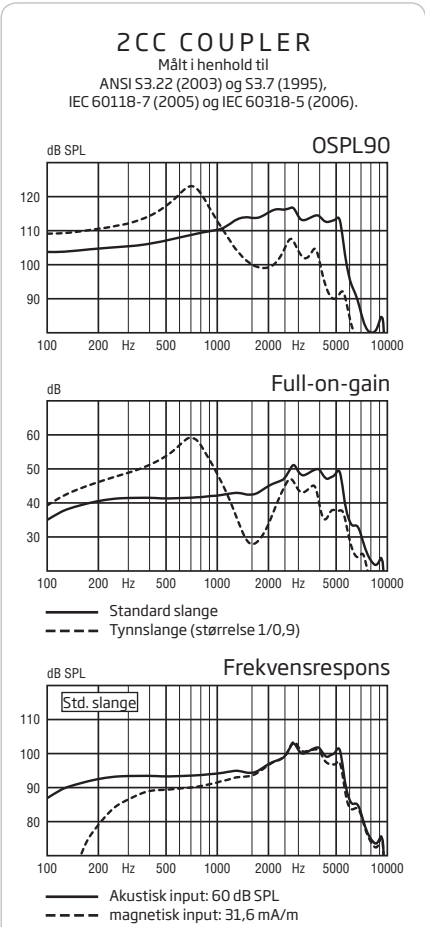

OSPL90	Toppverdi	117 (123*) dB SPL
	1 600 Hz	114 (100*) dB SPL
Gjennomsnitt		113 (106*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi	51 (59*) dB
	1 600 Hz	43 (28*) dB
Gjennomsnitt		44 (41*) dB
Reference test gain		36 dB
Frekvensområde		100-7 700 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt	-
	10 mA/m-felt	-
	SPLITS V/H	94/94 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (Input 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %
	800 Hz	< 2 %
	1 600 Hz	< 2 %
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni	18 dB SPL
	Dir	27 dB SPL
Strømtrekk	Stille	1,1 mA
	Typisk	1,1 mA

240

BTE13 100

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.


Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

100	
OSPL90	Toppverdi
	1 600 Hz
	Gjennomsnitt
Full-on gain	Toppverdi
	1 600 Hz
	Gjennomsnitt
Reference test gain	
Frekvensområde	
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt
	10 mA/m-felt
	SPLITS V/H
Total harmonisk forvrengning	500 Hz
(Input 70 dB SPL)	800 Hz
	1 600 Hz
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni
	Dir
Strømtrekk	Stille
	Typisk

Batterilevetid, kalkulte timer**
Str.13 (IEC PR48)
IRIL (IEC 60118-13-2011)

* For apparater tilpasset med Corda miniFit Power
** Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydømgivelser


Oticon | Alta2

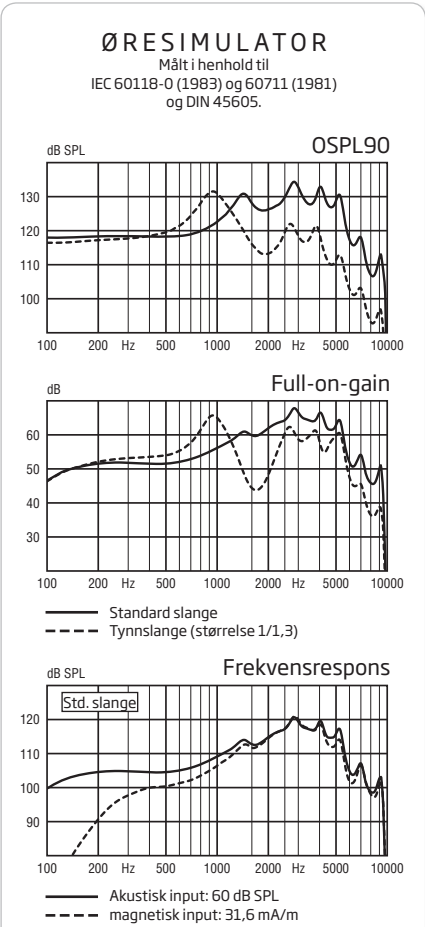

OSPL90	Toppverdi
	135 (132*) dB SPL
	128 (116*) dB SPL
	122 (121*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi
	68 (66*) dB
	60 (44*) dB
	57 (56*) dB
Reference test gain	53 dB
Frekvensområde	100–9 500 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt
	10 mA/m-felt
	89 dB SPL
	109 dB SPL
	–
Total harmonisk forvrengning	500 Hz
(Input 70 dB SPL)	800 Hz
	1 600 Hz
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni
	Dir
Strømtrekk	Stille
	Typisk

240

800/1 400/2 000 MHz: 24/48/45 dB SPL

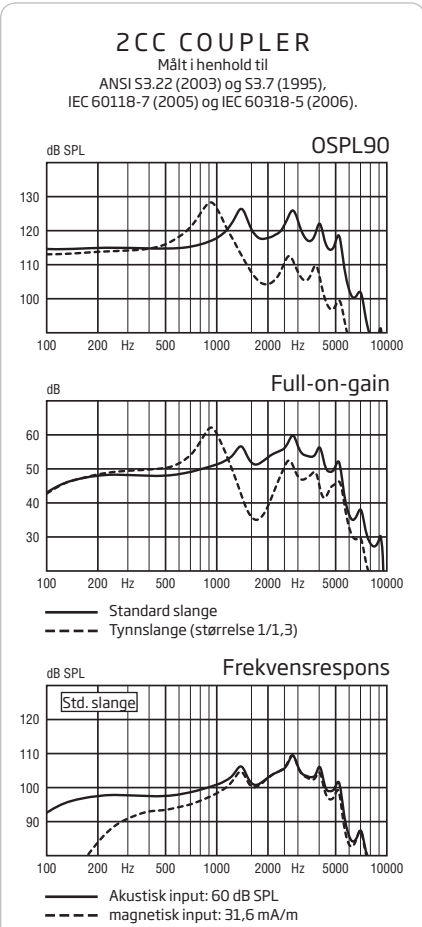

OSPL90	Toppverdi
	126 (128*) dB SPL
	120 (108*) dB SPL
	120 (115*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi
	60 (62*) dB
	52 (36*) dB
	53 (49*) dB
Reference test gain	43 dB
Frekvensområde	100–7 400 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt
	10 mA/m-felt
	–
Total harmonisk forvrengning	500 Hz
(Input 70 dB SPL)	800 Hz
	1 600 Hz
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni
	Dir
Strømtrekk	Stille
	Typisk

240

800/1 400/2 000 MHz: 24/48/45 dB SPL

BTE13 105

OTICON ALTA2 PRO

OTICON ALTA2



Teknisk informasjon
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.


Advarsel til den som tilpasser høreapparatet
Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.

105	
OSPL90	Toppverdi
	1 600 Hz
	Gjennomsnitt
Full-on gain	Toppverdi
	1 600 Hz
	Gjennomsnitt
Reference test gain	
Frekvensområde	
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt
	10 mA/m-felt
	SPLITS V/H
Total harmonisk forvrengning	500 Hz
(Input 70 dB SPL)	800 Hz
	1 600 Hz
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni
	Dir
Strømtrekk	Stille
	Typisk

Batterilevetid, kalkulte timer**
Str.13 (IEC PR48)
IRIL (IEC 60118-13-2011)

* For apparater tilpasset med Corda miniFit Power
** Basert på måling av standardisert batteriforbruk (IIC 60118-0.) Total batterilevetid avhenger av batterikvalitet, bruksmønstre, aktive egenskaper, hørselstap og lydømgivelser


Oticon | Alta2

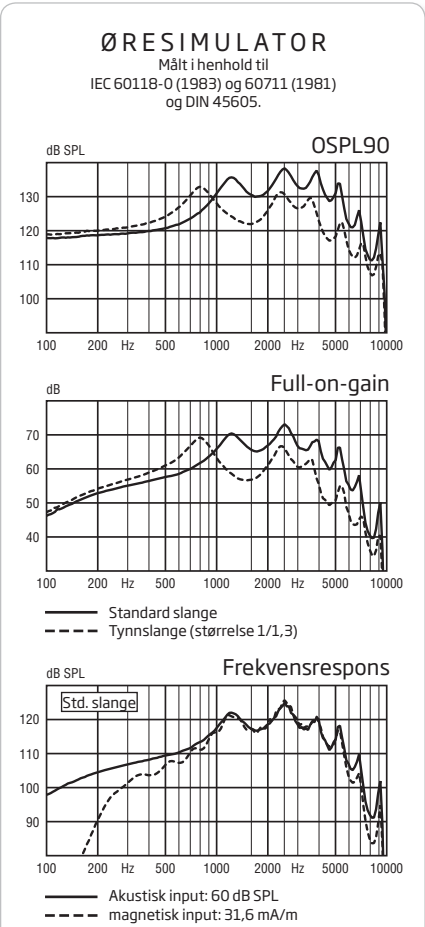

OSPL90	Toppverdi
	138 (133*) dB SPL
	131 (122*) dB SPL
	128 (126*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi
	73 (69*) dB
	66 (57*) dB
	63 (62*) dB
Reference test gain	57 dB
Frekvensområde	100–7 200 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt
	10 mA/m-felt
	96 dB SPL
	117 dB SPL
	–
Total harmonisk forvrengning	500 Hz
(Input 70 dB SPL)	800 Hz
	1 600 Hz
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni
	Dir
Strømtrekk	Stille
	Typisk

270

800/1400/2000 MHz: 36/<16/<16 dB SPL

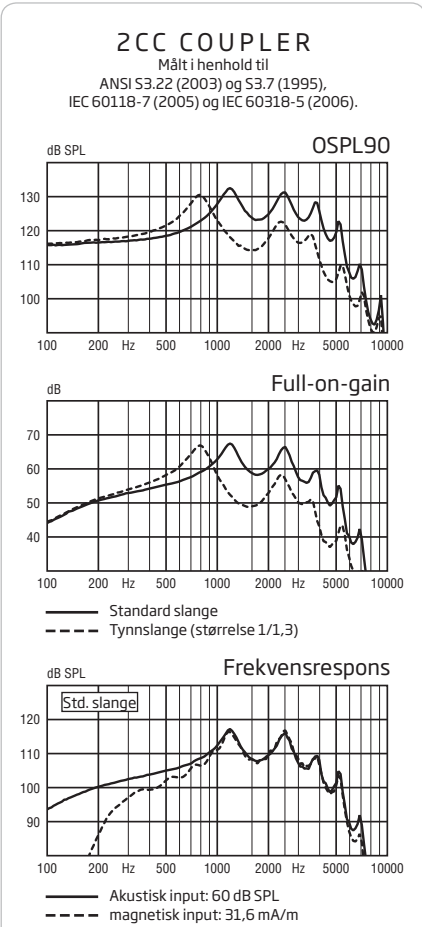

OSPL90	Toppverdi
	133 (131*) dB SPL
	124 (114*) dB SPL
	128 (120*) dB SPL
Full-on gain	Toppverdi
	67 (67*) dB
	59 (49*) dB
	63 (55*) dB
Reference test gain	52 dB
Frekvensområde	100–5 700 Hz
Telespole output (1600 Hz)	1 mA/m felt
	10 mA/m-felt
	–
Total harmonisk forvrengning	500 Hz
(Input 70 dB SPL)	800 Hz
	1 600 Hz
Ekvivalent inngangsnivå (A)	Omni
	Dir
Strømtrekk	Stille
	Typisk

270

800/1400/2000 MHz: 36/<16/<16 dB SPL

MERKNADER

Oticon | Alta2

MERKNADER

Oticon | Alta2

People First

Med People First lover
vi å hjelpe mennesker til
til å kommunisere fritt
og naturlig, for dermed å
kunne ta en aktiv del i livet