

# Hurtigveiledning for **Oticon Companion app** på **Apple Watch**

Slik installerer, parer og kontrollerer du Oticon Companion med en Apple Watch.

Med Apple Watch kan du kontrollere volumet, endre program, dempe eller oppheve demping av høreapparatene, slå Speech Booster på eller av, slå av den eksterne mikrofonen og sjekke batterinivåene. Spesielle funksjoner kalt Complications kan også aktiveres, som lar deg raskt få tilgang til appen fra urskiven.

## Komme i gang

Før du bruker Oticon Companion på en Apple Watch, må du installere appen på en iPhone og sørge for at høreapparatene er parert med din iPhone.

## Systemkrav

Du trenger det følgende for å bruke appen med Apple Watch:

- Apple Watch Series 4 eller senere
- watchOS 8 eller senere



Skann QR-koden  
for å laste ned  
**Oticon Companion**  
fra App Store.



Last ned fra  
**App Store**

Made for  
**iPhone | Apple Watch**

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad og Apple Watch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land.

# Å installere Oticon Companion på din Apple Watch


Slik kommer du i gang med Oticon Companion på en Apple Watch.



Først laster du ned **Oticon Companion-appen** fra App Store på iPhone og parer høreapparatene dine med iPhone.



Åpne **Watch-appen** på din iPhone.

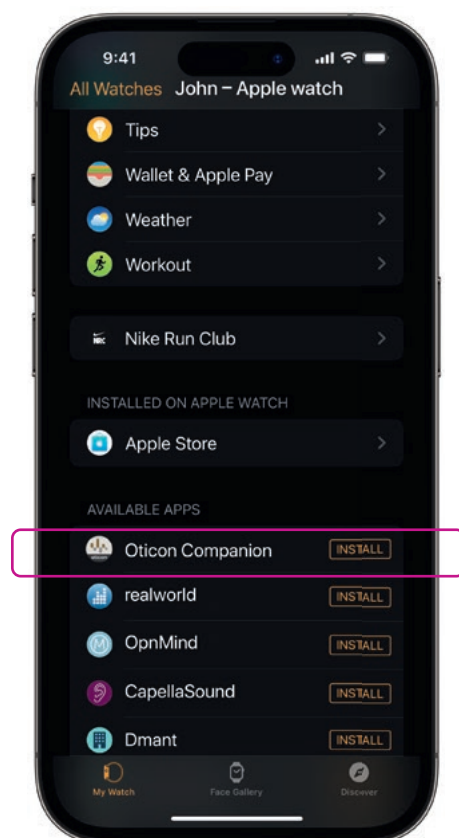

Rull ned til **TILGJENGELIGE APPER** og klikk på **INSTALL** til høyre for Oticon Companion-ikonet. Appen vil nå bli installert på Apple Watch.

# Å bruke hovedfunksjonene til Oticon Companion på Apple Watch

Trykk på ikonet for **Oticon Companion-appen** på din Apple Watch for å åpne appen.



## Kontroller batterinivåene

Fra skjermen General Oticon Companion, **sveip til høyre** for å vise høreapparatbatterinivået ditt.



## Generelt

General Oticon Companion-skjermen brukes til å endre program, justere volumet og dempe høreapparatene dine.



## Speech Booster

Fra skjermen General Oticon Companion, **sveip til venstre** for å slå på eller av Speech Booster, eller slå av den eksterne mikrofonen.

Trykk på program-ikonet (**P1**) for å åpne Program-skjermen.


Bla gjennom programmene og **trykk på programmet** som du ønsker å velge.

Du kan også bla gjennom programmene ved å **snu Digital Crown**.




# Oppsett av Apple Watch Complications

For å få rask tilgang til appen fra urskiven kan du sette opp en Apple Watch complication\*. Dette er en nyttig Apple Watch-funksjon som fungerer som en snarvei på urskiven.

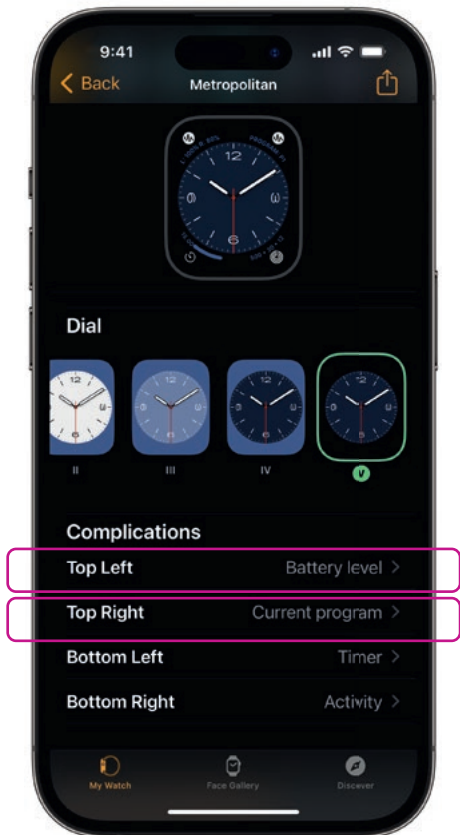

Velg urskiven fra My Faces og rull ned til Complications. Merk at ikke alle urskiver tillater complications.

Trykk **øverst til venstre** og velg en snarvei.

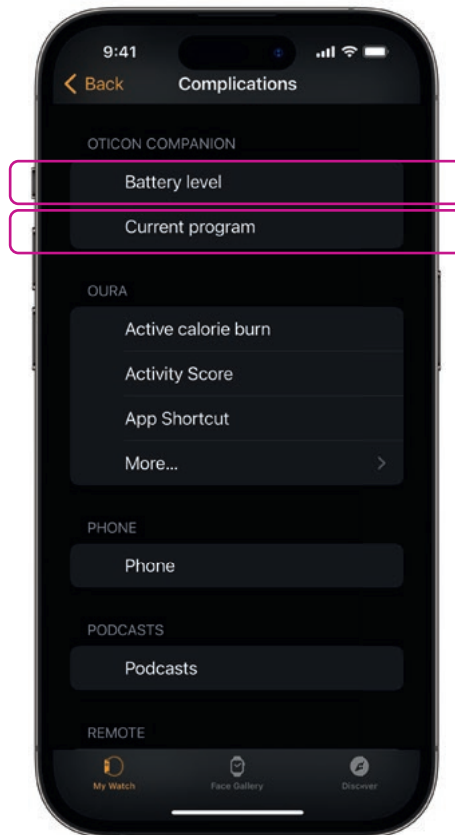

Bla gjennom Complications og velg **Batterinivå** under Oticon Companion.

Reperer prosessen for **øverst til høyre** og velg **nåværende program**.



Complications vises nå på urskiven i **det øvre hjørnet** på skjermen.

\* Hvis Complications er tilgjengelig på den valgte urskiven.