

Bruksanvisning

Streamer Pro 1.3A

ConnectLine



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Innledning til dette heftet

Dette heftet gir deg veiledning om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye Streamer Pro. Les nøye gjennom heftet, også delen Advarsler. Dette hjelper deg til å få mest mulig nytte av din Streamer Pro.

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruk av Streamer Pro, ta kontakt med din audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

| **Om** | Oppstart | Håndtering | Funksjoner | Advarsler | Mer info |

Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk	Streamer Pro skal brukes sammen med Oticons høreapparatbrukere. Produktet skal brukes sammen med den gitte hørselsløsningen. Streamer Pro er et bindeledd mellom høreapparat og andre enheter, slik som mobiltelefoner. Streamer Pro kan kobles til en rekke eksterne (ekstra) enheter for å gjøre det enklere for høreapparat brukere å høre TV-en bedre eller kommunisere gjennom Bluetooth-aktiverte mobiltelefoner, etc. Streamer Pro kan også brukes som en fjernkontroll som gjør det mulig for deg å justere høreapparatets volum og endre programmer i høreapparatet.
Indikasjoner for bruk	Ingen indikasjoner for bruk.
Tiltenkt bruker	Voksne og barn eldre enn 36 måneder.
Brukermiljø	Innendørs/utendørs.
Kontraindikasjoner	Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker enheten. For mer informasjon, les delen Advarsel.
Kliniske fordeler	Se høreapparatets kliniske fordeler.

Innholdsfortegnelse

Om	
Innhold i pakken	6
Tilbehør og reservedeler	8
Streameroversikt	11
Oppstart	
Bruk streameren med halsslyngen	12
Bruk streameren uten halsslyngen	14
Slå streameren AV og PÅ	16
Fjernkontroll ved høreapparatet	18
Pare streameren	20
Lade streameren	22
Håndtering	
Advarsel ved lavt batteri	24
Slett paring	28
Rengjøring og vedlikehold	31

Funksjoner	
Primærfunksjoner	32
Mobiltelefon	33
ConnectLine telefonløsning	40
ConnectLine mikrofon	42
ConnectLine TV-løsning	44
ConnectLine app	46
Sekundærfunksjoner	47
Musikk eller audiokabel	48
Headset-kabel	50
Trådløs musikk eller audio	52
Headset - trådløs	54
Telespole (innebygget)	56
FM-mottaker (valgfritt)	58
Advarsler	
Advarsler	60
Mer info	
Bruksforhold	64
Internasjonal garanti	65
Garanti	66
Teknisk informasjon	67

Innhold i pakken

Pakken består av følgende elementer:



Streamer Pro
1.3A




Halsslynge - medium



Halsslynge - lang

Dette heftet (Bruksanvisning)

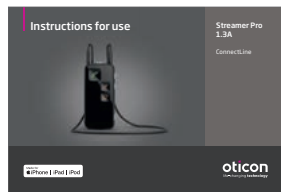

Boks 1



Lader

Strømforsyning vil variere fra land til land.

Boks 2

USB ladekabel



3.5 mm mini-jack stereo-kabel for MP3 eller musikk

3.5 mm headset-splitterkabel for bruk med PC-er



Boks 3



Beskyttende overtrekk

Tilbehør og reservedeler

Beskyttende overtrekk

Ekstra beskyttende overtrekk, mørk eller lysgrå, er tilgjengelig hos audiografen din.




Beskyttende overtrekk - enkeltknapp

Et beskyttende overtrekk, mørk eller lysgrå, med en utstikkende knapp, som gjør "blind" bruk lettere, er tilgjengelig hos audiografen din.



Ekstra halsslynge

Ekstra halsslynge, svart eller hvit, er tilgjengelig i tre størrelser: Kort (51 cm), medium (66 cm) og lang (81 cm) fra audiografen din.

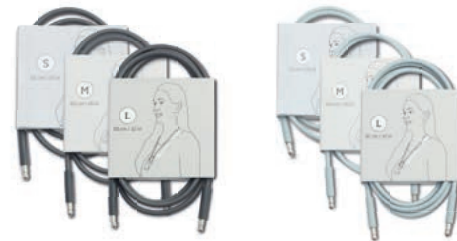

Belteklemme


En belteklemme, svart eller hvit, er tilgjengelig hos audiografen din.



VIKTIG

Vennligst referer til bruksanvisningen for ditt høreapparat, for detaljer om funksjoner på ditt høreapparat.

Streamer-oversikt

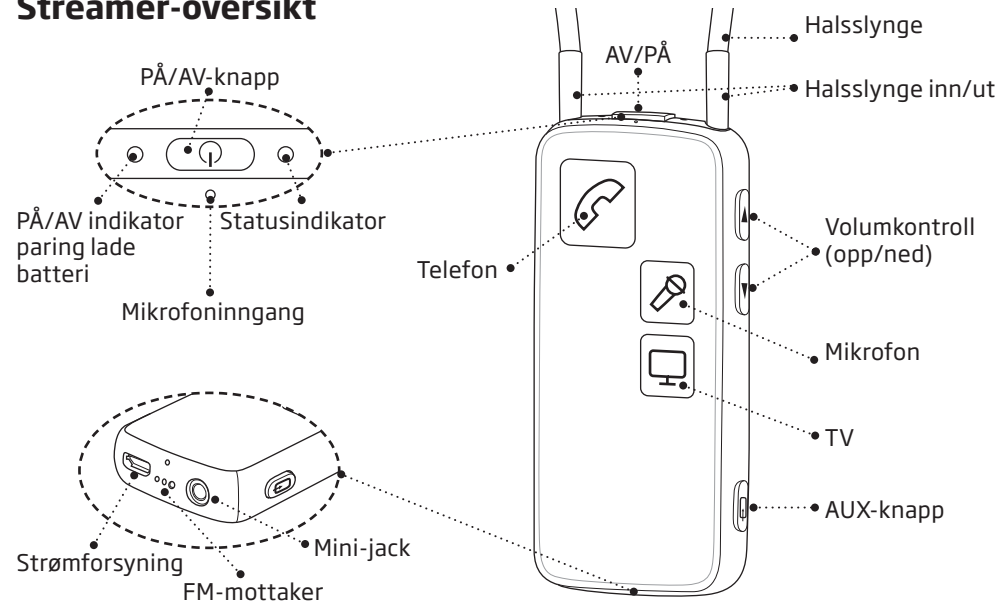

Bruk streameren med halsslyngen

Halsslyngen er en del av Streamerens elektroniske system. Den kan brukes som antenne for å sende lyd til høreapparatet ditt.

For best mulig lyd og lengst mulig strømmetid, bør streameren alltid bæres med en av de inkluderte halsslyngene. Streameren kommer med to halsslynger, en lang og en medium.



VIKTIG

Vennligst bruk halsslyngen med forsiktighet. For å unngå kvelning vil halsslyngen automatisk løsne dersom den setter seg fast i noe. Ikke korte ned eller endre på halsslyngens lengde på noen måte, slik som å knyte en knute for å korte ned på lengden. Dersom en halsslynge ryker, kan den ikke repareres og må umiddelbart erstattes med en ny. Kontakt din audiograf for utskiftning.

Sette inn halsslyngen

Halsslyngen klikker på plass i hullet på toppen av streameren.


Merk at når du snakker til noen gjennom streameren, er det viktig at stemmen din kan plukkes opp av den innebygde mikrofonen på toppen.

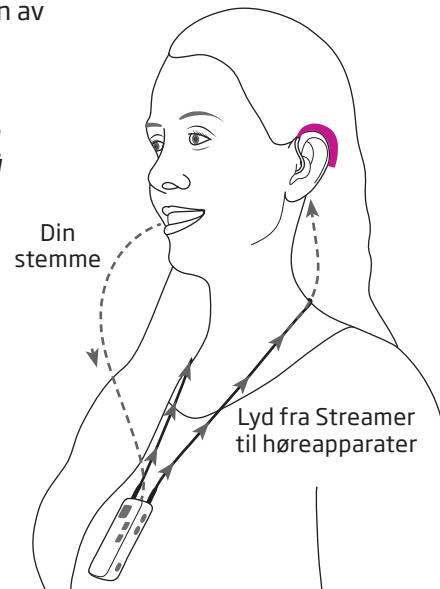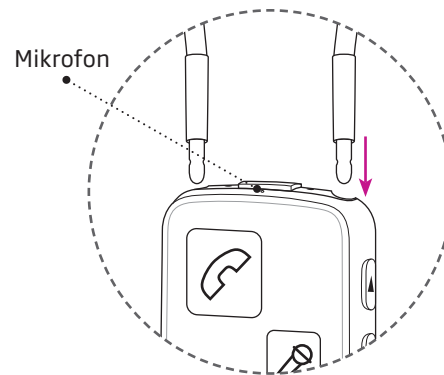

Bruk streameren uten halsslyngen

Når du bruker streameren uten halsslyngen, bør avstanden til høreapparatet være mindre enn en meter. Du kan oppleve at lyden detter ut, som er grunnen for hvorfor vi alltid anbefaler bruk av halsslyngen.

Når du bruker streameren uten halsslyngen, brukes mer kraft – som konsekvens vil maksimal strømmetid reduseres til 5 timer etter en full lading.

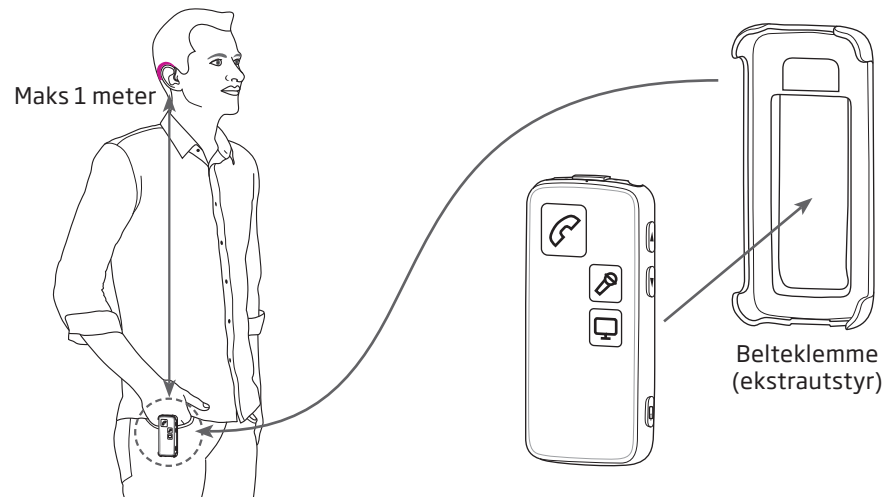

Slå streameren AV og PÅ

Slå på

Trykk på PÅ/AV-knappen på toppen av streameren i 2 sekunder helt til alle lysene på fremsiden og toppen blinker for å indikere at strømmen er på.


Slipp opp PÅ/AV knapp. Strømindikatoren på toppen av streameren bør nå gå over til grønt.

Dersom streameren ikke skruer seg på, må du forsikre deg om at den er ladet.

For å se statusen på streameren, trykk kort på PÅ/Av knappen.

Slå av

Trykk og hold inne PÅ/AV knappen på streameren i ca. 2 sekunder til den grønne strømindikatoren skrus av.

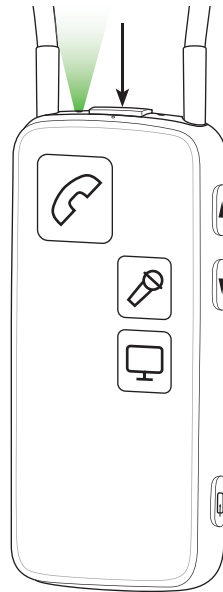

Status	Forfra	Beskrivelse
  	  	Streameren er av
  	  	Etter å ha trykket på PÅ/AV knappen i 2 sekunder, kommer alle lysene til å være på i et par sekunder for å indikere at streameren nå er skrudd på.
  	  	Streameren er nå slått på og mikrofonen er klar til bruk

Fjernkontroll ved høreapparatet

Volum opp/ned

Ved å trykke kort på enten volum opp eller ned, kommer volumet i høreapparatet til å bli regulert deretter. Du vil høre et lite bekreftelses "klikk" i høreapparatene.

Endre programmer i høreapparatene


Du kan endre programmer opp eller ned ved å holde volumet opp eller ned i mer enn et sekund. Endre programmer indikeres med en lyd i høreapparatet ditt.

Dempe høreapparatene

Du kan dempe høreapparatene ved å trykke på volum opp og ned i 1 sekund samtidig.

VIKTIG

Dempefunksjonen er kun tilgjengelig ved de nyeste Oticon høreapparatene. Vennligst kontakt audiografen din for detaljer. Selv når Streameren er skrudd av, vil fjernkontrollen ved høreapparatet fortsatt fungere.

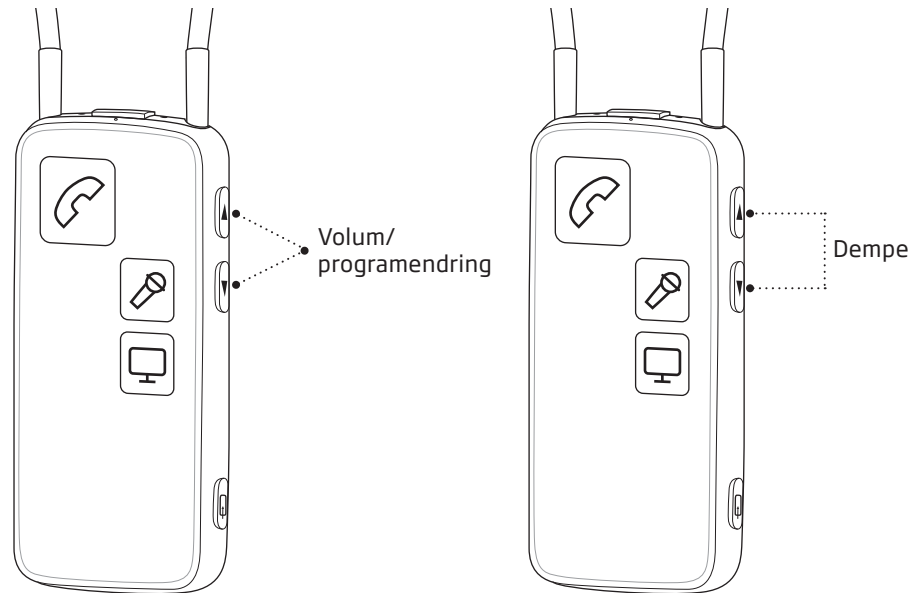


Pare streameren

Før streameren kan brukes sammen med andre enheter - slik som mobiltelefoner - må de to enhetene pares.

1. Sett streameren i paringsmodus

Trykk og hold inne PÅ/AV knappen inne i omtrent 5 sekunder, inntil indikatoren blinker blått.

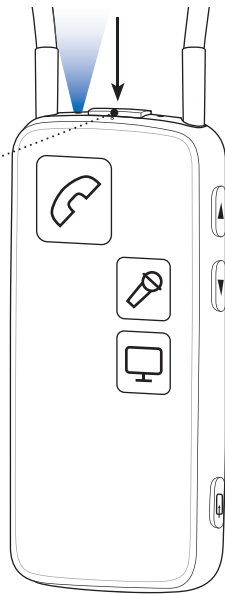


2. Sett den andre enheten (for eks. mobil) i paringsmodus.

Dette er vanligvis i en konfigurasjonsmeny på telefonen. Vi anbefaler deg å se i mobiltelefonens "bruksanvisning", f.eks under paring.

3. Den andre enheten (mobiltelefon) krever ofte en pinkode.

Pinkoden for Streameren er 0 0 0 0 (fire nuller).

4. Når den er paret, vil mobiltelefonen vanligvis vise et hodesett ikon; samtidig vil streamerens paringsindikator være konstant blå.

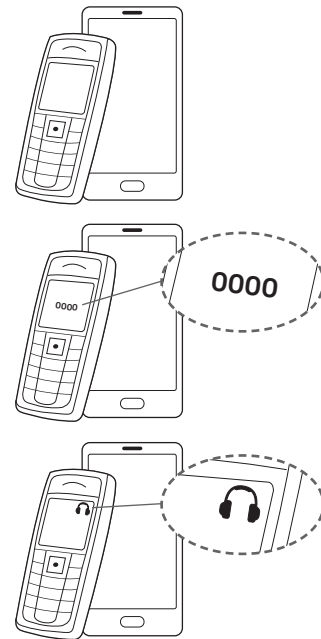

Lade streameren

Streameren bruker et oppladbart batteri. Vi anbefaler at du lader streameren minst en gang om dagen for best mulig prestasjon.

Sett kabelen ved den medfølgende laderen inn i mikro-USB uttaket på bunnen av streameren (**A**). Husk å sette laderen i stikkontakten.

Lading, når skrudd på, er indikert ved en blinkende grønn indikator på toppen. Når den er fulladet, vil indikatoren vise konstant grønn.

Lading, når skrudd av, er indikert ved en blinkende grønn indikator på toppen. Når den er fulladet, vil indikatorene være av.

PÅ/AV-knapp




VIKTIG

Når du lader Streameren, bruk den medfølgende originale strømforsyningen 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.



Status	Forfra	Beskrivelse
 		Lading - når skrudd av - statusindikator blinker grønt.
 		Lading - når skrudd på (eller i bruk) - statusindikatoren bytter mellom sterk og svak grønn.

 Blink  Forsvinner

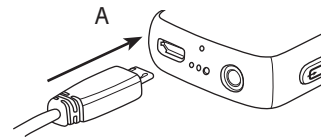


VIKTIG

Under lading, bør ladeindikatoren lyse som beskrevet i dette heftet. Dersom ladeindikatoren ikke er tent slik som beskrevet, kobler du enheten fra laderen og kontakter audiografen.

Indikator for lavt batteri

Streamereren viser at batterinivået er lavt (når det gjenstår ca. 20 minutters kapasitet) med et konstant rødt lys, og svært lavt (når det gjenstår ca. 5 minutters kapasitet) med et blinkende rødt lys.

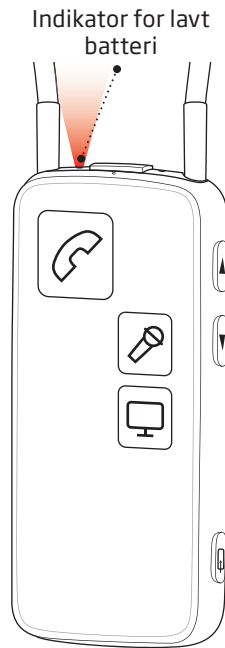

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Lavt batteri – 20 minutters kapasitet gjenstår ved strømming til høreapparater.
  		Meget lavt batteri – 5 minutters kapasitet gjenstår ved strømming til høreapparater.

 Konstant  Forsvinner


VIKTIG

Batteriet bør ikke tømmes fullstendig. Holde batteriet fulladet kommer til å forlenge batteriets kapasitet. Batteriet kan ikke skiftes av bruker selv.

Batterikapasitet og ladetid	
Batterikapasitet ved bruk av halsslynge	Opp til 10 timers typisk daglig bruk: 2 timers telefon, 6 timers TV og 2 timer stand-by.
Batterikapasitet uten bruk av halsslynge	Opp til 5 timers typisk bruk: 1 time telefon, 3 timers TV og 1 time stand-by.
Batteriets ladetid	2 timer for fullstendig lading, ved å bruke strømforsyning.
Fjernkontroll	Dersom Streameren er skrudd av, kan fjernkontrollen ved høre-apparatet fungere i opp til 6 måneder på en fullstendig opplading.
Forventet batteri levetid	Streamerens batteri vil fungere i mer enn 2 år når det fullades en gang om dagen. Batteriet kan skiftes ut av audiografen din.

Slett paring

Dersom du har problemer med paringer, kan du slette alle paringer ved å trykke på PÅ/AV knappen og volum opp knappen på samtidig i 3 sekunder.

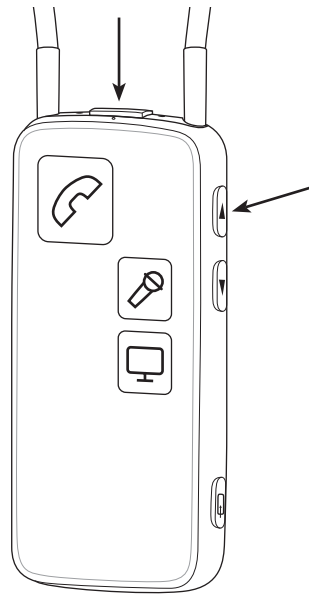

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer i paringsmodus
  		Paring fullført
  		Streamer på

 Konstant  Blinkende

Statisk elektrisitet

Dersom Streameren utsettes for en elektrostatisk utlading, f.eks statisk elektrisitet, kan den hende den stopper å strømme. Streameren kommer til å starte på nytt som standard og du kan starte strømmingen din på nytt.

For detaljert informasjon om hvordan du oppretter spesifikke strømmekoblinger, vennligst se "Funksjoner" i denne bruksanvisningen.

Rengjøring og vedlikehold

Streameren er en forseglet enhet som kun krever begrensede mengder med vedlikehold. All smuss, fuktighet eller fett bør rengjøres ved å bruke en myk, tørr klut. Det anbefales at du rengjør Streameren med jevne mellomrom. Mikrofoninntaket og kontaktene for lydinngang, halsslynge og lading må holdes fri for smuss eller rusk.

VIKTIG

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre Streameren. Streameren og halsslyngen må aldri vaskes med eller senkes ned i vann eller andre flytende væsker.

Primærfunksjoner


Streamerens brukergrensesnitt har blitt designet for å gi deg best mulig daglig bruk i følgende situasjoner:

1. Bruk av mobiltelefon via Bluetooth*.

Bruk av ConnectLine telefonløsning (selges separat) med en analog fasttelefon*.

2. Bruk av en ConnectLine parttermikrofon (selges separat), for å forbedre dine sjanser til å høre en valgt taler på avstand, eller i meget støyende situasjoner.


3. Bruk av ConnectLine Tv-løsning (selges separat) for å overføre Tv-lyden trådløst til høreapparatet ditt*.

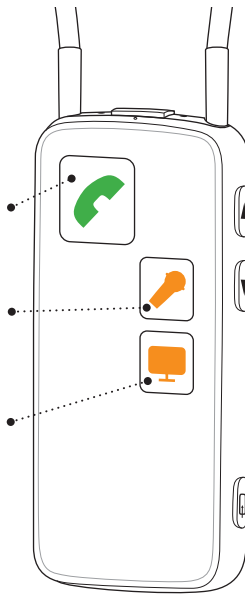

* Faktisk gjøres streamer og høreapparatene om til et trådløst headset

Mobiltelefon

For å være i stand til å motta eller foreta anrop mens du bruker streameren, må du forsikre deg om at streameren og mobiltelefonen har blitt parett, er skrudd på og er innenfor rekkevidde (10 meter). Mobiltelefonen din vil ofte indikere at den er koblet til streamer med et lite headset-ikon.

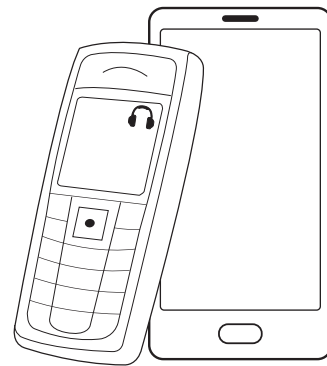


Hvordan svare på et anrop

Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-mikrofonen.

Når mobiltelefonen din ringer, vil du høre et varsel om innkommende anrop i høreapparatene. Samtidig blinker telefonknappen på streamer og statusindikatoren grønt.

Trykk kort på telefonknappen på streamer for å svare på anropet. Du vil høre et lite bekräftelsespip i høreapparatene dine. Telefonknappen og statusindikatoren vil nå være konstant grønne.

For å avslutte anropet, trykker du ganske enkelt på telefonknappen på streameren.

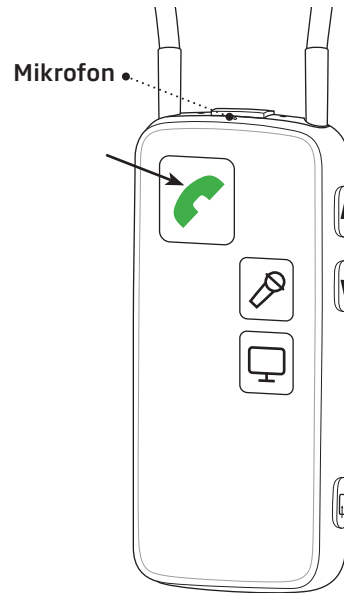

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Telefonindikator og toppstatus blinker grønt. Du vil høre et innkommende samtale anropsindikator i høreapparatene dine.
  		Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som erkjenner at anropet er besvart - nå kan du lytte og snakke med den andre parten.

 Konstant  Blinkende


Hvordan foreta et anrop

Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-mikrofonen.

For å foreta et anrop, trenger du bare å bruke mobiltelefonen. Du trenger ikke å bruke streameren. Bare tast inn nummeret slik du normalt gjør for å ringe – samtalen kobles automatisk til din streamer.

Telefonknappen på streamer og statusindikatoren på toppen blir grønne, og du vil høre en bekreftelse fra høreapparatene som indikerer at samtalen nå er koblet gjennom din streamer og høreapparatene.

For å avslutte anropet, trykker du ganske enkelt på "avslutt anrop" knappen på telefonen eller kort på telefonknappen på streameren.

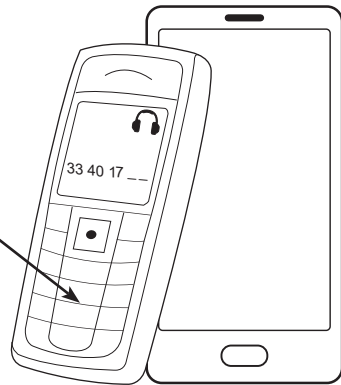

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som erkjenner at anropet er koblet til – nå kan du lytte og snakke med den andre parten.

 Konstant  Blinkende

Persontilpasning av mobiltelefon funksjoner

De følgende mobilfunksjonene kan aktiveres eller deaktiveres av audiografen din.

Avvis anrop - standard på

Et innkommende anrop kan avvises ved å trykke kort på volumknappen på streameren.

Taleoppringing - standard på

Ved å trykke kort på telefonknappen aktiveres taleoppringing (hvis den støttes av mobiltelefonen din og du ikke befinner deg i området for en ConnectLine-telefonadapter).

Slå siste brukte nummer på nytt - standard på

Ved å trykke på og holde nede telefonknappen aktiveres det siste nummeret på nytt (hvis det støttes av mobiltelefon).

Overfør anrop - standard på

Hvis du trykker og holder nede telefonknappen, overføres et anrop tilbake til mobiltelefonen.

Alle frontknapper svarer på anrop - standard på

Hvis den er av, er det bare telefonknappen på streameren som svarer på anrop.


Aktivere innkommende (A2DP) koblinger - standard av

Hvis det er aktivert, kan andre enheter, f.eks. iPod-er, datamaskiner og mobiltelefoner kan aktivere lydstrømming, for eksempel innkommende tekstvarsler eller musikk startet fra en paret og tilkoblet mobiltelefon.

ConnectLine telefonløsning


Streameren kan også brukes med en tradisjonell analog fasttelefon ved å bruke en ConnectLine telefonløsning, som er tilgjengelig som et separat tilbehør.

For detaljer om hvordan du bruker ConnectLine telefonløsning, vennligst se bruksanvisningen som følger med ConnectLine telefonadapter.

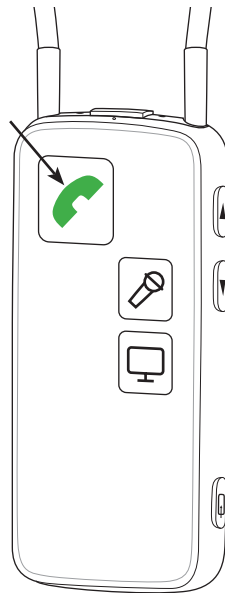

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamers klar og på
  		Streamers koblet til - du er i stand til å lytte til og snakke med den andre parten.


 Konstant

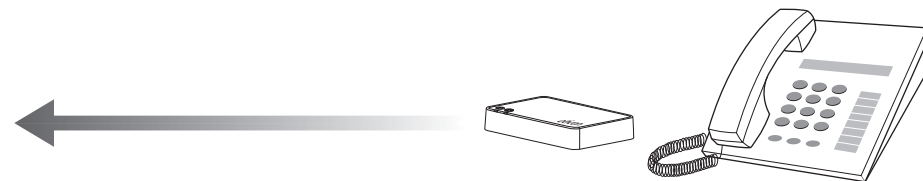

ConnectLine mikrofon


ConnectLine mikrofon er tilgjengelig som et eget tilbehør. Tale fra personen som bruker mikrofonen overføres gjennom streameren til personen som har på seg Oticon høreapparater.

For detaljer om hvordan du bruker ConnectLine telefonløsning, vennligst se bruksanvisningen som følger med ConnectLine mikrofonen.

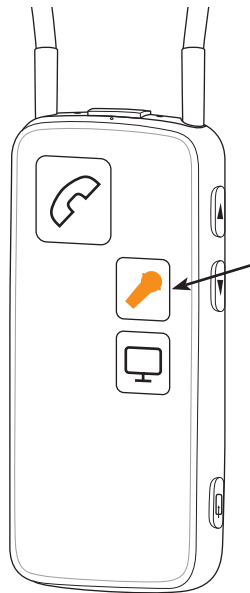

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Når koblet til mikrofonen - kommer du til å høre lyd fra mikrofonen i høreapparatene.


  Konstant

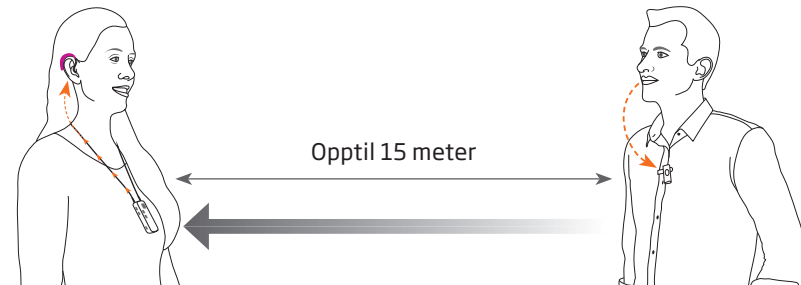

ConnectLine TV-løsning


En ConnectLine Tv-løsning er tilgjengelig som et eget tilbehør, som overfører lyden fra en TV til ditt Oticon høreapparat gjennom streameren.

For detaljer om hvordan du bruker ConnectLine TV-løsning, vennligst se bruksanvisningen som følger med ConnectLine TV-adapter.

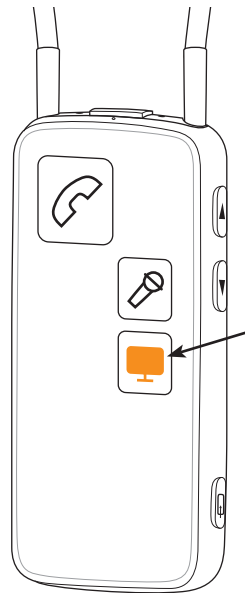

Status	Forfra	
  		Streamer klar og på
  		Koble til TV
  		Streamer koblet til - lyd fra TV i høreapparater.

  Konstant   Blinkende

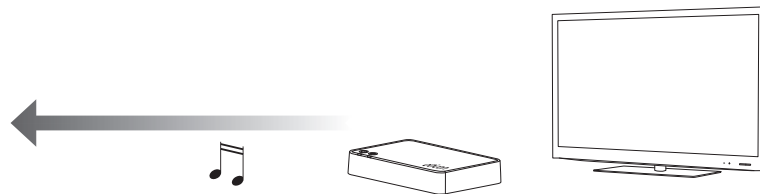

ConnectLine app

Appen for iPhone®, iPad®, iPod touch® og Android™ enheter tilbyr en intuitiv og diskre måte å kontrollere høreapparatene og ConnectLine-systemet. Den tilbyr også muligheten til å tilpasse funksjonene ved ConnectLine-systemet.

Appen er tilgjengelig på App Store® og Google Play™.



For informasjon om kompatibilitet, vennligst se www.oticon.no/compatibility.




Merket "Laget for iPhone" betyr at det elektroniske tilbehøret har blitt laget for å kobles spesifikt til Apples produkt(er) som fremgår av merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apple sine standarder for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller dens overholdelse av regulatoriske standarder og standarder for sikkerhet. Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke fra Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker fra Google LLC. Merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ytelse.

Sekundærfunksjoner

Streameren kan brukes med en stor rekke standard periferiutstyr, slik som Mp3-spillere, datamaskiner, etc.

De følgende prioritetene gjelder.

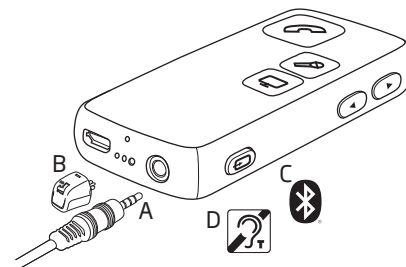


A	Prioritet 1	Mini-jack inn/ut (dersom tilkoblet)	Trykk kort på AUX-knappen
B	Prioritet 2	FM (dersom tilkoblet)	Trykk kort på AUX-knappen
C	Prioritet 3	Trådløs Bluetooth (innebygget)	Trykk kort på AUX-knappen
D	Prioritet 4	Teleslynge mottaker (innebygget)	Trykk og hold inne Aux-knapp i 2 sekunder

Musikk eller audiokabel


Ved å sette inn og koble til den inkluderte mini-jack kabelen er det mulig for deg å lytte til musikk/audio fra en lang rekke enheter.

For å lytte til audio fra enheten din, trykk kort på aux-knappen. Når kabelen er satt inn, vil strømmingen starte automatisk.

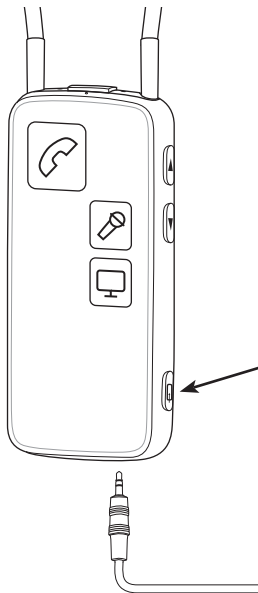

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra teleslyngesystemet

  Konstant

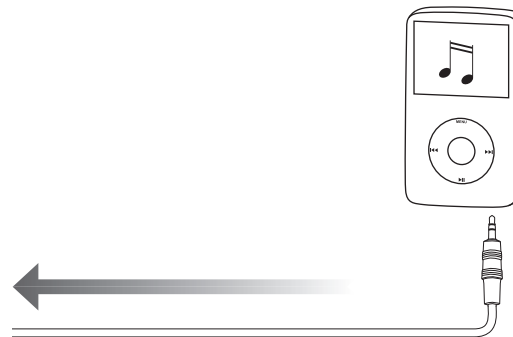


Headset-kabel

Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-mikrofonen.


Ved å sette inn og koble til den inkluderte mini-jack-kabelen og det inkluderte headset splitterkabel, er det mulig for deg å bruke streameren som et headset sammen med datamaskinen din.

For å bruke headset-funksjonen, holder det å trykke kort på AUX-knappen.

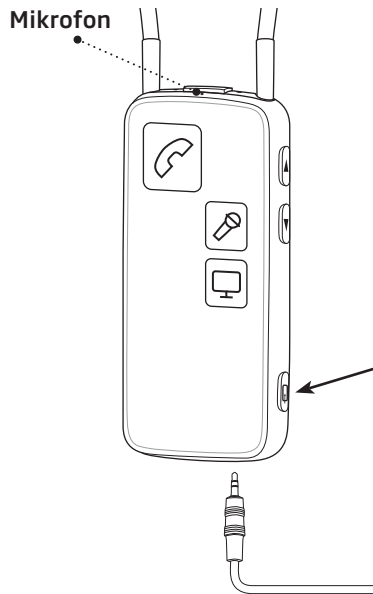

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Du kommer til å høre et bekreftelsespip - du er i stand til å lytte til og snakke med den andre parten

  Konstant

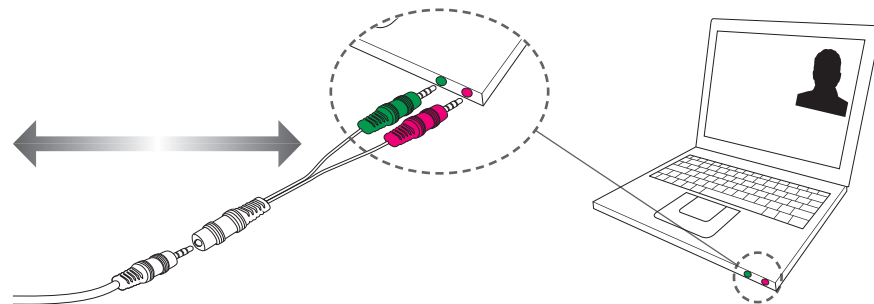


Trådløs musikk eller audio

For å høre på musikk eller lyd trådløst, for eks. fra en Mp3-spiller eller en datamaskin med innebygget Bluetooth, må du forsikre deg om at enheten er paret til streameren din, at begge er skrudd på og er innenfor rekkevidde (<10 meter).

For å lytte til musikk, for eks. fra en mobiltelefon, trykk på AUX-knappen før du starter musikkspilleren.

Aktivere innkommende koblinger - standard av
Dersom aktivert av audiografen din, kan iPod-er, datamaskiner og mobiltelefoner aktivere audiostrømming automatisk. For eksempel, innkommende tekstvarsler eller musikk startet fra en paret og tilkoblet mobiltelefon.

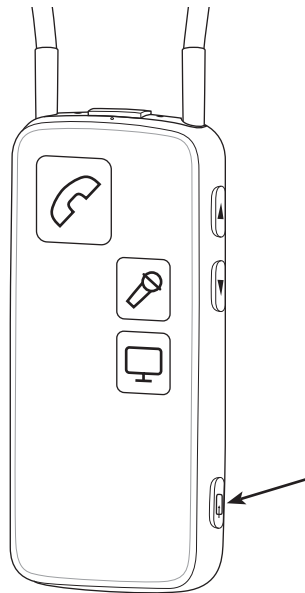

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Streamer koblet til musikk eller audioenhet.
  		Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra enheten når tilkoblet.

  Konstant  Blinkende




Headset - trådløs

Forsikre deg om at du kan snakke inn i streamer-mikrofonens inntak.


Når paret til en datamaskin, må du forsikre deg om at streameren er paret som en headset-enhet.

For å bruke headset-funksjonen, gjøres anropskontroll fra datamaskinen.

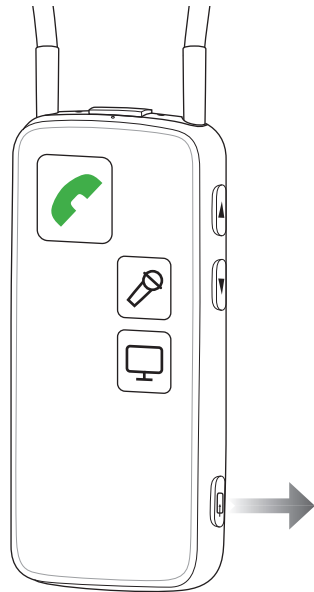

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Streamer koblet til musikk eller audioenhet.
  		Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra enheten når tilkoblet.

  Konstant  Blinkende

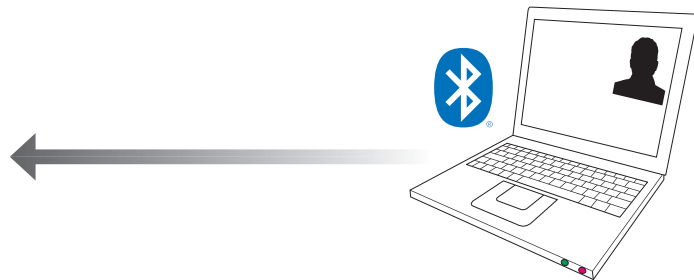


Telespole (innebygget)

Streamereren har en innebygget teleslyngemottaker (telespole).

For å motta lyd fra en teleslynge mottaker, trykk og hold inne AUX-knappen i 2 sekunder.

Vennligst merk: hvis ønskelig kan operasjonen endres, slik at en telespole kan aktiveres ved et kort trykk.

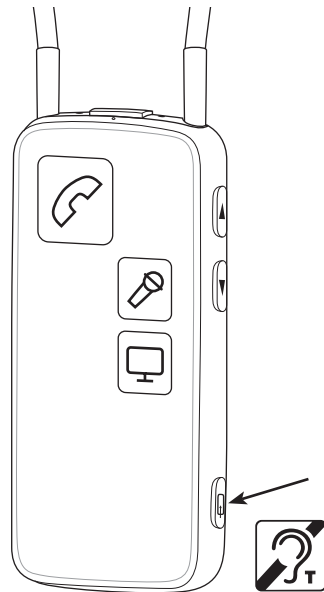

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på
  		Når tilkoblet kommer du til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra teleslyngesystemet.


  Konstant

FM-mottaker (valgfritt)

En FM-mottaker kan plugges inn i europinngangen, på bunnen av streameren. Mottakeren brukes til å motta FM-signaler fra en FM-sender, typisk brukt av en lærer.

Bare plugg inn FM-mottakeren og trykk kort på AUX-mottakeren. Når FM-senderen og mottakeren er synkronisert og er på samme kanal, vil FM-signalet bli mottatt i høreapparatene.

Når FM-mottakeren din har en vippebryter, skyv bryteren inn i OO posisjon.

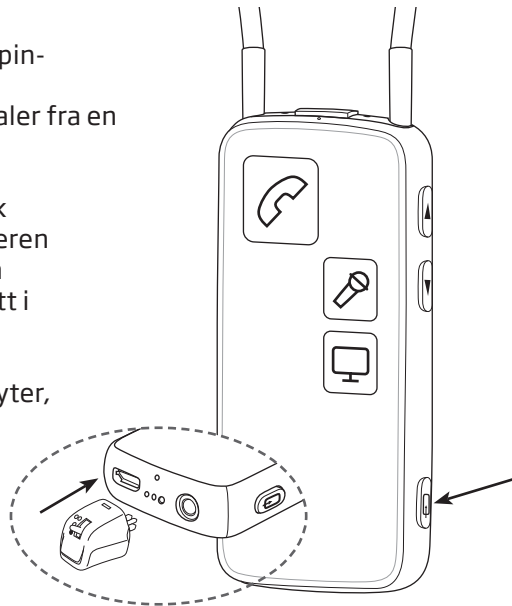

Status	Forfra	Beskrivelse
  		Streamer klar og på. FM-mottaker skrudd på og klar for kanal-synkronisering.
  		Du kommer til å høre et bekreftelsespip fulgt av lyden fra enheten når tilkoblet.

  Konstant

VIKTIG

Vennligst sikre at Streameren er skrudd på, men ikke strømmer lyd til høreapparatene, når FM kanalsynk er nødvendig.

Advarsler

For din personlige sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker din Streamer Pro. Kontakt audiografen hvis du opplever uventede eller alvorlige hendelser med Streamer Pro under bruk eller på grunn av bruken. Hørselseksperten vil hjelpe deg med å håndtere problemene og om relevant med å rapportere til produsenten og/eller nasjonale myndigheter.

Tilkobling til eksternt utstyr

Sikker bruk av Streamer Pro ved tilkobling til eksternt utstyrt med AUX-kabel avhenger av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Oppladbart batteri

Ikke forsøk å åpne Streamer Pro, da dette kan skade batteriet.

Prøv aldri å bytte ut batteriet. Hvis det er nødvendig å bytte ut batteriet, må du ta med enheten til leverandøren. Servicegarantien er ugyldig hvis det er tegn på at den har blitt tuklet med.

Sikkerheten ved gjenopplading av batterier ved bruk av USB-ledningen, avgjøres kun av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Fare for kvelning og risiko for å svelge batterier og andre smådeler

Streameren, dens deler og batterier er ikke leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn og andre som kan tenkes å komme til å svelge disse delene eller på annen måte skade seg selv.

Hvis et batteri, et høreapparat eller en liten del svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig.

Krysskontroll

Streameren din må oppbevares utilgjengelig for barn og andre som kan tenkes å ta kontroll over funksjonaliteten, for å sikre din personlige sikkerhet og unngå feil bruk.

Bruk av streamer med halsslynge

Dersom halsslynge uforvarende skulle henge seg fast i noe mens den bæres, er halsslyngen konstruert slik at den løsner automatisk. Derfor må det aldri forsøkes forkorte eller endre halsslyngen på en uautorisert måte. Halsslyngen bør ikke brukes hos barn som veier mindre enn 11 kg.

Varme og kjemikalier

Streameren må aldri utsettes for sterk varme, f.eks. ved å etterlates inni en bil som står parkert i solen. Streamerens må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller andre ovner. Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade Streameren. Ta alltid av deg Streameren før du bruker slike produkter, og la produktet tørke før du setter fjernkontrollen tilbake på plass.

Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi og operasjon

Ta av deg Streameren under f.eks. røntgen, CT-/MR-/PET-skanning, elektroterapi eller operasjon siden den kan bli skadet om den blir eksponert for sterke elektromagnetiske felt.

Aktive implantater

Streamer pro er grundig testet og karakterisert med hensyn til virkninger på menneskers helse i henhold til internasjonale standarder for menneskelig eksponering (Specific Absorption Ratio - SAR), indusert elektromagnetisk effekt og spenninger inn i menneskers kropp. Eksponeringsverdiene er godt under internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser for SAR, indusert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp definert i standardene for menneskelig helse og sameksistens med aktive medisinske implantater, som pacemakere og hjertestartere.

Advarsler

Mulige bivirkninger

De ellers ikke-allergifremmende materialene som brukes i Streameren din, kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger.

Oppsøk lege hvis disse tilstandene oppstår.

Bruk i trafikken

Du kan bli distraheret når du bruker Streameren. Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker Streameren.

Vennligst referer til nasjonale lover om bruk av kommunikasjonsenheter i trafikken.

Bruk i fly

Streameren din inneholder Bluetooth. Streameren skal ikke brukes om bord på fly, med mindre flypersonalet spesifikt har tillatt det.

Eksploder

Streameren er trygg å bruke under vanlige bruksforhold. Streameren har ikke blitt testet for samsvar med internasjonale standarder når det gjelder eksplosive atmosfærer.

Bruk derfor ikke Streameren i miljøer med fare for eksplosjoner, f.eks. gruver, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare bedøvelsesmidler håndteres.

Interferens

Streameren er blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Likevel, kan interferens oppstå mellom Streameren og andre enheter (f.eks. noen mobiltelefoner, amatørradio, butikkalarmer og andre trådløse enheter). Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom Streameren og enheten som skaper interferens.

Bruk av tredjeparts tilbehør

Bruk bare tilbehør, energiomformer eller kabler levert av produsenten. Inkompatibelt tilbehør kan føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på enheten din.

Lading

Lad Streamer Pro hver sjette måned for å forhindre potensielle batteriskader under lagring.

Mobiltelefonkompatibilitet

Se www.oticon.no/compatibility for en liste over mobiltelefoner som er testet omfattende av Oticon, og har vist seg å oppfylle minimumskravene for ConnectLine-kompatibilitet på tidspunktet for testing. Imidlertid tar Oticon ikke noe ansvar for slik kompatibilitet generelt. Spesielt skal Oticon ikke være ansvarlig for inkompatibilitet som følge av fremtidige oppdateringer av mobiltelefonene, og heller ikke fra hendelser med inkompatibilitet som ikke er dekket av og/eller funnet i disse testene. Oticon tar ikke økonomisk ansvar når det gjelder refusjon av mobiltelefoner som ikke fungerer som forventet. Før du kjøper en ny mobiltelefon, anbefales du å se listen ovenfor.

Bruksforhold

Driftsmiljøforhold	Temperatur: +10 °C til 45°C Fuktighet: < 85%, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
Transport og oppbevaringsforhold	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring: Temperatur: -20°C til +60°C Fuktighet: < 85%, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Internasjonal garanti

Enheden din dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve enheten, men ikke tilbehør som f.eks. batterier, kabler, strømforsyning osv. Garantien dekker IKKE problemer som oppstår som følge av feilaktig/uriktig håndtering eller vedlikehold, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av en uautorisert part, at enheten er blitt utsatt for etsende væske, skade som følge av at fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, eller feiljusteringer; slike forhold kan gjøre garantien ugyldig. I henhold til denne garantien vil produsenten velge etter eget skjønn å reparere enheten eller erstatte den med en tilsvarende modell. Denne garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan derfor ha innført en garanti som går utover

denne begrensede garantien. Ta kontakt med Oticon AS for mer informasjon.

Hvis du trenger hjelp

Ta med Streamer Pro til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og justeringer på stedet. Audiografen din kan hjelpe deg med å få garantiservice fra produsenten. Audiografen din kan kreve et gebyr for deres tjenester.

Garanti

Sertifikat

Navn på eier: _____

Audiograf: _____

Audiografens adresse: _____

Audiografens telefonnummer: _____

Kjøpsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Serienr.: _____

Teknisk informasjon

Modell	Streamer Pro 1.3
GTIN nummer	05707131379399

Streameren inneholder en radiotransceiver som benytter en magnetisk induksjonsteknologi med kort rekkevidde som virker på 3,84 MHz. Styrken på senderens magnetiske felt er veldig svakt, og er alltid under 15 nW (typisk under -15 dBµA/m på 10-meters avstand).

Streameren inneholder en radiosender som bruker Bluetooth ved 2.4 GHz. Radiosenderen er svak og er alltid under 10mW, tilsvarende 10 dBm i total utstrålt effekt.

Streameren samsvarer med internasjonale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker.

På grunn av begrenset plass på Streamer, er relevante godkjenningstempler å finne i dette dokumentet.

Ytterligere informasjon finnes i:
Tekniske datablad (TD) på www.oticon.no.

USA og Canada

Dette apparatet inneholder en radiomodul med følgende sertifiserings ID-numre:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs standarder.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

1. denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
2. denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

Merk

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Herved erklærer produsenten at denne enheten er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EU.

Dette medisinske utstyret samsvarer med forskriften om medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos produsenten.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet	
	Advarsler Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.
	Produsent Enheden er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den medisinske enhetens produsent, slik definert i EU-direktiv 2017/745 og 2017/746.
	CE-merke Denne enheten samsvarer med alle påkrevde EU-forskrifter og direktiver.
	Elektronisk avfall (WEEE) Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer. Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
	Merke for regulatorisk overholdelse (RCM) Enheden samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia eller New Zealand.
	Innendørsbruk Kun for innendørs bruk.
	Dobbel isolasjon Strømforsyningen til produktet er dobbeltisolert. Dette betyr en veldig lav risiko for enkeltfeil.
	Laget for Apple-merker Enheden er kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet	
	Bluetooth-logo Registrert varemerke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. All bruk krever lisens.
GTIN	Global Trade Item Number Et globalt unikt 14-sifret nummer brukt til å identifisere medisinsk utstysprodukter, inkludert medisinsk enhet programvare. GTIN i dette heftet er knyttet til medisinsk enhet programvare. GTIN på forskriftsmessig emballasjemerke er knyttet til medisinsk enhet programvare.
	Singapore IMDA-merke Indikerer at enheten samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre autoriserte radiokommunikasjonsnettverk

Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene	
	Holdes tørr Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.
	Advarselssymbol Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.
	Katalognummer Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Serienummer Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
	Symbol for gjenvinning av batteri Symbol for gjenvinning av Li-Ion-batteri
5,0 V  500 mA	Strømforsyningsinngang Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra strømforsyningen til enheten din.
	Medisinsk enhet Denne enheten er et medisinsk utstyr.
	Telekom-symbol Japan Merke for sertifisert radioutstyr.
	Sør-Afrika ICASA-merke Enheden har lisens til å selges i Sør-Afrika.

219920N0 / 2020.03.30 / v1

219920N0 / 2020.03.30 / v1



oticon
life-changing **technology**

219920N0 / 2020.03.30 / v1