

60 85 100 105

	Oticon Opn S 1	Oticon Opn S 2	Oticon Opn S 3
Taleforståelse	OpenSound Navigator™	Nivå 1	Nivå 2
	- Balanserende energi effekt	100%	50%
	- Maks støyfjerning	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	Speech Guard™ LX	Nivå 1	Nivå 2
	Spatial Sound™ LX	4 estimatorer	2 estimatorer
	Soft Speech Booster LX	•	•
Lydkvalitet	Speech Rescue™ LX	•	•
	Klar dynamikk	•	-
	Romlig lydstyring	•	-
	Tilpasningsbåndbredde*	10 KHz	8 KHz
	Prosesseringskanaler	64	48
Lytte-komfort	Bassøkning (streaming)	•	•
	Flyktig lydstyring	4 konfigurasjoner	Av/på
	Feedbackvern LX	•	•
Tilpasning og optimalisering	Vindstøykontroll	•	•
	YouMatic™ LX	3 konfigurasjoner	2 konfigurasjoner
	Tilpasningsbånd	16	14
	Flere direksjonalitetsalternativer	•	•
	Tilpasningskontroll	•	•
	Oticon firmware-oppdatering	•	•
Tilkoblingsmulighet til verden	Tilpasningsrasjonaler	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
	Stereo streaming (2.4 GHz)	•	•
	Oticon PÅ App	•	•
	ConnectClip	•	•
	Fjernkontroll 3.0	•	•
	TV-boks 3.0	•	•
	Telefonadapter 2.0	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•

* Tilgjengelig båndbredde for justering av forsterkning under tilpassing

DriftsforholdTemperatur: +5°C til +40 °C
Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende**Lagings- og transportforhold**

Temperatur og fuktighet bør ikke overskride følgende grenser i lengre perioder under transport og lagring.

Transport:Temperatur: -20°C til +60°C
Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende**Oppbevaring:**Temperatur: -20°C til +30°C
Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

Oticon Opn S™ miniRITE R er en diskret stil som drives av et oppladbart litium-ion batteri. Den induktive laderen sikrer pålitelig og rask lading innen 3 timer for en fullstendig opplading.

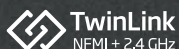
miniRITE R har telespole og en praktisk dobbel trykknapp.

OpenSound Navigator™ hjelper brukere til å velge ut og forstå tale i alle slags miljøer ved å balansere lydkildene og dempe støy.

OpenSound Optimizer™ forbedrer brukerens lytteopplevelse og komfort ved å blokkere feedback og sikre den målrettede forsterkningen av lydkilder.

TwinLink™ trådløse teknologi kombinerer binaural kommunikasjon og 2,4 GHz tilkoblingsmuligheter i stereo-streaming direkte fra digitale enheter.

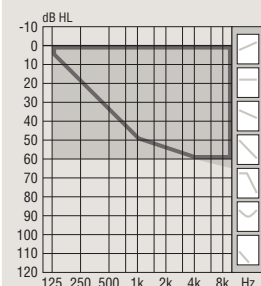
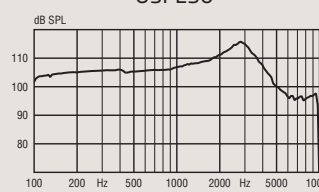
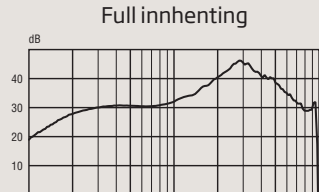
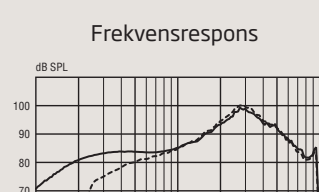
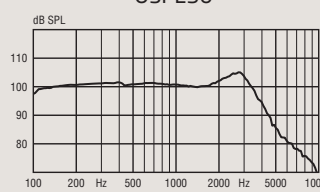
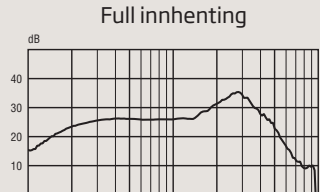
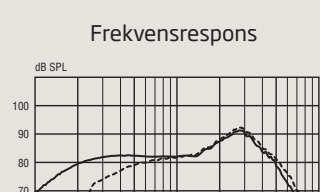
Oticon Opn S er bygget på den kraftige Velox S™ -plattformen som har programmerbar firmware-arkitektur, som støtter fremtidige ytelsesoppdateringer.



For informasjon om kompatibilitet, besøk www.oticon.no/connectivity

Oticon Opn S 1

miniRITE R 60

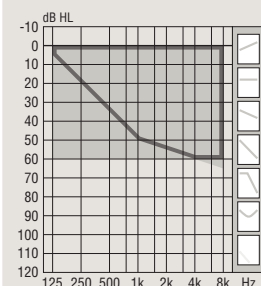
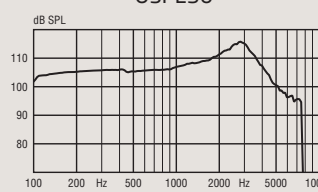
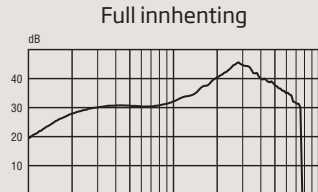
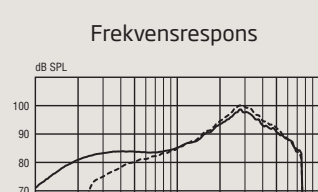
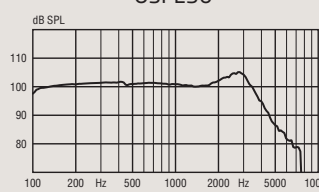
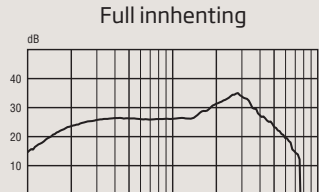
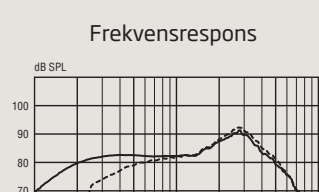
Tekniske data		Øresimulator	2CC Coupler
		Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 		  	  
Propp, Bass- og Power-dome			
Åpne dome			
Teknisk informasjon			
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.			
Akustisk input: 60 dB SPL magnetisk input: 31,6 mA/m			
OSPL90		116 dB SPL	105 dB SPL
1600 Hz		109 dB SPL	100 dB SPL
HFA-OSPL90		110 dB SPL	102 dB SPL
Full innhenting*		46 dB	35 dB
1600 Hz		37 dB	29 dB
HFA-FOG		38 dB	30 dB
Referansetest-økning		30 dB	26 dB
Frekvensområde		110-9700 Hz	100-9200 Hz
1 mA/m-felt		67 dB SPL	-
Telekveiloutput (1600 Hz)		87 dB SPL	-
SPLITS V/H		-	85/85 dB SPL
Total harmonisk forvrengning		<2 %	<2 %
(inngang 70 dB SPL)		<3 %	<2 %
1600 Hz		<2 %	<2 %
Ekvivalent støyinngangsnivå		21 dB SPL	18 dB SPL
Dir		28 dB SPL	27 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Oticon Opn S 2 & 3

miniRITE R 60

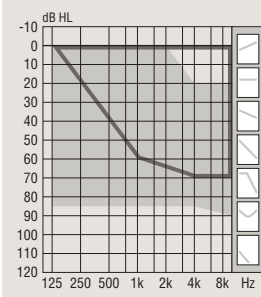
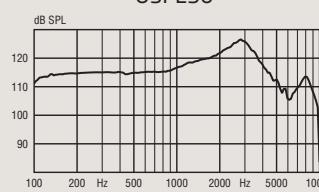
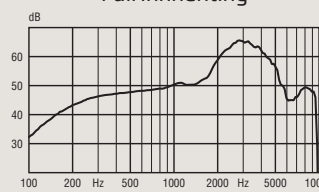
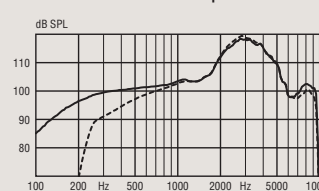
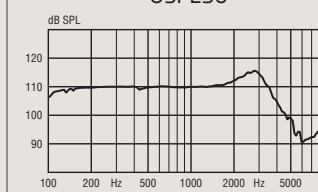
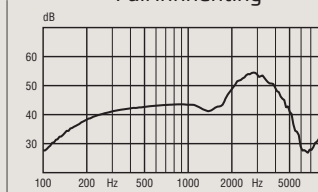
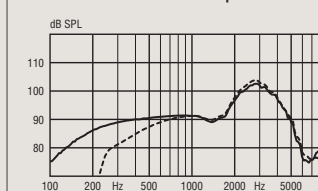
Tekniske data		Øresimulator	2CC Coupler
		Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 		  	  
Propp, Bass- og Power-dome			
Åpne dome			
Teknisk informasjon			
Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.			
Akustisk input: 60 dB SPL magnetisk input: 31,6 mA/m			
OSPL90		116 dB SPL	105 dB SPL
1600 Hz		109 dB SPL	100 dB SPL
HFA-OSPL90		110 dB SPL	102 dB SPL
Full innhenting*		46 dB	35 dB
1600 Hz		37 dB	29 dB
HFA-FOG		38 dB	30 dB
Referansetest-økning		30 dB	26 dB
Frekvensområde		110-7500 Hz	100-7500 Hz
1 mA/m-felt		67 dB SPL	-
Telekveiloutput (1600 Hz)		87 dB SPL	-
SPLITS V/H		-	85/85 dB SPL
Total harmonisk forvrengning		<2 %	<2 %
(inngang 70 dB SPL)		<3 %	<2 %
1600 Hz		<2 %	<2 %
Ekvivalent støyinngangsnivå		22 dB SPL	19 dB SPL
Dir		30 dB SPL	28 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Oticon Opn S 1

miniRITE R 85

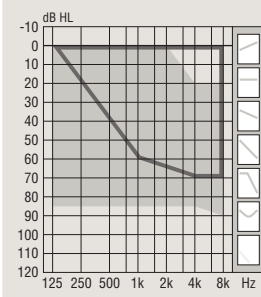
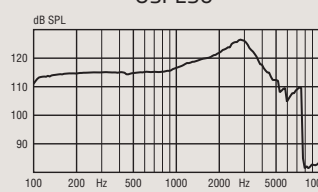
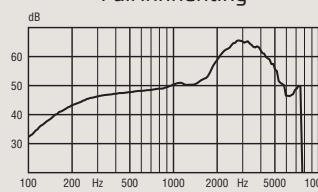
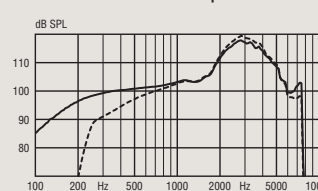
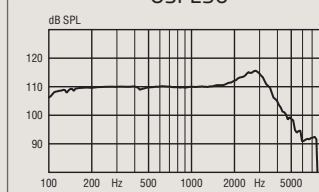
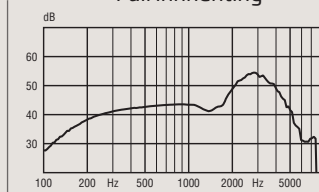
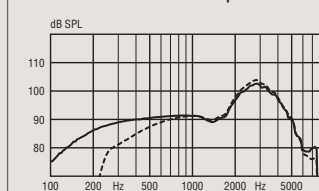
Tekniske data		Øresimulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
  Propp, Bass- og Power-dome Åpne dome Teknisk informasjon Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.		   Akustisk input: 60 dB SPL magnetisk input: 31,6 mA/m	   Akustisk input: 60 dB SPL magnetisk input: 31,6 mA/m
OSPL90	Toppverdi	127 dB SPL	116 dB SPL
	1600 Hz	120 dB SPL	111 dB SPL
	HFA-OSPL90	121 dB SPL	112 dB SPL
Full innhenting*	Toppverdi	66 dB	54 dB
	1600 Hz	52 dB	43 dB
	HFA-FOG	55 dB	47 dB
Referansetest-økning		45 dB	34 dB
Frekvensområde		120-9500 Hz	100-8500 Hz
Telekveiloutput (1600 Hz)	1 mA/m-felt	82 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	102 dB SPL	-
	SPLITS V/H	-	94/94 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (inngang 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ekvivalent støyinngangsnivå	Omni	25 dB SPL	20 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	29 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Oticon Opn S 2 & 3

miniRITE R 85

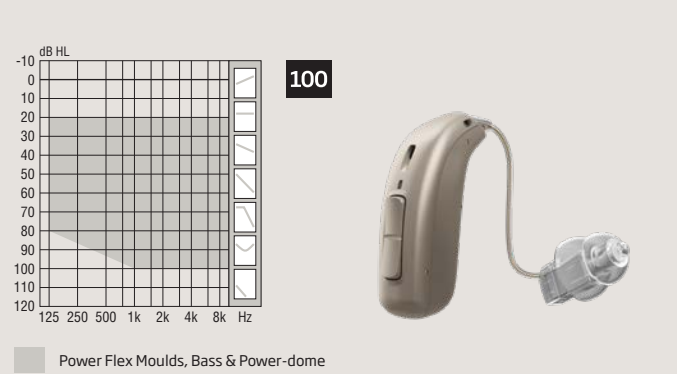
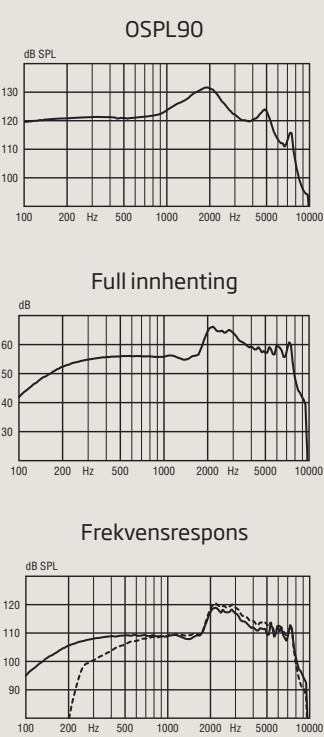
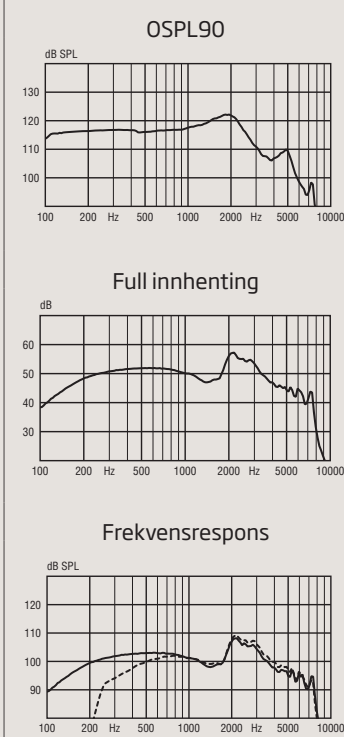
Tekniske data		Øresimulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
  Propp, Bass- og Power-dome Åpne dome Teknisk informasjon Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt.		   Akustisk input: 60 dB SPL magnetisk input: 31,6 mA/m	   Akustisk input: 60 dB SPL magnetisk input: 31,6 mA/m
OSPL90	Toppverdi	127 dB SPL	116 dB SPL
	1600 Hz	120 dB SPL	111 dB SPL
	HFA-OSPL90	121 dB SPL	112 dB SPL
Full innhenting*	Toppverdi	66 dB	54 dB
	1600 Hz	52 dB	43 dB
	HFA-FOG	55 dB	47 dB
Referansetest-økning		45 dB	34 dB
Frekvensområde		120-7500 Hz	100-7500 Hz
Telekveiloutput (1600 Hz)	1 mA/m-felt	82 dB SPL	-
	10 mA/m-felt	102 dB SPL	-
	SPLITS V/H	-	94/94 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (inngang 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ekvivalent støyinngangsnivå	Omni	26 dB SPL	21 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	30 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Oticon Opn S 1

miniRITE R 100

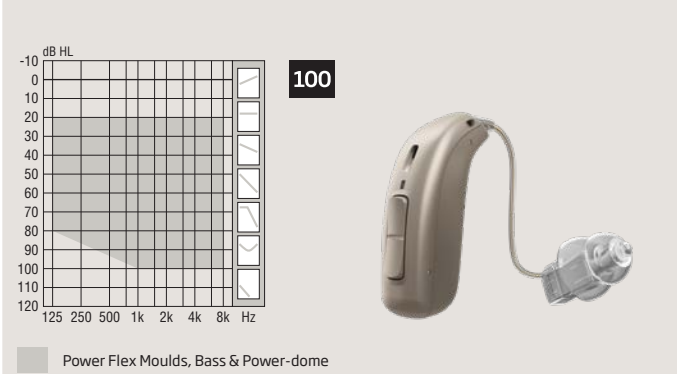
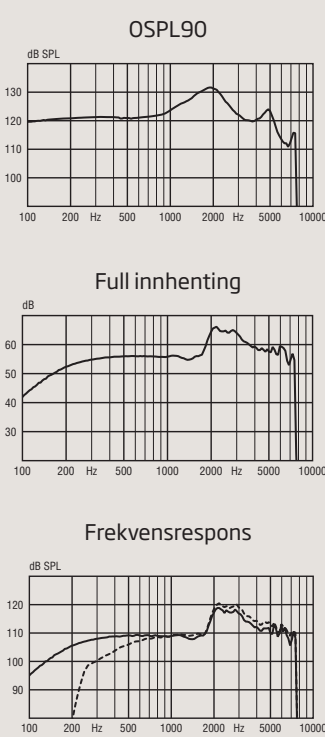
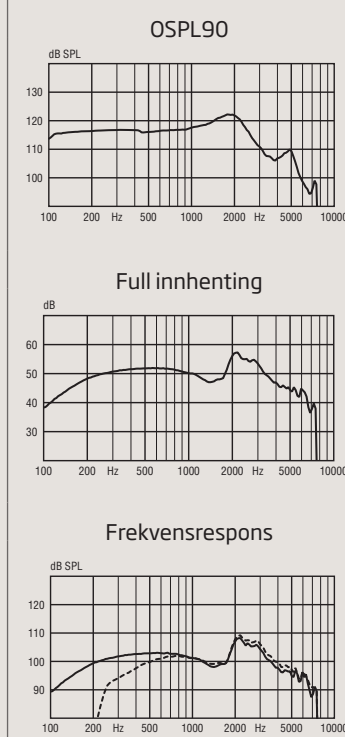
Tekniske data		Øresimulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 Power Flex Moulds, Bass & Power-dome Teknisk informasjon Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt. Instrumentadvarsel Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.			
OSPL90		132 dB SPL	122 dB SPL
1600 Hz		130 dB SPL	121 dB SPL
HFA-OSPL90		127 dB SPL	118 dB SPL
Full innhenting*		66 dB	57 dB
1600 Hz		56 dB	48 dB
HFA-FOG		59 dB	51 dB
Referansetest-økning		49 dB	42 dB
Frekvensområde		100-8500 Hz	100-8000 Hz
1 mA/m-felt		86 dB SPL	-
Telekveiloutput (1600 Hz)		106 dB SPL	-
SPLITS V/H		-	103/103 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (inngang 70 dB SPL)		500 Hz <7 % 800 Hz <4 % 1600 Hz <2 %	<2 % <2 % <2 %
Ekvivalent støyinngangsnivå		Omni 23 dB SPL Dir 32 dB SPL	19 dB SPL 30 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Oticon Opn S 2 & 3

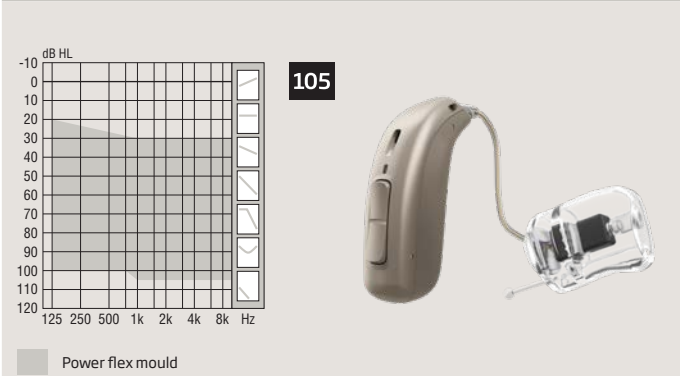
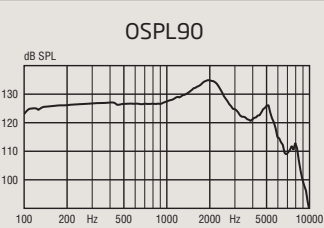
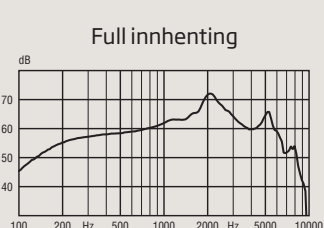
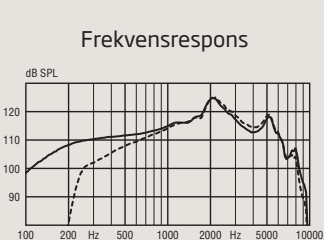
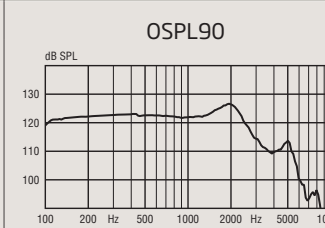
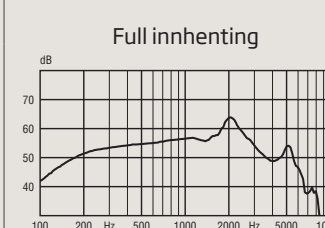
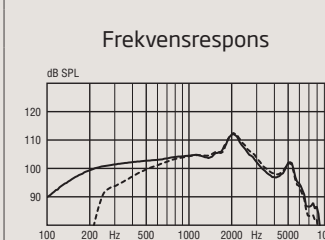
miniRITE R 100

Tekniske data		Øresimulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 Power Flex Moulds, Bass & Power-dome Teknisk informasjon Omni-direksjonell modus brukes med mindre annet er oppgitt. Instrumentadvarsel Maks output på høreapparatet kan overstige 132 dB SPL (IEC 711). Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater fordi det kan forårsake skade på den resterende hørsel til brukeren.			
OSPL90		132 dB SPL	122 dB SPL
1600 Hz		130 dB SPL	121 dB SPL
HFA-OSPL90		127 dB SPL	118 dB SPL
Full innhenting*		66 dB	57 dB
1600 Hz		56 dB	48 dB
HFA-FOG		59 dB	51 dB
Referansetest-økning		49 dB	42 dB
Frekvensområde		100-7500 Hz	100-7500 Hz
1 mA/m-felt		86 dB SPL	-
Telekveiloutput (1600 Hz)		106 dB SPL	-
SPLITS V/H		-	103/103 dB SPL
Total harmonisk forvrengning (inngang 70 dB SPL)		500 Hz <7 % 800 Hz <4 % 1600 Hz <2 %	<2 % <2 % <2 %
Ekvivalent støyinngangsnivå		Omni 23 dB SPL Dir 32 dB SPL	19 dB SPL 30 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Oticon Opn S 1

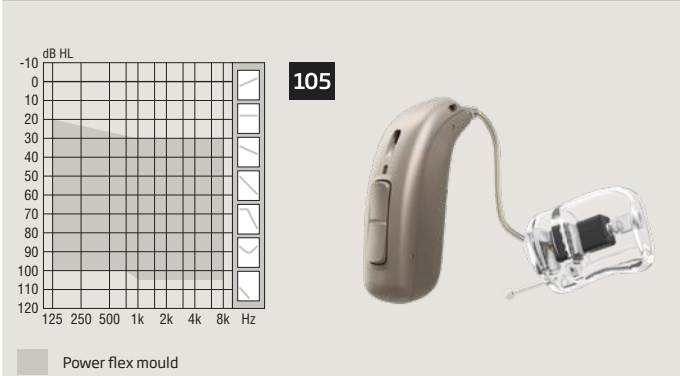
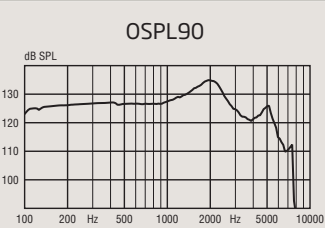
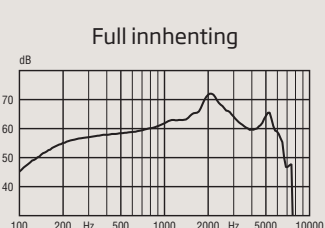
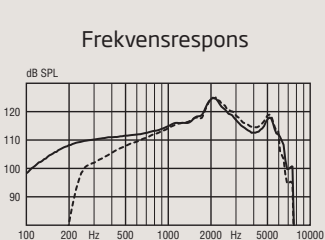
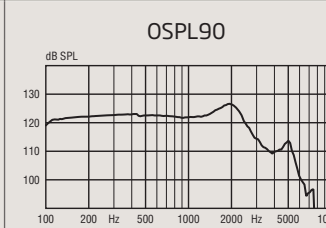
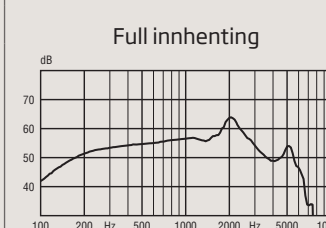
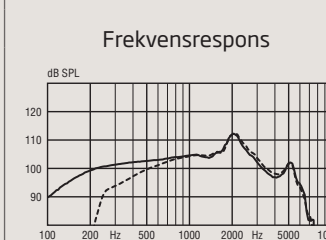
Tekniske data		Øresimulator	2CC Coupler
		Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
		  	  
Toppverdi		135 dB SPL	127 dB SPL
OSPL90		1600 Hz	125 dB SPL
HFA-OSPL90		130 dB SPL	122 dB SPL
Toppverdi		72 dB	64 dB
Full innhenting*		1600 Hz	57 dB
HFA-FOG		65 dB	57 dB
Referansetest-økning		58 dB	46 dB
Frekvensområde		100-8200 Hz	100-7800 Hz
1 mA/m-felt		96 dB SPL	-
Telekveiloutput (1600 Hz)		10 mA/m-felt	-
SPLITS V/H		-	105/105 dB SPL
500 Hz		<2 %	<2 %
Total harmonisk forvrengning		<2 %	<2 %
(inngang 70 dB SPL)		<3 %	<2 %
Omni		18 dB SPL	18 dB SPL
Ekvivalent støyinngangsnivå		Dir	29 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

miniRITE R 105

Oticon Opn S 2 & 3

Tekniske data		Øresimulator	2CC Coupler
		Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
		  	  
Toppverdi		135 dB SPL	127 dB SPL
OSPL90		1600 Hz	125 dB SPL
HFA-OSPL90		130 dB SPL	122 dB SPL
Toppverdi		72 dB	64 dB
Full innhenting*		1600 Hz	57 dB
HFA-FOG		65 dB	57 dB
Referansetest-økning		58 dB	46 dB
Frekvensområde		100-7500 Hz	100-6500 Hz
1 mA/m-felt		96 dB SPL	-
Telekveiloutput (1600 Hz)		10 mA/m-felt	-
SPLITS V/H		-	105/105 dB SPL
500 Hz		<2 %	<2 %
Total harmonisk forvrengning		<2 %	<2 %
(inngang 70 dB SPL)		<3 %	<2 %
Omni		18 dB SPL	18 dB SPL
Ekvivalent støyinngangsnivå		Dir	29 dB SPL
Batteri		Litium-ion	Litium-ion
Forventet brukstid, timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL	

* Målt med oppnåelsekontrollen til høreapparatet satt til full posisjon minus 20 dB og med en SPL-inngang på 70 dB. Dette er for å oppnå en oppnåelsesrespons tilsvarende full oppnåelsesrespons fra f.eks. IEC 60118-0+A1:1994 men uten å påvirkes av feedback.

** Forventet brukstid for det oppladbare batteriet avhenger av bruksmønster, sett med aktive funksjoner, hørselstap, lydmiljø, batterialder og bruk av trådløst ekstraustyr.

Charger 1.0

miniRITE R

Laderen er designet for lading av miniRITE R, deler av Oticon Opn S™ familien. Laderen er basert på induktiv teknologi. Den lader trådløst høreapparater i løpet av tre timer. En magnetisk kobling sikrer at høreapparatet alltid står i laderen. Laderen er designet for å gjøre dagligdags ladingsaktiviter enklere med et par, enkle trinn.

Lading

- Designet for å gjøre den daglige laderutinen så lett og enkel som mulig.
- Bare ta av deg høreapparatet og sett det i laderen - ingen lokk som trenger å åpnes. Operasjonen er så enkel at den kan utføres med en hånd.
- Høreapparatet starter automatisk ladingen når det plasseres i laderen og skruer seg automatisk PÅ når det tas ut av laderen.
- Lad om natten og høreapparatet ditt kommer til å være fulladet når du trenger det i løpet av dagen.

Produktinfo

- Induktiv lading
- Strøm PÅ/AV LED-indikator på lader
- Laderen kommer med en festet ledning
- Høy stabilitet på grunn av gummiføtter
- Myk, rund form - enkel å gjøre ren
- Myk reiseveske følger med

Enkel å avkode med et par enkle LED beskjeder direkte på høreapparatet:

- Rød = Lader
- Grønn = Fullstendig ladet

Tilbyr kort ladetid. Dersom høreapparatet er fullstendig utladet, er de normale ladetidene:

- 3 t = Fulladet
- 1 t = 50 % ladet
- 0.5 t = 25 % ladet



* Strømkontakten vil variere fra land til land

Charger 1.0

miniRITE R

Tekniske data: Lader	
Navn	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Designet for/kompatibilitet	Oticon Opn S, Oticon Opn Play: miniRITE R
Dimensjoner	Ø95 mm /total høyde på 39 mm
Vekt	140 gram
Farge	Svart
Strømforsyningsplugg	USB A
Status indikator	LED-lys på lader. Indikerer Laderens PÅ/AV status LED-lys på høreapparat. Indikerer lademodus
Ladetid ved høreapparater	Maks 3 timer, avhengig av batteriets opprinnelige tilstand (Temperatur: +5 °C to +35 °) Maks 4 timer, avhengig av batteriets opprinnelige tilstand (Temperatur: +35 °C to +40 °)
Strømkilde	Levert strømforsyningsenhet
Inntaksspenning	5 V DC
Inntaksstrøm	< 0.2 A (lader to høreapparater) <10mA stand-by (intet høreapparat koblet til)
Kabel	Fastmontert ledning / 150 cm
Tilkobling til eksternt utstyr	Når den er tilkoblet eksternt utstyr som er koblet i en stikkontakt, må dette utstyret være i samsvar med IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 frem til 20.juni 2019) eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.
Bruksforhold	
Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Lagrings- og transportforhold	Temperatur: -25 °C til +70 °C Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk	700 hPa til 1060 hPa
Tekniske data: Strømforsyningsenhet	
Strømforsyningsenhet	AN05x-050A
Inntaksspenning	100 -240 V AC
Inntaksstrøm	0,2 A
Inntaksfrekvens	50-60 Hz
Utgangsspenning	5 V DC
Utgangstrøm	1 A



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
+45 3917 7100

198046NO/2018.12.06



www.oticon.no

oticon
PEOPLE FIRST