

Oticon | Amigo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odbiornik FM
Amigo Star



oticon
PEOPLE FIRST

Podziękowanie

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twój nowy Amigo Star był najwyższej jakości, a także łatwy w użytkowaniu i obsłudze.

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji, co pozwoli w pełni wykorzystać wszystkie funkcje, jakie oferuje Twoje nowe urządzenie.

W zależności od Twoich potrzeb w Amigo Star można zaprogramować różne funkcje.

Protetyk słuchu zaznaczy ustawione funkcje i programy urządzenia w odpowiednich sekcjach instrukcji. Pełną informację na temat zaprogramowanych funkcji znajdziesz w tabelce na ostatniej stronie.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące użytkowania lub obsługi Amigo Star, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Wskazania

Amigo Star przekazuje dźwięk z nadajnika FM do ucha.

Amigo Star jest przeznaczony dla osób dobrze słyszących, które mogą czerpać korzyści z urządzeń wspomagających słyszenie. Został stworzony, aby zapewnić czysty sygnał audio/mowy podczas różnych codziennych czynności, eliminując negatywne efekty wynikające z odległości, złej akustyki pomieszczenia i hałasu otoczenia.

Amigo Star musi być używany razem z nadajnikiem FM, nie jako samodzielne urządzenie.



WAŻNA UWAGA

Przed rozpoczęciem korzystania z Amigo Star prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją. Zawarto w niej istotne informacje dotyczące właściwego i bezpiecznego używania urządzenia i baterii.

Spis treści

Opis Amigo Star	7
Ostrzeżenia	8
Uruchamianie Amigo Star po raz pierwszy	15
Wymiana baterii	16
Włączanie/wyłączanie Amigo Star	18
Oznaczenie dla prawego i lewego ucha	20
Dołączanie cienkiego dźwiękowodu Corda miniFit	2
Zakładanie Amigo Star	22
Wskaźnik LED	23
Przycisk funkcji - wyszukiwanie kanału	24
Regulacja głośności	25
Komora baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem (opcja)	26
Używanie Amigo Star	27
Dbanie o Amigo Star	29
Narzędzia czyszczące	30
Czyszczenie cienkiego dźwiękowodu Corda miniFit	31

Dokończenie na następnej stronie

Codzienna pielęgnacja nasadki Corda miniFit	32
Wymiana nasadki Corda miniFit	33
Postępowanie z Corda miniFit	34
Tryb uśpienia i tryb wyłączenia	35
Wodoodporność	36
Unikanie uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą i chemikaliami	39
Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązania	40
Międzynarodowa gwarancja	44
Informacje techniczne	46
Przegląd ustawień Amigo Star	49
Ogólne warunki gwarancji	50

Opis Amigo Star

Twoje rozwiązanie:



Dźwiękowód Corda miniFit:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Lewy, dł. -1 | ☐ Prawy, dł. -1 |
| ☐ Lewy, dł. 0 | ☐ Prawy, dł. 0 |
| ☐ Lewy, dł. 1 | ☐ Prawy, dł. 1 |
| ☐ Lewy, dł. 2 | ☐ Prawy, dł. 2 |
| ☐ Lewy, dł. 3 | ☐ Prawy, dł. 3 |

Nasadka otwarta:




☐ Mała (S)



☐ Średnia (M)



☐ Duża (L)

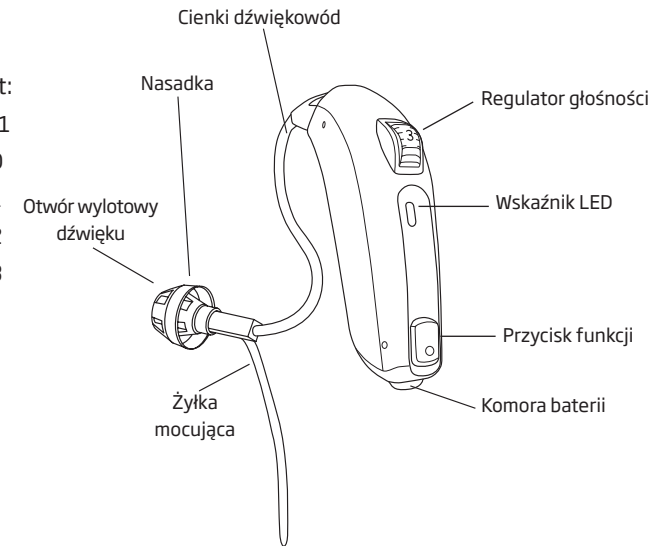

Bateria: 312

Ostrzeżenia

Amigo Star nie zastępuje aparatu słuchowego – nie jest jego substytutem.

Zanim zaczniesz używać Amigo Star, skonsultuj się z protetykiem słuchu, aby upewnić się, że jest to odpowiednie urządzenie dla Ciebie.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem korzystania z Amigo Star należy w pełni zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami i całą zawartością instrukcji.

Używanie Amigo Star

- Amigo Star może być używany tylko po dostrojeniu przez protetyka słuchu i zgodnie z jego zaleceniami. Rezultatem nieodpowiedniego użycia może być nagła i trwała utrata słuchu.
- Nigdy nie pozwalaj innym osobom używać Twojego Amigo Star, ponieważ niewłaściwe użytkowanie może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu u tych osób.
- Pamiętaj, że nasadka może czasami zsunąć się w przewodzie słuchowym. Jeśli możesz, ostrożnie ją wyjmij. Nie wpychaj nasadki w głąb przewodu słuchowego. Przed wyjęciem nasadki nie wkładaj ponownie dźwiękowodu do ucha. Jeśli masz wątpliwości dotyczące wyjęcia nasadki, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Ostrzeżenia

Ryzyko zakrztuszenia się/połknięcia

- Urządzenie, jego części i baterie nie są zabawkami i powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci lub kogokolwiek, kto mógłby je połknąć czy też w inny sposób wyrządzić sobie krzywdę.
- Nigdy nie zmieniaj baterii ani nie dostrajaj urządzenia w obecności niemowląt, małych dzieci lub osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- Usuwać baterie ostrożnie w miejscach, do których niemowlęta, małe dzieci i osoby niepełnosprawne intelektualnie nie mają dostępu. Większość urządzeń może być na życzenie wyposażona w komorę baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem. Jest to szczególnie zalecane w przypadku niemowląt, małych dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Jeżeli bateria lub urządzenie zostały połknięte, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

- Zdarza się, że baterie bywają mylone z tabletkami, dlatego zawsze sprawdzaj leki przed połknięciem, aby uniknąć takiej pomyłki.
- Nigdy nie wkładaj urządzenia ani baterii do ust. Są one śliskie i mogą zostać przez przypadek połknięte.

Ostrzeżenia

- Amigo Star może być na życzenie wyposażony w komorę baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem. Jest to szczególnie zalecane w przypadku niemowląt, małych dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Używanie baterii

- Zawsze używaj baterii zalecanych przez Twojego protetyka słuchu. Baterie niskiej jakości mogą wyciekać, powodując uszkodzenie ciała.
- Nigdy nie próbuj ładować baterii. Mogą eksplodować i spowodować poważne obrażenia. Nigdy nie pal baterii. Mogą eksplodować i spowodować poważne obrażenia.

Przerwy w działaniu urządzenia

- Urządzenie może przestać działać na przykład, gdy bateria się wyczerpała lub jeśli dźwiękowód jest niedrożny z powodu wilgoci lub woskowiny. Powinieneś być tego świadomy, szczególnie gdy uczestniczysz w ruchu ulicznym lub innych sytuacjach, w których należy zwracać uwagę na dźwięki ostrzegawcze.
- Amigo Star może przestać działać, np. gdy bateria się wyczerpała lub jeśli dźwiękowód/nasadka Corda miniFit jest niedrożny/-a (wilgć lub woskowina). Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, przejdź do rozdziału o rozwiązywaniu problemów na str. 40.

Ostrzeżenia

Aktywne implanty

- Oticon zaleca ostrożność i postępowanie zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producentów implantów, np. rozruszników serca, dotyczących korzystania z telefonów komórkowych.
- Jeżeli używasz implantu, trzymaj urządzenie w odległości większej niż 15 cm od niego, np. nie w kieszonce na piersi. Jeżeli masz implant wszczepiony do mózgu, skontaktuj się z producentem implantu, aby uzyskać informacje na temat możliwych zakłóceń.
- Narzędzie wielofunkcyjne ma wbudowany magnes. Jeżeli masz wszczepiony implant, np. rozrusznik serca, nie noś narzędzia blisko piersi.

Niebezpieczeństwo wybuchu

- Źródło zasilania urządzenia nie ma wystarczającej energii, by wywołać pożar w normalnych warunkach użytkowania.
- Urządzenie nie zostało jednak sprawdzone pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa w otoczeniach zagrożonych wybuchem. Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Ostrzeżenia

Rentgen, CT, MR, PET i elektroterapia

- Zawsze na czas np. badania rentgenowskiego, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania PET, elektroterapii lub operacji zdejmij Amigo Star, ponieważ może on ulec uszkodzeniu pod wpływem silnego pola.

Możliwe efekty uboczne

- Noszenie Amigo Star może powodować gromadzenie się woskowiny.
- Amigo Star jest wykonany z niealergicznymi materiałami, mimo to może czasami powodować podrażnienia skóry lub inne nietypowe objawy. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli takie objawy wystąpią.

Zakłócenia

- Amigo Star został starannie przetestowany pod kątem zakłóceń zgodnie z najostrzejszymi międzynarodowymi normami. Jednakże mogą pojawić się zakłócenia między Amigo Star a innymi urządzeniami, np. przy niektórych modelach telefonów komórkowych, radiach CB lub systemach alarmowych w sklepach. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, zwiększ odległość między Amigo Star a urządzeniem.

Uruchamianie Amigo Star po raz pierwszy

Amigo Star to miniaturowe urządzenie elektroniczne działające na baterię 312. Aby uruchomić Amigo Star, należy do komory baterii włożyć nową baterię.

Amigo Star zacznie działać, jeśli komora baterii jest zamknięta, a regulator głośności jest ustawiony na dowolną pozycję oprócz 1. Po zamknięciu komory baterii załóż Amigo Star na ucho.

Podczas uruchamiania usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Jeżeli Amigo Star nie odbiera dźwięku z nadajnika FM, naciśnij przycisk funkcji Amigo Star. Amigo Star rozpocznie wyszukiwanie kanału nadajnika i synchronizację.

Gdy Amigo Star znajdzie odpowiedni kanał i zacznie odbierać sygnał FM, zaświeci się wskaźnik LED.

Wymiana baterii



Właściwy typ baterii do Twojego urządzenia to 312. Jedna bateria wystarcza na około 55 godzin.

Zużyta bateria powinna być niezwłocznie wyjęta i wyrzucona zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kiedy bateria jest już słaba, usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe. To ostrzeżenie będzie powtarzać się w umiarkowanych odstępach, do wyczerpania baterii.

Bateria może się wyczerpać krótko po ostrzeżeniu lub po kilku godzinach, w zależności od jakości baterii.

Kiedy bateria się wyczerpie, urządzenie wyłączy się. Wskaźnik LED wyłączy się, gdy bateria jest całkowicie wyczerpana. Przez krótką chwilę wskaźnik LED może się świecić, ale Amigo Star nie będzie emitował dźwięku.

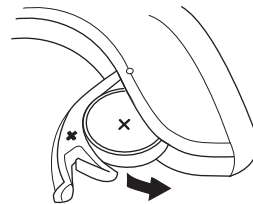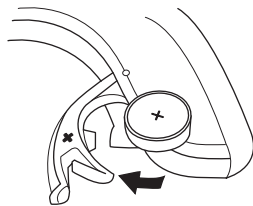

Aby wymienić baterię, postępuj zgodnie ze wskazówkami:


- Otwórz komorę baterii na całą szerokość, odpychając wystający brzeg na dole urządzenia. Wyjmij zużytą baterię. Do wyjęcia baterii możesz użyć magnesu znajdującego się w narzędziu wielofunkcyjnym.
- Z nowej baterii usuń od strony (+) naklejkę zabezpieczającą. Jakakolwiek wilgoć na baterii powinna zostać wytarta przed użyciem. Poczekaj kilka sekund po zdjęciu naklejki, aby bateria mogła zacząć działać.
- By założyć nową baterię, możesz użyć magnesu znajdującego się na końcu narzędzia wielofunkcyjnego. Wkładając nową baterię, upewnij się, że znak (+) na baterii odpowiada znakowi (+) w komorze baterii. Zamknij komorę baterii.




Włączanie/wyłączanie Amigo Star

Aby **WŁĄCZYĆ** Amigo Star, należy całkowicie zamknąć komorę baterii (z założoną baterią). Kiedy zamkniesz komorę baterii, usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający, że urządzenie jest gotowe do pracy.

Aby **WYŁĄCZYĆ** Amigo Star, należy lekko otworzyć komorę baterii, aż do wycucia „kliknięcia”.

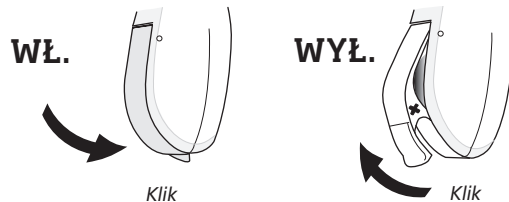

Amigo Star można również włączać i wyłączać regulatorem głośności. Aby włączyć Amigo Star, przekręć regulator głośności do góry, na pozycję wyższą niż 1. Aby wyłączyć Amigo Star, przekręć regulator głośności do dołu, do pozycji 1.

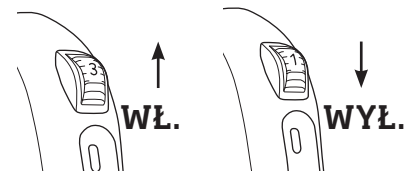

Aby wydłużyć czas działania baterii, upewnij się, że Amigo Star jest wyłączony, kiedy go nie używasz. Gdy nie używasz Amigo Star, zwłaszcza w nocy lub przez dłuższy czas, otwórz całkowicie komorę baterii, aby umożliwić obieg powietrza!


Oznaczenie dla prawego i lewego ucha

Ze względu na kształt cienkiego dźwiękowodu Corda miniFit dołączanego do Amigo Star, urządzenie może być noszone tylko na prawym lub tylko na lewym uchu.

Aby ułatwić odróżnianie urządzenia na prawe i lewe ucho, w komorze baterii może zostać umieszczone kolorowe oznakowanie.

Czerwona kropka oznacza PRAWE urządzenie.
Niebieska kropka oznacza LEWE urządzenie.

Można także sprawdzić drobny napis znajdujący się na cienkim dźwiękowodzie Corda miniFit.
Czerwony napis oznacza PRAWE urządzenie.
Niebieski napis oznacza LEWE urządzenie.

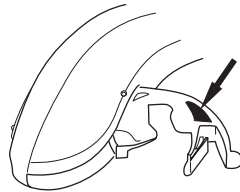

Dołączanie cienkiego dźwiękowodu Corda miniFit


Aby móc założyć Amigo Star na ucho, dołącz do urządzenia cienki dźwiękowód Corda miniFit z nasadką.

Amigo Star jest dostarczany z zestawem startowym Corda miniFit zawierającym 4 dźwiękowody i 4 nasadki.

Dźwiękowody i nasadki na wymianę można zamówić u protetyka słuchu.

Aby dołączyć Corda miniFit do Amigo Star


1. Wybierz dźwiękowód Corda miniFit. Prawe dźwiękowody są oznaczone czerwonym numerem, lewe – niebieskim. Małe dźwiękowody są oznaczone numerem 0-0.9, większe 1-0.9.
2. Wsuń dźwiękowód do Amigo Star.
3. Wybierz nasadkę. Nasadki są dostępne w dwóch rozmiarach – małym i średnim. Wciśnij nasadkę na dźwiękowód.
4. Amigo Star jest gotowy.

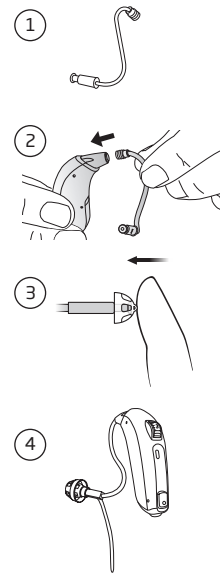

Zakładanie Amigo Star

Poprawne zakładanie Amigo Star z cienkim dźwiękowodem wymaga praktyki:

1. Załóż Amigo Star za ucho.
2. Przytrzymaj dźwiękowód w miejscu zagięcia palcem wskazującym i kciukiem. Nasadka powinna być skierowana w stronę przewodu słuchowego. Delikatnie wsuń nasadkę do przewodu słuchowego, aż dźwiękowód ułoży się blisko głowy.
3. Palcem wskazującym ułóż żyłkę mocującą w małżowinie. Obejrzyj się w lustrze. Jeśli dźwiękowód odstaje od ucha, oznacza to, że nasadka nie jest poprawnie umiejscowiona w przewodzie słuchowym. Jeśli żyłka mocująca widocznie wystaje z ucha, to nie została umiejscowiona poprawnie. Aby zdjąć Amigo Star, pociągnij dźwiękowód w miejscu zagięcia.

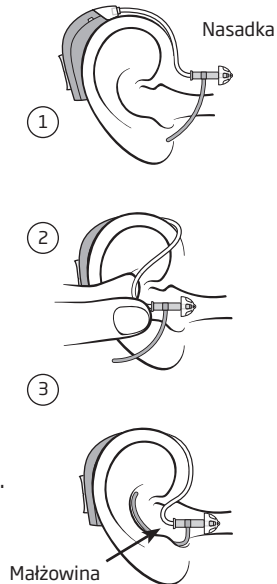


Wskaźnik LED

Amigo Star jest wyposażone we wskaźnik stanu LED.

Co wskazuje LED:

Świeci stale lub wolno miga	Sygnał FM z nadajnika jest odbierany
3 szybkie mignięcia	Amigo Star został zsynchronizowany z kanałem nadajnika

Protetyk słuchu może wyłączyć wskaźnik albo zaprogramować go tak, aby migał lub był włączony, gdy odbiera sygnał FM.

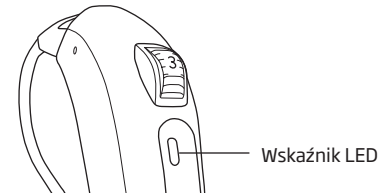


Przycisk funkcji - wyszukiwanie kanału

Amigo Star jest wyposażony w przycisk funkcji.

Przycisk służy do wyszukiwania kanału, na który ustawiony jest nadajnik FM.

Po naciśnięciu przycisku Amigo Star rozpocznie wyszukiwanie kanałów. Podczas wyszukiwania będzie emitował pojedyncze sygnały dźwiękowe. Gdy znajdzie kanał nadajnika, usłyszysz dwa szybkie sygnały dźwiękowe, a następnie dźwięk z nadajnika FM.

Wyszukiwanie kanału może potrwać około 20 sekund.

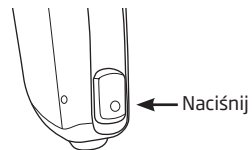

Przycisk Amigo Star może zostać wyłączony przez protetyka słuchu.


Regulacja głośności

Amigo Star jest wyposażony w regulator głośności.

Pokrętło głośności jest oznaczone cyframi od 1 do 4.

Gdy pokrętło jest na pozycji 1, Amigo Star jest wyłączony.

Gdy pokrętło jest na pozycji 4, głośność Amigo Star jest ustawiona na maksimum.

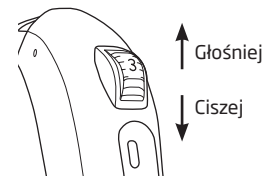


Protetyk słuchu może zaprogramować urządzenie tak, aby regulacja głośności nie była aktywna. Pokrętło będzie nadal działało jako włącznik/wyłącznik.

Komora baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem (opcja)

W Amigo Star może być założona specjalna komora baterii, zapobiegająca niezamierzonemu lub niepożądanemu otwarciu komory baterii i wyjęciu baterii.

Jest szczególnie zalecana w przypadku niemowląt, małych dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Komora baterii jest zaprojektowana tak, że może zostać otwarta tylko przy użyciu małego śrubokrętu. Włóż śrubokręt w nacięcie w komorze baterii i podważ.

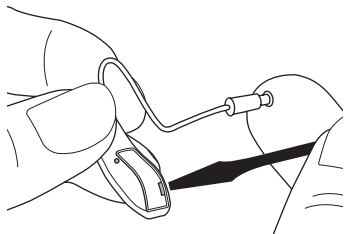

Używanie Amigo Star

Amigo Star nie może być używany jako niezależne urządzenie. Należy używać Amigo Star z nadajnikiem FM.

Amigo Star może być używany z nadajnikami FM Amigo T30/T31 lub Amigo T5.



Amigo T30/T31



Amigo T5

Amigo Star może być używany z nadajnikami FM innych producentów.

Używanie Amigo Star

Poproś nauczyciela, by nosił nadajnik FM. Mikrofon powinien znajdować się blisko ust, a nadajnik powinien być włączony.

1. Włącz Amigo Star.
2. Jeśli wskaźnik LED się nie świeci, naciśnij przycisk, aby zsynchronizować Amigo Star z kanałem nadajnika.
3. Załóż Amigo Star na ucho.
4. Ustaw pokrętkę regulacji głośności tak, aby słyszeć głos nauczyciela na optymalnym poziomie.

Dbanie o Amigo Star

Przewód słuchowy produkuje woskowinę, która może spowodować zatkanie otworu wylotowego dźwięku w Amigo Star. Aby zapobiec zmianom w działaniu urządzenia spowodowanym przez nagromadzoną woskowinę, zwracaj szczególną uwagę na cienki dźwiękowód Corda miniFit i nasadkę, ponieważ wymagają regularnego czyszczenia i wymiany.


Podczas obsługi Amigo Star zawsze trzymaj go nad miękką powierzchnią, aby w razie upadku nie uległ uszkodzeniu.

Przed snem otwórz komorę baterii, umożliwiając obieg powietrza.

Narzędzia czyszczące

Do czyszczenia Amigo Star powinny być używane specjalne narzędzia, aby zapewnić jak najlepszą konserwację i działanie.

Narzędzie wielofunkcyjne

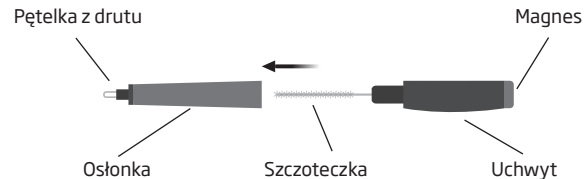


W narzędziu wielofunkcyjnym znajdują się szczoteczka i pętka z drutu, służące do czyszczenia Amigo Star z woskowiny. Użyj ściereczki, aby wytrzeć do czysta powierzchnię urządzenia.

Do Amigo Star dołączane jest specjalne narzędzie do czyszczenia cienkiego dźwiękowodu Corda miniFit. Czyszczenie dźwiękowodu zostało omówione na następnych stronach.

Czyszczenie cienkiego dźwiękowodu Corda miniFit

Aby usunąć woskowinę z cienkiego dźwiękowodu:

- Wysuń dźwiękowód z Amigo Star (1).
- Wprowadź narzędzie czyszczące do dźwiękowodu na całą długość (2).
- Wyjmij narzędzie czyszczące i wsuń dźwiękowód z powrotem do urządzenia (3).

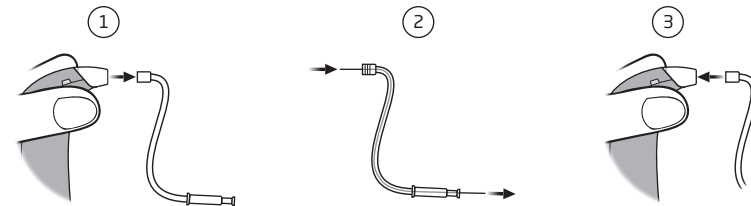


Codzienna pielęgnacja nasadki Corda miniFit

Nasadkę należy sprawdzać za każdym razem, gdy używasz Amigo Star. Otwór wylotowy dźwięku powinien być czysty, bez woskowiny. Jeśli potrzebujesz czystej nasadki, zdejmij używaną i załóż nową.

Zaleca się wymianę nasadki co najmniej raz na miesiąc lub według wskazań protetyka słuchu.

Wymiana nasadki Corda miniFit

Wymiana nasadki jest łatwa. Przytrzymaj nasadkę w najszerszym miejscu i ściągnij ją z elementu łączącego na dźwiękowodzie (1). Załóż nową nasadkę na dźwiękowód (2) i upewnij się, czy jest dobrze umocowana (3).

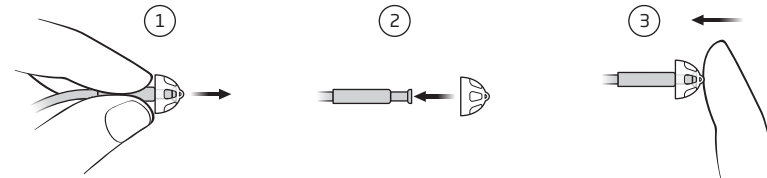

WAŻNA UWAGA

Nasadka jest wykonana z miękkiego materiału. Jeśli nasadka zsunie się w przewodzie słuchowym, nie spowoduje żadnych obrażeń. Jeśli zdołasz, delikatnie ją wyjmij. W razie konieczności, poproś drugą osobę o pomoc. Nie wpychaj nasadki w głąb przewodu słuchowego. Zanim nasadka nie zostanie wyjęta, nie wkładaj dźwiękowodu ponownie do ucha. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Postępowanie z Corda miniFit

WAŻNA UWAGA

- Używaj tylko części przeznaczonych do Amigo Star.
- Narzędzia czyszczące powinny być używane do czyszczenia dźwiękowodu tylko wtedy, gdy jest on odłączony od urządzenia i nie jest założony na ucho.
- Przed włożeniem do ucha, nasadkę należy poprawnie założyć na cienki dźwiękowód. Postępowanie niezgodne z tym zaleceniem może spowodować obrażenia.
- Cienki dźwiękowód nie może być używany bez założonej nasadki.
- Nie używaj Amigo Star, jeśli masz w uchu korek woskowinowy lub cierpisz na infekcję ucha.
- Właściwa obsługa i profilaktyczna pielęgnacja przyczynią się do niezawodnego i bezpiecznego działania.
- Należy regularnie czyścić cienki dźwiękowód.
- Nie pozwalaj nikomu używać swojego urządzenia ani jego części.
- Miej zawsze czyste ręce, kiedy dotykasz Amigo Star i jego części.

Tryb uśpienia i tryb wyłączenia

W Amigo Star funkcjonują inteligentne tryby wyciszenia i wyłączenia, dzięki którym wydłuża się czas życia baterii.

Tryb uśpienia

Jeśli Amigo Star nie wykrywa sygnału FM przez dłużej niż 60 sekund, urządzenie uruchamia energooszczędny tryb uśpienia.

Co 6-7 sekund Amigo Star „budzi się” i szuka sygnału FM. Proces ten jest powtarzany do momentu wykrycia sygnału FM.

W trybie uśpienia wskaźnik LED jest wyłączony.

Tryb wyłączenia

Po 90 minutach trwania trybu uśpienia, poziom zużycia baterii zmniejsza się jeszcze bardziej.

Aby ponownie uruchomić Amigo Star, naciśnij przycisk funkcji lub otwórz i zamknij komorę baterii.

Wodoodporność

Twoje urządzenie jest wodoodporne, nie wodoszczelne. Jeśli urządzenie zostanie zamoczone i przestanie działać, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Ostrożnie wytrzyj wodę.
2. Otwórz komorę baterii, wyjmij baterię i ostrożnie wytrzyj wodę z komory baterii.
3. Urządzenie z otwartą komorą baterii pozostaw do wyschnięcia na około 30 minut.
4. Włóż nową baterię.

WAŻNA INFORMACJA

Nie noś urządzenia pod prysznicem ani podczas pływania, nurkowania czy udziału w innych zabawach/sportach wodnych. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

WAŻNA UWAGA

Gdy nie używasz Amigo Star, zwłaszcza w nocy lub przez dłuższy czas, otwórz całkowicie komorę baterii, aby umożliwić obieg powietrza.

Unikanie uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą i chemikaliami

Amigo Star nie może być narażony na działanie wysokich temperatur, na przykład zostawiony w samochodzie, który stoi na słońcu. Nie wolno suszyć go w kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.

Jeżeli na baterii jest wilgoć, delikatnie ją wytrzyj, ponieważ może zakłócić działanie baterii. Używanie zestawu przeciw wilgoci może pomóc uniknąć problemów, a nawet wydłużyć czas eksploatacji Amigo Star. Aby uzyskać poradę lub więcej informacji, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Chemikalia zawarte w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, olejkach do opalania czy środkach przeciw owadom mogą uszkodzić urządzenie. Przed użyciem wyżej wymienionych produktów lub do nich podobnych należy zawsze zdjąć Amigo Star, a następnie poczekać, aż chemikalia wyschną – dopiero wówczas można ponownie założyć Amigo Star.

Jeżeli użyłeś balsamu, wytrzyj ręce przed założeniem Amigo Star.

Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązania			
Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie problemu	
Brak dźwięku	Zużyta bateria w Amigo Star	Wymień baterię	str. 16
	Amigo Star nie jest na odpowiednim kanale	Naciśnij przycisk wyszukiwania kanału i poczekaj, aż zaświeci się LED	str. 24
	Amigo Star jest wyłączony	Zamknij komorę baterii i ustaw regulator głośności na pozycję wyższą niż 1	str. 18
	Wyczerpany akumulator nadajnika	Naładuj akumulator	
	Zatkany otwór wylotowy dźwięku w cienkim dźwiękowodzie lub nasadce Corda miniFit	Wyczyść/wymień dźwiękowód lub nasadkę	str. 31

Jeśli żadne z sugerowanych rozwiązań nie pomaga, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Najczęściej spotykane problemy i ich rozwiązania			
Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie problemu	
Przerywany lub stłumiony dźwięk	Zatkany otwór wylotowy dźwięku w cienkim dźwiękowodzie Corda miniFit	Wyczyść/wymień dźwiękowód lub nasadkę	str. 31
	Wilgoć w cienkim dźwiękowodzie Corda miniFit	Wyczyść i wysusz dźwiękowód	str. 31
	Wyczerpany akumulator nadajnika	Naładuj akumulator	
	Mikrofon nadajnika jest za daleko od ust nauczyciela	Zmień pozycję tak, aby mikrofon przypinany znajdował się w odległości 10-15 cm od ust, a mikrofon nagłówny w odległości 1-5 cm od ust	
	Za cicho	Ustaw regulator głośności na większą głośność	str. 25
Zakłócenia dźwięku	Kanał FM jest poddany zakłóceniom	Zmień kanał w nadajniku FM, następnie zsynchronizuj z Amigo Star lub naciśnij przycisk wyszukiwania kanału	str. 24

Jeśli żadne z sugerowanych rozwiązań nie pomaga, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Międzynarodowa gwarancja

Amigo Star jest objęty ograniczoną międzynarodową gwarancją producenta na czas 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje defekty materiałowe i wady wykonania samego urządzenia, nie dotyczy natomiast akcesoriów takich jak baterie, słuchawki, nasadki itp.

Problemy spowodowane niewłaściwym użyciem lub pielęgnacją, nadużyciem, wypadkiem, manipulacją przez nieuprawnione osoby, narażeniem na warunki korozyjne, fizycznymi zmianami w uchu użytkownika, uszkodzenia spowodowane obcymi przedmiotami lub niewłaściwym dopasowaniem NIE są objęte gwarancją i mogą ją unieważnić.

Gwarancja nie narusza żadnych praw, które mogą mieć zastosowanie na mocy przepisów krajowych, regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Firma audioprotetyczna, w której się zaopatrujesz, może ustalić zakres gwarancji przekraczający tę gwarancję międzynarodową. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Jeśli potrzebujesz serwisu

Dostarcz Amigo Star do swojego protetyka słuchu, który może mieć możliwość rozwiązania drobnych problemów i zmiany ustawień na miejscu.

Karta gwarancyjna

Imię i nazwisko nabywcy:

Wydany przez:

Adres:

Telefon:

Data zakupu:

Okres gwarancji:

Miesiące:

Model lewy:

Nr seryjny:

Model prawy:

Nr seryjny:

Bateria: 312

Informacje techniczne

Urządzenie zawiera nadajnik radiowy pracujący na częstotliwościach do 3,714 MHz i wykorzystujący technologię magnetycznej indukcji krótkiego zasięgu. Natężenie pola magnetycznego nadajnika to $< -40 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ dla 10m.

Moc emisji urządzenia jest poniżej międzynarodowych limitów określających maksymalne parametry bezpiecznej ekspozycji dla organizmu ludzkiego. Dla porównania promieniowanie urządzenia jest mniejsze niż promieniowanie elektromagnetyczne np. z lamp halogenowych, monitorów komputerów, zmywarek itp. Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.

Amigo Star zawiera moduł z:

FCC ID: U28FU2ALD01

IC: 1350B-FU2ALD01

Urządzenie jest zgodne z zasadami 15 rozdziału FCC i RSS-210 zasad przemysłu Kanady.

Korzystanie z urządzenia związane jest z trzema następującymi warunkami:

1. Praca urządzenia nie może spowodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi odbierać jakiegokolwiek zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą być przyczyną niepożądanych operacji. Zmiany lub przeróbki dokonane w urządzeniu bez zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą doprowadzić do unieważnienia prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
3. Urządzenie nie może zakłócać odbioru sygnału TV ani radaru rządu federalnego.

Niniejszym Oticon deklaruje, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Deklaracja zgodności jest dostępna u producenta.

Wyprodukowane przez:

Oticon A/S

Kongebakken 9

DK-2765 Smorum

Dania

www.oticon.global

CE 0543 0682



Utylizacja sprzętu
elektronicznego musi być
zgodna z lokalnymi
przepisami.



N1175

IP58

Przegląd ustawień Amigo Star

Ustawienia Amigo Star		
Pokrętko regulacji głośności	☐ Włączone	☐ Wyłączone
Przycisk funkcji - wyszukiwanie kanału	☐ Włączony	☐ Wyłączony
Wskaźnik LED	☐ Włączony	☐ Wyłączony
Wskaźniki dźwiękowe	☐ Włączone	☐ Wyłączone

Ogólne warunki gwarancji

§1

Oticon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 176148, numer REGON: 01208630500000, numer NIP: 5260303881, kapitał zakładowy: 462 000,00 zł (dalej „Oticon Polska”), udziela gwarancji na produkty firmy OTICON A/S wskazane w niniejszej gwarancji i na zasadach w niej wskazanych. Firma Oticon Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż produkty będące przedmiotem niniejszej gwarancji są urządzeniami przeznaczonymi do poprawy słyszenia dźwięków otoczenia.

§2

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zapewnia zgodność oferowanych produktów z właściwościami określonymi w §1 oraz ich niewadliwość w okresie trwania gwarancji, rozumianą jako możliwość swobodnego użytkowania tych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w § 1.

§3

ust. 1 Okres gwarancji wynosi:

pkt. 1 30 miesięcy na aparaty indywidualne wewnętrzne;

pkt. 2 30 miesięcy na aparaty zewnętrzne;

pkt. 3 24 miesiące na urządzenia systemu ConnectLine oraz pilota do aparatów słuchowych;

pkt. 4 30 miesięcy na systemy FM Oticon Amigo;

pkt. 5 3 miesiące na niedopasowanie obudowy aparatu wewnętrznego do anatomii ucha (np. uwieranie, poluzowanie, sprzężenia) wynikające ze zmiany budowy anatomicznej ucha. Gwarancja, o której mowa w niniejszym punkcie, jest niezależna od gwarancji, o której mowa w pkt. 1.

pkt. 6 3 miesiące na akcesoria wymienione w instrukcjach urządzeń systemów ConnectLine i FM Oticon Amigo;

pkt. 7 3 miesiące na część wymienioną w wyniku naprawy pogwarancyjnej, z wyjątkiem wzmacniacza, mikrofonu i słuchawki, na które gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy;

ust. 2 Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.

ust. 3 Bieg terminu gwarancji w wypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 7, rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, po wykonaniu naprawy pogwarancyjnej.

- ust. 4** Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji dostarczono uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonano istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono część rzeczy, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
- ust. 5** Uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu przysługują tylko wobec produktów firmy OTICON A/S zakupionych jako fabrycznie nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu gwarancji ujawnionej w okresie gwarancji, o ile wada ta powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej oraz nieodpłatnego usunięcia wady w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 5.

§5

- ust. 1** Firma Oticon Polska oświadcza, iż nieodpłatne usunięcie wady, o którym mowa w §4 nastąpi w terminie:

pkt. 1 14 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu*;

pkt. 2 31 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, gdy z powodu konieczności wykonania specjalistycznych napraw nie jest możliwa naprawa w kraju (brak właściwej elektroniki), lub gdy z powodu nie posiadania przez serwis niezbędnych do naprawy części zamiennych zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

- ust. 2** W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, firma Oticon Polska powiadomi Kupującego na piśmie lub telefonicznie w terminie 10 dni od daty dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, o braku możliwości realizacji naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.

§6

- ust. 1** Gwarancja nie obejmuje:

pkt. 1 uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją;

pkt. 2 mechanicznych uszkodzeń, przykładowo: pęknięcia obudowy, urwania komory baterii, uszkodzenia potencjometru głośności, ułamania przycisku, pęknięcia płytki wzmacniacza na skutek upuszczenia, uszkodzenia gniazd wynikającego z użycia nadmiernej siły i in.;

- pkt. 3** chemicznych uszkodzeń na skutek: zabrudzenia, zamoczenia, działania różnych kosmetyków (np. lakieru do włosów, żelu do włosów, szamponu i odżywki do włosów) oraz innych szkodliwych substancji (np. rozpuszczalnika, farby, lakieru), używania środków czyszczących innych niż przeznaczone do danych produktów lub czyszczenia produktów w sposób niezgodny z instrukcją;
- pkt. 4** uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem wydzielinami (woskowiną, potem), kurzem lub pyłem, a w przypadku aparatu wewnętrznego, którego prawidłowe działanie zależy od regularnej wymiany filtrów ochronnych, uszkodzeń wynikających z używania aparatu bez filtra lub używania uszkodzonego bądź zużytego filtra. Wymiana filtrów powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami, o których mowa w §9.
- pkt. 5** sprzężeń powstałych z powodu nieuszczelności obudowy aparatu wewnętrznego wynikających ze zmiany budowy anatomicznej ucha powstałych po okresie określonym w §3 ust. 1 pkt. 5;
- pkt. 6** uszkodzeń powstałych w wyniku wylania lub korozji baterii, stosowania baterii innych niż zalecane przez producenta lub dystrybutora, o innym napięciu niż zalecane przez producenta lub dystrybutora lub przeznaczonych do innych urządzeń.

§7

Gwarancja nie obejmuje następujących elementów: filtra ochronnego, żyłki do wyjmowania aparatu z ucha, żyłki mocującej, rożka, dźwiękowodu, nasadki, baterii i akumulatorów.

§8

Kupujący zobowiązany jest do użytkowania produktu zgodnie z instrukcją wydawaną wraz z produktem, pod rygorem utraty uprawnień opisanych w niniejszym dokumencie.

§9

W przypadku zakupu aparatu słuchowego z filtrami ochronnymi, Kupujący zobowiązany jest do wymiany filtrów nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§10

Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wypadku:

- pkt. 1** użytkowania produktu niezgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji lub instrukcji;
- pkt. 2** wykonania naprawy samodzielnej lub w nieautoryzowanych punktach serwisowych, chyba że wada nie wynikała z takich czynności;
- pkt. 3** wady wynikającej z celowego zniszczenia lub uszkodzenia produktu;

pkt. 4 wady wynikającej z nieumyślnego zniszczenia lub uszkodzenia produktu.

§11

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

- pkt. 1** posiada wpisany numer seryjny zgodny z numerem na produkcie;
- pkt. 2** posiada wpisany typ produktu;
- pkt. 3** posiada wpisaną datę sprzedaży;
- pkt. 4** posiada pieczętkę firmy i podpis sprzedającego;
- pkt. 5** nie zawiera skreśleń lub poprawek dokonanych przez osobę nieuprawnioną.

§12

Produkty firmy OTICON A/S objęte są międzynarodową gwarancją na czas 12 miesięcy od dnia zakupu aparatu.

§13

Przedmiotowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

§14

W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny” (Dz. U nr 16, poz. 93, z 1971 z późniejszymi zmianami), w szczególności o gwarancji oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

*) Adres autoryzowanego serwisu produktów firmy Oticon A/S będących przedmiotem powyższej gwarancji:
DGS Poland Sp. z o.o.
ul. Lubieszewska 42, Mierzyn
72-006 Szczecin

People First

People First to nasza obietnica,
by dawać ludziom możliwość
swobodnej komunikacji,
naturalnych kontaktów
i aktywnego uczestnictwa.

child
friendly
hearing
care



oticon
PEOPLE FIRST