

Instrukcja obsługi



Charger 1.0 miniRITE R

Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Ruby

Wprowadzenie

W broszurze znajdziesz wskazówki, jak obsługiwać ładowarkę i jak o nią dbać. Przeczytaj uważnie całą broszurę z rozdziałem „**Ostrzeżenia**” włącznie. Pomoże Ci to w pełni wykorzystać możliwości ładowarki. Jeżeli masz więcej pytań dotyczących ładowarki, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

| [Informacje](#) | [Uruchamianie](#) | [Obsługa](#) | [Ostrzeżenia](#) | [Informacje dodatkowe](#) |

Na dole strony znajdziesz pasek menu, który ułatwi poruszanie się po broszurze.

Przeznaczenie

| | |
|------------------------------------|--|
| Przeznaczenie | Ładowarka służy do ładowania aparatów słuchowych zasilanych akumulatorem (ogniwo ładowalne). Ładowarki należy używać z odpowiednim aparatem słuchowym. |
| Wskazania dotyczące użycia | Nie ma wskazań do używania (diagnoz) dotyczących samej ładowarki. |
| Docelowa grupa użytkowników | Laicy, również dzieci powyżej 36. miesiąca życia. |
| Środowisko użycia | Warunki domowe. |
| Przeciwwskazania | Brak przeciwwskazań. |
| Korzyści kliniczne | Sprawdź korzyści kliniczne z aparatu słuchowego. |

WAŻNA INFORMACJA

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i działania aparatu słuchowego znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu.

Spis treści

Informacje

| | |
|-------------------------------|---|
| Ładowarka | 6 |
| Warunki dotyczące temperatury | 7 |

Uruchamianie

| | |
|-------------------------------|----|
| Przygotowanie ładowarki | 8 |
| Ładowanie aparatów słuchowych | 9 |
| Czas ładowania | 10 |

Obsługa

| | |
|---|----|
| Dbanie o ładowarkę | 12 |
| Zasilanie ładowarki za pomocą innych źródeł | 13 |

Ostrzeżenia


| | |
|-------------|----|
| Ostrzeżenia | 14 |
|-------------|----|

Informacje dodatkowe

| | |
|-----------------------------|----|
| Rozwiązywanie problemów | 16 |
| Rozwiązywanie problemów | 18 |
| Ładowarka: Warunki używania | 20 |
| Gwarancja | 21 |

Ładowarka

Co to jest i do czego służy

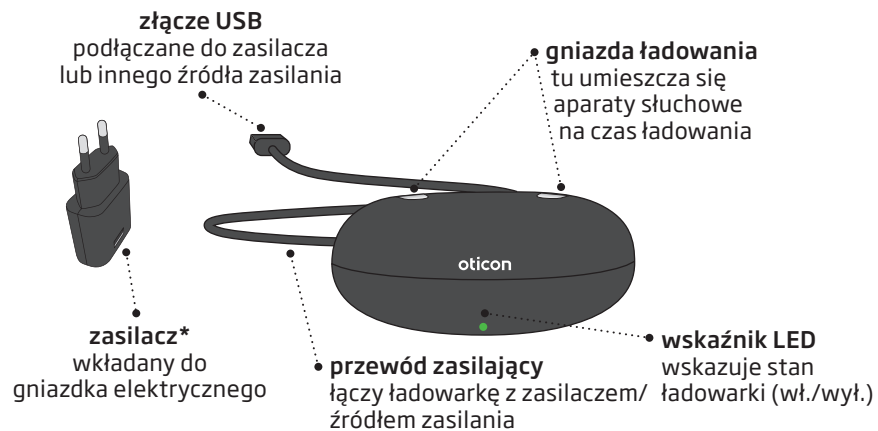

* Zasilacz będzie się różnić w zależności od kraju.


Warunki dotyczące temperatury

| Temperatura | Warunki ładowania |
|--------------------------------------|---|
| poniżej +5°C | Brak ładowania z powodu niskiej temperatury. |
| od +10°C do +35°C | Najlepsze warunki do ładowania. Ładowanie potrwa do 3 godzin. |
| od +5°C do +10°C i od +35°C do +40°C | Dłuższe ładowanie. Ładowanie potrwa do 4 godzin. |
| powyżej +40°C | Brak ładowania z powodu wysokiej temperatury. |

Ładowanie wznowi się automatycznie, gdy temperatura znajdzie się w zakresie od +5°C do +40°C.

Przygotowanie ładowarki


Podłącz do źródła zasilania

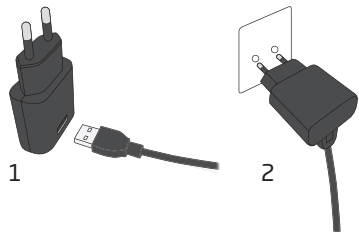

1. Włóż złącze USB do zasilacza.
2. Włóż zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Ładowarka włączy się automatycznie.

Ładowarka jest włączona

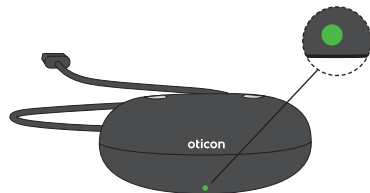

Gdy ładowarka jest podłączona do źródła zasilania, wskaźnik LED świeci się na zielono.

Ładowanie aparatów słuchowych


Umieść aparaty w ładowarce



Umieść aparaty słuchowe w gniazdach ładowania, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że aparaty są umieszczone zgodnie z oznaczeniami na ładowarce.

Prawy aparat słuchowy należy umieścić w gnieździe oznaczonym kolorem czerwonym. Lewy aparat słuchowy należy umieścić w gnieździe oznaczonym kolorem niebieskim.

Ładowanie

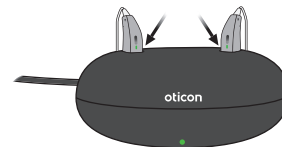

Wskaźnik LED aparatów słuchowych włączy się, gdy aparaty będą prawidłowo umieszczone w ładowarce.

Wskaźnik LED aparatu słuchowego - stan ładowania:
czerwony/pomarańczowy* = trwa ładowanie
zielony = w pełni naładowany

*w zależności od rodziny aparatu słuchowego; patrz instrukcja obsługi aparatu słuchowego

Czas ładowania

Przed pierwszym użyciem naładuj aparat słuchowy do pełna.

Ładuj aparat słuchowy co noc. Dzięki temu codziennie rano aparat słuchowy będzie w pełni naładowany.

Czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałej pojemności akumulatora. Jeżeli aparat słuchowy jest całkowicie rozładowany, standardowy czas ładowania to:

| 3 godziny | 1 godzina | 0,5 godziny |
|--------------------|------------------|------------------|
| w pełni naładowany | naładowany w 50% | naładowany w 25% |

Proces ładowania zatrzyma się automatycznie, gdy akumulator będzie w pełni naładowany. Zostaw aparat słuchowy w ładowarce, gdy go nie używasz. Pamiętaj, aby ładowarka była podłączona do źródła zasilania.

Czas ładowania prawego i lewego aparatu słuchowego może się różnić.

WAŻNA INFORMACJA

Ładowarka musi być zawsze podłączona do źródła zasilania, gdy aparat słuchowy jest umieszczony w gnieździe ładowania. Po wyłączeniu ładowarki aparat słuchowy włączy się i zacznie pobierać prąd z akumulatora.

Dbanie o ładowarkę

Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy ładowarka jest sucha i czysta. Dbaj o to, by gniazda ładowania nie były zakurzone; wycieraj je suchą ściereczką. Do czyszczenia gniazd ładowania nie używaj wody ani płynów czyszczących.

Przechowuj ładowarkę w suchym miejscu, np. w sypialni (a nie w łazience lub kuchni).

Przechowuj ładowarkę w miejscu, w którym panuje temperatura od +5°C do +40°C.

Zasilanie ładowarki za pomocą innych źródeł

Można zasilać ładowarkę z innych źródeł, które mają gniazdo USB. Sprawdź, czy źródło zasilania jest zgodne z USB 2.0 i ma minimalne natężenie na wyjściu 500 mA.

Przykładowe źródła zasilania:

- power bank
- komputer osobisty
- ładowarka samochodowa

W przypadku używania power banku należy upewnić się, czy urządzenie nie ma trybu oszczędzania mocy lub automatycznego wyłączenia, ponieważ aktywacja takiego trybu może spowodować, że aparaty słuchowe nie zostaną całkowicie naładowane lub nie zostaną w ogóle naładowane.

WAŻNA INFORMACJA

Podczas ładowania aparatu słuchowego używaj dostarczonego oryginalnego zasilacza do ładowarki 5.0V/1 A, oznaczonego znakiem CE i symbolem bezpieczeństwa.



Ostrzeżenia

Zanim zaczniesz używać ładowarki, zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami, aby korzystać z niej bezpiecznie i prawidłowo. W przypadku niewłaściwego działania lub poważnych incydentów podczas lub na skutek używania ładowarki należy skontaktować się z protetykiem słuchu. Protetyk słuchu pomoże rozwiązać problem oraz, jeśli okaże się to konieczne, zgłosi problem do producenta i/lub odpowiednich instytucji krajowych.

Używanie ładowarki

Ładowarki można używać tylko zgodnie z zaleceniami i po dostosowaniu przez protetyka słuchu.

Ryzyko oparzeń

W gniazdach ładowania można umieszczać wyłącznie odpowiednie aparaty słuchowe.

Ryzyko zadławienia się

Ładowarka, aparaty słuchowe i ich części powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci lub kogokolwiek, kto mógłby je połknąć, czy też w inny sposób wyrządzić sobie krzywdę.

W przypadku połknięcia małego elementu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub udać się do szpitala.

Wysokie temperatury

Ładowarki nie można wystawiać na działanie wysokich temperatur (na przykład zostawiać w samochodzie, który stoi na słońcu).

Nie wolno suszyć ładowarki w kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.

Podłączanie do urządzeń zewnętrznych

Bezpieczeństwo używania ładowarki podłączonej do urządzenia zewnętrznego za pomocą uniwersalnego przewodu AUX i/lub przewodu USB, i/lub bezpośrednio zależy od zewnętrznego źródła sygnału. W przypadku podłączenia do zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazdka, urządzenie to musi być zgodne z normą IEC-62368-1 lub równoważnymi normami bezpieczeństwa.

Zagrożenie pożarem

Źródło zasilania w ładowarce nie ma wystarczającej energii, aby wywołać pożar w normalnych warunkach użytkowania.

Rozwiązywanie problemów

| Problem | Prawdopodobna przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Wskaźnik LED ładowarki pozostaje wyłączony, gdy ładowarka jest podłączona do zasilania. | Ładowarka nie jest włączona. | Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania. Zawsze sprawdzaj, czy ładowanie się rozpoczęło, aby upewnić się, że źródło zasilania ma na wyjściu natężenie wystarczające dla ładowarki. |
| Wskaźnik LED ładowarki emituje długie pomarańczowe sygnały. | Aparat słuchowy lub ładowarka są za ciepłe. | Przenieś ładowarkę i aparat słuchowy do miejsca, w którym panuje temperatura od +5°C do +40°C. |
| Wskaźnik LED ładowarki emituje powtarzające się 3 krótkie pomarańczowe sygnały. | Ładowarka jest za zimna. | Przenieś ładowarkę do miejsca, w którym panuje temperatura od +5°C do +40°C. |
| | Błąd systemowy. | Skontaktuj się z protetykiem słuchu. |

Rozwiązywanie problemów

| Problem | Prawdopodobna przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|--|
| Wskaźnik LED aparatu słuchowego pozostaje wyłączony, gdy aparat słuchowy jest umieszczony w ładowarce. | Ładowarka nie jest włączona. | Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania. |
| | Aparat słuchowy lub ładowarka są za ciepłe lub za zimne. | Przenieś ładowarkę i aparat słuchowy do miejsca, w którym panuje temperatura od +5°C do +40°C. |
| | Ładowanie nie jest zakończone. Temperatura w pomieszczeniu przekracza +35°C, co wydłuża czas ładowania. Ładowarka przestała ładować, aby chronić akumulator. | Włóż ponownie aparat słuchowy do ładowarki; to spowoduje zakończenie ładowania w ciągu około 15 minut. |
| | Aparat słuchowy nie jest prawidłowo włożony do ładowarki. | Sprawdź, czy w gniazdach ładowarki nie ma ciał obcych. |
| Wskaźnik LED aparatu słuchowego miga na czerwono/ pomarańczowo*, gdy aparat słuchowy jest umieszczony w ładowarce. | Błąd systemowy. | Skontaktuj się z protetykiem słuchu. |

*w zależności od rodziny aparatu słuchowego, patrz instrukcja obsługi aparatu słuchowego

Ładowarka: Warunki używania

| | |
|--|---|
| Warunki w środowisku pracy | Temperatura: od +5°C do +40°C Wilgotność: od 5% do 93%, bez skraplania Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa |
| Warunki podczas transportu i przechowywania | Podczas transportu i przechowywania temperatura i wilgotność nie powinny przez dłuższy czas przekraczać poniższych limitów: Temperatura: od -25°C do +70°C Wilgotność: od 5% do 93%, bez skraplania |

Informacje o aparacie słuchowym: Warunki używania opisano w instrukcjach obsługi aparatu słuchowego.

Gwarancja

Certyfikat

Imię i nazwisko nabywcy: _____

Protetyk słuchu: _____

Adres protetyka słuchu: _____

Nr telefonu protetyka słuchu: _____

Data zakupu: _____

Okres gwarancji: _____ Miesiąc: _____

Model: _____ Nr seryjny: _____

Gwarancja międzynarodowa

Ładowarka jest objęta międzynarodową ograniczoną gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wady produkcyjne samego urządzenia, nie dotyczy natomiast akcesoriów, takich jak akumulatory, przewody, zasilacze itp. Ograniczona gwarancja NIE obejmuje zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania spowodowanego niewłaściwym/nieprawidłowym użyciem lub pielęgnacją, nadużyciem, wypadkami, manipulacją przez nieuprawnione osoby, narażeniem na warunki korozyjne, uszkodzeń spowodowanych obcymi przedmiotami, podłączonymi urządzeniami lub niewłaściwym dopasowaniem przez protetyka. Gwarancja nie narusza żadnych praw, które mogą mieć zastosowanie na

mocy przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Firma protetyczna, w której się zaopatrujesz, może ustalić zakres gwarancji przekraczający tę ograniczoną gwarancję. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Jeśli potrzebujesz serwisu

Dostarcz ładowarkę do protetyka słuchu, który może mieć możliwość rozwiązania drobnych problemów i wprowadzenia zmian na miejscu.

Producent deklaruje, że ładowarka jest zgodna z istotnymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy EMC (2014/30/EU) i LVD (2014/35/EU).

Deklaracja zgodności jest dostępna u producenta.








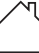
SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania
www.sbohearing.com









Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna z lokalnymi przepisami.



Objaśnienie symboli i skrótowców użytych w tej broszurze

| | |
|---|---|
|  | Ostrzeżenia Przed użyciem urządzenia należy przeczytać teks oznaczony symbolem ostrzegawczym. |
|  | Producent Urządzenie zostało wyprodukowane przez producenta, którego nazwa i adres znajdują się obok symbolu. Wskazuje producenta urządzenia medycznego, zgodnie z dyrektywami UE 90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/79/WE. |
|  | Odpady elektroniczne (WEEE) Aparaty słuchowe, akcesoria lub baterie należy oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Użytkownicy aparatów słuchowych mogą także zwrócić odpady elektroniczne do swojego protetyka słuchu w celu ich utylizacji. Sprzęt elektroniczny objęty dyrektywą 2012/19/UE w sprawie odpadów i sprzętu elektrycznego (WEEE). |
|  | Znak zgodności z przepisami (RCM) Urządzenie spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz wymogi związane z transmisją radiową dla produktów dostarczanych na rynek australijski i nowozelandzki. |
|  | Podwójna izolacja Oznacza, że zasilacz produktu jest podwójnie izolowany. Wskazuje to na bardzo niskie ryzyko awarii z powodu jednej wady, tj. awarie będące skutkiem pojedynczej przyczyny nie mogą wystąpić. |
|  | Używanie w pomieszczeniach Oznacza, że produkt nadaje się do używania w pomieszczeniach. |

Objaśnienie dodatkowych symboli użytych na etykietach

| | |
|---|---|
|  | Przechowywać w suchym miejscu Oznacza urządzenie medyczne, które musi być chronione przed wilgocią. |
|  | Symbol ostrzeżenia Należy zapoznać się z ostrzeżeniami i uwagami zawartymi w instrukcji obsługi. |
|  | Numer katalogowy Wskazuje numer katalogowy nadany przez producenta, aby możliwe było zidentyfikowanie urządzenia medycznego. |
|  | Numer seryjny Wskazuje numer seryjny nadany przez producenta, aby możliwe było zidentyfikowanie danego urządzenia medycznego. |
|  | Urządzenie medyczne To urządzenie jest urządzeniem medycznym. |
|  | Gniazdo zasilania Wskazuje parametry zasilania urządzenia elektrycznego. |

Ogólne warunki gwarancji

§1

Oticon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 176148, numer REGON: 01208630500000, numer NIP: 5260303881, kapitał zakładowy: 462 000,00 zł (dalej „Oticon Polska”), udziela gwarancji na produkty wskazane w niniejszej gwarancji i na zasadach w niej wskazanych. Firma Oticon Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż produkty będące przedmiotem niniejszej gwarancji są urządzeniami przeznaczonymi do poprawy słyszenia dźwięków otoczenia.

§2

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zapewnia zgodność oferowanych produktów z właściwościami określonymi w §1 oraz ich niewadliwość w okresie trwania gwarancji, rozumianą jako możliwość swobodnego użytkowania tych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w § 1.

§3

ust. 1 Okres gwarancji wynosi:

pkt. 1 30 miesięcy na aparaty indywidualne wewnętrzne;

pkt. 2 30 miesięcy na aparaty zewnętrzne;

pkt. 3 24 miesiące na urządzenia systemu ConnectLine i Connectivity oraz pilota do aparatów słuchowych i Charger 1.0;

pkt. 4 30 miesięcy na systemy FM Oticon Amigo oraz EduMic;

pkt. 5 3 miesiące na niedopasowanie obudowy aparatu wewnętrznego do anatomii ucha (np. uwieranie, poluzowanie, sprzężenia) wynikające ze zmiany budowy anatomicznej ucha. Gwarancja, o której mowa w niniejszym punkcie, jest niezależna od gwarancji, o której mowa w pkt. 1.

pkt. 6 3 miesiące na akcesoria wymienione w instrukcjach urządzeń systemów ConnectLine, Connectivity i FM Oticon Amigo oraz EduMic;

pkt. 7 3 miesiące na część wymienioną w wyniku naprawy pogwarancyjnej, z wyjątkiem wzmacniacza, mikrofonu i słuchawki, na które gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy;

ust. 2 Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.

ust. 3 Bieg terminu gwarancji w wypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 7, rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, po wykonaniu naprawy pogwarancyjnej.

- ust. 4** Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji dostarczono uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonano istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono część rzeczy, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
- ust. 5** Uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu przysługują tylko wobec produktów zakupionych jako fabrycznie nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu gwarancji ujawnionej w okresie gwarancji, o ile wada ta powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej oraz nieodpłatnego usunięcia wady w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 5.

§5

ust. 1 Firma Oticon Polska oświadcza, iż nieodpłatne usunięcie wady, o którym mowa w §4 nastąpi w terminie:

pkt. 1 14 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu*;

pkt. 2 31 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, gdy z powodu konieczności wykonania specjalistycznych napraw nie jest możliwa naprawa w kraju (brak właściwej elektroniki), lub gdy z powodu nieposiadania przez serwis niezbędnych do naprawy części zamiennych zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

ust. 2 W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, firma Oticon Polska powiadomi Kupującego na piśmie lub telefonicznie w terminie 10 dni od daty dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, o braku możliwości realizacji naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.

§6

ust. 1 Gwarancja nie obejmuje:

pkt. 1 uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją;

pkt. 2 mechanicznych uszkodzeń, przykładowo: pęknięcia obudowy, urwania komory baterii, uszkodzenia potencjometru głośności, ułamania przycisku, pęknięcia płytki wzmacniacza na skutek upuszczenia, uszkodzenia gniazd wynikającego z użycia nadmiernej siły i in.;

- pkt. 3** chemicznych uszkodzeń na skutek: zabrudzenia, zamoczenia, działania różnych kosmetyków (np. lakieru do włosów, żelu do włosów, szamponu i odżywki do włosów) oraz innych szkodliwych substancji (np. rozpuszczalnika, farby, lakieru), używania środków czyszczących innych niż przeznaczone do danych produktów lub czyszczenia produktów w sposób niezgodny z instrukcją;
- pkt. 4** uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem wydzielinami (woskowiną, potem), kurzem lub pyłem, a w przypadku aparatu wewnętrznego, którego prawidłowe działanie zależy od regularnej wymiany filtrów ochronnych, uszkodzeń wynikających z używania aparatu bez filtra lub używania uszkodzonego bądź zużytego filtra. Wymiana filtrów powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami, o których mowa w §9.
- pkt. 5** sprzężeń powstałych z powodu nieszczelności obudowy aparatu wewnętrznego wynikających ze zmiany budowy anatomicznej ucha powstałych po okresie określonym w §3 ust. 1 pkt. 5;
- pkt. 6** uszkodzeń powstałych w wyniku wylania lub korozji baterii, stosowania baterii innych niż zalecane przez producenta lub dystrybutora, o innym napięciu niż zalecane przez producenta lub dystrybutora lub przeznaczonych do innych urządzeń.

§7

Gwarancja nie obejmuje następujących elementów: filtra ochronnego, żyłki do wyjmowania aparatu z ucha, żyłki mocującej, rożka, dźwiękowodu, nasadki, baterii i akumulatorów.

§8

Kupujący zobowiązany jest do użytkowania produktu zgodnie z instrukcją wydawaną wraz z produktem, pod rygorem utraty uprawnień opisanych w niniejszym dokumencie.

§9

W przypadku zakupu aparatu słuchowego z filtrami ochronnymi, Kupujący zobowiązany jest do wymiany filtrów nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§10

Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wypadku:

- pkt. 1** użytkowania produktu niezgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji lub instrukcji;
- pkt. 2** wykonania naprawy samodzielnej lub w nieautoryzowanych punktach serwisowych, chyba że wada nie wynikała z takich czynności;
- pkt. 3** wady wynikającej z celowego zniszczenia lub uszkodzenia produktu;
- pkt. 4** wady wynikającej z nieumyślnego zniszczenia lub uszkodzenia produktu.

§11

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

- pkt. 1** posiada wpisany numer seryjny zgodny z numerem na produkcie;
- pkt. 2** posiada wpisany typ produktu;
- pkt. 3** posiada wpisana datę sprzedaży;
- pkt. 4** posiada pieczętkę firmy i podpis sprzedającego;
- pkt. 5** nie zawiera skreśleń lub poprawek dokonanych przez osobę nieuprawnioną.

§12

Produkty objęte są międzynarodową gwarancją na czas 12 miesięcy od dnia zakupu.

§13

Przedmiotowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

§14

W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny” (Dz. U nr 16, poz. 93, z 1971 z późniejszymi zmianami), w szczególności o gwarancji oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

*) Adres autoryzowanego serwisu produktów będących przedmiotem powyższej gwarancji:
DGS Poland Sp. z o.o.
ul. Lubieszewska 42, Mierzyn
72-006 Szczecin

215377PL / 2019.12.02

215377PL / 2019.12.02



oticon
life-changing technology