

Instrukcja obsługi

Remote Control
2.0



Wprowadzenie

Z tej broszury dowiesz się, jak używać pilota zdalnego sterowania Remote Control 2.0 i jak o niego dbać. Przeczytaj uważnie całą broszurę z rozdziałem **Ostrzeżenia** włącznie. Pomoże Ci to w pełni wykorzystać możliwości pilota.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące korzystania z pilota, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Na dole strony znajdziesz pasek menu, który ułatwi poruszanie się po broszurze.

[| Informacje](#) | [Uruchamianie](#) | [Obsługa](#) | [Ostrzeżenia](#) | [Informacje dodatkowe](#) |

Przeznaczenie

Przeznaczenie	Remote Control 2.0 umożliwia użytkownikom aparatów słuchowych Oticon z łącznością bezprzewodową zmienianie głośności i programów aparatów.
Wskazania dotyczące używania	Brak wskazań.
Docelowa grupa użytkowników	Dorośli oraz dzieci powyżej 36 miesiąca życia.
Środowisko używania	W pomieszczeniach/na zewnątrz.
Przeciwwskazania	Użytkownicy aktywnych implantów muszą zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ostrzeżenia .
Korzyści kliniczne	Poznaj korzyści kliniczne z aparatu słuchowego.

Spis treści

Informacje

Zawartość zestawu	6
Opis produktu	7

Uruchamianie

Baterie	8
Wkładanie baterii	9

Obsługa

Zasięg działania	10
Potwierdzenia	11
Zmiana programu	12
Regulacja głośności	13
Wyciszenie*	14
Otwór na pasek	15
Dbanie o pilota zdalnego sterowania	16

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia	17
-------------	----


Informacje dodatkowe

Warunki używania	20
Informacje techniczne	22
Ogólne warunki gwarancji	25


Zawartość zestawu

Zestaw zawiera następujące elementy:

Remote Control 2.0

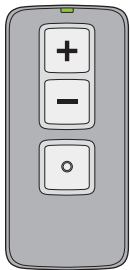

baterie


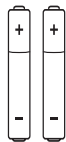


2 x AAAA

niniejsza broszura



Opis produktu

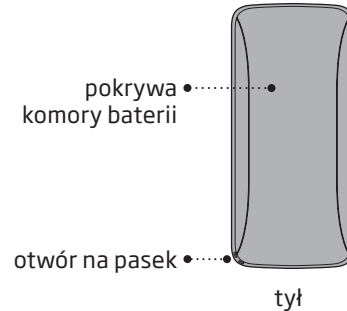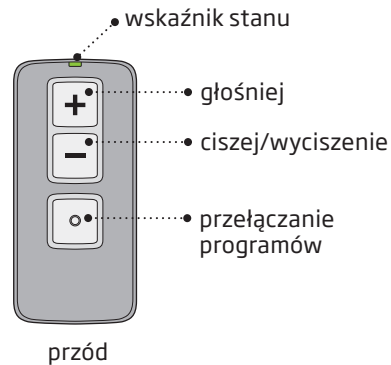

Baterie


Aby włączyć pilota zdalnego sterowania, należy umieścić dwie baterie typu AAAA w komorze baterii.

Czas pracy baterii zależy od warunków używania. Przy standardowym użytkowaniu baterie należy wymieniać mniej więcej raz w roku.

Nie należy zamykać komory baterii na siłę; jeżeli nie możesz łatwo zamknąć komory baterii, sprawdź ułożenie pokrywy – ustaw pokrywę w prawidłowej pozycji, aby można było łatwo ją zatrzasknąć.

Wkładanie baterii


1 Wyjmij

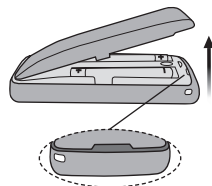

Ostrożnie zdejmij pokrywę komory baterii.

Wyjmij zużyte baterie.


2 Włóż

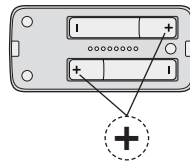

Włóż nowe baterie do komory baterii.

Sprawdź, czy symbol „+” na baterii odpowiada symbolowi „+” w komorze baterii.

3 Zamknij

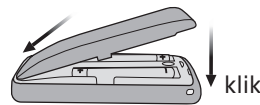

Założ pokrywę baterii.


Następnie delikatnie dociśnij pokrywę, aby ją zatrzasknąć.

Zasięg działania

Pilot zdalnego sterowania pozwala obsługiwać aparaty słuchowe z odległości do 1 m.

Nie jest wymagane ustawienie pilota i aparatów w jednej linii.

Jeśli nosisz dwa aparaty słuchowe, pilot zmieni ustawienia w obu aparatach jednocześnie.

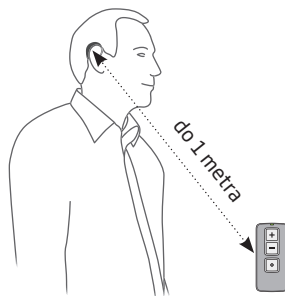


Potwierdzenia

Sygnal świetlny

Wskaźnik stanu informuje o działaniu pilota. Dioda miga po każdym naciśnięciu przycisku.


Słaba bateria

Gdy baterie wymagają wymiany, dioda miga w wolnym tempie (co 2 sekundy). Dopóki baterie nie zostaną wymienione, pilot nie będzie działać. W takim przypadku wymień baterie jak najszybciej.

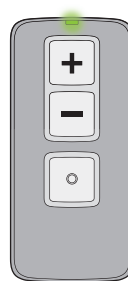

Zmiana programu

Jeżeli w aparacie słuchowym ustawionych jest kilka programów, możesz je przełączać pilotem zdalnego sterowania. Aby zmienić program aparatu słuchowego, naciśnij krótko przycisk „•” na pilocie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przejście aparatu słuchowego do kolejnego programu w cyklu programów.

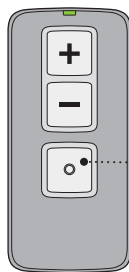


naciśnij, aby
zmienić program


Aby wrócić do programu 1 i początkowych ustawień głośności, naciśnij i przytrzymaj przez 3-4 sekundy przycisk „•”.

Regulacja głośności

Aby dostosować głośność aparatów słuchowych za pomocą pilota, użyj przycisków regulacji głośności (głośniej/ciszej).

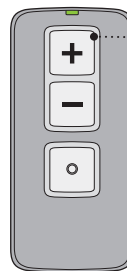

naciśnij „+”,
aby zwiększyć
głośność

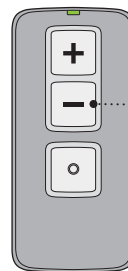


naciśnij „-”,
aby zmniejszyć
głośność

WAŻNA INFORMACJA

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji danego aparatu słuchowego podano w jego instrukcji obsługi.

Wyciszenie*

Używaj funkcji wyciszania, jeśli musisz wyciszyć aparaty słuchowe podczas ich noszenia.

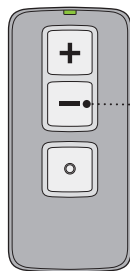

- naciśnij i przytrzymaj przez 3-4 sekundy przycisk zmniejszania głośności


Aby wyłączyć wyciszenie aparatu słuchowego, naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

* Funkcja wyciszania nie jest dostępna we wszystkich aparatach słuchowych z łącznością bezprzewodową. Więcej szczegółów możesz uzyskać u protetyka słuchu.
Uwaga: Funkcja wyciszania aparatu słuchowego nie wyłącza aparatu. Aby wyłączyć aparat słuchowy, otwórz komorę baterii aparatu.

Otwór na pasek

Pilot ma otwór na pasek w prawym dolnym rogu.

Można użyć odpowiedniego paska na rękę.

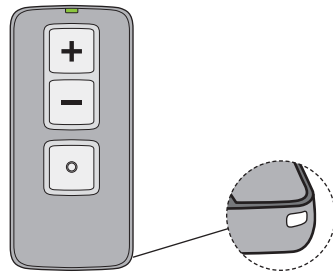

Dbanie o pilota zdalnego sterowania

Podczas wymiany baterii lub czyszczenia pilota trzymaj urządzenie nad miękką powierzchnią, aby nie uległo uszkodzeniu w przypadku upuszczenia.

WAŻNA INFORMACJA

Do czyszczenia pilota zdalnego sterowania używaj suchej miękkiej ściereczki. Nigdy nie myj ani nie zanurzaj pilota w wodzie ani innych płynach.

Ostrzeżenia

Zanim zaczniesz używać pilota zdalnego sterowania, zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami, aby korzystać z niego bezpiecznie i prawidłowo.

W przypadku niewłaściwego działania lub poważnych incydentów podczas lub na skutek używania pilota zdalnego sterowania należy skontaktować się z protetykiem słuchu. Protetyk słuchu pomoże rozwiązać problem oraz, jeśli okaże się to konieczne, zgłosić problem do producenta i/lub odpowiednich instytucji krajowych.

Używanie baterii

Zawsze używaj baterii zalecanych przez Twojego protetyka słuchu. Baterie niskiej jakości mogą wyciekać, powodując uszkodzenia ciała.

Nigdy nie próbuj ładować baterii ani nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą eksplodować.

Korzystanie z paska

Jeżeli używasz do pilota zdalnego sterowania paska na rękę, upewnij się, że pasek jest przeznaczony i odpowiedni do tego celu. Nigdy nie noś pilota na lince/smyczy na szyję ze względu na ryzyko uduszenia.

Ryzyko zadławienia się i połknięcia baterii lub innych małych elementów

Pilot zdalnego sterowania, jego części i baterie powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci lub kogokolwiek, kto mógłby je połknąć, czy też w inny sposób wyrządzić sobie krzywdę.

W przypadku połknięcia baterii, aparatu słuchowego lub małej części należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia

Przejęcie kontroli

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego używania przechowuj pilota zdalnego sterowania poza zasięgiem dzieci i osób, które mogłyby przejąć kontrolę nad jego funkcjami.

Możliwe działania niepożądane

Pilot zdalnego sterowania jest wykonany z niealergicznymi materiałami, mimo to może czasami powodować podrażnienia skóry lub inne nietypowe objawy.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Aktywne implanty

Pilot zdalnego sterowania został dokładnie przetestowany i zbadano jego działanie pod kątem wpływu wywieranego na zdrowie człowieka zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi emisji dla urządzeń dopuszczonych do długotrwałego użytku przez ludzi (Specific Absorption

Ratio, SAR), indukowanego pola elektromagnetycznego i napięcia w ciele człowieka. Poziomy ekspozycji są znacznie niższe niż dopuszczalne międzynarodowe limity bezpieczeństwa dotyczące SAR, indukowanego pola elektromagnetycznego i napięcia w ciele człowieka określone w normach dotyczących zdrowia ludzi oraz wzajemnego oddziaływania z aktywnymi implantami medycznymi, np. rozrusznikami serca.

Rentgen, CT, MR, PET, elektroterapia i zabieg chirurgiczny

Odkładaj pilota zdalnego sterowania na czas badania rentgenowskiego, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania PET, elektroterapii, zabiegu chirurgicznego itp., ponieważ pilot może ulec uszkodzeniu pod wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

Korzystanie z pilota w ruchu drogowym

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania może powodować dekoncentrację. Należy być świadomym swojego otoczenia podczas używania pilota. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego dotyczącymi korzystania z urządzeń do komunikacji podczas prowadzenia pojazdu.

Wysokie temperatury i substancje chemiczne

Pilota zdalnego sterowania nie można wystawiać na działanie wysokich temperatur, na przykład zostawiać go w samochodzie, który stoi na słońcu.

Nie wolno suszyć pilota w kuchni mikrofalowej, piekarniku itp.

Substancje chemiczne zawarte w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, olejkach do opalania czy środkach przeciw owadom mogą uszkodzić pilota. Przed użyciem

wyżej wymienionych produktów należy zawsze odłożyć pilota, a po ich użyciu poczekać, aż wyschną. Dopiero wówczas można ponownie korzystać z pilota.

Zakłócenia

Pilot zdalnego sterowania został starannie przetestowany pod kątem zakłóceń zgodnie z najbardziej wymagającymi normami międzynarodowymi.

Jednak mogą pojawić się zakłócenia między pilotem a innymi urządzeniami (np. niektórymi modelami telefonów komórkowych, radioodbiornikami CB, systemami alarmowymi w sklepach lub innymi urządzeniami bezprzewodowymi). Jeśli takie zakłócenia wystąpią, zwiększ odległość między pilotem a zakłócającym urządzeniem.

Warunki używania

Warunki podczas pracy	Temperatura: od +10°C do +45°C Wilgotność: < 85% wilgotności względnej, bez skraplania Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa
Warunki podczas transportu i przechowywania	Podczas transportu i przechowywania temperatura oraz wilgotność nie powinny przez dłuższy czas przekraczać poniższych limitów: Temperatura: od -20°C do +70°C Wilgotność: < 85% wilgotności względnej, bez skraplania Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa

Międzynarodowa gwarancja

Urządzenie jest objęte międzynarodową ograniczoną gwarancją producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wady produkcyjne samego urządzenia, nie dotyczy natomiast akcesoriów, takich jak baterie, przewody, zasilacze itp. Ograniczona gwarancja NIE obejmuje zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania spowodowanego nieodpowiednim/niewłaściwym użyciem lub konserwacją, zaniedbaniem, nadużyciem, wypadkiem, manipulacją przez nieuprawnione osoby, narażeniem na warunki korozyjne, obcymi przedmiotami lub niewłaściwym dopasowaniem przez protetyka. W ramach tej gwarancji producent zdecyduje według własnego uznania, czy naprawić urządzenie, czy wymienić je na równoważny model.

Gwarancja nie narusza żadnych praw, które mogą mieć zastosowanie na mocy przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Firma protetyczna, w której się zaopatrujesz, może ustalić zakres gwarancji przekraczający tę ograniczoną gwarancję. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Jeśli potrzebujesz serwisu

Dostarcz urządzenie do protetyka słuchu, który może mieć możliwość rozwiązania drobnych problemów i zmiany ustawień na miejscu. Protetyk słuchu może pomóc Ci w uzyskaniu serwisu gwarancyjnego od producenta. Protetyk słuchu może pobrać opłatę za swoje usługi.

Informacje techniczne

Nazwa modelu	RC-2A
--------------	-------

Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik-odbiornik radiowy wykorzystujący technikę indukcji magnetycznej krótkiego zasięgu o częstotliwości 3,84 MHz. Siła pola magnetycznego nadajnika jest niewielka i jest zawsze mniejsza niż 15 nW (zwykle poniżej -15 dBμA/m dla odległości 10 metrów).

Pilot spełnia międzynarodowe normy dotyczące nadajników radiowych, kompatybilności elektromagnetycznej i emisji dla urządzeń dopuszczonych do długotrwałego użytku przez ludzi.

Ze względu na ograniczone rozmiary pilota oznaczenia zgodności z odpowiednimi wymogami podano w niniejszej broszurze.

W przypadku noszenia urządzenia blisko ciała, urządzenie to spełnia normy FCC oraz IC dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe i zostało przetestowane podczas kontaktu z ludzkim ciałem. Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu ani pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w arkuszach specyfikacji technicznych na stronie www.oticon.global

Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada

To urządzenie ma certyfikat:

FCC ID: ZACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

Uwaga

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz z normami RSS dotyczącymi zwolnienia z posiadania licencji Ministerstwa Przemysłu Kanady.

Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom

1. Praca urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą być przyczyną niepożądanego działania.

Uwaga

Zmiany lub przeróbki dokonane w urządzeniu bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą doprowadzić do unieważnienia prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

Producent deklaruje, że Remote Control 2.0 (RC-2A) jest zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

To urządzenie medyczne jest zgodne z Rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Deklaracja zgodności jest dostępna u producenta.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania



Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna z lokalnymi przepisami.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Ogólne warunki gwarancji

§1

Oticon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 176148, numer REGON: 01208630500000, numer NIP: 5260303881, kapitał zakładowy: 462 000,00 zł (dalej „Oticon Polska”), udziela gwarancji na produkty wskazane w niniejszej gwarancji i na zasadach w niej wskazanych. Firma Oticon Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż produkty będące przedmiotem niniejszej gwarancji są urządzeniami przeznaczonymi do poprawy słyszenia dźwięków otoczenia.

§2

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zapewnia zgodność oferowanych produktów z właściwościami określonymi w §1 oraz ich niewadliwość w okresie trwania gwarancji, rozumianą jako możliwość swobodnego użytkowania tych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w §1.

§3

- ust. 1** Okres gwarancji wynosi:
- pkt. 1** 30 miesięcy na aparaty indywidualne wewnętrzne;
 - pkt. 2** 30 miesięcy na aparaty zauszne;
 - pkt. 3** 24 miesiące na urządzenia systemu ConnectLine oraz pilota do aparatów słuchowych;
 - pkt. 4** 30 miesięcy na systemy FM Oticon Amigo;
 - pkt. 5** 3 miesiące na niedopasowanie obudowy aparatu wewnętrznego do anatomii ucha (np. uwieranie, poluzowanie, sprzężenia) wynikające ze zmiany budowy anatomicznej ucha. Gwarancja, o której mowa w niniejszym punkcie, jest niezależna od gwarancji, o której mowa w pkt. 1.
 - pkt. 6** 3 miesiące na akcesoria wymienione w instrukcjach urządzeń systemów ConnectLine i FM Oticon Amigo;
 - pkt. 7** 3 miesiące na część wymienioną w wyniku naprawy pogwarancyjnej, z wyjątkiem wzmacniacza, mikrofonu i słuchawki, na które gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy;
- ust. 2** Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.
- ust. 3** Bieg terminu gwarancji w wypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 7, rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, po wykonaniu naprawy pogwarancyjnej.

- ust. 4** Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji dostarczono uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonano istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono część rzeczy, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
- ust. 5** Uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu przysługują tylko wobec produktów zakupionych jako fabrycznie nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu gwarancji ujawnionej w okresie gwarancji, o ile wada ta powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej oraz nieodpłatnego usunięcia wady w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 5.

§5

- ust. 1** Firma Oticon Polska oświadcza, iż nieodpłatne usunięcie wady, o którym mowa w §4 nastąpi w terminie:
- pkt. 1** 14 dni roboczych, poczynwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu*;
 - pkt. 2** 31 dni roboczych, poczynwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, gdy z powodu konieczności wykonania specjalistycznych napraw nie jest możliwa naprawa w kraju (brak właściwej elektroniki), lub gdy z powodu nie posiadania przez serwis niezbędnych do naprawy części zamiennych zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
- ust. 2** W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, firma Oticon Polska powiadomi Kupującego na piśmie lub telefonicznie w terminie 10 dni od daty dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, o braku możliwości realizacji naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.

§6

- ust. 1** Gwarancja nie obejmuje:
- pkt. 1** uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją;
 - pkt. 2** mechanicznych uszkodzeń, przykładowo: pęknięcia obudowy, urwania komory baterii, uszkodzenia potencjometru głośności, ułamania przycisku, pęknięcia płytki wzmacniacza na skutek upuszczenia, uszkodzenia gniazd wynikającego z użycia nadmiernej siły i in.;

- pkt. 3** chemicznych uszkodzeń na skutek: zabrudzenia, zamoczenia, działania różnych kosmetyków (np. lakieru do włosów, żelu do włosów, szamponu i odżywki do włosów) oraz innych szkodliwych substancji (np. rozpuszczalnika, farby, lakieru), używania środków czyszczących innych niż przeznaczone do danych produktów lub czyszczenia produktów w sposób niezgodny z instrukcją;
- pkt. 4** uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem wydzielinami (woskowiną, potem), kurzem lub pyłem, a w przypadku aparatu wewnętrznego, którego prawidłowe działanie zależy od regularnej wymiany filtrów ochronnych, uszkodzeń wynikających z używania aparatu bez filtra lub używania uszkodzonego bądź zużytego filtra. Wymiana filtrów powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami, o których mowa w §9.
- pkt. 5** sprzężeń powstałych z powodu nieuszczelnności obudowy aparatu wewnętrznego wynikających ze zmiany budowy anatomicznej ucha powstałych po okresie określonym w §3 ust. 1 pkt. 5;
- pkt. 6** uszkodzeń powstałych w wyniku wylania lub korozji baterii, stosowania baterii innych niż zalecane przez producenta lub dystrybutora, o innym napięciu niż zalecane przez producenta lub dystrybutora lub przeznaczonych do innych urządzeń.

§7

Gwarancja nie obejmuje następujących elementów: filtru ochronnego, żyłki do wyjmowania aparatu z ucha, żyłki mocującej, rożka, dźwiękowodu, nasadki, baterii i akumulatorów.

§8

Kupujący zobowiązany jest do użytkowania produktu zgodnie z instrukcją wydawaną wraz z produktem, pod rygorem utraty uprawnień opisanych w niniejszym dokumencie.

§9

W przypadku zakupu aparatu słuchowego z filtrami ochronnymi, Kupujący zobowiązany jest do wymiany filtrów nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§10

Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wypadku:

- pkt. 1** użytkowania produktu niezgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji lub instrukcji;
- pkt. 2** wykonania naprawy samodzielnej lub w nieautoryzowanych punktach serwisowych, chyba że wada nie wynikała z takich czynności;
- pkt. 3** wady wynikającej z celowego zniszczenia lub uszkodzenia produktu;
- pkt. 4** wady wynikającej z nieumyślnego zniszczenia lub uszkodzenia produktu.

§11

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

- pkt. 1** posiada wpisany numer seryjny zgodny z numerem na produkcie;
- pkt. 2** posiada wpisany typ produktu;
- pkt. 3** posiada wpisana datę sprzedaży;
- pkt. 4** posiada pieczętkę firmy i podpis sprzedającego;
- pkt. 5** nie zawiera skreśleń lub poprawek dokonanych przez osobę nieuprawnioną.

§12

Produkty objęte są międzynarodową gwarancją na czas 12 miesięcy od dnia zakupu.

§13

Przedmiotowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

§14

W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny” (Dz. U nr 16, poz. 93, z 1971 z późniejszymi zmianami), w szczególności o gwarancji oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

*) Adres autoryzowanego serwisu produktów będących przedmiotem powyższej gwarancji:
DGS Poland Sp. z o.o.
ul. Lubieszńska 42, Mierzyn
72-006 Szczecin

Objaśnienie symboli użytych w broszurze	
	Ostrzeżenia Przed użyciem urządzenia należy przeczytać tekst oznaczony znakiem ostrzegawczym.
	Producent Urządzenie zostało wyprodukowane przez producenta, którego nazwa i adres znajdują się obok symbolu. Wskazuje producenta urządzenia medycznego, zgodnie z Rozporządzeniami unijnymi (UE): 2017/745 i 2017/746.
	Znak CE Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganymi rozporządzeniami i dyrektywami UE.
	Odpady elektroniczne (WEEE) Aparaty słuchowe, akcesoria lub baterie należy oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Użytkownicy aparatów słuchowych mogą także oddać odpady elektroniczne protetykowi słuchu w celu utylizacji. Sprzęt elektroniczny objęty Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie odpadów i sprzętu elektrycznego (WEEE).
	Znak zgodności z przepisami (RCM) Urządzenie spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz wymogi związane z transmisją radiową dla produktów dostarczanych na rynek australijski i nowozelandzki.
	Singapurska etykieta IMDA Oznacza, że urządzenie spełnia normy i warunki specyfikacji opublikowane przez Info-Communications Media Development Authority (IMDA) oraz jest kompatybilne z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi w Singapurze i nie powoduje zakłóceń transmisji radiowej w innych autoryzowanych sieciach radiokomunikacyjnych.

Objaśnienie dodatkowych symboli użytych na etykietach	
	Przechowywać w suchym miejscu Oznacza urządzenie medyczne, które musi być chronione przed wilgocią.
	Symbol ostrzegawczy Należy zapoznać się z ostrzeżeniami i uwagami zawartymi w instrukcji obsługi.
	Numer katalogowy Wskazuje numer katalogowy nadany przez producenta, aby możliwe było zidentyfikowanie urządzenia medycznego.
	Numer seryjny Wskazuje numer seryjny nadany przez producenta tak, aby możliwe było zidentyfikowanie danego urządzenia medycznego.
	Urządzenie medyczne To urządzenie jest urządzeniem medycznym.
	Bateria Wskazuje rodzaj baterii i sposób jej umieszczania w urządzeniu.
	Brazylijska etykieta ANATEL Wskazuje, że urządzenie jest certyfikowane i homologowane w Brazylii.

219967PL / 2020.03.20 / v1

219967PL / 2020.03.20 / v1



oticon
life-changing **technology**

219967PL / 2020.03.20 / v1