

Alta | Nera | Ria

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS



Instrucciones de uso

oticon
PEOPLE FIRST

Resumen de modelos

Este manual se utiliza para los siguientes modelos y familias de audífonos:

- Oticon Alta Pro
 - Oticon Nera Pro
 - Oticon Ria Pro
 - Oticon Alta
 - Oticon Nera
 - Oticon Ria
-
- IIC Invisible en el conducto auditivo
 - CIC Completamente en el conducto auditivo
 - MIC Prácticamente en el conducto auditivo
 - ITC En el conducto auditivo
 - HS Media concha
 - FS Concha completa

Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo audífono. Léalo con atención, incluyendo la **sección Advertencias**, Esto le ayudará a sacar el máximo beneficio de su nuevo audífono.

Su audiólogo protésico ha ajustado el audífono a sus necesidades. Si tiene alguna duda, contacte con él.

| **Acerca de** | Inicio | Manejo | Opciones | Advertencias | Adicional |

Para su comodidad, el manual incluye una barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

Uso previsto

El audífono amplifica y transmite sonido al oído y de este modo compensa pérdidas auditivas de medias a severas. El audífono no debe ser utilizado por bebés o niños menores a 36 meses.

NOTA IMPORTANTE

La amplificación se ajusta de forma única y optimizada para sus necesidades personales y su capacidad auditiva durante la adaptación del audífono, en base a la prescripción de su audiólogo protésico.

Índice

Acerca de

Identifique el estilo de su audífono	8
Pila de tamaño 10 (en la imagen CIC)	10
Pila de tamaño 312 (en la imagen ITC)	12
Pila de tamaño 13 (en la imagen, carcasa completa)	14
Identifique el audífono izquierdo y el derecho	16
Pila	17

Inicio

Encender y apagar el audífono	18
Cuándo debe cambiar la pila	19
Cómo cambiar la pila	20

Manejo

Cuidado de su audífono	22
Multiherramienta para pilas y limpieza	24
Cómo cambiar los filtros	26
Cómo cambiar el filtro ProWax (todos los audífonos)	27
Cómo sustituir un filtro T-Cap para micrófono (audífonos con pila de tamaño 10)	28

Cómo sustituir un filtro O-Cap para micrófono (audífonos con pila de tamaño 312 y 13)	29
---	----

Cómo ponerse el audífono	30
Cómo quitarse los audífonos	31

Opciones

Características y accesorios opcionales	32
Cómo silenciar el audífono	33
Cómo cambiar de programa	34
Cambio de volumen con pulsador	36
Cambio de volumen con rueda	37
Accesorios inalámbricos	40
Otras opciones	41

Advertencias

Advertencias	42
--------------	----

Adicional

Guía de resolución de problemas	48
Conditions of use	50
Certificado de garantía	51
Garantía internacional	52
Información técnica	53

Identifique el estilo de su audífono

Los audífonos intraauriculares están disponibles en diferentes estilos y tamaños. Identifique el estilo. De ese modo será más fácil utilizar este manual.

Pila de tamaño 10 (IIC, CIC, MIC, ITC, HS)




En la imagen IIC

Pila de tamaño 312 (ITC, HS, FS)



En la imagen ITC

Pila de tamaño 13 (ITC, HS, FS)

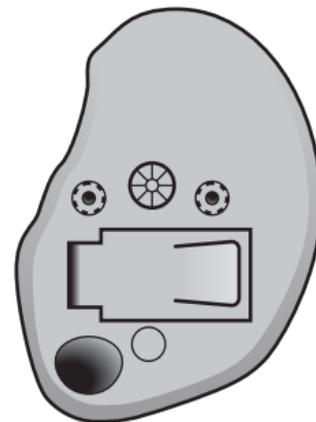


En la imagen FS


Todos los estilos están disponibles en diferentes formas y con diferentes configuraciones.

Pila de tamaño 10 (en la imagen CIC)

Qué es

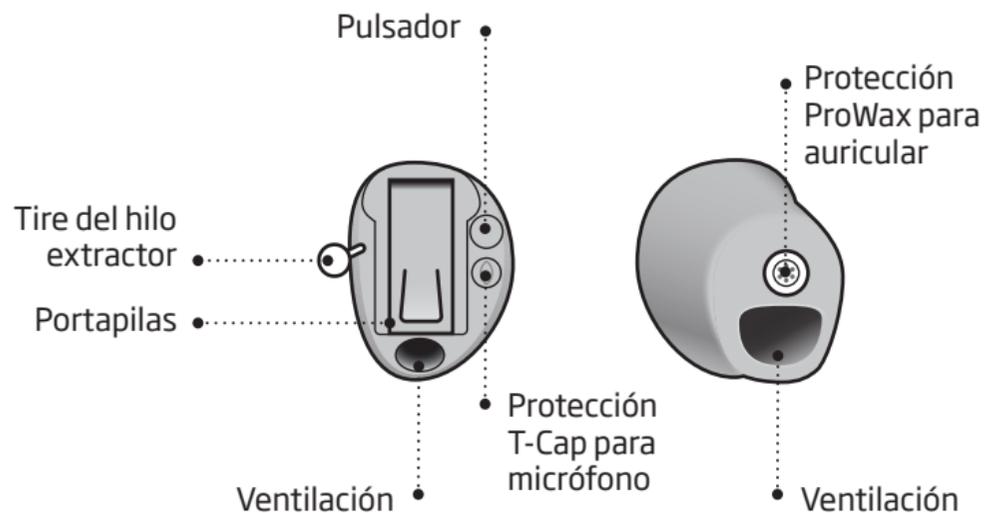


Qué hace

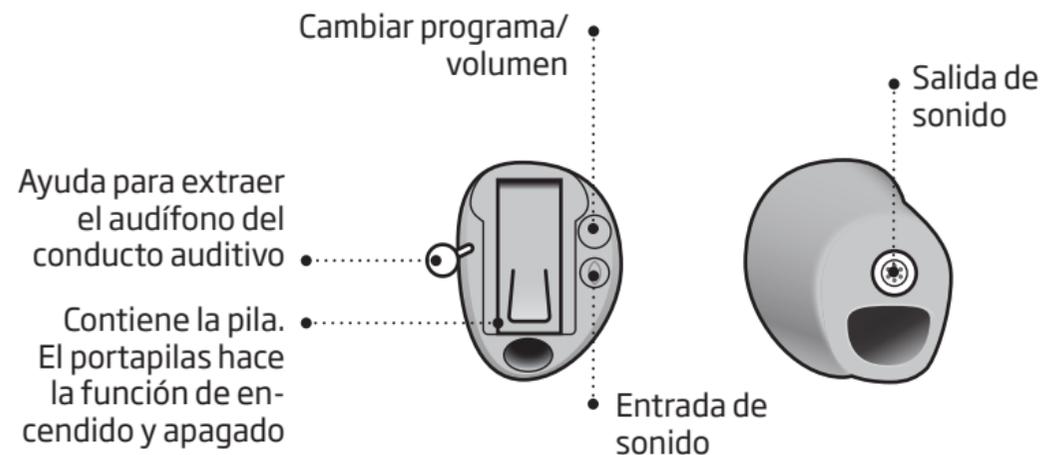


La posición de los componentes puede ser diferente en sus audífonos.

Pila de tamaño 312 (en la imagen ITC)

Qué es

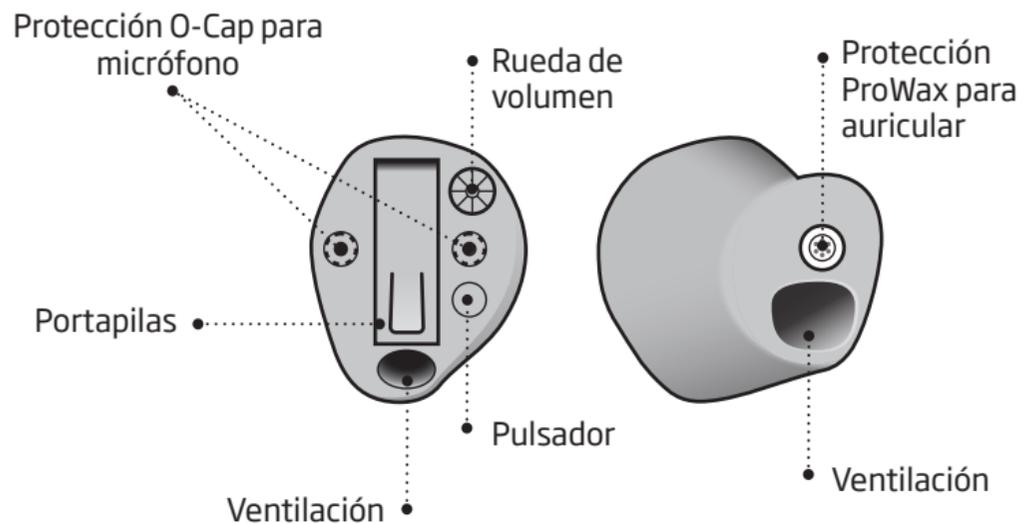


Qué hace

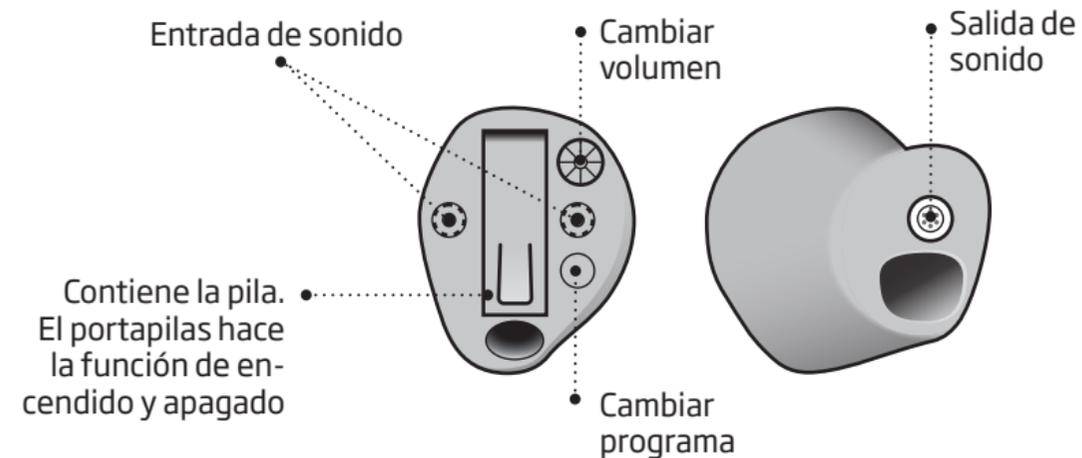


La posición de los componentes puede ser diferente en sus audífonos.

Pila de tamaño 13 (en la imagen, carcasa completa)

Qué es

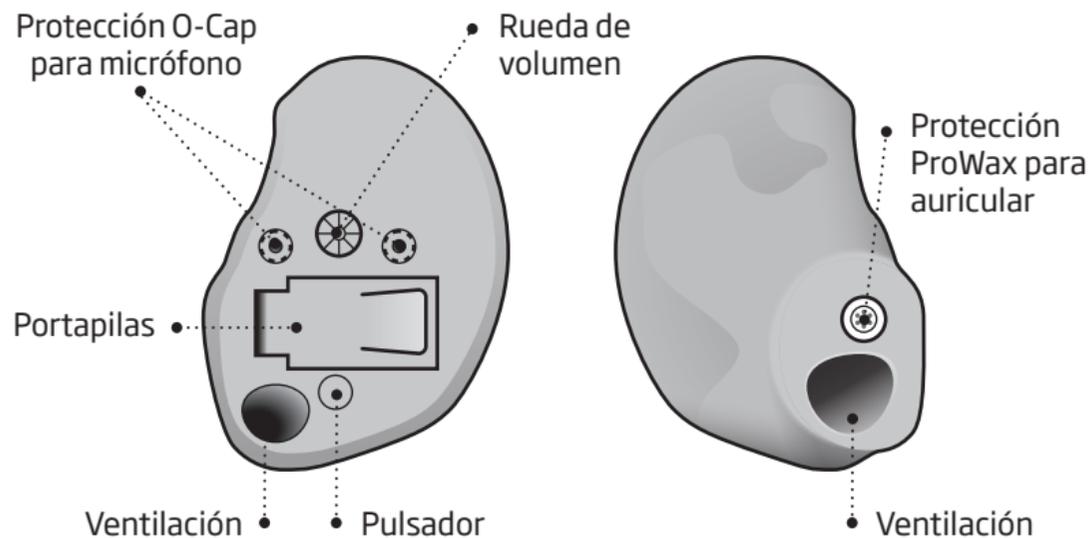

Qué hace

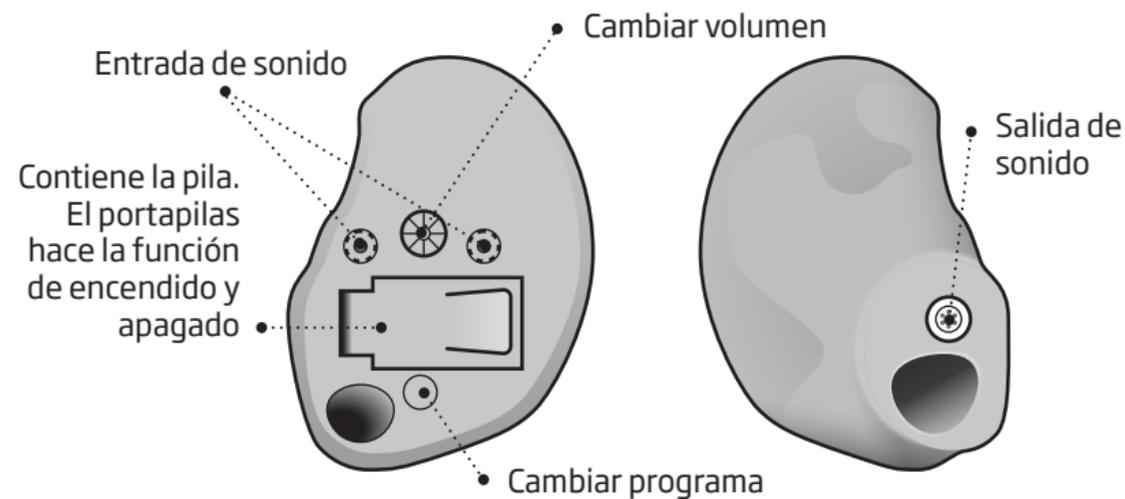

La posición de los componentes puede ser diferente en sus audífonos.

Identifique el audífono izquierdo y el derecho

Es importante diferenciar entre el audífono izquierdo y el derecho porque la forma y la programación pueden ser diferentes.



Una carcasa, un texto o un punto de color **AZUL** identifica el audífono **IZQUIERDO**.


Una carcasa, un texto o un punto de color **ROJO** identifica el audífono **DERECHO**.

Pila

Su audífono es un dispositivo electrónico muy pequeño que utiliza pilas especiales. Para activarlo tiene que colocar una pila nueva en el portapilas. Mire cómo hacerlo en la sección «Cambiar la pila».

Portapilas

Consulte las primeras páginas de la sección **Acerca de** para ver el tamaño de la pila de su audífono

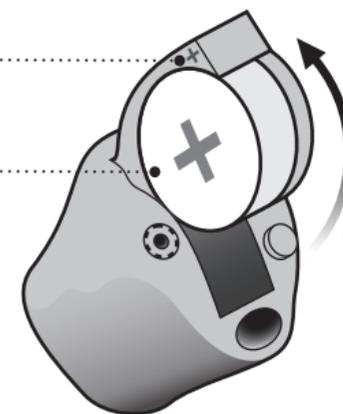

Tirar para abrir

Encender y apagar el audífono

El portapilas también se usa para encender y apagar el audífono. Para ahorrar pila, apague el audífono cuando no lo esté usando.

Encendido

Cierre el portapilas con la pila dentro.



Apagado

Abra el portapilas.



Cuándo debe cambiar la pila

Cuando llegue el momento de cambiar la pila, oirá dos pitidos repetidos a intervalos moderados hasta que se agote.



Dos pitidos

= La pila se está agotando



Cuatro pitidos

= La pila se ha agotado por completo

Consejo para el mantenimiento de la pila

Para asegurarse de que el audífono funciona siempre, lleve pilas de repuesto o cámbielas antes de salir de casa.


Cómo cambiar la pila

1. Extraer



Abra completamente el portapilas. Extraiga la pila.

2. Destapar

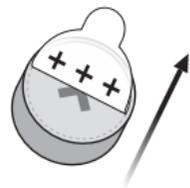

Retire el adhesivo del polo positivo + de la pila nueva.

Consejo:
Espere 2 minutos para que la pila se airee y asegurarse de que funciona de forma óptima.

3. Insertar



Introduzca la pila nueva en el portapilas. Asegúrese de que la cara + de la pila coincida con el signo + grabado en el portapilas.

4. Cerrar



Cierre el portapilas. El audífono reproducirá una melodía. Manténgalo cerca del oído para oírla.

Consejo



Multiherramienta

La multitool puede usarse para cambiar la pila. Utilice el extremo magnético para extraer e insertar las pilas.


Su audiólogo protésico le proporcionará la multitool.

Cuidado de su audífono


Manipule los audífonos sobre una superficie blanda para evitar que se estropeen en caso de caída.

Limpieza del audífono

Con cuidado, retire los residuos de las aberturas del micrófono con un cepillo limpio. Cepille suavemente la superficie.

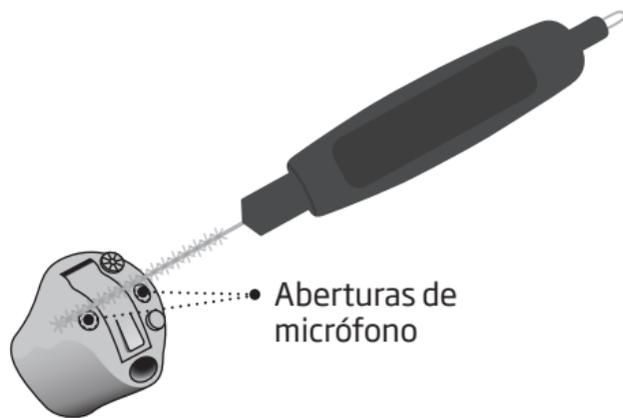

Limpie la ventilación presionando el cepillo contra el orificio y haciéndolo girar ligeramente.

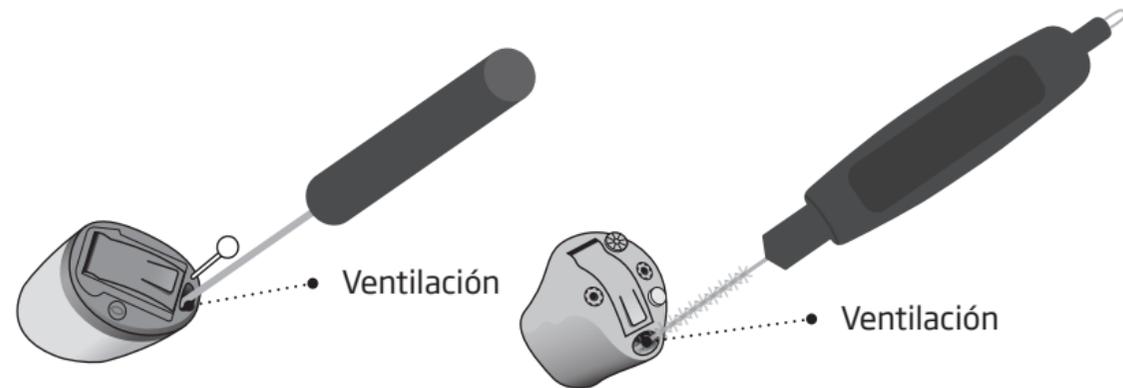


NOTA IMPORTANTE

Utilice un paño seco y suave para limpiar el audífono. No debe lavarse ni sumergirse en agua ni en otros líquidos bajo ningún concepto.

Multiherramienta para pilas y limpieza


La Multiherramienta contiene un imán que facilita la sustitución de la pila en el audífono. También contiene un cepillo y un removedor para limpiar y quitar el cerumen. Si necesita una Multiherramienta nueva, consulte por favor con su audiólogo protésico.

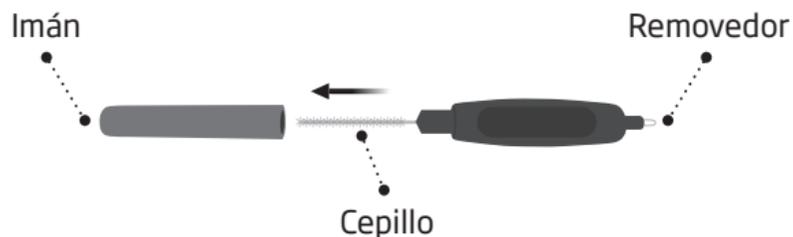

AVISO IMPORTANTE

La Multiherramienta tiene un imán integrado, manténgala a una distancia de 30 cm de tarjetas de crédito y otros dispositivos magnéticamente sensibles.

Si el venting es muy pequeño, puede necesitar una herramienta especial para limpiarlo. Consulte con su audiólogo protésico para más información.

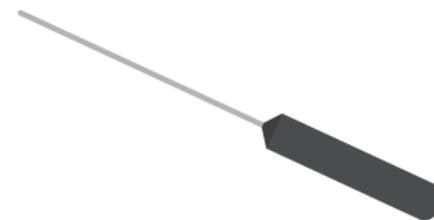

Cómo cambiar los filtros

Si la calidad del sonido se reduce, es el momento de cambiar los filtros.

En las siguientes páginas encontrará instrucciones sobre cómo cambiar los filtros.

NOTA IMPORTANTE

Utilice siempre filtros anticerumen del mismo tipo que el original.

Si tiene cualquier duda sobre cómo usar o sustituir el filtro anticerumen, consulte con su audiólogo protésico.


□ Cómo cambiar el filtro ProWax (todos los audífonos)

1. Herramienta




Extraiga la herramienta de la carcasa. La herramienta tiene dos puntas: una vacía para extraer y otra con el filtro ProWax nuevo.

2. Extraer

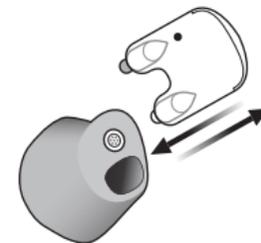

Introduzca la punta vacía en el filtro ProWax del audífono y extráigalo.


3. Insertar

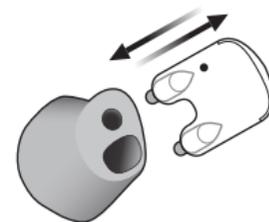

Introduzca el nuevo filtro ProWax con la otra punta, retire la herramienta y tírela.


□ **Cómo sustituir un filtro T-Cap para micrófono** (audífonos con pila de tamaño 10)

1. Herramienta

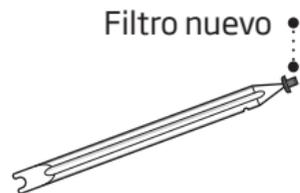


Extraiga la herramienta del embalaje. La herramienta tiene dos puntas: una para extraer y otra con el filtro T-Cap nuevo.

2. Extraer

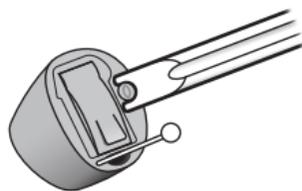

Introduzca la horquilla de la herramienta bajo el borde superior del filtro T-Cap usado y levántelo.

3. Insertar

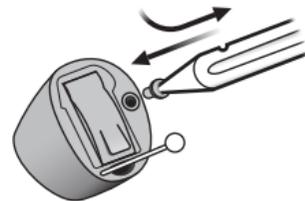

Inserte el filtro T-Cap nuevo y gire la herramienta levemente para retirarla. Tire la herramienta después de usarla.


□ **Cómo sustituir un filtro O-Cap para micrófono** (audífonos con pila de tamaño 312 y 13)

1. Herramienta




Extraiga la herramienta del embalaje. La herramienta tiene dos puntas: una para extraer y otra con el filtro O-Cap nuevo.

2. Extraer

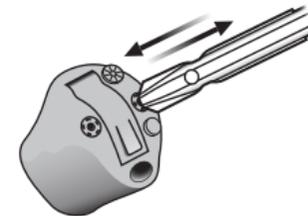

Introduzca la punta de la herramienta en el filtro O-Cap usado y retírelo.

3. Insertar

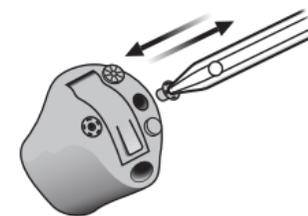

Introduzca el nuevo filtro O-Cap con la otra punta, retire la herramienta y tírela.

Cómo ponerse el audífono

Paso 1



Coja el audífono de forma que el punto de color quede mirando hacia arriba. Coloque la punta del audífono en el conducto auditivo.

Paso 2



Tire de la oreja hacia atrás e introduzca el audífono en el conducto auditivo, girándolo levemente si es necesario. Siga el recorrido natural del conducto auditivo.

Cómo quitarse los audífonos

Agarre el hilo del audífono (si lo tiene).
Tire suavemente para extraerlo del conducto auditivo.

Si el audífono no tiene hilo, puede tirar del borde del audífono para extraerlo.

NOTA IMPORTANTE

NO utilice el portapilas como asa para introducir o retirar el audífono. No está diseñado para eso.

Características y accesorios opcionales


Las características y accesorios que se describen en las siguientes páginas son opcionales. Póngase en contacto con su audiólogo protésico para saber cómo está programado su audífono.

Si se enfrenta a situaciones de escucha difíciles, le será útil un programa especial. Esta programación debe ser realizada por su audiólogo protésico.

Apunte las situaciones de escucha en las que puede necesitar ayuda.

Cómo silenciar el audífono

Utilice el modo silencio si necesita silenciar su audífono mientras lo está utilizando.

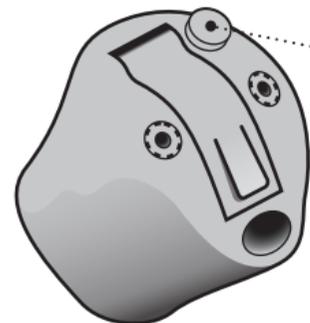


- Mantenga pulsado el botón para silenciarlo. Para desactivar el modo silencio, presione brevemente el botón.

NOTA IMPORTANTE

No utilice el modo silencio como si fuese un interruptor para apagar el audífono, porque aunque esté silenciado, sigue gastando pila.

Cómo cambiar de programa

Su audífono puede tener hasta cuatro programas. Esta programación debe ser realizada por su audiólogo protésico.

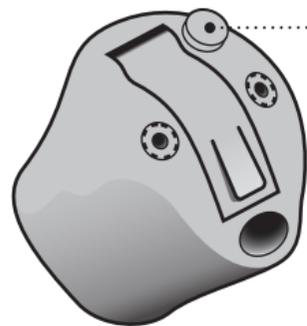

• Pulse el botón para cambiar de programa. Pulse brevemente el botón si sirve solo para cambiar de programa y durante más tiempo si sirve también para controlar el volumen.

Si tiene dos audífonos sincronizados (cuando los dos responden al pulsar cualquier botón), el DERECHO sirve para avanzar de programa (p. ej., del programa 1 al 2) y el IZQUIERDO, para retroceder (p. ej., del programa 4 al 3).

Si los audífonos funcionan de forma independiente, pulse el botón de cada uno de ellos.


A rellenar por su audiólogo protésico.

Programa	Sonido que se escucha al activarlo	Cuándo usarlo
1	♪ «1 pitido»	
2	♪♪ «2 pitidos»	
3	♪♪♪ «3 pitidos»	
4	♪♪♪♪ «4 pitidos»	

Cambio de programa	
<input type="checkbox"/> Independiente	<input type="checkbox"/> Sincronizado
<input type="checkbox"/> IZQUIERDO	<input type="checkbox"/> DERECHO
<input type="checkbox"/> Pulsación corta	<input type="checkbox"/> Pulsación larga


Cambio de volumen con pulsador

El pulsador permite regular el volumen. Cada vez que lo suba o lo baje, puede oír un clic.

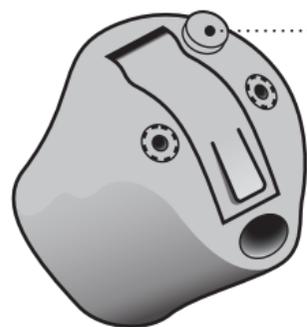

Pulse brevemente en el audífono DERECHO para subir el volumen.

Pulse brevemente en el audífono IZQUIERDO para bajar el volumen.

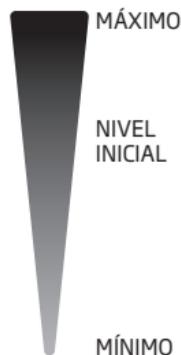

Oirá dos pitidos cuando llegue al nivel inicial de volumen

A rellenar por su audiólogo protésico.


Cambiar el volumen

IZQUIERDO

DERECHO


Cambio de volumen con rueda

La rueda permite regular el volumen. Cada vez que suba o baje el volumen, puede oír un clic.

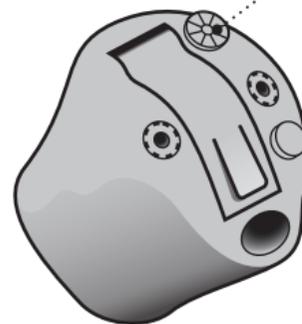

Gire la rueda hacia arriba para subir el volumen

Gire la rueda hacia abajo para bajar el volumen

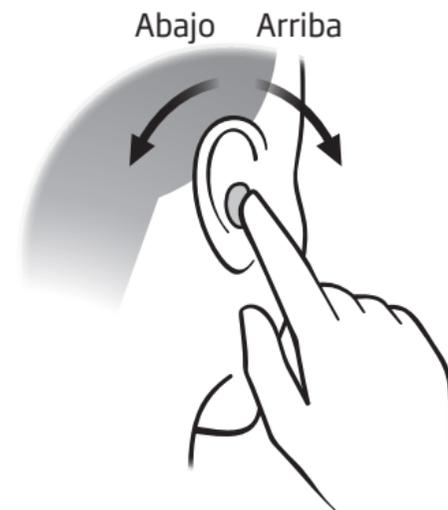

Reinicio rápido

Si quiere volver a los ajustes del audífono programados por su audiólogo protésico, solo tiene que abrir y cerrar el portapilas.

Abrir



Cerrar



Accesorios inalámbricos

Los audífonos inalámbricos disponen de una amplia gama de accesorios inalámbricos disponibles.

ConnectLine

ConnectLine es una familia de productos que le permite recibir directamente en su audífono señales de audio de la televisión, el teléfono, reproductores de música, un ordenador o un micrófono externo inalámbrico.

Mando a Distancia 2.0

El Mando a distancia ofrece la posibilidad de cambiar de programa, ajustar el volumen o silenciar el audífono.

Para más información, contacte con su audiólogo protésico o visite www.oticon.global

Otras opciones



Bobina

La bobina le permite oír mejor cuando utilice un teléfono con bucle integrado o si se encuentra en un edificio que tenga un sistema de bucle como un teatro, una iglesia o una sala de conferencias. Podrá ver este símbolo o uno similar en los lugares que cuentan con un sistema de bucle.



AutoPhone

es un programa que se activa automáticamente cuando su teléfono tiene un bucle integrado (ver arriba). Debe colocar un imán en el teléfono junto a la salida de sonido.

Para más información, contacte con su audiólogo protésico.

Advertencias

Por su propia seguridad y para garantizar un uso correcto, debe familiarizarse con las siguientes advertencias generales antes de utilizar sus audífonos.

Por favor tenga en cuenta que un audífono no reestablece una audición normal y no previene o mejora una pérdida auditiva por condiciones orgánicas. Es más, tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, un uso poco frecuente del audífono impide al usuario obtener todos los beneficios de él.

Consulte con su audiólogo protésico si experimenta operaciones inesperadas con su audífono.

Uso del audífono

- El audífono debe utilizarse exclusivamente siguiendo las indicaciones de su audiólogo protésico y con los ajustes que él le haga. El uso incorrecto puede provocar una pérdida auditiva repentina y permanente.
- No permita que otras personas utilicen su audífono; podrían sufrir lesiones permanentes en el oído.

Riesgo de ahogamiento y de tragarse las pilas.

- Los audífonos, sus componentes y las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda tragárselos o lesionarse con ellos de cualquier otra manera.
- Se han dado casos en los que las pilas se han confundido con pastillas. Si toma pastillas, compruébelas antes de tomárselas.

- La mayoría de los audífonos se pueden distribuir con un portapilas de seguridad bajo petición. Esto se recomienda especialmente para niños y personas con dificultades de aprendizaje.
- Los niños de menos de 36 meses deben utilizar siempre portapilas de seguridad. esta opción está disponible en audífonos BTE, miniBTE, RITE y miniRITE.

En caso de ingestión del audífono o de la pila, acuda inmediatamente a un médico.

Advertencias

Uso de la pila

- Utilice siempre las pilas recomendadas por su audiólogo protésico. Las pilas de baja calidad pueden sulfatarse y causar daños físicos.
- Nunca intente recargar las pilas, ni las queme. Existe el riesgo de que las pilas exploten.

Mal funcionamiento

- Tenga en cuenta que su audífono podría dejar de funcionar sin aviso previo. Téngalo en cuenta si debe prestar atención a sonidos de advertencia (por ejemplo, si está conduciendo). Los audífonos pueden dejar de funcionar, por ejemplo, si

se les agota la pila o si el tubo se bloquea por un exceso de cerumen o humedad.

Implantes activos

- Si lleva algún implante activo, debe tener precaución. Como norma general, siga las pautas sobre el uso de teléfonos móviles recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos:
- El imán Autophone y la Multiherramienta (que consta de un imán integrado) deben mantenerse alejados a más de 30 cm de implantes, por ejemplo no se deben llevar en el bolsillo del pecho.

- Si usted tiene un implante cerebral activo, póngase en contacto con el fabricante y consulte con él si existe algún riesgo de interferencias.

Radiografías, TAC, RM, TEP y electroterapia

- Quítese el audífono antes de hacerse una radiografía, un TAC / RM / TEP, o de someterse a electroterapia o una intervención quirúrgica. El audífono puede dañarse si se expone a campos intensos.

Calor y químicos

- Su audífono no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo aparcado al sol.
- No seque el audífono en un microondas, ni en ningún tipo de horno.
- Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del afeitado, cremas solares y repelentes de insectos pueden dañar los audífonos. Quítese siempre el audífono antes de usar estos productos y espere a que se sequen antes de volver a ponérselo.

Advertencias

Audífonos Power

- Se debe tener especial cuidado con la elección, la adaptación y el uso de audífonos cuando la presión sonora máxima supere 132 dB SPL (IEC 711), ya que existe riesgo de dañar la audición residual del usuario.

Para saber si su audífono es Power, observe la parte posterior del folleto.

Posibles efectos secundarios

- El uso de audífonos, moldes o conos puede acelerar la acumulación de cerumen.
- En algunos casos poco frecuentes, los materiales no alergénicos de los audífonos pueden causar irritación de la piel u otros efectos inusuales.

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Interferencias

- Su audífono ha superado pruebas exhaustivas de interferencias, de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre sus audífonos y otros equipos electrónicos, como teléfonos móviles, sistemas de banda ciudadana y alarmas de comercios. En caso de interferencias, aumente la distancia entre el audífono y el equipo en cuestión.

Conexión con equipamiento externo

- La seguridad del audífono cuando se conecta con un equipo externo (a través de cable de entrada auxiliar, cable USB o directamente), la determina el equipo externo. Cuando se conecte a un equipo externo enchufado a la red eléctrica, el equipo debe cumplir con IEC60065, IEC-60950 o estándares de seguridad equivalentes.

Guía de resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución
Ausencia de sonido	Pila gastada	Cambie la pila
	Salida de sonido obstruida	Limpiar la salida de sonido o sustituir el ProWax
	Entrada del micrófono obstruida	Limpiar la entrada del micrófono o sustituir el filtro (T-Cap u O-Cap)
Sonido intermitente o reducido	Salida de sonido obstruida	Limpiar la salida de sonido o sustituir el ProWax
	Humedad	Limpiar la pila y el audífono con un paño seco
	Pila gastada	Cambie la pila
Pitidos	Audífono colocado incorrectamente	Colóquese de nuevo el audífono
	Acumulación de cerumen en el conducto auditivo	Acudir al médico para que examine su conducto auditivo

Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audiólogo protésico.

Condiciones de uso

Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +1 °C a +40 °C Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento: Temperatura: -25°C a +60°C Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación

Certificado de garantía

Nombre del propietario: _____

Audiólogo protésico: _____

Centro auditivo: _____

Teléfono del centro auditivo: _____

Fecha de compra: _____

Período de garantía: _____ Mes: _____

Modelo izquierdo: _____ N.º de serie: _____

Modelo derecho: _____ N.º de serie: _____

Tamaño de la pila: _____

Garantía internacional

El audífono está cubierto por una garantía internacional limitada del fabricante durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y materiales del audífono en sí, pero no de los accesorios como las baterías, tubos, filtros anticerumen, etc. Los problemas derivados de un uso inadecuado, negligente o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición del audífono a condiciones corrosivas, cambios físicos en el oído, daños provocados por objetos extraños introducidos en el audífono o ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla. Esta garantía no afecta a los

derechos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consumo. Es posible que su audiólogo protésico le haya expedido una garantía más amplia que esta. Consulte con él para más información.

Si necesita asistencia técnica

Lleve su audífono a su audiólogo protésico, quien seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata.

Información técnica

El audífono contiene un radiotransmisor con tecnología de inducción magnética de corto alcance, que trabaja a una frecuencia de 3,84 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ a 10 m.

La potencia de emisión del sistema de radio está muy por debajo de los límites internacionales de emisión para exposición humana. Como comparación, la radiación del audífono es inferior a la radiación electromagnética no intencionada que emite, por ejemplo, una lámpara halógena, el monitor de un ordenador, un lavavajillas, etc. El audífono cumple la normativa internacional sobre compatibilidad electromagnética.

Debido al reducido tamaño de los audífonos, todas las marcas de homologación relevantes se encuentran en este documento.

Los audífonos inalámbricos IIC, CIC & MIC contienen un módulo con:

FCC ID: U28FU2CICWL
IC: 1350B-FU2CICWL

Los audífonos inalámbricos IIC, HS & FS contienen un módulo con:

FCC ID: U28FU2ITE
IC: 1350B-FU2ITE

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la normativa FCC y está exento de patente RSSs de la industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones realizados al equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable correspondiente, podrían anular la autoridad del usuario para manejarlo.

Este dispositivo digital de clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

Nota: Este equipo se ha testado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B digital device, conforme al apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Aún así, no hay garantía de que no se produzca en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión,

producidas al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones:

- Reorientar o relocalar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el fabricante o un técnico de radio/televisión con experiencia.

Más información: www.oticon.global

Oticon declara que este audífono cumple con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se encuentra disponible en:



Fabricado por:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

CE 0543



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



Descripción de los símbolos utilizados en este manual



Advertencias

Antes de usar el producto deberá leerse el texto señalado con un símbolo de marcado.



Fabricante

El producto está elaborado por un fabricante cuyo nombre y dirección aparecen junto al símbolo. Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en las Directivas UE 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE.

CE 0543

Marca CE

El producto cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. El número de cuatro dígitos indica la identificación del organismo notificado.



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Recicle sus audífonos, accesorios o pilas de acuerdo con las normativas locales o devuélvalos a su audioprotesista para su eliminación. Equipo electrónico contemplado en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).



Marca del cumplimiento de la normativa (RCM)

El producto cumple con los requisitos eléctricos de seguridad, EMC y espectro radioeléctrico necesarios para los productos suministrados al mercado de Australia o Nueva Zelanda.

Descripción de los símbolos utilizados en la etiqueta	
	Mantener seco Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
	Símbolo de precaución Consultar las instrucciones de uso para conocer las advertencias y precauciones.
	Número de catálogo Indica el número de catálogo del fabricante que permite identificar el dispositivo médico.
	Número de serie Indica el número de serie del fabricante que permite identificar el dispositivo médico.

152006ES / 2018.05.07

Audífono Power <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No				
Vista general de los ajustes del audífono				
Izquierdo		Derecho		
<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Control de volumen	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Cambio de programa	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Silenciar	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Indicadores de control de volumen				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Tonos de volumen mínimo/máximo	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Clic cada vez que se cambia el volumen	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Tonos al llegar al volumen preferido	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Indicadores de pila				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Aviso de pila gastada	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off

152006ES / 2018.05.07



oticon
PEOPLE FIRST

152006ES / 2018.05.07