

BTE13 SP

Dynamo



Instrucciones de uso

oticon
PEOPLE FIRST

Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo audífono. Lea con atención el manual, incluyendo la **sección Advertencias**, le ayudará a sacar el máximo partido de su nuevo audífono.

Su audiólogo protésico ha ajustado el audífono a sus necesidades. Si tiene alguna duda, contacte con él.

| **Acerca de** | Inicio | Manejo | Opciones | Advertencias | Más información |

Para su comodidad, el manual incluye una barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

Uso previsto

El audífono sirve para amplificar y transmitir sonido al oído y, por lo tanto, compensar las dificultades de una pérdida auditiva. El uso de este audífono está indicado tanto para adultos como para niños mayores de 36 meses.

NOTA IMPORTANTE


Durante la adaptación del audífono, la amplificación se ajusta de forma única y optimizada a sus necesidades personales y su capacidad auditiva en base a la prescripción de su audiólogo protésico.

Índice


Acerca de			
Vista del producto	6		
Identifique el audífono izquierdo y el derecho	8		
Pila (tamaño 13)	9		
Inicio			
Encender y apagar el audífono	10		
Cuándo debe cambiar la pila	11		
Cómo cambiar la pila	12		
Manejo			
Cuidado de su audífono	14		
Codo de sonido con molde	16		
Cómo colocarse un audífono con molde	17		
Limpieza del molde	18		
Lavado del molde	19		
Opciones			
Características y accesorios opcionales	20		
Cómo silenciar el audífono (opcional)	21		
		Cambiar volumen	22
		Control de volumen y ConnectLine (opcional)	24
		Cómo cambiar de programa (opcional)	26
		Otras opciones (opcional)	30
		Entrada directa de audio (DAI)	31
		Accesorios inalámbricos (opcional)	32
		Portapilas de seguridad (opcional)	34
		Advertencias	
		Advertencias	36
		Más información	
		Guía de resolución de problemas	42
		Resistente al agua (IP58)	44
		Condiciones	45
		Certificado de garantía	46
		Garantía internacional	47
		Información técnica	48

Vista del producto

Qué es

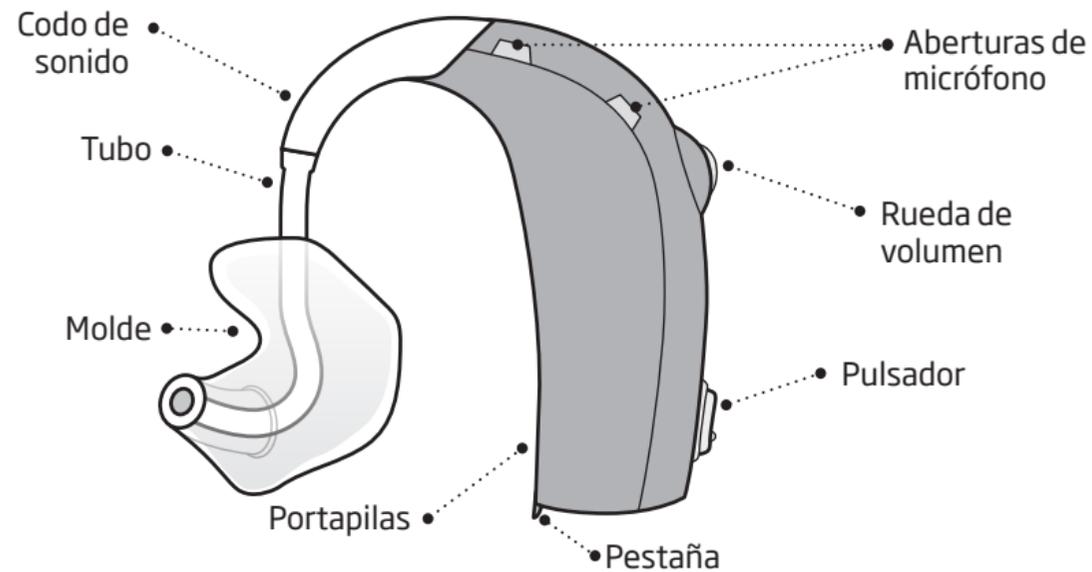


Qué hace

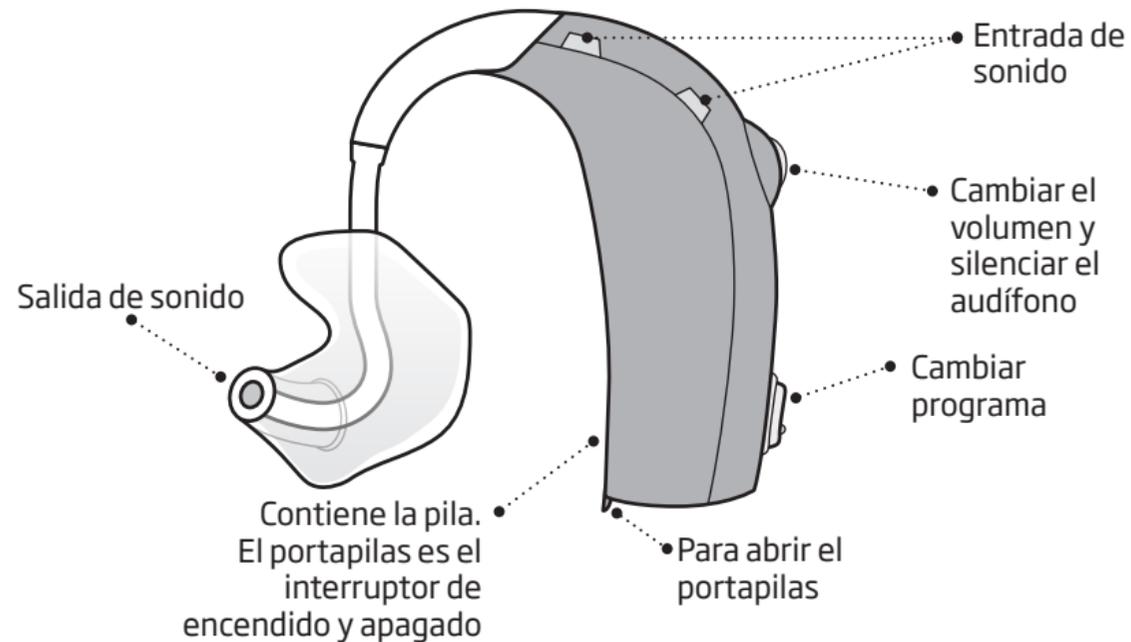


Identifique el audífono izquierdo y el derecho

Es importante diferenciar entre el audífono izquierdo y el derecho porque la programación puede ser diferente.

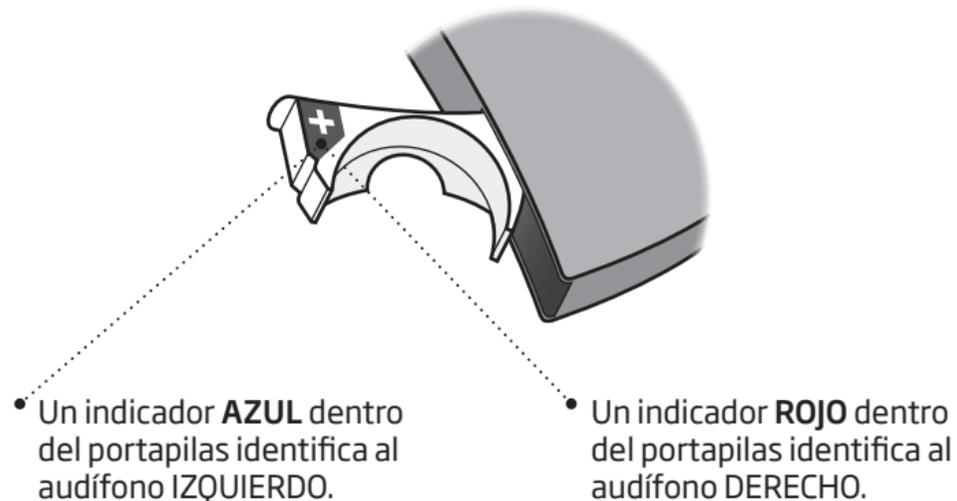

Pila (tamaño 13)

Su audífono es un dispositivo electrónico muy pequeño que utiliza pilas especiales. Para activarlo tiene que colocar una pila nueva en el portapilas. Mire cómo hacerlo en la sección «Cambiar la pila».

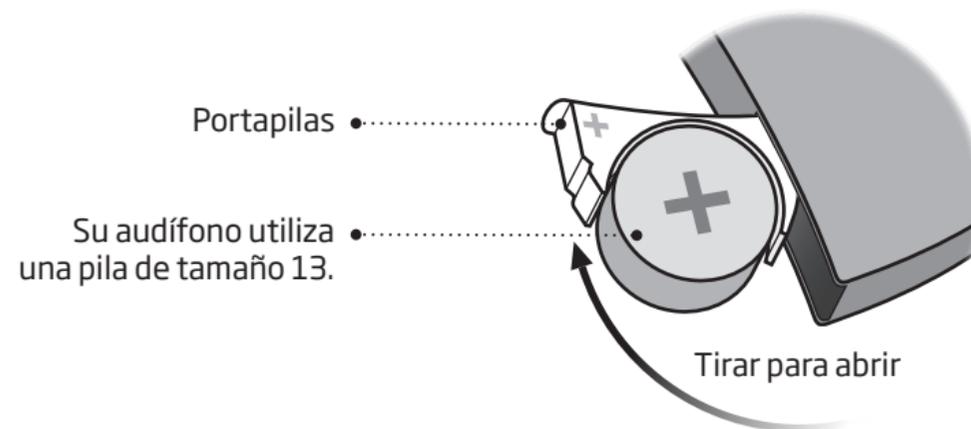


Encender y apagar el audífono

El portapilas también se usa para encender y apagar el audífono. Para ahorrar pila, apáguelo cuando no lo esté usando.


Encendido

Cierre el portapilas con la pila dentro.

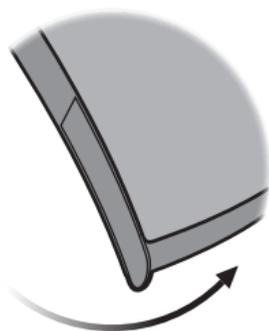

Apagado

Abra el portapilas.

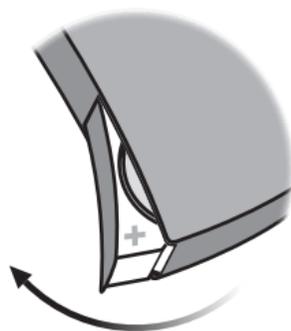

Cuándo debe cambiar la pila

Cuando llegue el momento de cambiar la pila, oirá dos pitidos repetidos a intervalos moderados hasta que se agote.



Dos pitidos

= La pila se está agotando



Cuatro pitidos


= La pila se ha agotado por completo

Consejo para el mantenimiento de la pila

Para asegurarse de que el audífono funciona siempre, lleve pilas de repuesto o cámbielas antes de salir de casa.


Cómo cambiar la pila

1. Extraer

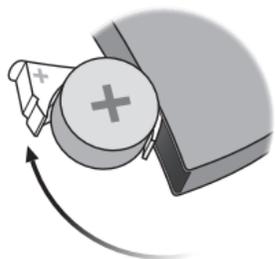


Abra completamente el portapilas y extraiga la pila.

2. Destapar

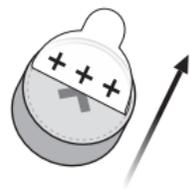


Retire la etiqueta adhesiva del polo positivo (+) de la pila nueva.

3. Insertar

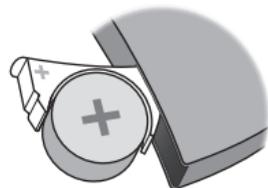

Introduzca la pila nueva en el portapilas. Insértela desde arriba, no desde un lado. Asegúrese de que el polo positivo (+) apunte hacia arriba.

4. Cerrar

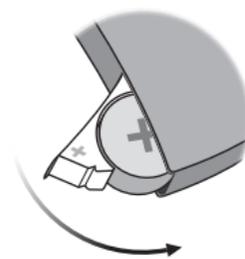

Cierre el portapilas. El audífono reproducirá una melodía a través del molde. Sostenga el molde cerca del oído para oír la melodía.

Consejo



Multiherramienta

Puede usar la multiherramienta para cambiar la pila. Utilice el extremo magnético para extraer e insertar las pilas.


Su audiólogo protésico le proporcionará la multiherramienta.

Cuidado de su audífono

Manipule los audífonos sobre una superficie blanda para evitar que se estropeen en caso de caída.

Limpie las aberturas del micrófono

Con cuidado, limpie con el cepillo toda la suciedad de las aberturas. Cepille suavemente la superficie. No haga presión con el cepillo sobre las aberturas.

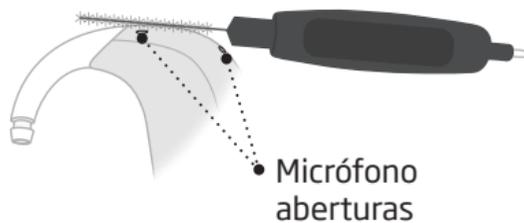


NOTA IMPORTANTE

Utilice un paño seco y suave para limpiar el audífono. No debe lavarse ni sumergirse en agua ni en otros líquidos bajo ningún concepto.

La multiherramienta

La multiherramienta contiene un cepillo y un removedor para eliminar el cerumen del molde. Los cepillos pueden adquirirse a través de su audiólogo protésico.

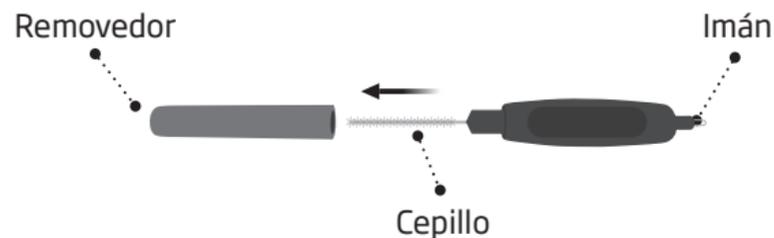


NOTA IMPORTANTE

La multiherramienta lleva un imán integrado. Mantenga la multiherramienta a 30 cm de distancia de tarjetas de crédito y otros objetos sensibles a los campos magnéticos.

Codo de sonido con molde

El molde está personalizado para usted y se adapta a su oído.

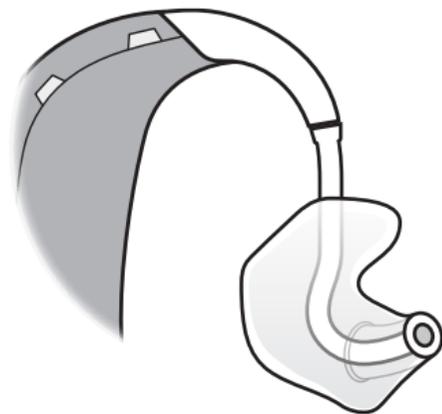

Cómo colocarse un audífono con molde

Paso 1



Tire suavemente de la oreja hacia fuera y presione el molde hacia el interior del conducto auditivo girándolo lentamente.


Paso 2



Colóquese el audífono detrás de la oreja.

Limpieza del molde

El molde debe limpiarse con regularidad. Use un paño suave para limpiar su superficie y utilice el removedor de la multiherramienta para limpiar la abertura.

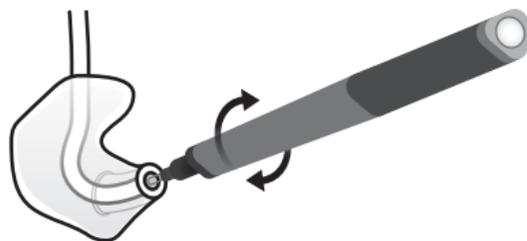

Sustitución del tubo

El tubo de conexión entre el molde y el audífono debe cambiarse cuando se amarillee o esté rígido. Consulte a su audiólogo protésico para más información.

Lavado del molde

Paso 1



Asegúrese de que es capaz de identificar qué molde corresponde a cada audífono antes de desconectarlos.

Paso 2



Desconecte el tubo y el molde del codo y sostenga firmemente el codo al extraer el tubo, de lo contrario, puede dañar el audífono.

Paso 3



Lave el molde y el tubo con jabón suave, después aclárelos y séquelos bien antes de volver a conectarlos al audífono.

Características y accesorios opcionales


Las características y accesorios que se describen en las siguientes páginas son opcionales. Póngase en contacto con su audiólogo protésico para saber cómo está programado su audífono.

Si se enfrenta a situaciones de escucha difíciles, le será útil un programa especial. Esta programación debe ser realizada por su audiólogo protésico.

Apunte las situaciones de escucha en las que puede necesitar ayuda.

Cómo silenciar el audífono (opcional)

Utilice el modo silencio si necesita silenciar su audífono mientras lo está utilizando.

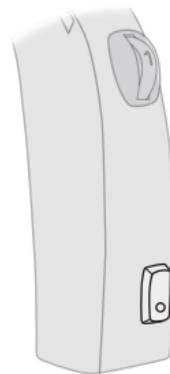

Mantenga pulsado el botón para silenciar el audífono. Para reactivar el audífono, presione brevemente el botón.


NOTA IMPORTANTE

No utilice el modo silencio como si fuese un interruptor para apagar el audífono, porque aunque esté silenciado, el audífono sigue gastando pila.

Cambiar volumen

Puede activar la rueda de volumen que le permite ajustar el volumen en situaciones específicas de escucha, a un nivel que le resulte cómodo.

La rueda de volumen tiene las marcas 1, 2, 3 y 4 y una posición en la que hace clic:

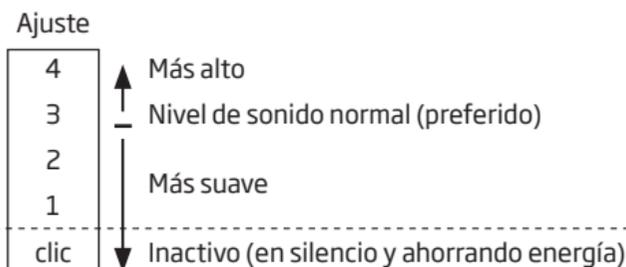

El ajuste de volumen normal es 3. Al ajustar el volumen al nivel normal, oírás dos pitidos.



Puede utilizar la rueda de volumen para silenciar el audífono, colocándola por debajo del número uno hasta que oiga un clic. Para reactivar el audífono, suba el volumen con la rueda.

NOTA IMPORTANTE

No utilice la posición de inactivo (clic) como si fuese un interruptor para apagar el audífono porque, aunque esté silenciado, el audífono sigue gastando pila.

Control de volumen y ConnectLine (opcional)

Asegúrese de que el control de volumen del audífono está entre 1 y 4, para poder usar el Streamer como mando a distancia en llamadas de teléfono y para transmisión de TV/música. No es posible iniciar la transmisión si la rueda de volumen del audífono está en la posición de inactivo (clic).


Si utiliza el Streamer para ajustar el nivel de volumen del audífono, el volumen resultante no coincidirá con lo que se indica en la rueda de volumen. Si gira la rueda a la posición de inactivo (clic) y vuelve a la gama de 1-4 o si apaga y vuelve a encender el audífono, el volumen volverá a coincidir con el ajuste indicado en la rueda.

Al ajustar el volumen al nivel preferido, oirá dos pitidos.

Durante la transmisión de audio, ajuste el volumen en el Streamer. El Streamer controlará el volumen con independencia del ajuste de la rueda de volumen.

Cómo cambiar de programa (opcional)

Su audífono puede tener hasta cuatro programas.
Esta programación debe ser realizada por su audiólogo protésico.

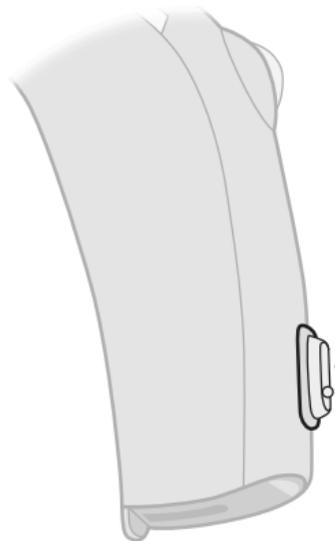

Presione el pulsador para cambiar de programa

Si lleva dos audífonos, el DERECHO sirve para avanzar (por ejemplo, del programa 1 al 2) y el IZQUIERDO, para retroceder (por ejemplo, del programa 4 al 3).

A rellenar por su audiólogo protésico.

Programa	Sonido que se escucha al activarlo	Cuándo usarlo
1	 «1 pitido»	
2	 «2 pitidos»	
3	 «3 pitidos»	
4	 «4 pitidos»	

Cambio de programa

IZQUIERDO

DERECHO


Pulsación corta

Pulsación larga


Reinicio rápido

Si quiere volver a los ajustes del audífono programados por su audiólogo protésico, solo tiene que abrir y cerrar el portapilas.

Abrir

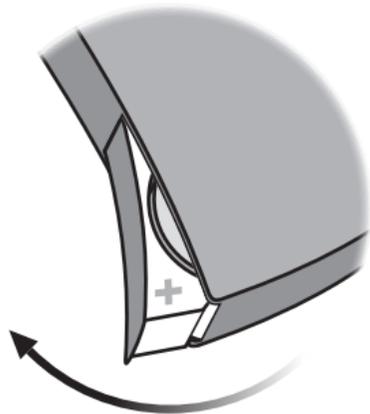

Cerrar

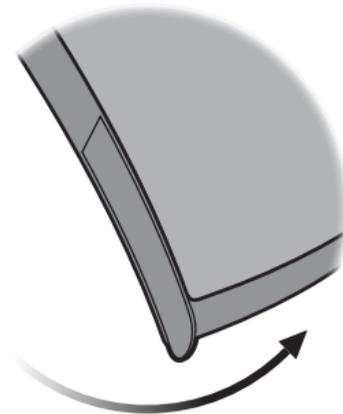

Tenga en cuenta que el ajuste de volumen no cambia con el reinicio rápido.

Otras opciones (opcional)



Bobina de inducción

La bobina de inducción le permite oír mejor cuando utilice un teléfono con bobina de inducción o si se encuentra en un edificio que tenga un sistema de bucle magnético como un teatro, una iglesia o una sala de conferencias. Podrá ver este símbolo o uno similar en los lugares que cuentan con un sistema de bucle magnético.



AutoPhone

AutoPhone puede activar automáticamente un programa de teléfono en el audífono si el teléfono tiene un imán especial para ello, que debe estar colocado en el teléfono junto a la salida de sonido.

Entrada directa de audio (DAI)

DAI permite que su audífono reciba señal directamente desde fuentes externas como la televisión, la radio, el reproductor de música, etc. El adaptador DAI está instalado en su audífono y conectado por cable con una fuente de sonido externa.

Para más información sobre estas opciones, consulte a su audiólogo protésico o visite **www.oticon.global**

NOTA IMPORTANTE

Conecte los audífonos con DAI solo a aparatos eléctricos que cumplan las normas de seguridad EN 60950-1, EN 60065 u otras equivalentes. El origen de la señal externa determina la seguridad de los audífonos con DAI.

□ **Accesorios inalámbricos** (opcional)

Los audífonos inalámbricos tienen una amplia gama de accesorios inalámbricos disponibles.

ConnectLine

ConnectLine es una familia de productos que le permite recibir directamente en su audífono señales de audio de la televisión, el teléfono, reproductores de música, un ordenador o un micrófono externo inalámbrico.

Mando a distancia

El mando a distancia le permite cambiar de programa, ajustar el volumen de su audífono o silenciarlo.

FM

Su audífono puede funcionar con un sistema FM, que le permite recibir una señal de habla o audio directamente en su audífono desde un transmisor.

Para más información sobre los accesorios inalámbricos, consulte a su audiólogo protésico o visite **www.oticon.global**

□ Portapilas de seguridad (opcional)


Para mantener la pila fuera del alcance de bebés, niños y personas con dificultades de aprendizaje, utilice un portapilas de seguridad. Utilice un destornillador pequeño para bloquear y desbloquear el portapilas.

NOTA IMPORTANTE

No fuerce el portapilas para abrirlo si está bloqueado. No fuerce el portapilas más allá de su posición totalmente abierta. Asegúrese de introducir la pila correctamente.


Póngase en contacto con su audiólogo protésico si cree que el portapilas de seguridad está dañado y no se bloquea correctamente.

Desbloquear el portapilas

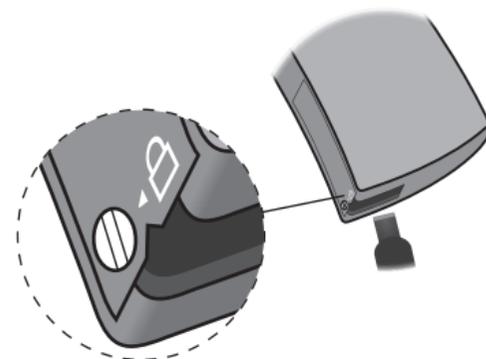

Utilice el destornillador para mover el tornillo de seguridad a la posición de desbloqueo (vertical). Introduzca el destornillador en la ranura de la parte inferior del audífono y abra la tapa.

Bloquear el portapilas

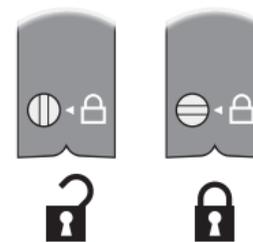

Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada, gire el tornillo hasta la posición de bloqueo (horizontal).

Advertencias

Familiarícese con las siguientes advertencias antes de utilizar los audífonos para garantizar su seguridad y un uso correcto.

Tenga en cuenta que un audífono no devuelve la audición normal y tampoco impide ni mejora una pérdida auditiva derivada de condiciones orgánicas. Además, tenga en cuenta que, en la mayor parte de los casos, el uso infrecuente de un audífono no permite a un usuario obtener todas las ventajas.

Consulte con su audiólogo protésico si observa un comportamiento inusual de su audífono.

Uso de audífonos

- El audífono debe utilizarse exclusivamente siguiendo las indicaciones de su audiólogo protésico y con los ajustes que él le haga. El uso incorrecto puede provocar una pérdida auditiva repentina y permanente.
- No permita que otras personas utilicen su audífono; podrían sufrir lesiones permanentes en su audición a causa de un uso incorrecto.

Riesgo de ahogamiento y de tragarse las pilas.

- Los audífonos, sus componentes y las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda tragárselos o lesionarse con ellos de cualquier otra manera.
- Se han dado casos en los que las pilas se han confundido con pastillas. Si toma pastillas, compruébelas antes de tomárselas.
- La mayoría de los audífonos pueden suministrarse con portapilas de seguridad. Esta opción es recomendable si el usuario del audífono es un niño o una persona con dificultades de aprendizaje.

- Los niños menores de 36 meses deben utilizar siempre portapilas de seguridad. Por favor, hable con su audiólogo protésico sobre la disponibilidad de esta opción.

En caso de ingestión del audífono o de la pila, acuda inmediatamente a un médico.

Uso de la pila

- Utilice siempre las pilas recomendadas por su audioprotesista. Las pilas de baja calidad pueden sulfatarse y causar daños físicos.
- Nunca intente recargar las pilas, ni las queme. Existe el riesgo de que las pilas exploten.

Advertencias

Mal funcionamiento

- Tenga en cuenta que su audífono podría dejar de funcionar sin aviso previo. Téngalo en cuenta si debe prestar atención a sonidos de advertencia (por ejemplo, si está conduciendo). Los audífonos pueden dejar de funcionar, por ejemplo, si se les agota la pila o si el tubo se bloquea por un exceso de cerumen o humedad.

Implantes activos

- Si lleva algún implante activo, debe tener precaución. Como norma general, siga las pautas sobre el uso de teléfonos móviles e imanes recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.
- Mantenga el imán de AutoPhone y la multiherramienta (que tiene un imán integrado) a más de 30 cm del implante. Por ejemplo, no los lleve en un bolsillo cerca del pecho.
- Si usted tiene un implante cerebral activo, póngase en contacto con el fabricante y consulte con él si existe algún riesgo de interferencias.

Radiografías, TAC, RM, TEP y electroterapia

- No lleve el audífono cuando vaya a hacerse una radiografía, un TAC / RM / TEP, o a someterse a electroterapia o una intervención quirúrgica. El audífono puede dañarse si se expone a campos intensos.

Calor y productos químicos

- Su audífono no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo aparcado al sol.
- No seque el audífono en un microondas, ni en ningún tipo de horno.

- Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del afeitado, cremas solares y repelentes de insectos pueden dañar el audífono. Quítese siempre el audífono antes de usar estos productos y espere a que se sequen antes de volver a usarlo.

Audífonos Power

- Se debe tener especial cuidado con la elección, la adaptación y el uso de audífonos cuando la presión sonora máxima supere 132 dB SPL (IEC 711), ya que existe riesgo de dañar la audición residual del usuario.

Advertencias

Posibles efectos secundarios

- El uso de audífonos, moldes o conos puede acelerar la acumulación de cerumen.
- En algunos casos poco frecuentes, los materiales no alergénicos de los audífonos pueden causar irritación de la piel u otros efectos secundarios.

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Interferencias

- Su audífono ha superado pruebas exhaustivas de interferencias, de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre el audífono y otros dispositivos (como algunos teléfonos móviles, dispositivos de banda ciudadana, alarmas de tiendas y otros dispositivos inalámbricos). En caso de interferencias, aumente la distancia entre el audífono y el equipo en cuestión.

Conexión con equipamiento externo

- La seguridad del audífono cuando se conecta con un equipo externo (a través de cable de entrada auxiliar, cable USB o directamente), la determina el equipo externo. Cuando se conecte a un equipo externo enchufado a la red eléctrica, el equipo debe cumplir con IEC60065, IEC-60950 o estándares de seguridad equivalentes.

Guía de resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución
Ausencia de sonido	Pila gastada	Cambie la pila
	Tubo o adaptadores obstruidos	Limpia el molde
Sonido intermitente o reducido	Salida de sonido obstruida	Limpia el molde
	Humedad	Limpie la pila con un paño seco y seque el tubo
	Pila gastada	Cambie la pila
	Obstrucción del filtro atenuador del codo	Pida ayuda a su audioprotesista
Pitidos	Cono del audífono colocado incorrectamente	Vuelva a introducir el cono (molde)
	Acumulación de cerumen en el conducto auditivo	Acudir al médico para que examine su conducto auditivo

Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audiólogo protésico.

Resistente al agua (IP58)

Su audífono es resistente al agua, por lo que está diseñado para utilizar en todas las situaciones cotidianas. No tiene que preocuparse por el sudor ni por si se moja cuando llueve. Si su audífono entra en contacto con agua y deja de funcionar, haga lo siguiente:

1. Seque el agua con cuidado
2. Abra el portapilas, extraiga la pila y seque con cuidado el agua que pueda haber en el portapilas.
3. Deje el portapilas abierto durante unos 30 minutos para que se seque.
4. Coloque una pila nueva

NOTA IMPORTANTE

No utilice el audífono en la ducha ni en actividades acuáticas. No sumerja el audífono en agua ni en otros líquidos.

Condiciones

Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +1 °C a +40 °C Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento. Temperatura: -25 °C a +60 °C Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensación

Certificado de garantía

Nombre del propietario: _____

Audiólogo protésico: _____

Centro auditivo: _____

Teléfono del centro auditivo: _____

Fecha de compra: _____

Período de garantía: _____ Mes: _____

Modelo izquierdo: _____ N.º de serie: _____

Modelo derecho: _____ N.º de serie: _____

Tamaño de la pila: _____

Garantía internacional

El audífono está cubierto por una garantía internacional limitada del fabricante durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y materiales del audífono en sí, pero no de los accesorios como las baterías, tubos, filtros anticerumen, etc. Los problemas derivados de un uso inadecuado, negligente o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición del audífono a condiciones corrosivas, cambios físicos en el oído, daños provocados por objetos extraños introducidos en el audífono o ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla. Esta garantía no afecta a los derechos legales que

le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consumo. Es posible que su audiólogo protesico haya expedido una garantía más amplia que esta. Consulte con él/ella para más información.

Si necesita asistencia técnica

Lleve su audífono a su audiólogo protésico, quien seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata.

Información técnica

El audífono contiene un radiotransmisor con tecnología de inducción magnética de corto alcance, que trabaja a una frecuencia de 3,84 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ a 10 m.

audífono cumple con los estándares internacionales relacionados con radio transmisores, compatibilidad electro-magnética y exposición humana.

Debido al reducido tamaño de los audífonos, todas las marcas de homologación relevantes se encuentran en este documento.

EE. UU. y Canadá

El audífono contiene un módulo de radio con:

FCC ID: U28FU2SP

IC: 1350B-FU2SP

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas FCC y RSS sin licencia del Departamento de Industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones realizados al equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable correspondiente podrían anular la autoridad del usuario para manejarlo.

Este dispositivo digital de clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

Nota: Este equipo se ha testado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase Bass B digital device, conforme al apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Aún así, no hay garantía de que no se produzca en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, producidas al apagar y encender el equipo, el usuario

debe tratar de corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones:

- Reorientar o relocar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el fabricante o un técnico de radio/televisión con experiencia.

Oticon declara que este audífono cumple con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se encuentra disponible en:



Fabricado por:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

CE 0543



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



IP58

Descripción de los símbolos utilizados en este folleto	
	Advertencias El texto marcado con este símbolo debe ser leído antes de utilizar el producto.
	Fabricante El producto es producido por el fabricante, cuyo nombre y dirección se encuentran junto al símbolo. Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en las Directivas de la UE 90/385 / EEC, 93/42 / EEC y 98/79 / EC.
	Marca CE El producto cumple con la Directiva de dispositivos médicos 93/42 / EEC. El número de cuatro dígitos indica la identificación del organismo notificado.
	Residuos electrónicos (RAEE) Recicle sus audífonos, accesorios o baterías de acuerdo con las normativas y regulaciones locales o devuélvalas a su audioprotesista para su eliminación. Equipo electrónico cubierto por la Directiva 2012/19 / UE sobre residuos y equipo eléctrico (RAEE).
	Marca de cumplimiento regulatorio (RCM) El producto cumple con los requisitos de seguridad eléctrica, EMC y espectro de radio para los productos suministrados al mercado australiano o neozelandés.
	Código de IP Este símbolo indica los tipos de protecciones contra el agua y material partículas de acuerdo con la normativa EN 60529: 1991 / A1: 2002. IP5X indica protección contra el polvo. IPX8 indica la protección contra los efectos de inmersión continua en agua.

Descripción de los símbolos utilizados en la etiqueta	
	Mantener seco Indica un dispositivo médico que necesita protección contra la humedad.
	Símbolo de precaución Consulte las instrucciones de uso para advertencias y precauciones.
	Número de catalogo Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico puede ser identificado.
	Número de serie Indica el número de serie del fabricante para que se pueda identificar un dispositivo médico específico.

Vista general de los ajustes del audífono				
Izquierdo			Derecho	
<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Rueda de volumen	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Cambio de programa	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Silenciar	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Indicadores de la rueda de volumen				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Tonos de volumen mínimo/máximo	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Clic cada vez que se cambia el volumen	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Tonos al llegar al volumen preferido	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Indicadores de pila				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Aviso de pila gastada	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Cambiar la pila	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off

161853ES / 2018.12.17

161853ES / 2018.12.17



oticon
PEOPLE FIRST

161853ES / 2018.12.17