

INSTRUCCIONES DE USO

RITE



Gracias

Gracias por haber elegido nuestro producto como medio para lograr una mejor audición.

Para ayudarle en su esfuerzo, nos hemos asegurado de que su nuevo audífono ofrezca la más alta calidad y que sea fácil de utilizar y de mantener.

Su nuevo audífono está diseñado para amplificar y transmitir el sonido a sus oídos, mejorando de ese modo su audición en la mayoría de las situaciones. La amplificación está ajustada de forma única y optimizada a las necesidades personales de sus habilidades auditivas, en base a la prescripción de su audioprotesista. Para satisfacer sus necesidades se pueden configurar varias funciones. Su audioprotesista las marcará en las secciones relevantes de este manual. En la última página verá una vista general de todas las funciones configuradas de su audífono. Le recomendamos que lea estas instrucciones con atención para poder obtener el máximo beneficio y asegurar el buen rendimiento de su audífono.

Si tiene cualquier pregunta acerca del uso o el mantenimiento del audífono, por favor, contacte con su audioprotesista.

Indicaciones de uso

El uso de su audífono tiene como finalidad amplificar y transmitir el sonido al oído y por lo tanto compensar una pérdida auditiva.

Su audífono está especialmente indicado para cubrir pérdidas auditivas de leves a moderadas.

Índice

Modelo	7
Advertencias	8
Activar el audífono por primera vez	12
Sustitución de la pila	13
Encendido (ON) y apagado (OFF) del audífono	15
Indicador de lado izquierdo/derecho	16
Colocación del audífono	17
Programas (Opcional - vía Streamer)	18
Control de Volumen (Opcional- vía Streamer)	20
Cuidado de su audífono	21
Mantenimiento diario con Micro Molde	24
Mantenimiento diario - Conos	26
Siete pasos fáciles para mejorar su audición	31
Problemas habituales y sus soluciones	36
Accesorios inalámbricos	38
Garantía internacional	39

Teléfono móvil	41
Información técnica	43
Vista general de los ajustes del audífono	46

IMPORTANTE

Por favor, familiarícese con el contenido de este folleto antes de usar su audífono. Contiene instrucciones de seguridad e importante información sobre el uso y manejo de su audífono y de las pilas.

Modelo

Su tipo de sujeción es

Conos:

6mm



8mm



10mm



Cono Plus



Conos Power:

6mm



8mm



10mm




12mm



Micro molde



Tamaño pila: 10

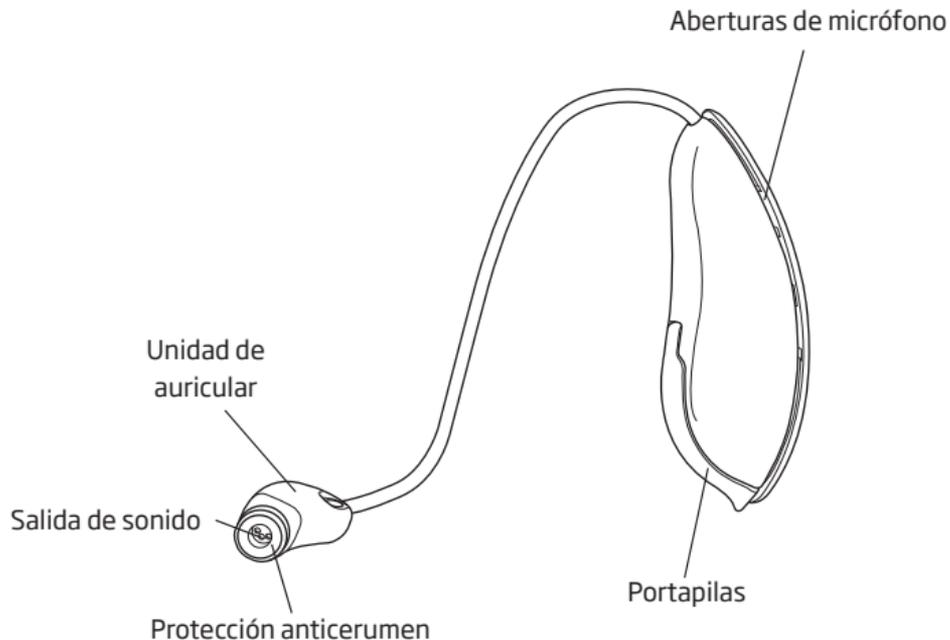

Advertencias

Antes de utilizar su audífono, debe familiarizarse con todo el contenido de este folleto, así como con las advertencias generales que se indican a continuación.

Uso del audífono

- El audífono debe utilizarse exclusivamente según las indicaciones que le de su audioprotesista y los ajustes que él le haga. El uso incorrecto puede provocar una pérdida auditiva repentina y permanente.
- Nunca permita que otras personas utilicen su audífono, ya que podría provocar lesiones permanentes en el oído.

Peligro de atragantarse

- Los audífonos, sus componentes y las pilas no son juguetes y deben mantenerse alejados del alcance de los niños o de cualquiera que pudiese ingerirlos o para evitar daños que se pueden ocasionar.
- Jamás sustituya la pila ni ajuste los controles en presencia de niños o de personas con dificultades de aprendizaje.
- Deseche las pilas en un lugar inaccesible para niños o para personas con dificultades de aprendizaje.

Advertencias

- Compruebe siempre sus medicinas antes de ingerirlas, ya que se han dado casos de haber tragado pilas en lugar de píldoras.
- Nunca se meta el audífono ni las pilas en la boca, por ninguna razón, dado que son escurridizos y podrían tragarse accidentalmente.

Uso de la pila

- Utilice siempre pilas recomendadas por su audioprotesista. Las pilas de baja calidad pueden sulfatarse y causar daños físicos.
- Nunca intente recargar las pilas. Pueden explotar y causar lesiones.
- No tire las pilas al fuego, pueden explotar y causar lesiones serias.

Mal funcionamiento de los audífonos

- Los audífonos pueden dejar de funcionar, por ejemplo, al terminarse la pila o al bloquearse por el exceso de cerumen. Tenga en mente esta posibilidad, sobre todo cuando vaya conduciendo o cualquier circunstancia en la que usted dependa de señales acústicas.

Advertencias

Implantes activos

- Ante el uso de teléfonos móviles, Oticon muestra precaución y aconseja seguir las pautas recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.
- Si usted tiene un sistema implantado, debe llevar el audífono a una distancia de más de 15 cm del implante. No debe llevarlo en un bolsillo cerca del pecho. Si usted tiene un implante cerebral activo, por favor, póngase en contacto con el fabricante de su implante para obtener información acerca de cualquier riesgo de distorsión de la señal o interferencias.
- La caja incluida para guardar el audífono cuenta con un imán integrado. Si usted tiene un sistema implantado, como un marcapasos o un desfibrilador, no debe llevar la caja en un bolsillo cerca del pecho.

Explosivos

- La fuente de alimentación de su audífono no tiene energía suficiente para incendiarse bajo condiciones normales de uso. El audífono no ha sido testado en conformidad con los estándares internacionales con respecto a atmósferas explosivas. Recomendamos no usar su audífono en zonas donde exista riesgo de explosiones.

Advertencias

Radiografía, TAC cerebral, RM, TEP, electroterapia

- Quítese el audífono antes de hacerse una radiografía, una TAC cerebral / RM / TEP, electroterapia o una intervención quirúrgica porque se puede dañar si está expuesto a campos fuertes.

Posibles efectos secundarios

- El uso de audífonos o moldes puede provocar acumulación acelerada de cerumen (cera del oído).
- Por otro lado, los materiales no alérgicos pueden, en raras ocasiones, causar irritación en la piel. Consulte a su médico si se produce cualquiera de estos efectos.

Interferencias

- Su audífono ha sido probado contra interferencias siguiendo las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, puede haber interferencias con sus audífonos u otros dispositivos electrónicos, por ejemplo con teléfonos móviles y sistemas de alarmas en tiendas. Si esto ocurre, aumente la distancia entre el audífono y el dispositivo.

Activar el audífono por primera vez

Un audífono es un dispositivo electrónico muy pequeño que utiliza pilas especiales. Para activarlo tiene que colocar una pila nueva en el portapilas.

Para encender el audífono cierre el portapilas completamente con la pila dentro. Tardará unos segundos antes de emitir un sonido. Sonará una melodía mientras el audífono se enciende. Colóquese el audífono después de cerrar el portapilas.

Si tiene el audífono en la mano mientras lo activa, se puede producir un pitido que dejará de sonar al colocar el audífono en el oído adecuadamente.

Sustitución de la pila




El tamaño de pila correcto aparece en el apartado “Modelo” en la primera sección de este documento.

Las pilas gastadas deben retirarse inmediatamente y desecharse según las normas locales.

Cuando la pila se acabe, oirá dos avisos cortos. Este preaviso se repetirá con intervalos moderados para indicar que debe cambiar la pila. Después del preaviso, la pila se puede agotar en un corto periodo o después de unas horas según la capacidad de la misma y su pérdida auditiva personal.

Si la pila se acaba el audífono se apagará. Cuando esto ocurra, se emitirán 4 avisos para indicar que el audífono no está funcionando.

Cambie la pila.

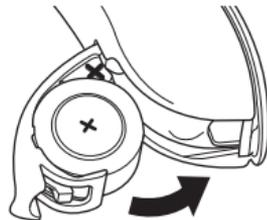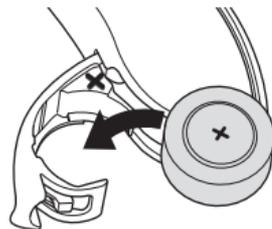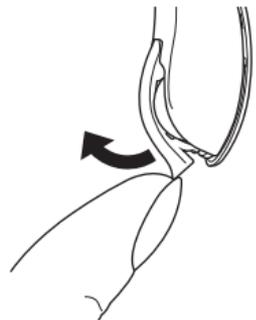

Para cambiar la pila siga estas instrucciones:

- Abra el portapilas moviendo hacia atrás el borde que queda levantado y extraiga la pila usada. Como ayuda para manejar la pila, puede utilizar el imán situado en el extremo de la Multiherramienta.
- Retire el adhesivo del lado “+” de la pila nueva.
- La pila nueva puede insertarse utilizando el imán del extremo de la Multiherramienta. Asegúrese de que el signo (+) de la pila coincida con el signo (+) grabado en el interior del portapilas. Cierre el portapilas.

Si la pila presenta restos de humedad, debe limpiarse antes de su utilización. Al cambiar la pila, tenga en cuenta que puede tardar algunos segundos en funcionar a pleno rendimiento.

Como ayuda para manejar la pila, puede utilizar el imán situado en el extremo de la herramienta.



Encendido (ON) y apagado (OFF) del audífono

Para encender el audífono cierre el portapilas completamente con la pila dentro. Cuando el portapilas esté cerrado el audífono emitirá una melodía. Esto indica que la pila está cargada y que el audífono está funcionando.

Asegúrese de que el portapilas está completamente abierto para apagar el audífono.

Para ahorrar pila, asegúrese de que su audífono esté apagado, cuando no esté usando su audífono.

NOTA IMPORTANTE

Abra completamente el portapilas para permitir que circule el aire cuando no esté usando el audífono, especialmente por la noche o durante largos periodos de tiempo.




Indicador de lado izquierdo/derecho

Los audífonos se adaptan de forma distinta para cada oído, lo que significa que si usted tiene dos audífonos, su audífono izquierdo estará programado de forma distinta al derecho. Por esta razón, es muy importante poder distinguir el audífono izquierdo del derecho.



Para poder identificar fácilmente el audífono izquierdo del derecho, se pueden añadir indicadores de color dentro del portapilas.

Un punto azul marca el audífono IZQUIERDO
Un punto rojo marca el audífono DERECHO

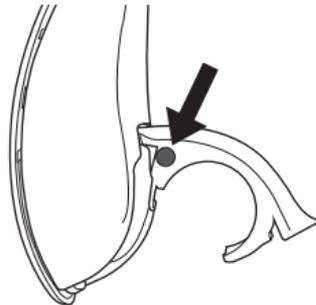

Colocación del audífono

1. Colóquese el auricular, con el tipo de sujeción anexo, dentro del oído.
2. Coloque el audífono detrás de la oreja.
3. Asegúrese de que la parte que va dentro del oído esté colocado de forma que siga el contorno de la piel.
4. Si el audífono tiene un hilo de sujeción, colóquelo dentro de la oreja según se indica en los dibujos 3 y 4, de forma que siga el contorno del pabellón.

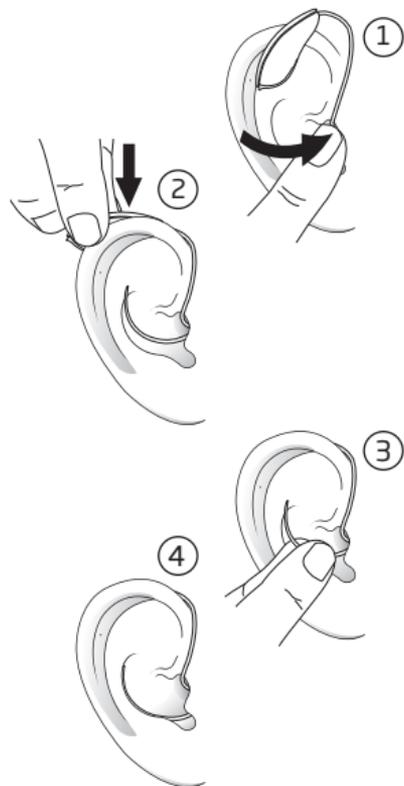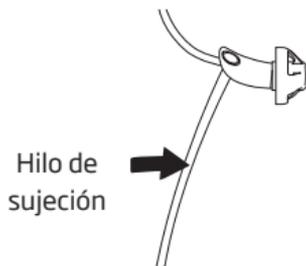

Programas (Opcional - vía Streamer)



Su audífono puede tener hasta cuatro programas. Su audioprotesista programa el número y tipo de programas disponibles para su audífono.

Si desea cambiar los programas usted mismo, necesitará ConnectLine Streamer. Por favor, consulte las Instrucciones de uso del Streamer para saber cómo manejarlo con su audífono.

Al cambiar entre los distintos programas, su audífono le avisará. El número de avisos indica qué programa está usando.

	Un aviso, al cambiar al programa 1
	Dos avisos, al cambiar al programa 2
	Tres avisos, al cambiar al programa 3
	Cuatro avisos, al cambiar al programa 4

Los programas disponibles para su audífono se encuentran en la sección de “Programas” en la última página de este documento.

Control de Volumen (Opcional - vía Streamer)



Puede ajustar el control de volumen utilizando ConnectLine Streamer de Oticon. El Streamer le permite ajustar el volumen en situaciones específicas de escucha al nivel en el que usted se siente cómodo.

Si desea ajustar el volumen usted mismo, necesitará ConnectLine Streamer. Por favor, consulte las Instrucciones de uso del Streamer para ver cómo manejarlo con su audífono.

Oirá un aviso al subir y bajar el volumen.

Cuando se encienda el audífono, empezará con el nivel de volumen preferido.
Cuando ajuste el control de volumen al nivel preferido, se indicará con un aviso.

Cuidado de su audífono

Su conducto auditivo genera cerumen que puede taponar la salida del sonido, y por lo tanto, su audífono lleva un filtro para evitar que la acumulación de cerumen provoque un cambio en el funcionamiento. Consulte a su audioprotesista acerca de las indicaciones del sistema específico de protección anticerumen de su audífono y cómo cambiarlo.

Cuando esté manipulando su audífono, manténgalo sobre una superficie blanda para evitar que se estropee en caso de caída.

Antes de irse a dormir:

- Asegúrese de que no queda cerumen en ninguno de los orificios del molde ya que el cerumen puede reducir la eficacia del audífono.
- Para ahorrar pila, asegúrese de que su audífono esté apagado cuando no esté utilizándolo.
- Apague su audífono abriendo el portapilas ligeramente hasta que sienta un “clic”.


ADVERTENCIA

Abra completamente el portapilas para permitir que circule el aire cuando no esté usando el audífono, especialmente por la noche o durante largos periodos de tiempo.

Limpeza del audífono

Una variedad de herramientas de limpieza están preparadas especialmente para limpiar su audífono. La multiherramienta debe utilizarse para conseguir el mejor cuidado y funcionamiento de su audífono.

Multiherramienta

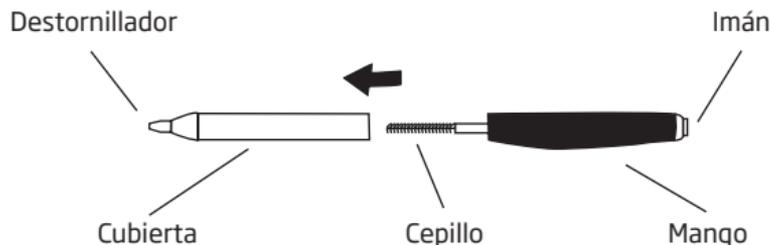

Cambie el cepillo cuando sea necesario. Retírelo de la herramienta e inserte uno nuevo, presionando firmemente.


Los cepillos pueden adquirirse a través del audioprotesista.

Utilice un paño suave para limpiar la superficie de los audífonos.

Mantenimiento diario con Micro Molde

El Micro Molde debe limpiarse regularmente:

- Limpie la abertura de ventilación empujando el cepillo hacia el orificio mientras lo gira ligeramente.

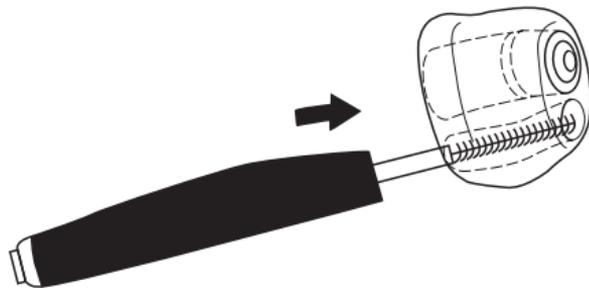


¡El audífono y el Micro Molde no deben lavarse nunca ni introducirlos en agua u otros líquidos!

Sustituir el sistema de protección anticerumen WaxStop

Se debe cambiar el filtro del sistema de protección anticerumen WaxStop cuando:

- Cuando vea que el filtro del Micro Molde está obstruido.
- Cuando el audífono no suene de una forma normal.

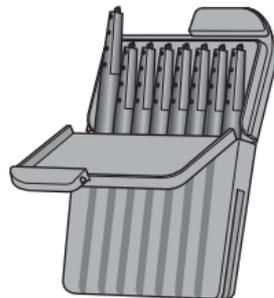

Utilice exclusivamente sistemas de protección anticerumen suministrados por su audioprotesista. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre cómo cambiar el filtro anticerumen en el propio embalaje del filtro.

Instrucciones de recambio:


1. Saque la herramienta de la carcasa. La herramienta tiene dos extremos, uno con el nuevo filtro y otro con la herramienta para cambiar el antiguo.
2. Inserte la herramienta dentro de la salida de sonido del Micro Molde.
3. Saque el filtro utilizado lentamente manteniendo la herramienta recta.
4. Gire la herramienta 180°.
5. Presione el nuevo filtro dentro de la salida de sonido y saque la herramienta con cuidado.
6. Tire la herramienta utilizada. No vuelva a utilizarla.

Mantenimiento diario - Conos

Limpie la unidad de auricular a diario. Utilice un paño seco para retirar el cerumen.

El cono no debe limpiarse. Cuando necesite un cono limpio y nuevo, cambie el cono existente por uno nuevo.




Recomendamos cambiar el cono regularmente.

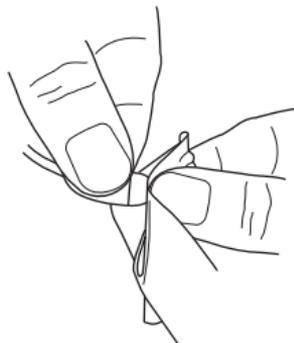

Cambio del cono

El cono es fácil de cambiar. Cámbielo siempre que lo necesite.

1. Sujete con las uñas la parte inferior del cono y extráigalo.
2. Coloque el cono nuevo en el auricular.
3. Asegúrese de que queda sujeto firmemente.

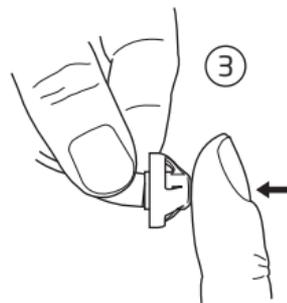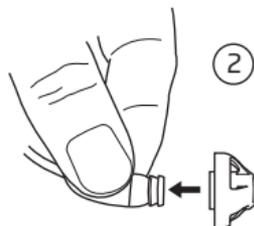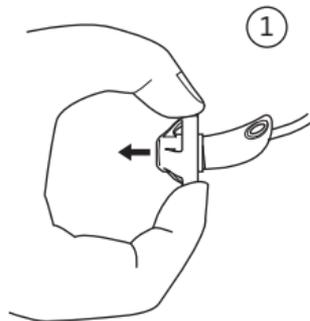

Bajo el cono notará la presencia de un filtro anticerumen blanco en el extremo del auricular. Este filtro evitará que los restos de cerumen dañen al auricular. Si el filtro se tapona, póngase en contacto con su audióprotesista para cambiarlo.

NOTA IMPORTANTE

El cono está fabricado con un material de goma suave clínicamente probado. Si el cono se soltara en el canal auditivo, no causaría ningún daño. Si puede, extráigalo con cuidado o pida a alguien que le ayude. No empuje el cono hacia el interior del canal auditivo. No empuje el auricular hacia el interior del oído de nuevo antes de haber quitado el cono del oído. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su audióprotesista.

NOTA IMPORTANTE

¡El audífono propiamente dicho, no debe lavarse jamás ni sumergirse en agua u otros líquidos!

Evite el calor, la humedad y los productos químicos

Su audífono no debe dejarse jamás en lugares con mucho calor, como dentro de un vehículo aparcado al sol. También debe protegerse de las fuentes de humedad, como por ejemplo baños calientes, la ducha o la lluvia. Tampoco debe secarse nunca en un microondas o en un horno.

Seque la pila con cuidado si tiene humedad ya que puede afectar a su funcionamiento. El uso de un kit antihumedad puede ayudar a evitar estos problemas e incluso a alargar la vida del audífono. Pregunte a su audioprotesista si desea más información.

Los productos químicos de los cosméticos, como la laca, el perfume o las lociones para después del afeitado, así como los repelentes de mosquitos, pueden dañar su audífono. Por ello, debería quitarse siempre el audífono antes de usar estos productos y esperar a que se sequen antes de volverse a poner el audífono. Si utiliza cualquiera de estos productos debería lavarse y secarse bien las manos antes de ponerse el audífono.

MANTENIMIENTO DE SU AUDÍFONO

NOTA IMPORTANTE

- Utilice únicamente piezas o accesorios diseñados para su audífono.
- El cono debe ir perfectamente encajado al tubo de sonido antes de insertarlo en el oído. Si no sigue las instrucciones puede producirle heridas.
- Nunca utilice el auricular sin el cono.
- No utilice el audífono si tiene una excesiva acumulación de cerumen o infección.
- Un mantenimiento y un cuidado preventivo adecuado asegurará un funcionamiento óptimo, ofreciendo mayor fiabilidad.
- No comparta el audífono o cualquiera de sus piezas con otras personas.
- Asegúrese de que tiene las manos limpias al manipular el audífono y sus piezas.

Siete pasos fáciles para mejorar su audición

Adaptarse a un audífono lleva un tiempo. La duración de este periodo de adaptación varía de una persona a otra, dependiendo de varios factores, tales como el hecho de no haber utilizado un audífono con anterioridad o el grado de pérdida auditiva del usuario.

1. En el silencio de su casa

Intente acostumbrarse a todo tipo de sonidos nuevos para usted. Escuche los ruidos de fondo e intente identificar cada sonido. Tenga en cuenta que algunos sonidos pueden sonar de forma diferente a lo que usted está acostumbrado. Puede que tenga que aprender a identificarlos de nuevo. Notará que en poco tiempo se acostumbrará a los sonidos de su entorno - si no es así, contacte con su audioprotesista.

Si el hecho de utilizar el audífono le produce cansancio, apáguelo y descanse. Comenzará a poder escuchar durante períodos de tiempo más largos. En breve, podrá llevar su audífono cómodamente todo el día.

2. En conversación con una persona

Siéntese frente a otra persona para poder ver con claridad las expresiones de su cara y asegúrese de que no haya ruido en la habitación. Oirá nuevos sonidos del habla que le parecerán un poco molestos al principio. De todas formas, oirá el habla mucho más clara después de que el cerebro se haya adaptado a los nuevos sonidos.

3. Al oír la radio o la televisión

Al oír la televisión o la radio, empiece escuchando a los presentadores de noticias, ya que suelen hablar con mucha claridad, pruebe después con otro tipo de programas.

Si encuentra difícil escuchar la radio o la televisión, su audioprotesista le aconsejará sobre el sistema ConnectLine de Oticon y otros accesorios disponibles.


4. En conversaciones en grupo

En este tipo de situaciones, generalmente suele haber mucho ruido de fondo y por lo tanto, son más difíciles de seguir. En tales situaciones, concentre su atención en la persona a la que desea oír. Si se le escapa alguna palabra, pida a su interlocutor que se la repita.

5. Al hablar por teléfono

Cuando esté utilizando el teléfono, incline el extremo del auricular ligeramente sobre su pómulo para permitir que el sonido entre directamente en la abertura del micrófono del audífono. De esta forma, el audífono no pitará y se asegurará las mejores condiciones para comprender la conversación. Al mantener el auricular en esta posición, recuerde hablar directamente en el micrófono del teléfono para asegurarse una buena comprensión "al otro lado de la línea".

Si le resulta difícil utilizar el teléfono, pida a su audioprotesista más información sobre el sistema ConnectLine de Oticon y otros accesorios disponibles.

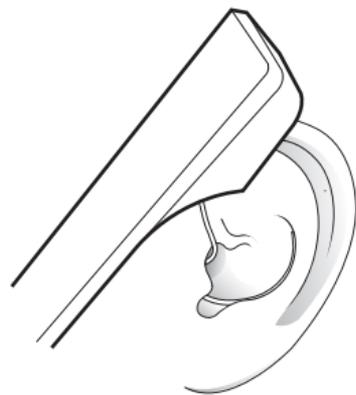

6. Teléfonos móviles e inalámbricos

Su audífono ha sido diseñado para cumplir con las normas de la ley Internacional de Compatibilidad Electromagnética. De todas formas, no todos los teléfonos móviles son compatibles con los audífonos. El hecho de que se produzcan interferencias puede deberse a la naturaleza de su teléfono móvil en particular.

Si le resulta difícil obtener un buen resultado con el teléfono móvil, pida a su audio-protésista más información sobre el sistema ConnectLine de Oticon y otros accesorios disponibles.

7. Utilice su audífono durante todo el día

La mejor forma de conseguir mejorar su audición es practicar la escucha hasta que pueda llevar su audífono cómodamente durante todo el día. En la mayoría de los casos, la utilización poco frecuente del audífono impide al usuario sacarle todo el provecho posible.

Su audífono no le permitirá recuperar una audición normal. Tampoco le evitará, ni mejorará, una pérdida auditiva por causas físicas. Lo que sí hará sin embargo, es ayudarle a sacar un mayor provecho de su capacidad auditiva. Si tiene dos audífonos lleve siempre ambos.

Problemas habituales y sus soluciones

Problema	Posible causa
Ausencia de sonido	Pila gastada
	Salida de sonido obstruída
Sonido intermitente o reducido	Salida de sonido obstruída
	Humedad
	Pila gastada
Pitido	Audífono colocado incorrectamente
	Cerumen acumulado en el canal

Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audioprotesista.

Solución	
Cambiar la pila	pg. 13 & 14
Limpiar el molde	pg. 24
Sustituir el sistema de protección anticerumen o el cono	pg. 25 & 27
Limpiar el molde	pg. 24
Limpiar la pila y el audífono con un paño seco	pg. 29
Cambiar la pila	pg. 13 & 14
Colocar de nuevo el audífono	pg. 17
Acudir al médico para que examine su canal auditivo	

Accesorios inalámbricos

ConnectLine

Como mejora de su audífono inalámbrico se le puede conectar una variedad de aparatos. Los productos ConnectLine pueden conectar su audífono a numerosos tipos de medios o fuentes de sonidos. Esto le permitirá recibir señales de audio de la televisión, el teléfono, reproductores de música, el ordenador o un micrófono externo inalámbrico de su audífono.

Para más información detallada acerca del sistema ConnectLine pregunte a su audioprotesista o visite www.oticon.com.

Garantía Internacional

Existe una garantía limitada para los audífonos Oticon que cubre los defectos de los materiales utilizados o de fabricación, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía cubre el audífono, pero no los accesorios como tubos, pilas, filtros anticerumen, etc.

Esta garantía pierde su validez en caso de uso inadecuado, maltrato, exposición del audífono a condiciones corrosivas, cambios físicos en su oído, daño provocado por objetos extraños introducidos en su audífono, ajustes incorrectos o en caso de que el audífono fuese reparado por personal técnico no autorizado.

Esta garantía no afecta a ninguno de los derechos legales que usted pueda tener según la legislación nacional concerniente a los bienes de consumo. Puede que su audioprotésista le haya expedido una garantía que sobrepase los límites de la nuestra. Por favor, consulte con su audioprotésista para más información.

Si precisa Asistencia Técnica

Lleve su audífono a su audioprotésista que seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes sobre la marcha.

Certificado de Garantía Oticon

Nombre del usuario:

Audioprotesista:

Centro auditivo:

Teléfono:

Fecha de compra:

Período de Garantía:

Mes:

Modelo izquierdo:

Nº de serie.:

Modelo derecho:

Nº de serie.:

Pila: 10

Teléfono móvil

Algunos usuarios notan un zumbido en el audífono al usar un teléfono móvil, lo cual indica que el teléfono móvil y el audífono no son compatibles.

De acuerdo con la norma ANSI C63.19 (ANSI C63.19-2006 - Norma nacional estadounidense sobre métodos de medición de la compatibilidad entre audífonos y dispositivos de comunicaciones inalámbricos), la compatibilidad entre un audífono y un teléfono móvil concretos puede predecirse sumando la calificación de inmunidad del audífono con la clasificación de emisiones del teléfono móvil. Por ejemplo, la suma de un audífono de clase 2 (M2) y un móvil de clase 3 (M3) daría como resultado una clasificación combinada de 5. Cualquier clasificación combinada igual o superior a 5 permite un "uso normal". Una clasificación combinada de 6 o superior indica "funcionamiento excelente".

La inmunidad de este audífono tiene un mínimo de M2. Las medidas de funcionamiento de material, categorías y sistemas de clasificaciones se basan en la mejor información disponible pero no garantiza una satisfacción a todos los usuarios.

NOTA IMPORTANTE

El rendimiento de cada audífono puede variar con diferentes teléfonos móviles. Por lo tanto, por favor pruebe este audífono con su móvil, o si va a comprar un teléfono nuevo, asegúrese de probarlo con su audífono antes de comprarlo. Para más ayuda, consulte a su proveedor de móviles acerca del folleto llamado "Compatibilidad de audífonos con teléfonos móviles inalámbricos digitales".

Información técnica

El audífono contiene un transmisor de radio que utiliza tecnología de inducción magnética de corto rango a 3.84 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es < -42 dB μ A/m @ 10m.

La potencia de emisión del sistema de radio está muy por debajo de los límites de emisión internacional para la exposición humana. Si se compara, la radiación del audífono es inferior a la radiación electromagnética no intencionada de por ejemplo: lámparas halógenas, monitores de ordenador, lavavajillas, etc. El audífono cumple con los estándares internacionales sobre Compatibilidad Electromagnética.

Debido al tamaño limitado disponible en los audífonos todas las marcas relevantes de homologación se encuentran en este documento.

El audífono contiene un módulo con:

FCC ID: U28FURIT04

IC: I350B-FURIT04

El aparato cumple con la Sección 15 de la normativa FCC y RSS-210 de la industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo no debe provocar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan provocar un funcionamiento indeseado.

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Oticon, podrían anular la autorización FCC para manejar el equipo.

Por la presente, Oticon declara que este audífono cumple con los requisitos fundamentales y con las directrices 1999/5/EC. La declaración de conformidad puede obtenerse dirigiéndose a:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

CE 0543 (MDD 42/93)

CE 0682 (1999/5/EC)



Los residuos de los equipos electrónicos deben manejarse de acuerdo con las normas locales.



N1175

Vista general de los ajustes del audífono

Audífono				
Izquierdo		Indicadores de control de volumen	Derecho	
<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off	Pita cuando el volumen está al mín/máx	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off
<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off	Hace clic al cambiar el volumen	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off
<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off	Pita al llegar al volumen preferido	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off
Indicadores de pila				
<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off	Aviso de pila gastada	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> off

Puede utilizar ConnectLine Streamer para ajustar el volumen o cambiar de programa.

N° de programa	Programa
1	
2	
3	
4	

People First

People First es nuestra promesa para ayudar a las personas a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma activa



0000115088000001

oticon
PEOPLE FIRST