

Accesorios inalámbricos

Mando a
distancia 3.0



Instrucciones de uso

oticon
PEOPLE FIRST

Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo Mando a distancia 3.0. Léalo con atención, incluyendo la sección Advertencias. Este manual le ayudará a sacar el máximo partido de su nuevo Mando a distancia.

Si tiene más dudas sobre el uso del dispositivo, póngase en contacto con su audiólogo protésico.

Para su comodidad, el manual incluye una barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

| **Acerca de** | Inicio | Uso diario | Advertencias | Más información |

Uso previsto

El Mando a distancia 3.0 está diseñado para ayudar a los usuarios de audífonos inalámbricos a controlar las características que ofrece su solución auditiva.

El Mando a distancia 3.0 puede ser utilizado por niños (> 36 meses) y adultos junto con su audífono.

Índice

Acerca de

Contenido de la caja	6
Vista general del producto	7

Inicio

Pilas	8
Cómo insertar las pilas	9
Cómo emparejar el mando a distancia con los audífonos	11

Uso diario

Alcance	14
Confirmaciones	15
Cambio de programa	17
Ajuste el volumen	18
Silenciar	19
Activar el sonido	20
Pasador para cordón	21
Cuidados de su mando a distancia	22

Advertencias

Advertencias	24
--------------	----


Más información

Garantía internacional	28
Información técnica	29

Contenido de la caja

Encontrará los siguientes elementos:

Mando a distancia 3.0

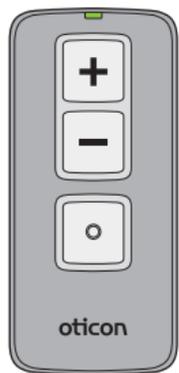

Pilas





2 x AAAA

Este manual



Vista general del producto

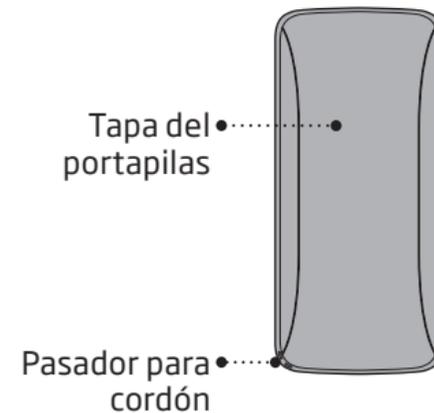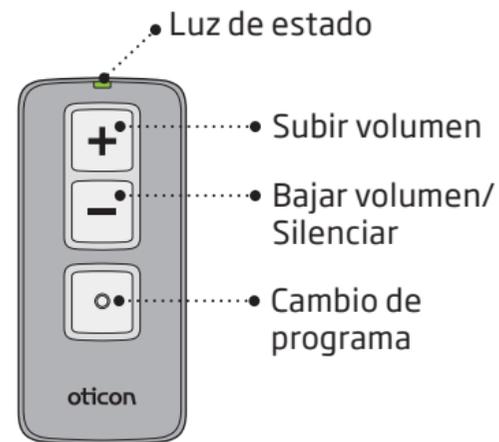


Pilas

Para activar el mando a distancia debe introducir dos pilas AAAA en el portapilas. Consulte la sección "Cómo insertar las pilas".

La duración de las pilas variará en función de las condiciones de uso. Con un uso normal, deberá cambiarlas aproximadamente una vez al año.

Cómo insertar las pilas


1 Retirar

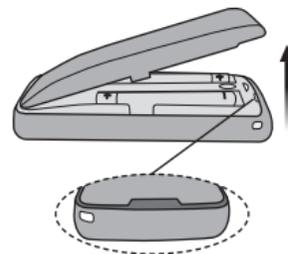

Abra con suavidad la tapa del portapilas.

Retire las pilas usadas.


2 Insertar

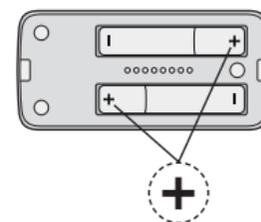

Coloque las pilas nuevas en el portapilas.

Asegúrese de que el signo + de la pila coincide con el signo + del portapilas.

3 Cerrar

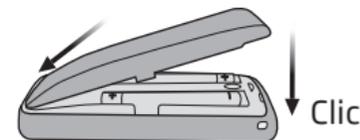

Coloque la tapa del portapilas.

Presione la tapa hasta que encaje con un clic.

La tapa del portapilas no debe forzarse en ningún caso. Si no consigue cerrarlo sin hacer fuerza, compruebe si está bien alineado y colóquelo bien para que encaje con facilidad.

Cómo emparejar el mando a distancia con los audífonos


El mando a distancia es un dispositivo personal que funciona con un solo par de audífonos. Después de emparejarlo, podrá manejar hasta dos audífonos al mismo tiempo.

Debe emparejar el mando a distancia con los audífonos para poder utilizarlo.

Puede emparejarlo con dos audífonos al mismo tiempo o con uno cada vez. Si desea sincronizar uno cada vez, deberá repetir el proceso de emparejamiento.

En la siguiente página encontrará las instrucciones para emparejar un par de audífonos con el mando a distancia.


1. Prepare el mando a distancia para el emparejamiento

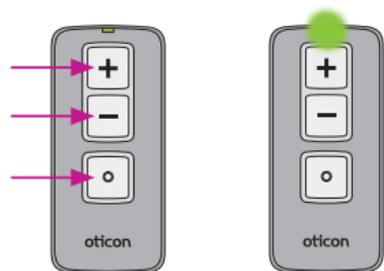

Presione todos los botones durante 5 segundos. La luz LED parpadeará en verde dos veces.

Después la luz LED se mantendrá en verde durante alrededor de 10 segundos para confirmar que el mando a distancia está listo para el emparejamiento.

2. Ponga los audífonos en modo emparejamiento

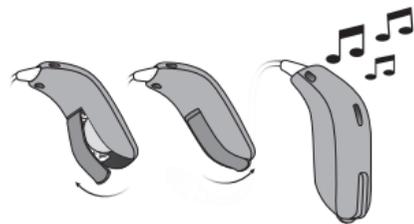

Asegúrese de que tiene pilas nuevas en los audífonos.

Abra los portapilas de ambos audífonos, espere aproximadamente cinco segundos y cierre los portapilas de nuevo.


Espero unos 10 segundos hasta que los audífonos estén completamente encendidos y la melodía de encendido suene.

Los audífonos permanecerán en modo de emparejamiento durante 3 minutos.


3. Empareje el mando a distancia con los audífonos



Sitúe ambos audífonos a 20 centímetros del mando a distancia.

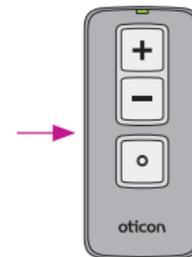

Presione brevemente cualquier tecla de mando a distancia para que se empareje automáticamente con los audífonos.

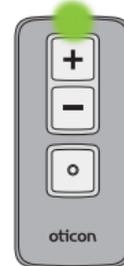

Cuando el emparejamiento se haya completado, la luz de estado se pondrá verde durante 10 segundos.

Alcance


El mando a distancia le permite utilizar sus audífonos a un máximo de 1,8 metros de distancia. No es necesario que los audífonos y el mando a distancia estén en línea directa de visión. Si ha sincronizado dos audífonos con el mando a distancia, los dos se ajustarán al mismo tiempo.



Confirmaciones

Indicaciones visibles

La luz de estado del mando a distancia se iluminará en verde al pulsar un botón.

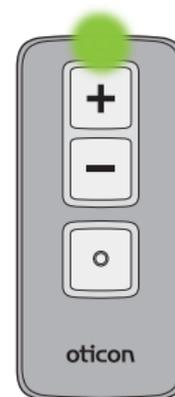


Indicaciones audibles

Oirá un sonido en los audífonos que confirmará la acción realizada.

Pila baja


Si las pilas se están agotando, la luz de estado parpadeará rápidamente al pulsar un botón. En ese caso, cambie las pilas cuando sea posible.

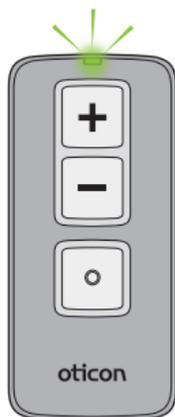

Cambio de programa

Puede utilizar el mando a distancia para cambiar de programa si su audiólogo protésico ha incluido más de un programa en sus audífonos.

Solo tiene que pulsar el botón • del mando a distancia para cambiar el programa de los audífonos. Cada vez que pulse el botón, cambiará al siguiente programa de los audífonos.

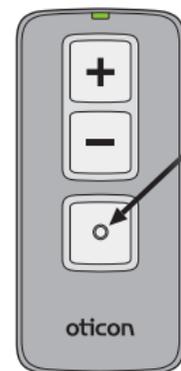

Pulse para cambiar de programa


NOTA IMPORTANTE

Consulte las "Instrucciones de uso" de sus audífonos para más información sobre las características de sus audífonos específicos.


Ajuste de volumen

Utilice los botones de control de volumen del mando a distancia para ajustar el volumen de sus audífonos.

Cada vez que lo suba o lo baje oirá un breve sonido de confirmación en su audífono.

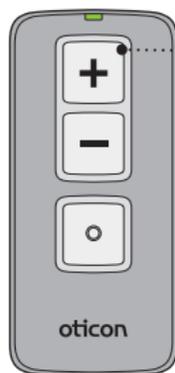


Pulse + para subir el volumen (sonido más alto)

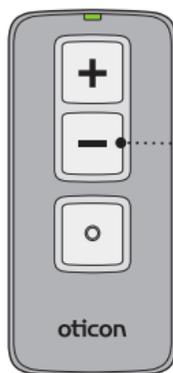

Pulse - para bajar el volumen (sonido más bajo)

Silenciar

Utilice la función de silencio si necesita silenciar su audífono mientras lo está utilizando. Mantenga pulsado el botón de bajar el volumen (-) durante aproximadamente 2 segundos hasta que se apague la luz de estado para silenciar los audífonos.

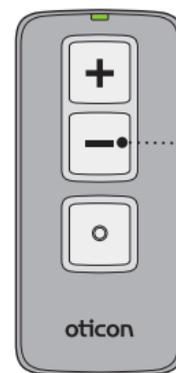

Pulsar durante 2 segundos

Activar el sonido

Pulse cualquier botón del mando a distancia para activar los audífonos.


NOTA IMPORTANTE

Consulte las "Instrucciones de uso" de sus audífonos para más información sobre las características de su solución auditiva específica.

Pasador para cordón

El mando a distancia dispone de un pasador en la esquina inferior derecha.

Puede utilizar cualquier cordón que encaje.

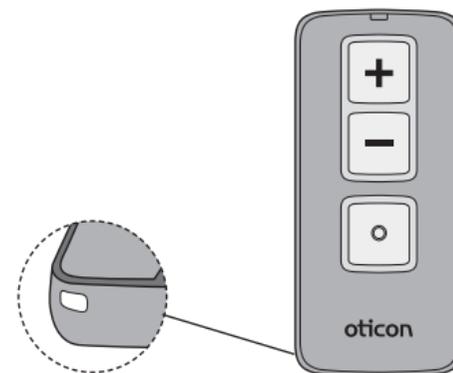

Cuidados de su mando a distancia

Coloque el mando a distancia sobre una superficie blanda cuando vaya a cambiar las pilas o a limpiarlo para evitar daños si se le cae.

NOTA IMPORTANTE

Utilice un paño seco y suave para limpiar el mando a distancia. No debe lavarse ni sumergirse en agua ni en otros líquidos bajo ningún concepto.

Advertencias

Antes de utilizar el mando a distancia debe familiarizarse con todo el contenido de este manual, así como con las advertencias generales que se indican a continuación para garantizar la seguridad personal y el uso correcto. Consulte con su audiólogo protésico si observa un comportamiento inusual del mando a distancia.

Riesgo de asfixia y de tragarse las pilas u otras piezas pequeñas

- Los audífonos, sus componentes y las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda tragárselos o lesionarse con ellos de cualquier otra manera.

En caso de ingestión de las pilas o de otras piezas pequeñas, acuda inmediatamente a un médico.

Control ajeno

- Mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda manipularlo para asegurar su seguridad personal y evitar un uso incorrecto.

Uso de correas

- Si utiliza un cordón para la mano, asegúrese de que es adecuado para ese uso. No utilice un cordón para el cuello porque hay riesgo de estrangulamiento.

Uso de la pila

- Utilice siempre las pilas recomendadas por su audiólogo protésico. Las pilas de baja calidad pueden sulfatarse y causar daños físicos.
- Nunca intente recargar las pilas, ni las queme. Existe el riesgo de que exploten.

Implantes activos

- Si lleva algún implante activo, debe tener precaución.
- Si usted tiene un implante cerebral activo, póngase en contacto con el fabricante y consulte con él si existe algún riesgo de interferencias.

Radiografía/TAC/RM/TEP, electroterapia y cirugía

- No lleve el mando a distancia cuando vaya a hacerse una radiografía, un TAC / RM / TEP, o a someterse a electroterapia o una intervención quirúrgica. El mando a distancia puede dañarse si se expone a campos intensos.

Posibles efectos secundarios

- En algunos casos poco frecuentes, los materiales no alergénicos del mando a distancia pueden causar irritación de la piel u otros efectos inusuales.

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Advertencias

Calor y productos químicos

- Su mando a distancia no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo aparcado al sol.
- No lo seque en un microondas, ni en ningún tipo de horno.
- Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del afeitado, cremas solares y repelentes de insectos, pueden dañar su mando a distancia. Quítese siempre el mando a distancia antes de usar estos productos y espere a que se sequen antes de volver a usarlo.

Uso al volante

- El mando a distancia puede distraerle mientras conduce.
- Consulte la legislación nacional sobre el uso de dispositivos de comunicación al volante.

Uso en aviones

- Su mando a distancia dispone de Bluetooth. No lo utilice a bordo de un avión si no es con el permiso expreso de la tripulación.

Interferencias

- Su mando a distancia ha superado pruebas exhaustivas de interferencias, de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre el mando a distancia y otros dispositivos (como algunos teléfonos móviles, emisores de radio, alarmas de tiendas y otros dispositivos inalámbricos). En caso de interferencias, aumente la distancia entre el mando a distancia y el equipo en cuestión.

Explosión

- La fuente de alimentación de su mando a distancia no tiene energía suficiente para producir un incendio en condiciones normales de uso. No obstante, no se ha sometido a pruebas de comportamiento en atmósferas explosivas según normas internacionales. Por ello, le recomendamos que no lo utilice en zonas con riesgo de explosiones.

Garantía internacional

El mando a distancia está cubierto por una garantía internacional limitada del fabricante durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y materiales del dispositivo en sí, pero no de los accesorios como las pilas, cables, fuentes de alimentación, etc. Los problemas derivados de un uso o un cuidado inadecuado, incorrecto o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición a condiciones corrosivas, daños provocados por objetos extraños introducidos en el dispositivo o ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla. Esta garantía no afecta a los dere-

chos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consumo. Es posible que su audiólogo protésico le haya expedido una garantía más amplia que esta. Pregúntele si necesita más información.

Si necesita asistencia técnica

Lleve su mando a distancia a su audiólogo protésico, quien seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata.

Información técnica

Modelo	RC-3A
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: De 5 °C a 40 °C Humedad: De 15 % a 93 %, sin condensación Presión atmosférica de funcionamiento: De 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura: De -25 °C a 70 °C Humedad: De 15 % a -93%, sin condensación
Dimensiones mecánicas	75,3 x 35 x 12 mm; peso 32,7 g (incluyendo pilas)
Compatibilidad	Audífonos Oticon con tecnología de radio de 2,4 GHz
Tipo de pila	2 x AAAA
Duración de la pila con un uso normal	12 meses
Alcance normal de transmisión	Hasta 1,8 m
Indicador de estado	LED verde
Frecuencia	Sin licencia 2,4 GHz (banda ISM)
Potencia de emisión	Máx. 10 dBm EIRP

El mando a distancia contiene un transductor de radio que utiliza tecnología de inducción magnética de corto alcance que trabaja en 3,84 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es muy baja y siempre está por debajo de -40 dB μ A/m a 10 metros de distancia.

El mando a distancia cumple las normas internacionales relativas a la compatibilidad electromagnética y a la exposición de las personas.

Debido al tamaño reducido del mando a distancia, todas las marcas de homologación relevantes se encuentran en este documento.

EE. UU. y Canadá

Este dispositivo tiene las certificaciones:
FCC ID: 2ACAHREMCTRO3
IC: 11936A-REMCTRO3

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas FCC y con la exención de licencia RSS del Departamento de Industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y
2. este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en entornos domésticos. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. No hay garantía de que la interferencia no vaya a ocurrir en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, lo

que puede comprobar si apaga y vuelve a encender el equipo, el usuario puede probar una de las siguientes soluciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el auricular.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el auricular.
- Consultar al fabricante o a un técnico de radio/televisor cualificado.

Los cambios o modificaciones realizados al equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable correspondiente podrían anular la autoridad del usuario para manejarlo.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.sbohearing.com

El fabricante declara que este mando a distancia cumple con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante.

179817ES / 2017.03.23



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



179817ES / 2017.03.23



oticon
PEOPLE FIRST