

Alta2 | Nera2 | Ria2

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Modellöversikt

Denna broschyr gäller för följande hörapparatfamiljer och modeller:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Oticon Alta2 Pro | ☐ Oticon Nera2 Pro | ☐ Oticon Ria2 Pro |
| ☐ Oticon Alta2 | ☐ Oticon Nera2 | ☐ Oticon Ria2 |
-
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ☐ IIC | Invisible-In-the-Canal |
| ☐ CIC | Completely-In-the-Canal |
| ☐ MIC | Mostly-In-the-Canal |
| ☐ ITC | In-the-Canal |
| ☐ HS | Half-Shell |
| ☐ FS | Full Shell |

Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya hörsellösning.

Din audionom har anpassat hörapparaterna efter din hörsel och dina personliga önskemål/behov. Om du har ytterligare frågor, kontakta din audionom.

| **Om** | Komma igång | Hantering | Alternativ | Varningar | Tillbehör |

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten som gör det lättare att hitta det du söker.

Avsedd användning

Hörapparatens uppgift är att förstärka och överföra ljud till örat och därigenom kompensera för nedsatt hörsel inom området lätt till svår hörselnedsättning. Hörapparaten är inte avsedd för spädbarn eller barn yngre än 36 månader.

VIKTIGT!

Hörapparaternas är unikt inställda och anpassade till din hörsel under den anpassning som din audionom utförde.

Innehållsförteckning 1/2

Om

Identifiera modell	10
Batteristorlek 10 (CIC visas)	12
Batteristorlek 312 (ITC visas)	14
Batteristorlek 13 (fullskal visas)	16
Identifiera höger och vänster hörapparat	18
Batteri	19

Komma igång

Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna	20
Dags att byta batteri	21
Byta ut batteriet	22

Hantering

Skötsel av dina hörapparater	24
MultiTool för hantering av batterier och för rengöring	26
Filterbyte	28

Ersätt ProWax miniFit-filter (icke-trådlösa IIC & CIC V2 75)	29
Byta ProWax-filter (alla apparater utom icke-trådlösa IIC & CIC)	30
Byta T-Cap-filter (hörapparater med 10-batterier)	31
Byta O-Cap-filter (hörapparater med 312- och 13-batterier)	32
Sätta in hörapparaterna	33
Ta ut hörapparaterna	34

Alternativ

Tillvalsfunktioner och tillbehör	36
"Tyst läge" (tillval)	37
Byta program (tillval)	38
Justera volym med tryckknapp (tillval)	40
Justera volym med volymkontroll (tillval)	41
Trådlösa tillbehör (tillval)	43
Övriga alternativ (tillval)	44


Innehållsförteckning 2/2

Varningar	
Varningar	46
Tillbehör	
Felsökningsguide	52
Vatten- och dammskyddad (IP68)	54
Villkor för användning	55
Garantibevis	56
Internationell garanti	57
Teknisk information	58

Identifiera modell

Det finns olika modeller och storlekar för i-örat-hörapparater. Se till att identifiera din modell. Det gör det lättare för dig att finna de delar i bruksanvisningen som är relevanta för dig.

☐ **Batteristorlek 10 (IIC, CIC, MIC, ITC, HS)**

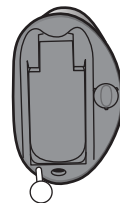


IIC visas

☐ **Batteristorlek 312 (ITC, HS, FS)**



ITC visas


☐ **Batteristorlek 13 (ITC, HS, FS)**

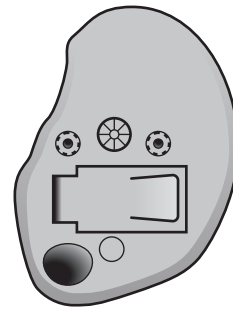


HS visas

Alla modeller finns med olika utformning och konfiguration.

Batteristorlek 10 (CIC visas)


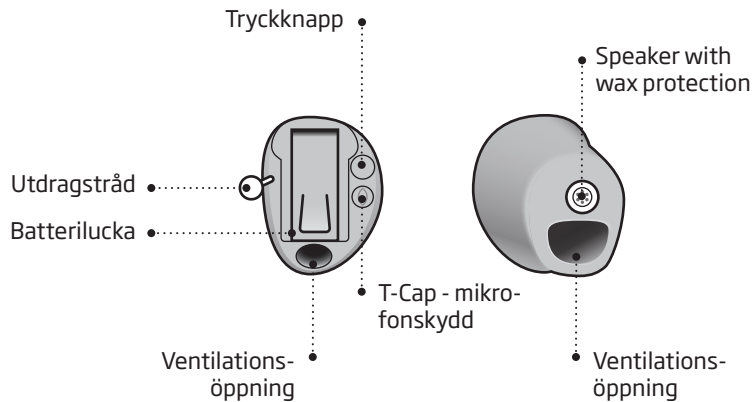


Vad den gör

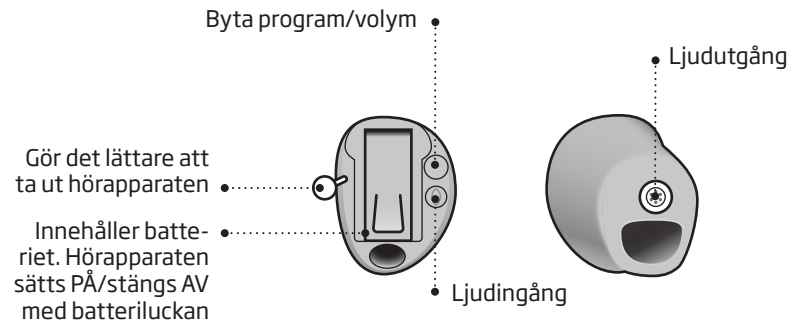



Delarna kan ha olika placering på olika hörapparater.

Batteristorlek 312 (ITC visas)

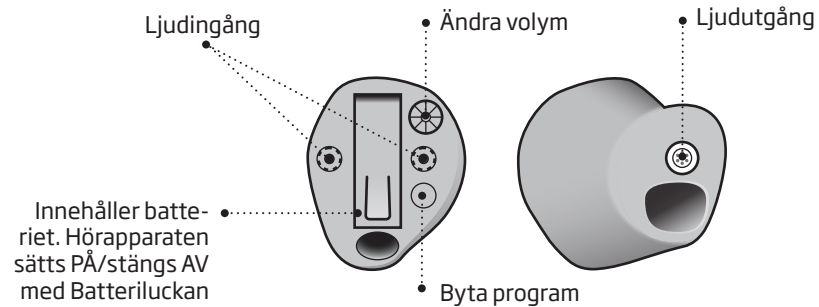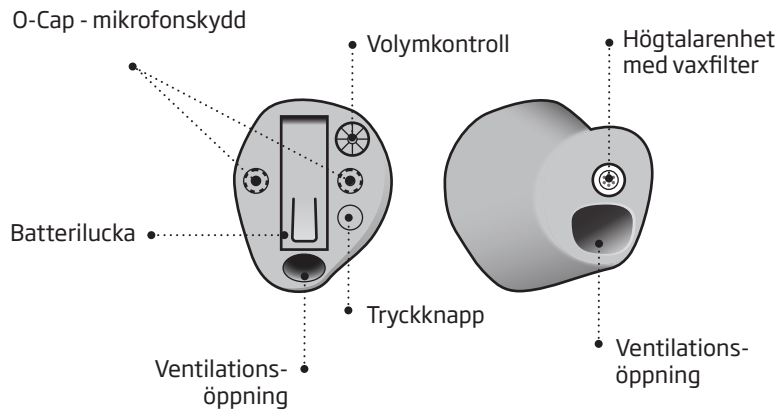

Delarna kan ha olika placering på olika hörapparater.

Batteristorlek 13 (fullskal visas)

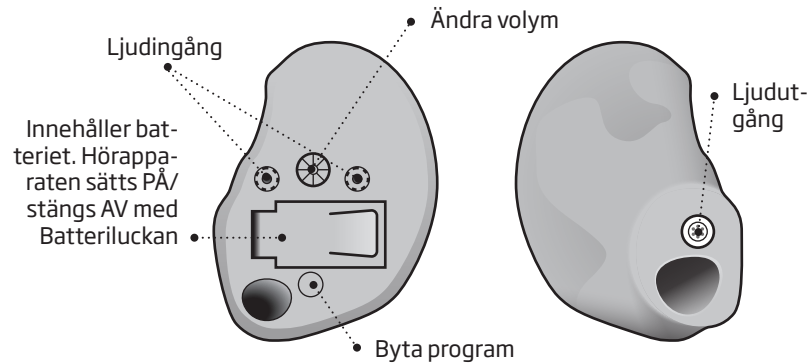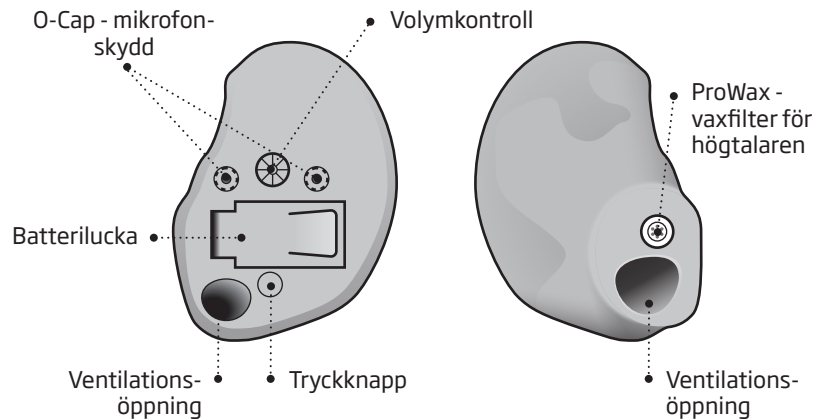

Delarna kan ha olika placering på olika hörapparater.

Identifiera höger och vänster hörapparat

Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara utformade och programmerade på olika sätt.



Ett **BLÅTT** skal, text eller punkt identifierar VÄNSTER hörapparat.


Ett **RÖTT** skal, text eller punkt identifierar HÖGER hörapparat.

Batteri

Din hörapparat är en känslig elektronisk enhet som kräver speciella batterier. Du sätter PÅ hörapparaten genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det. Se hur du gör i avsnittet "Byta batteri".

Batterilucka

I de första sidorna i sektionen
Om kan du se dina hörappara-
ters batteristorlek

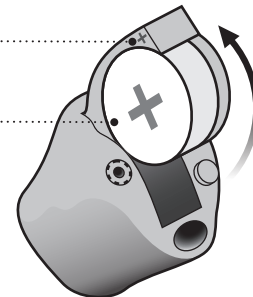


Dra ut för att öppna

Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna

Batteriluckan används även för att sätta PÅ och stänga AV en hörapparat. Du sparar på batteriet genom att kontrollera att hörapparaterna är avstängda när du inte använder dem.

Sätta PÅ
Stäng
batteriluckan
med batteriet
på plats.

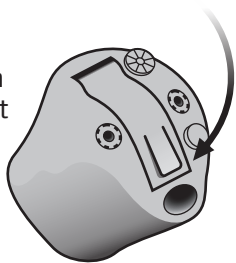

Stänga AV
Öppna
batteriluckan.



Dags att byta batteri

När det har blivit dags att byta batteri hör du två pipsignaler med jämna mellanrum, tills batteriet är tomt.



Två pipsignaler
= Batteriet är nästan tomt



Fyra pipsignaler
= Batteriet är tomt

Tips för batteriskötsel

För att vara säker på att hörapparaten alltid fungerar, ta alltid extra batterier med dig eller byt batterier innan du går hemifrån.


Byta ut batteriet

1. Ta bort



Öppna batteriluckan helt. Ta ut det gamla batteriet.

2. Ta fram

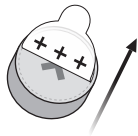

Ta fram ett nytt batteri och avlägsna klisterdekalen från +sidan.

3. Sätt in



Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Kontrollera att +sidan är vänd mot +tecknet på batteriluckan.

4. Stäng



Stäng batteriluckan. Hörapparatens ska nu spela en melodi. Håll hörapparatens nära örat för att höra melodin.

Tips



Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta ut och sätta i batterier.


Verktyget tillhandahålls av din audionom.

Skötsel av dina hörapparater


När du hanterar hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

Rengöring av hörapparater

Borsta försiktigt bort skräp från mikrofonöppningarna med en ren borste. Borsta ytan varsamt.

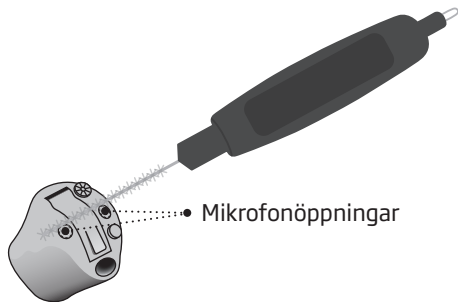

Rengör ventilationsöppningen genom att trycka in borsten genom hålet samtidigt som du vrider den en aning.

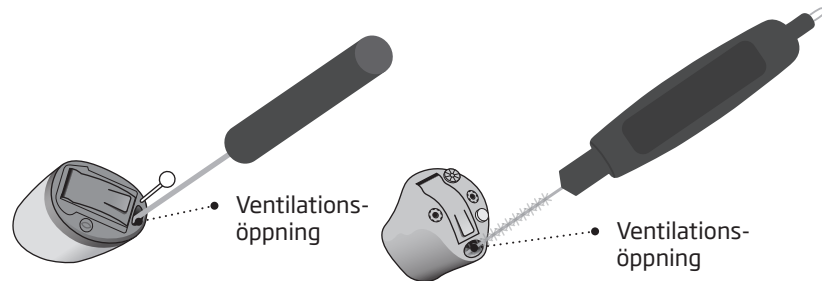


VIKTIGT!

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra hörapparater. Hörapparater får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

MultiTool för hantering av batterier och för rengöring


MultiTool-verktyget innehåller en magnet som gör det lättare att byta batteri i hörapparaten. Det innehåller även en borste och en trådgla för rengöring och vaxborttagning. Om du behöver en ny MultiTool, kontakta din audionom.

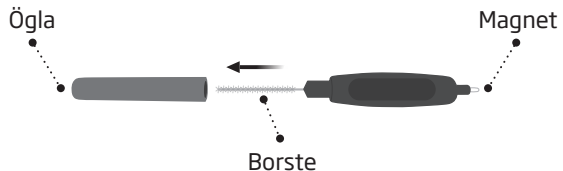

OBS!

MultiTool har en inbyggd magnet. Se till att hålla MultiTool på minst 30 cm avstånd från kreditkort och andra magnetkänsliga enheter

Om ventilationsöppningen är mycket liten kan du behöva ett specialverktyg för rengöring. Tala med din audionom.

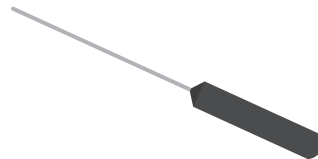

Filterbyte

Om du tycker att ljudkvaliteten försämras, är det dags att byta filter.

Se följande sidor för anvisningar för hur du byter filter.


VIKTIGT!

Använd alltid det vaxfilter som är avsett för dina hörapparater.

Om du känner dig osäker gällande användning eller byte av vaxfilter, tala med din audionom.


□ Byt ProWax miniFit-filter (icke-trådlösa IIC & CIC V2 75)

1. Verktyg

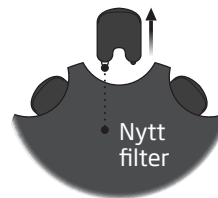


Ta ut verktyget ur förpackningen. Verktyget har två stift, ett tomt stift för borttagning och ett stift med det nya ProWax miniFit-filtret.

2. Ta bort

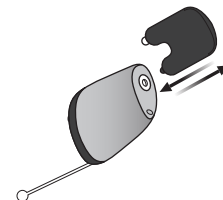

Tryck in det tomma stiftet i ProWax miniFit-filtret i hörapparatens och dra ut det.


3. Insättning

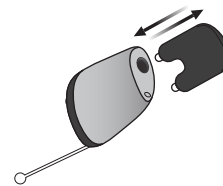

Sätt in det nya ProWax miniFit-filtret med det andra stiftet. Ta bort verktyget och kassera det.


□ Byta ProWax-filter (alla apparater utom icke-trådlösa IIC & CIC)

1. Verktyg

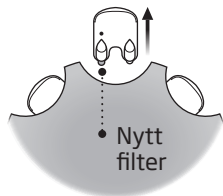


Ta ut verktyget ur förpackningen. Verktuget har två stift, ett tomt för borttagning och ett med det nya ProWax-filtret.

2. Ta bort

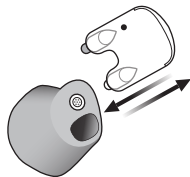

Tryck in det tomma stiftet i ProWax-filtret i hörapparaten och dra ut det.


3. Sätt in

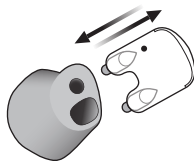

Sätt in det nya ProWax-filtret med det andra stiftet, lossa verktyget och kassera det.


□ Byta T-Cap-filter (hörapparater med 10-batterier)

1. Verktyg

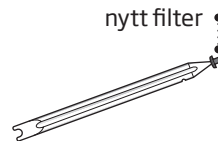


Ta ut verktyget ur förpackningen. Verktuget har två ändar, en för borttagning och en med det nya T-Cap-filtret.

2. Ta bort

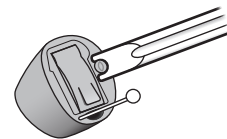

Tryck verktygsgaffeln under den övre kanten på det använda T-Cap-filtret och lyft ut det.


3. Sätt in

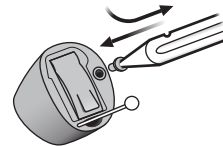

Sätt in det nya T-Cap-filtret och lossa verktyget genom att vrida det lätt. Kassera verktyget efter användning.


□ **Byta O-Cap-filter** (hörapparater med 312- och 13-batterier)

1. Verktyg

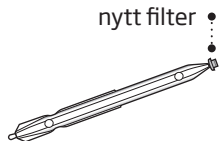


Ta ut verktyget ur förpackningen. Verktöget har två ändar, en för borttagning och en med det nya O-Cap-filtret.

2. Ta bort

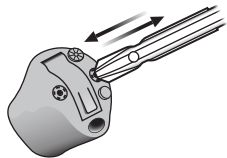

Tryck in verktygets spetsiga ände i det gamla O-Cap-filtret och dra ut det.

3. Sätt in

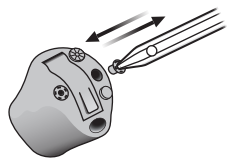

Sätt in det nya O-Cap-filtret med den andra verktygsändan, lossa verktyget och kassera det.


Sätta in hörapparaterna

Steg 1



Håll hörapparaten med färgpricken vänd uppåt. Placera spetsen av hörapparaten i din hörselgång.

Steg 2

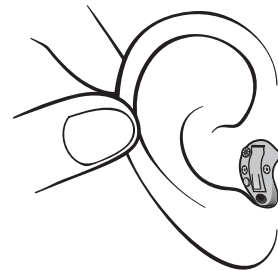

Dra försiktigt örat utåt och för in hörapparaten i hörselgången. Vrid den en aning vid behov. Följ hörselgångens naturliga kontur.

Ta ut hörapparaterna

Fatta hörapparatens utdragstråd (om sådan finns).
Dra försiktigt ut hörapparaten ur hörselgången.

Om utdragstråd saknas, kan du ta ut hörapparaten genom att dra i dess kant.

VIKTIGT!

Använd INTE batterifacket som handtag för att sätta in eller ta ut hörapparaten. Batterifacket är inte avsedd för detta.

Tillvalsfunktioner och tillbehör


De funktioner och tillbehör som beskrivs på de följande sidorna är tillval. Kontakta din audionom för att få veta hur dina hörapparater är programmerade.

Om du upplever att det är besvärligt i vissa lyssningssituationer, kan kanske ett specialprogram underlätta. Detta programmeras av din audionom.

Skriv ner de lyssningssituationer som du tycker är besvärliga.

☐ "Tyst läge" (tillval)

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaterna.

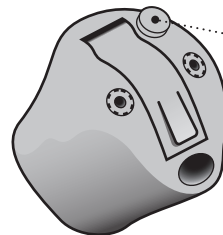


- Håll in tryckknappen (tills mikrofonen stängs av) för att aktivera "tyst läge". Tryck snabbt in knappen en gång till för att avaktivera "tyst läge".

VIKTIGT!

Använd inte denna funktion för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström.

☐ Byta program (tillval)

Dina hörapparater kan programmeras med upp till fyra olika program. Detta programmeras av din audionom.

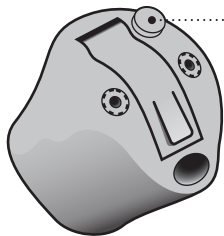

Tryck på knappen för att byta program. Gör ett kort tryck om tryckknappen används endast för programbyte, och långt tryck om den även används som volymkontroll.

Om du har två synkroniserade hörapparater (båda hörapparater reagerar när du trycker på någon av tryckknapparna) går HÖGER hörapparat framåt från exempelvis program 1 till 2 och VÄNSTER hörapparat bakåt från exempelvis program 4 till 3.

Om dina hörapparater fungerar oberoende måste använda tryckknappen på respektive hörapparat.


Fylls i av din audionom

Program	Ljud du hör efter aktivering	Lämpliga användningstillfällen
1	"1 pipsignal"	
2	"2 pipsignaler"	
3	"3 pipsignaler"	
4	"4 pipsignaler"	

Programbyte:	
☐ Oberoende	☐ Synkroniserad
☐ VÄNSTER	☐ HÖGER
☐ Kort tryck	☐ Långt tryck

☐ Justera volym med tryckknapp (tillval)

Du kan justera volymen med tryckknappen. När du höjer eller sänker volymen hörs vanligtvis ett klickljud.

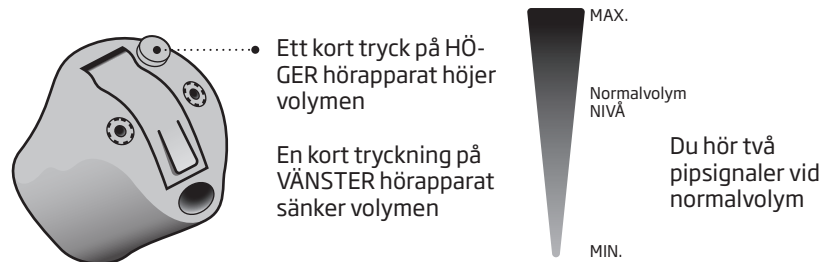


Fylls i av din audionom

Volymjustering	☐ VÄNSTER	☐ HÖGER
----------------	----------------------------------	--------------------------------

☐ Justera volym med volymkontroll (tillval)


Du kan justera volymen med volymkontrollen. När du höjer eller sänker volymen hörs vanligtvis ett klickljud.

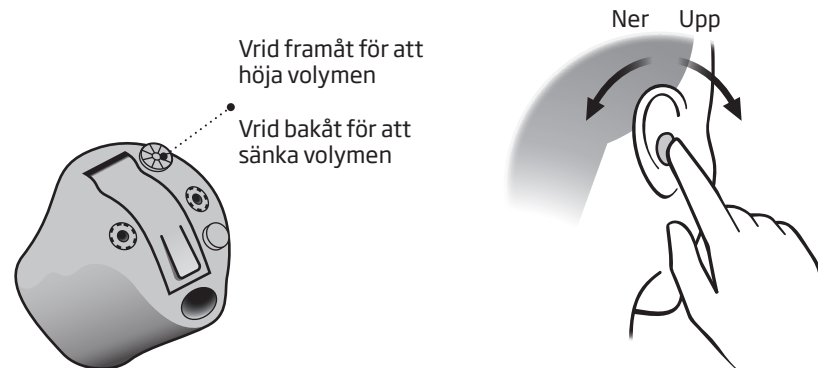


Snabbåterställning

Om du vill återgå till de hörapparaternas standardinställningar som din audionom programmerat, behöver du bara öppna och stänga batteriluckorna.

Öppen

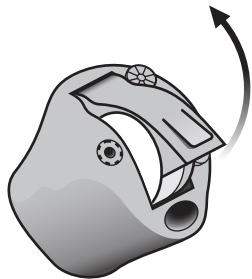

Stängd

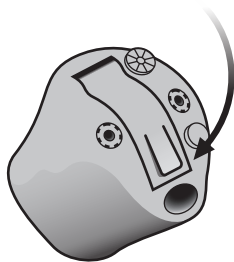

☐ Trådlösa tillbehör (tillval)

Det finns ett stort urval trådlösa tillbehör till dina hörapparater, som kan underlätta kommunikationen din vardag.

ConnectLine

ConnectLine är en serie produkter som ger dig tillgång till ljudet från t.ex. TV, mobiltelefon, dator eller extern mikrofon till dina hörapparater.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen erbjuder möjligheten att byta program, justera volymen eller stänga av ljudet på hörapparaten.

För mer information, kontakta din audionom eller besök www.oticon.global

☐ **Övriga alternativ** (tillval)



Telespole

Telespolen hjälper dig att höra bättre när du använder en telefon med en inbyggd teleslinga eller i lokaler med teleslinga, t.ex. teatrar och föreläsningssalar. Denna symbol eller en liknande symbol visas där en teleslinga är installerad.



Autotelefon

är ett program som aktiveras automatiskt om din telefon har en inbyggd teleslinga (se ovan). En magnet måste placeras bredvid telefonens ljudutgång.

För mer information, kontakta din audionom.

Varningar

Bekanta dig med följande allmänna varningar innan du använder hörapparaten, för din egen personliga säkerhet och för att försäkra dig om korrekt användning.

Observera att en hörapparat inte återställer hörseln och inte förebygger eller förbättrar en hörselnedsättning som har organiska orsaker. Notera även att sporadisk användning av hörapparaten i de flesta fall medför att en användare inte får ut mesta möjliga nytta av den.

Konsultera din audionom om du upplever oväntade effekter eller händelser med din hörapparat.

Använda hörapparaterna

- Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och anpassats av en audionom. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.
- Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom ett felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.

Kvävningsrisk & risk för att svälja batterier

- Hörapparater, deras tillbehör samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och alla som kan få för sig att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

- Det har hänt att batterier har förväxlats med piller. Kontrollera därför din medicin noga innan du sväljer några piller.
- De flesta hörapparater kan förses med barnsäkra batterifack. Detta rekommenderas starkt för små barn och personer med nedsatt kognitiv funktion.
- Barn yngre än 36 månader ska alltid ha barnsäkra batterifack. Denna lösning finns för BTE-, miniBTE-, RITE- och miniRITE-hörapparater.

Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Batterianvändning

- Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.
- Försök aldrig ladda upp batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

Varningar

Bristfällig funktion

- Tänk på att dina hörapparater plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet tagit slut och behöver bytas eller att ljudslangen är blockerad av fukt eller vax.

Aktiva implantat

- Iakttag försiktighet om du har aktiva implantat. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner.
- Autophone-magneten och MultiTool-verktyget (som har en inbyggd magnet) ska hållas på ett avstånd av mer än 30 cm från implantatet. De ska t.ex. inte bäras i en bröstficka.

- Om du har ett aktivt hjärtimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

Röntgen, datortomografi och elektroterapi

- Använd inte dina hörapparater vid exempelvis röntgen, datortomografi, elektroterapi eller medicinska ingrepp, eftersom hörapparaterna kan skadas av denna typ av utrustning.

Undvik värme och kemikalier

- Dina hörapparater får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.
- Du ska heller inte torka dina hörapparater i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.
- Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter hörapparaterna på plats igen.

Varningar

Power-hörapparater

- Extra varsamhet bör iakttas vid anpassning och användning av hörapparater för vilka max. ljudstyrka överstiger 132 dB SPL (IEC 711) eftersom de kan skada en användares återstående hörsel.

För information om huruvida din hörapparat är en Power-hörapparat, se baksidan av denna broschyr.

Eventuella biverkningar

- Hörapparater, individuella insatser och domer kan orsaka ökad vaxproduktion.
- Hörapparaternas normalt icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan ovanlig åkomma.

Kontakta en läkare vid eventuella problem.

Störningar

- Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Trots detta kan störningar uppstå mellan hörapparaterna och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, andra personers elektroniska utrustning eller larmsystem i butiker). Om detta inträffar, öka avståndet mellan dina hörapparater och den störande enheten.

Felsökningsguide

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteriet slut	Byt ut batteriet
	Igentäppt ljudutgång	Rengör ljudutgången eller byt ProWax - filtret
	Igentäppt mikrofonöppning	Rengör mikrofonöppning eller byt filter (T-Cap eller O-Cap)
Tillfälligt eller svagt ljud	Igentäppt ljudutgång	Rengör ljudutgången eller byt ProWax - filtret
	Fukt	Torka av batteriet och hörapparaten med en torr trasa
	Batteriet slut	Byt ut batteriet
Tjutande ljud	Hörapparaten felplacerad	Sätt in hörapparaten igen
	Vax i hörselgången	Låt läkare undersöka örat

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Vatten- och dammskyddad (IP68)

Din hörapparat är vattentät och dammskyddad vilket betyder att den är utformad för användning i alla typer av vardagssituationer. Därför behöver du inte vara orolig för att svettas eller att vara ute i regn. Om din hörapparat skulle hamna i vatten och sluta fungera, följ dessa råd:

1. Torka försiktigt av allt vatten
2. Öppna batterifacket, ta ur batteriet och torka försiktigt bort allt vatten från batterifacket
3. Låt hörapparaten torka med batterifacket öppet i c:a 30 minuter
4. Sätt i ett nytt batteri

VIKTIG INFORMATION

Bär inte hörapparaten när du duschar eller deltar i vattenaktiviteter. Sänk inte ner hörapparaten i vatten eller annan vätska.

Användarvillkor

Driftförhållanden	Temperatur: -25°C till +60°C Relativ luftfuktighet: 5% till 93%, utan kondens
Förvarings- och transportförhållanden	Temperatur och luftfuktighet bör inte överskrida följande gränser under någon längre tid vid transport och förvaring: Temperatur: +1°C till +40°C Relativ luftfuktighet: 5% till 93%, utan kondens

Garantibevis

Köpare: _____

Hörselklinik/audionom: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell vänster: _____ Serienummer: _____

Modell höger: _____ Serienummer: _____

Batteristorlek: _____

Internationell garanti

Din hörapparat har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, vaxfilter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörselklinik kan

ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Kontakta din audionom vid behov. Han eller hon kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

Teknisk information

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -42 dBμA/m vid 10 m.

Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse är strålningen från hörapparaterna lägre än den önskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. Hörapparaterna är utformade för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av det begränsade utrymmet på hörapparaterna återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

De trådlösa IIC-, CIC- och MIC-hörapparaterna innehåller en modul med:

FCC ID: U28FU2CICWL
IC: 1350B-FU2CICWL

De trådlösa ITC-, HS- och FS-hörapparaterna innehåller en modul med:

FCC ID: U28FU2ITE
IC: 1350B-FU2ITE

Enheten efterföljer Del 15 i FCC Rules och Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Mer information: www.oticon.se

Användande har följande två förbehåll:

1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Oticon deklarerar att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EU.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

CE 0543



Avfall från all elektro-
nisk utrustning ska
hanteras enligt lokala
föreskrifter.



E2831

IP68

Power-hörapparat ☐ Ja ☐ Nej

Översikt för hörapparaternas inställningar

Vänster			Höger	
☐ Ja	☐ Nej	Volymkontroll	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Programbyte	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Tyst läge	☐ Ja	☐ Nej
Volymkontroll				
☐ På	☐ Av	Pip vid min-/maxvolym	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Klick vid volymjustering	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Pip vid normal volym	☐ På	☐ Av
Indikeringar för batteri				
☐ På	☐ Av	Varning för svagt batteri	☐ På	☐ Av

Beskrivning av symboler som används i detta häfte

	Varningar Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
	Tillverkare Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, som definierat i EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
	CE-märkning Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. De fyra siffrorna anger identifikationsnummer på det anmälda organet.
	Elavfall (WEEE) Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala föreskrifter. Hörapparat användare kan även returnera elektronisk avfall till sin audionom för bortskaffande. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	Efterlevnad av regler och föreskrifter (RCM-märkning) Enheter uppfyller kraven avseende elsäkerhet, elektromagnetisk strålning och radiofrekvenser för enheter som säljs i Australien och Nya Zeeland.
	IP-kod Anger skyddsklass avseende skadlig inträngning av vatten och partiklar i enlighet med EN 60529:1991/A1:2002. IP6X indikerar sammantaget dammskydd. IPX8 indikerar skyddet mot effekterna av kontinuerlig nedsänkning i vatten.

1730045E / 2019.01.09

Beskrivning av symboler som används på förpackningens regelefterlevnadsdekal

	Skyddas från fukt Indikerar en medicinsk enhet som måste skyddas från fukt.
	Försiktighetssymbol Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsuppmärksamheter.
	Katalognummer Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicinska enheten.
	Serienummer Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av en specifik medicinsk enhet.

1730045E / 2019.01.09



oticon
PEOPLE FIRST

1730045E / 2019.01.09