

## Bruksanvisning

Oticon Amigo R12G2




oticon  
PEOPLE FIRST

188431SE / 2018.07.04



oticon  
PEOPLE FIRST

## Funktioner

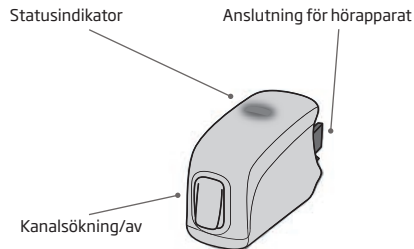

## Förbereda FM-systemet


För att installera systemet behöver du en FM-sändare, din FM-mottagare och en DAI-kompatibel hörapparat. Anslut din FM-mottagare till hörapparaten (se bild 1 och 2) och slå på FM-sändaren för att aktivera FM-systemet. FM-mottagaren har inget batteri. Den drar en liten mängd ström från hörapparatsens batteri.

### VIKTIG INFORMATION

Se sändarens bruksanvisning för mer information om funktionerna i just ditt FM-system.

## Ansluta FM-mottagaren till hörapparaten

1. Öppna batterifacket på hörapparaten och sätt i ett nytt batteri. För in FM-mottagaren (den behöver inte tvingas in)
2. Stäng batterifacket noga.

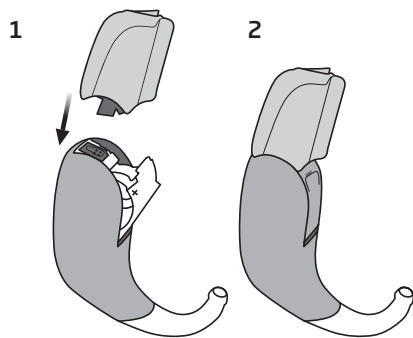

### VIKTIG INFORMATION

Byt aldrig hörapparatsens batteri eller anslut FM-mottagaren till hörapparaten i närvaro av spädbarn, småbarn eller personer med kognitivt funktionshinder.

Hörapparaten kan utrustas med ett petsäkert batterifack (tillval). Kontakta din audionom för mer information.

## Användning med hörapparat

När FM-mottagaren är ansluten kommer hörapparaten automatiskt att detektera FM-mottagaren och lägga till två extra program. Hörapparatsens standardprogram är programmet för FM + hörapparatsens mikrofon. Om du behöver ändra inställningen för att lyssna enbart på FM kan du byta till nästa program med hörapparatsens tryckknapp.

När FM-mottagaren sitter på plats kan du växla fram och tillbaka mellan standardprogrammet och de båda FM-programmen med hörapparatsens tryckknapp.

När hörapparaterna Oticon Opn och Siya är inställda på ett FM-program kan flygläge aktiveras för att säkerställa en FM-signal av hög kvalitet erhålls.

### VIKTIG INFORMATION

Se bruksanvisningen till din hörapparat för mer information om funktionerna i just din hörapparat.

## LED-indikator

En LED-indikator finns på din FM-mottagare. När den lyser med ett blinkande sken bekräftar den att:

- Hörapparatsens batteri fungerar
- FM-mottagaren är PÅ
- FM-mottagaren tar emot en FM-signal

## Programmera LED-indikator

Använd en Amigo T30/T31 FM-sändare för att programmera LED-indikatorn på två möjliga sätt:

PÅ: LED-indikator blinkar om en FM-signal detekteras.

AV: LED-indikator är avstängt även om en FM-signal detekteras.

## Knapp för kanalsökning och avstängning

Med FM-mottagarens kanalsökningsknapp kan du byta kanal och stänga av mottagaren.

- Ett kort tryck startar en sökning i den förinställda kanallistan.
- Ett långt tryck (över två sekunder) stänger av FM-mottagaren. En kort melodi spelas för att meddela att FM-mottagaren stängs av.

FM-mottagaren söker bara bland kanalerna som finns i kanallistan. Om ingen kanal tar emot någon FM-signal återgår mottagaren till den ursprungliga kanalen.

Om fler än en kanal i kanallistan tar emot en stark FM-signal kommer mottagaren att låsa fast vid den första i kanallistan. Om du önskar en annan kanal trycker du bara på knappen igen.

## Kanalhantering

Din FM-mottagare innehåller en förinställd kanallista, där samtliga kanaler är i funktion. För att anpassa kanallistan kan du använda Amigo T30/T31. Dessa enheter kan även användas till trådlös kanalsynkronisering med din FM-mottagare.

FM-mottagaren kan programmeras till att aktiveras i den senast använda kanalen eller i en förinställd kanal. Om du inte använder Amigo T30/T31 kan du byta kanal med hjälp av kanalsökningsknappen på din FM-mottagare.

## Viloläge

Din FM-mottagare har en funktion för viloläge. När FM-signalen försvinner i mer än 7 sekunder övergår FM-mottagaren automatiskt till viloläge för att spara batteri. En inbyggd signalsensor detekterar eventuella FM-signaler. När signalen återvänder aktiveras din FM-mottagare igen och LED-indikatorn tänds. Skulle signalen vara borta i mer än 90 minuter stängs FM-mottagaren av automatiskt. Därefter måste den slås på manuellt.

I viloläge kommer hörapparaten att inaktivera de båda FM-programmen, men om din FM-mottagare detekterar en FM-signal blir de automatiskt tillagda igen.

## Amigo T30/T31

Om du använder en FM-sändare av modell Amigo T30/T31 tillsammans med din FM-mottagare har du tillgång till följande funktioner:

- Flerkanal (kan programmeras trådlöst med en Amigo T30/T31)
- LED-indikator
- Manuell kanalknapp
- Tilldela till ett namn till mottagaren
- Tilldela till ett öra till mottagaren
- Enbart FM-förstärkning
- FM+M-förstärkning
- Bekräftande ljudsignal

## Felsökningsguide

### Problem

Inget ljud/ingen FM-mottagning.

### Lösning

- Kontrollera att hörapparatsens batteri är ordentligt insatt.
- Kontrollera att FM-mottagaren är påslagen och korrekt ansluten.
- Kontrollera att sändaren är påslagen.
- Tryck på kanalsökningsknappen igen.

### Problem

FM-mottagaren kan inte synkroniseras.

### Lösning

Synkronisering sker trådlöst och om FM-mottagaren inte bekräftar (LED-indikatorn blinkar tre gånger) ska du försöka flytta sändaren närmare, längre bort eller en aning åt sidan. Tryck sedan på sändarens SYNC-knapp igen.

För mer hjälp ber vi dig kontakta din audionom.

## Rengöring

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra FM-mottagaren.

### VIKTIG INFORMATION

FM-mottagaren får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Bär inte FM-mottagaren när du t.ex. duschar eller utövar vattenaktiviteter.

## Hanteringsanvisning

Driftsförhållanden	Temperatur: +1 till +40 °C Relativ luftfuktighet: 5 till 93 <span> </span> %, utan kondens
Förvarings- och transport-förhållanden	Temperatur och luftfuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring:  Temperatur: -25 till +60 °C Relativ luftfuktighet: 5 till 93 <span> </span> %, utan kondens

## Varningar

För personlig säkerhet och korrekt användning ska du läsa de allmänna varningstexterna och hela innehållet i denna bruksanvisning innan du använder FM-mottagaren. Rådfråga din audionom om din FM-mottagare inte fungerar som förväntat.

### Kvavningsrisk och risk för att svälja batterier eller andra smådelar

FM-mottagaren ska förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som kan tänkas svälja den eller på annat sätt skada sig själva med den.

Om en FM-mottagare har svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

### Användning med hörapparater

Använd FM-mottagare enbart med din egen hörapparat. Kontakta din audionom för närmare information.

### Störningar

FM-mottagaren har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Störningar kan dock uppstå mellan FM-mottagaren och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstödlarm och andra trådlösa enheter). Om detta inträffar, öka avståndet mellan FM-mottagaren och den störande enheten.

### Värme och kemikalier

FM-mottagaren får aldrig utsättas för hög värme, t.ex. i en bil som står parkerad i solen.

FM-mottagaren får inte heller torkas i mikrovågsugn eller andra ugnar.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada FM-mottagaren. Avlägsna alltid FM-mottagaren innan du använder en sådan produkt och låt produkten torka in innan du använder FM-mottagaren igen.

### Röntgen/CT/MR/PET-scanning, elektroterapi och kirurgi

Avlägsna FM-mottagaren före röntgen/CT/MR/PET-scanning, elektroterapi, kirurgi osv. eftersom den kan skadas av starka elektromagnetiska fält.

### Aktivt implantat

lakttta försiktighet om du har aktiva implantat.

Du ska följa riktlinjerna som tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakes lämnar för användning tillsammans med mobiltelefoner och magneter, eftersom hörapparater och dess tillbehör i likhet med mobiltelefoner innehåller radiosändare.

Om du har ett aktivt hjärnimplantat ska du kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

### Eventuella biverkningar

Materialen i FM-mottagaren är normalt inte allergiframkallande, men kan i sällsynta fall orsaka hudirritation eller annan biverkan.

Kontakta läkare vid eventuella problem.

### Användning i trafiken

Användning av FM-mottagaren kan distrahera dig. Var uppmärksam på omgivningen när du använder FM-mottagaren.

Följ den nationella lagstiftningen gällande användning av kommunikationsenheter i trafik.

## Internationell garanti

Din FM-mottagare har en internationell garanti som gäller i 12 månader från leveransdatumet. Denna garanti täcker tillverknings- och materialfel i själva enheten. Problem som uppkommit p.g.a. felaktig/opassande användning eller hantering, överanvändning, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, eller p.g.a. att enheten har utsatts för frätande kemikalier, skada p.g.a. att främmande föremål trängt in i den eller felaktiga justeringar, täcks INTE av garantin och kan innebära att garantin upphör att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din audionom kan ha lämnat en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din audionom för mer information.

### Service

Ta vid behov med dig FM-mottagaren till din audionom, som kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

## Teknisk information

FM-mottagaren innehåller en radiosändare som använder kortvågsteknik med magnetisk induktion vid 3,714 MHz.

Sändarens magnetfält är mycket svagt och ligger alltid under 15 nW (vanligtvis under -15 dBuA/m på 10 meters avstånd).

FM-mottagaren följer internationella standarder gällande radiosändare, elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

På grund av det begränsade utrymmet på FM-mottagaren återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

Ytterligare information finns i produktdatabladet på [www.oticon.global](http://www.oticon.global).






Tillverkaren deklarerar att FM-mottagaren överensstämmer med standardkraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EC.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från tillverkaren.

	Tillverkad av: Oticon A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Danmark <a href="http://www.oticon.global">www.oticon.global</a> 2018
	
	Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
	



	<b>Varningar</b> Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan produkten används.
	<b>Tillverkare</b> Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, enligt definition i EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
	<b>CE-märkning</b> Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
	<b>Elavfall (WEEE)</b> Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Som hörapparat användare kan du även returnera elektroniskt avfall till din audionom för kassering. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	<b>Överensstämmelsemärkning (RCM)</b> Enheten överensstämmer med kraven på elsäkerhet, EMC och radiospektrum för produkter som tillhandahålls i Australien och Nya Zeeland.

	
	<b>Ska hållas torr</b> Indikerar en medicinteknisk produkt som måste skyddas från fukt.
	<b>Försiktighet</b> Läs igenom bruksanvisningens varningar och försiktighetsuppmärningar.
	<b>Katalognummer</b> Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicintekniska produkten.
	<b>Serienummer</b> Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av den medicintekniska produkten.