

Snabbguide för Oticon Companion app på Apple Watch

Så här installerar, parkopplar och hanterar du Oticon Companion med en Apple Watch.

Med Apple Watch kan du justera volym, byta program, aktivera eller inaktivera ljudet i hörapparaterna, aktivera eller inaktivera Speech Booster, stänga av fjärrmikrofonen och kontrollera batterinivån i hörapparaterna. Specialfunktioner som kallas komplikationer kan också aktiveras för att snabbt komma åt Oticon Companion från urtavlan.

Komma igång

Innan du använder Oticon Companion på Apple Watch måste du installera appen på din iPhone och parkoppla hörapparaterna med din iPhone.

Systemkrav

För att använda Oticon Companion med Apple Watch, behöver du följande:

- Apple Watch Series 4 eller senare
- WatchOS 8 eller senare



Skanna QR-koden
för att ladda ner
Oticon Companion
från App Store.



Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod och Apple Watch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Installera Oticon Companion på din Apple Watch


Så här kommer du igång med Oticon Companion på din Apple Watch.



Ladda ner **Oticon Companion app** från App Store på din iPhone och parkoppla dina hörapparater med din iPhone.



Öppna **Watch-appen** på din iPhone.

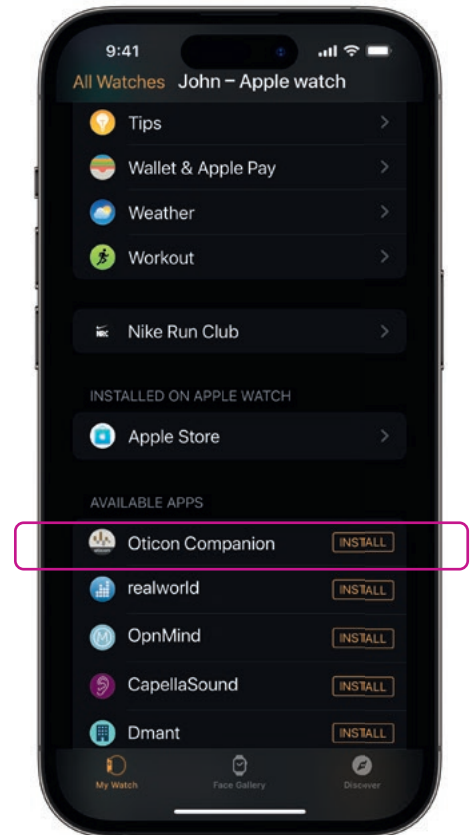

Rulla ner till **TILLGÄNGLIGA APPAR** och klicka på **INSTALLERA** till höger om Oticon Companion-ikonen. Appen kommer nu att installeras på din Apple Watch.

Använda huvudfunktionerna i Oticon Companion på din Apple Watch

Tryck på ikonen **Oticon Companion** på din Apple Watch för att öppna appen.



Kontrollera batterinivå

På Oticon Companions allmänna skärm **sveper du höger** för att kontrollera batterinivån i dina hörapparater.



Allmänt

Oticon Companions allmänna skärm används för att byta program, justera volym och inaktivera ljudet i dina hörapparater.



Speech Booster

På Oticon Companions allmänna skärm **sveper du vänster** för att aktivera eller inaktivera Speech Booster eller stänga av fjärrmikrofonen.

Tryck på programikonen (**P1**) för att öppna Programskärmen.


Rulla genom programmen och **tryck på det program** du vill använda.

Du kan även rulla genom programmen genom att **vrida på Digital Crown**.




Installation av Apple Watch komplikationer

För att snabbt komma åt appen från din urtavla kan du ställa in Apple Watch komplikationer*. Det är en användbar Apple Watch-funktion som fungerar som en genväg på urtavlan.

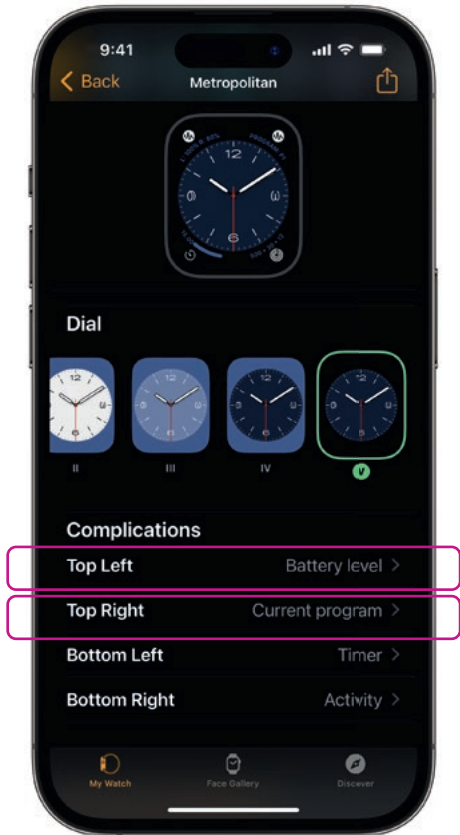

Välj urtavlan från My Faces och rulla ner till Komplikationer. Observera att inte alla Apple Watch-urtavlor tillåter att komplikationer läggs till.

Tryck på **Topp vänster** och välj genväg.

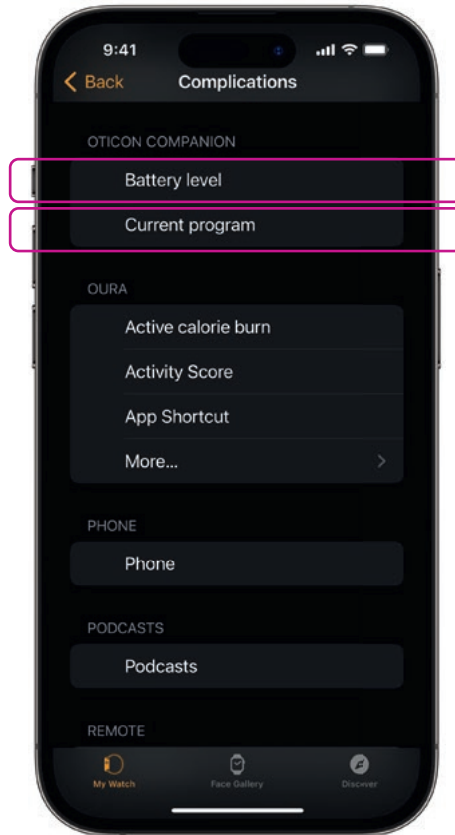

Bläddra igenom komplikationer och välj **Batterinivå** under Oticon Companion.

Upprepa processen för **Topp höger** och välj **Aktuellt program**.



Komplikationer visas nu på din urtavlas **övre hörn**.

* Om komplikationer är tillgängliga på vald urtavla.