

**Guide för
ConnectLine App
för iPhone**



App version 1.0.2

oticon
PEOPLE FIRST

Inledning

Detta är en guide för ConnectLine App för iPhone®, som beskriver följande.

- Hur du kopplar ihop Streamer med en iPhone.
- Hur du laddar ner ConnectLine App från App Store.
- Funktioner i iPhone vid användning av Appen.
- Översikt av funktioner som styrs via ConnectLine App
- Felsökning och åtgärder

Användningsområden

Oticon ConnectLine App är en fjärrkontroll som gör det möjligt för användaren att justera volymen och byta program i sina hörapparater. Oticon ConnectLine App gör det även möjligt att trådlöst överföra ljud till önskad volym från valfri enhet ansluten till Streamer Pro 1.2 App.

Streamer Pro 1.2 är kompatibel med iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S och iPhone 4.


Apple, Apples logotyp och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.



Innehåll

- 4 | Ihopkoppling
- 6 | Streamer som standardenhet
- 8 | Installera Appen
- 9 | Översikt ConnectLine App
- 10 | Program
- 12 | Besvara samtal
- 14 | Ringa samtal
- 16 | Musik
- 18 | TV/MIK/LJUDSLADD
- 20 | FM/Telespole
- 22 | Anslut extra mobiltelefon
- 23 | Fast telefon
- 24 | Inställningar
- 32 | Felsökning och åtgärder

Koppla ihop iPhone och Streamer Pro 1.2 App

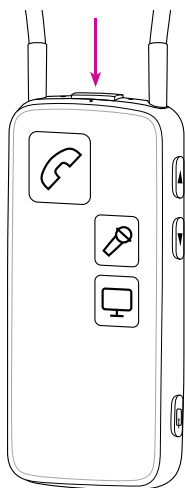


Förbered Streamer

Tryck på På/Av knappen upptill på Streamer tills statusindikatorn blinkar blått.




Inställningar

Hitta inställningsikonen på iPhone. Klicka på den.

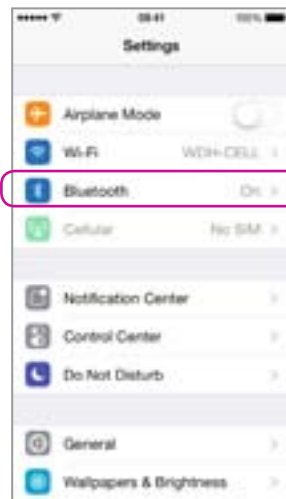

Välj Bluetooth

Hitta Bluetooth-ikonen i inställningsmenyn.

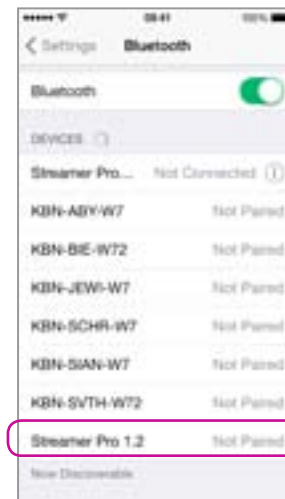

Hitta Streamer Pro 1.2


Välj Streamer Pro 1.2.



Ange Pin #0000

Ange pinkoden för Streamer 0000 (fyra nollor).

Tryck koppla ihop.

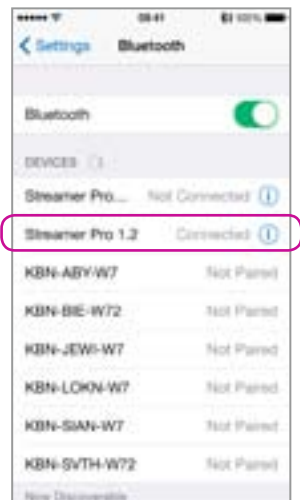

Bekräfta ihopkoppling

Kontrollera att Streamer Pro är ihopkopplad med iPhone. Det bör stå "Ansluten" och du bör se en Bluetooth-ikon längst upp i statusmenyn.


Streamer som standardenhet

Som standard kommer din iPhone använda den inbyggda högtalaren när du besvarar samtal, även om ett Bluetooth headset (som t.ex. Streamer) är anslutet.


För daglig användning av iPhone tillsammans med dina hörselapparater kan inställningarna ändras, så att ljudet alltid hörs i hörselapparaterna (via Streamer).




Välj Inställningar

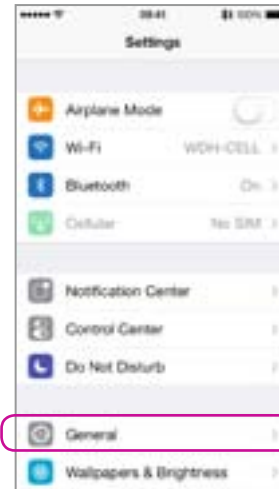


Välj Allmän

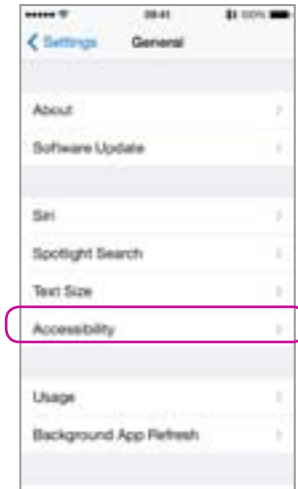


Välj Tillgänglighet

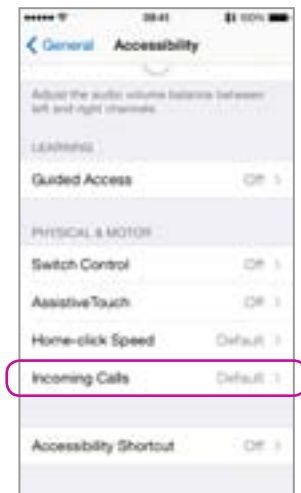

Välj Inkommande samtal

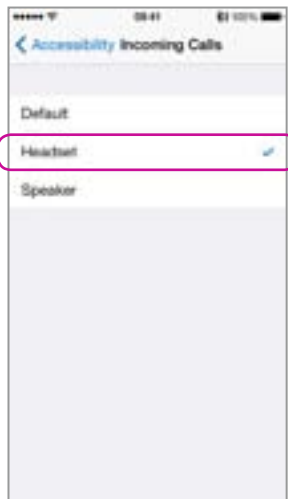

Välj Headset

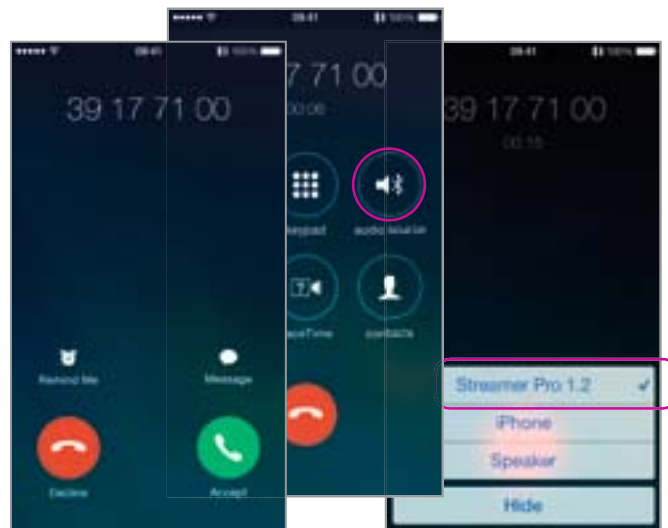

Bekräfta

När du besvarar samtal med din iPhone, ska du se Streamar Pro 1.2 som ljudutgång (och höra ljudet i dina hörlapparater)
Läs mer på sidan 12 .

Installera Appen



Öppna App Store

Hitta App Store-ikonen på iPhone. Klicka på den.

Step 1:
Välj sökfunktionen i App Store.

Step 2:
I sökfältet skriv in "Oticon".

Step 3:
Tryck på den blå "gratis" -ikonen för att påbörja nedladdningen.

Step 4:
Bekräfta ditt iTunes-konto genom att ange ditt lösenord.

Search, download & sign in




App installerad

ConnectLine App bör nu vara installerad på din iPhone.

Översikt ConnectLine App




Program

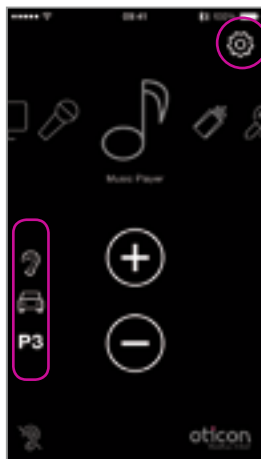


Programväljare

Program i hörapparaterna kan väljas direkt i Appen.

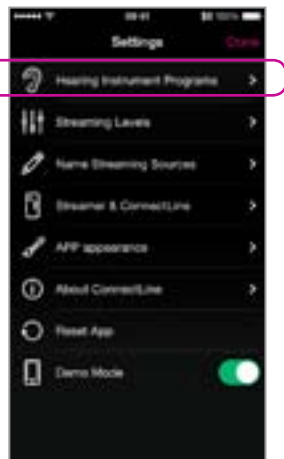

Programikoner

Program som redan finns i hörapparaterna kan läggas till i programmenyn.

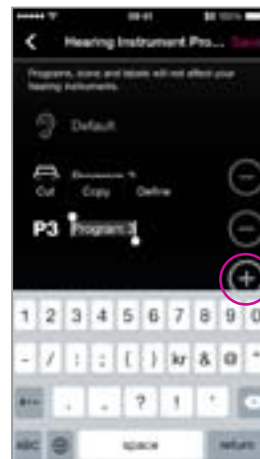

Anpassade programikoner


Inställningar --> Program i hörapparaterna--> Tryck + för att välja ikon för ett specifikt program.



Notera:

En ny ikon i programmenyn innebär inte ett nytt program i hörapparaterna.

Tyst läge

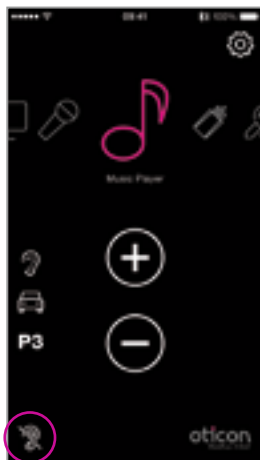

Vid ljudöverföring


Vid pågående ljudöverföring kan tyst läge aktiveras för hörapparaternas mikrofoner.



Ingen ljudöverföring

Även om ljudöverföring inte pågår kan tyst läge aktiveras för hörapparaterna för att ge ökad komfort (Gäller Oticon Alta, Nera, Ria och Sensei).

Besvara samtal med Appen aktiverad

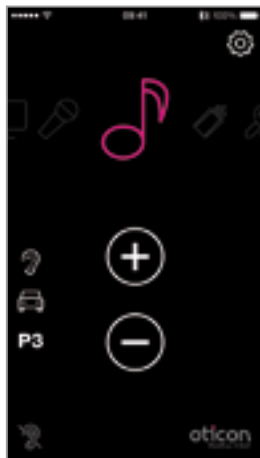

Appen är aktiverad

ConnectLine App är aktiverad. I detta exempel lyssnar användaren på musik från sin iPhone.



Inkommande samtal

När du besvarar samtal visas det vanliga fönstret för samtalshantering i din iPhone. Samtalet besvaras med telefonknappen på Streamer eller svarsknappen på din iPhone (1).



Pågående samtal

Under samtal fortsätter det vanliga fönstret för samtalshantering att vara aktivt.



Efter samtal

Efter avslutat samtal återgår Appen (och ConnectLine systemet) till den funktion som var aktiv före samtalet.

Appen ej aktiv



Appen ej aktiv

Om ConnectLine App inte är aktiverad visas vanligtvis telefonens startfönster.



Inkommande samtal

När du besvarar samtal visas det vanliga fönstret för samtalshandtering i din iPhone. Samtalet besvaras med telefonknappen på Streamer eller svarsknappen på din iPhone (2).



Pågående samtal

Under samtal fortsätter det vanliga fönstret för samtalshandtering att vara aktivt.



Efter samtal

iPhone återgår till telefonens startfönster.

Ringa samtal med iPhone



Appen är aktiverad

Inaktivera Appen genom att trycka på hemknappen.




Välj telefonikonen



Ange telefonnummer



Ange telefonnummer och tryck på "telefonknappen".

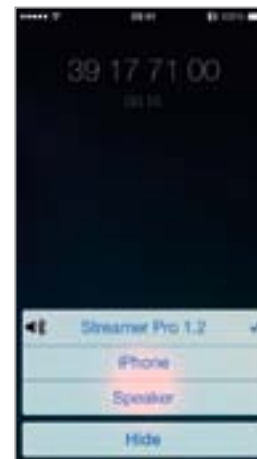

Samtal pågår/ Avsluta samtal

Samtal avslutas med telefonknappen på Streamer eller din iPhone.

Lyssna på din favoritmusik

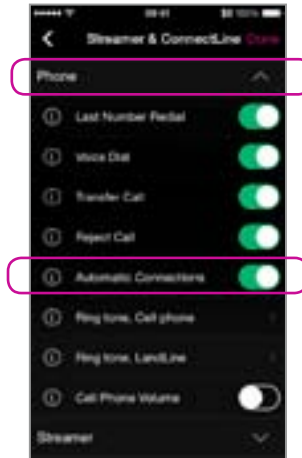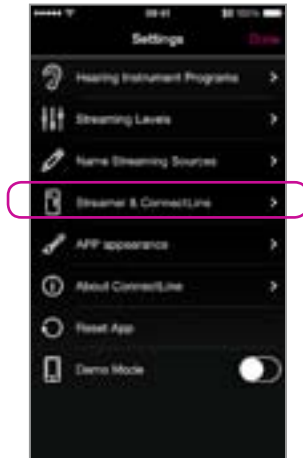

Automatisk anslutning av musikspelare

För att Streamer automatiskt ska börja överföra ljud när en musikspelare ansluts ska "Automatiska anslutningar" vara aktiverad.

Settings --> Streamer and ConnectLine --> Phone --> Enable automatic connections



Starta musikspelare

Tryck på hemknappen på din iPhone för att återgå till telefonens startfönster. Välj musik-ikonen.




Musikspelare

Du kan lyssna, pausa och justera volymen till en nivå som passar dig genom att använda musikappen. Överföringen av ljud sker automatiskt till Streamer och dina hörsapparater.



Återgå till Appen

Om du vill återgå till Appen kan du trycka på hemknappen på din iPhone två gånger för att få en översikt av aktiva appar och sedan välja ConnectLine App. Du kan även trycka på hemknappen en gång och på så sätt hitta ConnectLine App.

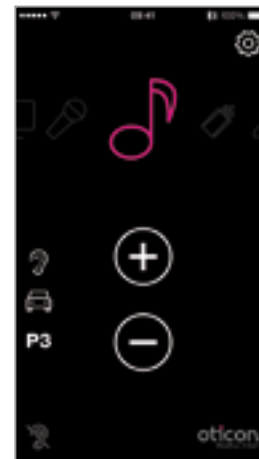

Välj och återuppta

Om ConnectLine App är aktiverad är musik-ikonen i Appen en genväg till musikspelaren. Om andra funktioner väljs, pausas musiken tills du åter trycker på musik-ikonen.

TV

I menyn om ihopkoppling gjorts



TV

Genom att trycka på TV-ikonen överförs ljud från din TV-adapter.

Mikrofon

I menyn om ihopkoppling gjorts



Mikrofon

Genom att trycka på mikrofon-ikonen överförs ljud från ConnectLine mikrofon. Överföring av ljud kan även påbörjas med hjälp av mikrofonen eller Streamer.




Anslutning för ljudsladd

I menyn om ihopkoppling gjorts



Anslutning in/ut

Om ljudsladd ansluts till Streamer, påbörjas överföring av ljud automatiskt.

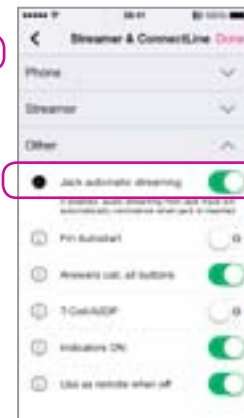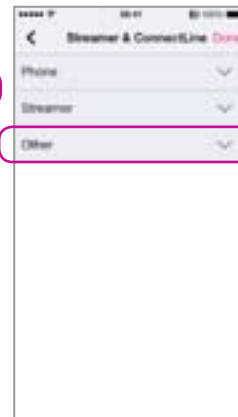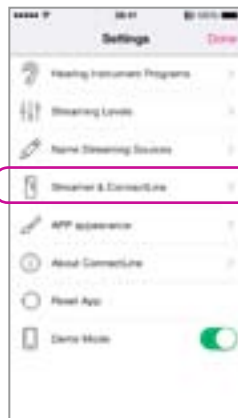

Automatisk överföring av ljud

Automatisk överföring av ljud vid anslutning av 3,5 mm ljudsladd kan aktiveras/inaktiveras.

Settings--> Streamer & ConnectLine --> Other --> Jack automatic streaming


FM

I menyn om ansluten



FM

Genom att trycka på FM-ikonen påbörjas överföring av ljud från anslutet FM-system.

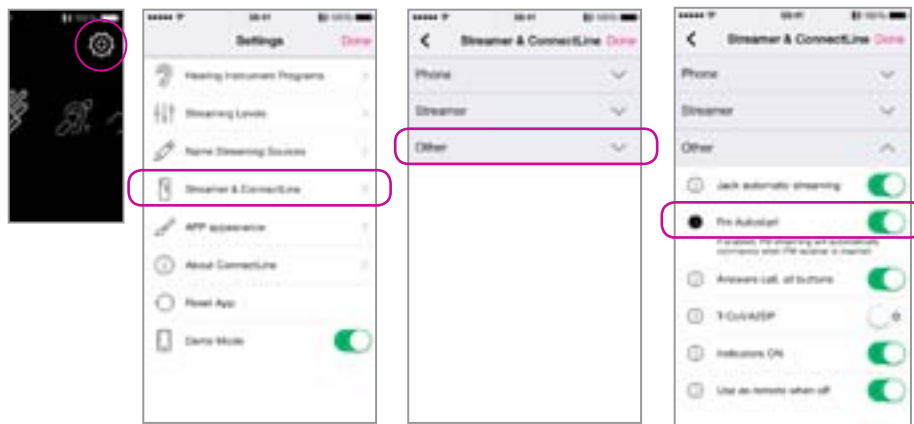

FM-autostart

Automatisk överföring av ljud vid anslutning till FM-system kan aktiveras/inaktiveras i "Settings".

Settings--> Streamer & ConnectLine --> Other --> FM Autostart

Telespole

Visas alltid i menyn



Telespole

Genom att trycka på telespole-ikonen påbörjas överföring av ljud från telespole.


Anslut extra mobiltelefon

Visas i menyn om den befinner sig inom räckvidden



Neka eller besvara inkommande samtal

Inkommande samtal indikeras i både hörapparaterna och i Appen. Samtal kan besvaras med både Appen och Streamer.

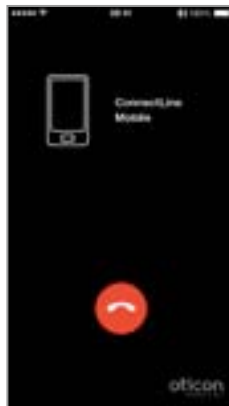

Avsluta samtal

Samtal kan avslutas med både Appen och Streamer.



Två Appar

Om Appen är installerat på två iPhones och båda är ihopkopplade med Streamer, kan kontrollen över Streamer tas över av den senast använda Appen.

Varning!

För att säkerställa att ditt system inte manövreras mot din vilja, rekommenderas att Appen endast är installerad på dina personliga enheter.

Fast telefon

Visas i menyn om telefonadaptern är inom räckvidden



App är aktiverad

Om en telefonadapter har kopplats ihop och är inom räckvidden, visas den som en telefon-ikon i Appen. Om Appen inte är aktiverad kan samtal endast besvaras med Streamer.



Besvara samtal

Inkommande samtal indikeras i både hörapparaterna och i Appen. Samtal kan besvaras med både Appen och Streamer.



Avsluta samtal


Samtal kan avslutas med både Appen och Streamer.



Efter samtal

Efter avslutat samtal återgår Appen (och ConnectLine-systemet) till den funktion som var aktiv före samtalet.

Inställningar - Volym vid ljudöverföring

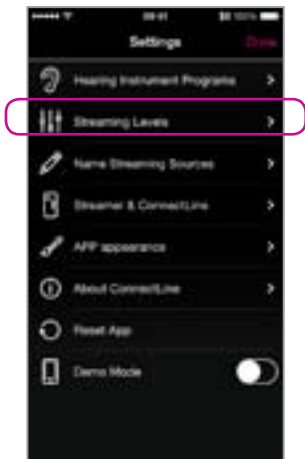


Volym vid ljudöverföring

Volymnivån kan justeras för varje ansluten ljudkälla. Om volymen ändras under pågående ljudöverföring, är ikonen för den aktiva ljudkällan färgmarkerad.

Settings --> Streaming levels

Inställningar - Ljudkälla ikoner/namn


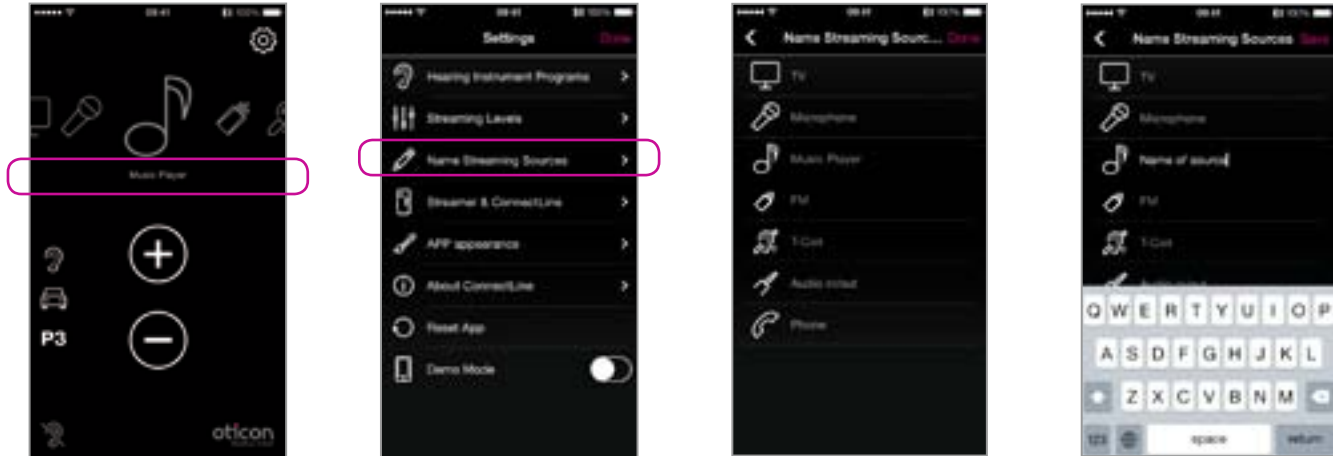


Ljudkälla ikoner/namn

Du väljer själv vilken ikon en ihopkopplad enhet ska ha i meny.

Settings --> Name Streaming Sources

Inställningar - Telefon

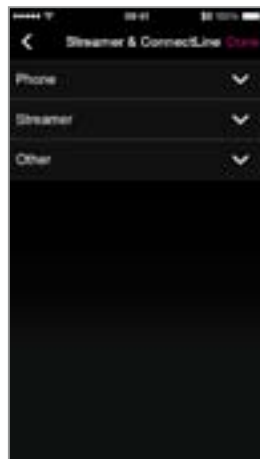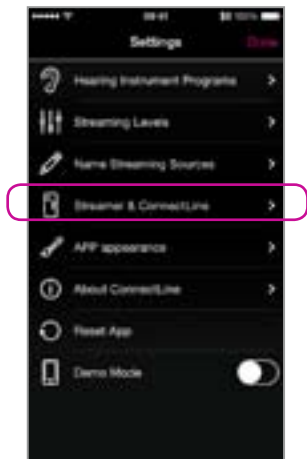

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Telefoninställningar

Inställningar som påverkar det dagliga användandet av telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

1: Senast slaget nummer

Du kan ringa upp det senast slagna numret genom att hålla in telefonknappen på Streamer (om denna funktion är aktiverad och stöds av mobiltelefonen).

2: Röstsamtal

Röstsamtal kan genomföras med ett kort tryck på telefonknappen på Streamer (om denna funktion är aktiverad och stöds av din mobiltelefon samt att du inte är inom räckvidden från en ConnectLine telefonadapter).

3: Överföra samtal

Genom att hålla in telefonknappen på Streamer överförs samtal till mobiltelefonen (om denna funktion är aktiverad).

4: Neka samtal

Ett inkommande samtal kan nekas med volym ner-knappen på Streamer (om denna funktion är aktiverad).

5: Automatiska anslutningar

Tillåt automatiska anslutningar t.ex. SMS och musikspelare.

6: Ringsignaler, mobiltelefon

Ringsignaler vid samtal från mobiltelefon.


7: Ringsignaler, Fast telefon

Ringsignaler vid samtal via ConnectLine telefonadapter.

8: Volym, mobiltelefon

Gör det möjligt att justera samtalsvolymen med telefonens volymknappar.

Inställningar - Streamer

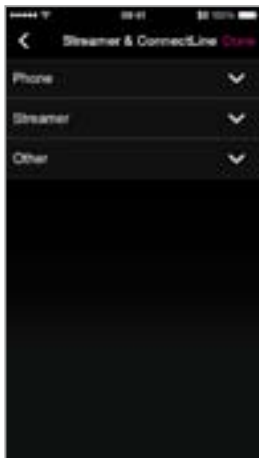

1: Inaktivera volymkontroll

Volymen i hörapparaterna kan inte justeras med Streamer om denna funktion är aktiverad.



2: Aktivera programbyte

Program i hörapparaterna kan inte ändras med Streamer om denna funktion är aktiverad.

Inställningar Streamer

Inställningar som påverkar det dagliga användandet av Streamer kan anpassas efter dina önskemål.

Övriga inställningar

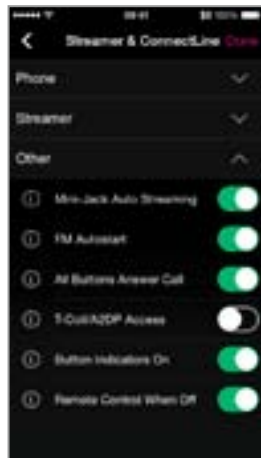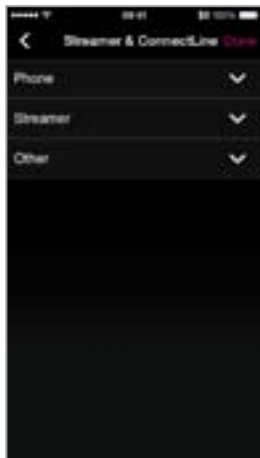


Övriga inställningar

Inställningar som påverkar det dagliga användandet av Streamer kan anpassas efter dina önskemål.

- 1: Automatisk överföring av ljud vid anslutning av ljudsladd**
Överföring av ljud påbörjas automatiskt när en ljudsladd och om denna funktion är aktiverad.
- 2: Automatisk överföring av ljud vid anslutning till FM**
Överföring av ljud påbörjas automatiskt när en FM-mottagare ansluts och om denna funktion är aktiverad.
- 3: Besvara samtal, alla knappar**
Alla knappar framtill på Streamer kan användas för att besvara samtal om denna funktion är aktiverad.
- 4: Telespole/Ljudöverföring via A2DP (Bluetooth-enheter)**
Ett tryck på AUX-knappen på Streamer kommer starta A2DP, om telespolen inte är vald. Är telespolen vald, kommer ett tryck på AUX-knappen på Streamer starta överföring av ljud via telespolen.
- 5: Indikatorer PÅ**
Inga indikatorer visas på Streamer om denna funktion är inaktiverad.
- 6: Använd Streamer som fjärrkontroll (När Streamer är avslagen)**
Streamer kan användas som fjärrkontroll till hörapparaterna, även när Streamer är avstängd och om denna funktion är aktiverad.

Inställningar - Utseende

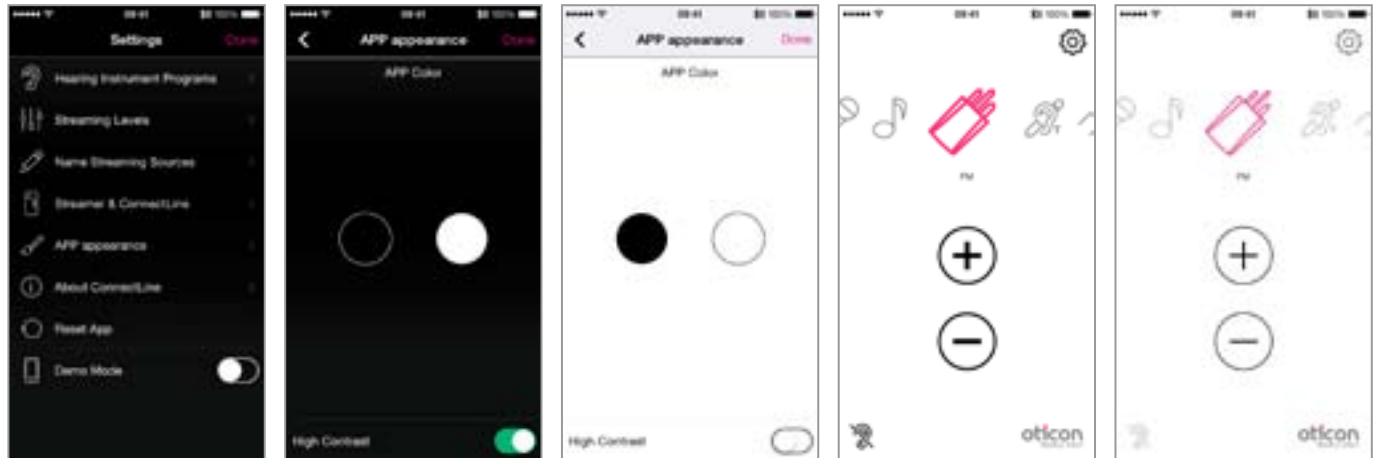

Appens utseende

Du kan välja om Appen ska ha en svart eller vit bakgrund. (A)

Du kan även välja tunn eller tjock kontur runt ikonerna som visas i menyn. (B)

Felsökning och åtgärder




Stäng/starta Appen

Tryck två gånger på hemknappen på din iPhone för att stänga Appen och visa alla aktiva appar.




Stäng Appen

Svep bilden med ConnectLine App uppåt så att den tas bort från din display. Appen är nu helt avstängd.

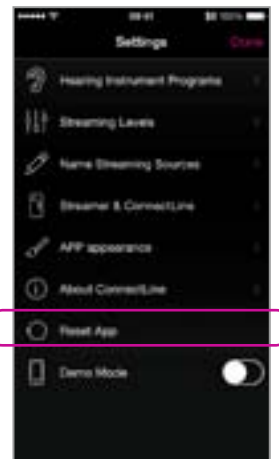


Återställ Appen

Genom att återställa Appen kommer Appen återfå sina ursprungliga inställningar.

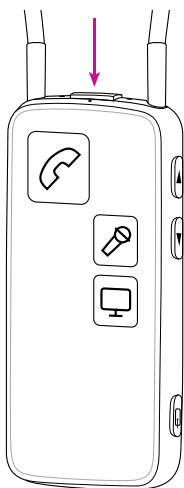

Återställ Streamer

Streamer återställs automatiskt när den sätts på/stängs av.

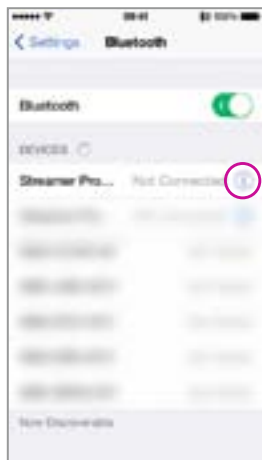

Genomför ny ihopkoppling av Streamer och iPhone

I vissa fall, särskilt om telefonen och Streamer har kopplats ihop flera gånger med andra enheter, kan det vara nödvändigt att radera alla tidigare ihopkopplingar i telefonen och Streamer.

1. Stäng av Streamer
2. På iPhone: (Inställningar > Bluetooth) välj (i) och tryck "Glöm denna enhet"
3. Sätt på telefonen
4. Sätt på Streamer
5. På Streamer: Håll in "PÅ/AV-knappen" OCH "Volym upp" i tio sekunder
6. Sätt PÅ din iPhone gör en ny ihopkoppling med Streamer (se sidan 4)

People First

People First är vår ledstjärna som handlar om att ge människor kraft att kommunicera och leva aktivt