

People First

People First är vår ledstjärna som handlar om att ge människor kraft att kommunicera och leva aktivt

Sennheiser BT800 USB



1447985E/07.14



Sennheiser BT800 USB

Introduktion

Många datorer använder idag Bluetooth vilket gör det möjligt att ansluta trådlösa headset och hörlurar. Exempel på användningsområden är videosamtal via Skype eller att lyssna på musik. Eftersom olika datortillverkare installerar hård- och mjukvara för Bluetooth på olika sätt, kan det ibland vara svårt att ansluta datorn till ConnectLine Streamer Pro.

För att undvika problem med anslutning rekommenderar vi att du använder Sennheiser BT800 USB för att underlätta installation och användande av Bluetooth på din dator tillsammans med ConnectLine.

Sennheiser BT800 USB finns tillgänglig hos en mängd återförsäljare och har testats för att fungera väl med Oticon ConnectLine.

För uppdaterad information kring kompatibilitet, besök www.oticon.se/connectline.




Sennheiser BT800 USB

För att använda Sennheiser BTD500 USB med ConnectLine Streamer Pro

Installation

1. Läs igenom bruksanvisningen för Sennheiser BTB800 USB noggrant före installation. Detta är viktigt eftersom den är i ihopkopplingsläge första gången den kopplas in i din dator.
2. Innan du kopplar in BTB800 i din dator, säkerställ att Streamer Pro också är i ihopkopplingsläge. Läs mer i bruksanvisningen för Streamer Pro eller besök www.oticon.se/connectline.
3. Följ de användarföreskrifter som finns för Sennheiser BTB800 USB.

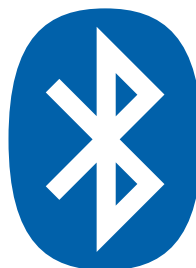

Användarföreskrifter

- 4a. Videosamtal över internet med exempelvis Microsoft® Lync™.
Allt användande möjliggörs av den mjukvara som är installerad på din dator. När datorn kopplar ihop sig med Streamer Pro hörs en signal för inkommande samtal i hörapparaterna och telefonknappen på Streamer Pro blinkar grönt. Tryck på telefonknappen på Streamer Pro för att koppla ihop enheterna.
- 4b. Musik som exempelvis Media Player eller iTunes.
Ihopkopplingen mellan din dator och Streamer Pro sker med hjälp av Streamer. Tryck på AUX-knappen på Streamer Pro för att skapa en Ihopkoppling med datorn, när ihopkopplingen fungerar hör du ett ljud i dina hörapparater. Efter detta startar du applikationen på din dator.

Viktigt:

- ▶ Tidigare version av Streamer Pro 1.1 kan vara konfigurerad av din audionom, så att Streamer ansluts till din dator om en applikation aktiveras.
- ▶ Om Streamer Pro är ihopkopplad med en mobiltelefon eller en fast telefon via ConnectLine telefonadapter, prioriteras inkommande samtal före exempelvis musik.