

Snabbguide

för Oticon hörapparater*
och Oticon ON App 1.10



* Oticon Opn S™, Oticon Opn™,
Oticon Siya, Oticon Play™

oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion

Detta är en guide för hur du använder Oticon hörapparater och Oticon ON App för iPhone®.

- Så här parkopplar du dina hörapparater med en iPhone
- Daglig användning av iPhone med hörapparater vid telefonsamtal
- Så här använder du Oticon ON App

Vad är nytt i version 1.10

OpenSound Booster 09

Besök www.oticon.se/connectivity för mer information om kompatibilitet, eller se beskrivningen för Oticon ON App i App Store® och Google Play™.


Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.



Innehållsförteckning

4	Så här parkopplar du en iPhone med Oticon hörapparater
6	Hörapparater som standardljudutgång
8	Installera Oticon ON App
10	Första användningstillfället
11	Startskärmens funktioner
12	Välj program/volym/aktivera tyst läge
14	Välj/justera program med tinnituslindringsljud
16	Lyssna på TV:n (kräver TV-Adapter 3.0)
17	Lyssna till extern mikrofon (kräver ConnectClip)
18	Live-lyssning/ljud från din iPhone till dina hörapparater
20	Ansluta till Internet/IFTTT
22	Övriga funktioner
26	Apple Watch
28	Hearing Fitness – första användningstillfället
30	Hearing Fitness – daglig användning

Så här parkopplar du en iPhone med Oticon hörapparater

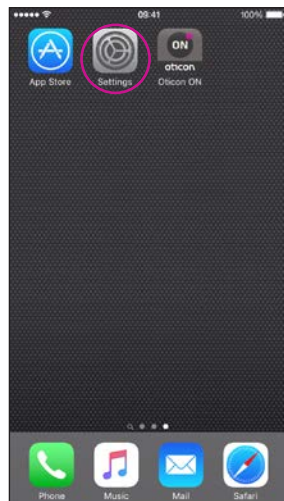


Öppna Settings (inställningar)
Hitta inställningsikonen på din iPhone.




Välj General (allmänt)




Välj Accessibility (hjälpmedel)

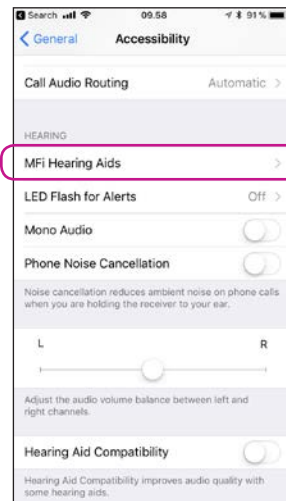


Välj MFi hörapparater

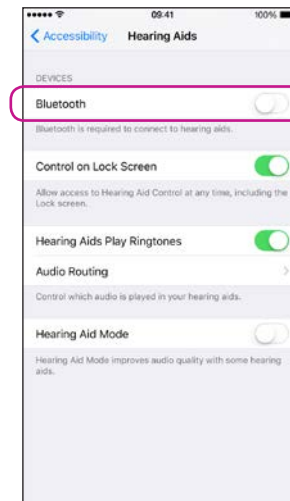


Kontrollera att Bluetooth är aktiverat

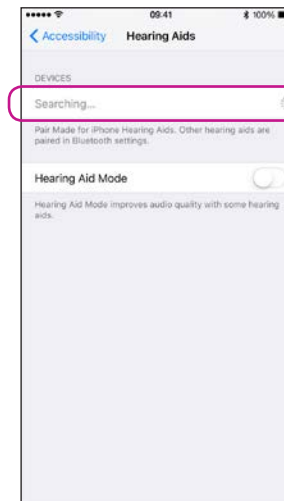

Nu söker din iPhone efter dina hörapparater
Öppna/stäng batteriluckan på hörapparaterna så att din iPhone kan hitta dem.

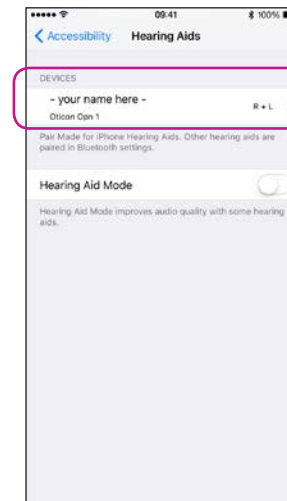


Välj hörapparaterna när de är tillgängliga

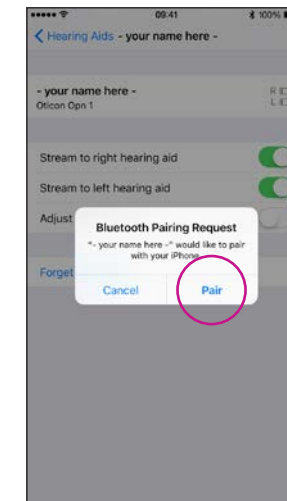

Bekräfta förfrågan om ihopparning via Bluetooth, en gång för varje hörapparat

Hörapparater som standardljudutgång

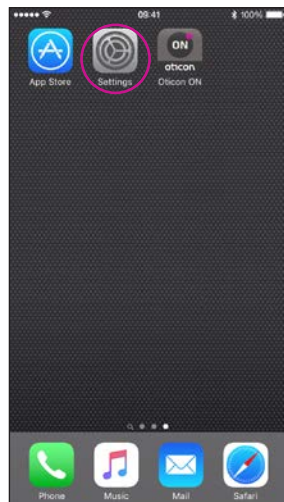


Välj Settings (inställningar)




Välj General (allmänt)




Välj Accessibility (hjälpmedel)

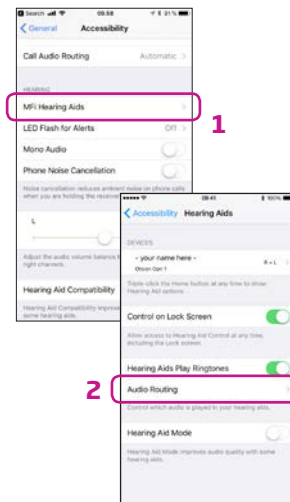

**1. Hörapparater
2. Audio Routing (ljuddirigering)**


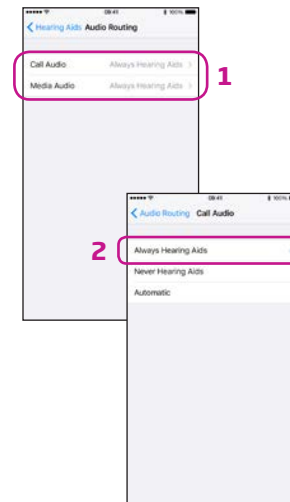


**1. Samtal och medieljud
2. Always Hearing Aids (alltid hörapparater)**

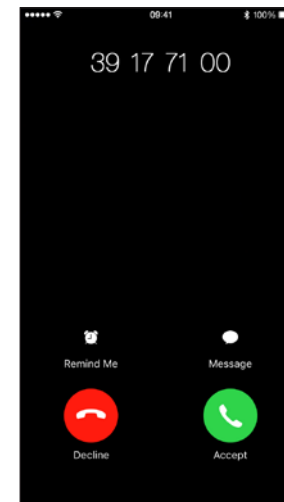


Bekräfta


När du besvarar ett samtal med din iPhone, ska du kunna se dina hörapparater som standardljudutgång (och höra samtalet i hörapparaterna).

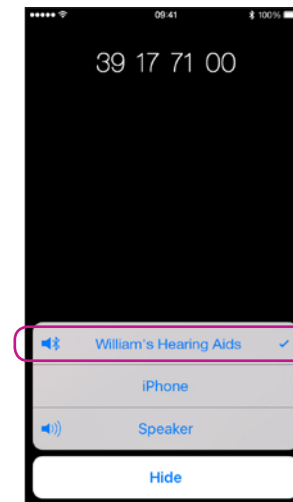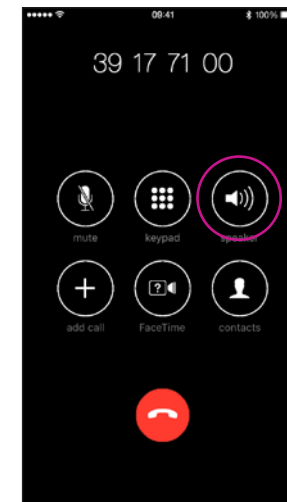


Installera Oticon ON App

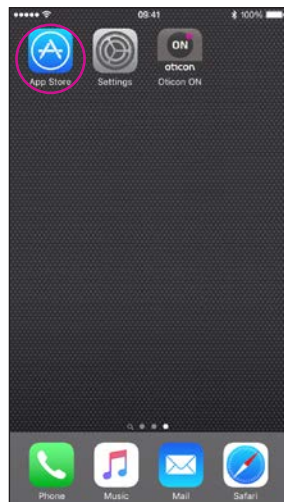


Hitta App Store-ikonen

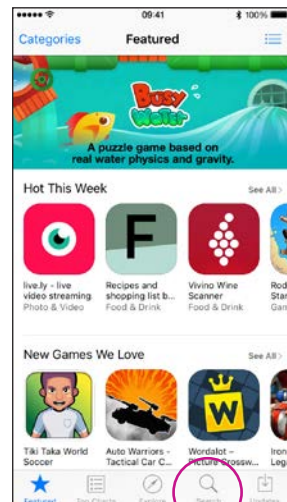


Välj Search (sök)

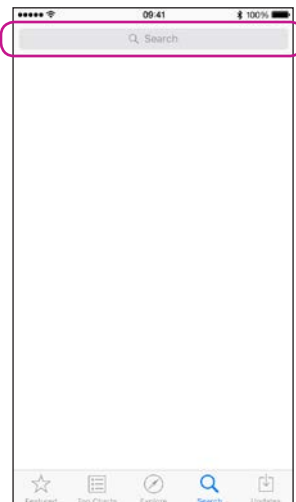


Skriv in "Oticon" i sökfältet

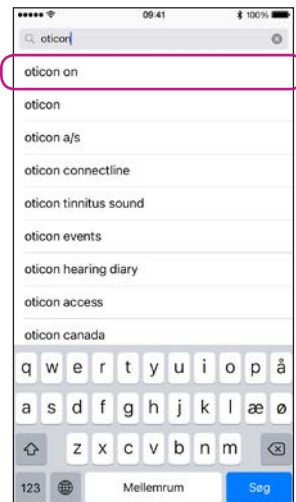

Välj Oticon ON

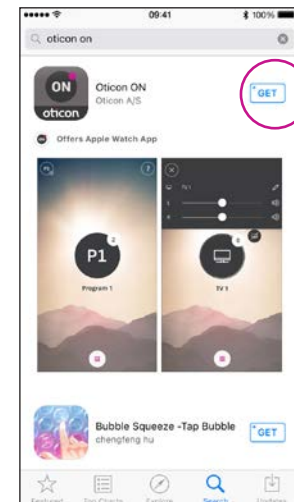


Tryck på hämta

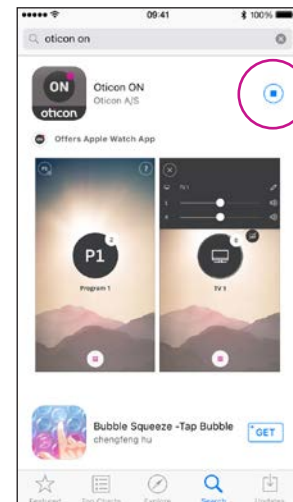


Installerar

Första användningstillfället

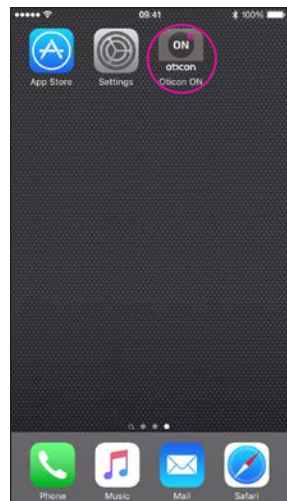

Starta Oticon ON App
Efter installationen kan Oticon ON App öppnas från startskärmen.

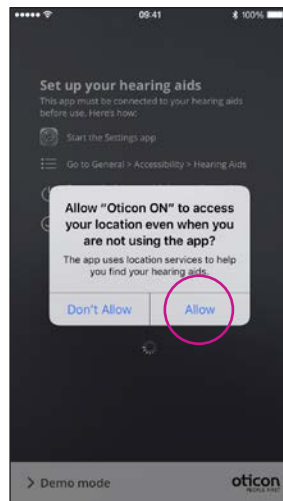


Tillåt åtkomst till telefoninformation
När du startar appen för första gången, ska du tillåta åtkomst till plats och meddelanden för att funktionerna ska fungera optimalt.




Genomgång
Första gången du öppnar Oticon ON App, visas en kort genomgång av appen.

Du kan avsluta genomgången med knappen "X".

Startskärmens funktioner

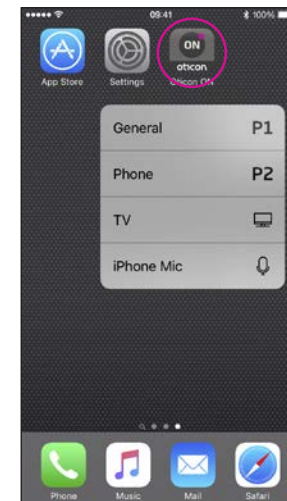


3D Touch
Tryck och håll in Oticon ON App för omedelbar åtkomst till program.

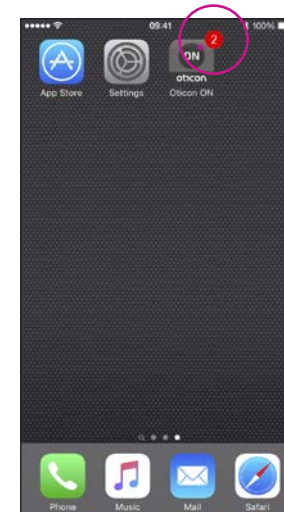

Bortkopplad anslutning
Den röda prickken vid Oticon ON App-ikonen meddelar bortkopplad(e) anslutning(ar).

Välj program/volym/aktivera tyst läge

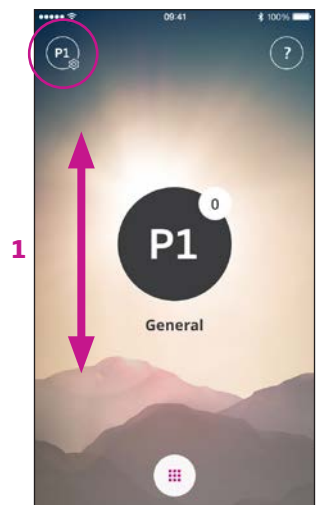

Volym

När du har öppnat Oticon ON App visas aktuellt program och aktuell volym.

Du justerar volymen genom att svepa med fingret uppåt eller neråt på skärmen (1).



Höger och vänster volym


Om detta är aktiverat (se Inställningar), justerar du vänster hörselapparat genom att svepa med fingret åt vänster (1), och du justerar höger hörselapparat genom att svepa med fingret åt höger (2). Om du sveper i mitten justeras volymen i båda hörselapparaterna.



Välja program

Välj det aktiva programmet för att öppna programväljaren (1). Välj önskat program (2).


Obs: Antalet tillgängliga program ställs in av din audionom.

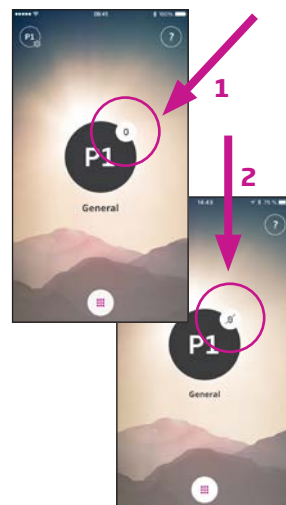

Aktivera "tyst läge" i hörselapparaterna

Tryck kort på volymindikatorn för att aktivera tyst läge i hörselapparaterna (1).

Du aktiverar ljudet igen genom att justera volymen eller genom ett kort tryck på volymindikatorn. (2).

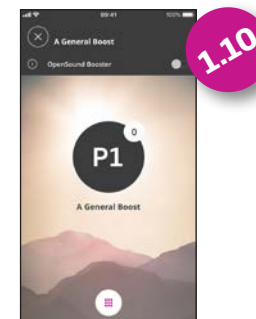

OpenSound Booster

Använd OpenSound Booster om du är trött eller har svårt att fokusera på tal. Aktivera funktionen i det valda programmets sekundära funktionsmeny.

När du aktiverar funktionen kan du se den lilla ikonen som visas bredvid huvudvolymindikatorn.

Obs! Funktionens tillgänglighet bestäms av hörselapparatsmodell. För närvarande är Opn S och Opn Play kompatibla hörselapparater.

Välj/justera program med tinnituslindringsljud




Välj program med lindringsljud
Eventuella tillgängliga program med tinnituslindringsljud kallas T1 osv. (1).



Justera volym för tinnituslindringsljud
Nivån/volymen för tinnituslindringsljud kan justeras genom de övriga funktionerna (2).

Volymen i vänster och höger hörräparat kan justeras separat (3).

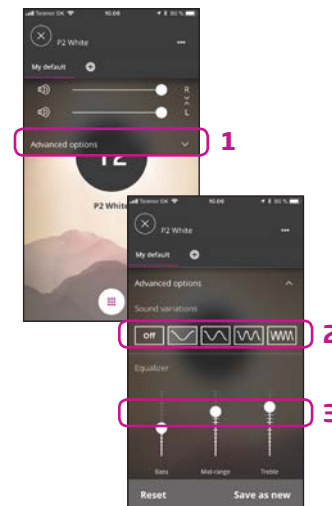

Lindringsljud mot tinnitus - Avancerat
Välj avancerad anpassning (1) för att välja ljudvariationer (2) och justera equalizer (3).



Individuella inställningar kan sparas - klicka på spara som ny (1) och namnge din favorit (2).



Du kan ändra namn på din favorit (1 och 2) eller ta bort den (3).

Lyssna på TV:n (kräver TV-Adapter 3.0)



Välja program

Tryck kort på det aktiva programmet för att öppna programväljaren (1).


Välj TV-program (2).

Obs: Antalet tillgängliga program ställs in av din audionom.



Aktivera "tyst läge" i hörapparaterna

Tryck kort på volymindikatorn för att aktivera "tyst läge" i hörapparaterna (1).

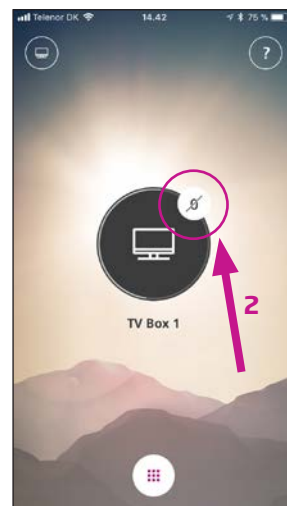

Du aktiverar ljudet igen genom att justera volymen eller genom ett kort tryck på volymindikatorn. (2).



Övriga funktioner

Tryck kort på inställningsindikatorn (A) för att öppna de övriga funktioner som är relaterade till det aktiva programmet.

Här kan du justera nivån på det överförda TV-ljudet (1).


Lyssna till extern mikrofon (kräver ConnectClip)



Välj program


Klick på det aktiva programmet för att öppna programväljaren (1). Välj den externa mikrofonen (2).

Notera: Antalet tillgängliga program avgörs av din audionom.

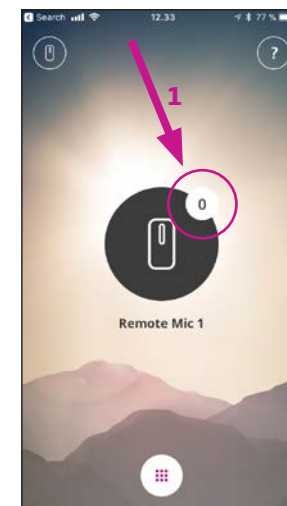


Aktivera tyst läge

Klicka på volymindikatorn för att aktivera tyst läge för hörapparaterna (1).

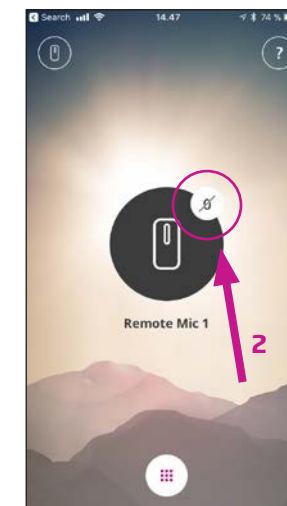

Du kan inaktivera tyst läge genom att justera volymen eller klicka på volymindikatorn.

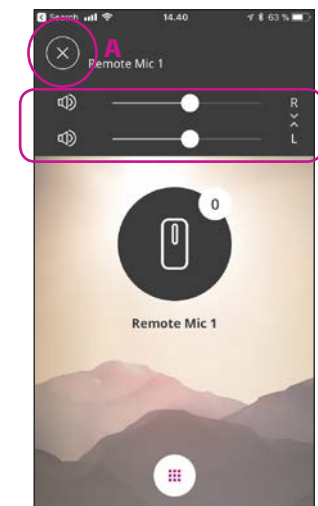

Övriga funktioner

Tryck på inställningsindikatorn (A) för att öppna de övriga funktioner som är relaterade till det aktiva programmet.

Här kan du justera nivån på det överförda ljudet (2).


Live-lyssning/ljud från din iPhone till dina hörapparater



Välja program

Tryck kort på det aktiva programmet för att öppna programväljaren (1).
Välj mikrofonprogrammet (2).


Obs: Antalet tillgängliga program ställs in av din audionom.

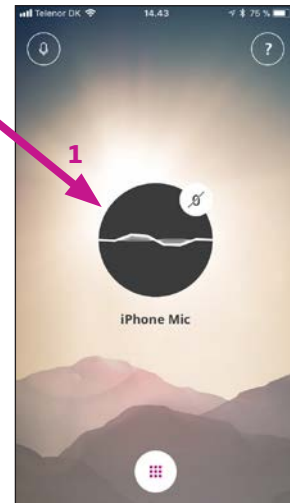

Placera din iPhone nära ljudkällan

Nu kommer din iPhone att överföra ljud från den inbyggda mikrofonen och indikera ljudnivån (1).

Obs: Första gången du använder live-lyssning måste du tillåta åtkomst till mikrofonen.

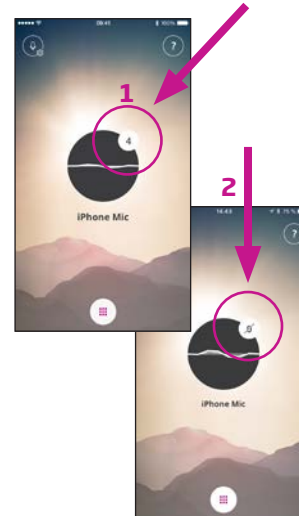

Aktivera "tyst läge" i hörapparaterna

Tryck kort på volymindikatorn för att aktivera "Tyst läge" i hörapparaterna (1).

Du aktiverar ljudet igen genom att justera volymen eller genom ett kort tryck på volymindikatorn. (2).

Ansluta till Internet/IFTTT

Introduktion


Du kan ansluta dina Oticon-hörapparater till Internet via Oticon ON App och tjänsten IFTTT (If This Then That).

Med IFTTT kan du exempelvis ställa in att dina lampor ska tändas när du sätter på dig dina hörapparater (ytterligare utrustning krävs). Du kan även få en notis i dina hörapparater när batteriet i hörapparaterna behöver bytas.

Möjligheterna är oändliga!


Besök ON.oticon.com för mer information om vad du kan göra och hur det fungerar.

Här hittar du även mer information om hur du ställer in och hanterar ditt IFTTT-konto.

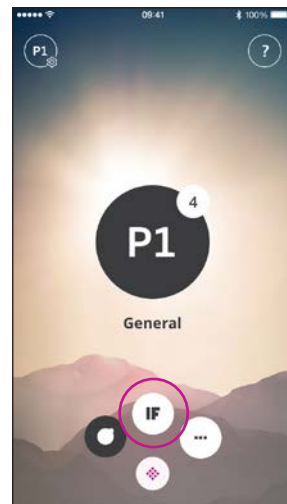

Ansluta till IFTTT

Välj IFTTT-huvudfunktionen.

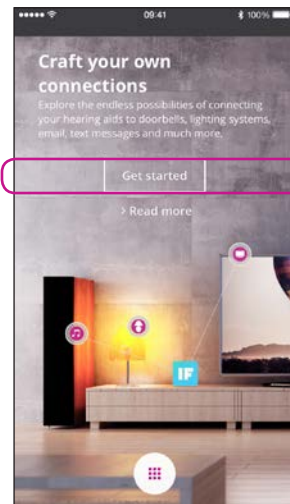


Första inställningstillfället

Välj Get started (komma igång).



Välj Sign up now (1) (registrera nu) eller använd ett befintligt Facebook®- eller Google™-konto (2).

Om du registrerar dig från appen, får du ett e-mail med en kod som du måste ange för att bekräfta din inloggning.

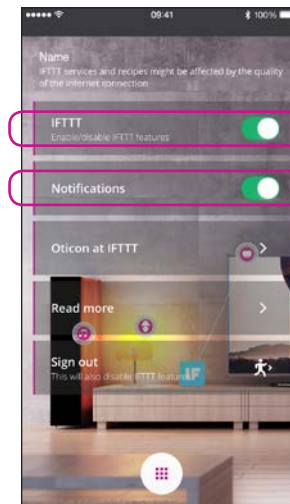


IFTTT

Om IFTTT-alternativet är inaktiverat, är inga IFTTT-kopplingar aktiva.


Notifications (meddelanden)

Om OFF (av) är valt, kan inga meddelanden ses på meddelandeskärmen i iPhone.

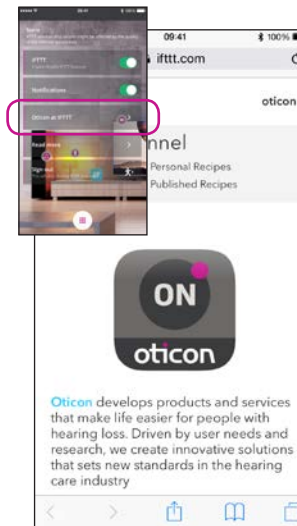


Oticon at IFTTT (Oticon på IFTTT)

En direktlänk till Oticon-kanalen på IFTTT.

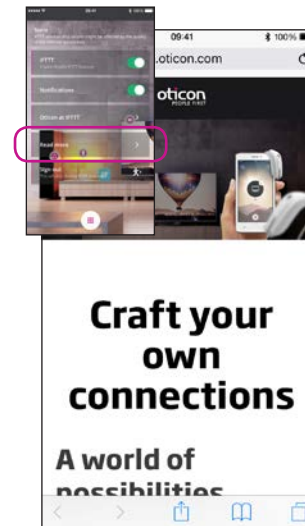

Read more (läs mer)


En direktlänk till ON.oticon.com där du hittar mycket mer information om Oticon ON App och IFTTT.

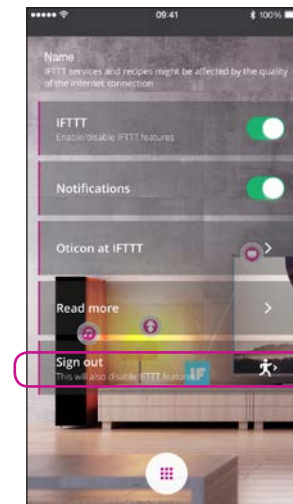

Sign out (logga ut)

Här kan du logga ut från din Oticon ON IFTTT-kanal. Detta stoppar även alla IFTTT-händelser och kopplingar.

Övriga funktioner

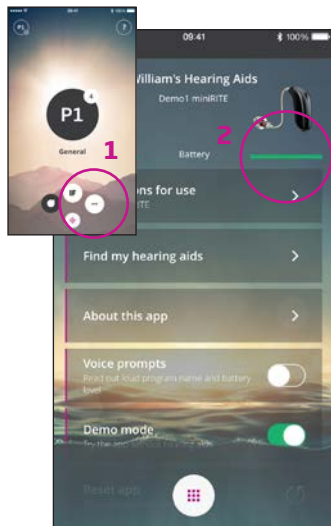

Inställningar

Tryck på inställningsikonen för att öppna de övriga funktionerna i Oticon ON App (1).


Batteristatus

En visuell indikation av batteristatus för både vänster och höger hörrapparat (2).




Bruksanvisning

Första gången appen ansluts till Internet kommer den automatiskt att hämta bruksanvisningen för din specifika hörrapparat.

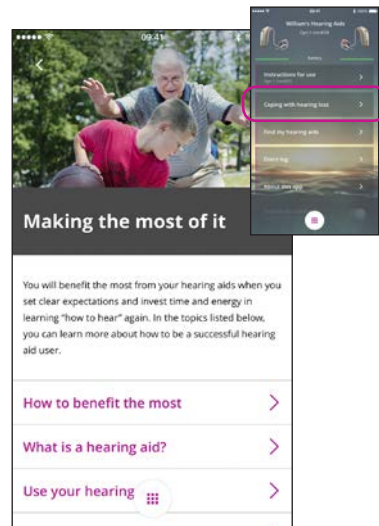

Leva med hörselnedsättning


Appen innehåller information och råd om hur man lever livet på bästa sätt när man har hörrapparater.

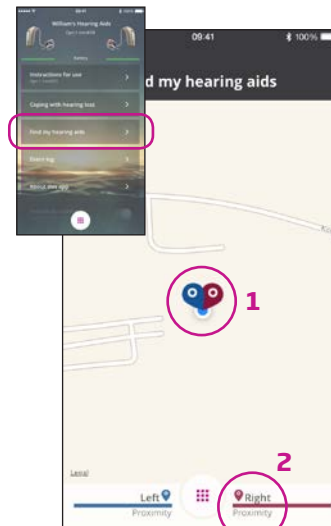

Find My Hearing Aids (hitta mina hörrapparater)


Kartan visar var dina hörrapparater senast var anslutna till din iPhone (1). Om de finns i närheten, visar staplarna hur nära hörrapparaterna du befinner dig (2).

Obs: Om du tappar kontakten med dina hörrapparater, kommer de röda/blå markörerna på kartan visa senast kända plats för hörrapparaterna.

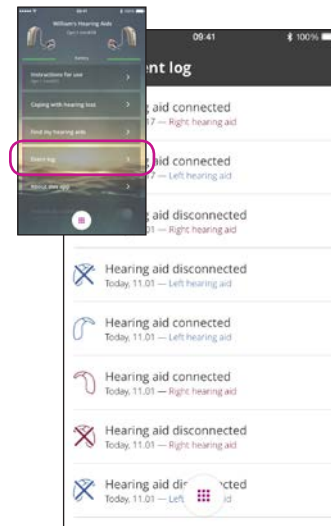

Event log (händelselogg)


Appen har en översikt över de senaste registrerade händelserna. Om ett varningsljud har spelats upp - så kan det återfinnas och spelas upp igen från händelseloggen.

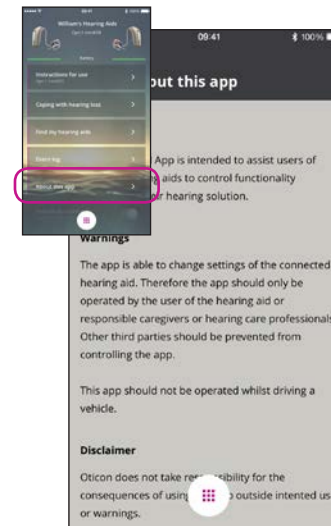


About the app (om appen)

Varningar och friskrivningar.


Övriga funktioner

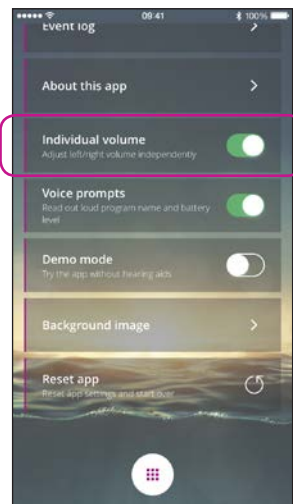


**Individual volume
(individuell volym)**
Detta alternativ möjliggör separat volymkontroll för vänster och höger hörapparat.

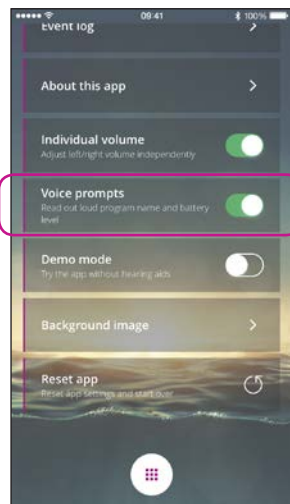


**Voice prompts
(röstuppmänningar)**
Om alternativet för röstuppmänningar är aktiverat, hör du programnamn och batteristatus i dina hörapparater.

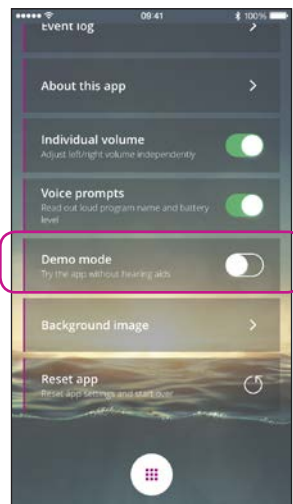


**Demo mode
(demoläge)**
Med detta alternativ kan du testa appen utan att behöva ansluta dina hörapparater till din iPhone.

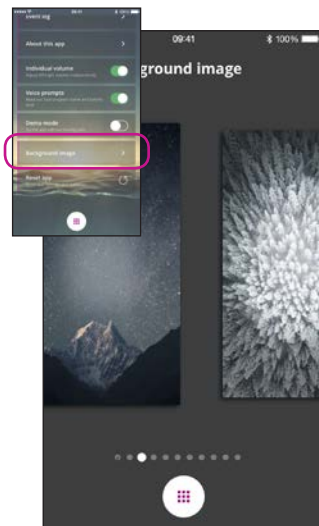

**Background image
(bakgrundsbild)**
Huvudskärmens bakgrundsbild kan anpassas.

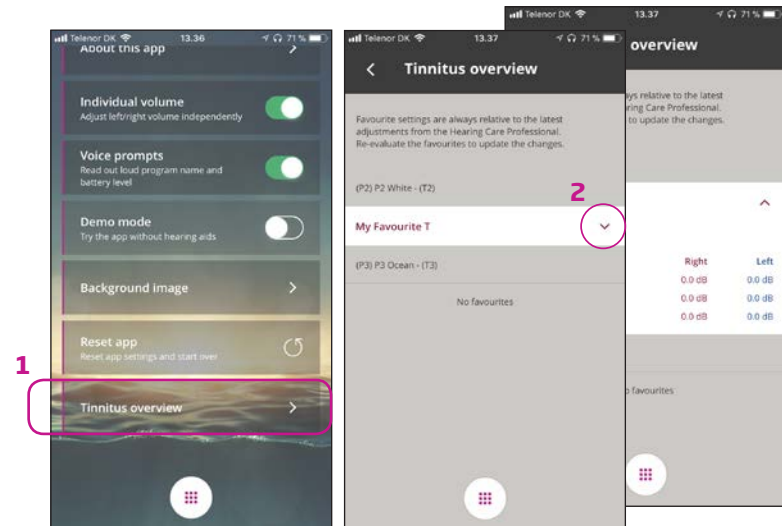

Tinnitus översikt
Välj översikt (1) för åtkomst till tillgängliga användardefinierade Tinnitus-inställningar.
Den detaljerade informationen (3) kan användas av audionomen för att skapa ett nytt permanent tinnitusprogram.

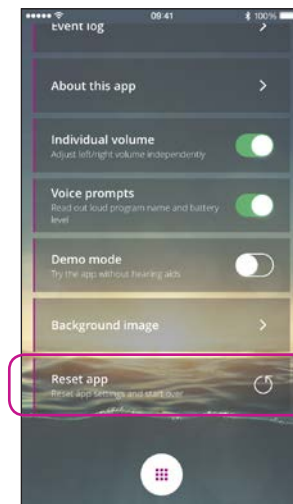

**Reset app
(återställ app)**
När du återställer appen, återställs alla dina inställningar till fabriksinställningarna.
Det tar inte bort ihopkopplingen mellan din iPhone och hörapparaterna.

Apple Watch



Apple Watch

Appen har ett Apple Watch-tillägg som gör det möjligt för Apple Watch-användare att välja program, se status för hörrapparaterna, aktivera "Tyst läge" i hörrapparaterna och justera volymen - med hjälp av Crown-funktionen i Apple Watch.



Justera volym



Hörrapparatsstatus



Aktivera "tyst läge" i hörrapparaterna



Välja program


Hearing Fitness – första användningstillfället

Ange din e-mail

HearingFitness är en funktion som möjliggör för dig att sätta upp personliga mål och följa upp hur du dagligen använder dina hörapparater för att nå dina uppsatta mål.

HearingFitness kräver ett personligt konto hos Oticon. Du behöver inte skapa ett konto för att använda övriga delar av Oticon ON App.

Kontot som du skapar är samma som du använder för att aktivera IFTTT (Se sida 20).

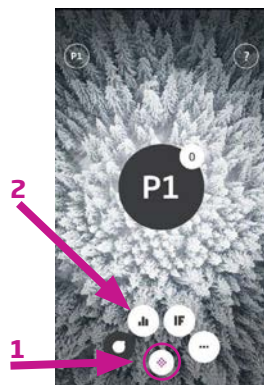

Välj HearingFitness

Tryck på välj-knappen (1).

Välj hörapparater (2).




Uppdatera hörapparaterna

Dina hörapparater kan behöva uppdateras för att få tillgång till funktionen HearingFitness. Kontakta din audionom för att genomföra denna uppdatering (1).

Startskärm


När funktionen finns tillgänglig kommer du se den på startskärmen (2).

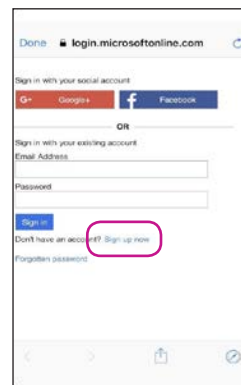

Registrera dig med Oticon

För att garantera din sekretess behöver du skapa ett personligt konto.


Välj "Registrera dig nu" (1)

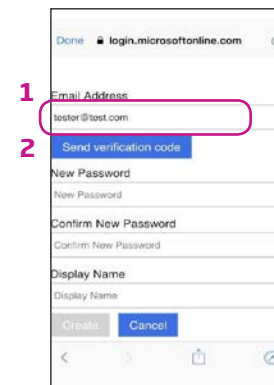

Ange din e-mail

Vänligen ange en giltig e-mail (1). Den kommer att användas vid bekräftelse när du skapar ditt konto.

Tryck på "Skicka bekräftelsekod" (2)

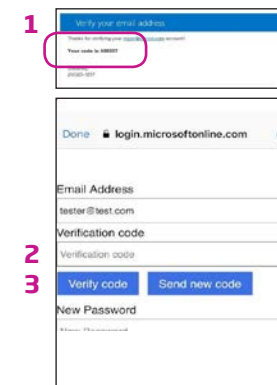


Läs din e-mail

Du kommer att få ett bekräftelse e-mail från Oticon med en 6-siffrig kod för att bekräfta ditt konto.


Ange verifieringskod

Ange den 6-siffriga koden och tryck "Bekräfta kod" (2). Tryck på bekräfta kod (3).

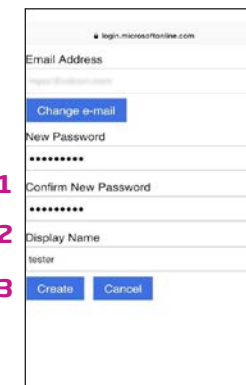

Skapa konto


Ange och bekräfta det NYA lösenordet (1), ange Display namn (2), och tryck slutligen på "Skapa" (3) för att skapa ditt HearingFitnesskonto.

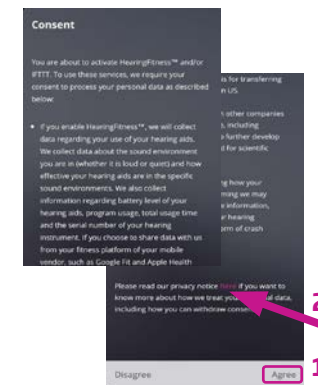

Bekräfta samtycke


Du behöver bekräfta ditt samtycke innan du kan använda HearingFitness (1). Sekretesspolicyen kan läsas i sin helhet via länken (2).

Hearing Fitness – daglig användning

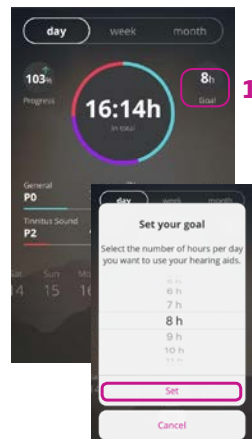

Sätt upp mål

Med HearingFitness kan du sätta upp mål för hur många timmar om dagen du vill använda dina hörapparater. Tryck på Mål för att ändra ditt dagliga mål (1). När du har angett antal timmar från listan trycker du Spara (2).

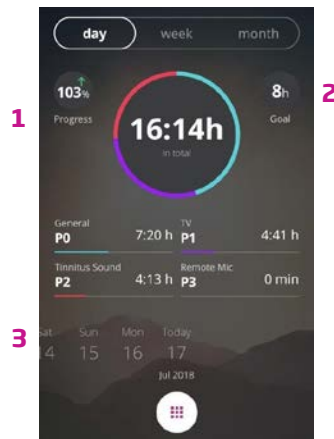

Dag

Nu kan du se dina personliga framsteg mot ditt uppsatta mål (1). De totala antalet timmar visas i den över cirkeln (2) och varje färg anger program och användningstid. Välj en dag du vill se (3).



Vecka

Tryck på vecka (1) för att se användardata, framsteg och genomsnittlig användning per vecka.



Månad

Tryck på månad (1) för att se användardata, framsteg och genomsnittlig användning per månad.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
+45 3917 7100

CE0543

www.oticon.se

oticon
PEOPLE FIRST