

Apple Watch'ta Oticon Companion App için Hızlı Kılavuz

Oticon Companion bir Apple Watch ile nasıl yüklenir, eşleştirilir ve kontrol edilir.

Apple Watch ile ses seviyesini kontrol edebilir, programı değiştirebilir, işitme cihazlarınızı sessize/ sessizden alabilir, Speech Booster'ı açabilir veya kapatabilir, Uzak mikrofonu kapatabilir ve pil seviyelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, saatin ekranından uygulamaya kolayca erişmenize izin veren Komplikasyonlar denen özel özellikler de etkinleştirilebilir.

Başlarken

Oticon Companion'ı, Apple Watch'ta kullanmadan önce, uygulamayı bir iPhone'a yüklemeniz ve işitme cihazlarının iPhone'unuzla eşleştirildiğinden emin olmanız gerekir.

Sistem gereksinimleri

Uygulamayı Apple Watch ile kullanmak için ihtiyacınız olanlar:

- Apple Watch Series 4 veya üzeri
- WatchOS 8 veya üzeri



Oticon Companion
App'i App Store'dan
indirmek için QR
kodu okutun.




Download on the
App Store

Made for
iPhone | Apple Watch

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve Apple Watch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Apple Watch'unuzda Oticon Companion kurulumu


Burada bir Apple Watch üzerinde Oticon Companion'ın nasıl kullanılmaya başlanacağı gösterilir.

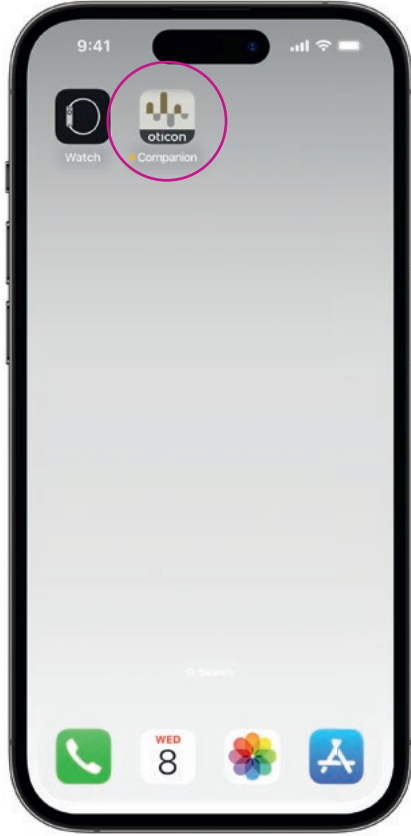

Öncelikle **Oticon Companion App'ı** App Store'dan iPhone'unuza indirin ve işitme cihazlarınızı iPhone'unuzla eşleştirin.



iPhone'unuzda **Watch app'ı** açın.

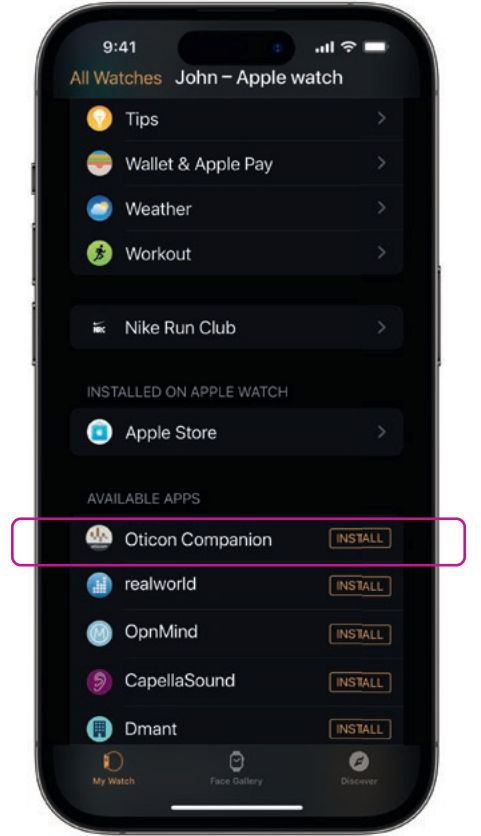

MEVCUT UYGULAMALAR'a ilerleyin ve Oticon Companion simgesinin sağ tarafındaki **YÜKLE** seçeneğine tıklayın. Böylece uygulama Apple Watch'unuza yüklenecektir.

Apple Watch'unuzda Oticon Companion'ın temel özelliklerini kullanmak

Uygulamayı açmak için Apple Watch'unuzda **Oticon Companion App** simgesine dokunun.



Pil seviyelerini kontrol edin

İşitme cihazınızın pil seviyesini görüntülemek için Genel Oticon Companion ekranında **sağa kaydırın**.



Genel

Genel Oticon Companion ekranı, programı değiştirmek, ses seviyesini ayarlamak ve işitme cihazlarınızı sessize almak için kullanılır.



Speech Booster

Speech Booster'ı açmak veya kapatmak ya da Uzak mikrofonu kapatmak için Genel Oticon Companion ekranında **sola kaydırın**.

Program ekranına girmek için **(P1)** program simgesine dokunun.



Programlar arasında gezinin ve seçmek istediğiniz **programa dokunun**.

Programlar arasında **Dijital Halkayı döndürerek** de gezinebilirsiniz.



Apple Watch Komplasyonlarının kurulumu

Saatinizin kadrانından uygulamaya hızlıca erişmek için bir Apple Watch komplasyonunu oluşturabilirsiniz*. Bu, saat kadrانında kısayol görevi gören kullanışlı bir Apple Watch özelliğidir.

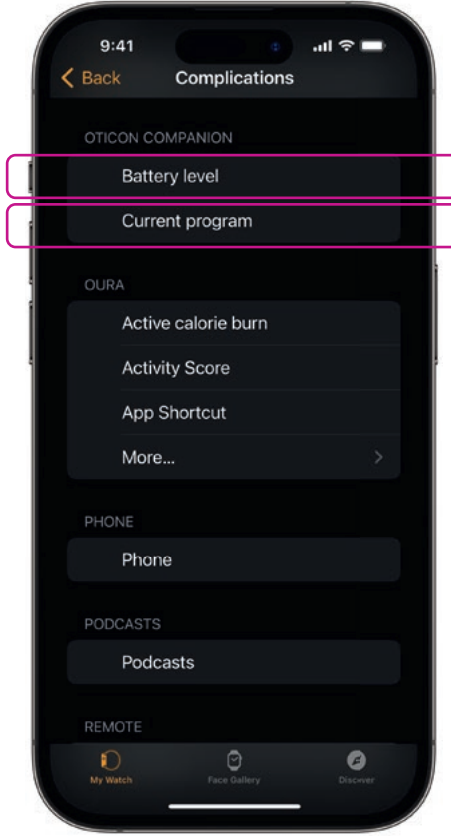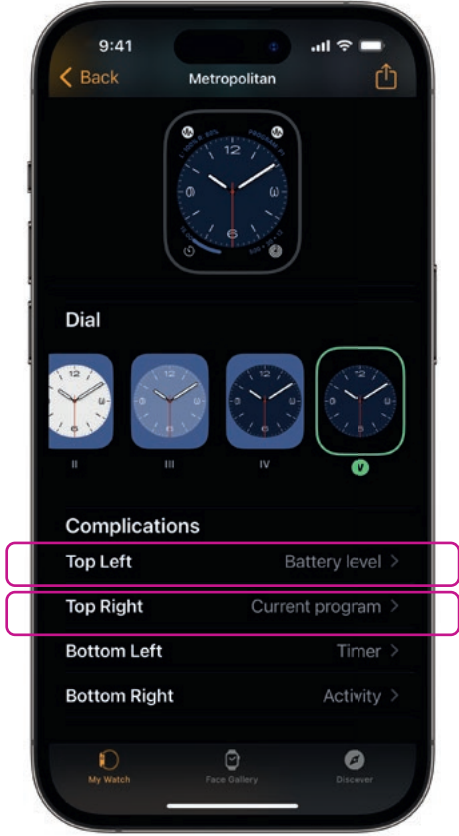

Kadran Galerisinden saat kadrانını seçin ve aşağıdaki Komplasyonlara ilerleyin. Lütfen tüm saat kadrانlarının Komplasyonların eklenmesine izin vermediğini unutmayın.

Sol Üst'e dokununuz ve bir kısayol seçin.

Komplikasyonlar arasında ilerleyin ve Oticon Companion altında **Pil seviyesi**'ni seçin.

Sağ Üst için işlemi tekrarlayın ve **Geçerli program**'ı seçin.

Böylece Komplasyonlar saat kadrانında, ekranın **üst köşesinde** gösterilir.

* Seçilen saat arayüzünde kullanılabilir Komplasyon olması durumunda.