

Kullanım kılavuzu

TV Adaptörü 2.0



Bu kitapçıġa giriř

Bu kitapçık, yeni TV Adaptörünüzün kullanımı ve bakımı konusunda size talimatlar sunar. Lütfen **Uyarılar** bölümü de dahil, kitapçıġı dikkatli bir biçimde okuyun. Bu sizin yeni TV Adaptörünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

TV Adaptörünüzün kullanımı ile ilgili ek sorularınız varsa, lütfen işitme cihazı uzmanınıza danışın.

| **Hakkında** | Başlangıç | Kullanım | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuġu içerir.

Kullanım amacı

Kullanım amacı	TV Adaptörü 2.0, Oticon kablosuz işitme cihazları ve Streamer Pro ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. TV Adaptörü 2.0, TV sesini TV Adaptöründen Streamer Pro aracılığıyla doğrudan işitme cihazına kablosuz olarak göndererek, işitme cihazı kullanıcısının TV'yi dinlemesini sağlar.
Kullanım gösterimleri	Kullanıma ilişkin gösterim mevcut değildir.
Hedef kullanıcı	Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kullanıcı ortamı	Kapalı mekan.
Kontraendikasyonlar	Kontraendikasyon yok.
Klinik yararlar	İşitme cihazının klinik faydalarına bakın.

İçindekiler tablosu

Hakkında	
Paket içeriği	6
TV Adaptörüne genel bakış	8
Başlangıç	
Kurulum	10
TV Adaptörünüzü yerleştirme	12
Elektrik prizine bağlama	14
TV'ye bağlama	16
TOSLINK'i kullanarak bağlama	18
RCA'yı kullanarak bağlama	20
Mini jak adaptörünü kullanarak bağlama	22
SCART'ı kullanarak bağlama	24
Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirme	26

Kullanım	
Ses seviyesi kontrolü	30
TV'yi dinlemeye başlama	32
SelectMe, birden fazla TV Adaptörü kullanımı	34
TV Adaptörünün bakımı	36
Uyarılar	
Uyarılar	38
Daha fazla bilgi	
Kullanım Koşulları	40
Teknik bilgiler	41

Paket içeriđi

Ürün kutusu, aşağıdaki öğelerden oluşur:



TV Adaptörü 2.0



Bu kitapçık (Kullanım kılavuzu)

Kutu 1



Güç kaynağı

Kutu 2



RCA kablosu



Mini jak adaptörü

Kutu 3



TOSLINK


TV Adaptörüne genel bakış

Mod	Güç göstergesi	TV göstergesi
Güç AÇIK, Streamer Pro bağlantısı yok		
Eşleştirme modunda		
Ses akışı - ses girişi tespit edilmedi		
RCA takılı ve akış sağlıyor		
TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)		
TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (geçersiz sinyal)*		
Arıza koşulu **		

○ Işık yok ● Yanıp sönüyor ● Sabit

* Başka bir giriş bağlantısı deneyin

** İşitme uzmanınızla irtibata geçin

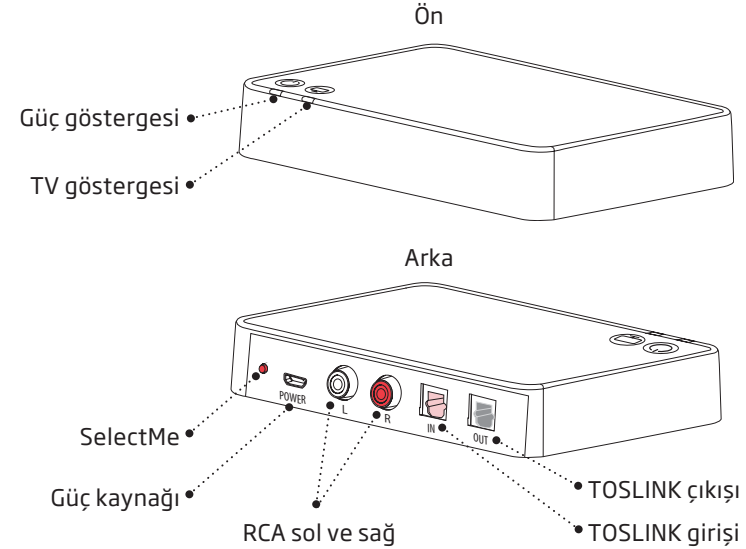

Daha ayrıntılı bilgi için: www.oticon.global/connectline

Kurulum

TV Adaptörünün ilk kullanımı

Streamer Pro ve işitme cihazlarınızı TV'nizle kullanmadan önce, TV Adaptörünüzün bir elektrik prizine takılması, TV'ye bağlanması ve Streamer Pro'nuzla eşleştirilmesi gerekir.

Bu kılavuz TV Adaptörünün kurulumunu adım adım tarif eder.

Kurulum için gereken tüm parçalar, pakete dahildir.



ÖNEMLİ NOT

Özel işitme cihazınızın fonksiyonlarının ayrıntıları için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

TV Adaptörünüzü yerleştirme

TV Adaptörü iki şekilde yerleştirilebilir:

1. TV'yi yakın - yatay olarak yerleştirilir (A).
2. Duvara asılı TV'ye yakın veya arkasına (dikey olarak) (vidalar dahil değildir) (B).

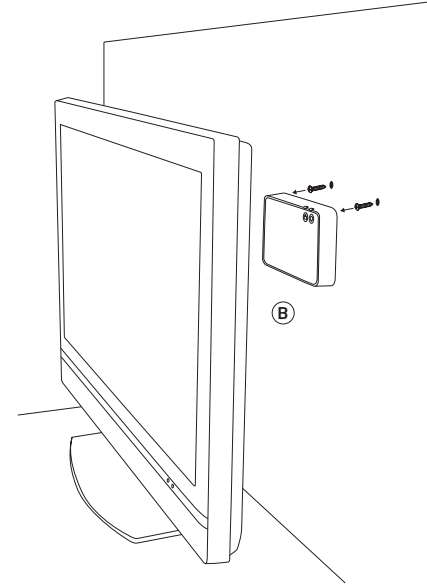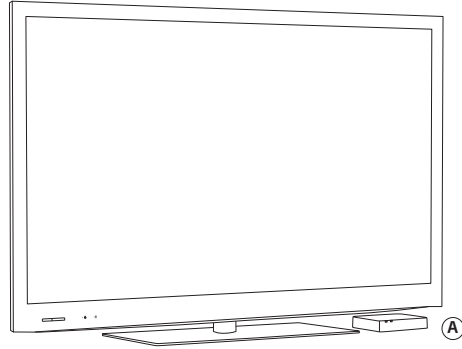


Elektrik prizine bağlama

Kutu no. 1'deki güç kaynağını kullanın.

1. Elektrik kablosunu TV Adaptöründeki "güç" konektörüne (A) takın.
2. Güç kaynağını duvardaki elektrik prizine (B) takın ve düğmeyi açık konuma getirin.
3. Birkaç saniye sonra, TV Adaptörünün (C) önündeki güç göstergesi  yeşil renkte yanacaktır.

ÖNEMLİ NOT

TV Adaptörünü şarj ederken, ürünle birlikte verilen orijinal güç kaynağını (5,0V/1A, CE ve güvenlik işaretli) kullanın.

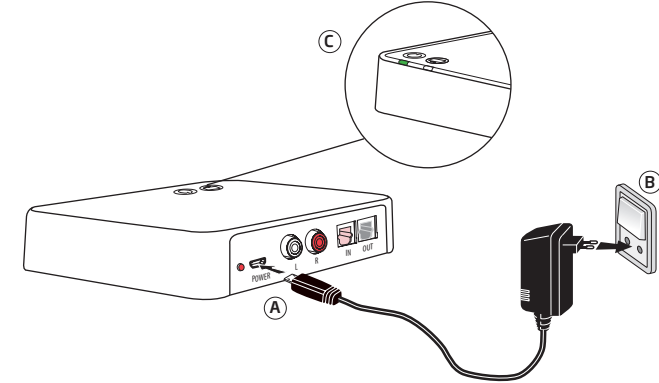

TV'ye bağlama

TV Adaptörünü TV'ye dört farklı şekilde bağlayabilirsiniz.


Bağlantı	Sayfa
TOSLINK. Dijital stereo (PCM) veya Dolby® Digital *	18
RCA ses çıkışı L+R	20
Mini jak ses çıkışı (genellikle kulaklık çıkışı)	22
SCART ses çıkışı (L+R)	24

* Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.


Lütfen uyumluluk için ConnectLine TV Adaptörü 2.0 (www.oticon.global/connectline) teknik özelliklerine ve TV kılavuzu/teknik özelliklerine bakın.

TV'nize uygun bir çözüm bulmak için lütfen aşağıdaki sayfalara bakın.


TOSLink (s. 18)

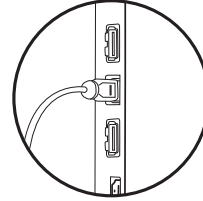


RCA (s. 20)

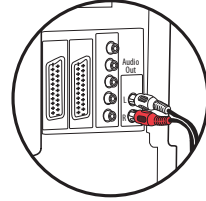

Mini jak (s. 22)

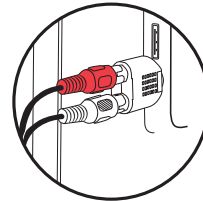

SCART (s. 24)

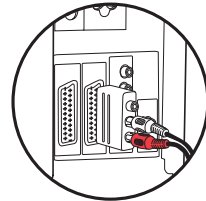

Daha ayrıntılı bilgi için: www.oticon.global/connectline


TOSLINK'i kullanarak bağlama

1. Kutu no. 3'teki TOSLINK kablosunu (A) kullanın.
2. Plastik kapağını TOSLINK kablosundan sökün. (B)
3. TOSLINK kablosunu TV'nizdeki/ev sineması sisteminizdeki (C) TOSLINK çıkışına bağlayın.
4. TOSLINK kablosunu TV adaptöründeki pembe TOSLINK girişine (D) bağlayın.
5. TOSLINK çıkışı (E), harici Dolby® Dekoderleri ve surround ses sistemleri gibi diğer TOSLINK cihazlarına bağlanmak için kullanılabilir.
6. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not

TV'nizi, DVD çalarınızı veya ev sineması sisteminizi, TOSLINK çıkışında doğru ses çıkışı kullanılabilecek şekilde ayarlamanız gerekebilir.

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne bakın: www.oticon.global/connectline

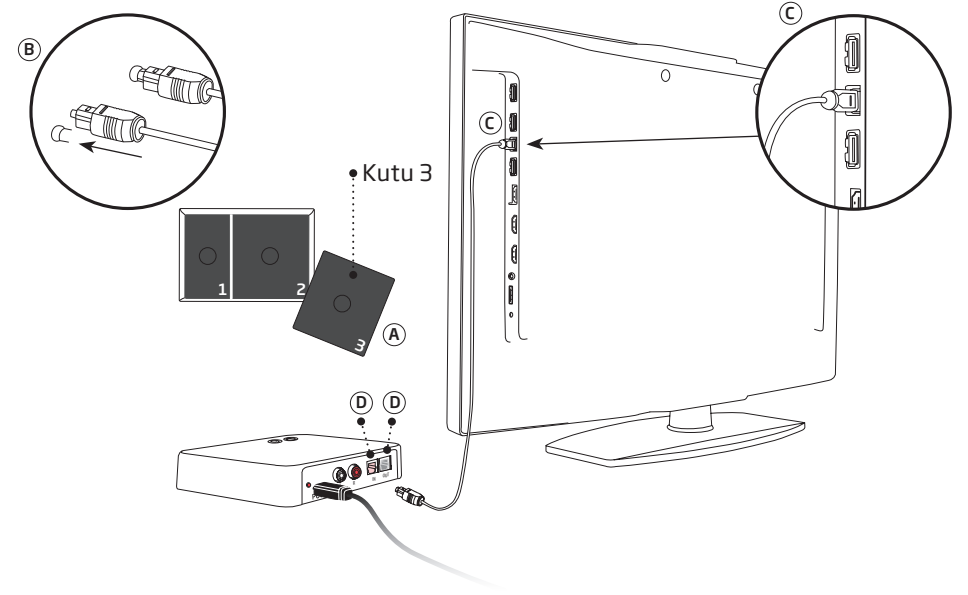


RCA'yı kullanarak bağlama

1. Kutu no. 2'deki RCA kablosunu kullanın (A).
2. RCA kablosunu TV'nizdeki (B) veya ev sineması sisteminizdeki RCA çıkışına bağlayın. (Genellikle "L - R AUDIO OUT" ile işaretlidir ve TV'nin arka veya alt panosunda bulunur.)
3. RCA kablosunu TV Adaptörünün arkasındaki RCA konektörlerine (C) bağlayın.
4. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not

TV'nizi, RCA çıkışında doğru ses çıkışı kullanılabilecek şekilde ayarlamamanız gerekebilir.

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne bakın: www.oticon.global/connectline

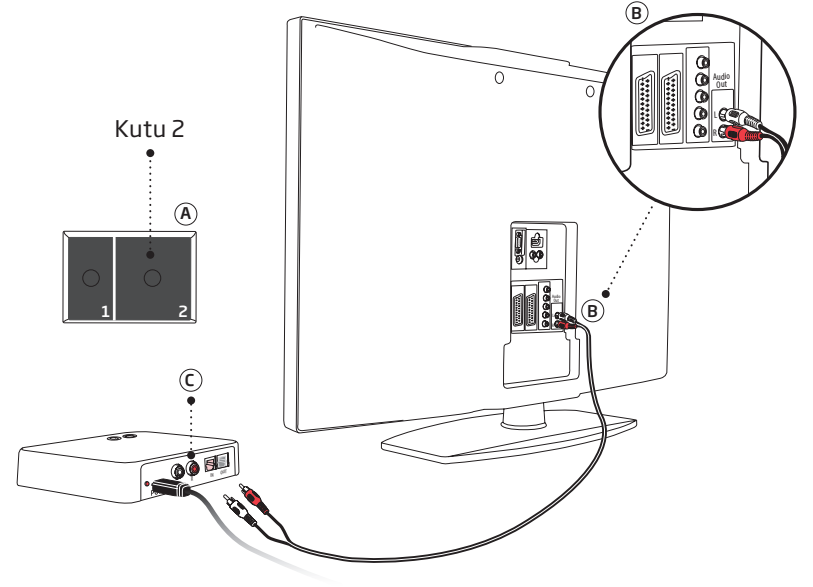


Mini jak adaptörünü kullanarak bağlama

1. Kutu no. 2'deki (A) mini jak adaptörünü kullanın.
2. RCA kablosunu mini jak adaptörüne (B1) bağlayın.
3. Mini jakı TV'ye bağlayın, bu genellikle kulaklık (B2) çıkışıdır.
4. RCA kablosunu TV Adaptörünün RCA girişine (C) bağlayın.
5. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not

Kulaklık çıkışına bağlanıldığında TV hoparlörleri sessize alınabilir ve ses sadece Streamer Pro/TV Adaptörü üzerinden duyulabilir.

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne bakın: www.oticon.global/connectline

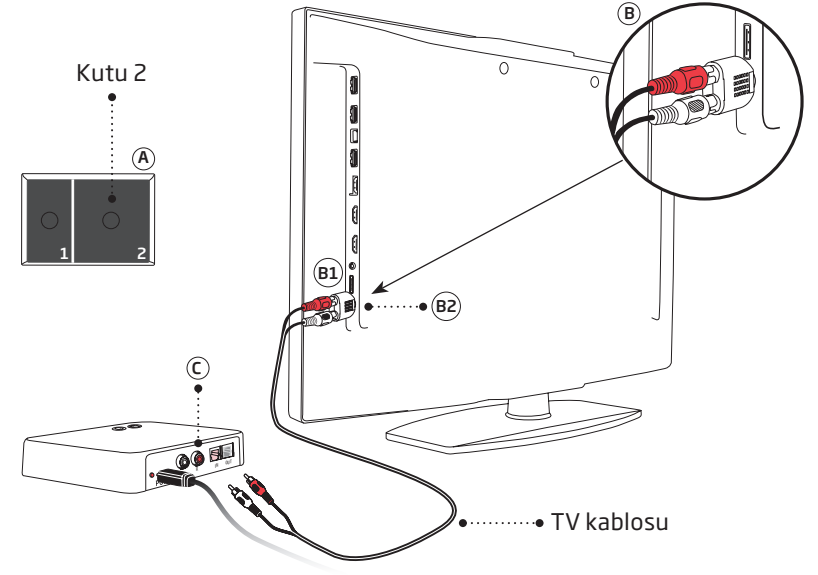

SCART'ı kullanarak bağlama


1. Bir SCART Adaptörü* kullanın. (A)
2. RCA kablosunu SCART Adaptöründeki (B) kırmızı ve beyaz uçlara bağlayın.
3. SCART Adaptörünü TV'nizdeki (C) SCART çıkışına bağlayın.
4. RCA konektörlerini TV Adaptörü RCA girişine (D) bağlayın.
5. Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirmek için sayfa 26'ya bakın.

Not

SCART konektöründeki ses çıkışı, TV'de seçilen kaynağa bağlı olabilir. Örneğin bazı TV'ler, SCART çıkışında sadece TV sesini kullanılabilir hale getirir (örn. bağlı bir DVD çalardaki ses).

Daha gelişmiş ve karmaşık kurulumlar için, şu adresteki destek bölümüne bakın: www.oticon.global/connectline

SCART Adaptörü, bu paket içeriğinde olmayan bir aksesuardır. Eğer bir SCART Adaptörüne ihtiyacınız olursa, lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin.

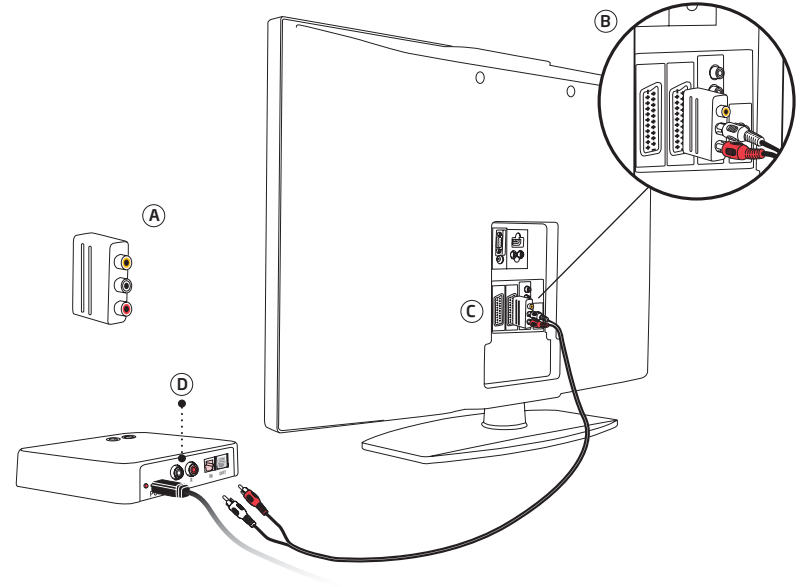


Streamer Pro'yu TV Adaptörü ile eşleştirme

Streamer Pro'nuzu TV dinlemek için kullanmadan önce, TV Adaptörünüz ile eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirme için:

1. TV Adaptörünün açık, yani güç göstergesinin sabit yeşil olduğundan emin olun.
2. Mavi ışık yanıp sönmeye (A) başlayıncaya kadar, Streamer Pro'daki (B) AÇMA/KAPAMA düğmesini 5-6 saniye basılı tutun.
3. Streamer Pro'yu TV Adaptörünün üzerine veya yakınına yerleştirin - eşleştirme işlemi 20-60 saniye sürer. TV Adaptörü otomatik olarak eşleştirme işlemini başlatacaktır.
4. TV Adaptöründeki güç göstergesi ve Streamer Pro'daki AÇMA/KAPAMA düğmesi kısa süreyle sabit mavi renge, ardından turuncu renge döndüğünde eşleştirme işlemi tamamlanmıştır.

Eşleştirme bir defa yapılır ve normalde tekrar edilmesi gerekmez.

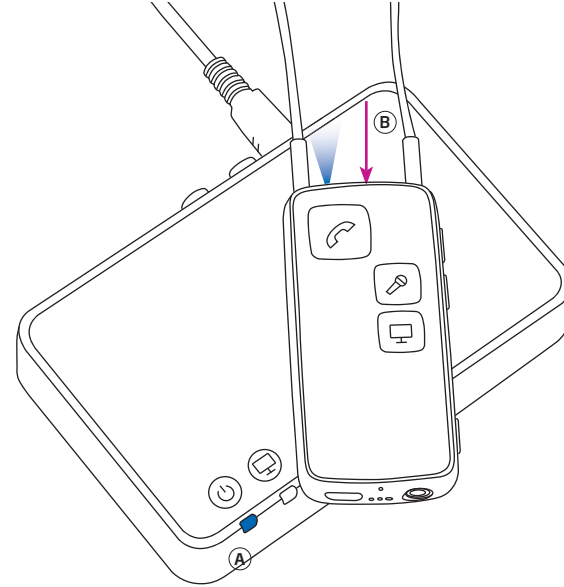

EŞLEŞTİRME			
Streamer Pro üst durum	Streamer Pro ön	TV Adaptörü	Açıklama
  		 	Streamer Pro ve TV Adaptörü AÇIK
  		 	Streamer Pro eşleştirme modunda
  		 	Eşleştirme tamamlandı
  		 	Ses akışı - ses girişi tespit edilmedi
  		 	RCA takılı ve akış sağlıyor
  		 	TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)

 Sabit  Yanıp sönme

Ses kontrolü

Her iki işitme cihazında da TV'nin ses seviyesini ayarlamak için, Streamer Pro'daki ses seviyesi düğmelerini kullanın. Sesi ayarlamak için aşağı veya yukarı kısa bir süre için basın. Diğer ayarlamalar için kısaca basmayı tekrarlayın.


Sessiz konum

TV izlerken sadece TV'nin sesinin duyulması için, işitme cihazlarınızdaki mikrofonlar kapatılabilir.


Ortam sesi kaybolana kadar, hem yukarı hem de aşağı ses seviyesi düğmelerine basın. İşitme cihazlarınızdaki mikrofonlar artık sessize alındığını belirten bir onay sinyali duyarsınız.

Not

İşitme cihazlarındaki TV sesi, TV'nin uzaktan kumandasıyla yapılan ses ayarlamalarından normalde etkilenmez.

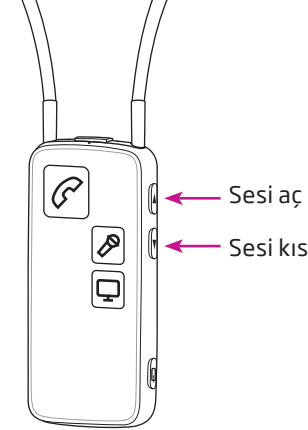

Streamer Pro

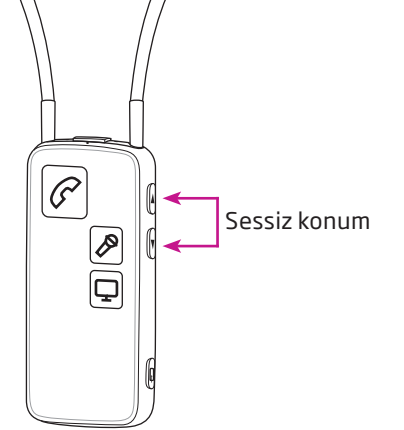

Streamer Pro

TV'yi dinlemeye başlama


Streamer Pro'yu boyun askısı ile boynunuzun etrafına taktığınızdan ve Streamer Pro'nun açık olduğundan emin olun.

TV sesini açma

Streamer Pro'nun ön kısmındaki TV düğmesine kısa süreyle basın. Streamer Pro, TV Adaptörüne bağlanır. Birkaç saniye sonra, Streamer Pro ve TV Adaptöründe sabit bir turuncu ışık görünür. İşitme cihazlarınızda önce bir onay sesi, ardından bağlanan TV'den gelen sesi duyarsınız.

TV sesini kapatma

Streamer Pro'nun ön kısmındaki TV düğmesine kısa süreyle basın. Hem Streamer Pro hem de TV Adaptöründe turuncu ışıklar söner. İşitme cihazlarınızda bir onay sesi duyarsınız.

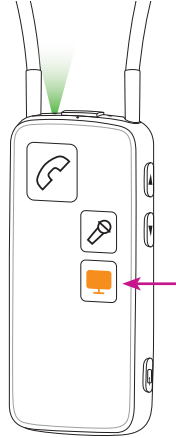

EŞLEŞTİRME			
Streamer Pro üst durum	Streamer Pro ön	TV Adaptörü	Açıklama
  		 	Streamer Pro ve TV Adaptörü AÇIK
  		 	Ses akışı - ses girişi tespit edilmedi
  		 	RCA takılı ve akış sağlıyor
  		 	TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)




SelectMe, birden fazla TV Adaptörü kullanımı

Streamer Pro 1.1 ve üzeri ile, birden fazla TV Adaptörü kullanabilirsiniz. Örneğin bir tane oturma odasında, bir tane yatak odasında.

TV Adaptörleri arasında geçiş yapmak için:

1. Herhangi bir TV Adaptörüne bağlı olmadığınızdan, yani Streamer Pro'nun açık ancak aktif olmadığından emin olun.
2. (A)'dan ses duymak istiyorsanız, TV Adaptöründeki SelectMe düğmesine kısa süreyle basın.
3. TV Adaptörü otomatik olarak bağlanır. İşitme cihazlarınızda önce bir onay bip sesi, ardından bağlanan TV'den gelen sesi duyarsınız.

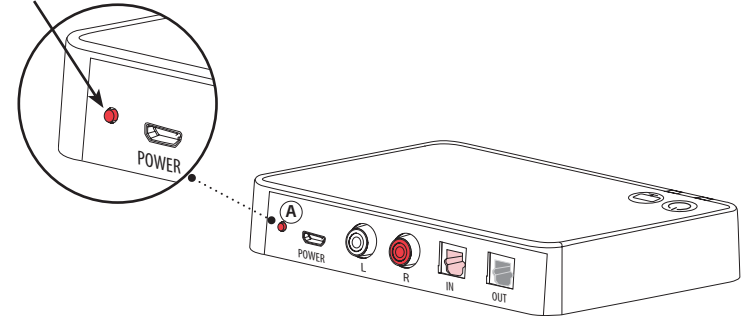

TV Adaptörünün bakımı

TV Adaptörünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

ÖNEMLİ NOT

TV Adaptörü asla su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için, TV Adaptörünüzü kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları incelemeniz önerilir. Kullanım sırasında veya kullanımdan kaynaklı olarak TV Adaptörünüz ile beklenmedik çalışma veya ciddi sorunlar yaşamanız durumunda, işitme uzmanınıza danışın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, cihazınızın elektromanyetik uyumluluğunun (EMC) azalmasına sebep olabilir.

Yangın tehlikeleri

TV Adaptörünün güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangına neden olabilecek enerjiye sahip değildir.

Parazit

TV Adaptörü uluslararası standartların en katı kurallarına göre geniş kapsamlı parazit testlerine tabi tutulmuştur. Ancak, TV Adaptörü ile diğer cihazlar arasında parazit meydana gelebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda TV Adaptörünü parazite neden olan cihazdan uzaklaştırın.

Harici ekipmana bağlantı

TV Adaptörünün bir yardımcı giriş kablosuyla harici ekipmana bağlandığında güvenliği, harici sinyal kaynağı tarafından belirlenir. Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC-62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Uyumlu olmayan ve tedarik edilmeyen aksesuarlar

Sadece üretici tarafından tedarik edilen aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

Kullanım Koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +5°C ila +40°C Nem: %15 ila %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25 °C ila +70 °C Nem: %15 ila %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Teknik bilgi

Model adı	BS-F200
-----------	---------

TV Adaptörü 2.0, 2,4 GHz'de Bluetooth kullanan bir radyo alıcısı-vericisi içerir. Radyo vericisi zayıftır ve her zaman 10 dBm toplam yayılma gücüne eşit 10mW'ın altındadır.

TV Adaptörü, radyo vericileri, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyeti ile ilgili uluslararası standartlara uygundur.

TV Adaptörü üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunabilir.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki Teknik veriler sayfasında (TD) bulabilirsiniz

ABD ve Kanada

Bu cihaz, aşağıdaki sertifika kimlik numaralarına sahip olan bir radyo modülü içerir:

FCC Kimliği: U28TVBOX03
IC: 1350B-TVBOX03

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSSs standartlarına uygundur.

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) bu cihaz zararlı çakışma oluşturmayabilir ve

(2) bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan parazitler de dahil tüm parazitleri almalıdır.

Dikkat: Uyumdan sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılar.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Bu donanım, FCC Kuralları, kısım 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı çakışmalara karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişimde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma oluşmayacağının hiçbir garantisi yoktur.

Bu ekipman, alınan telsiz veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olmadığı takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar açarak tespit edebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı anteninin yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı bulunduğu devreden farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın.
- Yardım için üreticiye veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine başvurun.

Uluslararası garanti

Cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Bu garanti kapsamında, cihazın tamir edilmesi veya muadil bir modelle değiştirilmesi tamamen üreticinin inisiyatifindedir.

Yukarıdaki garanti size tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceği her türlü yasal haklarını etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için ona başvurun.

Servis gerektiğinde

Cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme uzmanınıza götürün. İşitme uzmanınız, üreticiden garanti hizmeti almanız konusunda size yardımcı olabilir. İşitme uzmanınız, bu tür hizmetler için ücret talebinde bulunabilir.

Bu vesile ile üretici, bu TV Adaptörü 2.0'ın (BS-F200) temel gereksinimlerine ve 2014/53/EU Direktifinde yer alan diğer hükümlere uyumlu olduğunu ilan eder. Uygunluk beyanı, üreticiden temin edilebilir.



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklaması



Uyarılar

Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.



Üretici

Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT'de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.



AT işareti

Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET'ye uygundur.



Elektronik atık (WEEE)

İşitme cihazlarını, aksesuarları veya bataryaları yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/AB yönetmeliğinin kapsadığı elektronik cihazlar.



Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)

Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.



Çift yalıtım

Ürünün güç kaynağının çift yalıtımlı olduğunu gösterir. Bu, tekli arıza riskinin düşük olduğu, yani tekli arızaların meydana gelmeyeceği anlamına gelir.



Kapalı alanda kullanım

Ürünün kapalı alanda kullanıma uygun olduğunu gösterir.

Singapur IMDA etiketi

Cihazın Info-Communications Media Development Authority (IMDA) tarafından yayımlanan standartlar ve şartnamelere ve Singapur'da bulunan halka açık iletişim ağlarına uyumlu olduğunu ve yetkilendirilmiş diğer radyo iletişim ağlarıyla frekans girişimine neden olmadığını belirtir.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması



Kuru tutun

Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.



Dikkat işareti

Uyarılar ve dikkatler için talimatlara başvurun.



Katalog numarası

Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Seri numarası

Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Tıbbi Cihaz

Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır.

5,0V
200mA

Güç kaynağı çıkışı

Güç kaynağından cihazınıza gönderilen gücün oranını belirtir.

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması

	Güney Afrika ICASA etiketi Bu cihazın Güney Afrika'da satılmak üzere lisansa sahip olduğunu belirtir.
	Japon TELEC sembolü Sertifikalı radyo ekipmanı için işareti belirtir.
	Brezilya ANATEL etiketi Bu cihazın Brezilya'da satılmak üzere onaylı ve doğrulanmış olduğunu belirtir.
	Kore Sertifikasyonu İşareti (KC) Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için Kore ürün güvenliği gereksinimleri ile uyumludur.
	NCC sembolü İletişim bilgi ekipmanı Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) sertifikasyonu.

191554TR / 2020.01.24

191554TR / 2020.01.24



0000191554000001

oticon
life-changing **technology**

191554TR / 2020.01.24