

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AmpliPOWER 40/50

Dansk



Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen!

VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt designet til folk med høreproblemer og er forsynet med en volumenkontrol i telefonrørets højttaler for individuel tilpasning. Alle brugere må være påpasselige med at indstille telefonens volumenkontrol til det lavest mulige acceptable niveau for hver enkelt bruger. Der skal udvises påpasselighed for at sikre, at en uerfaren bruger er bekendt med dette krav.


INDHOLDSFORTEGNELSE


Indholdsfortegnelse	2
Beskrivelse	3
Tilkobling	6
1 - Tilkobling af telefonen	6
2 - Indstilling af alarm og ringestyrke	6
3 - Indstilling af ringetoner	7
4 - Tone/Puls kontakt (T/P)	7
5 - Tid for R-tast (270/100)	7
6 - Ventekontakt for hotelbeskeder	8
7 - Vægmontering	8
Brug af telefonen	9
8 - Svar på indkommende opkald	9
9 - Regulering af lydstyrke og ringetone	9
10 - Foretag opkald	11
11 - Gentag sidst opkaldte nummer	12
12 - Genkald, * & # knapper	12
13 - Lydløs tilstand	12
14 - Oplagring af telefonnumre	12
15 - Opkald til lagret telefonnummer	13
Muligheder	14
16 - Direkte vibrerende telefonrør (Tilbehør)	14
17 - Shaker (Tilbehør)	14
18 - Headset med mikrofon (Tilbehør)	15
Generelt	16




For produktsupport og hjælp - besøg vores website
på www.geemarc.com

BESKRIVELSE

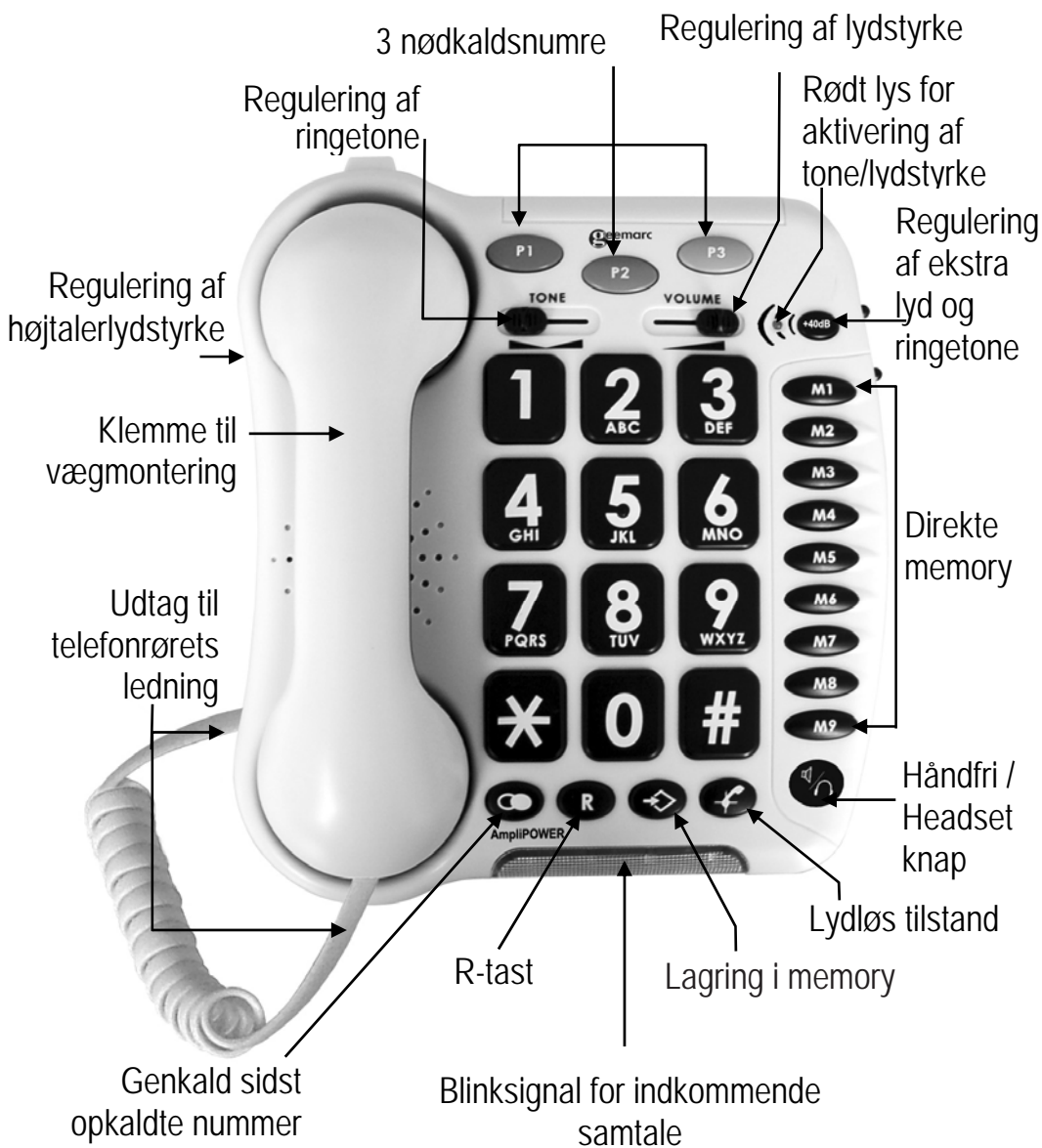

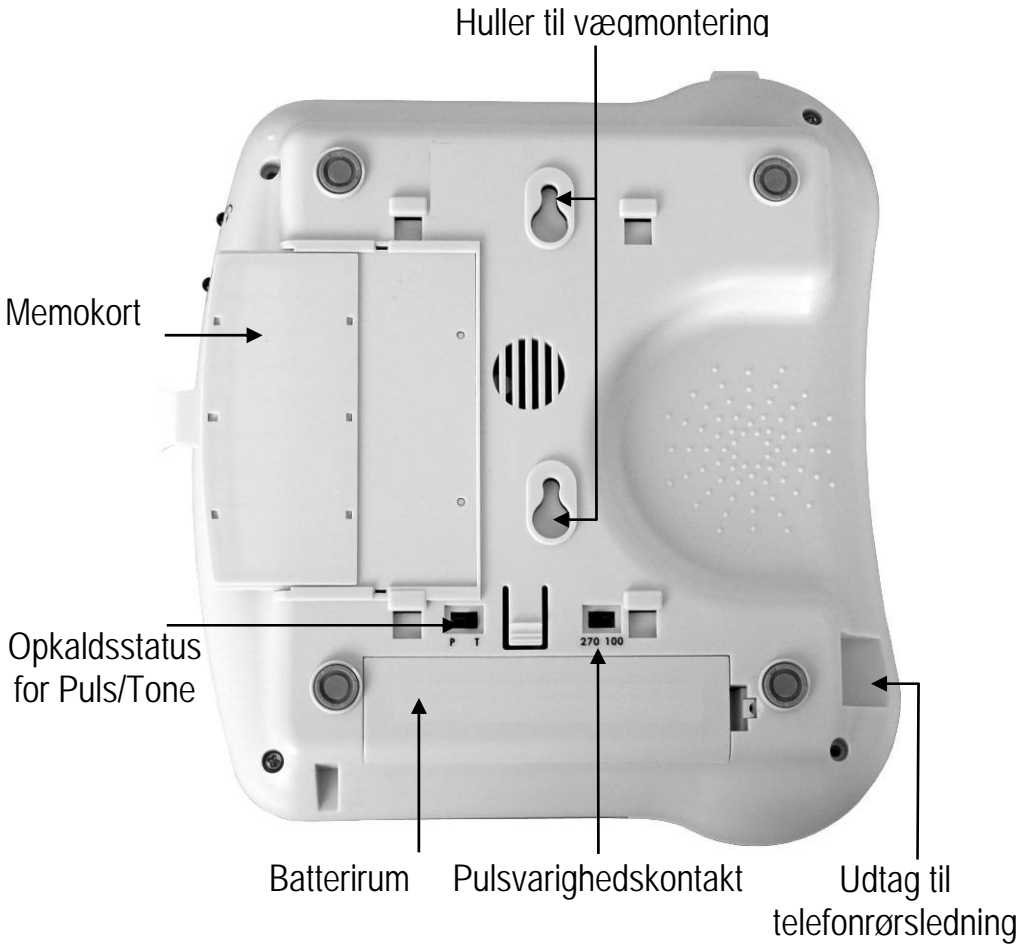


BESKRIVELSE

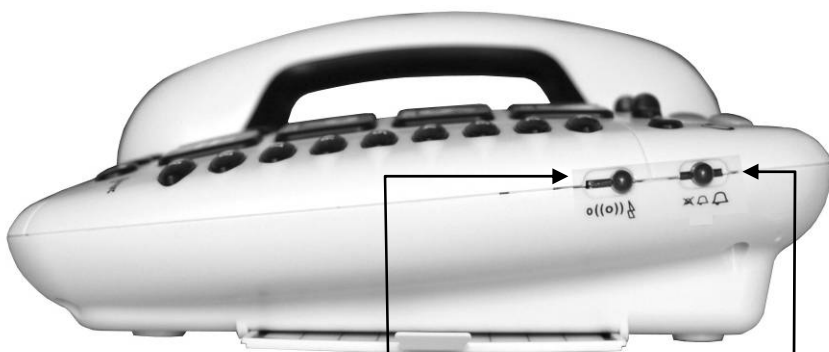

Indstilling af ringealarm

Kontakt for Høj/Lav/Fra af ringetone

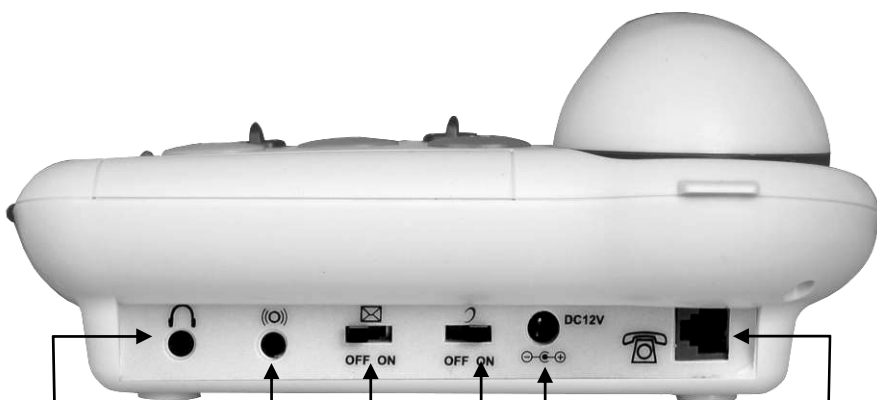

Udtag til headset

Udtag til shaker

Kontakt for hotelbeskeder

Udtag til adaptor

Til/Fra kontakt til regulering af lydstyrke og ringetone

Udtag til telefonlinje


1 - Tilkobling af telefonen

- Forbind ledningen til telefonrøret.
- Åbn batterilåget ved at skrue skruen, der holder det, af. Sæt 4 x AAA alkaliske batterier i (følger ikke med). Smæk batterilåget på plads.
Ved elektricitetssvigt er batterierne nødvendige for brug af telefonen.
- Forbind telefonledningen.
- Hvis shaker er anskaffet - sæt dens ledning i stikket.
- Hvis headset er anskaffet - sæt dens ledning i stikket.
- Sæt PTT stikket i telefonstikket på væggen.
- Forbind 12V strømforsyningens ledning til telefonen.
- Forbind 12V strømforsyningen til stikket i væggen (**).

(**) Klassificeret som "farlig spænding" ifølge EN60950 standard.

2 – Indstilling af alarm og ringestyrke

A 3-positionskontakt anbragt på højre side af telefonen tillader nedenstående indstillinger:

- 0 : Kun ringetonen er aktiveret.
- ((O)): Ringetone og shaker er aktiverede.
-  : Ringetone og blinkende diode er aktiverede.

3 – Indstilling af ringetoner

En kontakt på højre side muliggør at sætte ringetonen til HØJ, LAV, FRA:

 : Fra,  : Lav,  : Høj

Din telefon kommer med ringetonen indstillet på «Høj» og melodien sat på «6».

	Lav	Middel	Høj
Melodi 1	1	2	3
Melodi 2	4	5	6 (Fabriksindstilling)
Melodi 3	7	8	9

Hvis du ikke bryder dig om ringetonen, kan du vælge en ny melodi ved at ændre indstillingerne som følger:

- Løft telefonrøret.
- Tryk på  knappen.
- Tryk på # knappen.
- Tryk på en af knapperne **1-9**.

Ringetonen bliver aktiveret ved næste opkald.


4 – Tone/Puls kontakt (T/P)

Tone/Puls kontakten er forindstillet fra fabrikken til toneposition (T). I Danmark, bruger alle telefoncentraler nu toneopkald. Hvis din telefon ikke ringer ud, er det sikkert fordi, den bliver brugt fra et ældre, privat omstillingsbord (PBX). I det tilfælde skal Tone/Puls kontakten flyttes til Puls.

5 – Tid for R-tast (270/100)


For brug i Danmark, er PV-kontakten indstillet fra fabrikken til 100ms. Den kan omstilles til 270ms for andre steder eller for PBX'er (private omstillingsborde).

6 – Ventekontakt for hotelbeskeder

Disse bruges med den nye service, der ydes til hotelnetværk. En kontakt,  der sidder på bagsiden af telefonen, muliggør at tilslutte **ON** ventefunktionen for hotelbeskeder. Når kontakten står på **ON** og når du modtager en besked, lyser det røde lys for at informere om, at du har en besked på din telefon.

7 – Vægmontering

Bor 2 huller i væggen (80 mm fra hinanden). Isæt rawlplugs og skruerne, lad ca. 6 mm af skruerne stå ud fra væggen. Lad telefonen glide nedad for at holde den fast.

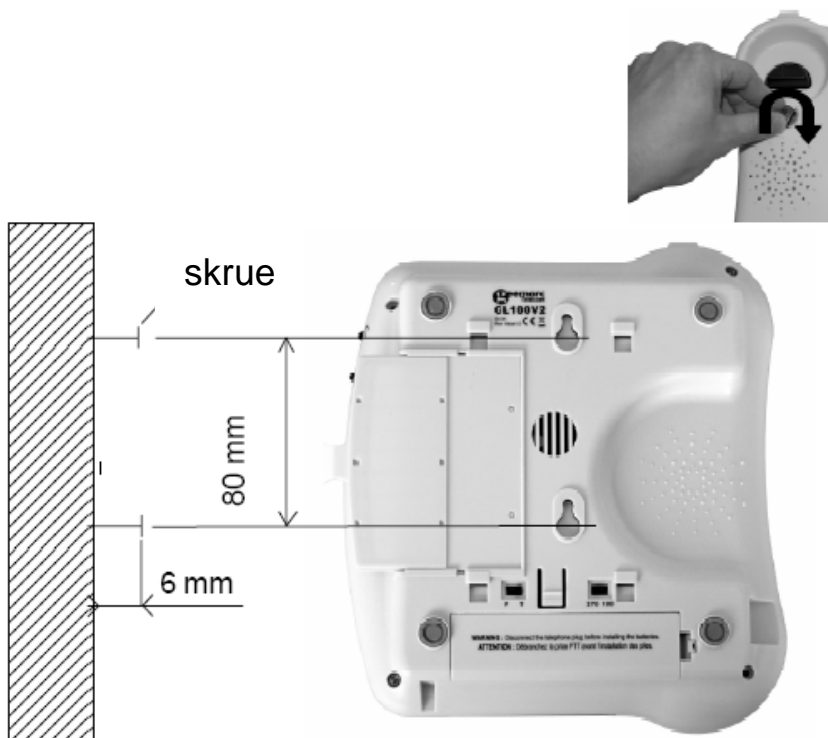



BRUG AF TELEFONEN

8 – Svar på indkommende opkald



Uden headset:

- Når et indkommende opkald modtages, ringer telefonen. For at svare - løft telefonrøret og tal.
- Når samtalen er færdig, læg telefonrøret omhyggeligt på plads i dets holder for at gøre linjen fri.

Med headset (valgfrit):


- Når et indkommende opkald, som du ønsker at besvare med headsettet, modtages - tryk på  knappen og tal.
- Når samtalen er færdig, tryk på  knappen igen for at gøre linjen fri.

I håndfri status:


- Når et indkommende opkald modtages, ringer telefonen. For at besvare opkaldet - tryk på  knappen.
- Når samtalen er færdig, tryk på  knappen for at gøre linjen fri.

9 – Regulering af lydstyrke og ringetone

Du kan øge lydstyrken og regulere den indkommende ringetone efter dit eget behov. Knappen +40 dB muliggør at aktivere ekstra modtagelse og tonefunktioner under samtalen, hvis dette ønskes. Når funktionen er aktiveret, lyser det røde lys for ekstra modtagelse og tonefunktioner. Det findes nær +40 dB knappen. Regulér **TONE** og **LYDSTYRKE** knapperne, så høreniveauet passer til eget behov.

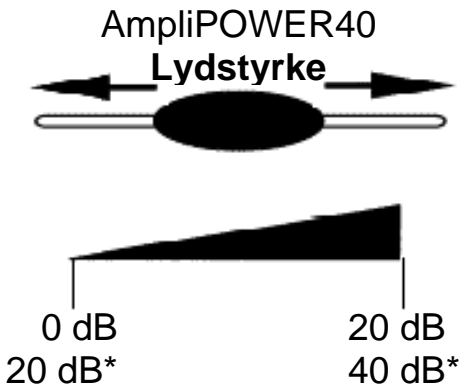

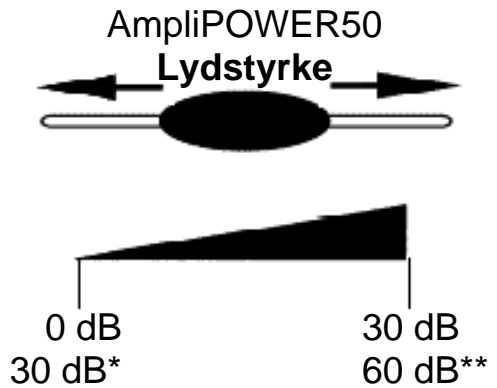

* Tryk på knap +40dB



** Tryk på knap +60dB

Obs:



Når kontakten  bagpå telefonen er på **ON**, aktiveres de ekstra modtagelse og tonefunktioner automatisk, hver gang du bruger telefonen. Når kontakten  er slået fra (**OFF**), er du nødt til at aktivere funktionen ved at trykke på knappen + 40dB (eller +60 dB for AmpliPOWER 50). Tone og lydstyrkeregulering (20dB til 40dB for AmpliPOWER 40 og 30 dB til 60 dB for AmpliPOWER 50) aktiveres kun, når knappen er indstillet på **ON**. Når knappen står på OFF, kan lydstyrken kun reguleres fra 0 dB til 20 dB (0 dB til 30 dB for AmpliPOWER 50).

10 – Foretag opkald



Uden headset:

- Løft telefonrøret.
- Afvent klartonen og indtast det ønskede nummer.
- Når samtalen er færdig, læg telefonrøret omhyggeligt på plads i dets holder.


Med headset (valgfrit):

- Tryk på  knappen.
- Afvent klartonen og indtast det ønskede nummer.
- Når samtalen er færdig, tryk på  knappen igen for at gøre linjen klar.


I håndfri status

- Tryk på  knappen.
- Afvent klartonen og indtast det ønskede nummer.
- Når samtalen er færdig, tryk på  knappen for at gøre linjen fri.
- Hvis der ikke svares på det opkaldte nummer, tryk på knappen igen for at gøre linjen fri.

Obs:

- For at deaktivere den håndfrie funktion under en samtale, løft telefonrøret. For at aktivere den håndfrie funktion under en samtale, tryk på  knappen og læg røret på.
- Under en samtale i håndfri status, kan du justere højttalerlyden til den ønskede styrke. Bare brug glidekontrollen LYDSTYRKE, der sidder på enhedens venstre side.



11 – Gentag sidst opkaldte nummer

- Løft telefonrøret.
- Afvent klartonen og tryk på  knappen.
- Det før kaldte nummer bliver automatisk genkaldt (gælder ikke for memorynumre).

12 – Genkald, * & # knapper

Disse bruges med de nye servicefunktioner, der ydes til digitale centraler. For detaljer, kontakt venligst din netværksudbyder.

13 – Lydløs tilstand

Hvis du vil tale privat med nogen anden i lokalet, uden at din samtalepartner hører, hvad der bliver sagt, tryk og hold  knappen. Du kan stadig høre personen i telefonen, men denne kan ikke høre dig, mens den er i lydløs tilstand. For at genoprette den normale samtale, slip  knappen.

14 – Oplagring af telefonnumre



Din telefons direkte memory kan lagre 12 telefonnumre, inklusive 3 prioriterede numre (maksimum 21 cifre for hvert nummer).

For eksempel kan de 3 prioriterede numre **P1**, **P2**, **P3** være:

- Lokal politistation,
- Din læge
- Familie

BRUG AF TELEFONEN

For at lagre et nummer, følg nedenstående instrukser:

- Løft telefonrøret.
- Tryk på  knappen.
- Tryk på **M1**, **M2**, ..., eller **M9** eller et af de 3 prioriterede numre for at lagre det ønskede nummer.
- Tast nummeret.
- Tryk på  knappen igen.

Numre går tabt efter nogle timer, hvis du tager din telefon ud af stikket. Indtastning af et nyt nummer i memory sletter automatisk det forrige nummer.

15 – Opkald til lagret telefonnummer

- Løft telefonrøret og afvent klartonen.
- Tryk på den relevante knap **M1**, **M2**, ..., eller **M9** eller et af de 3 prioriterede **P1**, **P2**, **P3** numre, det lagrede nummer ringes automatisk op.

For at registrere dit lagrede telefonnummer, brug indekshortet, der findes under basen.

16 – Direkte vibrerende telefonrør (Tilbehør)

Hvis du lider af konduktiv hørenedsættelse, kan du bruge et Direkte vibrerende telefonrør. Prøv at placere det Direkte vibrerende telefonrør fra din telefon, foran og en smule under dit øre eller bag dit øre, for at se hvilken position, der er bedst for dig.

Hvis du ikke lider af hørenedsættelse, kan du bruge telefonen normalt og sætte modtageren for øret.

Hvis du har brug for et Direkte vibrerende telefonrør ref: CLA4, kan du købe det fra din detailhandler eller din hørespecialist.

Hvis det ikke fungerer, besøg venligst vores website (www.geemarc.com).


For at installere det Direkte vibrerende telefonrør, afbryd standardtelefonrøret fra den snoede ledning og erstat det med det Direkte vibrerende telefonrør.

17 – Shaker (Tilbehør)

Hvis du vil opgradere din telefon ved at bruge en SHAKER ref: CLA2, stik shakerkontakten i udtaget på ((O)), der findes bagpå telefonen. Når, der modtages et indkommende opkald, aktiveres shakeren, når telefonen ringer.

Obs: Denne mulighed skal indstilles i ALARM OG RINGE MULIGHEDER punktet (side 6) for at blive aktiveret. For at anskaffe en SHAKER se punkt 1 ovenfor.

18 – Headset med mikrofon (Tilbehør)

Hvis du vil svare på opkald eller ringe ud med et Geemarc headset ref: CLA3, stik headsetkontakten i udtaget på , der findes bagpå telefonen.

Obs: Når du bruger headset, aktiveres højttaleren og det anbefales at indstille højttaleren i laveste position.

Anvisninger for genbrug:

Beholdere til affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er sat op, for at den slags produkter, kan genbruges på bedst mulige måde, når de ikke mere kan bruges.

Smid ikke dette produkt ud i den almindelige skraldespand, når det ikke duer mere.

Benyt venligst en af følgende metoder til at bortskaffe produktet:

- Fjern batterierne og anbring dem i den korrekte WEEE beholder. Anbring produktet i den korrekte WEEE beholder.
- Eller giv det gamle produkt tilbage til forhandleren. Hvis du køber et nyt produkt, bør forhandleren modtage det gamle.

På denne måde sikrer du, ved at følge disse instrukser, beskyttelse af sundhed og miljø.



Telefonforbindelse:

Den spænding, der er på telekommunikationens netværk, er klassificeret TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) ifølge EN60950 standard.

Erklæring:

Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav samt med andre relevante krav fra Radio and Telecommunications Terminal Equipment 1999/5/EEC og i særdeleshed med artikel 3 sektion 1a, 1b og sektion 2.

Erklæringen om overensstemmelse kan ses på www.geemarc.com



Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset

reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.

6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.



AmpliPOWER40/50_Danish_Ver1.0