

Ergophone S 510 Phonic Ear

Forstærkertelefon med
teleslynge og store taster



DK Programmeringsvejledning

 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Indholdsfortegnelse

1	Generel information	6
1.1	Vejledninger	6
2	Menuoversigt	7
2.1	Styring af telefonen med funktionstasterne	7
2.2	Menuer	7
3	Alarmer	10
3.1	Definitioner	10
3.2	Beskrivelse	10
3.3	Oversigt over opkaldstriggere	11
3.4	Modtagelse, besvarelse og afslutning af alarmopkald	12
3.5	Programmering af grundindstillingen "Alarmopkald"	13
3.5.1	Slå alarm til/fra	13
3.5.2	Fastlæg og gem alarmnumre	14
3.5.3	Indstil alarmparametre.....	16
4	Nødopkald	18
4.1	Nødopkaldsforløb	18
4.2	Nødopkaldstastens lys	19
4.3	Programmering og test af nødopkaldsfunktion.....	19
4.3.1	Tildeling af alarmnumre til nødopkaldstast og taster	20
4.3.2	Test nødopkald	21
5	Fejlbesked	22
5.1	Visning af fejlbeskeder	22
5.2	Fejlbeskedsforløb	23
5.3	Programmering og test af fejlbeskedsopkald	23
5.3.1	Tildeling af alarmnumre	24
5.3.2	Test fejlbesked.....	24
5.4	Visning af fejlbesked på telefonen	25
6	Testopkald.....	26
6.1	Testopkaldsforløb	26
6.2	Programmering og test af testopkald	26
6.2.1	Tildeling af alarmnumre	27
6.2.2	Slå testopkald til/fra og fastlæg tid	28
6.2.3	Test testopkald	28

Indholdsfortegnelse

7	Overvågning	29
7.1	"Via antal opkald"	29
7.1.1	"Via antal opkald" forløb	29
7.1.2	Beskrivelse	29
7.1.3	Programmering og test af "Via antal opkald"	30
7.2	"Via CLIP-nummer"	32
7.2.1	"Via CLIP-nummer" forløb	32
7.2.2	Beskrivelse	32
7.2.3	Programmering og test af "Via CLIP-nummer"	33
7.3	"Via specialopkald"	34
7.3.1	Programmering og test af "Via specialopkald"	35
7.4	Slå overvågning fra	35
8	Tastespærring	36
8.1	Vælg begrænsningstype	36
8.2	Gem spærrede numre	37
8.3	Gem direkte telefonnummer	38
8.4	Gem undtagelsesnumre	38
8.5	Vælg undtagelsesnumre	39
9	Frigivet / spærret telefonliste	40
9.1	Gem frigivne telefonnumre	40
9.2	Gem spærrede telefonnumre	41
9.3	Aktiver liste	41
10	Slet telefonbog / check ud	42
10.1	Slet telefonbog	42
10.2	Check ud	42
11	Grundindstillinger	43
11.1	Indstilling af generelle funktioner	43
11.2	Indstilling af opkaldsfunktioner	45
11.3	Indstilling af overvågning	47
11.4	Indstilling af kvikkaldstaster med andre funktioner	48
12	Service	50

Indholdsfortegnelse

13	Bilag.....	52
13.1	Fejlfindingsguide.....	52
13.2	Forholdsregler, hvis telefonen bliver beskadiget	53
13.3	Fabriksindstilling af vigtige funktioner.....	54
13.4	Tekniske data.....	55

1 Generel information

1.1 Vejledninger

Brugervejledning

I brugervejledningen får du forklaret, hvordan telefonen skal betjenes, og hvordan funktionerne indstilles uden pinkode.

Brugervejledningen er en del af produktet. Opbevar derfor vejledningen, så længe telefonen bruges. Hvis du giver telefonen til en anden, så læg brugervejledningen ved.

Programmeringsvejledning

Programmeringsvejledningen henvender sig til den, der skal gøre telefonen klar til brug. Her får du forklaret, hvordan telefonen skal betjenes, og hvordan funktionerne indstilles med pinkode. De tekniske data og fejlfindingsguide findes også i vejledningen.

Menuoversigt

2 Menuoversigt

2.1 Styring af telefonen med funktionstasterne

På telefonens startskærm har du via funktionstasterne adgang til telefonbogen (T-bog), opkaldslisten (Liste), menuen og højttaleren (🔊).

Du kan indstille din telefon via menuen.

Menu	Åbn menuen.
↓	Vælg funktion (frem).
↑	Vælg funktion (tilbage).
Ok	Bekræft funktion/indtastning.
Tilbage	Kort tryk: Vend tilbage til det forrige niveau. Langt tryk: Vend tilbage til startskærmen.

2.2 Menuer

Følgende funktioner uden pinkode er beskrevet i brugervejledningen:

Niveau 1	Niveau 2
Hurtigvalg	Gem telefonnummer på kviktast Gem kontakt i telefonbog <i>Slet telefonbog</i> Gem telefonnummer på kortvalgstast
Lyde & signaler	Indstil ringemelodi Slå ringetonen til/fra <i>Liste over frigivne telefonnumre til ringetonen</i> <i>Liste over spærrede telefonnumre til ringetonen</i> Slå tastelyd til/fra
Frigiv menu PIN	Kun adgang til den beskyttede "administratormenu" med pinkode (4 tegn).

Undtagelser: Funktioner med kursiv kræver indtastning af pinkode og er beskrevet i programmeringsvejledning.

Menuoversigt

Følgende funktioner med pinkode er beskrevet i denne programmeringsvejledning. Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi at ændre pinkoden, se afsnit 11.1.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Alarmer	Gem alarmnummer	
	Opkaldstrigger	Nødopkaldstast Fejlmeddelelse Kontrolopkald
	Indstillinger	Antal forløb Pausetid Forbindelsestid Identifikationsnummer „Lydstyrke høj“ til/fra Sluttone til/fra
	Testopkald	Til/fra/testopkaldstid
	Alarm til/fra	
Medhør (Overvågning)	Medhør indstillinger (Overvågningstilstande)	Medhør fra Antal ringninger Via CLIP-nummer Via specialopkald
	Gem „overvågningspin- kode“	
	Indstilling af antal opkald	
	Gem telefonnummer un- der ”vis-nummer” (CLIP)	
Taste- spærring	Begrænsningstype	Ingen spærring Direkte opkald Automatiske direkte opkald Spærrede numre Fuld spærring Kun kortvalg
	Gem spærrede numre	
	Gem direkte telefon- nummer	
	Gem undtagelsesnummer	

Menuoversigt

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Grund-indstillinger	Generelt	Sprog Dato til/fra Tid on/off Dato/tid Ændre tid Opkalds-LED til/fra Displaykontrast Ændring af pinkode Headset-tilstand til/fra Ændring af vis-nummer tilstand (CLIP)
	Ringer op	Flashtid Bylinjekode PABX-kode Pausetid Teleselskab nummer
	Overvågning	Strømforsyning Telefonlinje Timer trigger Fejl-LED
	Funktionstaster	Kvikkaldstast Servicetast R-tast
Service	Information Reset Re-initialisering Fabriksindstilling Sluk apparat Konfiguration fra SD-kort Konfiguration til SD-kort Software-update	

Hvis du vil foretage indtastninger inden for 30 sekunder efter at have forladt den pinkode-beskyttede menu, behøver du ikke indtaste pinkoden igen.

3 Alarmer

3.1 Definitioner

Alarmer har til formål at videregive informationer via automatiske opkald. Under begrebet "Alarmer" hører følgende 3 områder:

- | | |
|-------------------|--|
| Nødopkald | Nødopkaldet udløses ved tryk på nødopkaldstasten på telefonen eller via valgfrie ledningsforbundne opkaldstriggere (f.eks. træksensor).
> Se kapitel 4 Nødopkald. |
| Fejlbesked | Fejlbeskeden udløses, når en teknisk fejl registreres af telefonen. Her udløser telefonen selv opkaldet.
> Se kapitel 5 Fejlbesked. |
| Testopkald | Testopkaldet udløses på et fast indstillet tidspunkt for at teste, om telefonen fungerer korrekt. Telefonen udløser selv opkaldet.
> Se kapitel 6 Testopkald. |

3.2 Beskrivelse

Alarmopkaldets forløb


Opkaldssekvens: Ved opkaldssekvens forstås rækkefølgen af alle programmerede opkald. Alle telefonnumre ringes op i et loop, indtil alarmopkaldet besvares, og der er kvitteret for det, eller sekvensen slutter automatisk.

Opkaldscyklus: En opkaldscyklus er, når der er foretaget ét opkald til alle programmerede telefonnumre i rækkefølgen (standardindstilling: 9 cyklusser).

Opkaldspause: En opkaldspause er pausen mellem to cyklusser (standardindstilling: 3 minutter).

Alarmer

Sluttone: Ved slutningen af den sidste cyklus signaliserer tre toner, at der ikke følger en yderligere cyklus, og at opkaldssekvensen slutter.

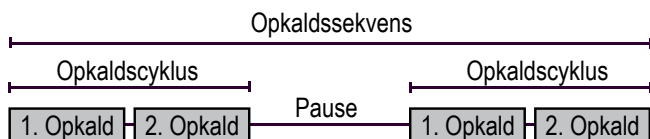

Kvittering for opkald: Efter en modtager har kvitteret for nødopkaldet, ringes de yderligere telefonnumre i sekvensen ikke mere op. Kvitteres der ikke (f.eks. fordi opkaldet modtages af en telefonsvarer), fortsættes opkaldene inden for sekvensen.

Forbindelsens varighed: Forbindelsens varighed er den tid, inden for hvilken et opkald løber. Opkaldets forløb slutter ved at modtager kvitterer nødopkaldet eller ved udløb af forbindelsestiden.

Prioritering af opkald

Alarmopkald har prioritet over alle andre telefonfunktioner. Når et nødopkald er aktivt, afvises alle andre indkomne opkald.

Modtagelse og behandling af opkald

Udløses flere opkald fra forskellige opkaldstriggere omtrent samtidig, så husker telefonen rækkefølgen og behandler opkaldene efter tur.

Modtagerens telefon

Den telefon, der modtager alarmopkaldet, skal være udstyret med funktionen tonekontrol (DTMF-opkald).

3.3 Oversigt over opkaldstriggere

En "opkaldstrigger" kan være en tast, en fejl eller en timer.

Opkaldstrigger	Typer af aktivering
Nødopkaldstast	Tryk på tast
Fejlbesked	Fejl på telefon- eller elnettet
Testopkald	Automatisk aktivering på fastsat tidspunkt

3.4 Modtagelse, besvarelse og afslutning af alarmopkald

Følgende tabel viser mulighederne for at modtage, besvare og afslutte et alarmopkald.

Modtagelse af alarmopkald:	
Taltast 5	Alarmopkaldet modtages og kvitteres, dvs. opkaldssekvensen slutter efter opkaldet.
Taltast 2	Ved serverdrift: Alarmopkaldet modtages, men kvitteres ikke, dvs. der ringes til yderligere telefonnumre inden for sekvensen.

Styring af alarmopkald:	
Taltast 1	Ved serverdrift: Alarmopkaldets forbindelsestid forlænges til 20 minutter (kan kun bruges ved modtagelse via "taltast 2")
Taltast 4	Aflytningstilstand: Modtageren hører den, der ringer op
Taltast 5	Håndfri betjening: Begge kan lytte og tale
Taltast 6	Meddelelsestilstand: Modtageren taler med den, der ringer op

Afslut alarmopkald:	
Læg røret på	Er alarmopkaldet blevet besvaret med taltast 5, så afsluttes samtalen, når modtageren lægger røret på. På Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen høres en optagetone.
Taltast 7	Ved serverdrift: Samtalen afsluttes, uden at der høres en optagetone. Der kvitteres ikke, og opkaldet går på pause (ventetid mellem cyklusserne). Pausetiden sættes til 30 minutter. Nødopkaldstasten blinker.
Taltast 8	Samtalen afsluttes og kvitteres. Ingen optagetone høres. Opkaldssekvensen slutter efter opkaldet.
Taltast 9	Ved serverdrift: Samtalen afsluttes, men kvitteres ikke. Ingen optagetone høres. Der ringes til flere telefonnumre inden for sekvensen.

3.5 Programmering af grundindstillingen "Alarmopkald"

FARE



Formidlingen af et alarmnummer kan ikke garanteres under alle omstændigheder.

Hvis du vil benytte en eller flere alarmfunktioner "nødopkald", "fejlbesked" og "testopkald" er følgende grundindstillinger nødvendige:

Grundindstillinger "Alarmopkald"	Side
3.5.1 Sæt alarmen til (Fabriksindstilling: on)	13
3.5.2 Fastlæg og gem alarmopkaldsnumre	14
3.5.3 Indstilling af alarmparametre	16

3.5.1 Slå alarm til/fra

Funktionen "alarm" er slået til ved leveringen. Hvis du vil benytte "nødopkald", "fejlbesked" og/eller "testopkald" så lad funktionen være til.

Alarmer

Slå alarm fra



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > „Alarmer“ > **OK**.



Vælg med **↓↑** „Alarmer on/off“ > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Off" > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Slå alarm til igen

Hvis du ønsker at slå alarmeren til igen, så vælg i stedet „On“.

3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre

"Alarmnumre" er telefonnumre, som automatisk ringes op i nødstilfælde (nødopkald), ved tekniske fejl (fejlbesked) og regelmæssigt med henblik på teknisk kontrol (testopkald).

Disse fastlagte telefonnumre kan fleksibelt tildeles til en eller flere opkaldstriggere. Tildelingen beskrives og foretages i de respektive kapitler Nødopkald, Fejlbesked og Testopkald.

Fastlæg alarmnumre

Der er 9 pladser til rådighed for alarmnumre (maks. 20 cifre). Indtast alarmnumre i følgende tabel:

Alarmer

Gemt under	Alarmnummer	Alarmområde(r)	Opkaldstrigger
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Gem alarmnumre



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > "Alarmer" > **OK**.



"Alarmnumre" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Alarmnummer (1-9)" > **OK**.



Indtast alarmnummer > **OK**.



Foretag ny indtastning eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

- Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal med **←** eller slette hele nummeret med **Slet**.
- Med den nederste kvikkaldstast kan du indføre pauser mellem kvikkaldene.

3.5.3 Indstil alarmparametre

Alarmparametrene er forudindstillet. Du kan ændre dem, men du behøver det ikke.

Indstillingsmuligheder:

- | | |
|---------------------------|--|
| Antal cyklusser | En cyklus defineres som ét engangsopkald af alle programmerede alarmnumre efter hinanden. Med antallet af cyklusser (1-9) fastlægger du, hvor hyppigt opkaldsnumrene skal ringes op.
Fabriksindstilling: 9 cyklusser.
> Indtast antallet af cyklusser (1-9) via taltasterne. |
| Pausetid | Du kan fastlægge, hvor længe (1-99 minutter) telefonen venter efter en ubesvaret cyklus. Efter denne pause startes en ny cyklus.
Fabriksindstilling: 3 minutter.
> Indtast minutterne (1-99) via taltasterne. |
| Forbindelsestid | Forbindelsestiden er den tid, alarmopkaldet varer. Forløbet slutes ved at modtager kvitterer alarmopkaldet eller ved udløb af forbindelsestiden.
Fabriksindstilling: 90 sekunder.
> Indtast sekunderne (1-99) via taltasterne. |
| Identifikationsnr. | Modtages nødopkaldet af en server, så kan den, der ringes op, ved hjælp af identifikationsnummeret modtage informationer om den person, der søger hjælp.
> Indtast identifikationsnummeret via taltasterne. |
| Lydstyrke høj | Telefonens højttalerlydstyrke indstilles automatisk til maksimal lydstyrke ved samtale i forbindelse med et nødopkald.
Fabriksindstilling: Til.
> Slå funktionen til eller fra med piletasterne. |

Alarmer

Sluttone

Sluttsignalet (3 toner) signalerer, at der ikke ringes til flere alarmnumre. Signalet kan slås til eller fra. Fabriksindstilling: Til.

> Slå signalet til eller fra med piletasterne.

Foretag indstillinger:



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > "Alarmer" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Indstillinger" > **OK**.



Vælg med **↓↑** den ønskede funktion (se ovenfor) > **OK**.



Indtast værdier via taltasterne eller via **↓↑** > **OK**.




Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.

4 Nødopkald

Via den røde nødopkaldstast på telefonen kan der sendes nødopkald til programmerede opkaldsnumre.

4.1 Nødopkaldsforløb

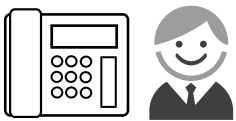 Beboer udløser nødopkald. →	 Sygeplejerskens telefon ringer.
	Sygeplejersken løfter røret og hører SOS-tonerne. Hun trykker på taltast 5 for at modtage opkaldet. SOS-tonerne stopper.
Ergophone S 510 telefonen indstilles automatisk på håndfri betjening.	Samtale med beboeren.
Samtale med sygeplejersken. Ergophone S 510 lægger på ←	Sygeplejersken kan via taltasterne styre samtalen: ④ Aflytning: Sygeplejerske lytter. ⑤ Håndfri betjening: Høre og tale. ⑥ Meddelelse: Sygeplejersken taler. ⑧ Sygeplejersken afslutter samtalen.



SOS-toner ved modtagelse af opkald

Tonesekvens: 3 x korte, 3 x lange, 3 x korte osv.

Styring af samtale

Styring af samtalen ved hjælp af taltasterne anbefales, hvis forbindelsen er dårlig. Et skift mellem meddelelses- og aflytningstilstand kan erstatte den sædvanlige håndfri betjening.

Nødopkald

Modtagelse af samtale

Når den, der søger hjælp, hører modtageren af nødopkaldet via medhørshøjttaleren, kan det forekomme at vedkommende af vane tager røret. I dette tilfælde skifter telefonen automatisk til betjening over telefonrøret.

4.2 Nødopkaldstastens lys

I brug lyser nødopkaldstasten som følger:

Type af lys	Betydning
Ingen lys	Alarm er slået fra
Lyser konstant svagt rødt	Alarm er slået til
Lyser konstant stærkt rødt	Der ringes til nødopkaldsnummer
Blinker stærkt rødt	Pause mellem to cyklusser

4.3 Programmering og test af nødopkaldsfunktion

Først skal grundindstillingerne i kapitel 3 Alarmer programmeres:

Nr.	Grundindstillinger "Alarmopkald"	Side
1	3.5.1 Slå alarm til (Fabriksindstilling: Til)	13
2	3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre	14
3	3.5.3 Indstil alarmparametre	16

Derefter foretager du følgende programmering og tester nødopkaldet:

Nr.	Indstilling og test af nødopkald	Side
4	4.3.1 Tildeling af alarmnumre	20
5	4.3.2 Test nødopkald	21

4.3.1 Tildeling af alarmnumre til nødopkaldstast og taster

Alarmnumre kan tildeles opkaldstrigger.

BEMÆRK

I følgende procedure tildeles ikke selve telefonnummeret, men i stedet den plads, hvor telefonnummeret er gemt (se tabel på side 15).

Eksempel: Ønsker du at tildele de første 3 telefonnumre, så indtast 123. Ved udløsning af nødopkald udløses telefonnumrene i den rækkefølge, de er indtastet.



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigivelse af PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > "Alarmer" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Opkaldstrigger" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Nødopkaldstast" > **OK**.



Tildel ved indtastning alarmnummeret/alarmnumrene en plads (f.eks. 123 for alarmnumrene på de tre første pladser) > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Du kan hele tiden slette den sidste plads med **←** og indtaste nye pladser via taltasterne. Du kan slette alle pladser ved at trykke **Slet**.

Nødopkald

4.3.2 Test nødopkald

Når du har foretaget programmeringerne 1-4, så test nødopkaldet ved at udløse nødopkald via nødopkaldstasten på telefonen.

Kontroller, om modtagelse, besvarelse og afslutning af nødopkaldet fungerer korrekt.

5 Fejlbesked

5.1 Visning af fejlbeskeder

Ved strømsvigt eller fejl på telefonnettet vises fejlene på telefonen. Ved strømsvigt eller fejl på batteripakken kan fejlen desuden meldes via et automatisk opkald til et eller flere af de programmerede opkaldsnumre.

Fejl	Visning på telefon	Fejlbesked
Strømsvigt	Forsyningsfejl  Menu Liste T-bog Advarselstone² (længde 1 sek.) pr. minut maks. 15 minutter langt. Den røde lampe¹ blinker.	Genoprettes netforbindelsen ikke inden for 15 minutter, følger et automatisk opkald til et telefonnummer (hvis programmeret).
Der er fejl på telefonnettet	Fejl telefonlinje  Menu Liste T-bog Advarselstone² (længde ca. 1 sek.) hvert halve minut, maks. 1 1/2 minut langt. Den røde lampe¹ blinker.	Meddelelse kan ikke sendes.
Batteripakken er ikke installeret eller skal udskiftes	Fejl  Menu Liste T-bog  Batteripakkens symbol vises i displayet. Den røde lampe¹ blinker.	Automatisk opkald til et valgfrit telefonnummer (hvis programmeret)


¹) Den røde lysdiode er placeret til venstre for stjernetasten. Den kan slås til eller fra (se afsnit 11.3).

²) Advarselstone kan slås til eller fra (se afsnit 11.3).

5.2 Fejlbeskedsforløb

I tilfælde af fejl på elnettet eller en fejl på batteripakken, kan det indstilles, at der sendes en fejlbesked til et valgfrit programmerbart telefonnummer.

Fejlbeskedsforløb

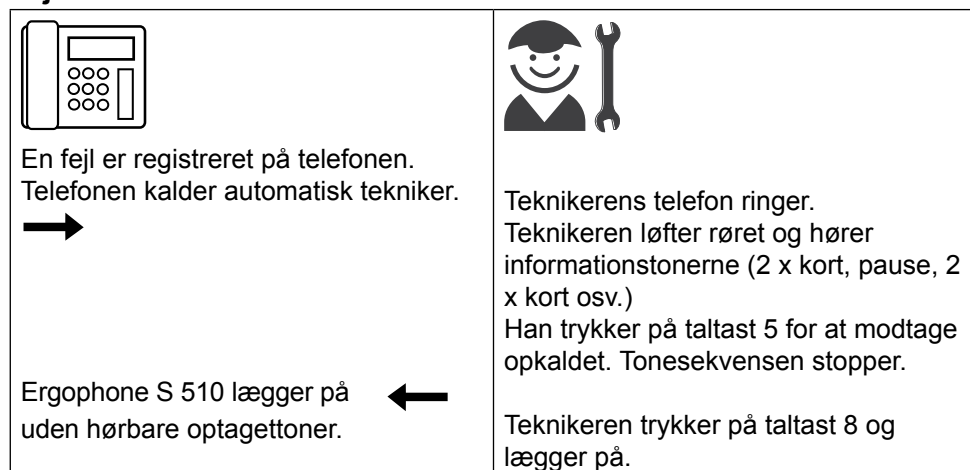

5.3 Programmering og test af fejlbeskedsopkald

Først skal grundindstillingerne i kapitel 3 Alarmer programmeres (hvis det ikke allerede er gjort):

Nr.	Grundindstillinger "alarmopkald"	Side
1	3.5.1 Slå alarm til (Fabriksindstilling: Til)	13
2	3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre	14
3	3.5.3 Indstil alarmparametre	16

Derefter programmerer og tester du fejlbesked:

Nr.	Indstilling og test af fejlbesked	Side
4	5.3.1 Tildeling af alarmnumre	24
5	5.3.2 Test fejlbesked	24

5.3.1 Tildeling af alarmnumre

Tildel de ønskede alarmnumre til opkaldstriggen "fejlmeddelelse".

BEMÆRK I følgende procedure tildeles ikke selve telefonnummeret, men i stedet den plads, hvor telefonnummeret er gemt (se tabel på side 15).
Eksempel: Ønsker du at tildele numrene 4 og 5, så indtast 45. Ved udløsning af en fejlbesked udløses telefonnumrene i den rækkefølge, de er indtastet.



Åben **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > "Alarmer" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Opkaldstrigger" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Fejlmeddelelse" > **OK**.



Tildel ved indtastning telefonnummeret/telefonnumrene en plads (f.eks. 45 for telefonnumrene på plads 4 og 5) > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Du kan hele tiden slette den sidste plads med **←** og indtaste nye pladser via taltasterne. Du kan slette alle pladser ved at trykke **Slet**.

5.3.2 Test fejlbesked

Træk stikket ud. Fejlmeddelelsen vises i displayet, advarselstonen høres og fejlbeskeden sendes efter 15 minutter.

5.4 Visning af fejlbesked på telefonen

Når teknikeren kommer, kan han aflæse fejlen på telefonen under menupunktet „Information“.



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Service" > **OK** > "Information" > **OK**.

Kig på listen.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.




Fejlbeskedens varighed

Fejlen vises på telefonens display, indtil den er afhjulpet. Den røde lysdiode blinker, indtil fejlen er set i menuen "Service" > "Information" eller er afhjulpet.

6 Testopkald

Med henblik på teknisk overvågning af telefonen kan der automatisk foretages et testopkald til et programmeret telefonnummer på et programmeret tidspunkt. Modtagerens telefon skal have funktionen tonekontrol (DTMF-opkald).

6.1 Testopkaldsforløb

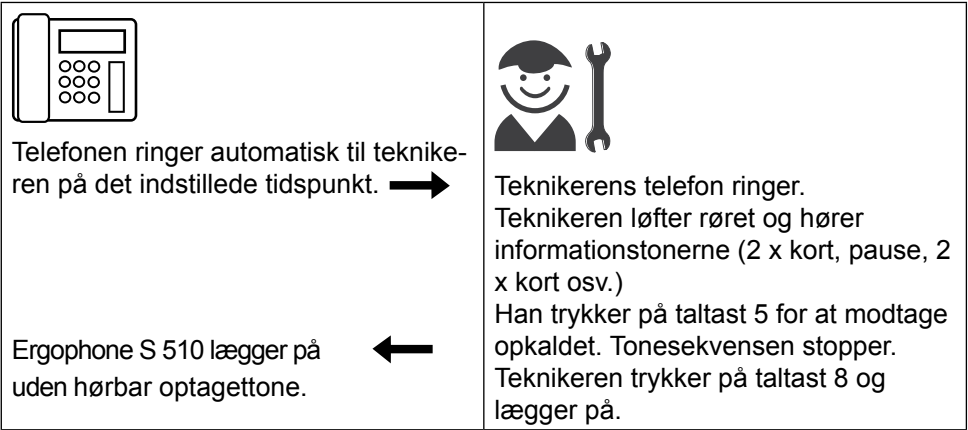

6.2 Programmering og test af testopkald

Først skal grundindstillingerne i kapitel 3 Alarmer programmeres (hvis det ikke allerede er gjort):

Nr.	Grundindstillinger "Alarmopkald"	Side
1	3.5.1 Slå alarm til (Fabriksindstilling: Til)	13
2	3.5.2 Fastlæg og gem alarmnumre	14
3	3.5.3 Indstilling af alarmparametre	16

Testopkald

Programmér og test derefter testopkaldet:

Nr.	Indstillinger af "Testopkald"	Side
4	6.2.1 Tildel alarmnumre	27
5	6.2.2 Slå testopkald til og fastlæg tid	28
6	6.2.3 Test testopkald	28

6.2.1 Tildeling af alarmnumre

Tildel opkaldstriggeren "testopkald" de ønskede alarmnumre.

BEMÆRK I følgende procedure tildeles ikke selve telefonnummeret, men i stedet den plads, hvor telefonnummeret er gemt (se tabel på side 15).
Eksempel: Ønsker du at tildele numrene 4 og 5, så tast 45. Ved aktivering af testopkald udløses telefonnumrene i den rækkefølge, de er indtastet.

-  Åben **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.
-   Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > "Alarmer" > **OK**.
-  Vælg med **↓↑** "Opkaldstrigger" > **OK**.
-  Vælg med **↓↑** "Testopkald" > **OK**.
-   Tildel ved indtastning telefonnummeret/telefonnumrene en plads (f.eks. 4 og 5 for telefonnumre på plads 4 og 5) > **OK**.
-  Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Du kan hele tiden slette den sidste plads med **←** og indtaste nye pladser via taltasterne. Du kan slette alle pladser ved at trykke **Slet**.

Testopkald

6.2.2 Slå testopkald til/fra og fastlæg tid

Du kan indstille et tidsinterval for, hvor lang tid, der skal gå, inden testopkaldet sendes (12, 24, 48 eller 72 timer) og klokkeslættet for, hvornår intervallet skal starte.

Eksempel: Du indstiller intervalltiden til 24 timer og klokkeslættet til kl. 15. Testopkaldet sendes automatisk hver dag kl. 15.

- Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.
-  Indtast 4-cifret pinkode > **OK** > "Alarmer" > **OK**.
- Vælg med **↓↑** "Testopkald" > **OK**.
- Vælg med **↓↑** "On" > **OK**.
- "Testopkald" > **OK**.
- Vælg med **↓↑** "Tid testopkald" > **OK**.
- Vælg interval med **↓↑** 12, 24, 48 eller 72 timer > **OK**.
-  Indtast klokkeslæt (tt:mm) via taltasterne > **OK**.
- Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Indtast klokkeslæt

Ved indtastning af klokkeslæt kan du med **←** og **→** flytte cursoren til venstre eller højre.

Slå testopkald fra

Hvis du ønsker at slå testopkaldet fra, vælg "off" inden for proceduren.

6.2.3 Test testopkald


Kontroller, om kontrolopkaldet sendes automatisk til den fastlagte tid.

7 Overvågning

Ved "overvågning" slår Ergophone S 510 telefonen direkte over på aflytningstilstand eller håndfri betjening, uden at den skal betjenes. Overvågning kan aktiveres på tre forskellige måder, der indbyrdes udelukker hinanden: "Via antal opkald", "Via CLIP-nummer" eller "Via specialopkald".

7.1 "Via antal opkald"

7.1.1 "Via antal opkald" forløb

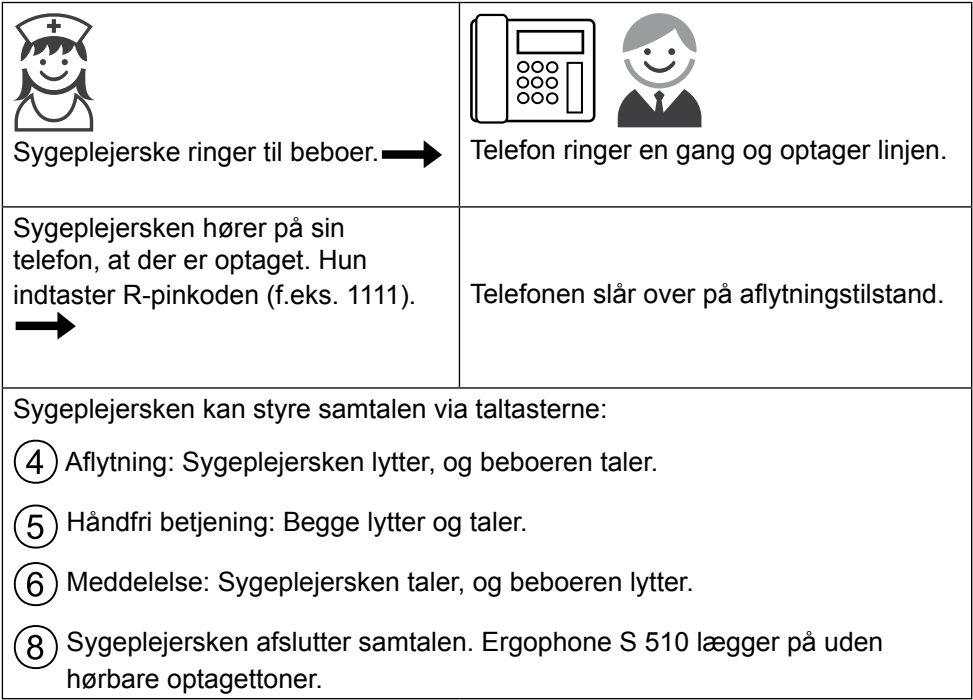

7.1.2 Beskrivelse

Den telefon, der ringer op til Ergophone S 510 telefonen, skal have funktionen tonekontrol (DTMF-valg). Ergophone S 510 telefonen ringer ved opkald så ofte, som den er indstillet til, og optager dermed linjen.

Overvågning

Indtaster den, der foretager opkaldet, sin 4-cifrede overvågningspinkode (R-pinkoden), slår Ergophone S 510 automatisk over på aflytningstilstand. Den, der foretager opkaldet, kan nu høre, hvad der sker i rummet, og derefter via taltasterne styre samtalen (håndfri betjening, samtale og afslutning).



Lydløs overvågning

Hvis du ønsker at overvåge rummet, så slå ringetonen på Ergophone S 510 fra. Vær venligst opmærksom på loven om databeskyttelse, når funktionen "lydløs overvågning" benyttes.

7.1.3 Programmering og test af "Via antal opkald"

Sådan programmerer og tester du "Via antal opkald":

Indstil og test "Via antal opkald"	Side
7.1.3.1 Aktiver "Via antal opkald"	30
7.1.3.2 Fastlæg overvågningspinkode	31
7.1.3.3 Indstil antal opkald	31
7.1.3.4 Test "Via antal opkald"	32

7.1.3.1 Aktiver "Via antal opkald"



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Medhør" > **OK** > "Medhør indstilling" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Via ant. ringn." > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.

7.1.3.2 Fastlæg overvågningspinkode

Den 4-cifrede overvågningspinkode (R-pinkoden) kan når som helst ændres ved at indtaste en ny.



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Medhør" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Medhør PIN" > **OK**.



Indtast R-pinkoden to gange efter hinanden > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Du kan under indtastning af R-PIN hele tiden slette det sidste tal med **←**. Trykker du **Slet** slettes hele pinkoden.

7.1.3.3 Indstil antal opkald

I fabriksindstilling er et opkald indstillet. Til særlig brug kan det være en god idé at lade telefonen ringe flere gange (så kan f.eks. et normalt opkald modtages ved at løfte røret på telefonen, selv om telefonen befinder sig i overvågningstilstand).



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Medhør" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Via ant. ringn." > **OK**.



Indtast antal (1-9) med taltasterne > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.


Overvågning

7.1.3.4 Test "Via antal opkald"

Ring til Ergophone S 510 telefonen. Den skal ringe og optage linjen. Indtast R-pinkoden på din telefon. Ergophone S 510 slår over på aflytningstilstand. Styr samtalen via taltasterne.

7.2 "Via CLIP-nummer"

7.2.1 "Via CLIP-nummer" forløb

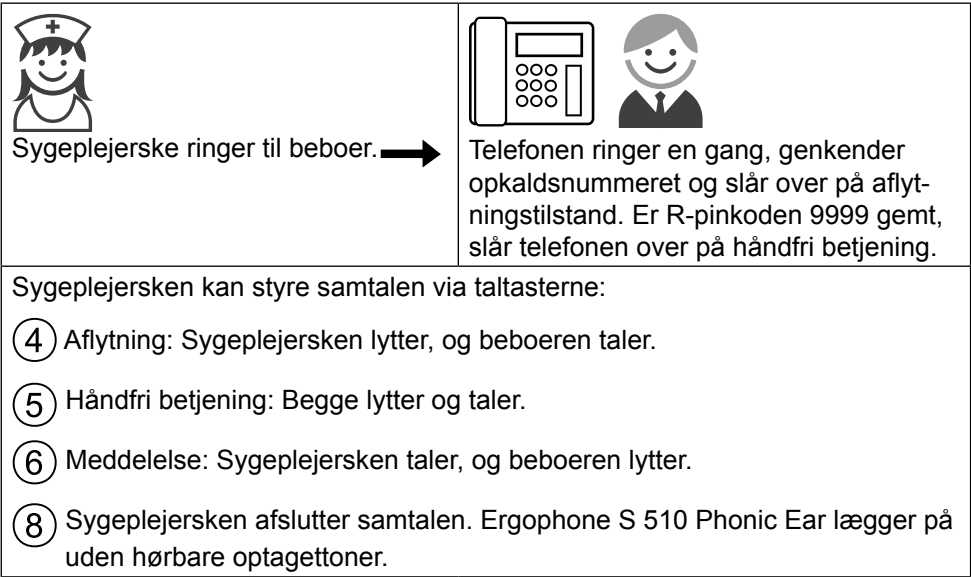

7.2.2 Beskrivelse

Den telefon, der ringer op til Ergophone S 510 telefonen, skal have funktionen tonekontrol (DTMF-valg). Ved funktionen "CLIP" (vis-nummer) videregives nummeret på den, der ringer op, til den, der ringes op. Ringer sygeplejersken til beboerens Ergophone S 510, så ringer telefonen en gang og sammenligner derefter nummeret på det indkommende opkald med de CLIP-numre, der er gemt i telefonen under funktionen "overvågning". Genkendes nummeret, slår telefonen automatisk over på aflytningstilstand. Er R-pinkoden 9999 gemt,

Overvågning

slår telefonen over på håndfri betjening. Sygeplejersken kan styre samtalen via taltasterne (håndfri betjening, samtale, afslutning).



Lydløs overvågning

Hvis du ønsker at overvåge rummet, så slå ringetonen på Ergophone S 510 fra. Vær venligst opmærksom på loven om databeskyttelse, når funktionen "lydløs overvågning" benyttes.

7.2.3 Programmering og test af "Via CLIP-nummer"

Sådan programmerer og tester du "Via CLIP-nummer":

Indstil og test CLIP-numre	Side
7.2.3.1 Aktiver "Via CLIP-nummer"	33
7.2.3.2 Gem CLIP-numre	34
7.2.3.3 Fastlæg overvågningspinkode	34
7.2.3.4 Test "Via CLIP-nummer"	34

7.2.3.1 Aktiver "Via CLIP-nummer"



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Medhør" > **OK** > "Medhør indstilling" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Via CLIP nr." > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.

7.2.3.2 Gem CLIP-numre

Der kan gemmes op til 5 CLIP-numre (hver med maks. 20 cifre).



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Medhør" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Via CLIP nr." > **OK**.



Vælg med **↓↑** "CLIP-nummer 1-5" > **OK**.



Indtast opkaldsnummer > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal med **←** eller slette hele nummeret med **Slet**.

7.2.3.3 Fastlæg overvågningspinkode

Se afsnit 7.1.3.2.

7.2.3.4 Test "Via CLIP-numre"

Ring til Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen. Den skal ringe en gang og så slå over på aflytningstilstand eller håndfri betjening.

7.3 "Via specialopkald"

Specialopkaldet udgår fra et telefonanlæg og består af mindst 4 opkald inden for 4 sekunder. Efter specialopkaldet slår telefonen over på håndfri betjening. Også ved "Via specialopkald" kan den, der ringer op, styre samtalen via taltasterne (se side 32). Den telefon, der ringer op til Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen, skal have funktionen tonekontrol (DTMF-valg).

7.3.1 Programmering og test af "Via specialopkald"

7.3.1.1 Aktiver "Via specialopkald"

Vælg "specialopkald" inden for proceduren, der er beskrevet under afsnit 7.2.3.1 Aktiver "Via CLIP-nummer".

7.3.1.2 Test „Via specialopkald“

Ring til Ergophone S 510 Phonic Ear telefonen. Efter specialopkaldet skal telefonen slå over på håndfri betjening.

7.4 Slå overvågning fra

Vælg "Medhør off" inden for proceduren, der er beskrevet under afsnit 7.2.3.1 Aktiver "Via CLIP-nummer".

8 Tastespærring

Du kan spærre udgående opkald på 5 forskellige måder.



Telefonnumre, der altid kan ringes til

Alarmnumre samt undtagelsesnumre (f.eks. til politi/brandvæsen) kan som hovedregel altid vælges, uanset hvilken form for spærring.

FORSIGTIG



Gem undtagelsesnumre i tilfælde af en kritisk situation, så vedkommende kan ringe op også ved tastespærring. Har du ved indstilling af tastespærring endnu ikke gemt nogen undtagelsesnumre, gør telefonen opmærksom på dette via displayet.

8.1 Vælg begrænsningstype

Indstillingsmuligheder:

Ingen spærring

Tastespærring ikke indstillet.

Direkte opkald

Det udgående opkald er spærret med undtagelse af ét gemt direkte telefonnummer, som kan ringes op ved at løfte røret og trykke på en tilfældig tast. Det direkte telefonnummer (maks. 20-cifret) skal være gemt.

Automatisk direkte opkald

Det udgående opkald er spærret med undtagelse af ét gemt direkte telefonnummer, som kan ringes op ved at løfte røret. Det direkte telefonnummer (maks. 20-cifret) skal være gemt.

Nummerspærring

Opringning til enkelte numre spærres. Forudsætning for nummerspærring er, at de spærrede telefonnumre er indtastede (maks. 20-cifret).

Tastespærring

Fuld spærring Der kan ikke ringes til nogen telefonnumre.

Kvikkaldstaster fri Med undtagelse af kvikkaldstasterne og nødopkaldstasten er alle andre taster spærrede for udgående opkald.

Foretag indstilling:

- ☐ Åbn **Menu** > vælg med $\downarrow\uparrow$ "Frigiv menu PIN" > **OK**.
-  ☐ Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.
- ☐ Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Tastespærring" > **OK** > "Begrænsningstype" > **OK**.
- ☐ Vælg med $\downarrow\uparrow$ begrænsningstype (se ovenfor) > **OK**.
- ☐ Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.

8.2 Gem spærrede numre

Hvis du vil bruge nummerspærring, skal du gemme spærrede numre. Det kan være hele telefonnumre eller dele af numre.

- ☐ Åbn **Menu** > vælg med $\downarrow\uparrow$ "Frigiv menu PIN" > **OK**.
-  ☐ Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.
- ☐ Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Tastespærring" > **OK**.
- ☐ Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Spærrede nr." > **OK**.
- ☐ Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Spærret nr. 1-5" > **OK**.
-  ☐ Indtast nummer (maks. 20-cifret) > **OK**.
- ☐ Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.

Tastespærring



Rediger/slet

Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal med  eller slette hele nummeret med **Slet**.

8.3 Gem direkte telefonnummer

Hvis du vil bruge begrænsningstypen "direkte opkald" eller "automatisk direkte opkald", skal du gemme direkte opkaldsnumre. De gemte opkaldsnumre gælder for begge begrænsningstyper.



Åbn **Menu** > vælg med   "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med   "Tastespærre" > **OK**.



Vælg med   "Direkte opk. nr." > **OK**.



Indtast nummer (maks. 20-cifret) > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

■ Du kan hele tiden slette det sidste tal med .
Trykker du på **Slet** slettes hele nummeret.

■ Du kan indtaste pausetid ved hjælp af de nederste kvik-kaldstaster.

8.4 Gem undtagelsesnumre

Undtagelsesnumrene kan for eksempel være telefonnumrene til politi og brandvæsen. De kan altid ringes op, selv om der er indstillet tastespærring.

FORSIGTIG



Gem undtagelsesnumrene, så du også ved tastespærring altid kan få fat i nogen telefonisk.

Tastespærring



Åbn **Menu** > vælg med $\downarrow\uparrow$ „Frigiv menu PIN“ > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med $\downarrow\uparrow$ ”Tastespærring“ > **OK**.



Vælg med $\downarrow\uparrow$ ”Undtagelsesnr.“ > **OK**.



Vælg med $\downarrow\uparrow$ ”Undtagelsesnr. 1-5“ > **OK**.



Indtast nummer (maks. 20-cifret) > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal med $\leftarrow$ eller slette hele nummeret med **Slet**.

8.5 Vælg undtagelsesnumre



Løft røret.



Indtast undtagelsesnumre via taltasterne.



Opkald ved ”automatisk direkte opkald“

Har du indstillet „automatisk direkte opkald“, venter telefonen 3 sekunder efter, at du har løftet røret, inden der ringes til det gemte telefonnummer. Ønsker du at ringe til et undtagelsesnummer, så tryk på taltasten straks efter, at du har løftet røret.

9 Frigivet / spærret telefonliste

I den frigivne telefonliste kan gemmes op til 9 telefonnumre, der får telefonen til at ringe. Alle andre opkald er kun synlige i displayet.

I den spærrede telefonliste kan gemmes op til 9 telefonnumre. Telefonen vil ikke ringe, hvis der kommer et indkommende opkald fra et af disse numre.

Forudsætningen for denne funktion er, at nummeret på den, der ringer op, videregives. Man kan nøjes med enten kun at slå den frigivne telefonliste eller kun den spærrede telefonliste til. Er ingen liste slået til, fungerer telefonen normalt.

9.1 Gem frigivne telefonnumre



Åbn **Menu** > vælg med   "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med   "Toner & signaler" > **OK**.

Vælg med   "Frigivet opk. list." > **OK**.

Vælg med   "Opk. frigiv nr. 1-9" > **OK**.



Indtast telefonnummer (maks. 20-cifret) > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal med  eller slette hele nummeret med **Slet**.

9.2 Gem spærrede telefonnumre

Gå frem som beskrevet under 9.1 og vælg i stedet for "Frigivet telefonliste" "Spærret telefonliste".

9.3 Aktiver liste



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Toner & signaler" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Ringer" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Frigivet liste" eller "Blokeringsliste" > **OK**.



Viderestilling

Hvis en af listerne er indstillet, kan opkald ikke viderestilles uden indtastning af pinkode. På displayet fremkommer „Ikke tilladt“.

10 Slet telefonbog / check ud

10.1 Slet telefonbog

Ved hjælp af følgende pinkode-beskyttede fremgangsmåde kan hele telefonbogen slettes.



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.

Vælg med **↓↑** "Hurtigopkald" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Telefonbog" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Slet alt" > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.

10.2 Check ud

Ved tryk på en tast kan du sætte alle pinkode-beskyttede indstillinger tilbage til fabriksindstilling. Alt gemt indhold (kvikkald, kortvalg og telefonbog) samt opkaldsliste slettes.



Tryk på den 5. kvikkaldstast (fra toppen) og hold den trykket ned i mindst 5 sekunder.



"Check ud" > **OK**.

11 Grundindstillinger

Menuen "grundindstillinger" indeholder generelle indstillinger samt indstillinger for opkald og overvågning. Kvikkaldstaster kan fortsat kodes med en anden funktion.

11.1 Indstilling af generelle funktioner

Fabriksindstillingen (F) for hver funktion finder du til venstre under funktionen.

Indstillingsmuligheder:

Sprog

F: Dansk

Meddelelserne i displayet kan vises på dansk, tysk, engelsk, hollandsk eller fransk.
> Vælg sprog med ↓↑.

Dato on/off

F: on

Datoen vises på startskærmen, når den er indstillet.
> Tryk på ↓↑ for at slå dato til eller fra.

Tid on/off

F: on

Klokkeslættet vises på startskærmen, når det er indstillet.
> Tryk på ↓↑ for at slå klokkeslæt til eller fra.

Dato/tid

> Indtast DD.MM.ÅÅ tt:m.m.:s.s. via taltasterne (dag.måned.år, time:minut:sekund)

Ændre tid

F: on

Der tages hensyn til tidsomstillingen sommertid/vintertid, når denne funktion er indstillet.
> Tryk ↓↑ for at slå tidsomstilling til eller fra.

Grundindstillinger

Opkalds-LED on/off

F: off

Et mistet opkald signaleres via opkalds-LED, hvis denne er slået til. I fabriksindstillingen er opkalds-LED slået fra.

Mistede opkald vises kun i displayet.

> Tryk **↓↑** for at slå LED til eller fra.

Displaykontrast

F: 5

Du kan indstille lysstyrken på displayet.

Jo højere tal, desto mørkere bliver displayet.

> Vælg kontrast med taltasterne (0-9).

Ændring af pin

F: 0000

Vigtige indstillinger er beskyttet med pinkode.

Hvis du ændrer pinkoden, skal du sikre dig, at du ikke glemmer den. Det er nøglen til programmeringen af din telefon.

> Indtast den nye pinkode to gange efter hinanden.

Headset-tilstand on/off

F: off

Hvis du i stedet for telefonrør ønsker at benytte et headset, skal funktionen "headset-tilstand" aktiveres.

Telefonrørets funktioner (modtage, lægge på) overtages af højttalertasten, når headset-tilstanden er indstillet.

> Tryk på **↓↑** for at slå headset-tilstand til eller fra.

Ændring af vis-nummer tilstand (CLIP)

F: DTMF

FSK-CLIP er indstillet for tysksprogede lande. I andre lande kræves DTMF-CLIP.

> Tryk på **↓↑** for at ændre vis-nummer tilstand.

Foretag indstillinger:



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.

Grundindstillinger



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.

Vælg med **↓↑** "Grundindstillinger" > **OK** >
"Generelt" > **OK**.

Vælg funktion med **↓↑** (se ovenfor) > **OK**.



Foretag indstilling med **↓↑** eller taltasterne > **OK**.

Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede,
indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal
med **←** eller slette hele nummeret med **Slet**.

11.2 Indstilling af opkaldsfunktioner

Fabriksindstillingen (F) for hver funktion finder du til venstre under funktioner.

Indstillingsmuligheder:

Flashtid

F: 90 ms

Du kan indstille genkaldstasten til fem flashtider af forskellig længde (se bruger-vejledningen for telefonanlægget).

> Tryk **↓↑** for at vælge 90, 260, 110, 130, 300 msec.

En kvikkaldstast (R-tasten) skal defineres som genkaldstast (se afsnit 11.4).

Bylinjekode

På nogle telefonanlæg er det nødvendigt at indføre en pause efter bylinjekoden. Lagring af en bylinjekode har til formål at fastlægge, efter hvilke talrækkefølge pausetid skal indføres. Du kan gemme en bylinjekode på op til 4-cifre.

Grundindstillinger

Se brugervejledningen til dit telefonanlæg. Når du har gemt en bylinjekode, så skal denne sættes foran de telefonnumre, du vil gemme (telefonbog, kvikopkald, kortvalg).
> Indtast kode via taltasterne.

PABX-kode

Er dit telefonanlæg under et hovedanlæg, kan du gemme en op til 4-cifret hovedanlægskode. Lagring af en PABX-kode har til formål at fastlægge, efter hvilken talrækkefølge pausetid skal indføres.
> Indtast kode via taltasterne.

Pausetid

F: 3 sek.

På telefonanlæg er det nødvendigt at trykke en kode for at få et ringetonesignal. På mange anlæg er det nødvendigt at indføre pausetid efter koden. Du kan indstille længde af pausetiden (1-9 sek.).
> Indtast pause via taltasterne.

Teleselskab nr.

Det forvalg, der gemmes her, sættes automatisk foran alle gemte telefonnumre.
> Indtast forvalg via taltasterne.

Foretag indstillinger:

Åbn **Menu** > vælg med   "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.

Vælg med   "Grundindstillinger" > **OK**.

Grundindstillinger



Vælg med **↓↑** "Ringer op" > **OK**.



Vælg funktion med **↓↑** (se ovenfor) > **OK**.



Foretag indstilling med **↑↓** eller taltasterne > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Rediger/slet

Under indtastning af numre kan du altid slette det sidste tal med **←** eller slette hele nummeret med **Slet**.

11.3 Indstilling af overvågning

Fabriksindstillingen (F) for hver funktion finder du til venstre under funktionen.

Indstillingsmulighed:

Strømforsyning

F: Fra

Det akustiske advarselssignal ved afbrudt strømforsyning eller strømsvigt kan slås fra. Fejlbeskeden vises stadig i displayet. Hvis fejlbeskeds-opkaldet er programmeret, forbliver denne funktion aktiv.
> Slå den akustiske advarselstone til eller fra.

Telefonlinje

F: On

Den akustiske fejlmelding ved ikke tilsluttet eller fejlbehæftet telefonlinje kan slås fra. Fejlen vises fortsat i displayet.
> Slå den akustisk advarselstone til eller fra.

Timer trigger

F: 0

Genkendes optagettonen ikke, kan en samtale afsluttes automatisk efter et vist tidsrum. Tiden kan indstilles til en fast tid (0-9 minutter). Indtastes 0, er funktionen slået fra.
> Indtast tid via taltasterne.

Grundindstillinger

Fejl-LED

F: Off

Den røde lysdiode til venstre for stjernetasten blinker, når Telefonlinjen svigter. Lysdioden kan slås til eller fra.
> Slå LED til eller fra.

Foretag indstillinger:



Åbn **Menu** > vælg med **↑↓** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Grundindstillinger" > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Overvågning" > **OK**.



Vælg funktion med **↓↑** (se ovenfor) > **OK**.



Tryk på **↓↑** for at indstille > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen forekommer.

11.4 Indstilling af kvikkaldstaster med andre funktioner

Indstillingsmuligheder:

Kviktast

Tasten er defineret som kviktast. Fabriksindstillingen er, at alle 7 kviktaster er indstillet til kvikkald.

Servicetast

Installatøren kan definere og indtaste et kvikkaldsnummer for servicetasten i den pinkode-beskyttede menu. Ved tryk på servicetasten kaldes nummeret. Brugeren af telefonen kan ikke ændre kvikkaldsnummeret uden adgang til den pinkode-beskyttede menu. Forsøger brugeren dette, vises "Ikke tilladt" i displayet.

Grundindstillinger

R-tasten Med genkaldstasten kan telefonnetværks-funktioner aktiveres. Ved tilslutning til et telefonanlæg kan genkald aktiveres.

Foretag indstillinger:



Åbn **Menu** > Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Grundindstillinger" > **OK**.



Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Funktionstaster" > **OK**.



Vælg med $\downarrow\uparrow$ "Funktionstast 1-7" > **OK**.



Vælg funktion med $\downarrow\uparrow$ (se ovenfor) > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Mærkat

Hvis du har indstillet en kviktast med en anden funktion, så skriv det på navneskiltet ved siden af.

Pausetid

Med den nederste kviktast kan du indføre pausetider ved indtastning af et telefonnummer i hukommelsen. Dette er uafhængigt af, hvilken funktion tasten har.

12 Service

Menuen ”service“ indeholder information om softwareversionen, fejlbeskeder og reset-muligheder.

Indstillingsmuligheder:

Information	Telefonens softwareversion vises. Er der informationer om fejl, kan de ses her. Er kontrolopkald indstillet, vises dens resterende tid indtil næste opkald.
Reset	Udfører telefonen ikke funktioner korrekt, kan den genstartes. Alle indstillinger bevares.
Re-initialisering	Hvis du tit har slået funktioner til og fra og har mistet overblikket, kan du nulstille telefonen. Funktionerne sættes tilbage til de indstillinger, den havde ved leveringen. Gemt indhold bevares.
Fabriksindstilling	Telefonen sættes tilbage til fabriksindstilling, og alt gemt indhold slettes.
Sluk apparat	En ubenyttet telefon kan slukkes for en periode af maks. 3 dage. Først skal telefonens forbindelse til el-nettet afbrydes. Efter at funktionen „Sluk apparat“ er programmeret, bruger telefonen meget lidt strøm fra batteripakken.
Konfigurering fra SD-kort	Softwareparametrene fra en txt-konfigurationsfil, der er gemt på et SD-kort, overføres til telefonens software.

Konfigurering til SD-kort

Telefonen danner en txt-konfigurationsfil på kortet og skriver software-parametrene i denne fil.

Software-update

Firmware fra en fil gemt på et SD-kort overføres til telefonen.

Foretag indstillinger:



Åbn **Menu** > vælg med **↓↑** "Frigiv menu PIN" > **OK**.



Indtast 4-cifret pinkode > **OK**.



Vælg med **↓↑** "Service" > **OK**.



Vælg funktion (se ovenfor) > **OK**.



Foretag indstillinger > **OK**.



Foretag yderligere indstillinger eller hold **Tilbage** nede, indtil startskærmen fremkommer.



Konfigurering af telefonen ved hjælp af SD-kort

Informationer om håndtering af et SD-kort på telefonen finder du i brugervejledningen.

13 Bilag

13.1 Fejlfindingsguide

Hvis der skulle opstå funktionsfejl, kan du i de fleste tilfælde med nedenstående hjælp selv finde årsagen og afhjælpe problemet.

Problem	Mulig årsag	Råd
Ingen klartone, når røret løftes	Telefonledning, telefonrørsledning, telefonstikdåsen	Tjek alle ledninger, prøv telefonstikdåsen med en anden telefon, kontakt eventuelt teleudbyderen.
Telefonen ringer kun én gang ved opkald	Funktionen "overvågning" er aktiveret	Slå funktionen fra
Pinkoden er glemt		Kontakt forhandler eller producent
Nummeret på den, der ringer op, vises ikke. Liste over frigivne og spærrede numre virker ikke	Servicen "Vis-nummer" (CLIP) tilbydes ikke hos din teleudbyder eller er ikke aktiveret	Kontakt teleudbyder
Telefonen ringer ikke ved indkommende opkald	Ringetone er slået fra	Slå ringetone til
Telefonen ringer altid til det samme telefonnummer	Direkte opkald eller automatisk direkte opkald er slået til	Slå direkte opkald fra
Telefon afbryder under opkald	Tastespærring er slået til	Slå tastespærring fra
Ingen eller forkert forbindelse efter opkald til gemt nummer (for eksempel kvikopkald)	- Bylinjekode ikke indtastet - Bylinjekode er ikke gemt før nummer	- Indtast bylinjekode og indstil evt. pauselængde - Gem bylinjekode sammen med telefonnummer

Problem	Mulig årsag	Råd
Genkald ikke muligt	- Flashtid forkert indstillet - R-tast ikke indstillet	- Ændr flashtid - Indstil R-tast
Et alarmopkald (nødopkald, fejlbesked, testopkald) sendes ikke	- Der mangler noget i programmeringen - En anden på nettet telefonerer og hovedlinjen er optaget - Fejl på telefonlinjen - Ingen strømforsyning forbundet, batteripakke ikke installeret.	- Foretag alle nødvendige programmeringer og test alarmopkald. - Der skal altid være en hovedlinje fri til telefonen - Kontakt udbyder - Forbind strømforsyning, installer batteripakke.

13.2 Forholdsregler, hvis telefonen bliver beskadiget

Behandl telefonen med stor forsigtighed. Hvis den behandles skødesløst, kan det betyde, at garantien bortfalder.

I følgende tilfælde skal du afbryde telefonen fra telefonnetværket og elnettet:

ADVARSEL



- Telefon, ledninger og/eller stik er beskadiget. Du kan komme til at røre strømførende dele.
- Hvis telefonen udsender røg efter et lynnedslag, eller hvis strømforsyningen bliver beskadiget.
- Der er trængt væske ind i telefonen. Komponenter kan være beskadigede.
- Fjern batteripakke: åbn skuffen og træk stikket ud.



Væske trængt ind i telefonen

Er der trængt væske ind i telefonen, så lad den dryppe af (fjern evt. først gummifødder). Dup overfladen tør, og lad telefonen stå mindst 72 timer på et tørt og varmt sted (stil den ikke i mikrobølgeovnen eller ovnen!). Tilslut igen telefonen, når den er tør.

13.3 Fabriksindstilling af vigtige funktioner

Alarmer	On
Opkalds-LED	Off
Displaykontrast	5
Udløsningstimer	0
Vis-nummer tilstand	DTMF
Dato/klokkeslæt	On
Sluttone	On
Flashtid	90 ms
Funktionstaster	Alle kvikkald
Headset-tilstand	Off
Testopkald	Off
Lydstyrke i højttaler	On
Pause efter cyklus	3 minutter
Strømforsyning	On
Pinkode	0000
R-pinkode	0000
Genkald	Off
Genkald: Antal opkald	1
Sprog	Dansk
Fejl-LED	Off
Telefonlinjeovervågning	On
Ringetone	On
Ringemelodi	3
Forbindelsens varighed	90 sekunder
Pausetid	3 sek.
Tastespærring	Ingen spærring
Cyklusantal	9
Tidsændring	On

13.4 Tekniske data

Mål	ca. 230 x 197 x 80 mm (B x D x H)
Vægt	ca. 850 g
Ydre materiale	ABS
Telefonledning	3 m
Ledningstildeling	Pin 3: La, Pin 4: Lb
Strømforsyning	Strømforsyning kun til telefonfunktion
Samtalekredsløb	Aktiv
Hovedtelefon og mikrofonkapsel	Dynamisk hovedtelefon/elektret mikrofon
Ringeanordning	Variabelt ringesignal, regulerbar lydstyrke (skydekontakt med trin) og melodi (10 forskellige melodier)
Håndfri betjening	Halvduplex
Lydstyrke i højttaleren	Variabel, regulerbar vha. skydekontakt
Telefonrørets lydstyrke	Variabel, regulerbar vha. skydekontakt
Display	LCD, 240 x 64 dots
Maksimal længde af telefonnumre	20 cifre
Vekselstrømsadapter	Sikkerhedsklasse 2, DC 5V 1A
Temperaturområde ved brug	0 °C til +40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-5 °C til +70 °C

Din lokale kontakt:

© 2016 Phonic Ear A/S



Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Danmark
Tlf: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900
mail@phonicear.com • www.phonicear.com