

Specifikationer:

HearIt Mobile

Forstærker mobilsamtaler



BESKRIVELSE

HearIt Mobile er en brugervenlig håndfri halsslyngeløsning til forstærkning af samtaler i Bluetooth mobiltelefoner. HearIt Mobile er specielt udviklet til mennesker med nedsat hørelse.

ANVENDELSE

Den trådløse anvendelse gør HearIt Mobile særdeles velegnet som et håndfrit sæt til mobiltelefonen. Den bæres om halsen i halsslyngen og er let at betjene. Lyden i HearIt Mobile kan indstilles på fem forskellige styrker, og brugeren kan således justere lydstyrken til sin hørelse. Den indbyggede mikrofon og en let tilgængelig svarer- og afbrydertast gør løsningen meget brugervenlig.

HearIt Mobile er designet både til høreapparatbrugere, og ikke-høreapparatbrugere:

- Personer, som har høreapparat med telespole, kan bruge HearIt Mobile med deres høreapparat i T-position.
- Personer, som har høreapparat uden telespole og personer, som ikke bruger høreapparat, kan bruge HearIt Mobile med hovedtelefoner.

FUNKTION

HearIt Mobile består af en modtager med halsslynge.

Lyden fra mobiltelefonen overføres via bluetooth til HearIt Mobile, som forstærker lyden og overfører den til hovedtelefonerne eller via halsslyngen til høreapparatet. Du kan endvidere besvare opkald, afslutte opkald og tale i mobiltelefon direkte gennem HearIt Mobile.



SPECIFIKATIONER

Transmission:	Bluetooth
Frekvensområde:	2,4 GHz
Rækkevidde:	Op til 10 m
Max. forvrængning (linieindgang):	0,75 %
Impedans for hovedtelefoner/halsslynge:	16/32 Ω
Lysindikatorer:	Bluetooth, on/off, volumen og ladeindikator
Dimensioner (bxhxd):	4,9 x 6,8 x 1,9 cm (uden halsslynge)
Vægt:	71 g
Kontroller:	On/off, volumen og svarknap
Output:	3,5 mm stereo jack (100 Hz - 20 kHz) Halsslynge (100 Hz - 5 kHz)
Batteritype:	Genopladelig
Batterilevetid:	
I brug	ca. 14 timer
Standby	ca. 24 timer
Opladningstid:	Ca. 6 timer
Batteriskift:	Efter ca. 1000 cykluser
Materiale:	ABS plastik
Farver:	Sort og grå



HEARIT MOBILE TILBEHØR



Hearit Mobile
200-50-600-00



Hovedtelefon
890-88-629-00



Strømforsyning
890-52-065-00