

# Link Pro

Puzzle Pro tonekald

Brugervejledning  
Dansk



 **Phonic Ear**<sup>®</sup>  
*Connected to life*

# Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Parring til Puzzle Pro sendere	9
Slet parring til Puzzle Pro sendere	11
Indstilling af melodi og statusindikatorens farve	12
Tilslutning til tv og radio mv.	13
Tilslutning af tv-løsning	14
Tilslutning af strømforsyning	15
Test af signal	15
Indstilling af lydstyrke	16
Indstilling af bas og diskant	16
Fejlsøgning	17
Test og godkendelser	18
Miljøinformation	19
Garanti	20

## Introduktion

Link Pro er Puzzle Pro systemets tonekald, der informerer dig om vigtige alarm- og ringsignaler, når du ser tv eller hører radio via en tv-løsning.

Med Link Pro er det muligt at modtage alarmer fra Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og Detect Door Pro, mens du lytter til radio eller ser tv. Når Link Pro modtager en alarm, dæmpes lyden fra tv eller radio automatisk, og et alarmsignal afspilles.

Hver alarm gengives med sit eget unikke lydmønster, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

# Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Link Pro tonekald



Strømforsyning  
(5V micro usb)



3,5 mm stereojack til  
3,5 mm stereojack



Optisk lyd kabel



Skruetrækker



Brugervejledning

# Overzicht


## Bagside

### Linjeudgang

Til tilslutning af tv-løsning

### Mikrofonindgang

Til tilslutning af ekstern mikrofon

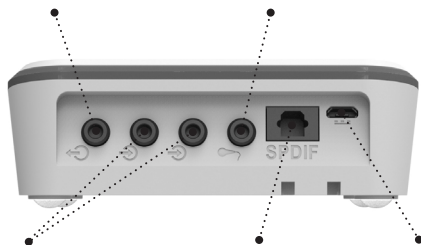

### Linjeindgange

Til tilslutning af radio, tv m.m.

### Digital indgang


Indgang til optisk lyd fra fx tv, PlayStation og lignende

### Strømforsyningsstik

Til tilslutning af 5V micro usb strømforsyning

# Overzicht

## Venstre side

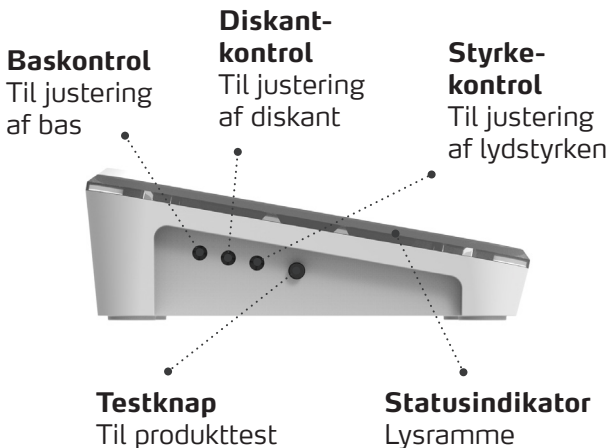

## Tilbehør (Købes separat)

Phono/SCART adapter



3,5 mm stereojack til  
6,3 mm stereojack



3,5 mm stereojack til  
2 x phonostik



## Parring til Puzzle Pro sendere

Link Pro modtageren skal parres med Puzzle Pro senderen/senderne. Vi anbefaler, at du parrer enhederne, før du monterer dem.

- 1 Sæt din Puzzle Pro sender (fx Detect Pro) i parringsmode (se evt. Puzzle Pro senderens brugervejledning).
- 2 Sæt Link Pro i parringsmode. Tryk kortvarigt på Link Pro's testknap. Statusindikatoren lyser kortvarigt blå i lysrammen.
- 3 Tryk på testknappen igen og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil den er i parringsmode, og statusindikatoren blinker rødt og blå. Link Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.

Når både Puzzle Pro senderen og Link Pro er i parringsmode, tager parringen ca. 5-10 sekunder. Ved succesfuld parring vil Link Pro's statusindikator lyse blå i hele lysrammen.



## Parring til Puzzle Pro sendere

- 4 Link Pro vil fortsat lyse blåt og være i parringsmode, også efter at parringen er afsluttet. Flere enheder kan parres samtidigt. Tryk på testknappen på Link Pro, hvis du ønsker at afslutte parringsmode. Lyset i statusindikatoren slukkes.
- 5 Tryk evt. på senderens testknap (fx Detect Pro) og test, at parringen er foretaget korrekt.

### Link Pro's statusindikatorer:

Lys	Status
Blå	Aktiv
Hvid (kortvarigt)	Lydsignal aktivt
Blinker rød og blå	I parringsmode
Blå	Succesfuld parring og i parringsmode (efter én sender er parret)

## Slet parring til Puzzle Pro sendere

- 1 Tryk på Link Pro's testknap, og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil statusindikatoren blinker rødt og blå.
- 2 Slip testknappen og vent i et par sekunder, og tryk derefter på testknappen igen, indtil statusindikatoren lyser rødt. Alle parringer til Link Pro er nu slettet.
- 3 Test evt. om parringerne er slettet korrekt ved at aktivere en af Puzzle Pro senderne fx Detect Pro, der før var parret med Link Pro. Er parringerne slettet korrekt, vil Link Pro's statusindikator ikke længere lyse, når Puzzle Pro senderen aktiveres.

### **BEMÆRK**

Alle parringer til Link Pro vil blive slettet.


## Indstilling af melodi og statusindikatorens farve

Link Pro har forskellige melodier og en række forskellige farver i statusindikatoren. Du kan vælge, hvilken melodi der skal afspilles, og hvilken farve statusindikatoren skal lyse i, når en alarm aktiveres.

- 1 Tryk på senderens (fx Detect Pro) testknap, så Link Pro's statusindikator lyser, og en af melodierne afspilles.
- 2 Tryk og hold Link Pro's testknap inde, indtil statusindikatoren lyser.
- 3 Tryk på Link Pro's testknap igen for at vælge melodi og farve. Fortsæt med at trykke, indtil du kommer til den ønskede melodi og farve.
- 4 Tryk og hold testknappen på Link Pro inde, indtil statusindikatoren og melodien slukker.

## Tilslutning til tv og radio mv.

- 1 Sæt en af de medfølgende ledninger i ét af de tre markerede indgangsstik på bagsiden af Link Pro.
- 2 Tilslut den anden ende af ledningen i "Line out" på tv'et eller i radioen.

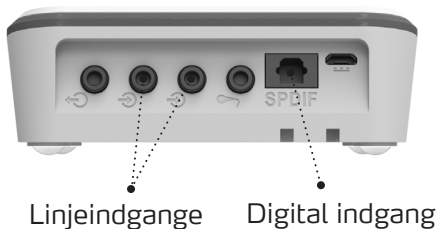

### **BEMÆRK**

Andre lydkilder end radio og tv kan tilsluttes til Link Pro.

Benyt kun ledninger og jackstik leveret af en Phonic Ear forhandler/installatør.

## Tilslutning af tv-løsning

- 1 Sæt ledningen i stikket mærket linjeudgang på bagsiden af Link Pro.
- 2 Sæt den anden ende af ledningen til din indgang på din tv-løsning (se evt. tv-løsningens brugervejledning).

## Tilslutning af strømfor syning

- 1 Sæt 5V micro usb strømfor syningen i strømfor syningsstikket på bagsiden af Link Pro.
- 2 Sæt strømfor syningen i stikkontakten, og tænd for stikkontakten.

## Test af signal

Du kan teste, om Link Pro er tændt, og om der er signal ved hjælp af testknappen.

Tryk kort på testknappen på siden af Link Pro. Link Pro er tændt, hvis statusindikatoren lyser blå t i lysrammen. Link Pro modtager et lydsignal, hvis statusindikatoren lyser hvidt.

## Indstilling af lydstyrke

Indstil lydstyrken ved hjælp af styrkekontrollen på siden af Link Pro. Benyt vedlagte skruetrækker.

Drej med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at dæmpe lydstyrken.

### **BEMÆRK**

Hvis du synes, at alarmsignalerne er for høje, kan du skrue helt op for den tilsluttede lydkilde og justere lyden ned på din tv-løsning.

## Indstilling af bas og diskant

### **Bas**

Basniveauet indstilles ved hjælp af baskontrollen på siden af Link Pro. Drejes kontrollen mod uret, mindskes basniveauet, og drejes den med uret, øges basniveauet.

### **Diskant**

Diskantniveauet indstilles ved hjælp af diskantkontrollen på siden af Link Pro. Drejes kontrollen mod uret, mindskes diskantniveauet, og drejes den med uret, øges diskantniveauet.

## Fejlsøgning

Fungerer dit Link Pro tonekald ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

### Ingen lyd

- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at lydstyrken er korrekt indstillet.
- Tjek, at der kommer lyd fra lydkilden fx tv'et.
- Tjek, at statusindikatoren lyser hvidt ved et kort tryk på testknappen.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.

### Link Pro modtager ikke alarmsignaler fra Puzzle Pro senderen

- Par Link Pro og Puzzle Pro senderen igen.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.



## Test og godkendelser

Link Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Danmark

**CE 1299**

## Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

# Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

## Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

## Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

## Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

### **Hvad gør du, hvis du har brug for service**

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.





Din forhandler

20007PE 01.20

Phonic Ear A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Tlf.: 3917 7101  
mail@phonicear.dk  
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**<sup>®</sup>