



Observer Pro

Puzzle Pro babyalarm

Brugervejledning
Dansk



 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Tilslutning af strømforsyning	9
Parring til Puzzle Pro modtagere	10
Slet parring til Puzzle Pro modtagere	12
Installation med intern mikrofon	13
Installation med ekstern mikrofon	14
Placering	15
Indstilling af mikrofonfølsomhed	16
Fejlsøgning	18
Test og godkendelser	19
Miljøinformation	20
Garanti	22
Sikkerhedsforanstaltninger	25

Introduktion

Observer Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere og fungerer som babyalarm. Den har en særlig sensitiv mikrofon, der kan justeres efter behov.

Observer Pro opfanger barnegråd og sender signal til Puzzle Pro systemets alarmmodtagere, som informerer brugeren via lyd, lys og/eller vibration.

Observer Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere fx Call Pro, Flash Pro, Wake Pro, PocketVib Pro, Loop Pro og Link Pro.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Observer Pro
babyalarm




Strømforsyning
(5V micro usb)



Brugervejledning


Oversigt

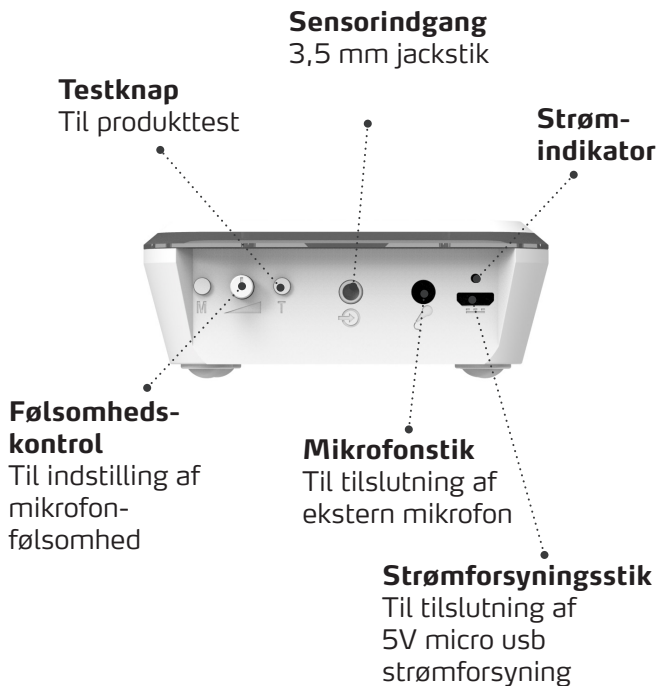

Oversigt

**Intern
mikrofon**

Statusindikator
Lysramme

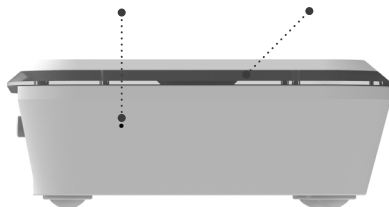

Vandalsikring
Til vandalsikret
montage

Tilbehør (Købes separat)

Vægbeslag

Observer Pro kan installeres på væggen med et vægbeslag.



Bordfod

Observer Pro kan sættes i bordfoden.



Ekstern mikrofon



Tilslutning af strømfor syning

- 1 Sæt ledningen fra den vedlagte 5V micro usb strømfor syning i strømfor syningsstikket på bagsiden af Observer Pro.
- 2 Sæt strømfor syningen i stikkontakten, og tænd for stikkontakten.

Strømindikatoren på bagsiden af Observer Pro lyser ved korrekt tilslutning.

Batteribackup

Observer Pro har et indbygget genopladeligt batteri.

Parring til Puzzle Pro modtagere

Observer Pro senderen skal parres med Puzzle Pro modtageren/modtagerne. Vi anbefaler, at du parrer enhederne, før du monterer dem.

- 1 Sæt Observer Pro i parringsmode. Tryk på Observer Pro's testknap, og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil den er i parringsmode, og statusindikatoren blinker rødt og blå. Observer Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.
- 2 Færdiggør parringen ved hjælp af din Puzzle Pro modtager (se evt. Puzzle Pro modtagerens brugervejledning). Når både Observer Pro og Puzzle Pro modtageren er i parringsmode, tager parringen ca. 5-10 sekunder. Ved succesfuld parring vil Observer Pro's statusindikator lyse lyseblåt.
- 3 Observer Pro vil fortsat lyse lyseblåt og være i parringsmode, også efter at parringen er succesfuldt afsluttet. Flere enheder kan parres samtidigt. Tryk på testknappen på Observer Pro, hvis du ønsker at afslutte parringsmode. Lyset i statusindikatoren slukkes.

Parring til Puzzle Pro modtagere

- 4 Test evt. om parringen er foretaget korrekt ved at trykke på Observer Pro's testknap igen. Er parringen foretaget korrekt, lyser Observer Pro's statusindikator nu hvidt, og de parrede Puzzle Pro modtagere aktiveres.

Observer Pro's statusindikatorer:

Lys	Status
Hvid (ved tryk på testknap)	Aktiv
Lilla (ved registrering af lyd)	
Blinker rød og blå	I parringsmode
Konstant lyseblå	Succesfuld parring og i parringsmode (efter én modtager er parret)

Slet parring til Puzzle Pro modtagere

- 1 Tryk på Observer Pro's testknap, og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil statusindikatoren blinker rødt og blå.
- 2 Slip testknappen og vent i et par sekunder, og tryk derefter på testknappen igen, indtil statusindikatoren lyser rødt. Alle parringer til Observer Pro er nu slettet.
- 3 Test evt. om parringerne er slettet korrekt ved at trykke på Observer Pro's testknap igen. Er parringerne slettet korrekt, lyser Observer Pro's statusindikator nu hvidt, men ingen af Puzzle Pro modtagerne aktiveres.

BEMÆRK

Alle parringer til Observer Pro vil blive slettet.

Installation med intern mikrofon

Observer Pro's interne mikrofon kan aktiveres og opfange barnegråd.

Aktiver den interne mikrofon

Tryk på mikrofonomskifteren på bagsiden af Observer Pro og hold den inde, indtil statusindikatoren lyser grønt for at aktivere den interne mikrofon.

Deaktiver den interne mikrofon

Tryk på mikrofonomskifteren på bagsiden af Observer Pro og hold den inde, indtil statusindikatoren lyser rødt for at deaktivere den interne mikrofon.

Installation med ekstern mikrofon

Den eksterne mikrofon kan anvendes til at opfange lyd fra andre lydkilder fx babygråd.

Anvender du den eksterne mikrofon undgår du så vidt muligt falske alarmer.

Aktiver den eksterne mikrofon

Tryk på mikrofonomskifteren og hold den inde, indtil statusindikatoren lyser grønt for at aktivere den interne mikrofon, og dermed også den eksterne mikrofon.

Tilslut den eksterne mikrofon til mikrofonstikket på bagsiden af Observer Pro. Den interne mikrofon slukkes automatisk, når den eksterne mikrofon er tilsluttet.

Fjern klistermærkaten fra mikrofonen og klæb den tæt på fx barnets seng - dog uden for barnets rækkevidde.

BEMÆRK

Den eksterne mikrofon er tilbehør og købes separat.

Placering

Observer Pro kan også installeres på væggen med vægbeslag (tilbehør).

VIGTIGT

Sørg altid for, at Observer Pro holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

Indstilling af mikrofonfølsomhed

Observer Pro's mikrofonfølsomhed bør indstilles så lavt som muligt for at minimere muligheden for falske alarmer. Dette gøres ved hjælp af følsomhedskontrollen på bagsiden af Observer Pro.

Juster mikrofonens følsomhed ved at dreje følsomhedskontrollen. Drej mod uret for at minimere følsomheden, og drej med uret for at øge følsomheden.

Når statuslyset på Observer Pro aktiveres, eller én af Puzzle Pro systemets modtagere aktiveres, er følsomheden korrekt indstillet.

BEMÆRK

Vi anbefaler, at følsomheden justeres så lavt som muligt for at undgå falske alarmer. Vær dog opmærksom på, at du ikke får skruet for langt ned på følsomhedskontrollen, da Observer Pro i så tilfælde ikke vil reagere, når barnet græder.

Fejlsøgning

Fungerer din Observer Pro babyalarm ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Statusindikatoren på Observer Pro lyser ikke, når du trykker på testknappen på bagsiden af Observer Pro

- Tilslut en 5V micro usb strømforsyning til Observer Pro.
- Tjek, om strømforsyningen er korrekt tilsluttet.
- Tjek, om stikkontakten er tændt.
- Batteriet kan udskiftes ved at kontakte din Phonic Ear forhandler/installatør.

Statusindikatoren på Observer Pro lyser, når testknappen aktiveres, men alarmmodtagerne modtager ikke alarmsignaler fra Observer Pro

- Par Observer Pro med Puzzle Pro modtageren igen.

Fejlsøgning

Puzzle Pro systemets modtagere afgiver signal - tilsyneladende uden grund

- Tjek, at uønskede lydkilder ikke er tilsluttede, hvis alarmsignaler fra disse ikke ønskes.
- Tjek, at følsomheden på mikrofonen er korrekt indstillet (se s. 16)

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Observer Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

C € 1299

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Genopladeligt litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning

Genopladelige litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.



Din forhandler

20012PE 01.20

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]