


PerfectDry Lux[®]

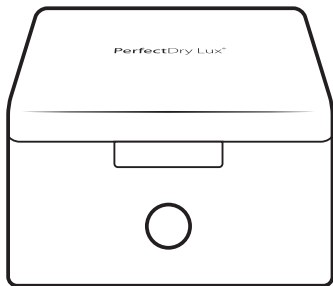

Hurtig affugtning
af dine høreapparater
med 360° UV-C stråling

1

Pakkens indhold

1 stk. PerfectDry Lux®


1 stk. USB-stik

1 stk. strømforsyning

1 stk. brugervejledning


2

Tilslut PerfectDry Lux®. Det blå lys indikerer, at der er strøm på, og såfremt du intet foretager dig, vil lyset automatisk slukke efter 30 sek.

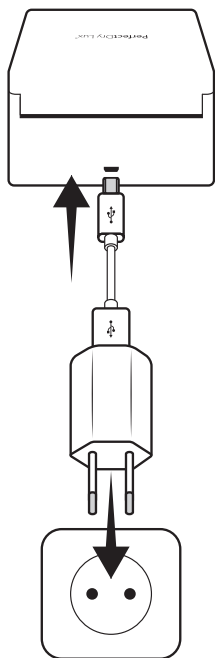

3


Rens dine høreapparater, som du plejer at gøre.
Åbn batteriskufferne på dine høreapparater.
Batterier må gerne blive i høreapparaterne under tørreprocessen. Luk låget på boksen.

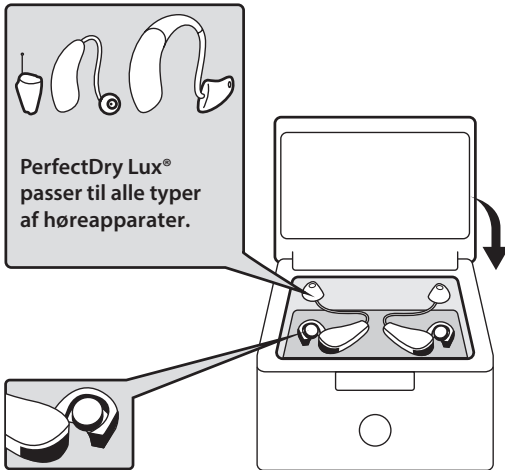

4

Tryk en enkelt gang på knappen for at starte tørreprocessen. Det blå lys vil blinke langsomt, og processen er i gang. Tørring vil kun finde sted, når låget er lukket og vil afsluttes efter 30 min.


PerfectDry Lux® vil automatisk stoppe, og det blå lys vil slukke.

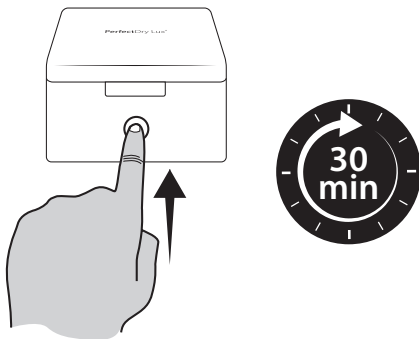

- ! Tjek, at låget på boksen er lukket. Åbnes låget under processen, vil PerfectDry Lux® af sikkerhedsmæssige årsager stoppe, og man må starte forfra.

Lysindikatorer

Hvis blåt lys **BLINKER**, er tørring i gang.
Hvis blåt lys er **KONSTANT**, er boksen i standby.

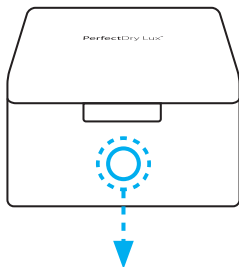


Identifikationer


Disse informationer er at finde på din PerfectDry Lux®


V Volt (strømforsyningsspænding)

A Ampere (strømforbrug)

 USB strømforsyningssymbol

 Indendørs brug

 Produktet er lavet af ABS med genbrugskode nr. 7

 Produktet er kompatibelt med alle europæiske direktiver gældende for medicinsk udstyr

Funktionsdetaljer

360° UV-C stråling

PerfectDry Lux® har en kortbølget UV-C-lampe, som dækker over hele høreapparatets overflade takket være en 360° udformning.

Høreapparaternes eksponering for UV-C-stråling reducerer kløe og irritation i øregangen betydeligt.

Affugtning

PerfectDry Lux® har et patenteret affugtningssystem, som affugter høreapparaterne ved hjælp af luft. Det er med til at reducere tørretiden samt mængden af strøm, der bruges på affugtningen. Temperaturen i boksen er kontrolleret af et elektronisk system for at kunne opnå maksimal temperatur på 45 °C, uanset rumtemperaturen. Derved forhindres det, at høreapparaterne tager skade under affugtningen. Det anbefales, at PerfectDry Lux® bruges dagligt for at opretholde høreapparaternes optimale kvalitet.

Gældende direktiver

Tørreboksen lever op til kravene i direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr.

Tekniske data

Funktioner

Indvendig (lxbxd):	70x21x51 mm
Udvendig (lxbxd):	93x48x76 mm
Vægt:	144 g
UV-lampe:	253,7 nm
Max. strøm:	4W
Standby-strøm:	0,04W
Software:	ØØ PDL-LOG-02.00
Opbevaringstemperatur mellem -20 °C til +65 °C	
Antal cyklusser:	1
Tørretemperatur:	<45 °C
Cyklusvarighed:	30 min.
Omgivende temperatur under cyklus:	Fra 12 °C til 40 °C
Strømforsyning	
Input:	100-240Vac 50-60Hz
Output:	5Vdc
Stik:	USB-kabel - mikro USB

 Sluk for PerfectDry Lux®, når den ikke er i brug -
for at beskytte miljøet.

Sikkerhedsinstruktioner

PerfectDry Lux® må ikke benyttes af personer med svækkede kognitive funktioner. Derudover er der ingen gældende krav til brugeren.

Opbevares utilgængeligt for børn. Brugeren bør kun varetage den almindelig rengøring af PerfectDry Lux®. Alt andet vedligehold eller reparation skal foretages af en professionel.

Placer ikke PerfectDry Lux®, strømforsyningskablet eller stikket i vand eller nogen anden form for væske. Brug ikke systemet, hvis strømforsyningskablet eller stikket er beskadiget. Udskift din netadapter med en original model.

Stil PerfectDry Lux® på en flad, tør og stabil flade. Se ikke direkte på tørreboksens UV-C-lampe. Træk i stikket, og ikke i kablet, når systemet frakobles.

Brug aldrig vaskemidler eller ætsende produkter under rengøring af PerfectDry Lux®. Der gives ingen garanti, såfremt disse anvisninger ikke følges. Producenten kan ikke stilles ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug eller håndtering.

Rengøring

Brug en blød klud til at rengøre produktet. Systemet tåler ikke slibemidler eller spray-væsker, som trænger ind i systemet.

Hold PerfectDry Lux® lukket, når systemet ikke anvendes, for at undgå aflejring af skidt.

Garanti

2 års reklamationsret (kabel og transformer er ikke inkluderet). Skulle systemet blive defekt, kontakt da din forhandler. Garantien gælder ikke for defekter, som er forårsaget af uheld eller en utilsigtet hændelse grundet brug af væsker, uagtsomhed, uegnet brug, demontering af enhver art, manglende pleje eller lignende, som er forårsaget af brugeren. Derudover dækker garantien ikke, hvis defekten skyldes lynnedslag eller en anden form for strømudsving. Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at PerfectDry Lux® frakobles strømforsyning under tordenvej.

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

PerfectDry Lux®



MG Développement • ZA aéroport de Montpellier • 34470 Pérols • Frankrig



#921-06-201-00 Rev. A 0118