



signolux



**DK**

## **Brugervejledning**

Signalux direkte sender


# Introduktion

Signalux direkte sender er en af Signalux alarmsystemets sendere. Den opfanger alarmer og ringetoner fra fx dørklokke, porttelefon og fastnettelefon og sender informationen trådløst til alarmsystemets modtagere.


Et Signalux alarmsystem består af mindst én sender og én modtager. Signalux direkte sender fungerer med alle Signalux-modtagere, fx Signalux fyrtårn, Signalux lys- og lyd giver, Signalux trådløs vibrator, Signalux lysgiver og Signalux vækkeur og alarmmodtager.

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan Signalux direkte sender sættes op, og du lærer enhedens funktioner at kende.

# Overzicht

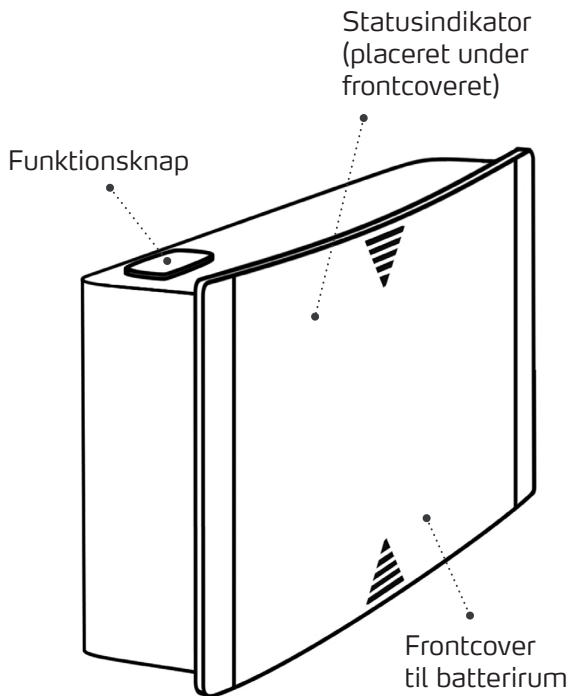

# Oversigt

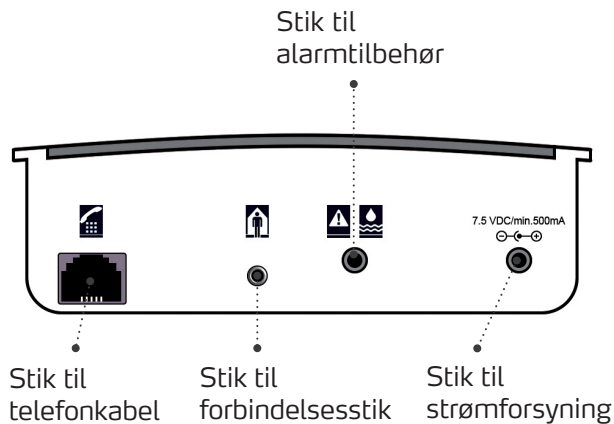

## **Pakkens indhold**

Pakken indeholder følgende dele:

- Signolux direkte sender
- 3 stk. Alkaline AAA-batterier 1,5 V
- Forbindelsesstik
- Vægbeslag
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.


## **Tilbehør**

Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os for yderligere information om fx telefonforbindelsesstik, kontaktmåtte, dør- eller vinduesensorer.


# Opsætning

## Isætning og udskiftning af batterier


- a) Batterirummet er placeret under frontcoveret. Skub frontcoveret opad. En vis modstand kan opleves pga. lukkemekanismen.

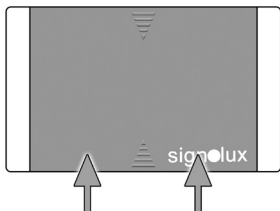

- b) Frontcoveret kan nu tages af, og batterirummet er tilgængeligt.
- c) Isæt de 3 stk. Alkaline AAA-batterier 1,5 V. Sørg for, at vende batterierne korrekt.

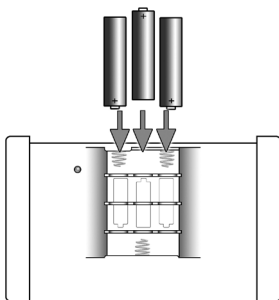

- d) Sæt frontcoveret på igen ved at lægge coveret over batterirummet med ca. 1 cm til den nederste kant.

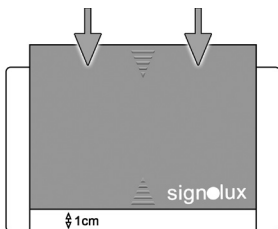

- e) Skub coveret nedad, indtil det klikkes på plads. Coveret sidder nu på igen.

### **BEMÆRK**

Det er muligt at benytte en strømforsyning (tilbehør) i stedet for batterier. Brug kun originalt tilbehør. Kontakt Phonic Ear for yderligere information.

## Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.

Signalux direkte sender er forudindstillet til at vise følgende symbol på Signalux-modtagerne:



Når du trykker på funktionsknappen på Signalux direkte sender, vises symbolet for dørklokke 2.



Når du bruger stik til telefonkabel, vises symbolet for telefon.



Når du bruger stikket til forbindelsstik, vises symbolet for dørklokke 1.



Når du bruger stikket til alarmtilbehør, vises symbolet for alarm.

### Bemærkning 1:

Hvis Signalux direkte sender skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at den pågældende Signalux-modtager i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på modtageren. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.



**Bemærkning 2:**

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signolux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signolux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

## **Parring og valg af symbol**

Du kan selv vælge, hvilket symbol Signolux direkte sender skal tildeles.

### **Sådan ændrer du symbol**

- a) Tryk og hold funktionsknappen på den pågældende modtager inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser (fx dørklokke-symbolet).
  
- b) Udløs nu et signal ved at trykke på funktionsknappen på Signolux direkte sender.
  
- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen ved at trykke på funktionsknappen på Signolux direkte sender. Signolux-modtageren bør nu reagere og vise det nye tildelte symbol.

## **Besked, når fastnettelefonen ringer**

Stik til telefonkabel reagerer på ringesignaler fra en analog bylinje (det offentlige telefonnet).

- a) Sæt et telefonforbindelsesstik (tilbehør) i stikket til telefonkabel i bunden af Signolux direkte sender.
- b) Sæt den anden ende i et ledigt telefonstik på væggen.

## Besked om andre signaler

Signalux direkte sender kan opfange diverse elektriske signaler. Når et signal opfanges, sendes signalet til alle parrede Signalux-modtagere inden for rækkevidde.

Stik til forbindelsesstik reagerer på input-volt på mindst 3 V og højst 15 V. Det er muligt at forbinde både veksel- og jævnstrøm. Derved kan Signalux direkte sender forbindes til lav-volt-systemer, som fx en dørklokke.

Signalux direkte sender kan også reagere på en kortslutning. Tilslut et standard 3,5 mm stereo-jack-kabel (spids og stel/skærm) i stikket alarmtilbehør.

### **VIGTIGT**

Inputtet er kun lavet til at forbinde til strøm-kredse med lav volt. Inputtet må ikke overstige 15 V.

Forbind aldrig det tynde kabel til det almindelige elnet (230 V  $\pm$ 10 %). Er du i tvivl, spørg da en elektriker til råds.


# Montering

## Vigtig bemærkning

Vær opmærksom på, at metaldele og andre byggematerialer kan forstyrre signalet. Disse kan både være synlige og skjulte på monteringsstedet, og du bør derfor altid lave en funktionstest på monteringsstedet, før du begynder monteringen. Er signalmodtagelsen ustabil, bør du vælge et andet monteringssted.

## Vægmontering

Signalux direkte sender kan sættes op med det medfølgende vægbeslag på en væg (eller bjælke, skab mv.). Når den monteres på en murstens- eller stenvæg, kan det være nødvendigt med en slagboremaskine og et betonbor. Når vægbeslaget sidder fast, hæng da enheden på vægbeslaget.

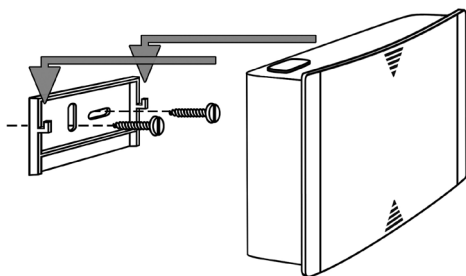

## Vedligeholdelse

Enheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Placer ikke enheden i direkte sollys. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige rystelser.

### **BEMÆRK**

Enheden er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand, fx vaser, eller åben ild, fx stearinlys, i nærheden af enheden. Sørg for, at batterierne ikke udsættes for høj varme fra fx sollys, ild eller lignende.

## Fejlsøgning

Fungerer din Signolux direkte sender ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

### **Statusindikatoren lyser ikke, når du trykker på funktionsknappen på toppen af Signolux direkte sender**

- Signolux direkte sender mangler strøm. Tilslut den originale strømforsyning (tilbehør) til den direkte sender, eller skift batterierne.

### **Statusindikatoren lyser, når du trykker på funktionsknappen på toppen af Signolux direkte sender, men Signolux-modtagerne modtager ikke signalet**

- Par Signolux direkte sender med Signolux-modtagerne igen.

### **Alarmodtagerne afgiver signal – tilsyneladende uden grund**

- Det kan antyde, at et andet Signolux alarmsystem i nærheden forårsager interferens. Par alle Signolux sendere og modtagere individuelt (se afsnittet "Parring og valg af symbol)

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

## **Generelle advarsler**

### **Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele**

Opbevar Signolux-enheder utilgængelige for børn. Pakken indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

### **Brug af batterier**

Brug kun batterier af typen Alkaline AAA 1,5 V. Brug af anden batteritype kan beskadige enheden. Batterier må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt atmosfærisk tryk. Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse af batterier er der risiko for, at de lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for eksplosion, brand og udvikling af røg og gas.

### **Brug af strømforsyning**

Brug kun den originale strømforsyning til enheden (tilbehør). Ønsker du en strømforsyning, bedes du kontakte Phonic Ear.



## Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2012/19/EF WEEE-direktivet
- 2014/53/EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på [www.humantechnik.com](http://www.humantechnik.com)



## Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

# Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

## Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

## Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

## Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

### **Hvad gør du, hvis du har brug for service**

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

## Forhandler

 **Phonic Ear**<sup>®</sup>

### Phonic Ear

Kongebakken 9

2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530

E-mail: [mail@phonicear.dk](mailto:mail@phonicear.dk)

[www.phonicear.dk](http://www.phonicear.dk)

## Producent

### Humantechnik GmbH

Im Wörth 25

D-79576 Weil am Rhein

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0

E-mail: [info@humantechnik.com](mailto:info@humantechnik.com)

[www.humantechnik.com](http://www.humantechnik.com)



HUMANTECHNIK