



signolux



DK

Brugervejledning

Signalux akustisk sender


Introduktion

Signalux akustisk sender er en af Signalux alarmsystemets sendere. Den opfanger via en mikrofon alarmer og ringetoner fra fx dørklokke og sender informationen trådløst til alarmsystemets modtagere.


Et Signalux alarmsystem består af mindst én sender og én modtager. Signalux akustisk sender fungerer med alle Signalux-modtagere, fx Signalux fyrtårn, Signalux lys- og lyd giver, Signalux trådløs vibrator, Signalux lysgiver og Signalux vækkeur og alarmmodtager.

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan Signalux akustisk sender sættes op, og du lærer enhedens funktioner at kende.

Overzicht

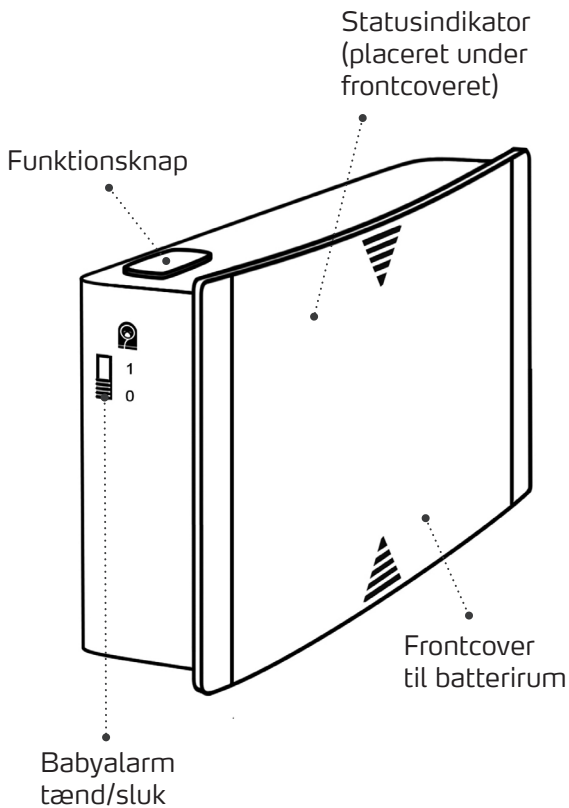

Øversigt

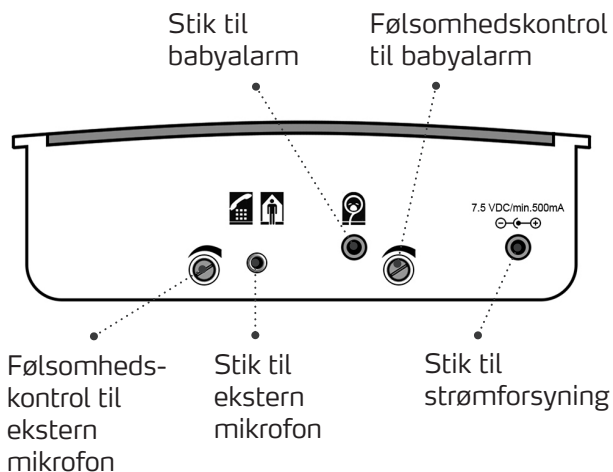

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:


- Signolux akustisk sender
- 3 stk. Alkaline AAA-batterier 1,5 V
- Ekstern mikrofon
- Vægbeslag
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.


Opsætning

Isætning og udskiftning af batterier


- a) Batterirummet er placeret under frontcoveret. Skub frontcoveret opad. En vis modstand kan opleves pga. lukkemekanismen.

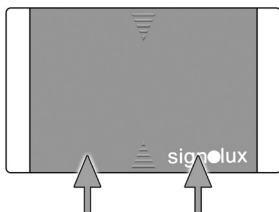

- b) Frontcoveret kan nu tages af, og batterirummet er tilgængeligt.
- c) Isæt de 3 stk. Alkaline AAA-batterier 1,5 V. Sørg for, at vende batterierne korrekt.

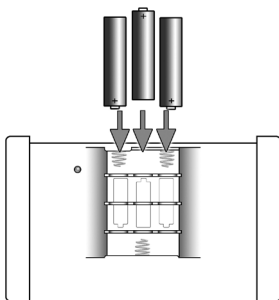

- d) Sæt frontcoveret på igen ved at lægge coveret over batterirummet med ca. 1 cm til den nederste kant.

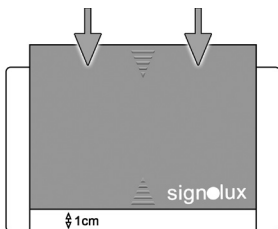

- e) Skub coveret nedad, indtil det klikkes på plads. Coveret sidder nu på igen.

BEMÆRK

Det er muligt at benytte en strømforsyning (tilbehør) i stedet for batterier. Brug kun originalt tilbehør. Kontakt Phonic Ear for yderligere information.

Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.

Signalux direkte sender er forudindstillet til at vise følgende symbol på Signalux-modtagerne:



Når du trykker på funktionsknappen på Signalux akustisk sender, vises symbolet for dørklokke 2.



Når du bruger stik til ekstern mikrofon, vises symbolet for dørklokke 1.



Når du bruger stikket til babyalarm, vises symbolet for babyalarm.

Bemærkning 1:

Hvis Signalux akustisk sender skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at den pågældende Signalux-modtager i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på modtageren. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

Bemærkning 2:

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signolux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signolux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Parring og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol Signolux akustisk sender skal tildeles.

Sådan ændrer du symbol

- a) Tryk og hold funktionsknappen på den pågældende modtager inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser.

- b) Udløs nu et signal ved at trykke på funktionsknappen på Signolux akustisk sender.

- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen ved at trykke på funktionsknappen på Signolux akustisk sender. Signolux-modtageren bør nu reagere og vise det nye tildelte symbol.

Montering af mikrofonledning

Signalux akustisk sender opfanger akustiske signaler (fx når dørklokken ringer) via den eksterne mikrofon. Når et signal opfanges, sendes signalet til alle parrede Signalux-modtagere inden for rækkevidde.

Fjern klistermærket fra mikrofonen, og klæb den direkte på lydkilden, fx dørklokken.

Tilslut den eksterne mikrofon til stikket til ekstern mikrofon i bunden af Signalux akustiske sender.

Indstilling af mikrofonfølsomhed

Mikrofonfølsomheden på Signalux akustisk sender bør indstilles så lavt som muligt for at minimere risikoen for falske alarmer. Dette gøres ved hjælp af følsomhedskontrollen til den eksterne mikrofon i bunden af den akustiske sender.

Drej følsomhedskontrollen helt i bund mod uret for at minimere følsomheden.

Drej derefter kontrollen langsomt med uret samtidig med, at fx dørklokken aktiveres. Når en af Signalux-modtagerne aktiveres, er følsomheden korrekt indstillet.

Babyalarm

Signalux akustiske sender kan benyttes som babyalarm, idet den kan registrere et barn som græder og sende signalet til alle parrede Signalux-modtagere inden for rækkevidde. Dette kræver dog en speciel babymikrofon (tilbehør). Kontakt Phonic Ear for yderligere information.

BEMÆRK

Den medfølgende eksterne mikrofon kan ikke benyttes til dette formål.


Montering

Vigtig bemærkning

Vær opmærksom på, at metaldele og andre byggematerialer kan forstyrre signalet. Disse kan både være synlige og skjulte på monteringsstedet, og du bør derfor altid lave en funktionstest på monteringsstedet, før du begynder monteringen. Er signalmodtagelsen ustabil, bør du vælge et andet monteringssted.

Vægmontering

Signolux akustisk sender kan sættes op med det medfølgende vægbeslag på en væg (eller bjælke, skab mv.). Når den monteres på en murstens- eller stenvæg, kan det være nødvendigt med en slagboremaskine og et betonbor. Når vægbeslaget sidder fast, hæng da enheden på vægbeslaget.

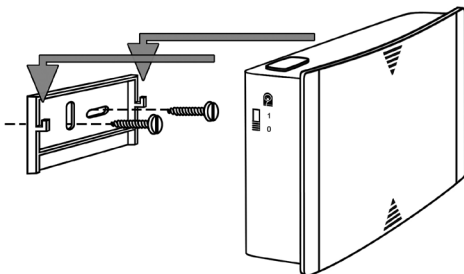

Vedligeholdelse

Enheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Placer ikke enheden i direkte sollys. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige rystelser.

BEMÆRK

Enheden er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand, fx vaser, eller åben ild, fx stearinlys, i nærheden af enheden. Sørg for, at batterierne ikke udsættes for høj varme fra fx sollys, ild eller lignende.

Fejlsøgning

Fungerer din Signolux akustiske sender ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

Statusindikatoren lyser ikke, når du trykker på funktionsknappen på toppen af Signolux direkte sender

- Signolux akustisk sender mangler strøm. Tilslut den originale strømforsyning (tilbehør) til enheden, eller skift batterierne.

Statusindikatoren lyser, når du trykker på funktionsknappen på toppen af Signolux akustisk sender, men Signolux-modtagerne modtager ikke signalet

- Par Signolux akustisk sender med Signolux-modtagerne igen.

Alarmodtagerne afgiver signal – tilsyneladende uden grund

- Det kan antyde, at et andet Signolux alarmsystem i nærheden forårsager interferens. Par alle Signolux sendere og modtagere individuelt (se afsnittet "Parring og valg af symbol")

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Generelle advarsler

Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele

Opbevar Signolux-enheder utilgængelige for børn. Pakken indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Brug af batterier

Brug kun batterier af typen Alkaline AAA 1,5 V. Brug af anden batteritype kan beskadige enheden. Batterier må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt atmosfærisk tryk. Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse af batterier er der risiko for, at de lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for eksplosion, brand og udvikling af røg og gas.

Brug af strømforsyning

Brug kun den originale strømforsyning til enheden (tilbehør). Ønsker du en strømforsyning, bedes du kontakte Phonic Ear.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2012/19/EF WEEE-direktivet
- 2014/53/EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 4445 2530
E-mail: mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
E-mail: info@humantechnik.com
www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK