



signolux



DK

Brugervejledning

Signalux Alarmo

Introduktion


Signalux Alarmo er en af Signalux alarm-systemets sendere. Det er en akustisk sender, der opfanger lyden fra allerede eksisterende røgalarmer.

Når Signalux Alarmo opfanger en alarm, sendes signalet trådløst til en eller flere af Signalux alarmsystemets modtagere.


Et Signalux alarmsystem består af mindst én sender og én modtager. Signalux Alarmo fungerer med alle Signalux-modtagere, fx Signalux fyrtårn, Signalux lys- og lyd giver, Signalux trådløs vibrator, Signalux lysgiver og Signalux vækkeur og alarmmodtager.

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan Signalux Alarmo sættes op, og du lærer enhedens funktioner at kende.

Øversigt

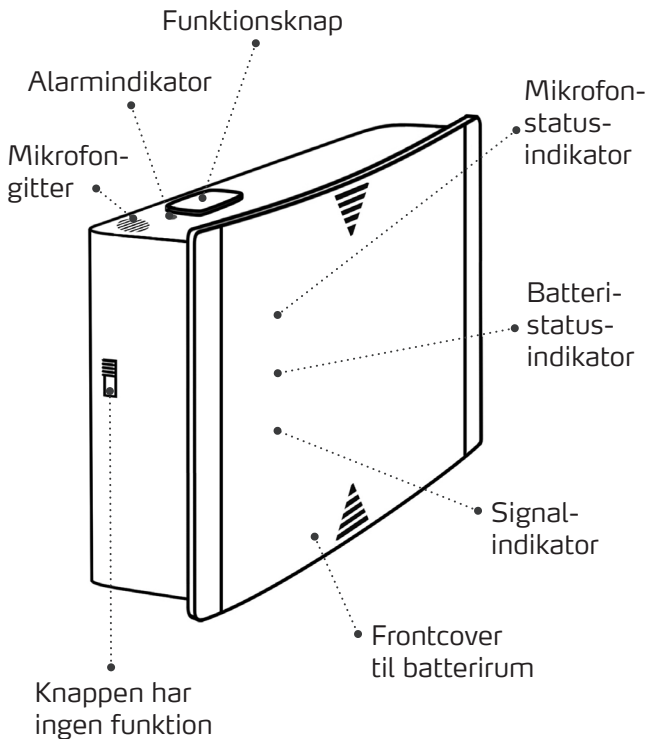

Øversigt

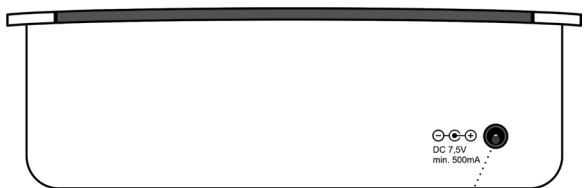

Stik til
strømforsyning

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

- Signolux Alarmo
- 3 stk. Ni-HM genopladelige AA-batterier
1,2 V (er isat)
- 7,5 V strømforsyning
- Vægbeslag
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.

Indikatorer og knapper

Tre indikatorer er placeret under frontcoveret:

Mikrofonstatusindikator

Denne indikator lyser, når støjen i omgivelserne når et vist niveau.

Batteristatusindikator

Et lavt batteriniveau indikeres ved, at batteristatusindikatoren lyser rødt, og de genopladelige batterier skal lades op. Under opladning lyser indikatoren orange. Når batterierne er opladet, og Signolux Alarmo er aktiv, lyser batteristatusindikatoren grønt.

Signalindikator

Denne signalindikator lyser rødt, når der er et udgående signal.

Funktionsknop

Man kan teste, at Signolux Alarmo fungerer ved hjælp af en funktionsknappen. Trykker man på den, bør Signolux-modtageren reagere og vise symbolet for alarmer fra Signolux Alarmo.

Alarmindikator

Denne indikator lyser, når en alarm opfanges.

Opsætning

Valg af bedste placering

Signalux Alarmo analyserer omgivelsernes lyde og reagerer på lyde fra røgalarmer.

For at understøtte denne funktion bør Signalux Alarmo placeres tættest muligt på den røgalarm, den skal opfange signalet fra, fx på en væg tæt på røgalarmen.

For at sikre den størst mulige rækkevidde, skal du være opmærksom på følgende:

- Senderen bør ikke placeres tæt på enheder, som kan forårsage interferens, såsom fjernsyn, computerskærme og mobiltelefoner.
- Senderen bør ikke placeres på genstande eller overflader af metal, da det kan forstyrre signalet.

BEMÆRK

Signalux Alarmo kan ikke opfange eller optage stemmer og samtaler og krænker således ikke privatlivets fred.

Strømforsyning

Ved brug første gang: Åbn batterirummet og fjern strimlen for at aktivere batterierne.

Tilslut strømforsyningen ved at sætte stikket i strømforsyningsstikket i bunden af Signolux Alarmo. Sæt ledningen i en stikkontakt med 230 V.


Batteribackup ved strømafbrydelse

Det anbefales at bruge strømforsyningen.

De genopladelige batterier er kun beregnet til at forsyne enheden med strøm i tilfælde af strømsvigt. Batterierne har strøm til ca. 16 timer. De oplades, når strømforsyningen benyttes. Batterierne har en opladningstid på ca. 12 timer.

Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.

 Signalux Alarmo er forudindstillet til at vise alarmsymbolet på modtagerne.

Bemærkning 1

Hvis Signalux Alarmo skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at den pågældende Signalux-modtager i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på modtageren. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

Bemærkning 2

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signalux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signalux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Parring og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol Signolux Alarmo skal tildeles.

Sådan ændrer du symbol

- a) Tryk og hold funktionsknappen på den pågældende modtager inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser.

- b) Udløs nu et signal ved at trykke på funktionsknappen på Signolux Alarmo.

- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen ved at trykke på funktionsknappen på Signolux Alarmo. Signolux-modtageren bør nu reagere og vise det nye tildelte symbol.

Proceduren skal gentages for hver modtagerenhed.

Vigtig meddelelse

Signalux Alarmo er programmeret til at analysere det omkringliggende lydbillede.

Muligheden for en falsk alarm kan dog ikke helt udelukkes. Phonic Ear tager ikke ansvar for falske alarmer og deres påvirkninger.


Vi anbefaler derfor at teste enhedens funktion ved at udløse en testalarm på den eksisterende røgalarm, som den skal opfange signalet fra.

Følsomhed


Signalux Alarmo er testet med mange forskellige alarmtoner. Det er muligt at ændre tærsklerne for dens akustiske analyse, hvis den ikke reagerer på røgalarmen, selv efter flere tests og skiftende positioner. Dette kræver en åbning af chassiset og en bestemt proces. I det tilfælde bedes du kontakte Phonic Ear eller din forhandler for råd.

Udskiftning af batteri


- a) Batterirummet er placeret under frontcoveret. Skub frontcoveret opad. En vis modstand kan opleves pga. lukkemekanismen.

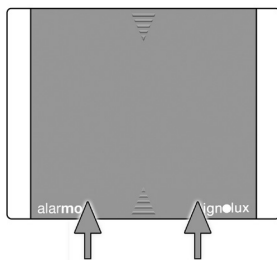

- b) Frontcoveret kan nu tages af, og batterirummet er tilgængeligt.
- c) Isæt de 3 stk. Ni-HM genopladelige AA-batterier 1,2 V. Sørg for, at vende batterierne korrekt.

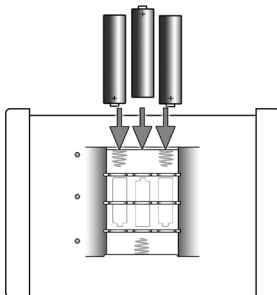


- d) Sæt frontcoveret på igen ved at lægge coveret over batterirummet med ca. 1 cm til den nederste kant.

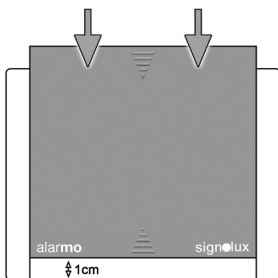

- e) Skub coveret nedad, indtil det klikkes på plads. Coveret sidder nu på igen.

Vægmontering

Signalux Alarmo kan sættes op med det medfølgende vægbeslag på en væg (eller bjælke, skab mv.). Når den monteres på en murstens- eller stenvæg, kan det være nødvendigt med en slagboremaskine og et betonbor. Når vægbeslaget sidder fast, hæng da enheden på vægbeslaget.

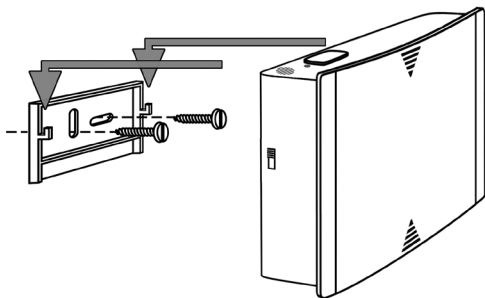

Vedligeholdelse

Enheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Placer ikke enheden i direkte sollys. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige rystelser.

BEMÆRK

Enheden er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand, fx vaser, eller åben ild, fx stearinlys, i nærheden af enheden. Sørg for, at batterierne ikke udsættes for høj varme fra fx sollys, ild eller lignende.

Fejlsøgning

Fungerer enheden ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

Signalindikatoren lyser, når der trykkes på funktionsknappen på Signolux Alarmo, men Signolux-modtagerne modtager ikke signalet

- Par Signolux Alarmo med Signolux-modtagerne igen.

Batteristatusindikatoren lyser ikke

- Sørg for, at de genopladelige batterier er isat korrekt i henhold til polaritetsindikatorerne + og -.

Alarmodtagerne afgiver signal – tilsyneladende uden grund

- Det kan antyde, at et andet Signolux alarmsystem i nærheden forårsager interferens. Par alle Signolux-sendere og -modtagere individuelt (se afsnittet "Parring og valg af symbol).

Afhjælp dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Generelle advarsler

Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele

Opbevar Signolux-enheder utilgængelige for børn. Pakken indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Brug af batterier

Brug kun batterier af typen Ni-HM genopladelige AA-batterier 1,2 V.

Brug af anden batteritype kan beskadige enheden. Batterier må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt atmosfærisk tryk. Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse af batterier er der risiko for, at de lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for eksplosion, brand og udvikling af røg og gas.

Brug af strømforsyning

Brug kun den originale strømforsyning, der medfølger enheden. Hvis der er behov for en ny strømforsyning, bedes du kontakte Phonic Ear.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2002/96/EF WEEE-direktivet
- 2014/53/EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 4445 2530
E-mail: mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
E-mail: info@humantechnik.com
www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK