

### Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.



Signalux røgalarm er forudindstillet til at vise røgalarm-symbolet på modtagerne.

### Bemærkning 1

Hvis Signalux røgalarm skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i brugervejledningen.

Vær opmærksom på, at den pågældende Signalux-modtager i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på modtageren. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

### Bemærkning 2

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signalux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle sendere og modtagere.