



HUMANTECHNIK

signolux



DK

Brugervejledning

Signalux trådløs vibrator

Introduktion


Signalux trådløs vibrator er en af Signalux alarmsystemets modtagere. Vibratoren modtager alarm- og ringesignaler fra Signalux alarmsystemets sendere fx Signalux dørtryk og Signalux direkte sender.

Signalux trådløs vibrator kan modtage alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, babyalarm, røgalarm m.m.



Når en alarm fra en af senderne modtages, vibrerer den trådløse vibrator og et symbol i vibratorens displayet indikerer, hvilken alarm der er aktiveret. Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, så det er muligt at skelne mellem signalerne.

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer ladestationens funktioner at kende.

Oversigt

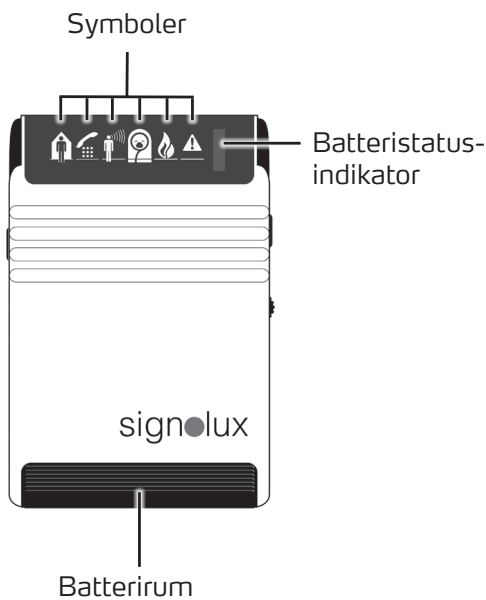

Oversigt

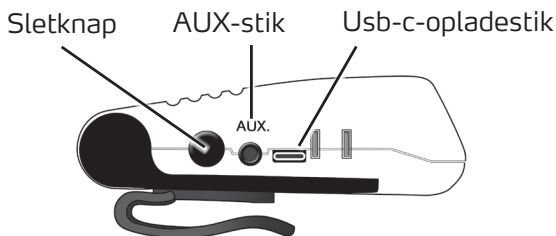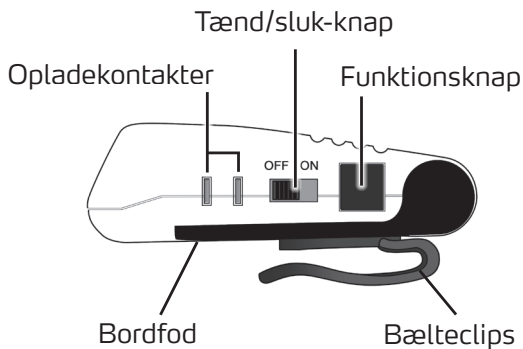

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

- Signolux trådløs vibrator
- Bæresnor
- 2 stk. Alkaline AAA-batterier 1,5 V
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.

Betjening

Symboler

De seks symboler gør det nemt at skelne mellem de forskellige signalkilder. De lyser i 40 sekunder, når et signal modtages.

Batteristatusindikator

Batteristatusindikatoren på den trådløse vibrator indikerer både batteristatus for modtageren og senderne:


- Et tilstrækkeligt batteriniveau for modtageren indikeres ved, at den grønne lampe blinker hvert 5. til 6. sekund.
- Et lavt batteriniveau for modtageren indikeres ved, at den røde lampe blinker hurtigt (én gang i sekundet). Udskift batterierne i modtageren hurtigst muligt.
- Et lavt batteriniveau for en sender indikeres ved, at lampen lyser samtidigt med symbolet for den pågældende sender, når dens signal udløses. Udskift batterierne i den pågældende sender hurtigst muligt.

Funktionsknap

Når vibratoren aktiveres, kan du stoppe vibrationerne ved at trykke på funktionsknappen.

Bælteclips

Du kan bruge bælteclipsen til at fastgøre vibratoren på dit tøj. Bælteclipsen kan udskiftes med bæresnoren.

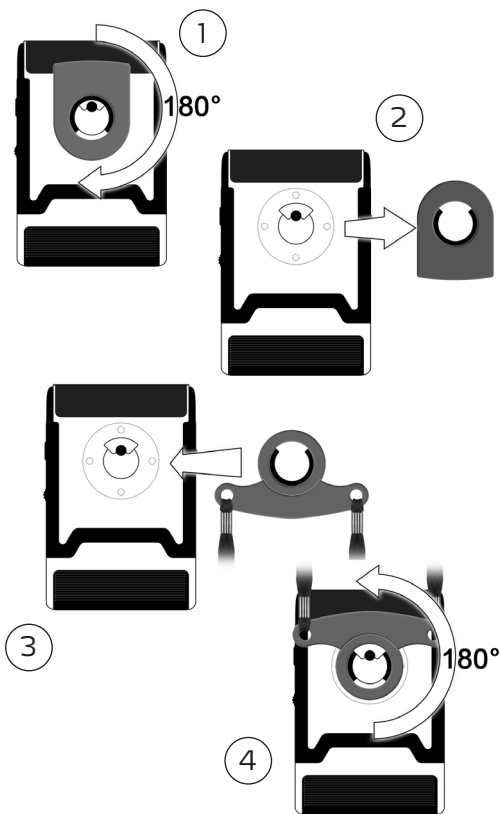

Tænd/sluk-knap

Brug denne knap til at tænde og slukke for den trådløse vibrator.

Sletknap

Med denne knap kan du fjerne sendere, der er tildelt et symbol på modtageren (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse").

Usb-c-opladestik

Der er et usb-c-opladestik på siden af vibratoren. Hvis genopladelige batterier (tilbehør) bruges i vibratoren, kan den også oplades ved hjælp af en standard usb-oplader med usb-c-kabel i stedet for i ladestationen. Under opladningsprocessen lyser batteristatus-indikatoren rødt. Når opladningsprocessen er afsluttet, lyser den grønt.

En vedligeholdelsesfunktion holder automatisk batterierne på fuld kapacitet. Dette betyder, at opladningsprocessen aktiveres med uregelmæssige intervaller, hvor batteristatusindikatoren lyser rødt i overensstemmelse hermed.

Er der isat engangsbatterier i vibratoren, har opladesticket ingen funktion.

AUX-stik

Forskelligt tilbehør såsom en pudevibrator eller en sengebundsvibrator kan tilsluttes via AUX-stikket.

Opsætning

Sådan isættes batterier

I bunden af Signolux vibratoren er der et batterirum. Åbn det ved at skubbe batterirummets dæksel væk fra modtageren.

Isæt to 1,5 V AAA-batterier, og sæt batterirummets dækslet på igen.

Sådan tændes vibratoren

Sæt tænd/sluk-knappen på »ON«. Nu er vibratoren klar til brug. Når der tændes for vibratoren, lyser batteristatusindikatoren rødt i ca. 1 sekund.

Rækkevidde

Rækkevidden mellem den trådløse vibrator og Signolux-senderne er op til 200 meter under ideelle forhold.

Symbolernes betydning

Symbolerne står for:



Dørklokke

Lyser grønt



Telefon

Lyser orange



Personkald

Lyser gult



Babyalarm

Lyser hvidt



Røgalarm

Lyser rødt



Alarm

Lyser rødt

Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.

Hvilket symbol der vises, afhænger af typen af sender. Disse oplysninger findes i brugervejledningen til senderen.

Manuel parring (valgmulighed)

Bemærkning 1:

Hvis en sender skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at vibratoren i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på vibratoren. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

Bemærkning 2:

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signalux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signalux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Nulstil til fabriksindstillinger

Slet alle parrede sendere (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse"). Når alle sendere er slettet, gendannes de forudindstillede symboler, og senderne vises igen automatisk.

Parring og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol en sender (fx Signolux dørtryk) skal tildeles. Der kan benyttes op til otte sendere for hvert symbol.

Vær opmærksom på, at hvis du allerede har tildelt en sender et valgfrit symbol, så skal du slette senderen fra vibratorens hukommelse, inden du kan tildele den et nyt symbol (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse").

- a) Tryk og hold funktionsknappen inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser (fx dørklokkesymbolet).
- b) Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol, ved hjælp af senderen (tryk fx på Signolux dørtryk).
- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen.

Slet sender fra modtagerens hukommelse

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen:

- a) Tryk og hold funktionsknappen inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser.

- b) Tryk nu samtidigt på funktionsknappen og sletknappen. Alle symboler lyser et kort øjeblik.

BEMÆRK

Dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol.

Se seneste signal, og sluk for det aktuelle signal

Tryk kort på funktionsknappen, og det sidste registrerede signal vises igen. Du kan også slukke for et aktiveret signal ved at trykke på funktionsknappen.

Vedligeholdelse

Den trådløse vibrator kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Placer ikke enheden i direkte sollys. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige rystelser.

BEMÆRK

Dette produkt er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand, fx vaser, eller åben ild, fx stearinlys, i nærheden af enheden. Sørg for, at batterierne ikke udsættes for høj varme fra fx sollys, ild eller lignende.

Fejlsøgning

Fungerer vibratoren ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder:

Ingen strøm på vibratoren

- Tjek, at batterierne er rigtigt placeret i batterirummet.
- Bruger du engangsbatterier, så tjek om de skal skiftes.
- Bruger du genopladelige batterier, så tjek, om de er fuldt opladet.
- Bruger du genopladelige batterier, så tjek, at ladestationen/usb-c-opladestikket er korrekt tilsluttet, samt at stikkontakten på væggen er tændt.

Vibratoren modtager ikke alarmsignaler fra Signolux-alarmsenderen

- Par vibratoren med Signolux-senderen igen (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Generelle advarsler

Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele

Opbevar Signolux-enheder utilgængelige for børn. Pakken indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Brug af batterier

Brug kun batterier af typen Alkaline AAA 1,5 V. Brug af anden batteritype kan beskadige enheden. Batterier må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt atmosfærisk tryk. Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse af batterier er der risiko for, at de lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for eksplosion, brand og udvikling af røg og gas.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2012/19/EF WEEE-direktivet
- 2014/53/EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 4445 2530
E-mail: mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
E-mail: info@humantechnik.com
www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK