



HUMANTECHNIK

signolux



DK

Brugervejledning

Signolux lysgiver

Introduktion

Signalux lysgiver er en af Signalux alarmsystemets modtagere. Den modtager alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, porttelefon, fastnettelefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux alarmsystemet.

Et Signalux alarmsystem består af mindst én sender og én modtager. Aktiveres en alarm fra en Signalux-sender (trykkes der fx på Signalux dørtrykket), sendes et signal til de parrede Signalux-modtagere.

Signalux lysgiver sørger for, at hver alarm gengives med sit eget unikke, kraftige lysblink og farvede symbol, hvilket gør det muligt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Der kan benyttes op til otte sendere for hvert symbol.

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan Signalux lysgiver sættes op, og du lærer enhedens funktioner at kende.


Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

- Signolux lysgiver
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.

Oversigt

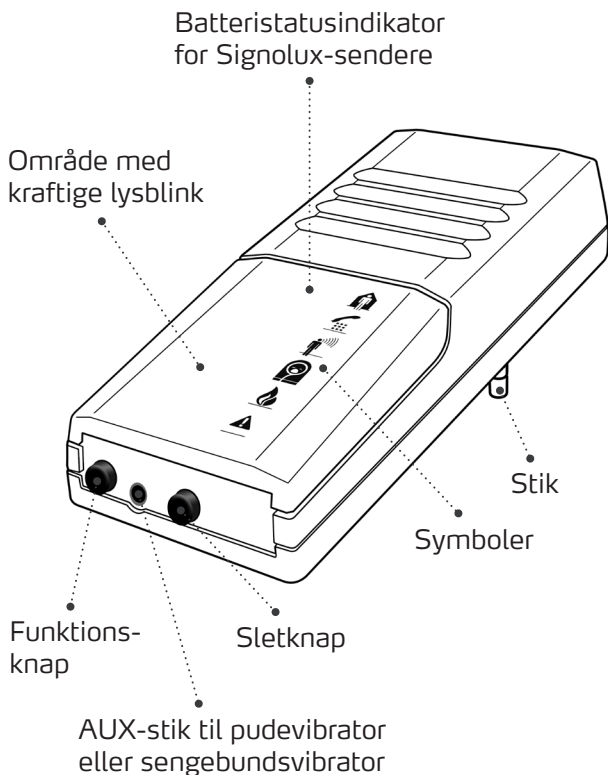

Betjening

Symboler

De seks symboler gør det nemt at skelne mellem de forskellige signalkilder. De lyser i 40 sekunder, når et signal modtages.

Batteristatusindikator for Signolux-sendere

Batteristatusindikatoren på lysgiveren indikerer batteristatus for Signolux-senderne:

Et lavt batteriniveau for en sender indikeres ved, at batteristatusindikatoren lyser rødt samtidigt med symbolet for den pågældende sender, når dens signal udløses. Udskift batterierne i den pågældende sender hurtigst muligt.

Funktionsknop

Når lysgiveren aktiveres, kan du stoppe de kraftige lysblink ved at trykke på funktionsknappen.

Du kan også få vist det sidste registrerede signal ved at trykke kort på funktionsknappen igen.

Funktionsknappen bruges også til valg af symbol på lysgiveren (se afsnittet "Parring og valg af symbol")

Sletknap

Med denne knap kan du fjerne sendere, der er tildelt et symbol på modtageren (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse").

AUX-stik

Forskelligt tilbehør såsom en pudevibrator eller en sengebundsvibrator kan tilsluttes AUX-stikket.

Opsætning

Tilslut lysgiveren

Sæt lysgiveren i en synlig stikkontakt. Symbolerne lyser én gang, og lysgiveren er klar til brug.

Lysgiveren er ikke vandtæt. Derfor frarådes det at bruge den udendørs.

Rækkevidde

Rækkevidden mellem lysgiveren og Signolux-senderne er op til 200 meter under ideelle forhold.

Symbolernes betydning

Symbolerne står for:



Dørklokke

Lyser grønt



Telefon

Lyser orange



Personkald

Lyser gult



Babyalarm

Lyser hvidt



Røgalarm

Lyser rødt



Alarm

Lyser rødt

Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.

Hvilket symbol der vises, afhænger af typen af sender. Disse oplysninger findes i brugervejledningen til senderen.

Manuel parring (valgmulighed)

Bemærkning 1:

Hvis en sender skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at Signalux lysgiver i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på enheden. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

Bemærkning 2:

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signalux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signalux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Nulstil til fabriksindstillinger

Slet alle parrede sendere (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse"). Når alle sendere er slettet, gendannes de forudindstillede symboler, og senderne vises igen automatisk.

Parring og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol en sender (fx Signolux dørtryk) skal tildeles. Der kan benyttes op til otte sendere for hvert symbol.

Vær opmærksom på, at hvis du allerede har tildelt en sender et valgfrit symbol, så skal du slette senderen fra lysgiverens hukommelse, inden du kan tildele den et nyt symbol (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse").

- a) Tryk og hold funktionsknappen inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser (fx dørklokke-symbolet).
- b) Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol, ved hjælp af senderen (tryk fx på Signolux dørtryk).
- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen.

Slet sender fra modtagerens hukommelse

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen:

- a) Tryk og hold funktionsknappen inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser.

- b) Tryk nu samtidigt på funktionsknappen og melodiknappen til alle symbolerne blinker kort på samme tid.

BEMÆRK

Dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol.

Vedligeholdelse

Enheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Placer ikke enheden i direkte sollys. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige rystelser.

BEMÆRK

Enheden er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand, fx vaser, eller åben ild, fx stearinlys, i nærheden af enheden. Sørg for, at batterierne ikke udsættes for høj varme fra fx sollys, ild eller lignende.

Fejlsøgning

Fungerer din Signolux lysgiver ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

Når du forsøger at programmere en sender, lyser et andet symbol

- Den sender, du forsøger at programmere, er allerede kendt af modtageren. Slet senderen fra modtagerens hukommelse, før den kan tildeles et nyt symbol.

Lysgiveren modtager ikke alarmsignaler fra Signolux-senderen

- Tjek, at Signolux lysgiver er korrekt placeret i stikkontakten, og at stikkontakten er tændt.
- Par lysgiveren med Signolux-senderen igen (se afsnittet "Parring og valg af symbol").
- Måske er Signolux lysgiver uden for senderens rækkevidde. Prøv at bruge senderen eller lysgiveren et andet sted.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011 / 65 / EF + 2015 / 863 / EF
RoHS-direktivet
- 2012 / 19 / EF WEEE-direktivet
- 2014 / 53 / EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet. Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9

2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530

E-mail: mail@phonicear.dk

www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25

D-79576 Weil am Rhein

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0

E-mail: info@humantechnik.com

www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK