



HUMANTECHNIK

signolux



DK

Brugervejledning

Signalux vækkeur og alarmmodtager

Introduktion

Signalux vækkeur og alarmmodtager vækker dig via vibrationer fra en kraftig vibrator under hovedpuden samt lydsignaler og lysblink, når vækkeuret ringer, eller når en af Signalux alarmsystemets sendere aktiveres, fx Signalux dørtryk eller Signalux direkte sender.

Signalux vækkeur og alarmmodtager har et display, hvor du kan se ur, dato og indgående alarmsignaler.


Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, lydsignal, lysblink og farvede symbol i displayet, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Alarmmodtageren kan modtage alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, babyalarm, røgalarm m.m.


Det er muligt at tilslutte en sengebundsvibrator til vækkeuret og alarmmodtageren (tilbehør).

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer dens funktioner at kende.

Overzicht

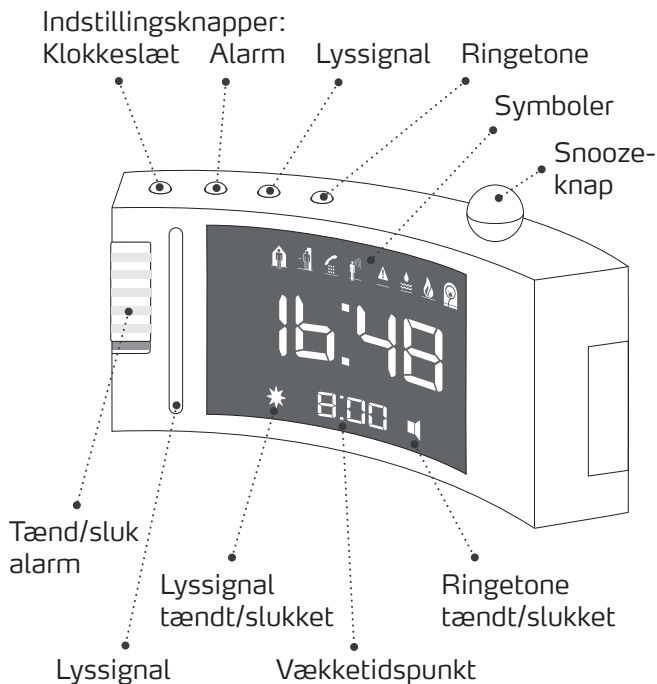

Øversigt

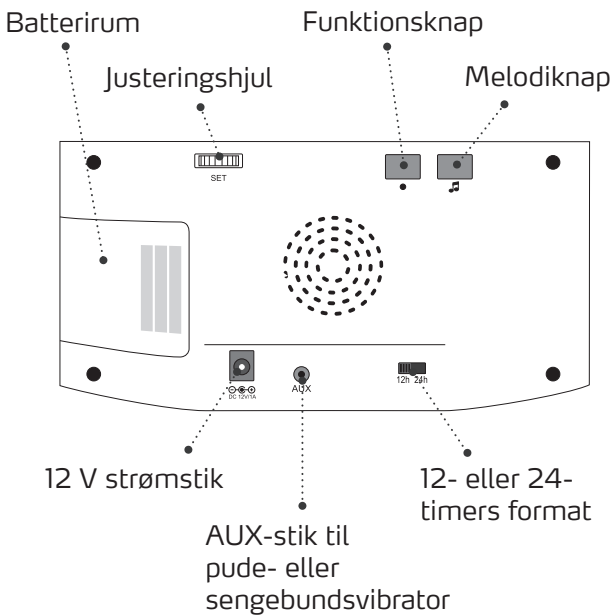

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

- Signolux vækkeur og alarmmodtager
- Pudevibrator
- 12 V strømforsyning
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.

Opsætning

Tilslut strømforsyningen til 12 V strømstikket på bagsiden af vækkeuret og alarmmodtageren, og sæt den i en stikkontakt med 230 V.

Indstilling af klokkeslæt

For at indstille klokkeslættet skal du trykke på indstillingsknappen for klokkeslæt »🕒« i ca. 1 sekund. Timetallet begynder at blinke. Indstil det ønskede timetal ved at dreje til venstre eller højre på justeringshjulet på vækkeurets bagside. Tryk på klokkeslætknappen »🕒« igen. Minuttallet begynder at blinke. Drej på justeringshjulet for at indstille det ønskede minuttal. Tryk på klokkeslætknappen »🕒« igen for at afslutte, og det indstillede klokkeslæt vises.

Indstilling af alarm

For at indstille et vækketidspunkt skal du trykke på indstillingsknappen for alarmer »🔔« i ca. 1 sekund. Vækketidspunktets timetal begynder at blinke. Indstil det ønskede timetal ved at dreje til venstre eller højre på justeringshjulet. Tryk på alarmknappen »🔔« igen. Vækketidspunktets minuttal begynder at blinke. Drej på justeringshjulet for at indstille det ønskede minuttal. Tryk på alarmknappen »🔔« igen for at afslutte, og det indstillede vækketidspunkt vises.


Tænd/sluk alarm

Alarmen tændes og slukkes ved hjælp af skydeknappen på venstre side.


Skydeknop i øverste position (grønt område kan ses): Alarm er tændt.

Skydeknappen i nederste position:
Alarm er slukket.


Ringetone til/fra

Tryk på ringetone-knappen »« i ca. 1 sekund for at slå ringetonen til eller fra. Hvis ringetonen er slået til, vises højttalersymbolet i displayet.

Indstilling af ringetonens lydstyrke

Tryk og hold ringetone-knappen »« nede, mens lydstyrken justeres. Efter 2 sekunder kan ringetonen høres. Hold ringetone-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere ringetonens lydstyrke. Slip ringetone-knappen for at afslutte indstillingen af lydstyrken.

Indstilling af ringetonens frekvens

Under justering af vækketonens frekvens skal ringetone-knappen »« og den kugleformede snooze-knap trykkes og holdes nede samtidigt. Efter 2 sekunder kan ringetonen høres. Hold ringetone-knappen og snooze-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere ringetonens frekvens. Slip knapperne for at afslutte indstillingen.

Lyssignal til/fra

Tryk og hold lyssignal-knappen »*« nede i ca. 1 sekund for at slå lyssignalet til eller fra. Hvis lyssignalet er slået til, kan lyssignalsymbolet ses på displayet.



Indstilling af lysstyrken i displayet om natten



Lysstyrken i displayet justeres automatisk i forhold til lysforholdene i rummet. I dagtimerne vises tallene med fuld lysstyrke. I mørke justeres displayets lysstyrke. Du kan dog selv indstille denne.

Tryk og hold lyssignal-knappen »*« nede for at indstille nattedisplayets lysstyrke. Hold lyssignal-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere lysstyrken i displayet om natten. Slip knapperne for at afslutte indstillingen. Foretages denne justering i dagtimerne, skifter displayet tilbage til fuld lysstyrke efter nogle få sekunder.

Oplyste tal til/fra

Hvis tallene lyser for kraftigt for dig om natten, selv i den svageste indstilling, kan lyset slukkes helt. Dette har ingen indvikling på evt. indikationer/alarmer.

Tal slukket: Tryk og hold knapperne »« og »« inde samtidigt i 5 sekunder. Tallene blinker 2 gange, hvorefter de slukkes efter 60 sekunder.

Tal tændt: Tryk og hold knapperne »« og »« inde samtidigt i 5 sekunder. Tallene blinker 4 gange, hvorefter de tændes.

Man kan få tallene til at blive oplyst i 60 sekunder ved at trykke på en valgfri knap.

Snooze-funktion

Du kan snooze alarmen ved at trykke på den kugleformede snooze-knap. Vækkeuret ringer igen efter 5 min.

12- eller 24-timers format

Klokkeslættet kan vises i et 12- eller 24-timers format. Indstillingen foretages med 12- eller 24-timers format-knappen på bagsiden af vækkeuret.

Batteribackup ved strømafbrydelse

Batterirummet har plads til 4 stk. Alkaline AAA-batterier 1,5 V (tilbehør). I tilfælde af en strømafbrydelse garanterer disse, at det indstillede klokkeslæt og modtagelsen af signaler fra andre Signolux-enheder ikke går tabt.

BEMÆRK

Under en strømafbrydelse er visning af tid og lyssignalet ikke aktivt, da strømforbruget er for højt til backup-batterierne.

Symbolernes betydning

Symbolerne står for:



Dørklokke 1

Lyser grønt



Dørklokke 2

Lyser grønt



Telefon

Lyser orange



Personkald

Lyser gult



Alarm

Lyser rødt



Oversvømmelsesalarm

Lyser blå



Røgalarm

Lyser rødt



Babyalarm

Lyser hvidt

Forudindstillede symboler

Signalux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.

Hvilket symbol der vises, afhænger af typen af sender. Disse oplysninger findes i brugervejledningen til senderen.

Manuel parring (valgmulighed)

Bemærkning 1:

Hvis en sender skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at vækkeuret i så fald skal have parret alle sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på enheden. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

Bemærkning 2:

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signalux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signalux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Nulstil til fabriksindstillinger

Slet alle parrede sendere (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse"). Når alle sendere er slettet, gendannes de forudindstillede symboler, og senderne vises igen automatisk.

Parring og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol en sender (fx Signolux dørtryk) skal tildeles. Der kan benyttes op til otte sendere for hvert symbol.

Vær opmærksom på, at hvis du allerede har tildelt en sender et valgfrit symbol, så skal du slette senderen fra vækkeurets hukommelse, inden du kan tildele den et nyt symbol (se afsnittet "Slet sender fra modtagerens hukommelse").

- a) Tryk og hold funktionsknappen »●« inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser (fx dørklokkesymbolet).
- b) Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol, ved hjælp af senderen (tryk fx på Signolux dørtryk).
- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen.

Slet sender fra modtagerens hukommelse

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen:


- a) Tryk og hold funktionsknappen »●« inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser.
- b) Tryk nu samtidigt på funktionsknappen »●« og melodiknappen »♪« til alle symbolerne blinker kort på samme tid.

BEMÆRK

Dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol.

Indstilling af melodi

Du kan indstille melodien for hvert symbol.

- a) Udløs et signal (tryk fx på Signolux dørtryk).
- b) Symbolet, der er tildelt senderen, bør lyse, og den tidligere valgte melodi bør kunne høres.
- c) Tryk og hold melodiknappen »« inde i 2 sekunder. Ikonet begynder at blinke.
- d) Tryk gentagende gange på melodiknappen, indtil du har fundet den ønskede melodi (du kan vælge mellem 15 forskellige melodier).
- e) Når symbolet stopper med at blinke, er den valgte melodi blevet tildelt.

Rækkevidde

Rækkevidden mellem Signolux vækkeur og alarmmodtager og Signolux-senderne er op til 200 meter under ideelle forhold.

Vedligeholdelse

Enheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. Placer ikke enheden i direkte sollys. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige rystelser.

BEMÆRK

Dette produkt er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand, fx vaser, eller åben ild, fx stearinlys, i nærheden af enheden.

Fejlsøgning

Fungerer dit Signolux vækkeur og alarmmodtager ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

Når du forsøger at tildele en Signolux-sender et valgfrit symbol, så lyser et andet symbol

- Den Signolux-sender, du forsøger at tildele et symbol, er allerede kendt af vækkeuret. Slet senderen fra vækkeurets hukommelse, før den kan tildeles et nyt symbol.

Signolux vækkeur og alarmmodtager virker ikke

- Tjek, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet.
- Måske er den aktiverede Signolux-sender endnu ikke parret med Signolux vækkeur og alarmmodtager. Tildel senderen et symbol.
- Måske er Signolux vækkeur og alarmmodtager uden for senderens rækkevidde. Prøv at placere senderen eller modtageren et andet sted.

Der er intet lydsignal

- Tjek, at lydstyrken ikke er indstillet på det laveste niveau.
- Tjek, at ringetonen er aktiveret.

Vækkeuret ringer ikke

- Tjek, at alarmen er indstillet korrekt.
- Tjek, at alarmen er aktiveret.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Generelle advarsler

Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele

Opbevar Signolux-enheder utilgængelige for børn. Pakken indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Brug af batterier

Brug kun batterier af typen Alkaline AAA 1,5 V til batteri-backupen. Brug af anden batteritype kan beskadige enheden. Batterier må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt atmosfærisk tryk. Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse af batterier er der risiko for, at de lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for eksplosion, brand og udvikling af røg og gas.

Brug af strømforsyning

Brug kun den originale strømforsyning, der medfølger enheden. Hvis der er behov for en ny strømforsyning, bedes du kontakte Phonic Ear.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2012/19/EF WEEE-direktivet
- 2014/53/EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 4445 2530
E-mail: mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
E-mail: info@humantechnik.com
www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK