



Varslingsenhed



Signalux varslingsenheden er en af Signalux-systemets trådløse alarmmodtagere. Enheden modtager trådløst alarm- og ringesignaler fra fx dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux-alarmsystemet.

Varslingsenheden laver alarmsignalerne om til både kraftige lysblink og en lyd, der indikerer, hvilken alarm der er aktiveret. På displayet er der otte forskellige symboler, der ydermere indikerer hvilken alarm, der er aktiveret.

Signalux varslingsenheden modtager trådløst alarm- og ringesignaler fra følgende Signalux-sendere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendør:

- Signalux direkte sender
- Signalux akustisk sender
- Signalux dørtryk
- Signalux røgalarm
- Signalux gateway til røgalarm "Alarmo"

Signalux varslingsenhed kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt have op til flere installationer i nærheden af hinanden fx i etageejendomme, tæt bebyggelse mv.

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signalux-modtagere, til samme Signalux-sender. Signalux varslingsenheden drives af 4 stk. udskiftelige 1,5 V LR14 batterier eller en strømforsyning.

Derudover er der mulighed for at koble en pude- eller sengebundsvibrator direkte til Signalux varslingsenheden.



Specifikationer

Signaloverførsel:	Modtager via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Lydtryk:	90 dB ved 1 m
Strømforsyning:	6V DC 0,8A
Batterier:	4 stk. 1,5V LR 14/C batterier
Batterilevetid:	Ca. 1 år
Mål (hxbxd):	153 x 121 x 42 mm
Vægt:	296 g (uden batterier)
Farve:	Bronze-metallic / gråt cover

Tilbehør



1,5 LR14/C batteri
4 stk. er nødvendigt
371-40-074-08



Pudevibrator
890-15-003-00



Sengebunds vibrator
890-15-406-00