



Smartphone Sensor

Brugervejledning
Dansk



 **Phonic Ear**[®]
Connected to life


Introduktion

Smartphone Sensor er Puzzle Pro alarm-systemets lyssensor, der registrerer, når din mobiltelefon ringer, du modtager en sms eller notifikation, alarmen ringer osv.

Smartphone Sensor kan tilsluttes til Detect Pro, Flash Pro, Call Pro og Charger for PocketVib Pro.

Sådan kommer du igang

1. Tilslut Smartphone Sensor til sensorindgangen på enten Detect Pro, Call Pro, Flash Pro eller Charger for PocketVib Pro.
2. Placer Smartphone Sensor på mobiltelefonens skærm, så de tre lyssensorer vender ned mod skærmen.

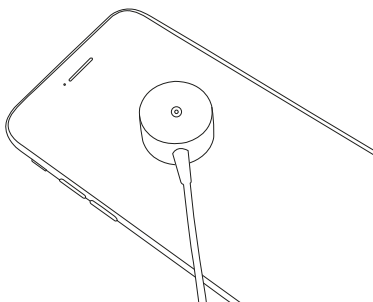

3. Når mobiltelefonens skærm lyser op, registreres det af Smartphone Sensor, og du får besked via din Puzzle Pro modtager dvs. Flash Pro, Call Pro eller Charger for PocketVib Pro. Har du tilsluttet Smartphone Sensor til Detect Pro, får du besked via den Puzzle Pro modtager, som Detect Pro er parret op med.

Fejlsøgning

Smartphone Sensor registrerer ikke, når mobiltelefonens skærm aktiveres

- Tjek, at mobiltelefonen og Smartphone Sensor ikke er placeret direkte i stærkt lys. Sensorerne kan i så fald ikke altid registrere en lysforskel, når mobiltelefonens skærm aktiveres.
- Tjek, at Flash Pro, Call Pro og Charger for PocketVib Pro er tilsluttet strøm.

Test og godkendelser

Smartphone Sensor er godkendt og CE-mærket i henhold til direktivet EMC 2014/30/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

 1299

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Vi forbeholder os ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb

af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Miljøinformation

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.



Din forhandler

20000PE 12.20

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]