



HUMANTECHNIK

signolux



DK

Brugervejledning

Signalux smartphone sensor

Introduktion

Signalux smartphone sensor er Signalux alarmsystemets vibrationssensor, der registrerer, når mobiltelefonen ringer, en sms eller notifikation modtages, alarmer ringer mv.


Sensoren lægges på mobiltelefonens skærm og aktiveres, når telefonen vibrerer. Den kan også bruges på en tablet, en babyalarm med vibrationer mv.

Smartphone sensoren tilsluttes Signalux akustisk sender, der sender signalet videre til en eller flere af Signalux modtagerne.

Husk at læse brugervejledningen grundigt.

Kom godt i gang

1. Par Signolux akustisk sender med en eller flere af Signolux modtagerne (se evt. afnittet: "parring og valg af symbol" i de respektive brugervejledninger).
2. Sørg for, at din mobiltelefon, tablet mv. er indstillet til at vibrere ved indgående opkald og modtagelse af sms og notifikationer.
3. Tilslut Signolux smartphone sensor til "stikket til ekstern mikrofon" på Signolux akustisk sender.

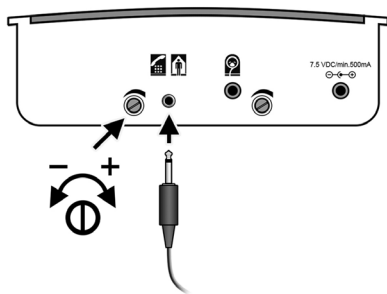

4. Juster "følsomhedskontrollen til ekstern mikrofon" på Signolux akustisk sender til maximum. Opstår der falske alarmer, kan du sænke følsomheden.

5. Placer smartphone sensoren på mobiltelefonens skærm, så det sorte håndtag vender opad.



6. Når mobiltelefonen vibrerer, registreres det af smartphone sensoren og Signolux akustisk sender, og du får besked via den eller de Signolux modtagere, som senderen er parret med.

Fejlsøgning

Signalux smartphone sensor registrerer ikke, når mobiltelefonen ringer

- Sørg for, at mobiltelefonen er indstillet til at vibrere ved indgående opkald.
Skift evt. vibrationsmønster.
- Sørg for, at smartphone sensoren er tilsluttet korrekt til "stikket til ekstern mikrofon" på Signalux akustisk sender.
- Sørg for, at følsomhedskontrollen til ekstern mikrofon på Signalux akustisk sender er indstillet til maksimum.
- Sørg for, at Signalux akustisk sender og Signalux modtager er parret korrekt.
- Skift evt. batterierne på Signalux akustisk sender.
- Sørg for, at Signalux modtageren er fuldt opladet eller er tilsluttet strøm.

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Test og godkendelser



Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EU + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2012/19/EU WEEE-direktivet
- 2014/30/EU EMC-direktivet
- 2014/35/EU LVD-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæring kan findes på www.humantechnik.com

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9

2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530

E-mail: mail@phonicear.dk

www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25

D-79576 Weil am Rhein

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0

E-mail: info@humantechnik.com

www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK