

swissvoice

Xtra 1110




BRUGERVEJLEDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

FUNKTIONER	4
INSTALLATION	5
Anbefalinger	5
Installation af telefon	5
Montering på væg	5
Indsæt foto (eller SOS-etiketten) i en af kviktasterne	5
GENEREL BRUG	6
Foretag et opkald	6
Foretag et opkald via kviktasterne eller SOS-tasten	6
Genkald til det sidste udgående telefonnummer	6
Besvar et opkald	6
Indstil lydstyrken på medhør	6
Indstil lydstyrken i telefonrøret samt ekstra forstærkning (+30 dB)	7
Indstil bas og diskant i telefonrøret	7
PROGRAMMERING	8
Programmer kviktasterne (SOS, fotos, M1 og M2)	8
Indstil flashtid	8
Indstil opkaldsmetode (tone og pulse)	8
SIKKERHED	8
MILJØINFORMATION	9
TEST OG GODKENDELSE	9
GARANTI	10

FUNKTIONER

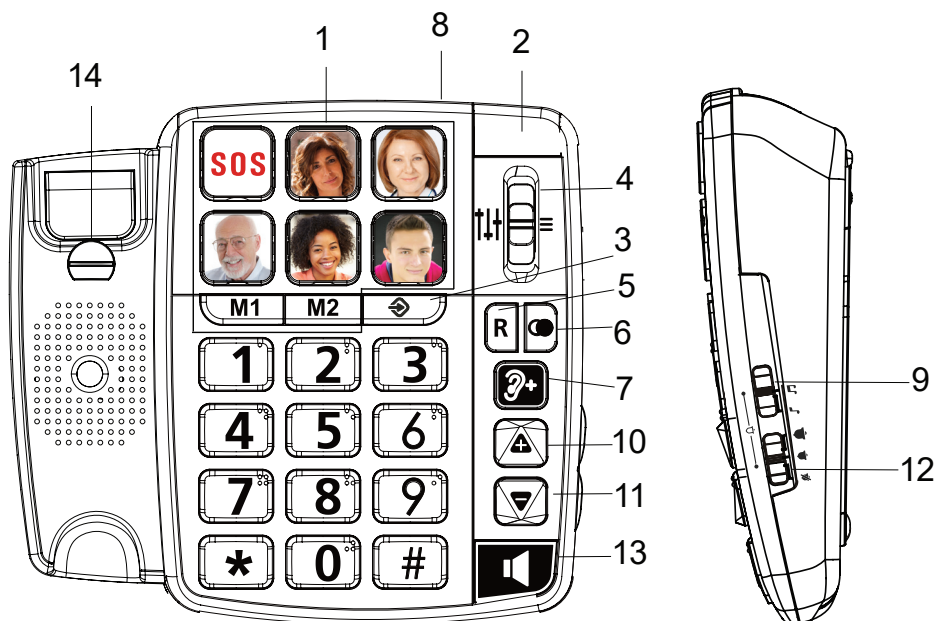

1. Otte kviktaster (SOS, fotos, M1 og M2)
2. Lyssignal ved indkommende opkald
3. Programmeringstast
4. Indstilling af bas og diskant i telefonrøret
5. R-tast
6. Genkaldstast (til det sidste udgående telefonnummer)
7. Indstilling af ekstra lyd i telefonrøret
8. Indstilling af ekstra lydstyrke til/fra
9. Indstilling af ringefrekvens
10. Indstilling af lydstyrke (øges)
11. Indstilling af lydstyrke (dæmpes)
12. Indstilling af ringetone
13. Tast til håndfri funktion
14. "Bøjle" til telefonrør


INSTALLATION

Anbefalinger

- Udsæt ikke telefonen for direkte sollys eller for høj temperatur.
- Driftstemperatur imellem +5 °C og +40 °C.
- Telefonen skal installeres mindst en meter fra radioudstyr, som fx tv, mobiltelefoner osv.

Installation af telefon

- Telefonen skal placeres på en plan overflade for at sikre stabilitet. Sæt håndsættets spiralledning i håndsættet (A) og i stikket på den venstre side af telefonen (B).
- Sæt telefonledningen i "Line"-stikket på bagsiden af telefonen og i telefonstikket på væggen (C). De to "fødder" på undersiden af telefonen kan evt. foldes ud (D).

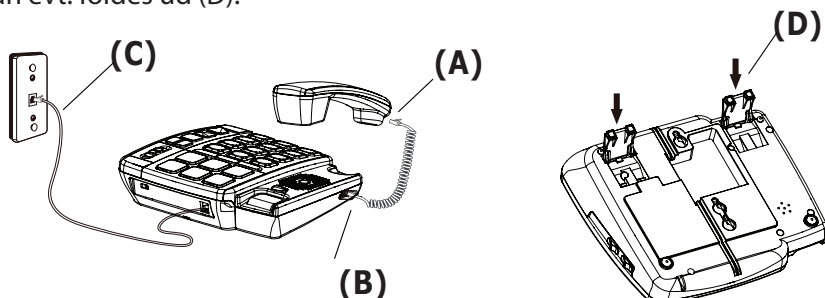

Montering på væg

- Fold de to fødder ind under telefonen (D).
- Drej bøjlen til telefonrøret 160 grader (14).
- Bor to 6 mm huller med 100 mm afstand. Isæt to rawplugs i hullerne og skru to skruer i hullerne (3,5 mm i diameter og 30 mm lange).
- Monter telefonen på de to skruer ved at lade den glide nedad til den sidder fast.

Indsæt foto (eller SOS-etiketten) i en af kviktasterne

- Fjern det gennemsigtige dæksel på en af kviktasterne og tag det gamle foto ud.
- Klip det valgte foto til ved hjælp af målene på det foto, du lige har fjernet.
- Placer det nye foto i dækslet og sæt dækslet på kviktasten igen.

GENEREL BRUG

Foretag et opkald

- Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
- Tast telefonnummeret.
- Afslut opkaldet ved at lægge telefonrøret på eller tryk på  tasten.

Foretag et opkald via kviktasterne eller SOS-tasten

- Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
- Tryk på en af fototasterne, M1, M2 eller SOS-tasten afhængig af, hvem du ønsker at ringe til. For at gemme et telefonnummer på en af kviktasterne se afsnittet "Programmer kviktaster".
- Afslut opkaldet ved at lægge telefonrøret på eller tryk på  tasten.

Genkald til det sidste udgående telefonnummer

- Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
- Tryk på  tasten.

Besvar et opkald

- Løft telefonrøret eller tryk på  tasten.
- Afslut opkaldet ved at lægge telefonrøret på eller tryk på  tasten.

Indstil lydstyrken på medhør

Ved håndfri samtale.

- Tryk på  tasten for at øge lydstyrken.
- Tryk på  tasten for at dæmpe lydstyrken.
- Du kan vælge mellem otte forskellige lydniveauer.

GENEREL BRUG

Indstil lydstyrken i telefonrøret samt ekstra forstærkning (+30 dB)

Når du fører en samtale via telefonrøret, kan du indstille lydstyrken i røret på 2 forskellige måder:

- **Standardmetoden**

Tryk på  tasten for at øge lydstyrken og på  tasten for at dæmpe lydstyrken.

- **Ekstra forstærkning (+30 dB)**

Tryk på  tasten for at aktivere den ekstra lydforstærkning.

Tryk på  tasten igen for at deaktivere den ekstra lydforstærkning.

En skydeknop på bagsiden af telefonen (Amplify) bruges til permanent at aktivere den ekstra lydforstærkning, når du taler i telefonen. Den er som standard slukket (Off). Sættes den på (On), aktiveres den ekstra lydforstærkning automatisk ved hvert telefonopkald.

Indstil bas og diskant i telefonrøret

- Brug skydeknappen på fronten af telefonen til at indstille frekvensen i telefonrøret (bas eller diskant)



PROGRAMMERING

Programmer kviktasterne (SOS, fotos, M1 og M2)

- 1) Løft telefonrøret.
- 2) Tryk på  /  tasten.
- 3) Indtast det telefonnummer, du ønsker at gemme.
- 4) Tryk på den kviktast (SOS, fotos, M1 eller M2), du ønsker at gemme det indtastede telefonnummer under. Vi anbefaler, at det telefonnummer du gemmer under SOS-tasten, skal være det nummer, du ønsker at ringe til i nødstilfælde.
- 5) Afslut ved at lægge telefonrøret på. Vi anbefaler, at du tester, om du har programmeret kviktasten rigtigt ved at foretage et telefonopkald via kviktasten.
- 6) Gentag processen fra punkt 1, hvis du ønsker du at ændre telefonnummeret på kviktasten.

Indstil flashtid

Flashtiden er som standard indstillet til 300 ms. Denne kan ændres:

-  +  /  /  /  /  /  /  = 100 ms
-  +  /  /  /  /  /  /  = 300 ms
-  +  /  /  /  /  /  /  = 600 ms

Indstil opkaldsmetode (tone eller pulse)

Telefonen er som standard indstillet til opkaldsmetode tone.

Denne kan ændres:

-  +  /  /  /  /  /  /  = Pulse
-  +  /  /  /  /  /  /  = Tone

SIKKERHED

Forsøg ikke at åbne telefonen, da det kan give elektrisk stød. Telefonen skal placeres et tørt sted, hvor den ikke udsættes for varme, fugt eller direkte sollys.

MILJØINFORMATION

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med det, bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning etableret til formålet. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af produktet skal der benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

TEST OG GODKENDELSE

Logoet på produktet angiver, at produktet er i overensstemmelse med alle væsentlige krav og gældende direktiver. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.swissvoice.net

GARANTI

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- 1) Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2) Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
- 3) Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
- 4) Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5) Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
- 6) Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Bemærk: Garantien gælder kun i Danmark.

www.swissvoice.net

ATLINKS Europe

147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON Frankrig
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2018 - Reproduktion forbudt.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre i specifikationerne af sine produkter for at foretage tekniske forbedringer eller for at leve op til nye krav.

SWISSVOICE og ATLINKS er registrerede varemærker.
SWISSVOICE logoet er et varemærke under licens af ATLINKS.

For produktsupport kontakt

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 4445 2530
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk