

travelTim

Vibrations-Reisewecker
Vibrationsrejssevækkeur
Réveil de voyage
avec vibreur
Vibrendere reiswekker
Sveglia da viaggio con
vibrazione

Despertador de viaje
con vibración
Vibrations-rese-
väckarklocka
Vibrendere vekkerklokke
Matkahaerätyskello
värinäkuulokkeilla

Budzik podróŜny z
funkcją wibracji
Rezgő üzemmódu úti
ébredztőóra











CE
Designet
i Europa



Tak for at du valgte »travelTim«. Du har købt et moderne og pålideligt produkt.

Funktionsprincip

»travelTim« er et elektronisk ur med et digitalt display. Det vækker med et lydsignal, blinkende lys og/eller med vibration.

Hovedfunktioner

	Displaylys og stop alarm
	Alarm med blinkende lys, lydsignal og vibration
	Alarm med vibration
	Alarm med blinkende lys og lydsignal
	Deaktivering af alarm
	Indstilling af alarm
	Indstilling af klokkeslæt
	Lås indstilling
Zzz	Snooze-alarm
12/24 timer	Skift mellem 12/24 timer

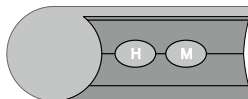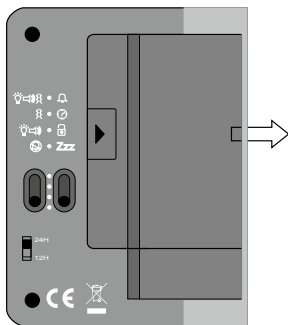





Anvendelse

1. Sådan isættes batteriet




»travelTim« bruger 1 stk. AAA alkaline batteri (til display) og 2 stk. AA alkaline batterier (til vibration). Batteriskuffen åbnes ved at skubbe batteridækslet i pilens retning (se tegningen) med tommelfingeren. Isæt de 3 batterier ifølge mærkningen i batteriskuffen.

2. Indstilling af klokkeslæt




- Skub den højre indstillingsknap til .
- Tryk på knapperne  /  for at indstille det nuværende klokkeslæt.
- Efter indstilling, skub indstillingsknappen til  (låst).
- Vælg med skydeknappen på urets bagside, om klokkeslættet skal vises i 12/24 timer.

Bemærk: Hvis din »travelTim« er indstillet til at vise 12 timer, vil "PM" blive vist efter kl. 12 middag.


3. Indstilling af alarm

- Skub den højre indstillingsknap til .
- Tryk på  indtil den korrekte vækketid vises.
- Efter indstilling, skub indstillingsknappen til  (låst).

4. Aktivering af alarmerne

- Vælg først hvilket signal, du ønsker at blive vækket af: blinkede lys, et lydssignal og vibration  eller blot vibration  eller blinkede lys og et lydssignal .
- Når alarmerne aktiveres, skubbes den venstre knap til  for at stoppe alarmerne. Hvis der ikke slukkes for alarmerne fortsætter den hver 24. time.

5. Brug af snooze-alarm

- Vælg det foretrukne vækkesignal.
- Skub den højre indstillingsknap til **Zzz**. **Zzz** vises i displayet.
- Når alarmerne lyder: Tryk på  og hvil dig i yderligere 8 minutter. Der skal trykkes på knappen inden for 4 min fra alarmerne start for at kunne gentage alarmerne.
- Skub den venstre knap til  for at deaktivere alarmerne.

Bemærk: Stikket på højre side af »travelTim« er en stikforbindelse til ekstraudstyr som f.eks. en pudevibrator.

Bemærk: Dette produkt er **ikke** beskyttet mod vandsprøjt. Anbring ikke beholdere med vand f.eks. vaser eller åben ild som f.eks. stearinlys på eller i nærheden af produktet. Sørg for at batterierne ikke udsættes for høj varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

Tekniske data

Dimensioner:	95 x 70 x 30 mm (H x B x D) med foden foldet ind
Vægt:	130 g inkl. batterier
Strømforsyning:	1 x 1,5 V batteri AAA (Type LR03) og 2 x 1,5 V batteri AA (Type LR6) for den vibrerende motor
Farve:	Sort / grøn
Vækketid:	4 min.



Dette produkt overholder den Europæiske Unions standarder. Du kan få en EU-overensstemmelseserklæring fra din forhandler eller direkte fra produktets fabrikant.

Med forbehold for ændringer af tekniske specifikationer uden varsel.