



Kommunikationssystem

TRIO system 3.0 er et trådløst kommunikationssystem, der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at høre og deltage i samtaler fx til møder, sociale arrangementer og ved restaurantbesøg. Derudover kan systemet sende lyden fra fjernsynet via halsteleslyngen til brugerens høreapparater eller direkte til brugerens hovedtelefoner (tilbehør).

Kommunikationssystemet kan med fordel anvendes af personer både med og uden høreapparater.

Systemet består af en sender (mikrofon), en modtager samt en mediasender.

Senderen har to mikrofonindstillinger – en omni og en retningsbestemt indstilling. Senderen tilpasser automatisk sine mikrofonindstillinger alt efter, hvordan den placeres.

Modtageren benyttes enten med en halsteleslynge eller hovedtelefoner (tilbehør).

Mediasenderen tilsluttes en lydkilde fx fjernsynet.

Med TRIO system 3.0 kan brugeren tage del i en samtale samtidigt med, at der ses fjernsyn. Lyden fra fjernsynet dæmpes automatisk, når der tales i mikrofonen.

Bruges kommunikationssystemet sammen med høreapparater, anbefaler vi, at det anvendes sammen med den medfølgende halsteleslynge, da lyden således sendes direkte til høreapparaterne og bliver mest optimal.

Sender



Frekvensområde	2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Plymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	2 timer
Batterilevetid	14 timer
Lydingang	Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	47 g
Materiale	ABS plast

Modtager



Frekvensområde	2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Rækkevidde	Op til 20 meter
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Plymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	2 timer
Batterilevetid	14 timer
Lydingang	Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	47 g
Materiale	ABS plast

Mediasender




Frekvensområde	2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Rækkevidde	Op til 20 meter
Lydingang	3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	47 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (098-52-012-00)

Sender med halssnor og silikonecover
Modtager med halsteleslynge
Mediasender
Usb-ladekabel til sender og modtager
Strømforsyning
Audioledning til tv, computer m.m.
Opbevaringstaske
Brugervejledning

Tilbehør

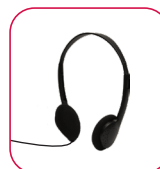

890-88-633-00
Standard
hovedtelefon