




BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE

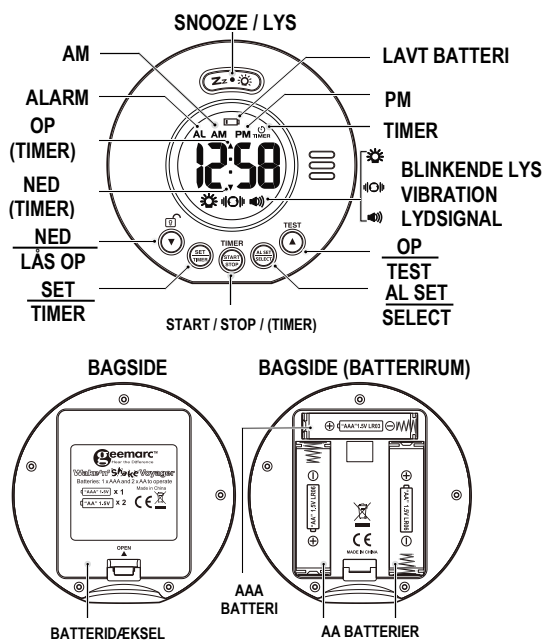

ISÆT BATTERI

Uret skal bruge 1 stk. AAA og 2 stk. AA alkaline batterier (inkluderet) for at virke.

- 1) Læg uret med forsiden nedad på en jævn overflade.
- 2) Åbn batteridækslet på bagsiden af uret.
- 3) Isæt 1 stk. AAA og 2 stk. AA nye alkaline batterier ifølge mærkningen i batterirummet.
- 4) Sæt batteridækslet på igen.

AUTOMATISK KNAPLÅS

Alle knapper har automatisk knaplås. Denne aktiveres 1 minut efter, at man ikke har trykket på en knap. Tryk og hold / knappen inde for at deaktivere den automatiske knaplås. Der høres to korte pip.

INDSTIL UR OG SNOOZE VARIGHED

- 1) Tryk og hold **SET / TIMER** knappen inde til timetallet "0" blinker. Tryk eller for at indstille timeslag (hold knappen eller inde for at gå hurtigt frem).
- 2) Tryk **SET / TIMER** igen. Minuttallene "00" blinker. Tryk eller for at indstille minutslag (hold knappen eller inde for at gå hurtigt frem).
- 3) Tryk **SET / TIMER** igen. Displayet viser "24Hr" og blinker. Tryk eller for at vælge "12Hr" eller "24Hr" timers tidsformat. Hvis "12Hr" vælges, kommer **AM** til syne i displayet i nat- og morgentimerne og **PM** i eftermiddags- og aftentimerne.
- 4) Tryk **SET / TIMER** igen. Displayet viser "05" og blinker. Tryk eller for at indstille antallet af minutter fra 5 til 60 minutter, som snoozefunktionen skal vare.
- 5) Tryk **SET / TIMER** igen for at afslutte indstillingen. Hvis ingen knapper trykkes inden for ca. 10 sekunder afsluttes indstillingen også.

INDSTIL ALARM (fabriksindstilling er 6:00 AM)

- 1) Tryk og hold **AL SET / SELECT** inde til **AL** vises i displayet, og alarmens timetal blinker. Tryk eller for at indstille timeslaget for alarmen (hold knappen eller inde for at gå hurtigt frem).
- 2) Tryk **AL SET / SELECT** igen. Alarmens minuttal vil blinke. Tryk eller for at indstille minutslaget for alarmen (hold knappen eller inde for at gå hurtigt frem).
- 3) Tryk **AL SET / SELECT** igen. I displayet blinker og "HI" (vibration på højt niveau). Tryk eller for at vælge "LO" (vibration på lavt niveau), hvis det ønskes.
- 4) Tryk **AL SET / SELECT** igen. I displayet blinker og "HI" (lyd på højt niveau). Tryk eller for at vælge "LO" (lyd på lavt niveau), hvis det ønskes.
- 5) Tryk **AL SET / SELECT** igen for at afslutte indstillingen og vende tilbage til det normale display, der viser klokken. Hvis ingen knapper trykkes inden for ca. 10 sekunder afsluttes indstillingen også.

VÆLG ALARMTYPE

Tryk **AL SET / SELECT** en til flere gange for at aktivere alarmerne, når du er i det normale display, der viser klokken. Den(de) tilsvarende alarmindikator(er) vil komme til syne nederst i displayet.

Alarm med lydsignal er aktiveret.	Alarm med vibration er aktiveret.	Alarm med blinkende lys er aktiveret.	Alarm med vibration og lydsignal er aktiveret.	Alarm med blinkende lys og lydsignal er aktiveret.

Tryk **AL SET / SELECT** igen for at slukke for alle alarmerne. Alarmindikatorerne nederst i displayet forsvinder.

SLUKKE OG GENINDSTILLE ALARMEN TIL NÆSTE DAG

Når alarmen lyder, blinker de tilsvarende alarmindikatorer. Tryk **AL SET / SELECT** en gang for at slukke for alarmen og genindstille den til at blive aktiveret den næste dag. Alarmindikatorerne forbliver i displayet.

SNOOZE

Tryk **Zz** én gang, når alarmen lyder, og alarmen stopper midlertidigt, og den tilsvarende alarmindikator blinker. Alarmen går på igen, når den indstillede snoozetid er ovre.

LYS I DISPLAYET


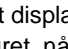
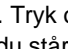
Tryk **Zz** én gang for at aktivere lys i displayet i 5 sekunder.

LOMMELYGTE

Tryk og hold **Zz** inde for at aktivere lommelygtefunktionen.

TIDTAGNING

- 1) Tryk **SET / TIMER** én gang, når du er i det normale display, der viser klokken. Displayet skifter til indstilling af tidtagning. Ikonet og kommer til syne, og "0:00" blinker.
- 2) Tryk for at indstille timetallet for tidtagningen. Tryk for at indstille minuttallet for tidtagningen.
- 3) Tryk **START / STOP** én gang for at starte tidtagningen. Derefter vil ":" og " blinke.
- 4) Tryk **START / STOP** under tidtagningen for at pause tidtagningen. Displayet vil blinke. Tryk og hold **START / STOP** knappen inde for at stoppe tidtagningen.
- 5) Tryk **START / STOP** igen for at fortsætte tidtagningen. Ikonerne ":" og " vil blinke igen.
- 6) Når tidtagningen viser "0:00", er tidtagningen slut, og uret vil vibrere / lydsignalet lyde / lyset blinke. Uret vil begynde at tælle fremad for at vise den tid, der er gået over tiden. Tryk **START / STOP** én gang for at stoppe timeren.
- 7) Tryk **START / STOP** igen. Displayet viser indstillingen for den sidste tidtagning og blinker.
- 8) Gentag trin 2-5 for at indstille og bruge tidtagningsfunktionen.

Bemærk: Når tidtagningen er aktiv og tæller ned eller op, kan et tryk på **SET / TIMER** gå tilbage til det normale display, der viser klokken. Ikonet  vil blinke i det display. Tryk og hold  /  knappen inde, for at stoppe stopuret, når du står i det normale display, der viser klokken.



Tryk **SET / TIMER** én gang for at indstille tidtagningen.

Tryk **▲** eller **▼** for at indstille tiden.

Tryk **START / STOP** én gang for at starte.

Tryk **START / STOP** for at holde pause i tidtagningen.


Når tidtagningen er slut, vibrerer, lyder og blinker uret, og tiden, der er gået over, vises. Tryk **START / STOP** én gang for at stoppe uret.

STOPUR

- 1) Tryk **SET / TIMER** én gang, når du er i displayet, der viser klokken. Displayet skifter til indstilling af timer og blinker. Tryk og hold **START / STOP** inde for at nulstille uret til "0:00".
- 2) Tryk **START / STOP** én gang for at starte stopuret. Ikonerne ":" og "▲" blinker.
- 3) Under tællingen, tryk **START / STOP** én gang for at pause stopuret. Displayet vil blinke. Tryk og hold **START / STOP** inde for at stoppe eller nulstille stopuret.
- 4) Tryk **START / STOP** igen for at fortsætte med optællingen.




Når timeren er indstillet til **0:00** (tryk og hold **START / STOP** inde), tryk **START / STOP** én gang for at starte stopuret.

Bemærk: Når timeren er aktiv og tæller op, kan et tryk på **SET / TIMER** gå tilbage til det normale display, der viser klokken. Ikonet  vil blinke i displayet.

TEST

Tryk og hold **▲ / TEST** knappen inde, og lyset vil blinke, vibratoren vibrere og lydsignalet lyde i 5 sekunder og stopper derefter.

ADVARSEL FOR LAVT BATTERINIVEAU

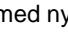Når batteriniveauet bliver lavt, kommer der et ikon for lavt batteriniveau  til syne i displayet. Udskift batterierne med nye alkaline batterier.

Bemærk: *Regelmæssig brug af vibratoren forkorter batteriets levetid.*

FEJLFINDING

Hvis uret viser et forkert klokkeslæt eller ikke fungerer korrekt, kan du tage batterierne ud og sætte dem i igen. Sørg for at placere dem korrekt i henhold til +/- mærkningen i batterirummet. Uret genstartes med fabriksindstillingerne, og du skal indstille ur mv. igen.

Et lavt batteriniveau nedsætter vibrationen og alarmlyden. Isæt nye batterier.

SÅDAN PASSER DU PÅ DIT PRODUKT

- 1) Stil dit ur på en fast overflade og sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer eller fugtighed.
- 2) Beskyt dine møbler, når du stiller uret på naturtræ og på lakeret materiale ved at lægge et stykke stof eller andet beskyttende materiale under uret.
- 3) Rengør uret med en blød klud, der kun er fugtet med mild sæbe og vand. Stærkere midler kan beskadige urets overflade. Sørg for, at uret er taget ud af stikket inden rengøringen.
- 4) Tag batterierne ud, hvis uret ikke skal bruges i en måneds tid eller længere for at undgå mulig korrosion. Rengør grundigt, hvis batterirummet rustet eller bliver snavset, og isæt batterierne.

SPECIFIKATIONER

Alarm varighed	1 minut	
Snooze varighed (indstillelig)	5 til 60 minutter	
Fabriksindstillinger	Tidsformat	24 timer
	Ur	0:00
	Alarm	6:00
	Lyd- og vibreringsniveau	HI
	Snooze varighed	05 (5 minutes)
	Tidtagning/stopur	23 timer 59 minutter
Alarm med lydsignal	80 dB ved 1m	

GARANTI

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- 1) Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2) Tilbehør, som specificeret i produkt-brochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
- 3) Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
- 4) Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5) Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
- 6) Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Bemærk: Garantien gælder kun i Danmark.

DEKLARATIONER:

Test og godkendelser: Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med EMC direktivet 2014/30/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.geemarc.com.

Miljøinformation:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med det, bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning etableret til formålet. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af produktet skal der benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.



For produktsupport

Phonic Ear A/S · Kongebakken 9 · 2765 Smørum
Tlf. : 3917 7101

mail@phonicear.dk · www.phonicear.dk