


Wake Pro

Puzzle Pro vækkeur

Brugervejledning
Dansk

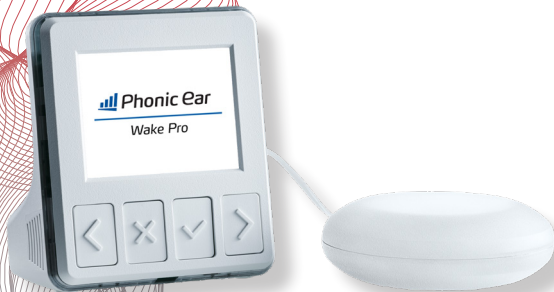

 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Tilslut strømforsyning	9
Tænd/sluk for Wake Pro	10
Oversigt over startskærm	11
Oversigt over hovedmenu	13
Indstil ur / skift urets tidsformat	15
Indstil dato	16
Indstil alarm	17
Indstil alarmens lydstyrke & varighed	18
Se alarmhistorik	19
Indstil snooze	20
Indstil alarmens melodi og frekvens	21
Indstil lysstyrken og farven i natlampen	22
Indstil skærmens lysstyrke	23
Indstil sprog	23
Sæt Wake Pro i parringsmode	24
Indstil alarmsymbol	25
Slet tilsluttet alarmsender	26
Fejlsøgning	27
Test og godkendelser	28
Miljøinformation	29
Garanti	31
Sikkerhedsforanstaltninger	34

Introduktion

Wake Pro er Puzzle Pro systemets vækkeur og alarmmodtager. En kraftig vibrator placeret under hovedpuden samt lyd- og lyssignaler sikrer, at du bliver vækket, når vækkeuret ringer, eller når én af Puzzle Pro systemets alarmsendere aktiveres fx Detect Pro og Detect Door Pro.

Wake Pro er et vækkeur, hvor du kan sætte alarmer. Den har et display, hvor du kan se ur, dato samt indgående alarmsignaler.

Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, eget unikke symbol i displayet og lysindikation i urets lysramme, hvilket gør det muligt at skelne mellem forskellige alarmsignaler.

Alarmmodtageren modtager trådløse alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, babyalarm, røgalarm, vindue-/dør- eller telefonsensorer m.m.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Wake Pro
alarmmodtager



Pudevibrator
(Ø 10 cm)



Strømforsyning
(5V micro usb)




Brugervejledning

Oversigt



Overzicht

Skruehuller til vægophæng

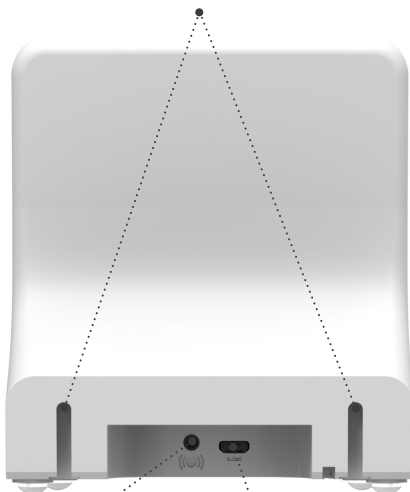

Udgang

Til tilslutning af pude- eller sengebundsvibrator

Strømforsyningsstik

Til tilslutning af 5V micro usb strømforsyning

Tilbehør (Købes separat)

Sengebundsvibrator

Kan placeres under
madrassen
(Ø 28 cm).




Tilslut strømfor syning

- 1 Sæt strømfor syningen i strømfor syningsstikket på bagsiden af Wake Pro (se evt. *oversigten på s. 7*).
- 2 Sæt strømfor syningen i stikkontakten, og tænd for stikkontakten.


Bemærk

Wake Pro har en indbygget batteribackup i tilfælde af strømsvigt og har min. 24 timers batteribackup ved et fuldt opladet batteri.


Tænd for Wake Pro

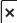Hold  inde i ca. 5 sekunder, indtil der kommer lys i displayet, og velkomstskærmen vises.

Sluk for Wake Pro

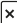Hold  inde i ca. 5 sekunder, indtil beskeden "Slukker" vises på skærmen. Herefter slukkes Wake Pro.

Bemærk

Holdes  inde i ca. 20 sekunder sættes Wake Pro i lagringstilstand (storage mode). Ved genoptaget brug efter lagringstilstand (storage mode) skal tid og dato indstilles igen.

Øversigt over startskærm

(Tidsformat: 24 timer digitalt)

Batteriindikator

Vises, når Wake Pro ikke er tilsluttet strømforsyning

Dato



Alarm

Vises, når alarm er slået til

Ur

Ubesvaret alarm

Vises, når der er en ubesvaret alarm under alarmhistorik


Øversigt over startskærm

(Tidsformat: 12 timer analog)

Batteriindikator

Vises, når Wake Pro ikke er tilsluttet strømforstyrning

Dato

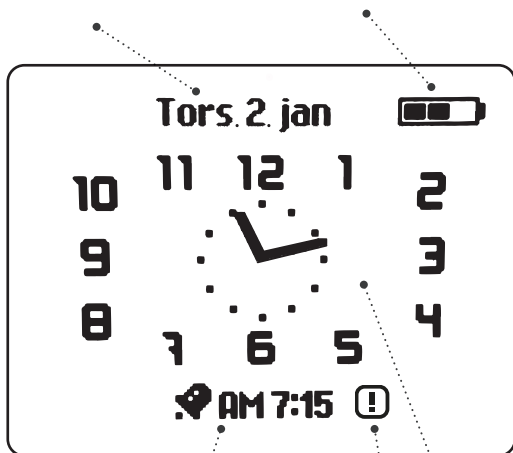

Alarm

Vises, når alarm er slået til

Ur

Ubesvaret alarm

Vises, når der er en ubesvaret alarm under alarmhistorik

Overzicht over hovedmenu



Alarmhistorik

Se ubesvarede alarmer
(vises kun i menuen, hvis der er ubesvarede alarmer)



Alarm

Sæt alarm



Ur

Indstil ur



Dato

Indstil dato



Lydstyrke

Indstil alarmens lydstyrke



Melodi

Indstil alarmens melodi



Frekvens

Indstil melodiens frekvens



Lysstyrke skærm

Indstil skærmens lysstyrke



Tidsformat

Indstil urets tidsformat

(12 / 24 timer digital ur, 12 timer analog ur)



Snoozeinterval

Indstil snoozeinterval



Lysstyrke natlampe

Indstil lysstyrken i natlampen



Farve natlampe

Indstil farven i natlampen



Alarm varighed









Indstil alarmens varighed







Sprog










Indstil sprog

Indstil ur
















- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Ur) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille timeslag.
Godkend valg med 

Brug herefter  og  til at indstille minutslag. Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.

Skift urets tidsformat

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Tidsformat) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte mellem:
12 timer analog ur, 12 timer digital ur og
24 timers digital ur.
- 3 Godkend valg med 
- 4 Tryk på  for at afslutte.

















Indstil dato

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Dato) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille årstal.
Godkend valg med 
- 3 Brug  og  til at indstille måned.
Godkend valg med 
- 4 Brug  og  til at indstille dato.
Godkend valg med 
- 5 Tryk på  for at afslutte.

Bemærk


Wake Pro finder automatisk den korrekte ugedag, når datoen er korrekt indstillet.

Indstil alarm










- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Alarm) og tryk på 
- 2 Aktiver/deaktiver alarmerne med 
- 3 Brug  og  til at navigere til ikonet  (Ur) og tryk på 
- 4 Brug herefter  og  til at indstille timeslaget for alarmerne. Godkend valg med 
- 5 Brug herefter  og  til at indstille minutslaget for alarmerne. Godkend valg med 

Alarmerne er nu slået til. Alarmikonet og tidspunktet for alarmerne vises på startskærmen.










Bemærk

Slå alarmerne til / fra hurtigt ude på startskærmen ved at holde  inde i ca. 2 sekunder.










Indstil alarmens lydstyrke

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Lydstyrke) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere lydstyrken.
Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.











Indstil alarmens varighed

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Alarm varighed) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille antal sekunder, som alarmen varer.
Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.

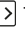Se alarmhistorik

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Alarmhistorik) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at navigere mellem de ubesvarede alarmsignaler.
- 3 Tryk på  eller  for at afslutte.



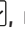






Indstil snooze

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Snooze) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille antal minutter, som snoozefunktionen varer.
Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.
- 4 Anvend snoozefunktionen ved et kort tryk på , når alarmen ringer.










Bemærk

For at afbryde snoozefunktionen skal alarmen slås fra (se afsnit på s. 17)










Indstil alarmens melodi

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Melodi) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte melodi.
Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.







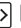


Indstil alarmens frekvens

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Frekvens) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere frekvensen.
Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.


Indstil lysstyrken i natlampen

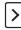- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Lysstyrke natlampe) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere natlysets lysstyrke. Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.










Indstil farven i natlampen

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Farve natlampe) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere natlysets farve. Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.










Bemærk

Slå natlyset til / fra hurtigt ude på startskærmen ved at holde  inde i ca. 2 sekunder.








Indstil skærmens lysstyrke

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Lysstyrke skærm) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere skærmens lysstyrke. Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.



Indstil sprog

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Sprog) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte sprog. Godkend valg med 
- 3 Tryk på  for at afslutte.


















Sæt Wake Pro i parringsmode

- 1 Sæt din Puzzle Pro sender i parringsmode (se evt. senderens brugervejledning)
- 2 Sluk Wake Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 3 Tænd for Wake Pro ved at holde  inde, og tryk dernæst på , så snart velkomstskærmen vises.
- 4 Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Tilslut alarmsenderen) og tryk på .

Lysrammen vil blinke rød og blå, og Wake Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter. Ved succesfuld parring vil lysrammen i Wake Pro lyse lyseblå.

- 5 Wake Pro vil fortsat lyse lyseblå og være i parringsmode, også efter at parringen er afsluttet. Tryk på , hvis du ønsker at afslutte parringsmode.
- 6 Tryk på  for at afslutte.
- 7 Tryk på senderens testknap (fx Detect Pro) for at teste, at parringen er foretaget korrekt.














Indstil alarmsymbol

- 1 Sluk Wake Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 2 Tænd for Wake Pro ved at holde  inde, og tryk på , så snart velkomstskærmen vises.
- 3 Brug  og  for at navigere til ikonet  (Rediger alarmsendere) og tryk på .
- 4 Brug  og  for at navigere til senderen, der skal redigeres, og tryk på .
- 5 Brug  og  for at navigere til ikonet  (Rediger alarmsendere) og tryk på .
- 6 Brug  og  for skifte mellem de forskellige alarmsymboler.
- 7 Godkend alarmsymbolet med .
- 8 Afslut ved at trykke tre gange på .


Bemærk

Når du skifter alarmsymbol, ændrer du også melodi og farve.

Slet tilsluttet alarmsender

- 1 Sluk Wake Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 2 Tænd for Wake Pro ved at holde  inde, og tryk på , så snart velkomstskærmen vises.
- 3 Brug  og  for at navigere til ikonet  (Rediger alarmsendere) og tryk på .
- 4 Brug  og  for at navigere til alarmsenderen, der ønskes slettet, og tryk på .
- 5 Brug  for at navigere til ikonet  (Slet) og tryk på .

Den valgte alarmsender er nu slettet.

- 6 Afslut ved at trykke tre gange på .

Fejlsøgning

Fungerer din Wake Pro ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Ingen strøm på Wake Pro

- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.

Ingen lyd ved alarmsignal

- Tjek, at lydstyrken er indstillet korrekt (se s. 18).

Wake Pro modtager ikke alarmsignaler fra Puzzle Pro senderen

- Par Wake Pro og Puzzle Pro senderen igen (se s. 24).

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Wake Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

C € 1299

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produkt-brochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Genopladeligt litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning

Genopladelige litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.



Din forhandler

20038PE 09.20

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]