

Wake Pro

Puzzle Pro vækkeur



Beskrivelse

Wake Pro er Puzzle Pro systemets vækkeur og alarmmodtager. En kraftig vibrator placeret under hovedpuden samt lyd- og lyssignaler sikrer, at man bliver vækket, når vækkeuret ringer, eller når én af Puzzle Pro systemets alarmsendere Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro aktiveres.

Wake Pro er et vækkeur, hvor man kan sætte alarmer. Den har et display, der viser ur og dato samt indgående alarmsignaler.

Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, eget unikke symbol i displayet og lysindikation i urets lysramme, hvilket gør det nemmere at skelne mellem forskellige alarmsignaler.

Alarmmodtageren modtager trådløse alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, babyalarm, røgalarm, vindue-/dør- eller telefonsensorer m.m.

Wake Pro har batteribackup, der ved fuld opladning har ca. 24 timers batterilevetid ved strømsvigt.

Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Strømforsyning	5V micro usb / 2100 mA
Batteri	Genopladeligt litiumbatteri
Batteribackup	Ca. 24 timers batterilevetid på en fuld opladning
Output	Lys, lyd og ikon på display, tilkobling af ekstern pudevibrator
Volumenkontrol	Ja
Display	Ja. 8 forskellige ikoner og farver
Vibration	Ja. Hver parret enhed får sit eget vibrationsmønster.
Akustisk alarm	Ja. Hver parret enhed får sin egen unikke melodi.
Frekvens på alarmsignal	Justerbar (lav, medium, høj)
Ur	Ja. Analog/digital
Tidsformat	12/24 timer
Lysstyrke i display	Justerbart i 4 forskellige indstillinger
Natlampe	Ja, justerbar i lysstyrke og forskellige farver
Mål (H x B x D)	125 x 110 x 71 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

Tilbehør (købes separat)



Sengebundsvibrator

Kan placeres under madrassen (Ø 28 cm)



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk