

# Aides auditives Ponto Pro Power Mode d'emploi



**Ponto™** – Le système auditif à ancrage osseux

**oticon**  
MEDICAL

## **Félicitations**

Nous vous félicitons d'avoir choisi une aide auditive Ponto. Le Ponto Pro Power est conçu pour être personnalisé et optimisé pour vous permettre de tirer un bénéfice maximum de votre implant auditif.

Ce manuel d'utilisation vous explique comment utiliser votre aide auditive Ponto Pro Power.

**Merci de lire attentivement ce manuel, tout particulièrement les pages jaunes, afin d'apprendre comment tirer le meilleur parti de votre Ponto. Si vous avez des questions ou des doutes, parlez-en avec votre médecin ORL ou votre audioprothésiste. Notez bien les instructions d'hygiène cutanée et de maintenance figurant dans ce manuel.**


# Table des matières

Transmission osseuse directe	4	DAI (Direct Audio Input - entrée audio directe)	22
Vue de l'aide auditive	6	Accessoires DAI	24
Utilisation de la pile	8	Autres accessoires	28
MARCHE, ARRÊT ou VEILLE	10	Guide de compatibilité	32
Connexion	12	Problèmes fréquents et solutions possibles	34
Déconnexion	13	Entretien et réparation	36
Position correcte	14	Garantie du fabricant	37
Contrôle du volume	16	Informations importantes	38
Programmes	18	Avertissements Pages jaunes	41
Maintenance de l'aide auditive	19	Clarification des symboles	45
Hygiène cutanée	20		

## Transmission osseuse directe

Votre aide auditive Ponto est conçue pour vous aider à mieux entendre grâce à la conduction osseuse directe. L'appareil convertit le son en vibrations qui sont transmises par le pilier et l'implant à travers l'os du crâne vers l'oreille interne. Le Ponto fonctionne donc sans utiliser les fonctions du conduit auditif, du tympan et de la caisse du tympan. Le Ponto est une solution de compensation possible des pertes auditives lorsque l'oreille externe ou la caisse du tympan présente un problème empêchant le son d'atteindre l'oreille interne.



L'aide auditive Ponto peut également capter le son près d'une oreille et le transférer de l'autre côté de la tête, vers l'autre oreille. C'est donc aussi un appareil adapté aux personnes dont une oreille présente une surdité totale mais qui entendent de l'autre côté (cette pathologie est dénommée surdité totale unilatérale).

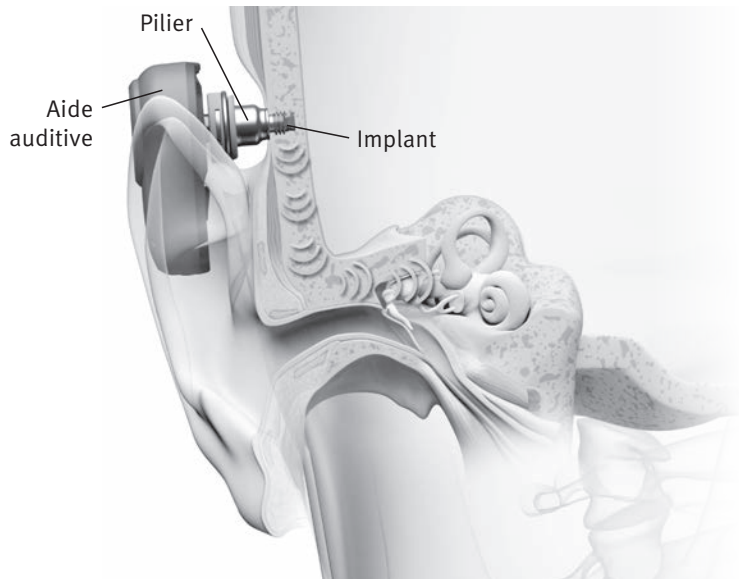

## Vue de l'aide auditive

1. Bouton pour les programmes et le mode veille/silencieux
2. Contrôle du volume
3. Prise DAI (Direct Audio Input)
4. Microphones
5. Entrée pour programmation
6. Logement de pile (on/off, sécurité)
7. Fixation
8. Orifice du cordon de sécurité
9. Étiquetage

**Version droite ou gauche :** Le Ponto Pro Power est disponible dans une version gauche et droite. Pour une identification aisée, chaque aide auditive porte la marque L (gauche) ou R (droite) sur le logement de la pile.

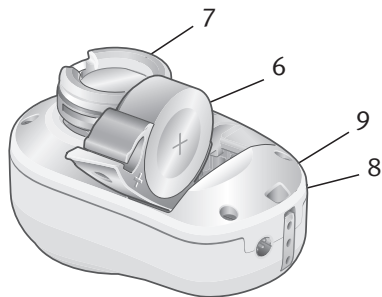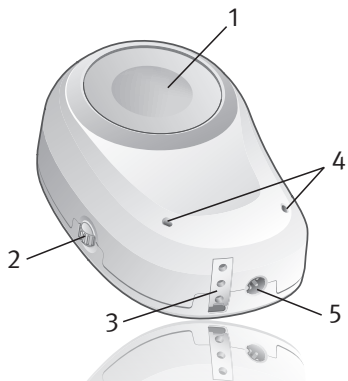

**⚠ AVERTISSEMENT**

L'aide auditive contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Les piles peuvent également être dangereuses si elles sont avalées. Toujours conserver les piles hors de la portée des jeunes enfants ou des personnes souffrant d'un handicap mental. Si une pile est avalée par accident, consulter un médecin aux Urgences les plus proches.

## Utilisation de la pile

### Insertion de la pile

Ouvrez le logement de la pile et insérez-la, le signe + tourné vers le bas de l'aide auditive. Seules des piles zinc-air type 675 de bonne qualité sont recommandées. La durée de vie d'une pile se situe généralement entre 80 et 160 heures.

*Remarque : il est important d'insérer la pile correctement pour éviter d'endommager son compartiment. Les piles ne sont pas rechargeables.*


### Logement de pile de sécurité

Verrouillage du logement de la pile : assurez-vous que le logement de la pile est correctement fermé. Utilisez le tournevis de l'outil d'extraction de la pile pour tourner la vis de sécurité en position verrouillée.

Déverrouillage du logement de la pile : utilisez le tournevis de l'outil d'extraction de la pile pour tourner la vis de sécurité en position déverrouillée. Vous pouvez désormais ouvrir et fermer le logement de la pile comme d'habitude.





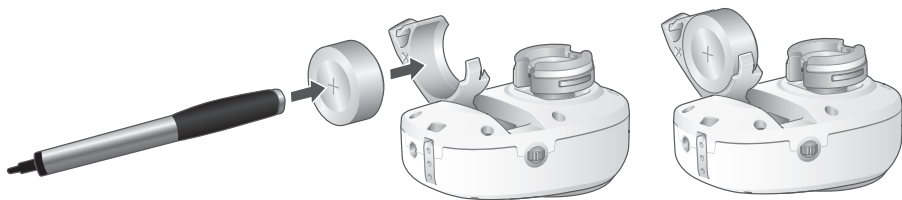

### **Avertissement de fin de pile**

L'aide auditive Ponto possède un système d'avertissement de fin de pile. Lorsqu'il est temps de changer la pile, vous entendez deux bips consécutifs. Lorsque la pile est totalement déchargée, quatre bips consécutifs sont émis.

### **Remplacement de la pile**

Après avoir ouvert le logement de la pile, vous pouvez retirer cette dernière. Le petit outil magnétique d'extraction de la pile, livré avec votre Ponto facilite l'extraction et l'insertion de la pile.

## **MARCHE, ARRÊT ou VEILLE**

### **MARCHE**

Vous mettez en marche votre Ponto en refermant le logement de la pile. Après une mélodie de démarrage, un délai s'écoule avant que l'aide auditive ne se mette en marche. Ceci pour vous éviter de subir un bruit gênant pendant que vous connecterez votre appareil auditif.

### **ARRÊT**


Vous arrêtez le Ponto en ouvrant le logement de la pile. N'ouvrez qu'à moitié le logement de la pile, pour éviter que la pile ne tombe. En cas d'inutilisation prolongée, nous vous conseillons de retirer la pile de l'aide auditive.

### **VEILLE/SILENCIEUX**

Si vous souhaitez arrêter l'aide auditive pour un petit moment, appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Ensuite, relâchez le bouton. L'aide auditive est alors en mode Veille/Silencieux et le volume est réglé à zéro. Pour entendre à nouveau, appuyez brièvement sur le bouton puis relâchez-le. Le Ponto se remettra en marche dans la configuration précédente. Nous vous déconseillons d'utiliser le mode Veille sur de longues périodes, à savoir, plus de 5 heures, ce qui réduirait la durée de vie de la pile.

*Remarque : la fonction Veille est optionnelle et peut parfois être désactivée durant l'adaptation. Pour plus d'informations, consultez votre audioprothésiste.*


**MARCHE**

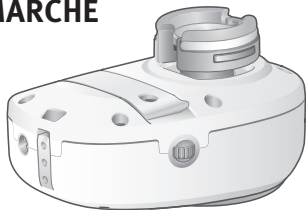

**VEILLE**





**ARRÊT**

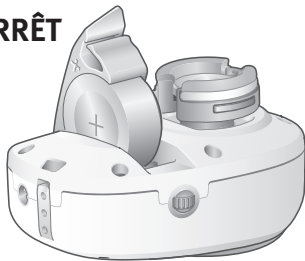

## Connexion



Pour connecter confortablement et en toute sécurité l'aide auditive, inclinez-la légèrement et poussez-la délicatement pour qu'elle se fixe au pilier.

*Remarque : il est important d'écarter vos cheveux lorsque vous enclenchez l'aide auditive sur le pilier.*

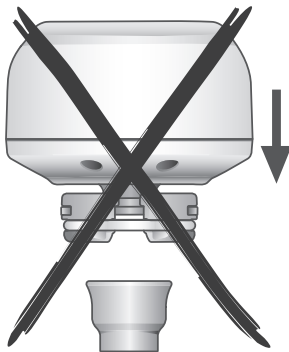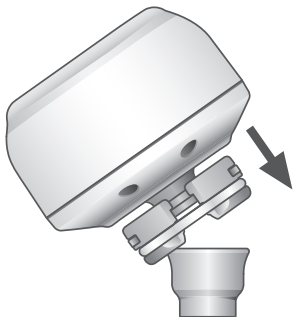

## Déconnexion

L'aide auditive se déconnecte confortablement et en toute sécurité en la faisant basculer doucement pour la sortir du pilier.

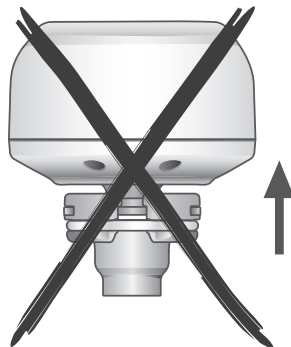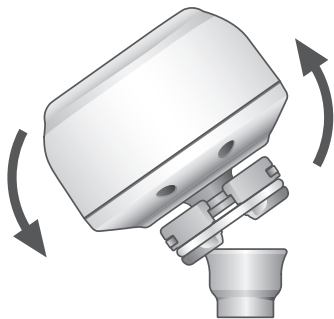

## Position correcte

Pour obtenir des performances optimales des microphones directionnels, l'aide auditive doit être positionnée verticalement, les microphones vers le bas et le potentiomètre tourné vers l'arrière.

*Remarque : il est très important que l'aide auditive ne soit pas en contact avec d'autres éléments (par exemple, l'oreille, la peau ou un chapeau). Cela peut provoquer un Larsen (sifflement).*



*Microphones*



## Contrôle du volume


Pour augmenter le volume, tournez le potentiomètre vers le haut. Pour le baisser, tournez vers le bas. Lorsque vous tournez le potentiomètre, des bips indiquent que le volume a changé. Les bips cessent lorsque le volume maximum ou minimum a été atteint. Lorsque vous dépassez le réglage initial, vous entendez 2 bips.

Le Ponto Pro Power peut enregistrer la façon dont vous réglez le volume. Après un moment, il reprendra automatiquement les réglages que vous aurez choisis avec votre audioprothésiste pour vos environnements sonores habituels.

*Remarque : la fonction d'apprentissage du potentiomètre est optionnelle et peut parfois être désactivée durant l'adaptation. Pour plus d'informations, consultez votre audioprothésiste.*

*Remarque : durant l'adaptation, il n'est parfois pas possible de régler le potentiomètre. Pour plus d'informations, consultez votre audioprothésiste.*



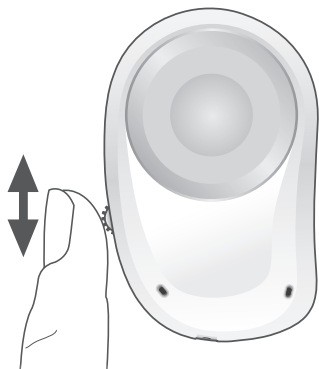





## Programmes

Le bouton permet de placer votre Ponto en mode Veille ou de changer le programme d'écoute, si le réglage de votre Ponto permet la création de plusieurs programmes.

*Remarque : le nombre de programmes est optionnel et peut être réglé durant l'adaptation.*

Si vous appuyez brièvement sur le bouton-poussoir, le programme suivant est indiqué par le nombre correspondant de bips.

*Remarque : si vous maintenez le bouton appuyé pendant plus de 2 secondes, le Ponto passe en mode Veille.*

Programme	Signalétique	Description
1		
2		
3		
4		

Vous pourrez compléter ce tableau récapitulatif des programmes de votre Ponto avec votre audioprothésiste.

## Maintenance de l'aide auditive

Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'aide auditive avec un chiffon sec ou une lingette pour bébé. Faites particulièrement attention à la fixation lorsque vous nettoyez ou enlevez des cheveux.

*Remarque : n'utilisez pas d'eau ou de liquide lorsque vous nettoyez votre aide auditive, car elle n'est pas étanche. Si votre appareil est mouillé accidentellement, ouvrez le logement de la pile et laissez sécher.*

# Hygiène cutanée

## Nettoyage quotidien

Afin d'éviter le risque d'infection cutanée autour du pilier, il est important de le nettoyer tous les jours.

Avant la cicatrisation totale de la plaie, vous pouvez utiliser un savon antibactérien et des lingettes pour bébé non alcoolisées pour nettoyer la zone située autour du pilier.

Lorsque la plaie est totalement cicatrisée, commencez à utiliser la brosse souple de nettoyage fournie avec l'aide auditive. Utilisez la brosse quotidiennement avec du savon et de l'eau pour nettoyer délicatement l'extérieur et l'intérieur du pilier. La brosse de nettoyage doit être remplacée environ tous les trois mois. N'utilisez que des brosses de nettoyage très douces comme celle qui vous est fournie avec votre appareil.


## Nettoyage fréquent

Outre les nettoyages quotidiens, la peau doit être nettoyée plus soigneusement pour retirer les desquamations au moins deux fois par semaine. Durant le lavage des cheveux, les desquamations sont ramollies et s'enlèvent plus facilement. La brosse de nettoyage doit être employée avec soin.

En cas de problèmes persistants de douleur autour du pilier, contactez votre médecin ORL.

Pour les enfants, les parents ou le personnel soignant doivent s'assurer du maintien d'une bonne hygiène autour du pilier.


*Remarque : il est très important de nettoyer à la fois, à l'intérieur et à l'extérieur du pilier. Cela est important pour prévenir la formation de desquamations.*

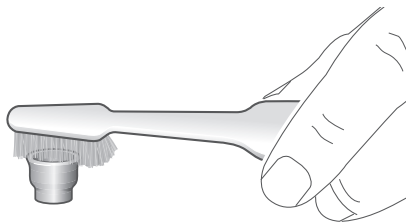

## DAI (Direct Audio Input - entrée audio directe)

La prise DAI permet de connecter un équipement externe à votre Ponto. Une bobine téléphonique ou un récepteur FM peuvent être directement connectés à votre aide auditive. En utilisant un adaptateur audio, il est également possible de connecter un équipement Hi-Fi externe tel qu'un lecteur MP3, une radio ou un téléviseur.

*Remarque : vous pouvez écouter un équipement externe si un programme Bobine/DAI/FM a été défini dans votre Ponto. Pour plus d'informations, consultez votre audioprothésiste.*

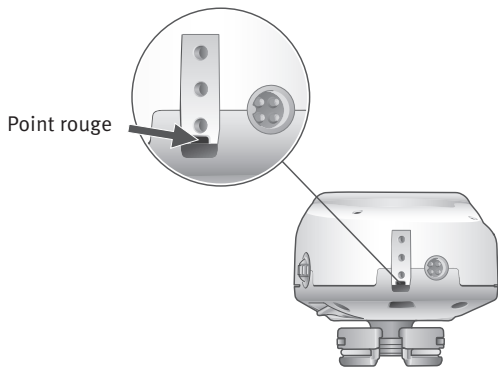

L'équipement externe doit être branché de sorte que la broche dotée d'un point rouge soit face au point rouge de la prise DAI.

## Accessoires DAI

### Adaptateur audio

L'adaptateur audio vous protège des surtensions et vous permet de brancher votre Ponto à un appareil audio possédant une sortie-casque (connecteur de 3,5 mm). Vous pouvez ainsi brancher directement un équipement hifi externe tel qu'une chaîne stéréo, un lecteur MP3 et un téléviseur.

Comment procéder :

1. Branchez le connecteur de 3,5 mm de l'adaptateur à la sortie casque de l'appareil audio externe.
2. Connectez l'adaptateur audio à la prise DAI de votre Ponto avant de connecter l'aide auditive au pilier. Vérifiez que le point rouge de la broche est aligné sur le point rouge de l'aide auditive.
3. Mettez en marche votre Ponto et connectez-le au pilier.
4. Appuyez sur le bouton-poussoir pour sélectionner votre programme Bobine/DAI/FM.
5. Le son de l'appareil audio externe est désormais entendu directement à travers votre Ponto.

*Remarque : vous pouvez écouter un équipement externe si un programme Bobine/DAI/FM a été défini dans votre Ponto.*



## **AVERTISSEMENT**

Un adaptateur audio avec transformateur d'isolation répondant à une isolation de sécurité médicale (c'est à dire conforme à la norme CEI 60601-1), doit toujours être utilisé si vous branchez votre Ponto à un équipement ayant une alimentation ou une batterie de plus de 12 V. Il est potentiellement dangereux et peut se révéler mortel de brancher directement une aide auditive sur une alimentation électrique de plus de 12 V. Lorsqu'un adaptateur audio isolé est connecté à l'équipement raccordé au réseau, cet équipement doit respecter les normes de sécurité électrique pour les produits de consommation (à savoir la norme CEI-60065 ou les normes de sécurité équivalentes).

### **Récepteur FM**

Un système FM est composé d'un émetteur et d'un récepteur FM. Le récepteur est branché à la prise DAI sur votre Ponto et utilisé pour capter les signaux radio de basse fréquence de l'émetteur.

On utilise des systèmes FM, par exemple, dans les écoles pour aider les enfants malentendants. L'enseignant porte un émetteur FM qui envoie les signaux directement à l'aide auditive via le récepteur FM. Pour plus d'informations, consultez votre audioprothésiste.

## **Bobine téléphonique**

La bobine téléphonique est un accessoire conçu pour améliorer la qualité du son et la compréhension d'un discours dans des lieux équipés d'une boucle magnétique. De nombreux établissements publics tels que des théâtres, cinémas, amphithéâtres, écoles et lieux similaires sont équipés de boucles magnétiques.


La bobine téléphonique peut aussi être employée avec un récepteur FM en collier ou à domicile avec des téléboucles spéciales connectées à des téléphones, des chaînes stéréo et des téléviseurs.

La bobine téléphonique est branchée à la prise DAI de l'aide auditive et capte le signal de la téléboucle puis transmet le son à votre Ponto. Lorsqu'elle est connectée au Ponto, le programme Bobine/DAI/FM doit être sélectionné.

Comment procéder :

1. Branchez la bobine téléphonique à la prise DAI de votre Ponto avant de fixer l'aide auditive au pilier. Veillez à ce que le point rouge sur le contact de la bobine téléphonique soit aligné sur le point rouge de l'aide auditive.
2. Mettez en marche votre Ponto et connectez-le au pilier.
3. Appuyez sur le bouton et sélectionnez le programme Bobine/DAI/FM.
4. La bobine téléphonique est prête à l'emploi.

*Remarque : vous pouvez écouter un équipement externe si un programme Bobine/DAI/FM a été défini dans votre Ponto.*

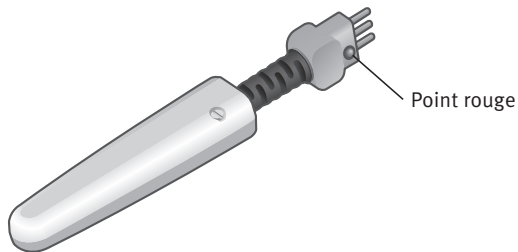


## Autres accessoires

### **Cordon de sécurité**

Le cordon de sécurité est conçu pour que vous évitiez de faire tomber votre Ponto pendant une activité physique ou dans d'autres situations où il risque de se déconnecter. Pour éviter que votre Ponto ne tombe dans de telles situations, fixez le cordon de sécurité à l'aide auditive et l'agrafe à vos vêtements. Nous vous recommandons également d'utiliser le cordon de sécurité pendant la période d'habituation à l'implant auditif.


*Remarque : veillez à ce que rien ne tire sur le cordon de sécurité, ce qui pourrait déconnecter l'aide auditive du pilier.*

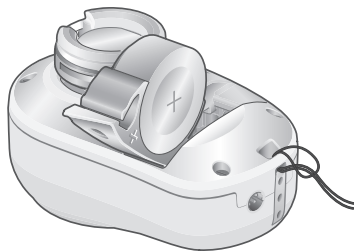

## Le Test rod

Le Test rod vous permet d'écouter l'aide auditive sans le connecter au pilier. Fixez votre Ponto au Test rod et appliquez-le contre la tête pour écouter l'aide auditive. C'est un moyen pratique pour faire une démonstration et tester votre Ponto avec vos amis et votre famille.

*Remarque : ne touchez pas l'aide auditive avec votre main lorsque vous tenez le Test rod, vous risqueriez de provoquer du Larsen (sifflement).*

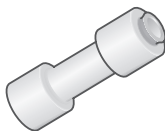

## Couvre pilier

Le couvre pilier peut être fixé au pilier lorsque l'aide auditive n'est pas utilisée. Il protège et dissimule le pilier.



## Autocollants pour le bouton

Ces autocollants vous permettent de changer le look de votre Ponto.

Comment appliquer et retirer l'autocollant :

1. Choisissez l'autocollant sans soulever le film d'application qui le recouvre.
2. Placez-le sur le bouton de sorte qu'il adhère à ce dernier. Pour éviter la formation de bulles d'air, commencez au centre et appuyez délicatement vers l'extérieur de l'autocollant.
3. Enlevez délicatement le film d'application. Votre Ponto a maintenant un nouveau look.

Pour retirer l'autocollant, grattez avec un ongle. N'utilisez pas d'objets pointus qui pourraient endommager l'appareil auditif.

## Guide de compatibilité

Description	Article
<b>Piliers dans le système d'implant Ponto d'Oticon Medical</b>	Tout
<b>Accessoires Oticon Medical</b>	Genie Medical (Logiciel de réglage Genie Medical, version 2011.1 ou ultérieure)
	Adaptateur audio
	Bobine téléphonique
	Bandeau souple Ponto
	SoundConnector
	Serre-tête de test
	Serre-tête
	Xpress
<b>Accessoires Oticon A/S</b>	Récepteur FM Amigo R2BA



<b>Guide de compatibilité</b>	
<b>Description</b>	<b>Article</b>
<b>Produits compatibles fabriqués par la société Cochlear BAS</b>	Piliers Baha® (90305, 90410)
	Implants avec pilier Baha® (90434, 90480)
	Adaptateur audio Baha® (90065)
	Bobine téléphonique Baha® (90185)
<b>Produits incompatibles fabriqués par la société Cochlear BAS</b>	Piliers Baha® de la série BA300
	Piliers Baha® de la série BA210
	Piliers Baha® de la série BA400
<b>Accessoires Phonak AG</b>	Émetteur Inspiro à système FM Phonak
	Récepteur Phonak MlxIBA

## Problèmes fréquents et solutions possibles

Symptôme	Causes possibles
<b>Pas de son</b>	Pile usée
	L'aide auditive est en veille (silencieux).
<b>Son intermittent ou réduit</b>	Saleté dans le pilier, le système de fixation ou l'entrée audio
	Humidité
	Pile usée
<b>Sifflement</b>	L'aide auditive touche quelque chose

*Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, merci de contacter votre audioprothésiste qui vous aidera.*

<b>Solutions</b>	
Remplacez la pile	Pages 8-9
Appuyez sur le bouton	Pages 10-11
Nettoyez l'aide auditive	Page 19
Ouvrez le logement de la pile et laissez sécher l'aide auditive	Page 19
Remplacez la pile	Pages 8-9
Vérifiez que l'aide auditive est correctement fixée et ne touche rien	Pages 12-15

## Entretien et réparation

Si votre Ponto ne fonctionne pas correctement, contactez votre audioprothésiste pour une vérification de votre aide auditive.

Interlocuteur du centre d'audioprothèse – nom et coordonnées :

---

---

---

Chirurgien ORL – nom et coordonnées :

---

---

---

## Garantie du fabricant

Les aides auditives Oticon Medical sont couvertes par une garantie limitée, offerte par le fabricant durant une période de 12 mois à compter de la date de livraison. Cette garantie limitée couvre les vices de fabrication et de matière de l'appareil, mais pas les piles.

Tout problème découlant d'une manipulation ou d'un entretien incorrect(e), d'une utilisation excessive, d'un accident, d'une réparation réalisée par une partie non agréée, d'une exposition à des conditions corrosives, de dommages dus à la pénétration d'objets étrangers dans l'appareil ou d'un réglage incorrect N'EST PAS couvert par la garantie limitée et est susceptible de l'annuler.

La présente garantie n'affecte pas vos droits légaux aux termes de la législation nationale en vigueur relative à la vente des biens de consommation. Il est possible que votre audioprothésiste vous ait offert une garantie plus large que la présente garantie limitée. Veuillez le/la consulter pour en savoir plus.

Si vous avez des suggestions ou des commentaires relatifs à l'aide auditive à ancrage osseux d'Oticon Medical, merci d'utiliser l'adresse électronique au verso du manuel pour nous contacter.

## Informations importantes

- Il est important de respecter les instructions d'hygiène cutanée. Contactez votre médecin ORL en cas de questions ou de doutes.
- Afin de ne pas la salir, conservez toujours votre aide auditive dans son boîtier lorsque vous ne la portez pas.
- À chaque fois que vous n'utilisez pas votre aide auditive, vérifiez qu'elle est éteinte en ouvrant le logement de la pile. Le logement de la pile doit rester ouvert afin de laisser s'évaporer l'humidité de votre aide auditive.
- Lorsque vous téléphonez, tenez le récepteur du téléphone près de votre aide auditive. Pour éviter un Larsen (sifflement), veillez à ce que le téléphone ne touche pas l'aide auditive.
- Retirez votre aide auditive ou utilisez le cordon de sécurité lorsque vous participez à des activités durant lesquelles elle risque de se détacher.

- Recouvrez toujours votre aide auditive quand vous utilisez des produits pour les cheveux.
- Pour éviter de déclencher les détecteurs de métaux lorsque vous voyagez, vous pouvez ôter votre aide auditive avant de passer les portails de sécurité.
- Vous devez éliminer ses composants électroniques dans le respect de votre législation locale.
- La durée de vie utile de l'aide auditive est de 5 ans.
- Bien que l'aide auditive ait obtenu la classification IP57, elle est décrite comme résistante à l'eau mais non étanche. Déconnectez toujours l'aide auditive avant de prendre une douche, un bain ou d'aller à la piscine. Si votre aide auditive est mouillée accidentellement, ouvrez le logement de la pile, sortez la pile et laissez sécher votre aide auditive.

- Pour éviter de déclencher les détecteurs de métaux lorsque vous voyagez, vous pouvez ôter votre aide auditive avant de passer les portails de sécurité.
- **Conditions de fonctionnement**  
Température : +1 °C à +40 °C  
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation
- **Stockage et conditions de transport**  
La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes, en cas de périodes de transport et de stockage prolongées.  
Température : -25°C à +55°C  
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation
- La source d'alimentation de votre aide auditive n'a pas suffisamment d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions normales d'utilisation. L'aide auditive n'a pas été testée quant à sa conformité aux normes internationales en termes d'atmosphères explosives. Il est recommandé de ne pas utiliser vos aides auditives dans des zones qui présentent un risque d'explosion.



## **Avertissements**

- L'aide auditive, les piles, les pièces et les accessoires ne sont pas des jouets et doivent être conservés hors de la portée des enfants et de toute personne pouvant avaler ces éléments ou se blesser. L'aide auditive contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
- Ne jetez pas au feu votre aide auditive, ses pièces ou ses piles. Elles pourraient exploser et vous blesser gravement.
- Cette aide auditive n'est pas étanche. Déconnectez-la toujours avant de prendre une douche, un bain ou d'aller à la piscine. Si votre aide auditive est mouillée accidentellement, ouvrez le logement de la pile, sortez la pile et laissez sécher.
- Évitez d'exposer l'aide auditive à une chaleur extrême.
- Débranchez l'aide auditive si vous devez passer une IRM (imagerie à résonance magnétique). L'implant et le pilier peuvent rester en place.

- Des interférences électromagnétiques peuvent survenir à proximité des équipements portant le symbole illustré à droite. Les appareils de communication portables et mobiles RF (fréquence radio) peuvent avoir une incidence sur la bonne performance de vos aides auditives.



Si votre aide auditive est affectée par des interférences électromagnétiques, éloignez-vous de leur source pour réduire les interférences.

- Bien que cela soit peu probable, les appareils électroniques à proximité peuvent être affectés par votre aide auditive. Dans ce cas, déplacez l'aide auditive pour l'éloigner de l'appareil électronique affecté.
- Cette aide auditive n'est pas adaptée aux IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Si le patient doit passer un examen par IRM, l'aide auditive doit être retirée. L'implant et le pilier peuvent rester en place. En prenant votre rendez-vous pour passer l'IRM, signalez à votre docteur ou au technicien que vous portez un système auditif à ancrage osseux (pour les enfants et les personnes présentant une déficience mentale, la personne en charge ou le soignant portent alors la responsabilité).

## **Utilisation de la pile**

- Utilisez toujours des piles recommandées par votre audioprothésiste. Les piles de mauvaise qualité peuvent couler et provoquer des blessures.
- Les piles peuvent également être dangereuses si elles sont avalées. Toujours conserver les piles hors de la portée des jeunes enfants ou des personnes souffrant d'un handicap mental. Si une pile est avalée par accident, consulter un médecin aux Urgences les plus proches.

### **Instructions de sécurité relatives au Direct Audio Input (DAI)**







- Un adaptateur audio avec transformateur d'isolation répondant à une isolation de sécurité médicale (c'est à dire conforme à la norme CEI 60601-1), doit toujours être utilisé si vous branchez votre Ponto à un équipement ayant une alimentation ou une batterie de plus de 12 V. Il est potentiellement dangereux et peut se révéler mortel de brancher directement une aide auditive sur une alimentation électrique de plus de 12 V. Lorsqu'un adaptateur audio isolé est connecté à l'équipement raccordé au réseau, cet équipement doit respecter les normes de sécurité électrique pour les produits de consommation (à savoir la norme CEI-60065 ou les normes de sécurité équivalentes).





### **Dysfonctionnement des aides auditives à ancrage osseux**

- L'aide auditive peut s'arrêter de fonctionner, par exemple si les piles sont usées. Vous devez le savoir, en particulier si vous conduisez ou si vous devez pouvoir entendre des alertes sonores.

### **Effets secondaires possibles**

- Dans de rares cas, les matériaux non allergisants utilisés dans les aides auditives peuvent entraîner une irritation cutanée. *En cas d'effets indésirables, consultez un médecin.*

<b>Clarification des symboles</b>	
	Référence
	Numéro de série
	Fabricant
	Date de fabrication
	Consultez le manuel d'utilisation
	Attention. Veuillez consulter le mode d'emploi pour connaître les avertissements et précautions qui ne figurent pas sur l'appareil en lui-même
Sur prescription uniquement	Attention, sur prescription uniquement : la loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ce dispositif aux médecins ou aux ordonnances établies par ceux-ci

 0413	Symbole CE avec numéro de l'organisme notifié
	Vous devrez éliminer les équipements électroniques conformément à la législation locale
	Partie appliquée de type B
	Le code IP classe et évalue les niveaux de protection fournis contre l'infiltration d'objets solides (y compris des membres tels que les mains et les doigts), la poussière, les contacts accidentels et l'eau dans les logements mécaniques et les enceintes électriques
YY.XXXXXXXX	Les deux premiers chiffres du numéro de série « YY » indiquent l'année de fabrication.

**Pour les États-Unis uniquement** : la loi fédérale limite la vente de ce dispositif aux médecins ou aux ordonnances établies par ceux-ci.

Avant la mise en place d'un implant ostéo-intégré, l'utilisateur potentiel doit toujours consulter un médecin qui s'assurera que toutes les pathologies médicalement traitables pouvant affecter l'audition sont identifiées et traitées avant l'achat de l'aide auditive.

CE 0413





*Fabricant :*

**Oticon Medical AB**

Datavägen 37B

SE-436 32 Askim

Suède

Tél. : +46 31 748 61 00

[info-ic@oticonmedical.fr](mailto:info-ic@oticonmedical.fr)

M51091FR / 2018.09

**oticon**  
MEDICAL

Because  
sound matters

[www.oticonmedical.fr](http://www.oticonmedical.fr)