

**Guide d'utilisation de
l'application ConnectLine
pour Android**



**Application
ConnectLine
version 1.1.0**



oticon
PEOPLE FIRST

Introduction

Voici un guide détaillé de l'application ConnectLine pour Android qui vous expliquera :

- Comment appairer le Streamer Pro 1.3 A avec un Smartphone Android™,
- Où trouver l'application dans Google Play™,
- Fonctionnement du Smartphone avec l'application,
- Vue d'ensemble des fonctions ConnectLine pilotées par l'application,
- Résolution des pannes : que faire ?


Utilisation

L'application ConnectLine d'Oticon est une interface grâce à laquelle l'utilisateur peut ajuster le volume de ses appareils auditifs et changer de programme. L'application permet également de sélectionner une source sonore connectée au Streamer Pro 1.3 A et d'en ajuster le volume.

**) Nécessite la version 1.3 ou ultérieure.*

L'application ConnectLine pour smartphones et tablettes Android nécessite le Streamer Pro avec le firmware 1.3 ou version ultérieure. Veuillez consulter le site www.oticon.fr/app pour de plus amples détails sur la compatibilité.


Android et Google Play sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

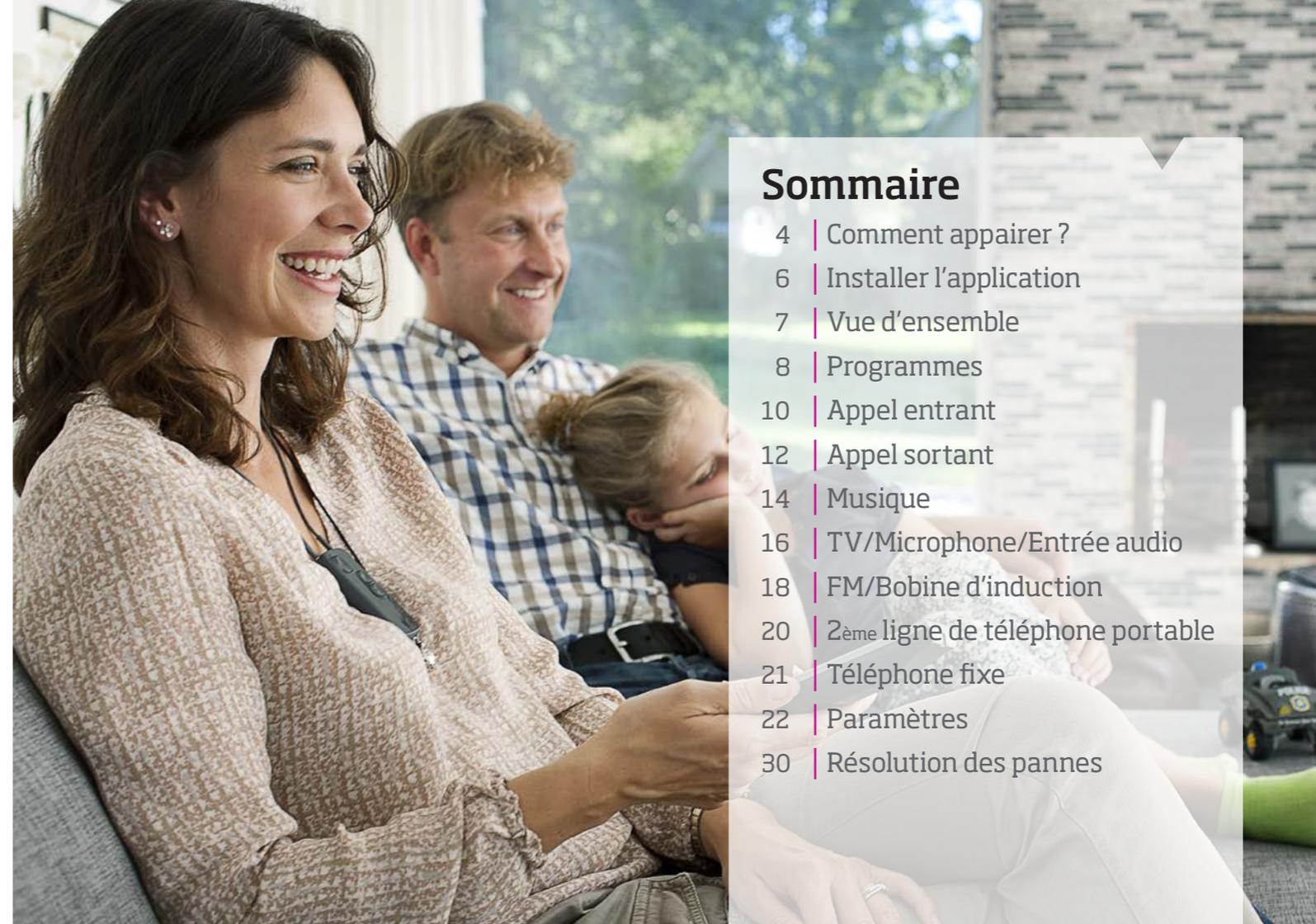

Sommaire

- 4 | Comment appairer ?
- 6 | Installer l'application
- 7 | Vue d'ensemble
- 8 | Programmes
- 10 | Appel entrant
- 12 | Appel sortant
- 14 | Musique
- 16 | TV/Microphone/Entrée audio
- 18 | FM/Bobine d'induction
- 20 | 2ème ligne de téléphone portable
- 21 | Téléphone fixe
- 22 | Paramètres
- 30 | Résolution des pannes

Comment appairer le Smartphone Android avec le Streamer Pro 1.3 A

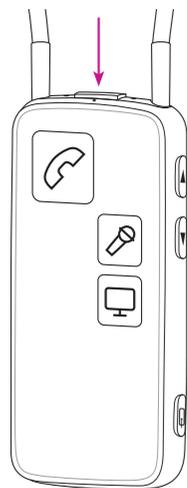

Préparer le Streamer Pro 1.3 A

Appuyez sur le bouton de mise sous tension sur le dessus du Streamer Pro 1.3 A, jusqu'à ce que le voyant bleu se mette à clignoter.



Menu Applications

Trouvez le menu Applications sur votre Smartphone Android.




Sélectionner Paramètres

Trouvez le menu Paramètres sur votre Smartphone.




Sélectionner Bluetooth

Trouvez l'icône Bluetooth dans le menu Paramètres.

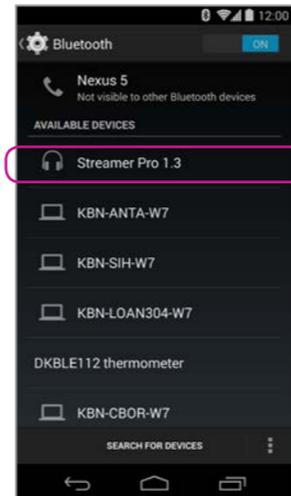


Trouver le Streamer Pro 1.3 A

Sélectionnez le Streamer Pro 1.3 A et cliquez sur Appairer

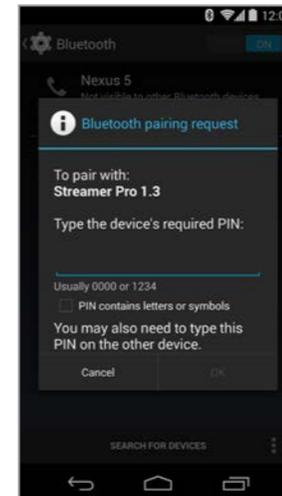

Entrer le code PIN


Si vous y êtes invité, entrez le code Pin 0000 (quatre zéros) du Streamer Pro 1.3 A.

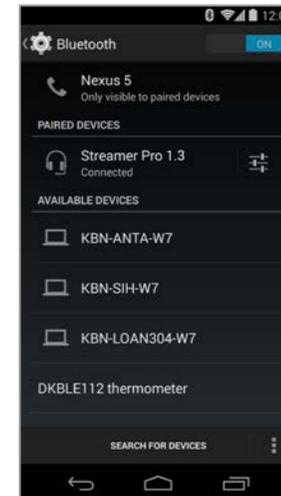

Vérifier la connexion

Vérifiez que le Streamer Pro 1.3 A est désormais connecté. Vous devriez voir «Connecté» et une petite icône Bluetooth apparaître dans le menu d'état.

Installer l'application

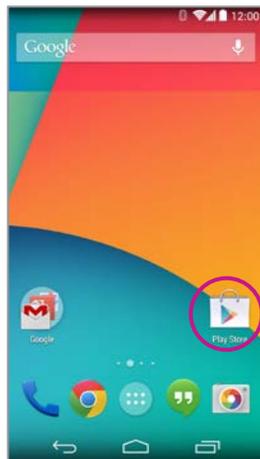

Ouvrir Google Play

Trouvez l'application Google Play store sur votre Smartphone Android et cliquez dessus.




Step 1:

In Google Play select the search function.

Step 2:

In the search field, type "Oticon".

Chercher, télécharger et se connecter

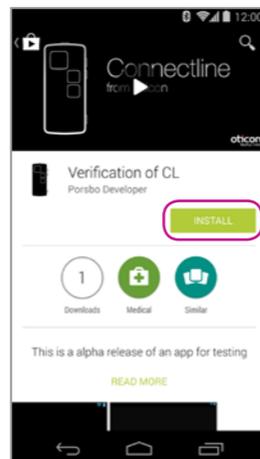

Installer

Appuyez sur le bouton vert Installer.



Application disponible


L'application ConnectLine devrait désormais être disponible sur votre Smartphone.

Vue d'ensemble

Le "Carrousel" pour faire défiler et sélectionner les sources de streaming

Programmes (page 8)

Mode Muet (page 9)

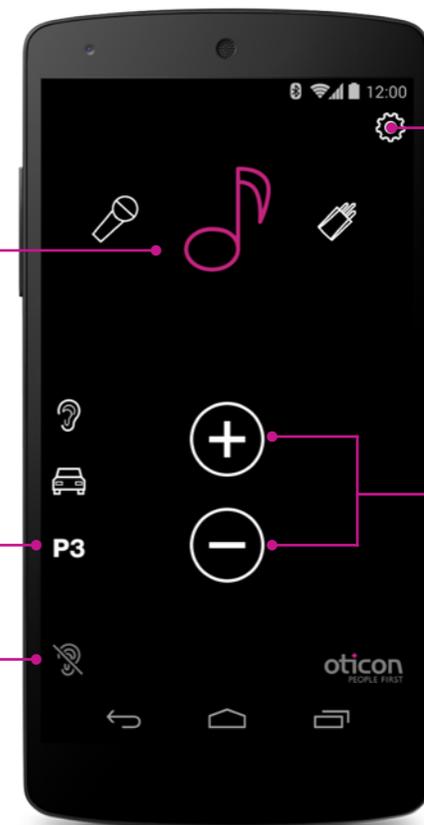

Paramètres


Augmenter/Diminuer le volume

Programmes



Choix des programmes

Vous pouvez sélectionner directement les programmes de vos appareils auditifs.

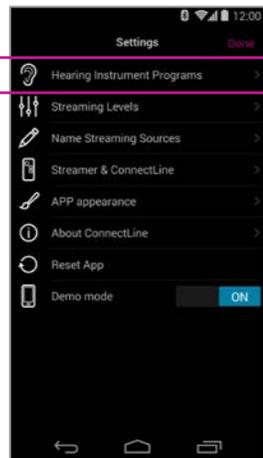

Icône personnalisée

Vous pouvez attribuer une icône aux programmes déjà existants de votre appareil auditif.

IMPORTANT :

L'ajout d'une icône ne crée pas un nouveau programme dans l'aide auditive.




Icônes personnalisées

Paramètres --> Programmes de l'appareil auditif --> Appuyez sur + pour sélectionner l'icône pour un programme donné.



Mode muet

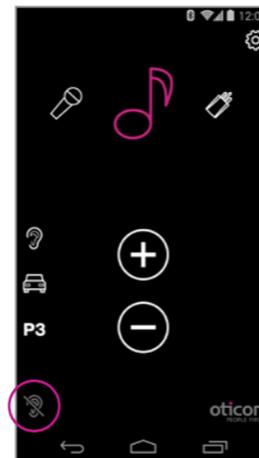

En cours de streaming


En cours de Streaming, vous pouvez couper les microphones de vos appareils auditifs afin d'éliminer les sons/bruits environnants.



Hors streaming


Hors streaming, vous pouvez couper les microphones de vos appareils auditifs Oticon Alta, Nera, Ria et Sensei pour plus de calme et de confort.

Appel entrant - Application ouverte

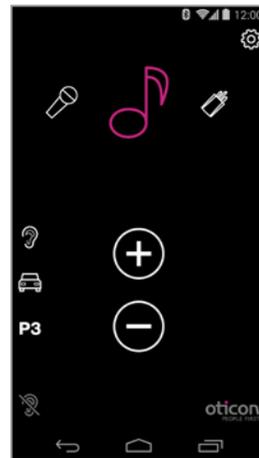


L'application fonctionne

L'application ConnectLine fonctionne. Dans cet exemple, l'utilisateur écoute de la musique (à partir du Smartphone).

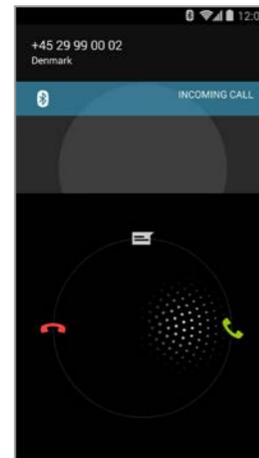

Appel entrant

Lorsque vous recevez un appel, l'application ConnectLine passe en arrière plan et la fenêtre de gestion des appels s'ouvre. Vous pouvez répondre sur le Streamer Pro 1.3 A ou en appuyant sur la touche répondre du Smartphone (1).

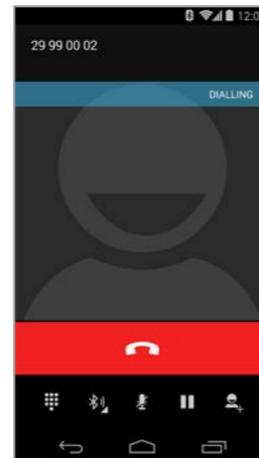

Lors d'un appel

Lors d'un appel, la fenêtre de gestion des appels du Smartphone reste active.



Reprise automatique


A la fin de l'appel, l'application (et le système ConnectLine) revient à son état initial, en l'occurrence à la musique dans cet exemple.

Application fermée




L'application n'est pas ouverte

Si l'application ConnectLine n'est pas ouverte, le téléphone affiche l'écran d'accueil.

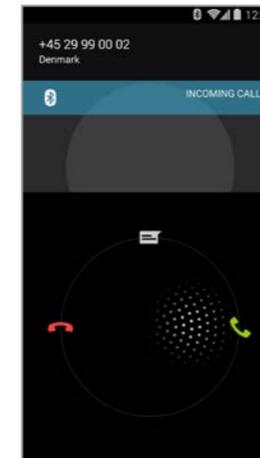

Appel entrant

Lorsque l'utilisateur reçoit un appel et que l'application ConnectLine est fermée, la fenêtre de gestion des appels du Smartphone s'ouvre. Il peut alors répondre via le Streamer Pro 1.3 A ou en appuyant sur la touche Répondre du Smartphone (2).

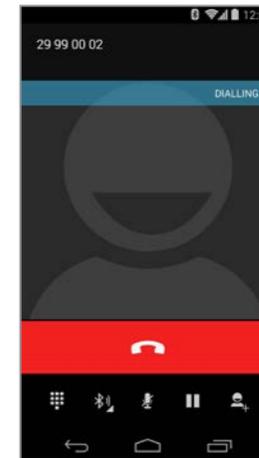

Lors d'un appel

Lors d'un appel, la fenêtre de gestion des appels du Smartphone reste active.



Fin d'appel

Le Smartphone revient à son état initial.

Appel sortant




L'application fonctionne

Fermez l'application en appuyant sur le bouton Accueil.




Sélectionner téléphone

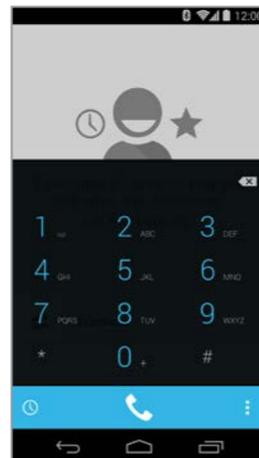

Composer le numéro


Composez le numéro et sélectionnez Appeler.

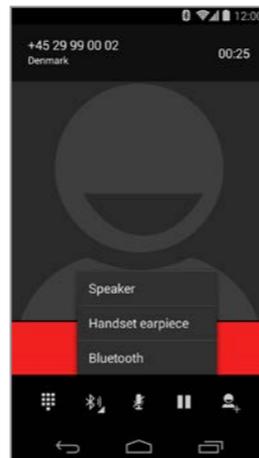

Appel actif / Fin d'appel

Terminez l'appel sur le Smartphone ou sur le Streamer Pro 1.3 A (touche Téléphone).

Musique

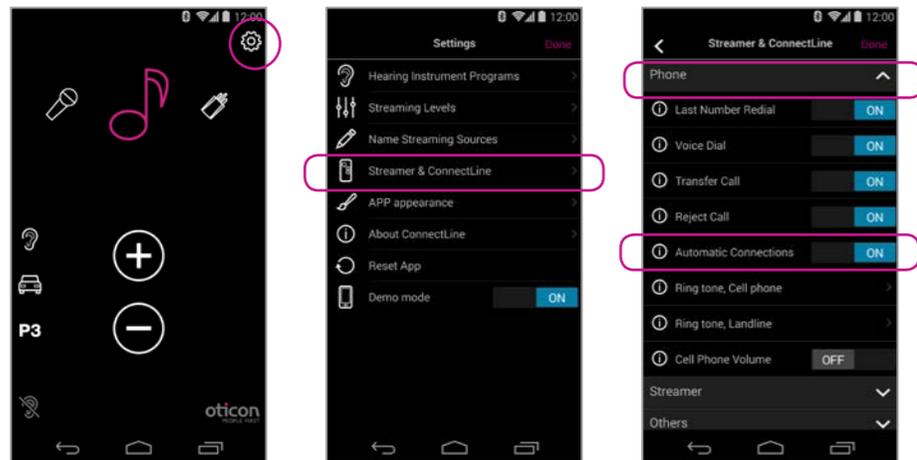

Connexions automatiques pour écouter de la musique


Pour permettre au Streamer Pro 1.3 A de débuter automatiquement le streaming audio lorsque le lecteur de musique est activé, vous devez autoriser les «Connexions automatiques» :

Paramètres --> Streamer & ConnectLine --> Téléphone fixe --> Connexions automatiques



Lancer le lecteur de musique

Cliquez sur le bouton Accueil pour faire passer l'application ConnectLine en arrière plan. Trouvez et sélectionnez l'icône musique.

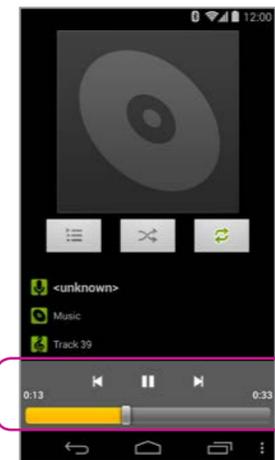


Lecteur de musique

Vous pouvez écouter de la musique ou la mettre en pause et ajuster le volume à volonté grâce à l'application musique. La connexion se fait automatiquement via le Streamer Pro 1.3 A et les appareils auditifs.



Revenir à l'application

Si vous voulez revenir à l'application, vous pouvez cliquer sur le bouton des tâches en cours et sélectionner celle de l'application ConnectLine ou bien cliquer sur le bouton d'Accueil et chercher l'application comme vous en avez l'habitude.

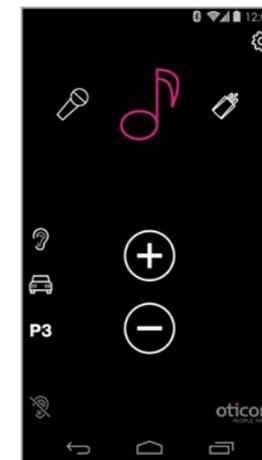

Sélectionner et reprendre

Si vous utilisez l'application ConnectLine, l'icône Musique de l'application sert désormais de raccourci vers le lecteur de musique, que vous pouvez démarrer et arrêter à volonté. Si vous choisissez d'autres sources sonores, la musique s'interrompt jusqu'à la prochaine sélection.

Télévision

Dans le carrousel (appairage effectué)



Télévision

Si vous appuyez sur l'icône Télévision, vous pouvez démarrer ou arrêter l'écoute à partir de l'adaptateur TV.

Microphone

Dans le carrousel (appairage effectué)



Microphone

Si vous appuyez sur l'icône Microphone, vous pourrez lancer le streaming à partir du Microphone ConnectLine. Vous pouvez également lancer le streaming à partir du Microphone ou du Streamer Pro 1.3 A.


Entrée audio

Dans le carrousel (fiche insérée)



Entrée / Sortie Audio

Si une prise casque est insérée dans le Streamer Pro 1.3 A, le streaming audio démarrera automatiquement.

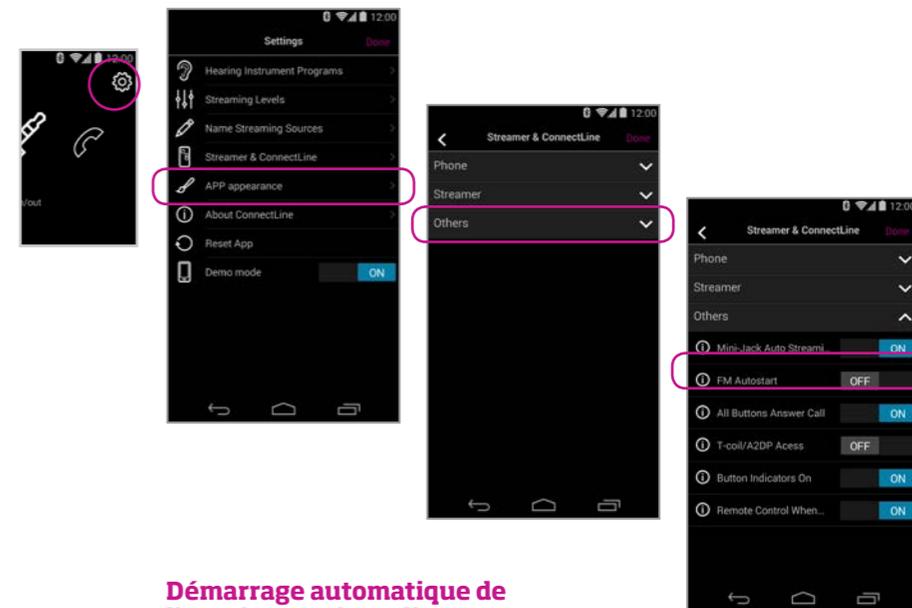

Démarrage automatique de l'entrée / sortie audio

Vous pouvez activer ou désactiver le démarrage automatique dans :


Paramètres--> Streamer & ConnectLine --> Autres --> Streaming automatique

Dans le carrousel (fiche insérée)



FM

Si vous appuyez sur l'icône FM, vous pourrez démarrer ou arrêter le streaming audio à partir de la FM.

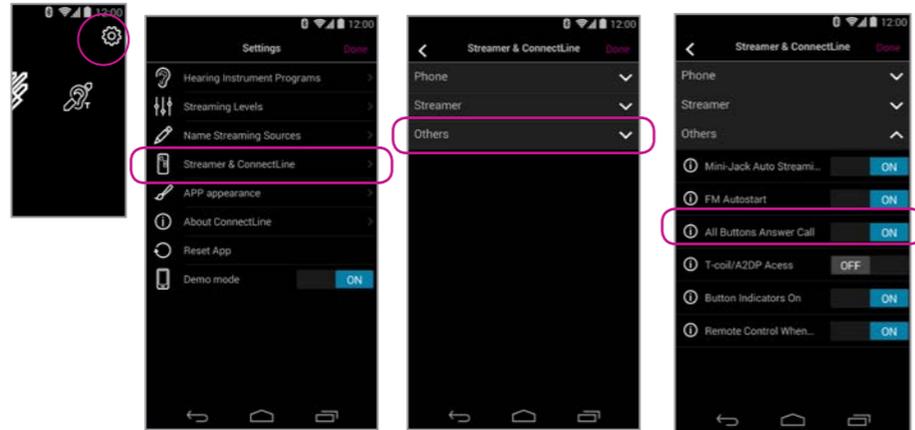

Démarrage automatique de la FM

Vous pouvez activer ou désactiver le démarrage automatique de la FM dans :

Paramètres--> Streamer & ConnectLine --> Autres --> Démarrage automatique FM

Toujours dans le carrousel



Bobine d'induction

Si vous appuyez sur l'icône Bobine d'induction, vous pourrez démarrer ou arrêter le streaming audio à partir de la bobine d'induction.

2ème ligne de téléphone portable

N'apparaîtra pas dans le carroussel




Refuser ou prendre un appel

Un appel entrant vous est signalé. Vous pouvez prendre l'appel sur l'application ou sur le Streamer Pro 1.3 A.



Terminer l'appel

Vous pouvez terminer l'appel sur l'application ou sur le Streamer Pro 1.3 A.

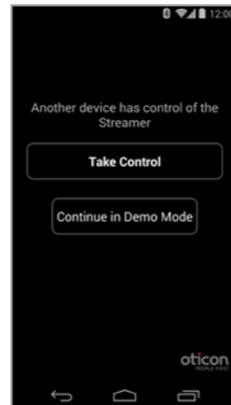

Deux applications

Si l'application est installée sur deux Smartphones, tous deux appairés avec le Streamer Pro 1.3 A, vous pouvez contrôler le Streamer Pro 1.3 A à l'aide de l'application lancée en dernier.

Avertissement

Pour vous assurer que votre système ne soit pas utilisé sans votre consentement, nous vous recommandons d'installer l'application sur vos appareils personnels.

Téléphone fixe

Apparaîtra dans le carroussel, si dans le champ de portée




L'application fonctionne

Si vous avez appairé un adaptateur de téléphone fixe et que celui-ci se trouve dans le champ de portée, une icône Téléphone apparaîtra dans l'application. Si l'application n'est pas ouverte, vous ne pourrez répondre à l'appel qu'à partir du Streamer Pro 1.3 A.




Prendre un appel

Un appel entrant vous est signalé dans les appareils auditifs et sur l'application. Vous pouvez prendre l'appel sur l'application ou sur le Streamer Pro 1.3 A.

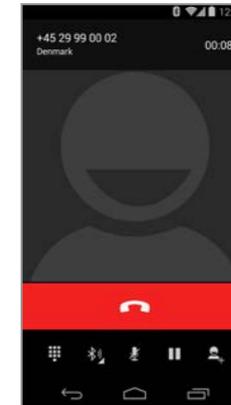

Terminer l'appel


Vous pouvez terminer l'appel sur l'application ou sur le Streamer Pro 1.3 A.

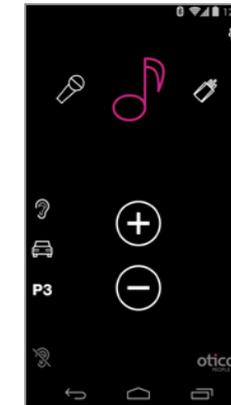

Reprise automatique

Si une autre source était active (par exemple : la musique), celle-ci reprendra à la fin de l'appel.

Paramètres - Niveaux de streaming

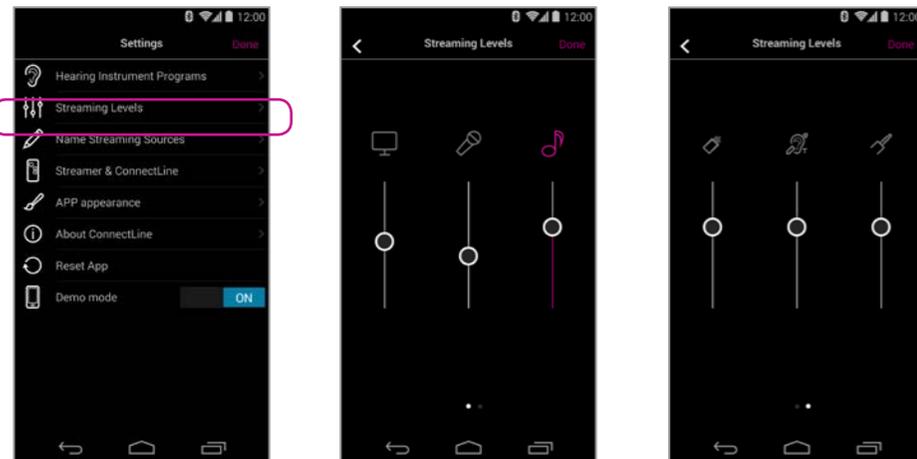


Niveaux de streaming

Vous pouvez régler les niveaux de streaming indépendamment pour chaque source. Si l'écran est ouvert et en cours de streaming, la source active sera surlignée en magenta.

Paramètres --> Niveaux de streaming

Paramètres - Icônes/Noms de sources de streaming

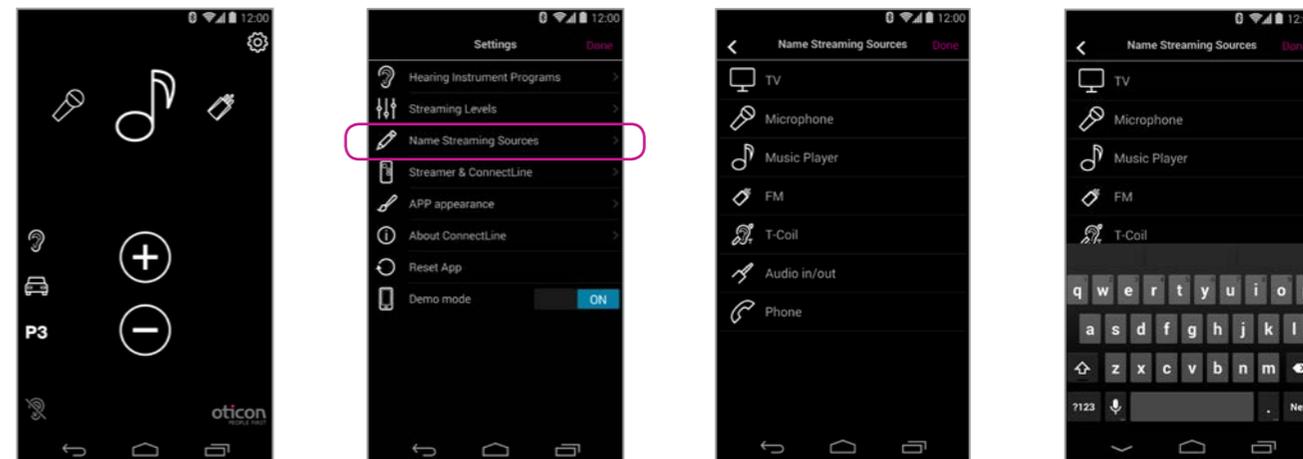


Icônes/Noms des sources de streaming

Vous pouvez nommer et attribuer une icône à vos sources de streaming selon vos préférences personnelles.

Paramètres --> Noms des sources de streaming

Paramètres - Téléphone

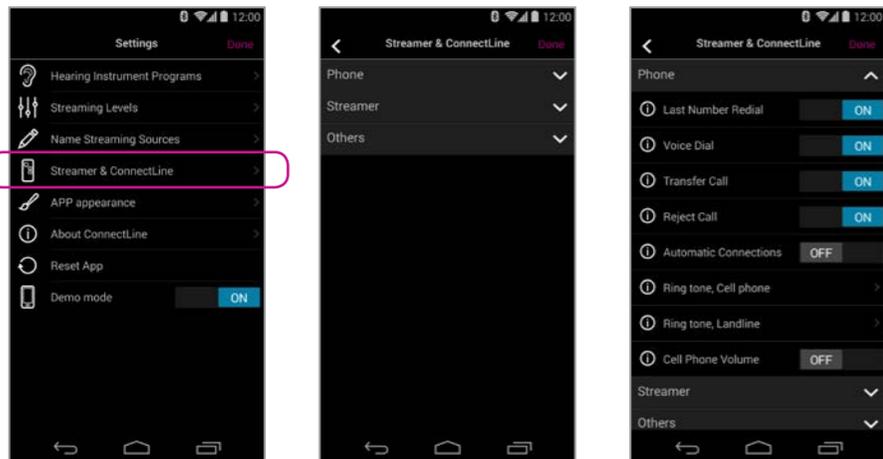

Paramètres Téléphone

Vous pouvez personnaliser différents paramètres directement liés à un usage quotidien des téléphones.

1: Recomposition du dernier numéro

Si activée, la recomposition du dernier numéro peut être démarrée en appuyant sur la touche Téléphone du Streamer Pro 1.3 A et en la maintenant enfoncée (si prise en charge par le téléphone portable).

2: Numérotation vocale

Si activée, un bref appui sur la touche Téléphone du Streamer Pro 1.3 A activera la numérotation vocale (si celle-ci est prise en charge par votre téléphone portable et si aucun adaptateur téléphonique ConnectLine n'est connecté).

3: Transfert d'appel

Si activé, l'appui et le maintien de la touche Téléphone du Streamer Pro 1.3 A transfèrera un appel sur le téléphone portable.

4: Rejeter un appel

Si activé, un appel de téléphone portable entrant pourra être rejeté en appuyant sur la touche de diminution du volume du Streamer Pro 1.3 A.

5: Connexions automatiques

Autoriser les connexions automatiques, comme les notifications, les SMS et les lecteurs de musique.

6: Sonnerie du téléphone portable

Sonnerie associée aux appels émis par votre/vos téléphone(s) portable(s).


7: Sonnerie du téléphone fixe

Sonnerie associée aux appels émis par votre adaptateur téléphonique ConnectLine 2.0.

8: Volume du téléphone portable

Permet d'ajuster le volume de l'appel à l'aide des touches de volume du téléphone.

Paramètres - Streamer Pro 1.3 A

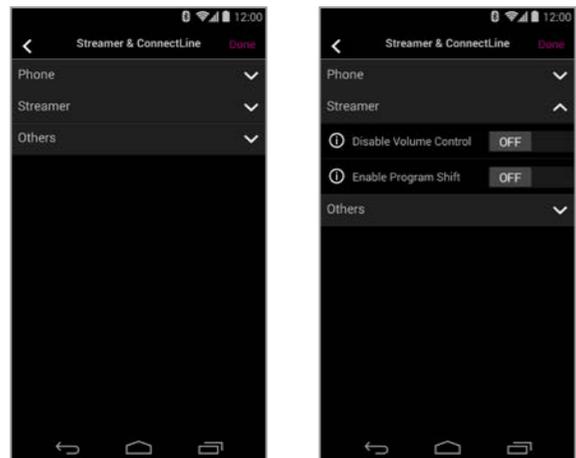

Paramètres du Streamer 1.3 App

Vous pouvez personnaliser différents paramètres relatifs à l'usage quotidien du Streamer Pro 1.3 A.


1: Désactiver la commande de volume

Si activée, la commande de volume des appareils auditifs ne peut pas être effectuée à partir du Streamer Pro 1.3 A.

2: Activer le changement de programme

Si activé, le changement de programme des appareils auditifs ne peut pas être effectué à l'aide du Streamer Pro 1.3 A.

Paramètres - Autres

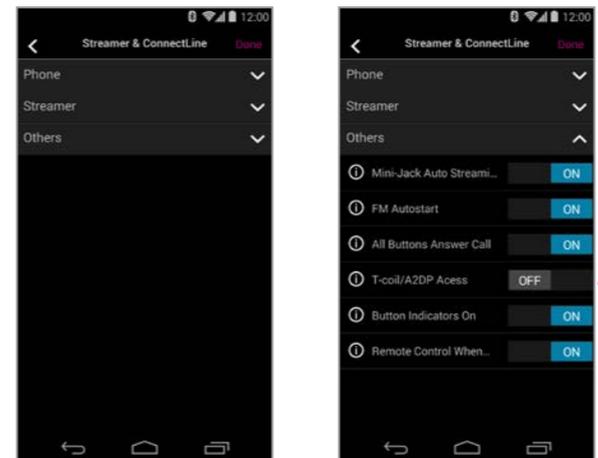

Autres paramètres

Vous pouvez personnaliser différents paramètres relatifs à l'usage quotidien du Streamer Pro 1.3 A.

1: Streaming automatique par entrée audio

Si activé, le streaming audio de l'entrée audio débutera automatiquement dès l'insertion de la prise audio.

2: Démarrage automatique FM

Si activé, le streaming FM débutera automatiquement dès l'insertion du récepteur FM.

3: Répondre à un appel - tous les boutons

Si activé, tous les boutons de la face avant du Streamer Pro 1.3 A peuvent être utilisés pour répondre à un appel.

4: Bobine d'induction/A2DP

Si non sélectionnée, la touche AUX du Streamer Pro 1.3 A démarre l'A2DP avec un appui simple. Si sélectionnée, la touche AUX démarrera la bobine d'induction.


5: Voyants allumés

Si hors tension, aucun voyant ne s'allumera sur la face avant du Streamer Pro 1.3 A.

6: Utiliser comme télécommande (même hors tension)

Si activé, le Streamer Pro 1.3 A peut être utilisé comme télécommande des appareils auditifs même lorsqu'il est hors tension.

Paramètres - Aspect de l'application

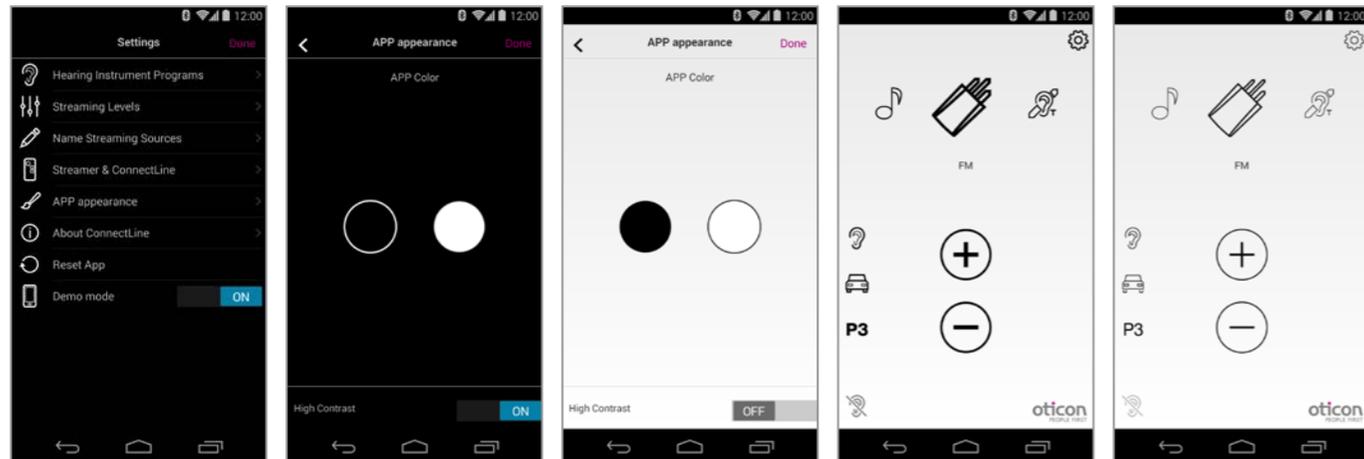

Aspect visuel

L'aspect visuel de l'application peut être noir ou blanc.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner un contraste plus ou moins élevé.

Résolution des pannes




Fermer/redémarrer l'application

Cliquez sur le bouton Tâches en cours pour obtenir une vue d'ensemble de vos applications actives.




Fermer l'application

Faites glisser l'image de l'application vers la gauche, hors de l'écran. Elle est désormais totalement arrêtée.

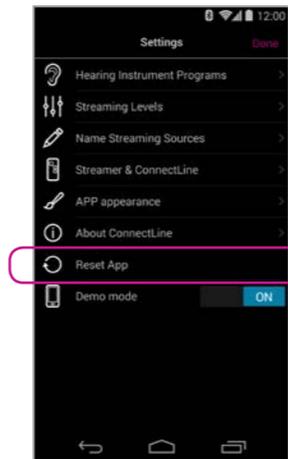



Réinitialiser l'application

La réinitialisation permet de restaurer les paramètres de l'application.

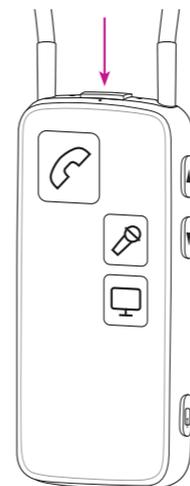

Réinitialiser le Streamer Pro 1.3 A

Le Streamer Pro 1.3 A est réinitialisé automatiquement lors de la mise sous/hors tension.

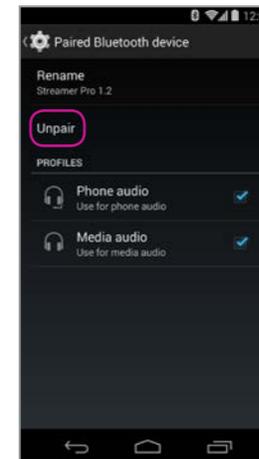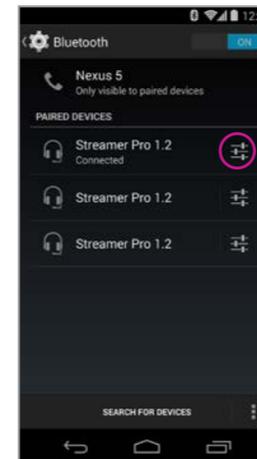

Réappairer le Streamer Pro 1.3 A et le Smartphone

Dans certains cas et en particulier si le téléphone et le Streamer Pro 1.3 A ont été appairés plusieurs fois à d'autres appareils, il peut être judicieux de supprimer tous les appairages du téléphone et du Streamer Pro 1.3 A.

1. Eteignez le Streamer Pro 1.3 A
2. Sur le Smartphone : (Paramètres > Bluetooth) sélectionnez le Streamer Pro 1.3 A puis cliquez sur "Oublier cet appareil"
3. Eteindre le Smartphone
4. Allumer le Streamer Pro 1.3 A
5. Appuyez simultanément sur les boutons «Marche/Arrêt» et «Augmenter le volume» pendant 10 secondes
6. Rallumez votre Smartphone et ré-appairez le Streamer Pro 1.3 A (voir page 4)

People First

People First est notre promesse
pour rendre à chacun :
la liberté de communiquer sans
contrainte, d'interagir naturellement
et de participer activement